



Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Gv+Ca

Номер серии набора: 01/852/21

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (обозреме ДНК-вицений геномов *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* и человека).

Наименование	Концентрация	Допустимый



ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выявления и идентификации
Gardnerella vaginalis и *Candida albicans*
методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, осадок мочи, секрет предстательной железы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения РВ-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.1.3. Из компонентов набора приготовить амплификационную смесь из расчета на 1 пробирку:

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь РВ-120: 1 пробирка 960 мкл
2. Тяг-полимеразы: 1 пробирка 50 мкл
3. Разбавитель: 2 пробирки по 2 мл
4. ПКО ИППП: 1 пробирка 200 мкл

Серия: 01/852/21
Годен до: 27.04.22

Фото 1. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca, вариант исполнения ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120.



Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Gv+Ca

Номер серии набора: 01/QS-952/21

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней геномов Gardnerella vaginalis, Candida albicans и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (г/мл)	Допустимый диапазон Ct



ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выявления и идентификации
Gardnerella vaginalis и *Candida albicans*
методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro

Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, осадок мочи, секрет предстательной железы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.1.3 Из компонентов набора приготовить амплификационную смесь из расчета на 1 пробирку

Фото 2. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca, вариант исполнения ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-60.



Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Gv+Ca



Номер серии набора 02/OS-952/21

ПКО ИПТ представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней генотипов *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (Г/мл)	Допустимый диапазон, %
--------------------------	---------------------	------------------------

ПАМЯТКА

по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, осадок мочи, секрет предстательной железы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения РВ-120 («Нераспаиваемый»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.1.3 Из компонентов набора приготовить амплификационную смесь из расчета на 1 пробирку:

Фото 3. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca, вариант исполнения ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-96.



Выдаются
к набору ДИПЛЕКС Gv+Ca

ПКО ИГП
Номер серии набора 01/TS-952/21

ПКО ИГП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцы ДНК-мишеней геномов *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (г/мл)	Допустимый диапазон Ct

ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выявления и идентификации
Gardnerella vaginalis и *Candida albicans*
методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридной флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, осадок мочи, секрет предстательной железы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.
Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора *Rotor-Gene Q*, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).
1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.
1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и стабилизатором тщательно перемешать.

Фото 4. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca, вариант исполнения ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-60.

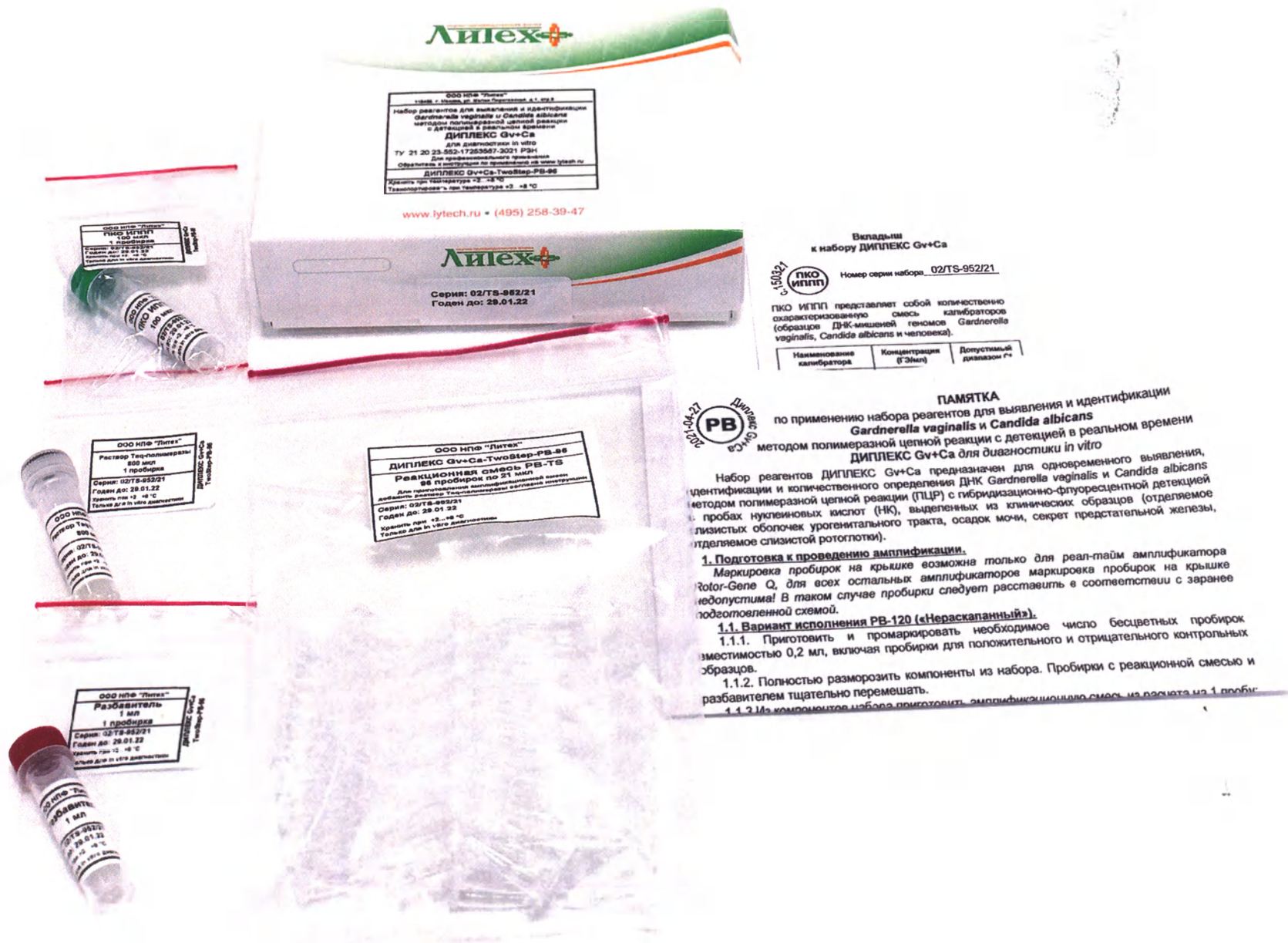


Фото 5. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca, вариант исполнения ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96.



Прошито, проверено,

скреплено печатью.

Количество листов

шт.

Директор

Наумов А.Ю.





Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Gv+Ca

150321
ПКО
ИПГП

Номер серии набора: 01/852/21

ПКО ИПГП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней геномов *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* и человека).

Наименование	Концентрация	Допустимый

ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридоизотопно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, осадок мочи, секрет предстательной железы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.
Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).
1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.
1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.
1.1.3. Из компонентов набора приготовить амплификационную смесь из расчета на 1 пробирку:

Фото 1. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca, вариант исполнения ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120.



Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Gv+Ca

ГКО ИППП

Номер серии набора: 01/OS-952/21

ГКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцы ДНК-мишеней геномов *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct

20-04-27
PB
ДИПЛЕКС Gv+Ca

ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выявления и идентификации
Gardnerella vaginalis и *Candida albicans*
методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, осадок мочи, секрет предстательной железы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.1.3. Из компонентов набора приготовить амплификационную смесь из расчета на 1 пробирку.

Фото 2. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca, вариант исполнения ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-60.



Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Gv+Ca

Номер серии набора 02/OS-952/21



ГКО ИГП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцы ДНК-мишеней генотипов *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (Г/мл)	Допустимый диапазон (Г/мл)
--------------------------	---------------------	----------------------------

ПАМЯТКА

по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, осадок мочи, секрет предстательной железы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения РВ-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.1.3. Из компонентов набора приготовить амплификационную смесь из расчета на 1 пробирку:

Фото 3. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca, вариант исполнения ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-96.



Внимание!
к набору ДИПЛЕКС Gv+Ca

ПАО ИГПГ
ИГПГ

Исходный номер набора: 01/TS-862/21

ПАО ИГПГ предоставляет собой количественно-определительную систему, позволяющую (обнаружить ДНК-мишень) реакции Gardinella vaginalis, Candida albicans и человека).

Назначение: микробиология	Классификация: (7.3.1.1)	Дополнительный код: 01
---------------------------	--------------------------	------------------------

ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Gardinerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для биодиагностики in vitro

Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Gardinerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией в пробках микротитровальных планшетов (МТ), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, осевая моча, секрет предстательной железы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок не является возможной только для реакт-тайм амплификатора *Real-Time Q*, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок не является обязательной. В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 (стандартный).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контроля реакции.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и субстратом тщательно перемешать.

1.1.3. ~~В каждую пробирку добавить по 0,1 мл реакционной смеси и 0,1 мл субстрата.~~

Фото 4. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca, вариант исполнения ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-60.

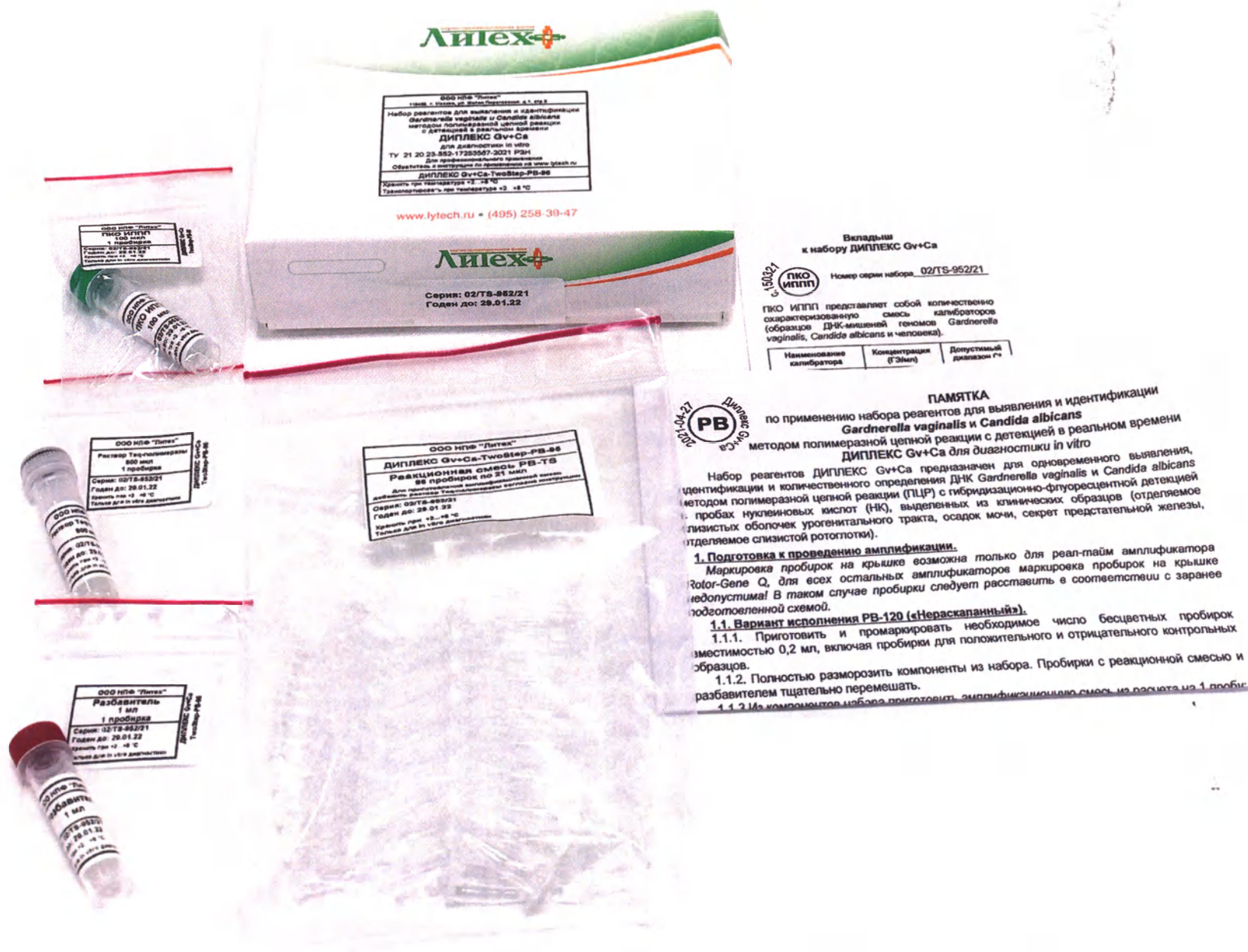


Фото 5. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca, вариант исполнения ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96.

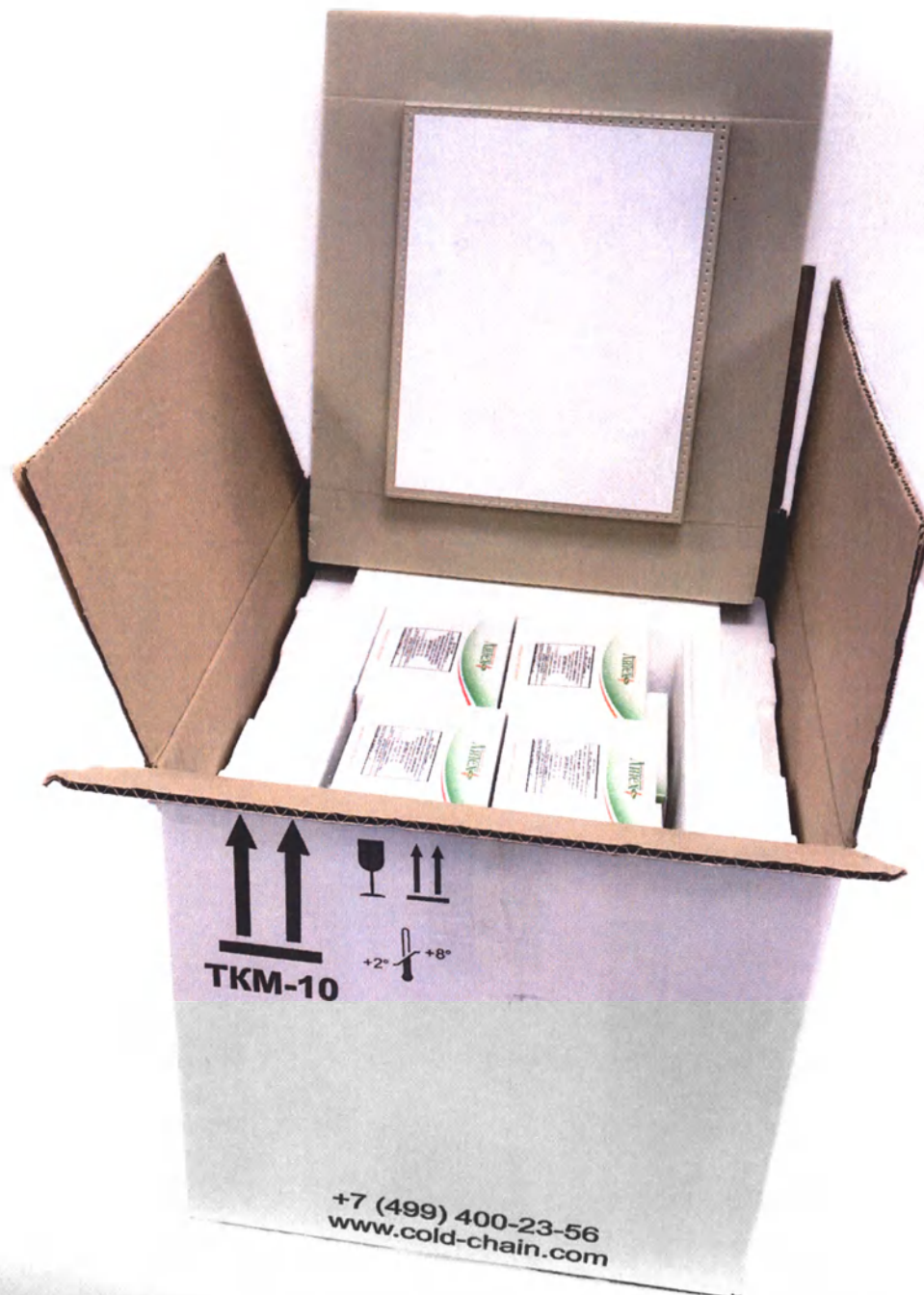


Фото 6. Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca Групповая упаковка.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов

шт.

Директор

Наумов А.Ю.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО НПФ «Литех»

А.Ю. Наумов

20 21 г.



ООО НПФ «Литех»

«Набор реагентов для выявления и идентификации *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro»

ТУ 21.20.23-552-17253567-2021

ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

ООО НПФ «Литех» 119436 г. Москва, ул. Малая Пироговская д.1 стр.3 набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardnerella vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro ТУ 21.20.23-552-17253567-2021 РЗН Для профессионального применения Обратитесь к инструкции по применению на www.litek.ru ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120 Хранить при температуре -18...-20 °С Транспортировать при температуре -18...-20 °С
--

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь РВ.....1 пробирка 960 мкл
2. Таq-полимераза.....1 пробирка 50 мкл
3. Разбавитель.....2 пробирки по 2 мл
4. ПКО ИПП.....1 пробирка 200 мкл

Серия: 01/852/21
Годен до: 27.04.22

Серия: 01/852/21
Годен до: 27.04.22

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ «Литех» 119436 г. Москва, ул. Малая Пироговская д.1 стр.3 набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardnerella vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro ТУ 21.20.23-552-17253567-2021 РЗН Для профессионального применения Обратитесь к инструкции по применению на www.litek.ru ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120 Хранить при температуре -18...-20 °С Транспортировать при температуре -18...-20 °С
--

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь РВ.....1 пробирка 960 мкл
2. Таq-полимераза.....1 пробирка 50 мкл
3. Разбавитель.....2 пробирки по 2 мл
4. ПКО ИПП.....1 пробирка 200 мкл

Серия: 01/852/21
Годен до: 27.04.22

ООО НПФ «Литех» ПКО ИПП 200 мкл 1 пробирка Серия: 01/852/21 Годен до: 27.04.22 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ «Литех» Реакционная смесь РВ 960 мкл Использовать для профессионального выявления инфекционной среды Серия: 01/852/21 Годен до: 27.04.22 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики
--

ООО НПФ «Литех» Таq-полимераза 50 мкл Серия: 01/852/21 Годен до: 27.04.22 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики
--

ООО НПФ «Литех» Разбавитель 2 мл Серия: 01/852/21 Годен до: 27.04.22 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех» ПКО ИПП 200 мкл Серия: 01/852/21 Годен до: 27.04.22 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики
--

ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-60

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

ООО НПФ "Литех" 119436, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр.3 Набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardnerella vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro ТУ 21.20.23-552-17253567-2021 РЗН Для профессионального применения Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-60 Хранить при температуре -18...-20 °С Транспортировать при температуре -18...-20 °С
--

СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационная смесь PB-OS.....
..... 60 пробирок по 28 мкл
2. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл
3. ПКО ИППП.....1 пробирка 100 мкл

Серия: 01/OS-952/21
Годен до: 29.08.21

Серия: 01/OS-952/21
Годен до: 29.08.21

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл 1 пробирка Серия: 01/OS-952/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca OneStep-PB-60
--	--------------------------------

ООО НПФ "Литех" ПКО ИППП 100 мкл 1 пробирка Серия: 01/OS-952/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca OneStep-PB-60
--	--------------------------------

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл Серия: 01/OS-952/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca OneStep-PB-60
--	--------------------------------

ООО НПФ "Литех" ПКО ИППП 100 мкл Серия: 01/OS-952/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca OneStep-PB-60
--	--------------------------------

ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

ООО НПФ "Литех" 119436, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 1, стр. 2 набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardnerella vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro ТУ 21 20 23 552-17253567-2021 РЭН Для профессионального применения Обратиться к инструкции по применению на www.liteph.ru ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-96 Хранить при температуре -18...-20 °C Транспортировать при температуре -18...-20 °C
--

СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационная смесь PB-OS.....
..... 96 пробирок по 20 мкл
2. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл
3. ПКО ИПП.....1 пробирка 100 мкл

Серия: 02/08-952/21
Годен до: 29.08.21

Серия: 02/08-952/21
Годен до: 29.08.21

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл 1 пробирка Серия: 02/08-952/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °C Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca OneStep-PB-96
--	---

ООО НПФ "Литех" ПКО ИПП 100 мкл 1 пробирка Серия: 02/08-952/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °C Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca OneStep-PB-96
---	---

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл Серия: 02/08-952/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °C Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca OneStep-PB-96
--	---

ООО НПФ "Литех" ПКО ИПП 100 мкл Серия: 02/08-952/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °C Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca OneStep-PB-96
---	---

ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-60

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

ООО НПФ "Литех"
119436, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр.3
Набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardnerella vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Gv+Ca
для диагностики in vitro
ТУ 21 20.23-552-17253567-2021 РЗН
Для профессионального применения
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru
ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-60
Хранить при температуре +2...+8 °С
Транспортировать при температуре +2...+8 °С

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь PB-TS.....
..... 60 пробирок по 21 мкл
2. Раствор Taq-полимеразы.....
.....1 пробирка 500 мкл
3. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл
4. ПКО ИПП.....1 пробирка 100 мкл

Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22

Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"
ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-60
Реакционная смесь PB-TS
60 пробирок по 21 мкл
Для приготовления амплификационной смеси добавить раствор Taq-полимеразы согласно инструкции
Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22
Хранить при +2...+8 °С
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор Taq-полимеразы
500 мкл
1 пробирка
Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22
Хранить при +2...+8 °С
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель
1 мл
1 пробирка
Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22
Хранить при +2...+8 °С
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИПП
100 мкл
1 пробирка
Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22
Хранить при +2...+8 °С
Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Раствор Taq-полимеразы
500 мкл
Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22
Хранить при +2...+8 °С
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель
1 мл
Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22
Хранить при +2...+8 °С
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИПП
100 мкл
Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22
Хранить при +2...+8 °С
Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

ООО НПФ "Литех" 118438 г. Москва, ул. Малая Пироговская д.1, стр.2 набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardnerella vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro ТУ 21 20 23-552-17253567-2021 РЗН Для профессионального применения Обратиться к инструкции по применению на www.litech.ru ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96 Хранить при температуре +2...+8 °С Транспортировать при температуре +2...+8 °С

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь PB-TS.....
..... 96 пробирок по 21 мкл
2. Раствор Taq-полимеразы.....
..... 1 пробирка 800 мкл
3. Разбавитель..... 1 пробирка 1 мл
4. ПКО ИПП 1 пробирка 100 мкл

Серия: 02/TS-952/21
Годен до: 29.01.22

Серия: 02/TS-952/21
Годен до: 29.01.22

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех" ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96 Реакционная смесь PB-TS 96 пробирок по 21 мкл Для приготовления амплификационной смеси добавить раствор Taq-полимеразы согласно инструкции Серия: 02/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики
--

ООО НПФ "Литех" Раствор Taq-полимеразы 800 мкл 1 пробирка Серия: 02/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
---	-----------------------------

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл 1 пробирка Серия: 02/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
---	-----------------------------

ООО НПФ "Литех" ПКО ИПП 100 мкл 1 пробирка Серия: 02/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
--	-----------------------------

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех" Раствор Taq-полимеразы 800 мкл Серия: 02/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
--	-----------------------------

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл Серия: 02/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
--	-----------------------------

ООО НПФ "Литех" ПКО ИПП 100 мкл Серия: 02/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
---	-----------------------------

Образец маркировки групповой упаковки

«Набор реагентов для выявления и идентификации *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени **ДИПЛЕКС Gv+Ca** для диагностики in vitro»

ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120

Номер серии 01/852/21

Дата изготовления 27.04.21

Годен до 27.04.22

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Набор реагентов **ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120** должен храниться при температуре -18...-20°C в течение всего срока годности. Срок годности набора – 12 месяцев.

Условия транспортировки:

Набор реагентов **ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120** рекомендуется транспортировать при температуре хранения. Допустима транспортировка при температуре +2°...+8°C в течение 5 дней (не более).

Копия верна
Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов
ит.

Директор

Наумов А.Ю.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО НПФ «Литех»

А.Ю. Наумов

20 21 г.

ООО НПФ «Литех»

«Набор реагентов для выявления и идентификации *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro»

TU 21.20.23-552-17253567-2021

ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

ООО НПФ «Литех» 118438 г. Москва, ул. Малая Гиреевская, д.1, стр.2
Набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardnerella vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro
TU 21 20 23-552-17253567-2021 РЗН
Для профессионального применения Обратитесь к инструкции по применению на www.liteph.ru
ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120
Хранить при температуре -18...-20 °C Транспортировать при температуре -18...-20 °C

Внутренняя сторона упаковки

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь PB.....1 пробирка 980 мкл
2. Taq-полимераза.....1 пробирка 50 мкл
3. Разбавитель.....2 пробирки по 2 мл
4. ПКО ИПП.....1 пробирка 200 мкл

Серия: 01/852/21
Годен до: 27.04.22

Заклейка

Серия: 01/852/21
Годен до: 27.04.22

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ «Литех» 118438 г. Москва, ул. Малая Гиреевская, д.1, стр.2
Набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardnerella vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro
TU 21 20 23-552-17253567-2021 РЗН
Для профессионального применения Обратитесь к инструкции по применению на www.liteph.ru
ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120
Хранить при температуре -18...-20 °C Транспортировать при температуре -18...-20 °C

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь PB.....1 пробирка 980 мкл
2. Taq-полимераза.....1 пробирка 50 мкл
3. Разбавитель.....2 пробирки по 2 мл
4. ПКО ИПП.....1 пробирка 200 мкл

Серия: 01/852/21
Годен до: 27.04.22

ООО НПФ «Литех»
ПКО ИПП 200 мкл 1 пробирка
Серия: 01/852/21 Годен до: 27.04.22 Хранить при -18...-20 °C Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ «Литех»
Реакционная смесь PB 980 мкл
Использовать для приготовления анализируемой смеси
Серия: 01/852/21 Годен до: 27.04.22 Хранить при -18...-20 °C Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех»
Taq-полимераза 50 мкл
Серия: 01/852/21 Годен до: 27.04.22 Хранить при -18...-20 °C Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех»
Разбавитель 2 мл
Серия: 01/852/21 Годен до: 27.04.22 Хранить при -18...-20 °C Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех»
ПКО ИПП 200 мкл
Серия: 01/852/21 Годен до: 27.04.22 Хранить при -18...-20 °C Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-60

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

ООО НПФ "Литех" 119436 г. Москва, ул. Малая Пироговская д.1 стр.3 набор реагентов для выявления и идентификации <i>Salmonella varitama</i> и <i>Salmonella anatum</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro ТУ 21 20 23-552-17253567-2021 РЭН Для профессионального применения Обратитесь к инструкции по применению на www.litech.ru ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-60 Хранить при температуре -18...-20 °С Транспортировать при температуре -18...-20 °С
--

СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационная смесь PB-OS.....
..... 60 пробирок по 28 мкл
2. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл
3. ПКО ИПП.....1 пробирка 100 мкл

Серия: 01/OS-962/21
Годен до: 29.08.21

Серия: 01/OS-962/21
Годен до: 29.08.21

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл 1 пробирка Серия: 01/OS-962/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики
--

ДИПЛЕКС Gv+Ca
OneStep-PB-60

ООО НПФ "Литех" ПКО ИПП 100 мкл 1 пробирка Серия: 01/OS-962/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС Gv+Ca
OneStep-PB-60

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл Серия: 01/OS-962/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики
--

ДИПЛЕКС Gv+Ca
OneStep-PB-60

ООО НПФ "Литех" ПКО ИПП 100 мкл Серия: 01/OS-962/21 Годен до: 29.08.21 Хранить при -18...-20 °С Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС Gv+Ca
OneStep-PB-60

ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

ООО НПФ "Литех"
119435 г. Москва, ул. Милая Парковая, д.1, стр.3
Набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardellia vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Gv+Ca
для диагностики in vitro
ТУ 21 20 23 552-17253587-2021 РЗН
Для профессионального применения
Обратиться к инструкции по применению на www.liteph.ru
ДИПЛЕКС Gv+Ca-OneStep-PB-96
Хранить при температуре -18 -20 °C
Транспортировать при температуре -18 -20 °C

СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационная смесь PB-OS.....
..... 96 пробирок по 28 мкл
2. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл
3. ПКО ИПП.....1 пробирка 100 мкл

Серия: 02/08-962/21
Годен до: 29.08.21

Серия: 02/08-962/21
Годен до: 29.08.21

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель
1 мл
1 пробирка
Серия: 02/08-962/21
Годен до: 29.08.21
Хранить при -18 -20 °C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИПП
100 мкл
1 пробирка
Серия: 02/08-962/21
Годен до: 29.08.21
Хранить при -18 -20 °C
Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель
1 мл
Серия: 02/08-962/21
Годен до: 29.08.21
Хранить при -18 -20 °C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИПП
100 мкл
Серия: 02/08-962/21
Годен до: 29.08.21
Хранить при -18 -20 °C
Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-60

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

ООО НПФ "Литех" 119436, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр.3 Набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardnerella vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro ТУ 21 20 23-552-17253567-2021 РЗН Для профессионального применения Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-60 Хранить при температуре +2...+8 °С Транспортировать при температуре +2...+8 °С
--

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь PB-TS.....
..... 60 пробирок по 21 мкл
2. Раствор Taq-полимеразы.....
.....1 пробирка 500 мкл
3. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл
4. ПКО ИПП.....1 пробирка 100 мкл

Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22

Серия: 01/TS-952/21
Годен до: 29.01.22

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех" ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-60 Реакционная смесь PB-TS 60 пробирок по 21 мкл Для приготовления амплификационной смеси добавить раствор Taq-полимеразы согласно инструкции Серия: 01/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех" Раствор Taq-полимеразы 500 мкл 1 пробирка Серия: 01/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca TwoStep-PB-60
---	--------------------------------

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл 1 пробирка Серия: 01/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca TwoStep-PB-60
---	--------------------------------

ООО НПФ "Литех" ПКО ИПП 100 мкл 1 пробирка Серия: 01/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca TwoStep-PB-60
--	--------------------------------

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех" Раствор Taq-полимеразы 500 мкл Серия: 01/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca TwoStep-PB-60
---	--------------------------------

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл Серия: 01/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca TwoStep-PB-60
---	--------------------------------

ООО НПФ "Литех" ПКО ИПП 100 мкл Серия: 01/TS-952/21 Годен до: 29.01.22 Хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca TwoStep-PB-60
--	--------------------------------

ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

ООО НПФ "Литех" 119426 г. Москва, ул. Малая Пироговская д.1, стр.2 набор реагентов для выявления и идентификации <i>Gardnerella vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro ТУ 21 20 23-552-17253567-2021 РЗН Для профессионального применения Обратитесь к инструкции по применению на www.liteph.ru ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96 Хранить при температуре +2...+8 °С Транспортировать при температуре +2...+8 °С
--

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь PB-TS.....
..... 96 пробирок по 21 мкл
2. Раствор Taq-полимеразы.....
..... 1 пробирка 800 мкл
3. Разбавитель..... 1 пробирка 1 мл
4. ПКО ИППП..... 1 пробирка 100 мкл

Серия: 02/TS-962/21
Годен до: 29.01.22

Серия: 02/TS-962/21
Годен до: 29.01.22

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех" ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96 Реакционная смесь PB-TS 96 пробирок по 21 мкл Для приготовления амплификационной смеси добавить раствор Taq-полимеразы согласно инструкции Серия: 02/TS-962/21 Годен до: 29.01.22 хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики
--

ООО НПФ "Литех" Раствор Taq-полимеразы 800 мкл 1 пробирка Серия: 02/TS-962/21 Годен до: 29.01.22 хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
--	-----------------------------

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл 1 пробирка Серия: 02/TS-962/21 Годен до: 29.01.22 хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
--	-----------------------------

ООО НПФ "Литех" ПКО ИППП 100 мкл 1 пробирка Серия: 02/TS-962/21 Годен до: 29.01.22 хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
--	-----------------------------

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех" Раствор Taq-полимеразы 800 мкл Серия: 02/TS-962/21 Годен до: 29.01.22 хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
--	-----------------------------

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл Серия: 02/TS-962/21 Годен до: 29.01.22 хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
--	-----------------------------

ООО НПФ "Литех" ПКО ИППП 100 мкл Серия: 02/TS-962/21 Годен до: 29.01.22 хранить при +2...+8 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС Gv+Ca-TwoStep-PB-96
--	-----------------------------

Образец маркировки групповой упаковки

«Набор реагентов для выявления и идентификации *Gardnerella vaginalis* и *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Gv+Ca для диагностики in vitro»

ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120

Номер серии 01/852/21

Дата изготовления 27.04.21

Годен до 27.04.22

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120 должен храниться при температуре -18...-20°C в течение всего срока годности. Срок годности набора – 12 месяцев.

Условия транспортировки:

Набор реагентов ДИПЛЕКС Gv+Ca-PB-120 рекомендуется транспортировать при температуре хранения. Допустима транспортировка при температуре +2°...+8°C в течение 5 дней (не более).

Копия верна
Прошито, проверено,
скреплено печатью.
Количество листов
шт.
Директор
Наумов А.Ю.

