

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МакСиз»

ОКПД2 14.12.30.190

Группа Р12  
(код ОКС 11.040.30)

## УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МакСиз»

Максимов А.А.



«11» сентября 2023 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Комплект одноразовых медицинских изделий из нетканого материала

по ТУ 14.12.30-003-30145339-2022

(версия 02)

2023 г.

## **1. Наименование медицинского изделия**

Комплект одноразовых медицинских изделий из нетканого материала по ТУ 14.12.30-003-30145339-2022 (далее по тексту – изделия, комплект). Количество и перечень изделий должен соответствовать варианту исполнения.

Варианты исполнения:

I. Комплект №1, в составе:

1. Комбинезон медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов, размер: S (44-46) / M (46-48) / L (48-50) / XL 50-52) / 2XL (52-54) / 3XL (54-56) / 4XL (56-58) - 1 шт.;
2. Бахилы медицинские высокие из нетканых материалов на резинках и завязках -1 пара;
3. Салфетка медицинская -1 шт.;
4. Инструкция по применению-1 шт.

II. Комплект №2, в составе:

1. Куртка медицинская одноразовая нестерильная из нетканых материалов, размер: S (44-46) / M (46-48) / L (48-50) / XL 50-52) / 2XL (52-54) / 3XL (54-56) / 4XL (56-58) – 1шт.;
2. Брюки медицинские одноразовые из нетканых материалов, размер: S (44-46) / M (46-48) / L (48-50) / XL 50-52) / 2XL (52-54) / 3XL (54-56) / 4XL (56-58) -1 шт.;
3. Инструкция по применению -1 шт.

III. Комплект №3, в составе:

1. Куртка медицинская одноразовая нестерильная из нетканых материалов, размер: S (44-46) / M (46-48) / L (48-50) / XL 50-52) / 2XL (52-54) / 3XL (54-56) / 4XL (56-58) – 1шт.;
2. Брюки медицинские одноразовые из нетканых материалов, размер: S (44-46) / M (46-48) / L (48-50) / XL 50-52) / 2XL (52-54) / 3XL (54-56) / 4XL (56-58) -1 шт.;
3. Бахилы медицинские высокие из нетканых материалов на резинках и завязках -1 пара;
4. Салфетка медицинская -1 шт.;
5. Инструкция по применению -1 шт.

## **2. Сведения о производителе медицинского изделия**

Общество с ограниченной ответственностью «МакСиз», 117628, город Москва, Куликовская ул., д. 12, эт/п/к/оф 5/VIII/32/620

Телефон: +7 (495)255-08-25

E-mail: info@maksiz.ru

### **3. Место производства**

ООО «МакСиз», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, корпус 3

### **4. Классификация медицинского изделия**

В зависимости от потенциального риска применения изделия, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России № 4н от 06.06.2012 г. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий», относится к классу 1.

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 14.12.30.190 – Одежда производственная и профессиональная прочая, не включённое в другие группировки

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий:

332470 – Набор одежды хирургический/смотровой

Климатическое исполнение – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

### **5. Назначение**

Комплект предназначен для ношения пациентами и медицинскими работниками во время осмотра для поддержания гигиены и предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом.

Основными потребителями изделий являются: медицинский персонал и пациенты лечебно профилактических учреждений широкого профиля.

### **6. Область применения**

Применяется в инфекционных клинических больницах, медицинских учреждениях, клиниках, клинических диспансерах и больницах.

### **7. Показания к применению, противопоказания и побочные эффекты**

Показания к применению: изделия являются противоэпидемиологическими и используют для обеспечения охраны здоровья медицинского персонала путем создания барьера, препятствующего распространению и передаче инфекции.

Противопоказания, возможные побочные действия: Непереносимость, аллергическая реакция на материалы.

Ограничения применения: 1. Комплект не подлежит повторному применению. 2. Воздействие некоторых загрязняющих веществ: воздействие жидкой пыли и брызг опасных

веществ, действие высоких температур и другие факторы могут потребовать применения защитной одежды с более высокой барьерной защиты. За консультацией обращайтесь к поставщику или производителю. 3. Только пользователь может судить о том, в сочетании с каким дополнительным оснащением (перчатки, респираторные средства защиты и т.д.) следует носить комплект для полной защиты тела и как можно носить изделие на конкретной работе, с учётом его защитных характеристик, удобства ношения комплекта.

## 8. Меры предосторожности

Не использовать вторично;

Не использовать с истекшим сроком годности;

Не использовать при нарушении упаковки, а также с видимыми повреждениями;

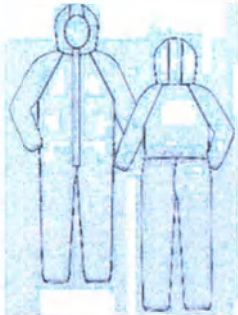
Изделия одноразового применения и после использования подлежат соответствующей утилизации.

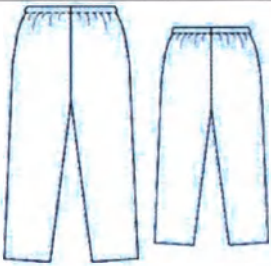
Рекомендуемое время использования – 8 часов (одна смена) с последующей утилизацией.

## 9. Описание медицинского изделия

Описание одежды, входящие в комплекты, приведено в таблице 1

Таблица 1

| Наименование изделия                                                                     | Внешний вид                                                                         | Описание, характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комбинезон медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов<br><br>Рисунок 1. |  | Комбинезон с капюшоном на молнии. Не стерильный, однократного применения. На рукавах, штанинах и капюшоне предусмотрена резинка для наилучшего прилегания. Центральная застежка на молнии, прикрытая планкой.<br>Для изготовления комбинезонов используют:<br>Материалы:<br>-смс пл. $40 \pm 8$ г/м <sup>2</sup> (цвет: белый) |
| Куртка медицинская одноразовая нестерильная из нетканых материалов<br><br>Рисунок 2      |  | Куртка предназначена для предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом.<br>Для изготовления рубашки используют:<br>Материалы:<br>-смс пл. $40 \pm 8$ г/м <sup>2</sup> (цвет: белый)                                      |

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брюки медицинские одноразовые нетканых материалов<br>Рисунок 3                   |  | Брюки предназначены для предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом.<br>Для изготовления брюк используют:<br>Материалы:<br>-смс пл. 40±8 г/м <sup>2</sup> (цвет: белый) |
| Бахилы медицинские высокие нетканых материалов на резинках завязках<br>Рисунок 4 |  | Бахилы одноразовые нестерильные, фиксация на резинках и завязках<br>Для изготовления бахил (на резинках и завязках) используют:<br>Материалы:<br>- смс пл. 40±8 г/м <sup>2</sup> (цвет: белый)                                                                                  |
| Салфетка медицинская<br>Рисунок 5                                                |  | Салфетка медицинская одноразовая нестерильная прямоугольной формы.<br>Материал: смс пл. 40±8 г/м <sup>2</sup> (цвет: белый)                                                                                                                                                     |

При изготовлении изделий красители не используются

Габаритные размеры комбинезона (рис1.) должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Размер                                                                 | Значение |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                        | S        | M     | L     | XL    | 2XL   | 3XL   | 4XL   |
|                                                                        | 44-46    | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Длина комбинезона от шва горловины до низа при сложении рукав к рукаву | 150      | 156   | 158   | 161   | 164   | 175   | 177   |
| Ширина спинки                                                          | 58       | 61    | 68    | 69    | 70    | 73    | 77    |
| Длина рукава от шва горловины до низа рукава                           | 75       | 77    | 78    | 82    | 84    | 88    | 90    |
| Длина по шаговому шву                                                  | 74       | 75    | 75    | 76    | 77    | 78    | 79    |
| Длина застежки передней части                                          | 78       | 80    | 80    | 80    | 83    | 89    | 93    |
| Длина спинки до талии                                                  | 46       | 49    | 50    | 54    | 56    | 58    | 59    |
| Высота капюшона                                                        | 34       | 35    | 35    | 37    | 37    | 37    | 38    |
| Ширина по низу брюк при стянутой резинке                               | 12       | 12    | 15    | 15,5  | 16    | 16,5  | 17    |
| Ширина по низу рукава при стянутой резинке                             | 8        | 8     | 10    | 10    | 10    | 10,5  | 11    |

Предельное отклонение от размера +/- 5 см

Габаритные размеры куртки (рис2.) должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя       | Значение |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размеры                       | S        | M     | L     | XL    | 2XL   | 3XL   | 4XL   |
|                               | 44-46    | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Длина по спинке, см           | 62       | 64    | 68    | 72    | 74    | 76    | 80    |
| Ширина низа, см               | 52       | 56    | 60    | 64    | 68    | 72    | 76    |
| Длина рукава от горловины, см | 32       | 33    | 34    | 34    | 36    | 38    | 40    |
| Ширина рукава по низу, см     | 18,5     | 19    | 19    | 19,5  | 20    | 20,5  | 21    |

Предельное отклонение от размера +/- 5 см

Габаритные размеры брюк (рис3.) должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя                             | Значение |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размеры                                             | S        | M     | L     | XL    | 2XL   | 3XL   | 4XL   |
|                                                     | 44-46    | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Длина, см                                           | 94       | 100   | 106   | 112   | 118   | 124   | 130   |
| Ширина на уровне бедер, см (по самой широкой части) | 52       | 56    | 60    | 64    | 68    | 72    | 76    |
| Ширина на уровне талии со стянутой резинкой, см     | 28       | 30    | 32    | 34    | 38    | 40    | 44    |
| Ширина низа, см                                     | 23       | 23    | 23    | 23    | 24    | 25    | 25    |

Предельное отклонение от размера +/- 5 см

Габаритные размеры бахил (на резинках и завязках) (рис4) должны соответствовать указанным в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя               | Значение |
|---------------------------------------|----------|
| Длина стопы, см                       | 30       |
| Высота бахил, см                      | 50       |
| Ширина верха при стянутой резинке, см | 17       |
| Длина завязок (2шт.), см              | 45       |

Предельное отклонение от размера +/- 3 см

Габаритные размеры салфетки (рис5) должны соответствовать указанным в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Значение      |
|-------------------------|---------------|
| Размер                  | универсальный |
| Длина, см               | 35            |
| Ширина, см              | 35            |

Предельное отклонение от размера +/- 1,5 см

## 10. Комплектность

Количество и перечень изделий должен соответствовать варианту исполнения.

Варианты исполнения:

I. Комплект №1, в составе:

1. Комбинезон медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов, размер: S (44-46) / M (46-48) / L (48-50) / XL 50-52) / 2XL (52-54) / 3XL (54-56) / 4XL (56-58) - 1 шт.;
2. Бахилы медицинские высокие из нетканых материалов на резинках и завязках -1 пара;
3. Салфетка медицинская -1 шт.;
4. Инструкция по применению-1 шт.

II. Комплект №2, в составе:

1. Куртка медицинская одноразовая нестерильная из нетканых материалов, размер: S (44-46) / M (46-48) / L (48-50) / XL 50-52) / 2XL (52-54) / 3XL (54-56) / 4XL (56-58) – 1шт.;
2. Брюки медицинские одноразовые из нетканых материалов, размер: S (44-46) / M (46-48) / L (48-50) / XL 50-52) / 2XL (52-54) / 3XL (54-56) / 4XL (56-58) -1 шт.;
3. Инструкция по применению -1 шт.

III. Комплект №3, в составе:

1. Куртка медицинская одноразовая нестерильная из нетканых материалов, размер: S (44-46) / M (46-48) / L (48-50) / XL 50-52) / 2XL (52-54) / 3XL (54-56) / 4XL (56-58) – 1шт.;
2. Брюки медицинские одноразовые из нетканых материалов, размер: S (44-46) / M (46-48) / L (48-50) / XL 50-52) / 2XL (52-54) / 3XL (54-56) / 4XL (56-58) -1 шт.;
3. Бахилы медицинские высокие из нетканых материалов на резинках и завязках -1 пара;
4. Салфетка медицинская -1 шт.;
5. Инструкция по применению -1 шт.

Вся документация предоставляется по ГОСТ 2.601 на русском языке.

## 11. Маркировка

Символы на маркировке готовых изделий - по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Маркировка потребительской упаковки должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на листок-вкладыш к продукции.

Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:

- полное наименование медицинского изделия;
- вариант исполнения;

- комплектность;
- наименование производителя;
- юридический адрес;
- адрес производства;
- товарный знак;
- размер изделия и цвет;
- состав сырья, из которого изготовлено изделие;
- функциональное назначение;
- условия хранения;
- условия утилизации;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц, год);
- годен до;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- символ «Не стерильно»;
- символ «Запрет на повторное применение»;
- символ «Не допускать воздействие солнечного света»;
- символ «Не использовать при повреждении упаковки».



Транспортная маркировка по ГОСТ Р ИСО 15223-1. В маркировке, нанесенной на транспортную упаковку, должна быть указана маркировка как в потребительской упаковке с дополнением:

- количество потребительских упаковок;
- символ «Беречь от влаги»;
- масса брутто.



Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке.

## 12. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов, соответствующих исполнениям УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, но при температурах

окружающей среды не ниже плюс 10 °С и не выше плюс 35 °С, относительной влажности воздуха не более 80 %, при 25°С.

Использование изделий должно выполняться в соответствии с требованиями способа применения, указанного производителем, в зависимости, от наименования.

Рекомендуемое время использования – 8 часов (одна смена) с последующей утилизацией.

Изделия являются одноразовыми медицинскими изделиями, ремонту и техническому обслуживанию не подлежат.

Подготовка изделия к использованию:

После распаковки, имеющиеся на изделиях складки, как правило, полностью распрямляются.

Проверьте целостность одежды и его элементов.

Дополнительной подготовки к применению не требуется.

Изделие надевается поверх одежды.

Транспортирование и хранение изделий – по ГОСТ 15150.

При транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по условиям хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150, но с ограничением температуры не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25°С.

Условия хранения в упаковке - по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150, но с ограничением температуры не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25°С.

Упакованные изделия перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке открытым транспортом изделие защищают от атмосферных осадков.

Размеры и масса брутто пакета должны соответствовать ГОСТ 24597.

Погрузка, крепление, транспортирование, разгрузка изделия должны обеспечить её сохранность и исключить возможность повреждения упаковки.

При транспортировании и хранении изделий не допускается присутствие посторонних запахов и ароматов от таких продуктов как табак, кофе, цитрусовые, рыба, моющие средства, горюче-смазочные или лакокрасочные материалы.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий, химических веществ.

Изделия, упакованные в индивидуальную и транспортную упаковку, должны храниться до реализации на стеллажах в упаковке изготовителя.

Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м.

### **13. Очистка, дезинфекция, стерилизация**

Уход, обслуживание, очистка и дезинфекция изделий перед применением не требуется.

### **14. Порядок осуществления утилизации и уничтожения**

Изделия, после применения инфицированными людьми, должны подвергаться обеззараживанию химическими (дезинфекция) и физическими (термические, микроволновые, радиационные и другие) методами с последующим удалением в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия, а также изделия, не имеющие контакта с инфекционными больными, является эпидемиологически безопасными отходами, приближенным по составу к твердым бытовым отходам, класса А по СанПиН 2.1.3684-21.

### **15. Техническое обслуживание и ремонт**

Изделия являются одноразовыми медицинскими изделиями, ремонту не подлежат.

### **16. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок хранения изделий со дня изготовления – 5 лет.

**17. Медицинское изделие соответствует технической документации производителя, национальным стандартам Российской Федерации на продукцию, а также международным стандартам:**

| Обозначение документа | Наименование документа                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                        |
| ГОСТ 12.1.004-91      | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| ГОСТ 12.3.002-2014    | Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные.                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Общие требования безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ГОСТ 12.3.005-75        | Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности                                                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 12.4.136-84        | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости микроорганизмами                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 12.4.175-88        | Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Нормы проницаемости микроорганизмами                                                                                                                                                                                                                   |
| ГОСТ 15.007-88          | Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения                                                                                                                                                                                                             |
| ГОСТ 15150-69           | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды                                                                                                       |
| ГОСТ Р 52770-2016       | Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний                                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 16371-2014         | Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ГОСТ 166-89             | Штангенциркули. Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ГОСТ EN 13795-2-2011    | Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 2. Методы испытаний                                                                                                                                                                        |
| ГОСТ 17.1.3.13-86       | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения                                                                                                                                                                                                                                     |
| ГОСТ 18251-87           | Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ГОСТ 2.601-2019         | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы                                                                                                                                                                                                                                             |
| ГОСТ 12302-2013         | Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия                                                                                                                                                                                                                                        |
| ГОСТ 20477-86           | Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ГОСТ 20566-75           | Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб (с Изменениями N 1, 2, 3)                                                                                                                                                                                                                         |
| ГОСТ 12088-77           | Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости                                                                                                                                                                                                                                             |
| ГОСТ 23948-80           | Изделия швейные. Правила приемки (с Изменениями N 1, 2)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 24297-13           | Верификация закупленной продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ГОСТ 24597 -81          | Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ГОСТ 9142-2014          | Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ГОСТ 427-75             | Линейки измерительные металлические. Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ГОСТ 7502-98            | Рулетки измерительные металлические. Технические условия                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ГОСТ Р 58577-2019       | Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов                                                                                                                                                      |
| ГОСТ 12.2.003-91        | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности                                                                                                                                                                                                                        |
| ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 | Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования                                                                                                                                                              |
| ГОСТ ISO 10993-1-2021   | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования                                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ ISO 10993-10-2011  | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия                                                                                                                                                                                |
| СанПиН 2.1.3684-21      | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических |

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  | (профилактических) мероприятий                                                    |
| СП 2.2.3670-20   | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда                          |
| СП 52.13330.2016 | Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* |

**18. Претензии и сведения о нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента) направлять по адресу:**

Общество с ограниченной ответственностью «МакСиз», 117628, город Москва,  
Куликовская ул., д. 12, эт/п/к/оф 5/VIII/32/620

Телефон: +7 (495)255-08-25,

E-mail: [info@maksiz.ru](mailto:info@maksiz.ru)

Прошито и скреплено печатью  
количество 12 (Двенадцать) листов

Генеральный директор  
Общество с ограниченной ответственностью  
«МакСиз»

/ А.А. Максимов/

Подпись

ФИО

