

ВТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП «Уфимское ПРОП»
Министр здравоохранения
и социального развития
России
К.Г. Исхакова
2011 г.



Протезы после вычленения в тазобедренном суставе
модульные ПН(8)
Памятка по пользованию

Протезы после вычленения конечности в тазобедренном суставе модульные (ПН8) предназначены для протезирования пациентов всех половозрастных групп после одностороннего или двустороннего вычленения бедра или после высокой ампутации бедра (длина культи бедра не более 5 см. от промежности) или при врожденном отсутствии нижней конечности.

1. Описание конструкции

1.1 Протез имеет модульную конструкцию, содержащую приемную гилзу в виде корсета (корзины), коленный и тазобедренные модули, искусственную стопу, регулировочно-соединительные узлы (адаптеры), косметическую обливку и дополнительные функциональные модули.

2. Надевание и использование протезом

2.1 На протез надеть чулок или носок, затем обувь.

2.2 Протез одевается непосредственно на нижнее белье.

2.3 Вставить культи в приемную гилзу протеза. Не давая нагрузки удобно

разместить объём таза в корсете и затянуть ремни.

При правильно надетом протезе, приемная гилза не должна оказывать бокового воздействия на мягкие ткани культи. В противном случае, отрегулировать натяжение крепёжных ремней.

Примечание: противопоказано покрывать культи кремами на жирной основе, возможно применение кремов на силиконовой основе.

2.4 В положении «стоя» необходимо осуществлять несколько небольших по амплитуде сгибательных и разгибательных движений в коленном шарнире. Проверить

удобство размещения культи в приемной полости гилзы и надежность крепления протеза.

3. Уход за протезом и чехлом

3.1 Протез необходимо оберегать от поломок и деформации отдельных элементов, предохранять от сырости.

3.2 Внутреннюю полость приемной гилзы не менее одного раза в неделю рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной нейтральным раствором моющих

средств, с последующей просушкой.

3.3 После использования в дождливую погоду в случае, если стопа, обувь и косметическая обливка протеза промокли, необходимо снять обувь, а протез протереть

и высушить.

3.4 Не следует хранить протез вблизи источника тепла, сушить на солнце.

4. Уход за культи

4.1 Ежедневно, после ходьбы на протезе, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов культи, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж культи, обработка кожи культи защитными питательными кремами и лосьонами.

5. Ремонт протеза

5.1 Самостоятельная разборка и ремонт протеза запрещены.

5.2 При возникновении неполадок и протезе (появлении люфтов, поломка стопы, повреждение силиконового чехла, обливки протеза и др.) необходимо обратиться на протезно-ортопедическое предприятие, выдавшее протез.

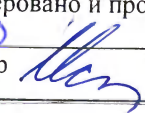


Директор

К. Г. Исхакова

КОПИЯ ВЕРНА

Пронумеровано и прошнуровано 2 листов

Директор  К.Г. Исхакова

