

**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**ООО «ФОРМАН Продактс»**



\_\_\_\_\_  
**В.В. Новиков**

**22.11.2022 г.**

**ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ «ФОРМАН» (FOREMAN)**

**по ТУ 32.50.30-002-79722512-2017**

**Инструкция по применению**

**ФРМН.942819.002 ИП**

**г. Санкт-Петербург**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....</b>                               | <b>4</b>  |
| 1.1 Назначение и условия применения .....                      | 4         |
| 1.2 Показания .....                                            | 4         |
| 1.3 Противопоказания .....                                     | 4         |
| 1.4 Побочные эффекты .....                                     | 4         |
| 1.5 Меры предосторожности .....                                | 5         |
| 1.6 Общий вид тумбы .....                                      | 6         |
| <b>2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....</b>                           | <b>16</b> |
| 2.1 Основные параметры и характеристики.....                   | 16        |
| 2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.....    | 19        |
| 2.3 Требования к надежности .....                              | 22        |
| 2.4 Комплектность .....                                        | 22        |
| 2.5 Маркировка.....                                            | 22        |
| 2.6 Упаковка .....                                             | 23        |
| <b>3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>                         | <b>24</b> |
| <b>4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....</b>                     | <b>24</b> |
| 4.1 Эксплуатационные ограничения .....                         | 24        |
| 4.2 Подготовка к эксплуатации .....                            | 24        |
| <b>5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ И РЕМОНТ .....</b>                       | <b>25</b> |
| <b>6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....</b>                     | <b>27</b> |
| <b>7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .....</b> | <b>27</b> |
| <b>8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....</b>                        | <b>28</b> |
| <b>9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ .....</b>                         | <b>29</b> |
| <b>10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....</b>                   | <b>30</b> |
| <b>11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ .....</b>                         | <b>31</b> |
| <b>12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....</b>                           | <b>32</b> |

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 3 из 33            |

Настоящая инструкция распространяется на Тумбу медицинскую «ФОРМАН» (FOREMAN) (в дальнейшем – тумба) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках тумбы, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения тумбы отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования тумбы, необходимо обращаться к изготовителю:

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАН Продактс»  
 Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12  
 Тел: +7 (812) 332-58-43  
 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 4 из 33            |

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Назначение и условия применения

Тумба медицинская «ФОРМАН» (FOREMAN) (далее – тумба) предназначена для хранения медицинских изделий в специализированных помещениях.

Условия применения – лечебно-профилактические учреждения.

В зависимости от потенциального риска применения тумба относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид тумбы в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 156900 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям тумба относится к виду УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации тумба относится к группе 1; тумба подкатная относится к группе 3 по ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации тумба относится к классу Г по ГОСТ Р 50444-92.

### 1.2 Показания

- организация хранения медицинских изделий

### 1.3 Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материала.

### 1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции по применению, показаний и противопоказаний.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 5 из 33            |

## 1.5 Меры предосторожности

### **Внимание!**

- Используйте тумбу только в соответствии с данной инструкцией.
- Уход за тумбой осуществлять в соответствии с данной инструкцией.
- Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за тумбой.
- Не следует ставить на поверхность тумбы горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

## 1.6 Общий вид тумбы

Тумба представляет собой небольшой невысокий шкафчик для хранения или расположения чего-либо внутри или на поверхности верхней крышки, например, принадлежностей медицинского персонала или пациента.

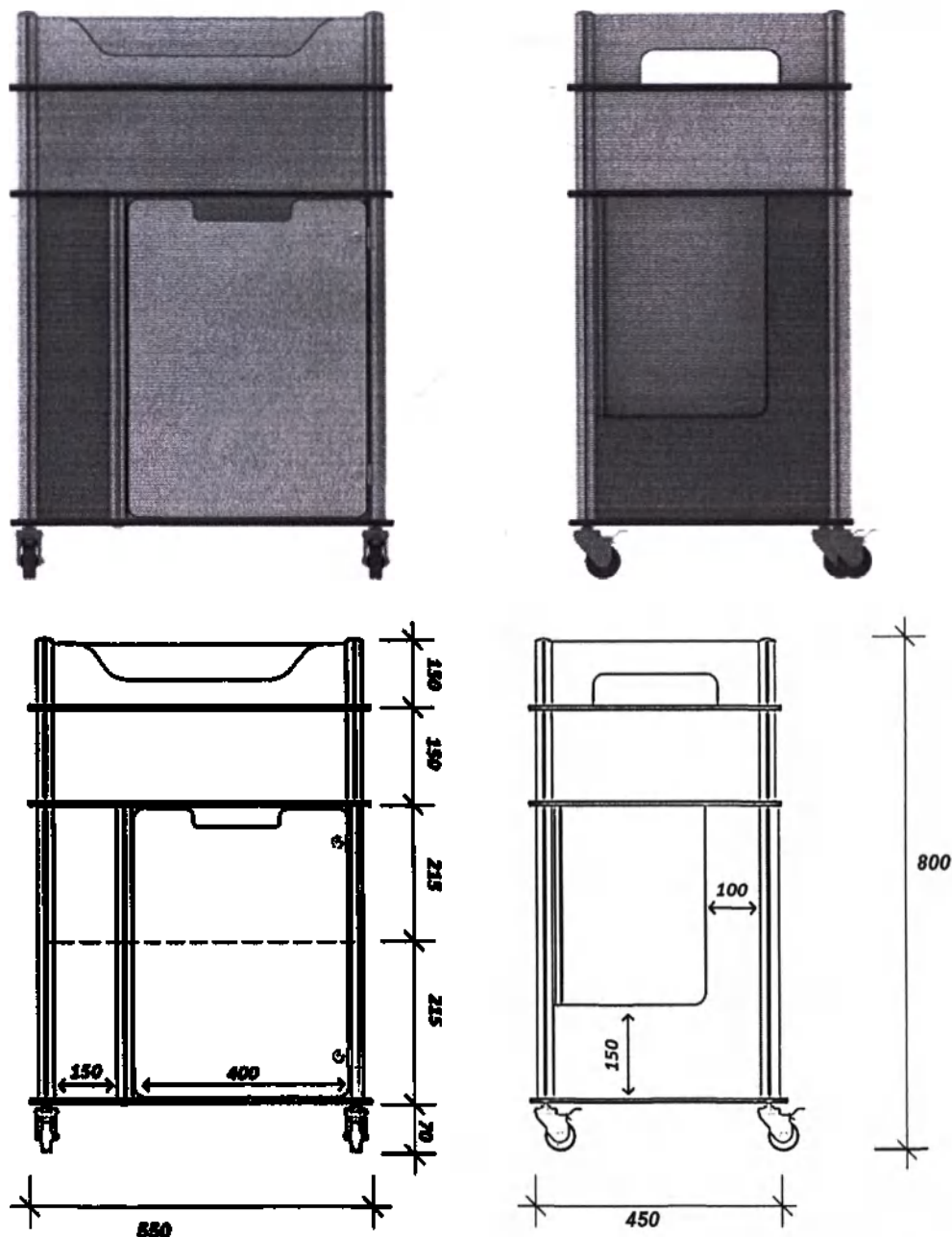


Рисунок 1 - Артикул FP-1-02-01. Тумба подкатная «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 1 - Размеры тумбы подкатной «ФОРМАН» (FOREMAN)

|             | Ширина | Высота | Глубина |
|-------------|--------|--------|---------|
| Размеры, мм | 550    | 800    | 450     |

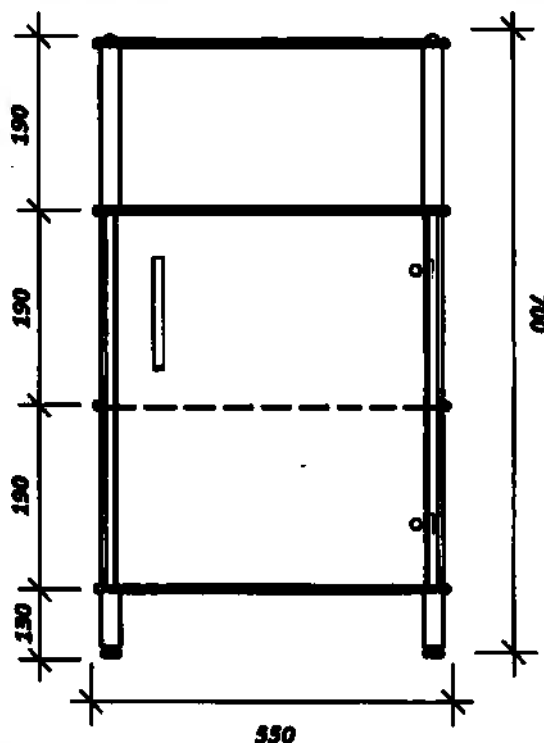
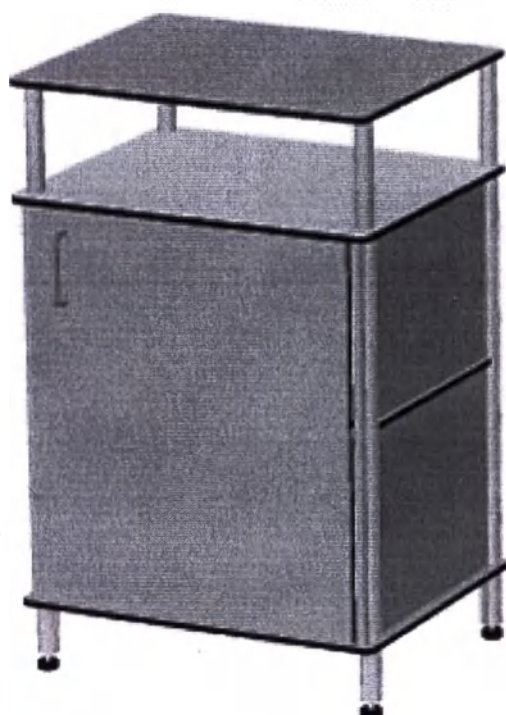


Рисунок 2 - Артикул FP-1-02-02. Тумба (общего назначения) с одной дверцей «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 2 - Размеры тумбы (общего назначения) с одной дверцей «ФОРМАН» (FOREMAN)

|             | Ширина тумбы | Высота тумбы | Глубина тумбы | Полки 1 шт. |         |
|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------|
|             |              |              |               | Ширина      | Глубина |
| Размеры, мм | 550          | 700          | 500           | 530         | 490     |

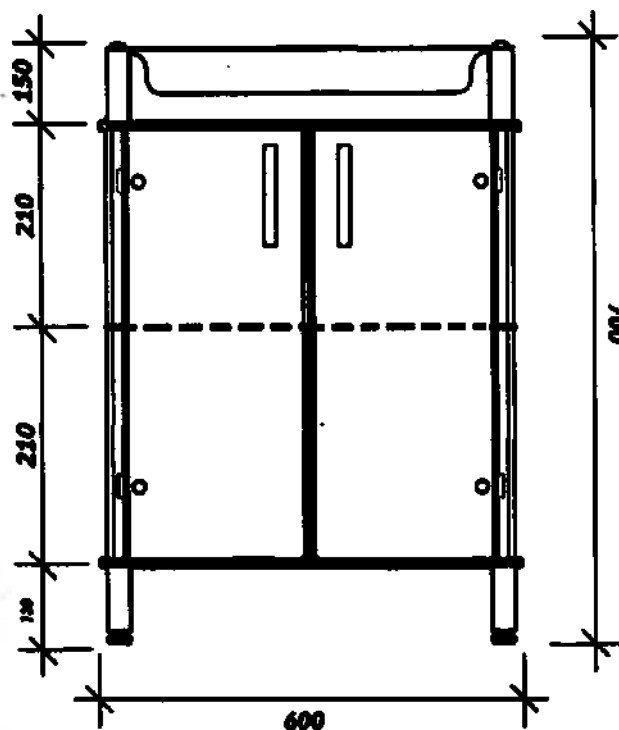


Рисунок 3 - Артикул FP-1-02-03. Тумба (общего назначения) с двумя дверцами «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 3 - Размеры тумбы (общего назначения) с двумя дверцами «ФОРМАН» (FOREMAN)

|             | Ширина тумбы | Высота тумбы | Глубина тумбы | Полки 1 шт. |         |
|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------|
|             |              |              |               | Ширина      | Глубина |
| Размеры, мм | 600          | 700          | 500           | 580         | 490     |

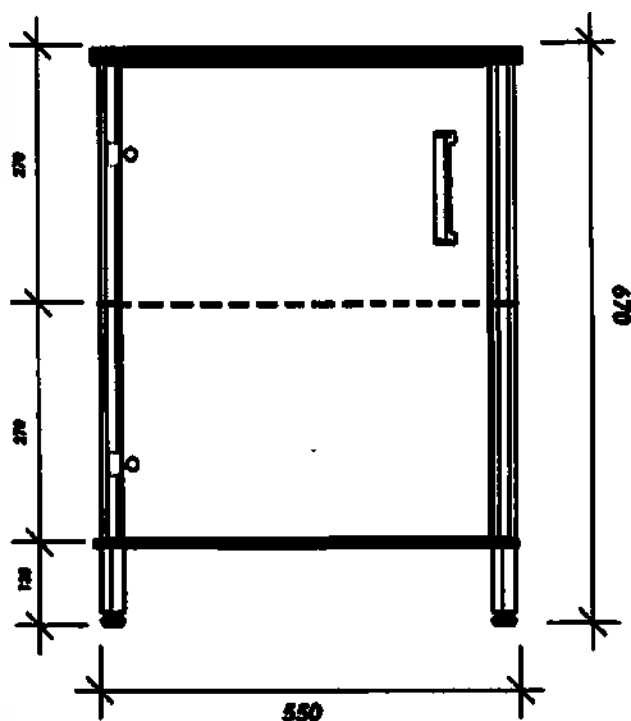
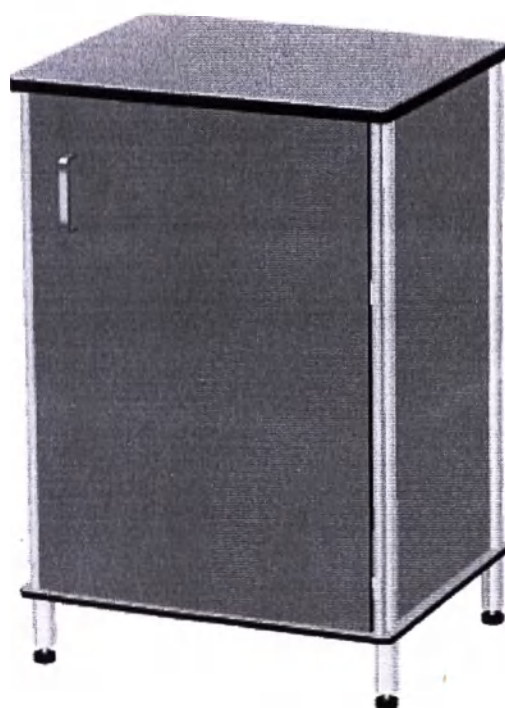


Рисунок 4 - Артикул FP-1-02-04. Тумба пристенная с дверцей «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 4 - Размеры тумбы пристенной с дверцей «ФОРМАН» (FOREMAN)

|             | Ширина<br>тумбы | Высота<br>тумбы | Глубина<br>тумбы | Полки 1 шт. |         |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|---------|
|             |                 |                 |                  | Ширина      | Глубина |
| Размеры, мм | 550             | 670             | 500              | 530         | 490     |

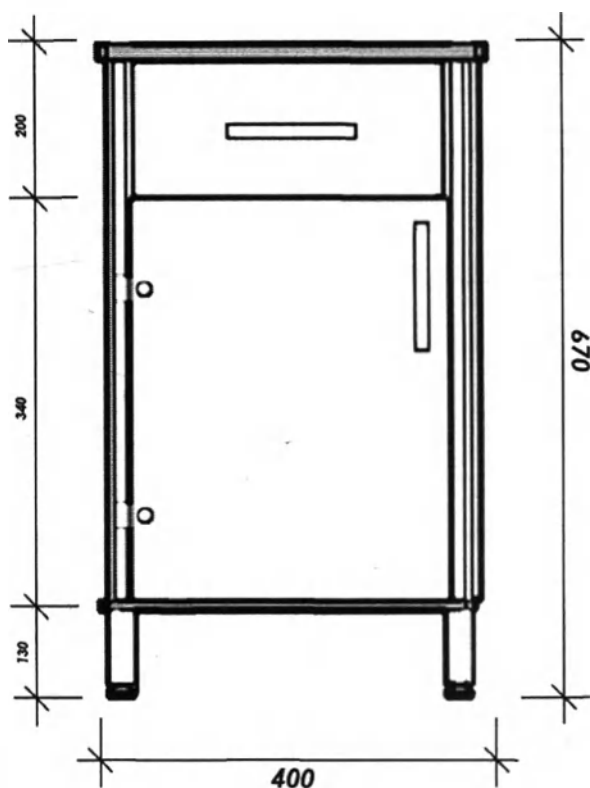
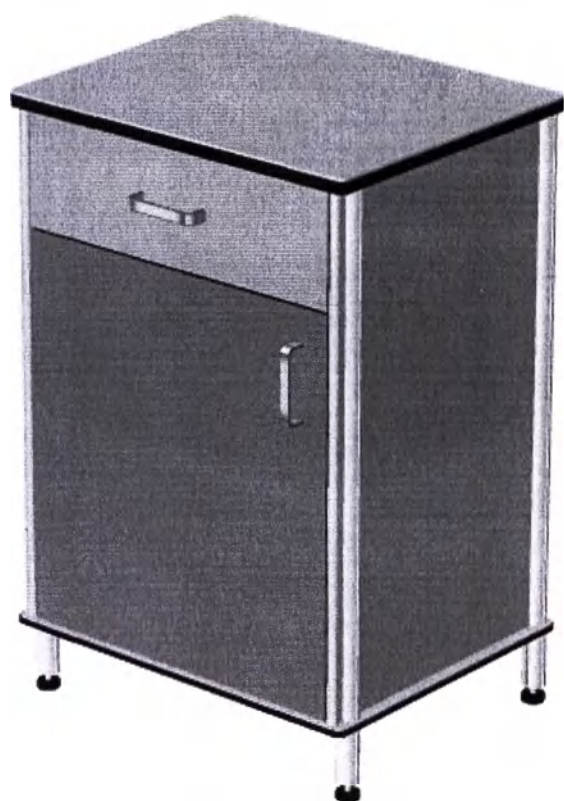


Рисунок 5 - Артикул FR-1-02-05. Тумба пристенная с дверцей и ящиком  
 «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 5 - Размеры тумбы пристенной с дверцей и ящиком «ФОРМАН» (FOREMAN)

|             | Ширина<br>тумбы | Высота<br>тумбы | Глубина<br>тумбы | Ящик 1 шт. |        |         |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------|---------|
|             |                 |                 |                  | Ширина     | Высота | Глубина |
| Размеры, мм | 400             | 670             | 500              | 380        | 180    | 490     |

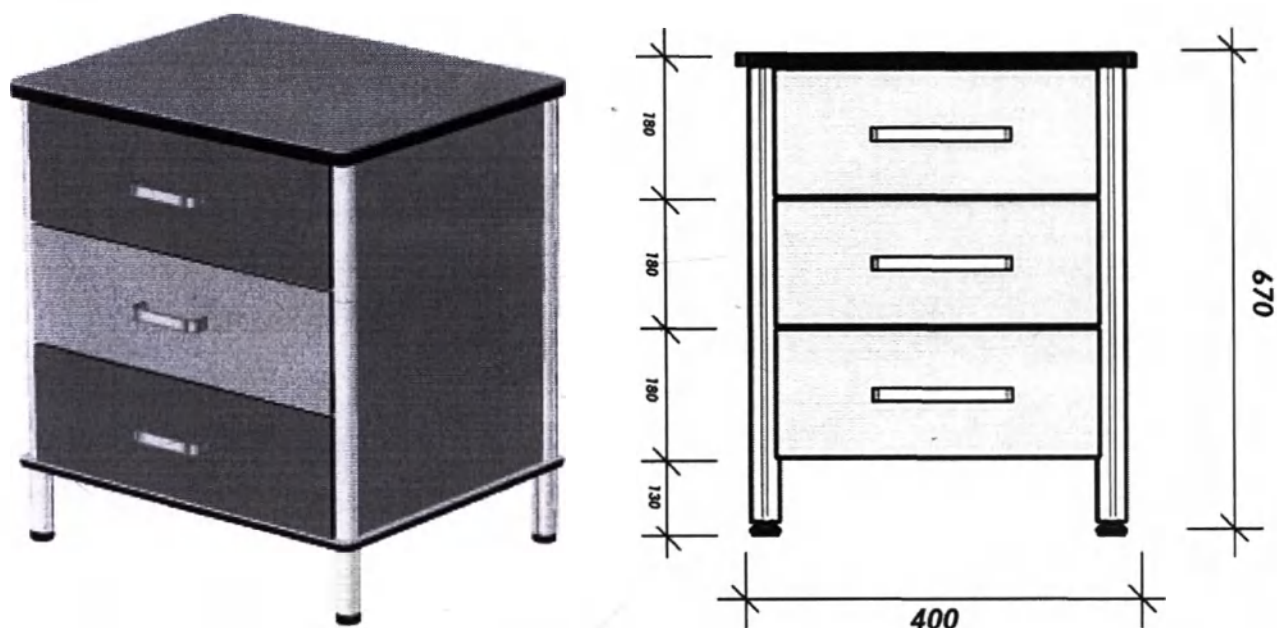


Рисунок 6 - Артикул FP-1-02-06. Тумба с тремя выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 6 - Размеры тумбы с тремя выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)

|                | Ширина<br>тумбы | Высота<br>тумбы | Глубина<br>тумбы | Ящики 3 шт. |        |         |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------|---------|
|                |                 |                 |                  | Ширина      | Высота | Глубина |
| Размеры,<br>мм | 400             | 670             | 500              | 380         | 180    | 490     |

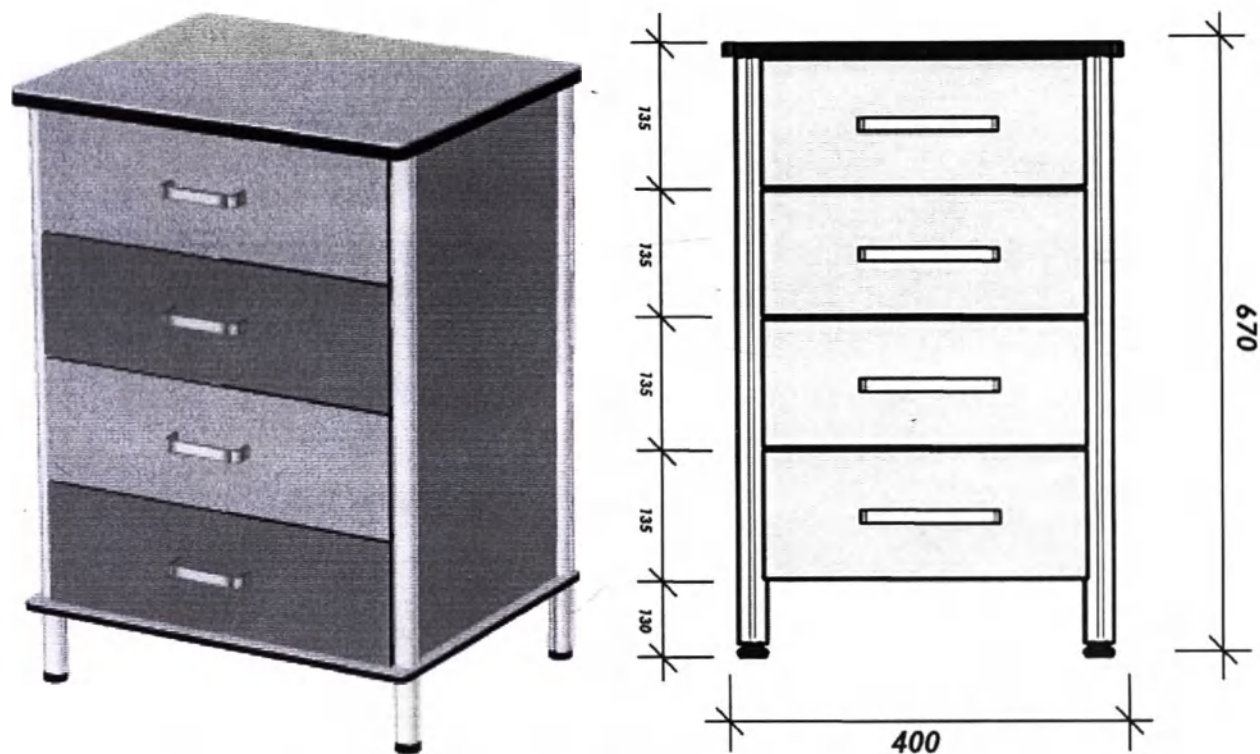


Рисунок 7 - Артикул FP-1-02-07. Тумба с четырьмя выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 7 - Размеры тумбы с четырьмя выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)

|             | Ширина<br>тумбы | Высота<br>тумбы | Глубина<br>тумбы | Ящики 4 шт. |        |         |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------|---------|
|             |                 |                 |                  | Ширина      | Высота | Глубина |
| Размеры, мм | 400             | 670             | 500              | 380         | 135    | 490     |

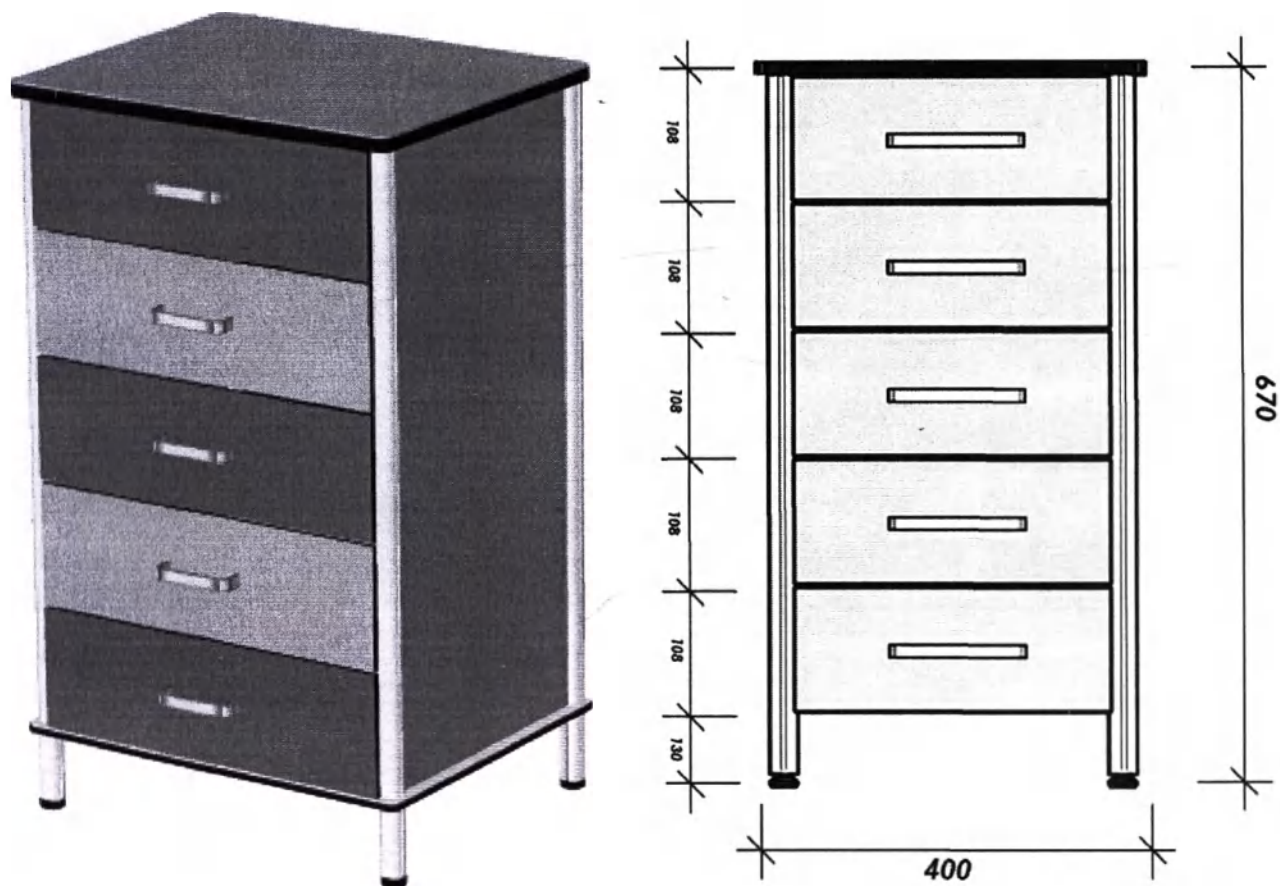


Рисунок 8 - Артикул FP-1-02-08. Тумба с пятью выдвижными ящиками  
 «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 8 - Размеры тумбы с пятью выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)

|             | Ширина<br>тумбы | Высота<br>тумбы | Глубина<br>тумбы | Ящик 5 шт. |        |         |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------|---------|
|             |                 |                 |                  | Ширина     | Высота | Глубина |
| Размеры, мм | 400             | 670             | 500              | 380        | 108    | 490     |

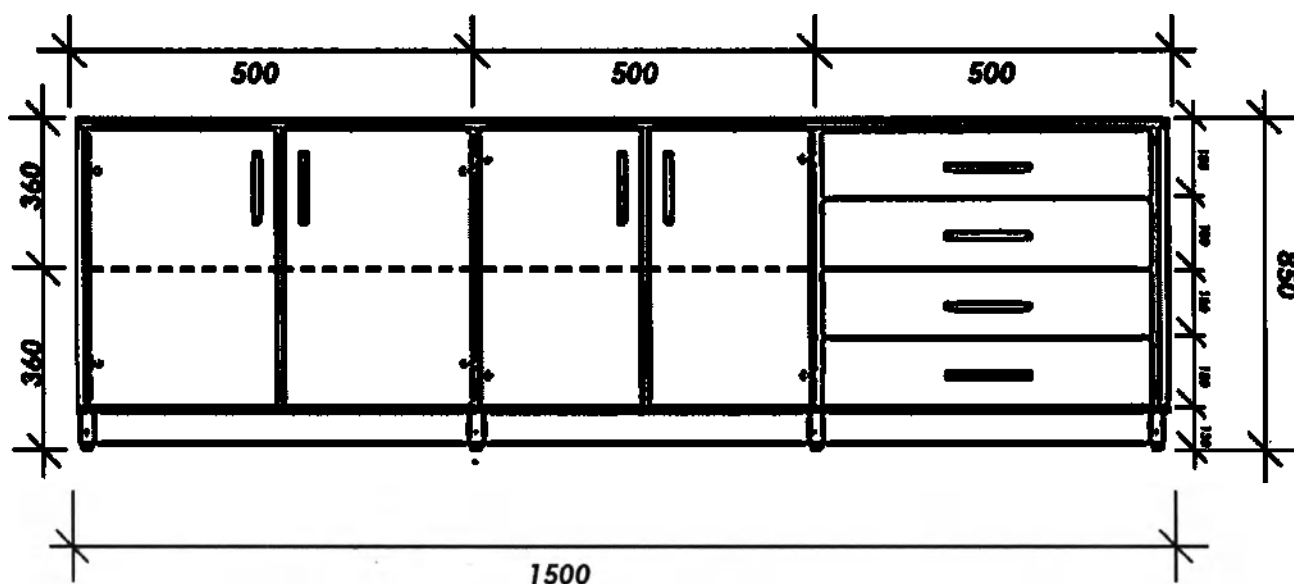
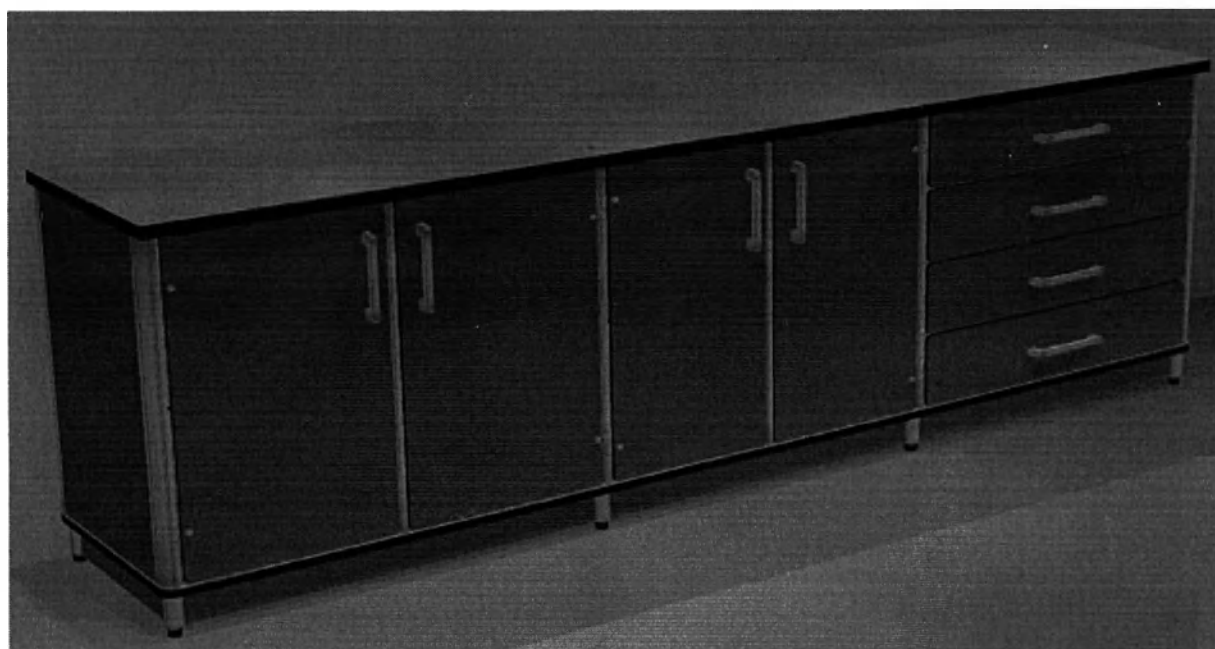


Рисунок 9 - Артикул FP-1-02-09. Тумба универсальная «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 9 - Размеры тумбы универсальной «ФОРМАН» (FOREMAN)

|             | Ширина<br>тумбы | Высота<br>тумбы | Глубина<br>тумбы | Полки 2 шт. |         | Ящик 4 шт. |        |         |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|---------|------------|--------|---------|
|             |                 |                 |                  | Ширина      | Глубина | Ширина     | Высота | Глубина |
| Размеры, мм | 1500            | 850             | 600              | 480         | 590     | 480        | 180    | 590     |

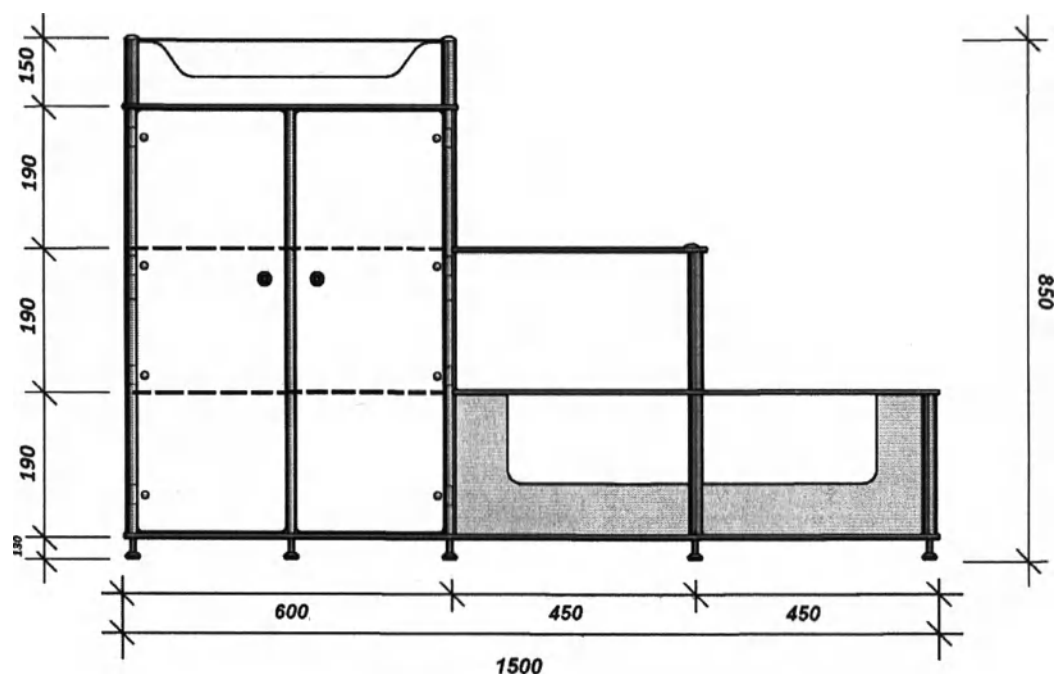


Рисунок 10 - Артикул FP-1-02-10. Тумба разноуровневая «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 10 - Размеры тумбы разноуровневой «ФОРМАН» (FOREMAN)

| Размеры, мм | Ширина<br>тумбы | Высота<br>тумбы | Глубина<br>тумбы | Полки 2 шт. |         |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|---------|
|             |                 |                 |                  | Ширина      | Глубина |
|             | 1500            | 850             | 500              | 580         | 490     |

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 16 из 33           |

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Тумба соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 16371-2014, настоящих технических условий и комплектов конструкторской документации согласно таблице 11.

Таблица 11 – Полный (номенклатурный) перечень изделий

| Артикул    | Наименование                                                  | Обозначение документа | № Рисунка |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| FP-1-02-01 | Тумба подкатная «ФОРМАН» (FOREMAN)                            | ФРМН.942819.002-01    | Рис. 1    |
| FP-1-02-02 | Тумба (общего назначения) с одной дверцей «ФОРМАН» (FOREMAN)  | ФРМН.942819.002-02    | Рис. 2    |
| FP-1-02-03 | Тумба (общего назначения) с двумя дверцами «ФОРМАН» (FOREMAN) | ФРМН.942819.002-03    | Рис. 3    |
| FP-1-02-04 | Тумба пристенная с дверцей «ФОРМАН» (FOREMAN)                 | ФРМН.942819.002-04    | Рис. 4    |
| FP-1-02-05 | Тумба пристенная с дверцей и ящиком «ФОРМАН» (FOREMAN)        | ФРМН.942819.002-05    | Рис. 5    |
| FP-1-02-06 | Тумба с тремя выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)           | ФРМН.942819.002-06    | Рис. 6    |
| FP-1-02-07 | Тумба с четырьмя выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)        | ФРМН.942819.002-07    | Рис. 7    |
| FP-1-02-08 | Тумба с пятью выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)           | ФРМН.942819.002-08    | Рис. 8    |
| FP-1-02-09 | Тумба универсальная «ФОРМАН» (FOREMAN)                        | ФРМН.942819.002-09    | Рис. 9    |
| FP-1-02-10 | Тумба разноуровневая «ФОРМАН» (FOREMAN)                       | ФРМН.942819.002-10    | Рис. 10   |

2.1.2 Конструкция и внешний вид тумбы соответствуют рисункам 1-10 раздела 1.6.

2.1.3 Габаритные размеры и масса тумбы соответствуют значениям, указанным в таблице 12. Предельные отклонения размеров тумбы не превышают  $\pm 4$  мм.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 17 из 33           |

Таблица 12 – Массогабаритные характеристики

| Наименование                                                  | Габаритные размеры<br>(ШхВхГ), мм | Масса, не<br>более, кг |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Тумба подкатная «ФОРМАН» (FOREMAN)                            | 550x800x450                       | 20                     |
| Тумба (общего назначения) с одной дверцей «ФОРМАН» (FOREMAN)  | 550x700x500                       | 22                     |
| Тумба (общего назначения) с двумя дверцами «ФОРМАН» (FOREMAN) | 600x700x500                       | 23                     |
| Тумба пристенная с дверцей «ФОРМАН» (FOREMAN)                 | 550x670x500                       | 25                     |
| Тумба пристенная с дверцей и ящиком «ФОРМАН» (FOREMAN)        | 400x670x500                       | 25                     |
| Тумба с тремя выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)           | 400x670x500                       | 25                     |
| Тумба с четырьмя выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)        | 400x670x500                       | 26                     |
| Тумба с пятью выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)           | 400x670x500                       | 27                     |
| Тумба универсальная «ФОРМАН» (FOREMAN)                        | 1500x850x600                      | 250                    |
| Тумба разноуровневая «ФОРМАН» (FOREMAN)                       | 1500x850x500                      | 50                     |

2.1.4 Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не превышают значений по ГОСТ 16371-2014.

2.1.5 Покоробленность щитовых деталей тумбы по ГОСТ 16371-2014.

2.1.6 На видимой поверхности тумбы отсутствуют дефекты по ГОСТ 20400-2013: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

2.1.7 Столешницы тумбы, полки и днища ящиков выдерживают двукратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой:

- на столешницу тумб  $30 \pm 1$  кг;
- на полку  $3 \pm 0,5$  кг;
- на дно ящика  $5 \pm 1$  кг.

2.1.8 Количество и размеры ящиков и полок, а также их расположение соответствуют рисункам 1-10 раздела 1.6. Предельные отклонения размеров не превышают  $\pm 2$  мм.

2.1.8.1 Тумбы имеют стеклянные дверцы толщиной  $8 \pm 0,5$  мм.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 18 из 33           |

2.1.8.2 Толщина стенок тумбы 4 мм. Толщина полок: 10 мм. Допускаемое отклонение:  $\pm 0,5$  мм.

2.1.9 Дверцы тумбы открываются и закрываются плавно, без перекосов, с усилием не более 20 Н.

2.1.10 Петли дверей интегрированы в алюминиевый профиль, обеспечивая открывание дверей на  $175 \pm 2$  градусов.

2.1.11 Двери тумбы и ящики без замков имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.

2.1.12 Выдвижные ящики тумбы имеют свободный ход без заеданий и перекосов, с усилием выдвигания не более 30 Н.

2.1.13 Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения их из корпуса.

2.1.14 Тумба устойчиво стоит на опорах. Зазор между одной из опор и поверхностью пола не превышает 3 мм.

2.1.15 Тумба устойчива при приложении нагрузки на открытую дверцу 45 Н, либо при приложении нагрузки на выдвинутый ящик 75 Н.

2.1.16 Тумба подкатная с колесами оснащена четырьмя одинаковыми колесами диаметром  $50 \pm 2$  мм, колеса снабжены тормозами.

2.1.17 Наибольшее усилие, необходимое для перемещения тумбы подкатной с колесами по горизонтальному бесшовному полу, с равномерно распределенной полуторакратной нагрузкой, не более 60 Н.

2.1.18 Колеса вращаются на горизонтальной оси свободно, без заедания, от усилия не более 0,35 Н. Колеса вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания.

2.1.19 Усилие, необходимое для включения/выключения тормоза колеса, не более 150 Н.

2.1.20 Усилие, необходимое для перемещения тумбы подкатной по твердой плоской поверхности с включенными тормозами, не менее 300 Н.

2.1.21 Опоры тумбы допускают регулировку не менее, чем на 10 мм.

2.1.22 Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей фурнитуры и деталей из металла по ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 для изделий группы условий 1.

2.1.23 Наружные поверхности тумбы устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

2.1.24 Тумба при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 19 из 33           |

2.1.25 Тумба обладает устойчивостью к механическим воздействиям при эксплуатации, соответствующим требованиям к изделиям группы 1, в свою очередь, тумба подкатная относится к группе 3 по ГОСТ Р 50444-92.

2.1.26 Тумба в транспортной таре обладает прочностью к воздействию климатических факторов при транспортировании в условиях 5 по ГОСТ 15150-69. Тумба в транспортной таре обладает прочностью к воздействию климатических факторов при хранении в условиях 2 по ГОСТ 15150-69.

2.1.27 Тумба в транспортной упаковке обладает прочностью к механическим воздействиям при транспортировании, соответствующим требованиям ГОСТ Р 50444-92

## 2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении тумбы, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве тумбы, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013.

2.2.3 Для изготовления тумбы используются сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 13.

Таблица 13 - Сырье, материалы и покупные изделия

| Артикул    | Наименование                                                 | Материалы                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                              | Наименование, марка, изготовитель                                                     |
| FP-1-02-01 | Тумба подкатная «ФОРМАН» (FOREMAN)                           | Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия |
|            |                                                              | Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия    |
|            |                                                              | Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия                   |
|            |                                                              | Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия                  |
|            |                                                              | Поликарбонатная панель по ГОСТ Р 56712-2015, ООО «Полигаль Восток», Россия            |
| FP-1-02-02 | Тумба (общего назначения) с одной дверцей «ФОРМАН» (FOREMAN) | Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия |
|            |                                                              | Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия    |
|            |                                                              | Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия                   |
|            |                                                              | Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия                  |

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 20 из 33           |

| Артикул    | Наименование                                                  | Материалы                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                               | Наименование, марка, изготовитель                                                     |
| FP-1-02-03 | Тумба (общего назначения) с двумя дверцами «ФОРМАН» (FOREMAN) | Поликарбонатная панель по ГОСТ Р 56712-2015, ООО «Полигаль Восток», Россия            |
|            |                                                               | Стекло закаленное по ГОСТ 30698-2014, ООО «АКМА», Россия                              |
|            |                                                               | Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия |
|            |                                                               | Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия    |
|            |                                                               | Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия                   |
|            |                                                               | Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия                  |
| FP-1-02-04 | Тумба пристенная с дверцей «ФОРМАН» (FOREMAN)                 | Поликарбонатная панель по ГОСТ Р 56712-2015, ООО «Полигаль Восток», Россия            |
|            |                                                               | Стекло закаленное по ГОСТ 30698-2014, ООО «АКМА», Россия                              |
|            |                                                               | Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия |
|            |                                                               | Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия    |
|            |                                                               | Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия                   |
|            |                                                               | Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия                  |
| FP-1-02-05 | Тумба пристенная с дверцей и ящиком «ФОРМАН» (FOREMAN)        | Поликарбонатная панель по ГОСТ Р 56712-2015, ООО «Полигаль Восток», Россия            |
|            |                                                               | Стекло закаленное по ГОСТ 30698-2014, ООО «АКМА», Россия                              |
|            |                                                               | Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия |
|            |                                                               | Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия    |
|            |                                                               | Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия                   |
|            |                                                               | Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия                  |
| FP-1-02-06 | Тумба с тремя выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)           | Поликарбонатная панель по ГОСТ Р 56712-2015, ООО «Полигаль Восток», Россия            |
|            |                                                               | Стекло закаленное по ГОСТ 30698-2014, ООО «АКМА», Россия                              |
|            |                                                               | Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия |
|            |                                                               | Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия    |
|            |                                                               | Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия                   |

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 21 из 33           |

| Артикул    | Наименование                                           | Материалы                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                        | Наименование, марка, изготовитель                                                     |
|            |                                                        | Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия                  |
|            |                                                        | Поликарбонатная панель по ГОСТ Р 56712-2015, ООО «Полигаль Восток», Россия            |
| FP-1-02-07 | Тумба с четырьмя выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN) | Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия |
|            |                                                        | Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия    |
|            |                                                        | Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия                   |
|            |                                                        | Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия                  |
|            |                                                        | Поликарбонатная панель по ГОСТ Р 56712-2015, ООО «Полигаль Восток», Россия            |
| FP-1-02-08 | Тумба с пятью выдвижными ящиками «ФОРМАН» (FOREMAN)    | Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия |
|            |                                                        | Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия    |
|            |                                                        | Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия                   |
|            |                                                        | Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия                  |
|            |                                                        | Поликарбонатная панель по ГОСТ Р 56712-2015, ООО «Полигаль Восток», Россия            |
| FP-1-02-09 | Тумба универсальная «ФОРМАН» (FOREMAN)                 | Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия |
|            |                                                        | Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия    |
|            |                                                        | Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия                   |
|            |                                                        | Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия                  |
|            |                                                        | Поликарбонатная панель по ГОСТ Р 56712-2015, ООО «Полигаль Восток», Россия            |
|            |                                                        | Стекло закаленное по ГОСТ 30698-2014, ООО «АКМА», Россия                              |
| FP-1-02-10 | Тумба разноуровневая «ФОРМАН» (FOREMAN)                | Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate), ООО «Слотекс», Россия |
|            |                                                        | Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия    |
|            |                                                        | Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ, Teknos, Финляндия                   |
|            |                                                        | Фурнитура алюминиевая AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия                  |

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 22 из 33           |

| Артикул | Наименование | Материалы                                                                       |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         |              | Наименование, марка, изготовитель                                               |
|         |              | Поликарбонатная панель по ГОСТ Р 56712-2015, ООО «Поли-<br>галь Восток», Россия |
|         |              | Стекло закаленное по ГОСТ 30698-2014, ООО «АКМА», Россия                        |

### 2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средняя наработка на отказ (To) не менее 5000 часов. Критериями отказа является несоответствие требованиям п.п. 2.1.5 - 2.1.11.

2.3.2 Средний срок службы тумбы не менее 4 лет. Критерием предельного состояния тумбы считается невозможность или нецелесообразность его восстановления (или использования).

### 2.4 Комплектность

2.4.1 Комплект поставки включает в себя:

- Тумбу одного из исполнений, в сборе
- Эксплуатационную документацию:

Инструкцию по применению ФРМН.942819.002 ИП

*Примечание: количество и исполнение тумбы определяются при заказе по согласованию с заказчиком.*

### 2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка тумбы соответствует ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 50444-92 и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

2.5.2 На каждом изделии этикетка, на которой указано:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя и (или) товарный знак предприятия;
- наименование изделия, его исполнение;
- обозначение изделия (артикул);
- год изготовления;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы;
- заводской номер;
- обозначение настоящих технических условий, ГОСТ 16371-2014.

2.5.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикреплены к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 23 из 33           |

На каждую транспортную тару нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».

## 2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 50444-92 и конструкторской документации.

2.6.2 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту тумбы от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 24 из 33           |

### 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям тумба соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

### 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

#### 4.1 Эксплуатационные ограничения

 Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством изделия.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния изделия, чтобы убедиться в отсутствии различных повреждений. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

Рабочие условия окружающей среды:

Температура от плюс 10 до плюс 35°C.

Относительная влажность воздуха: до 80%.

#### 4.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности по разделу 2.3 настоящей инструкции по применению.

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

#### 4.3 Порядок работы с изделием

- Освободите тумбу от упаковки, выбросьте упаковочный материал.

 Все изделия поставляются готовыми к применению, однако рекомендуется перед первым использованием осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями Раздела 5.

- Используйте изделие в соответствии с его функциональным назначением.

*Примечание: Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке (п. 2.1.7).*

|                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП<br>Версия: 1.3<br>Страница: 25 из 33 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ И РЕМОНТ

Необходимо регулярно (не менее одного раза в неделю) контролировать отсутствие механических повреждений.

Так же необходимо обеспечивать дезинфекцию изделия согласно разделу 5.1 настоящей инструкции.

5.1 Внешние и внутренние доступные поверхности тумбы протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644-96 или иные средства согласно МУ 287-113.

 Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за тумбой.

 Не следует ставить на поверхность тумбы горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

### 5.2 Ремонт

Если в процессе подготовки изделия к работе, его эксплуатации или обслуживания выявлены дефекты или неисправности, то необходимо обратиться в ближайший сервисный центр по гарантийному и послегарантийному обслуживанию для проверки, ремонта или замены изделия (его частей).

 Ремонт тумбы может осуществляться только квалифицированным специально обученным персоналом сервисных центров.

Персоналу сервисного центра необходимо заносить в таблицу 14 сведения о проведенном ремонте.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 26 из 33           |

Таблица 14 – Сведения о проведенном ремонте

| № | Дата проведения | Организация, должность, исполнитель | Неисправность, замечания, проведенные работы | Подпись исполнителя |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|   |                 |                                     |                                              |                     |
|   |                 |                                     |                                              |                     |
|   |                 |                                     |                                              |                     |

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 27 из 33           |

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение тумбы должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92.

Транспортирование тумбы может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

6.2 Условия транспортирования тумбы должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%)

6.3 Условия хранения тумбы в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности до 98%).

## 7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790-10.

7.2 Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 тумба относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы.

7.3 Перед утилизацией тумба должна быть подвергнута санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

7.4 Тумба должна подлежать утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

7.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 28 из 33           |

## 8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Использование тумбы должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

8.2 К эксплуатации тумбы допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие инструкцию по применению.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 29 из 33           |

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Тумба медицинская «ФОРМАН» (FOREMAN) производства ООО «ФОРМАН Продактс»

Исполнение \_\_\_\_\_ Артикул \_\_\_\_\_ Заводской номер \_\_\_\_\_

принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 30 из 33           |

## 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тумба медицинская «ФОРМАН» (FOREMAN)

Исполнение \_\_\_\_\_ Артикул \_\_\_\_\_ Заводской номер \_\_\_\_\_

упакована на предприятии-изготовителе ООО «ФОРМАН Продактс» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел \_\_\_\_\_  
 (личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 31 из 33           |

## 11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, артикул и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 32 из 33           |

## 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества тумбы требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем.

12.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

### Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок эксплуатации изделия указан в настоящей инструкции и исчисляется с даты продажи. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется бесплатный ремонт или обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.

- Несовпадения заводского номера изделия с гарантийным талоном
- Наличия механических повреждений
- Несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

|                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ООО «ФОРМАН Продактс»<br>Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12<br>Тел: +7 (812) 332-58-43<br>E-mail: nzaharov@foremanfitness.com | Документ: ФРМН.942819.002 ИП |
|                                                                                                                                                                                | Версия: 1.3                  |
|                                                                                                                                                                                | Страница: 33 из 33           |

**ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА**  
*на замену в течение гарантийного срока*

Тумба медицинская «ФОРМАН» (FOREMAN)

Исполнение \_\_\_\_\_ Артикул \_\_\_\_\_ Заводской номер \_\_\_\_\_

Приобретена \_\_\_\_\_  
*(дата, подпись и штамп покупателя)*

Продавец \_\_\_\_\_  
*(подпись, печать)*

прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 33 (тридцать три) лист(ов)

Генеральный директор  
ООО «ФОРМАН ПРОДАКТС»

В.В. Новиков

2023

