

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Альгимед»




Д. Л. Славашевич
«09» октября 2023 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP»
в вариантах исполнения**

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 100 образцов (упаковка)

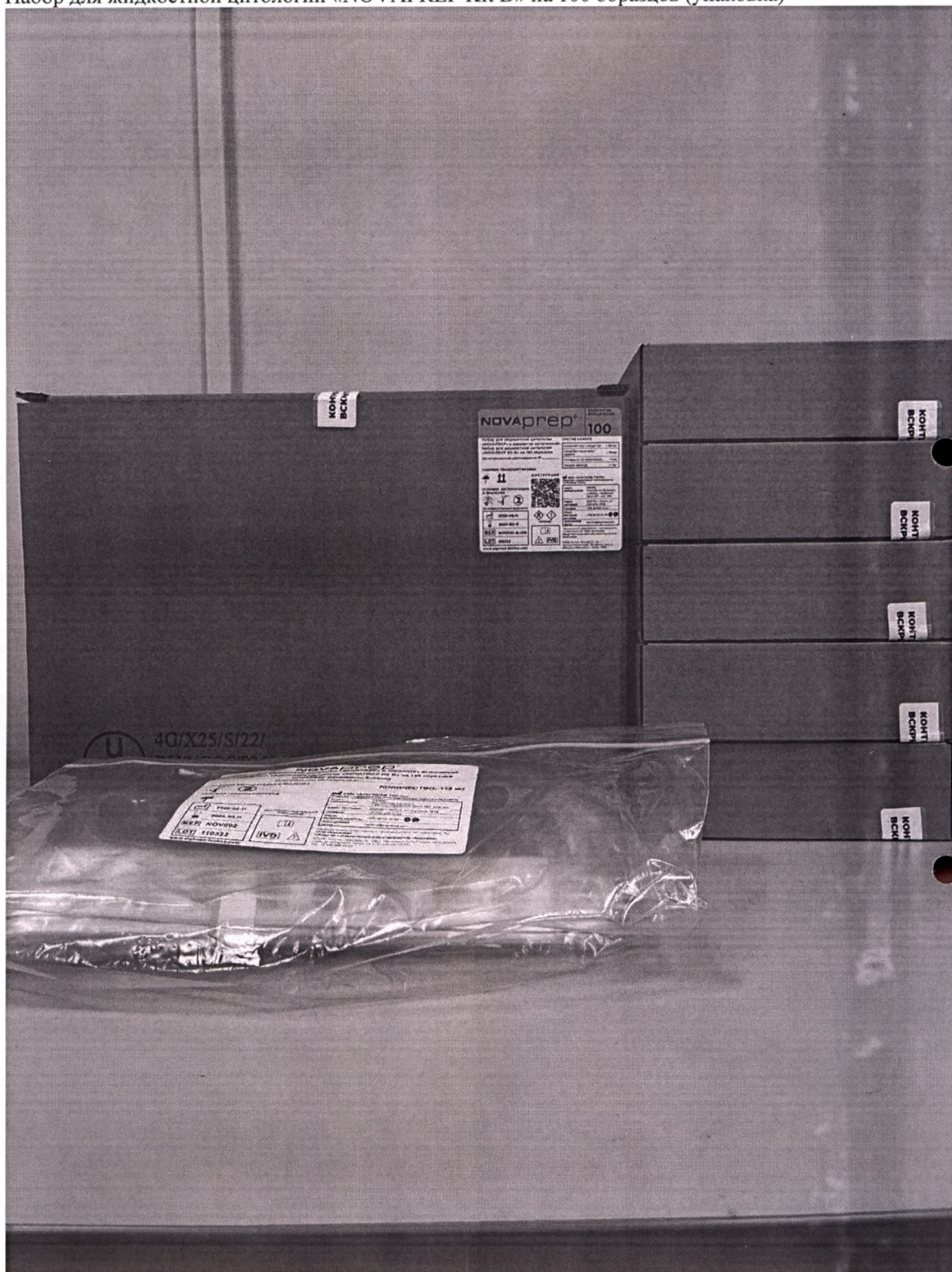


Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 100 образцов. NOVAPREP
Decantation Systems




Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 100 образцов. NOVAPREP HQ + Orange Vial (упаковка)



Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 100 образцов. NOVAPREP HQ + Orange Vial (флакон)

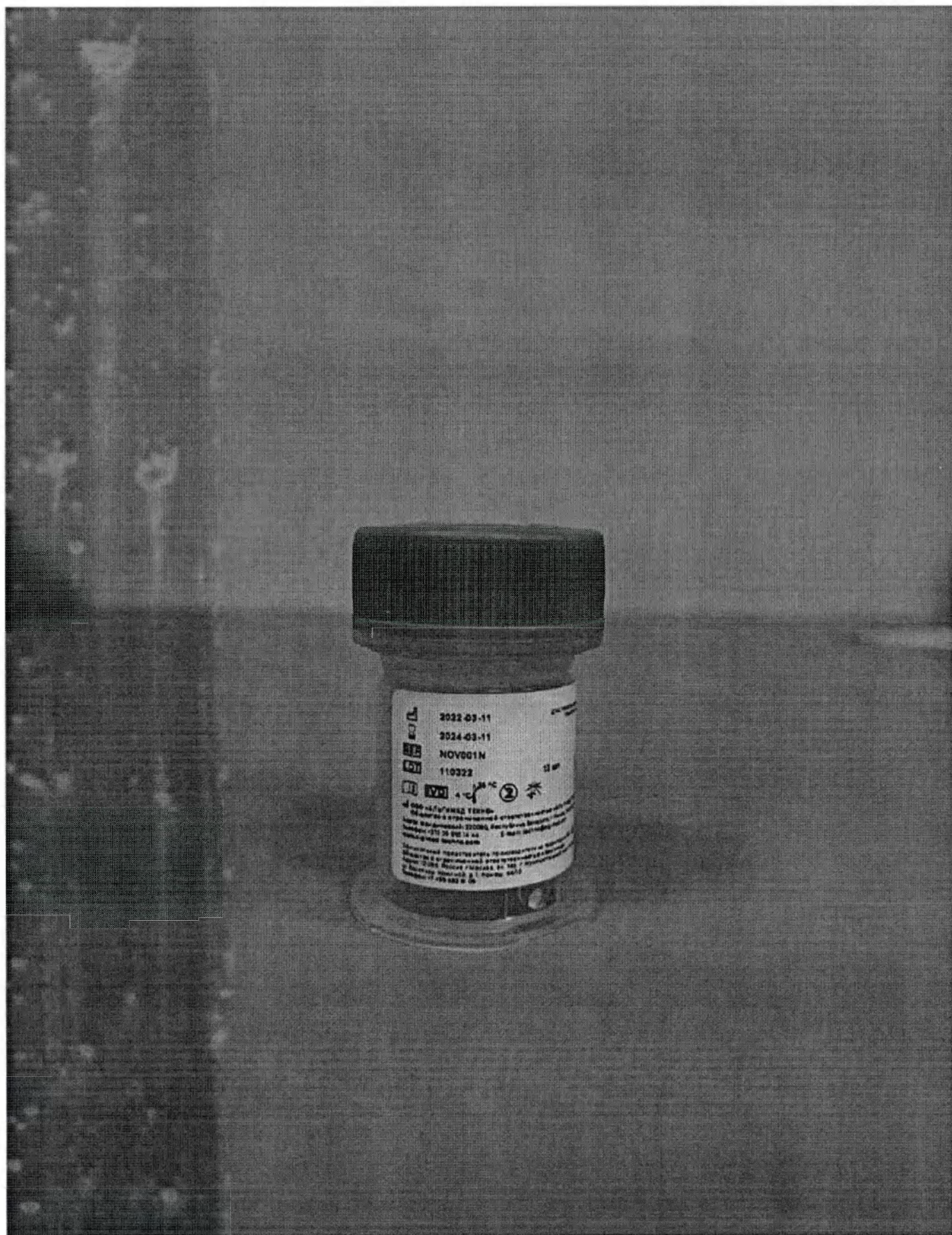

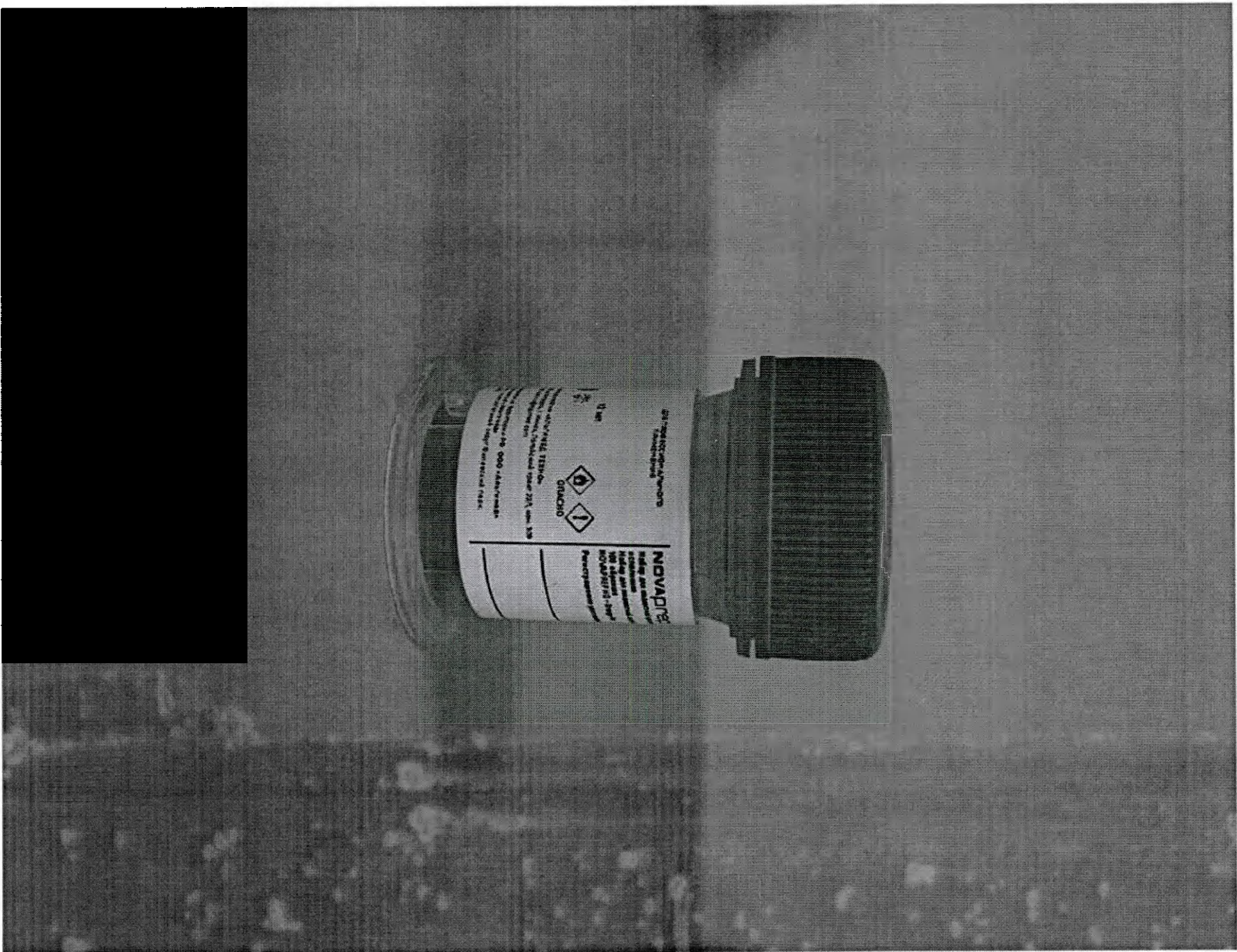

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 100 образцов. Инструкция по применению

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «Альгимед Техно»

Лютынский В.В.

« 10 » 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP»
в вариантах исполнения
Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 100, 500 образцов

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы

ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Логовский, д.22,
корп. 1, этаж 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 100 образцов. Паспорт качества

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ № 5 дата выдачи: 11.03.2022
---	--	--

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 100 образцов

Дата изготовления:	Номер партии:	Годеи до:	Срок хранения:
11.03.2022	110322	11.03.2024	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

1. NOVAPREP HQ + Orange Vial		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объем, мл	$12 \pm 2\%$	12
Электропроводность при 20 °C, мСм/см	$1,5 \pm 0,4$	1,5
Плотность при температуре 20 °C, г/мл	$0,95 \pm 0,02$	0,94

2. NOVAPREP Decantation Systems		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Без видимых нарушений	Без видимых нарушений
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Геометрические параметры блоттера	Длина блоттера, мм	243 ± 1 242,99
	Толщина блоттера по краю, мм отверстия	$0,6 \pm 0,2$ 0,63
	Ширина блоттера, мм	$44 \pm 0,2$ 44,12
	Толщина блоттера, мм	$1 \pm 0,1$ 1,00
	Диаметр отверстия, мм	$19 \pm 0,25$ 18,89
Геометрические параметры камер декантации	Длина спайки, мм	$237 \pm 1,2$ 237,10
	Ширина спайки, мм	$30 \pm 0,28$ 30,02
	Высота спайки, мм	$21 \pm 0,25$ 20,94
	Диаметр внешней декантационной камеры, мм	$20 \pm 0,25$ 20,04

2. NOVAPREP Decantation Systems		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Диаметр внутренней декантационной камеры, мм	$18 \pm 0,25$	18,11


Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit В» на 100 образцов
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества


Я.А.Бандык



Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREI ...t B» на 500 образцов (упаковка)

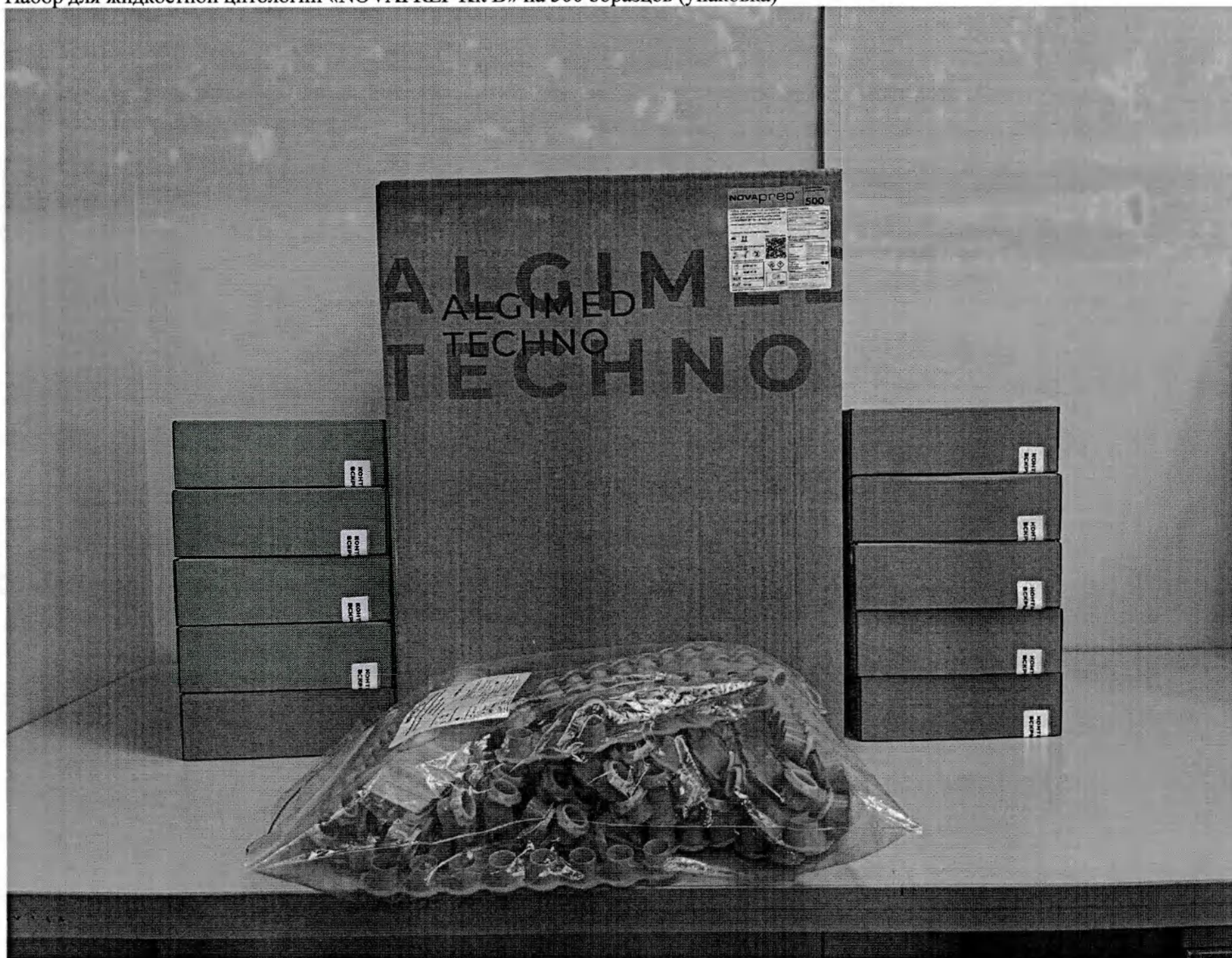

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 500 образцов. NOVAPREP Decantation Systems

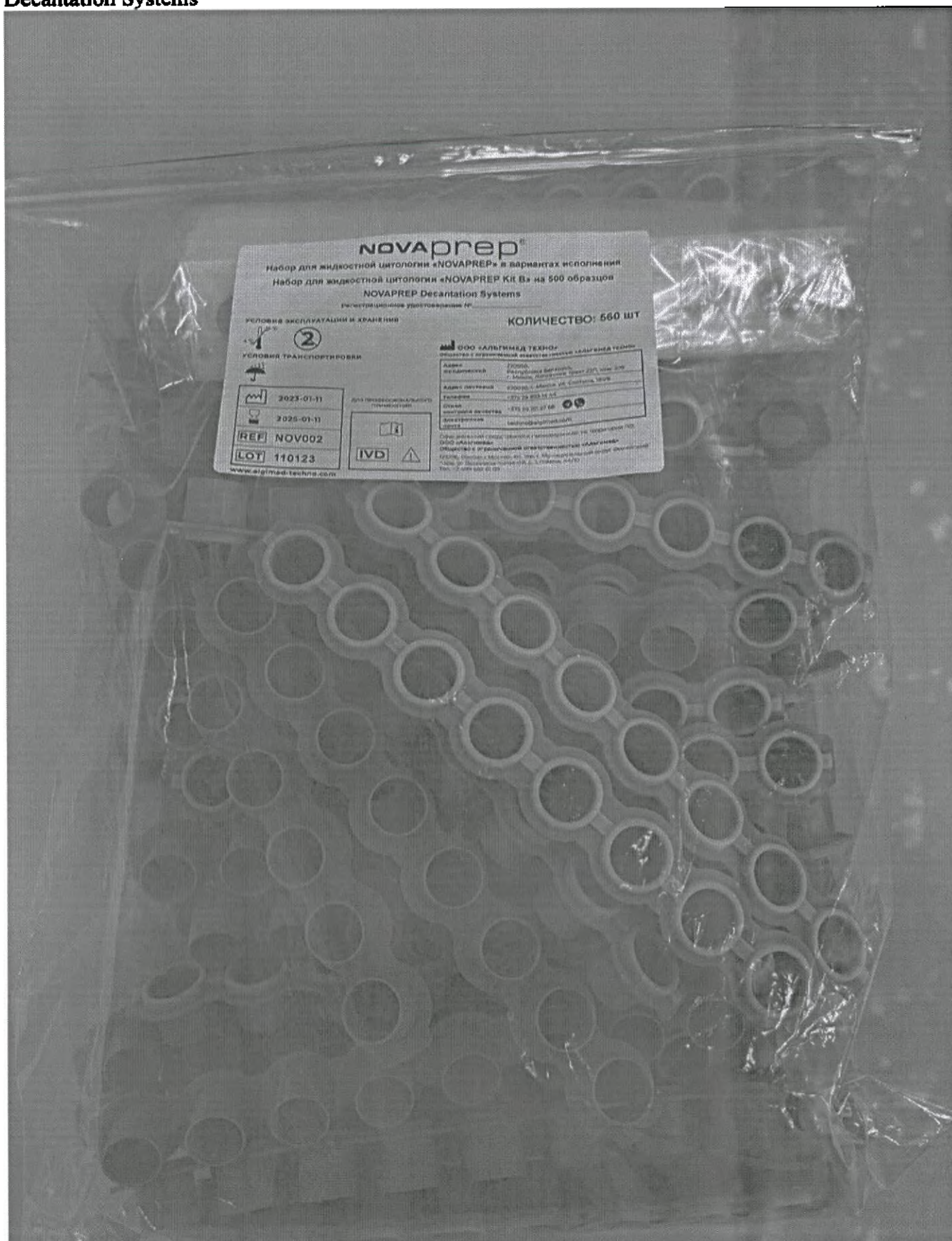

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 500 образцов. NOVAPREP HQ + Orange Vial (упаковка)



NOVAPREP® КОЛИЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЙ **25**

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP» в варианте исполнения Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 500 образцов NOVAPREP HQ + Orange Vial
Регистрационное удостоверение №

СОСТАВ
NOVAPREP HQ + Orange Vial - 25 шт

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
☔ ↑↑

ИНСТРУКЦИЯ
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Для профессионального применения

2023-01-11
2025-01-11
REF NOV001N-500
LOT 110123
www.algimed-techno.com


ОПАСНО
IVD


ООО «АЛГИМЕД ТЕХНО»
Унитарное с ограниченной ответственностью «Алгимед Техно»
Адрес: 230090, Республика Беларусь, г. Минск, Логовский тракт 22/1, ком. 309
Адрес почтовый: 230090, г. Минск, ул. Солтыса, 167/В
Телефон: +375 29 893 16 66
Электронная почта: techno@algimed.com


Официальный представитель производителя на территории РФ: ООО «Цирми»
Общество с ограниченной ответственностью «Цирми»
125096, Россия, г. Москва, вл. 780, г. муниципальный округ Филинский район, ул. Вокзальная, дом 10Б, стр. 1, этаж 4/4/0

КОМ
БКС

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 500 образцов. NOVAPREP HQ + Orange Vial (флакон)

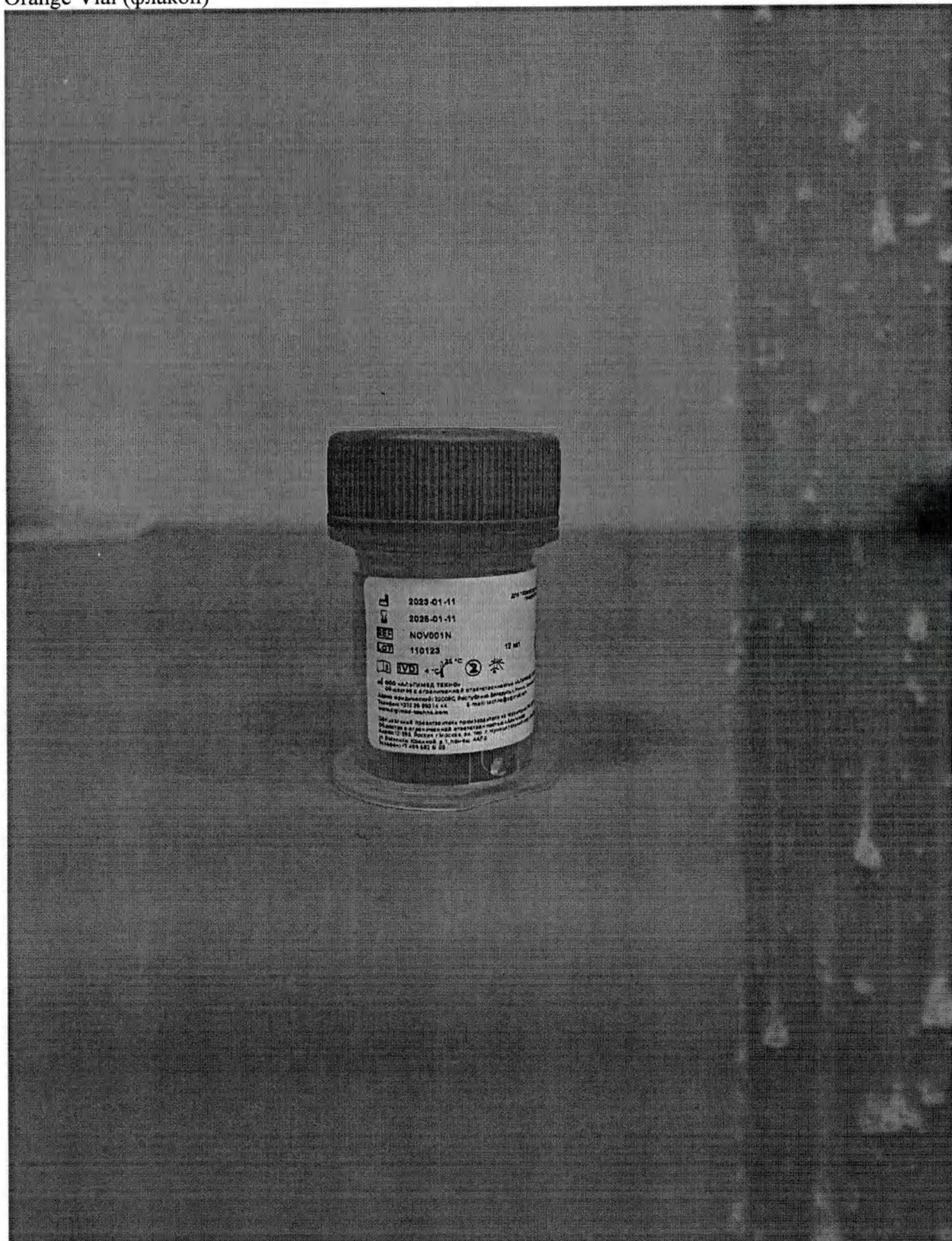

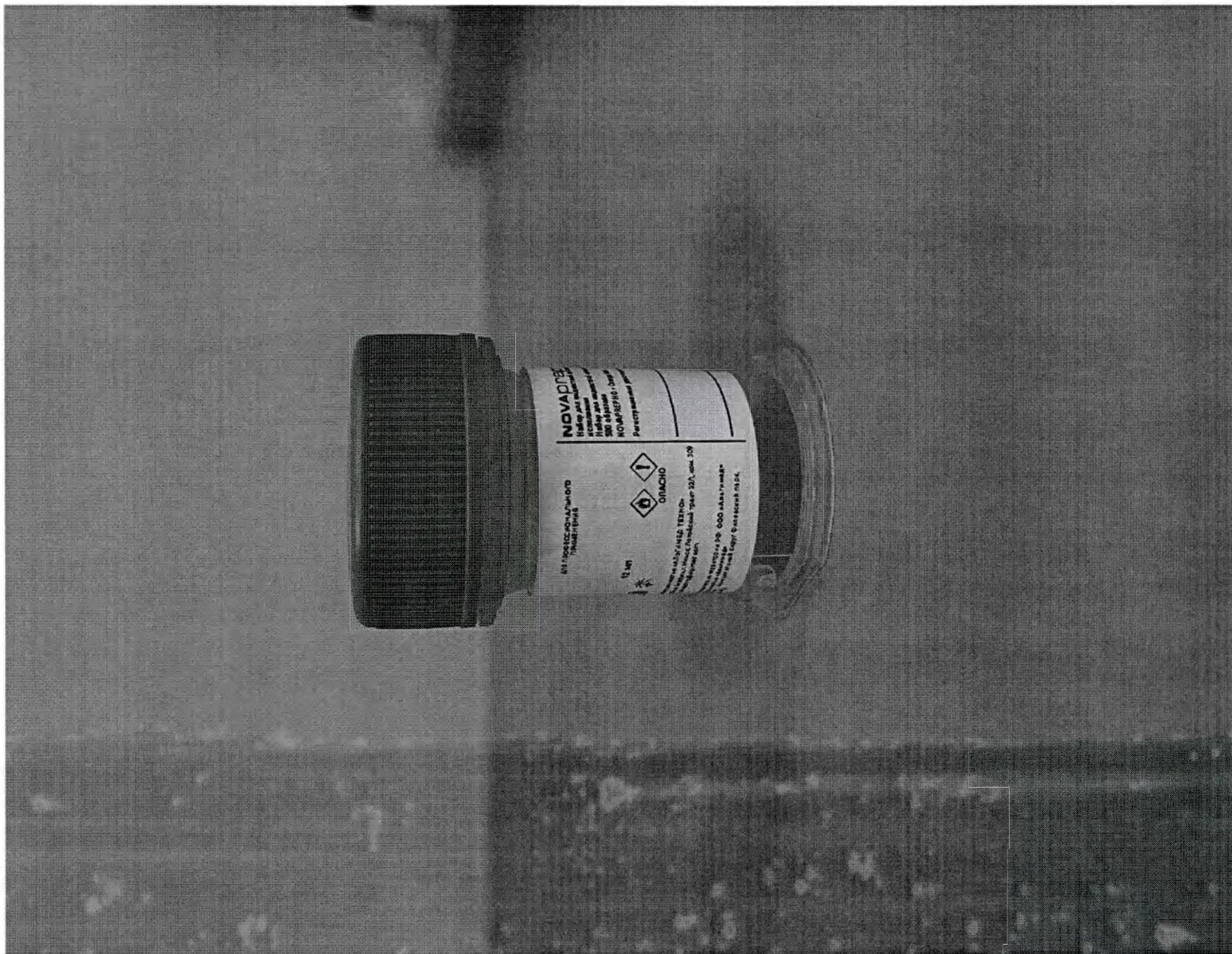

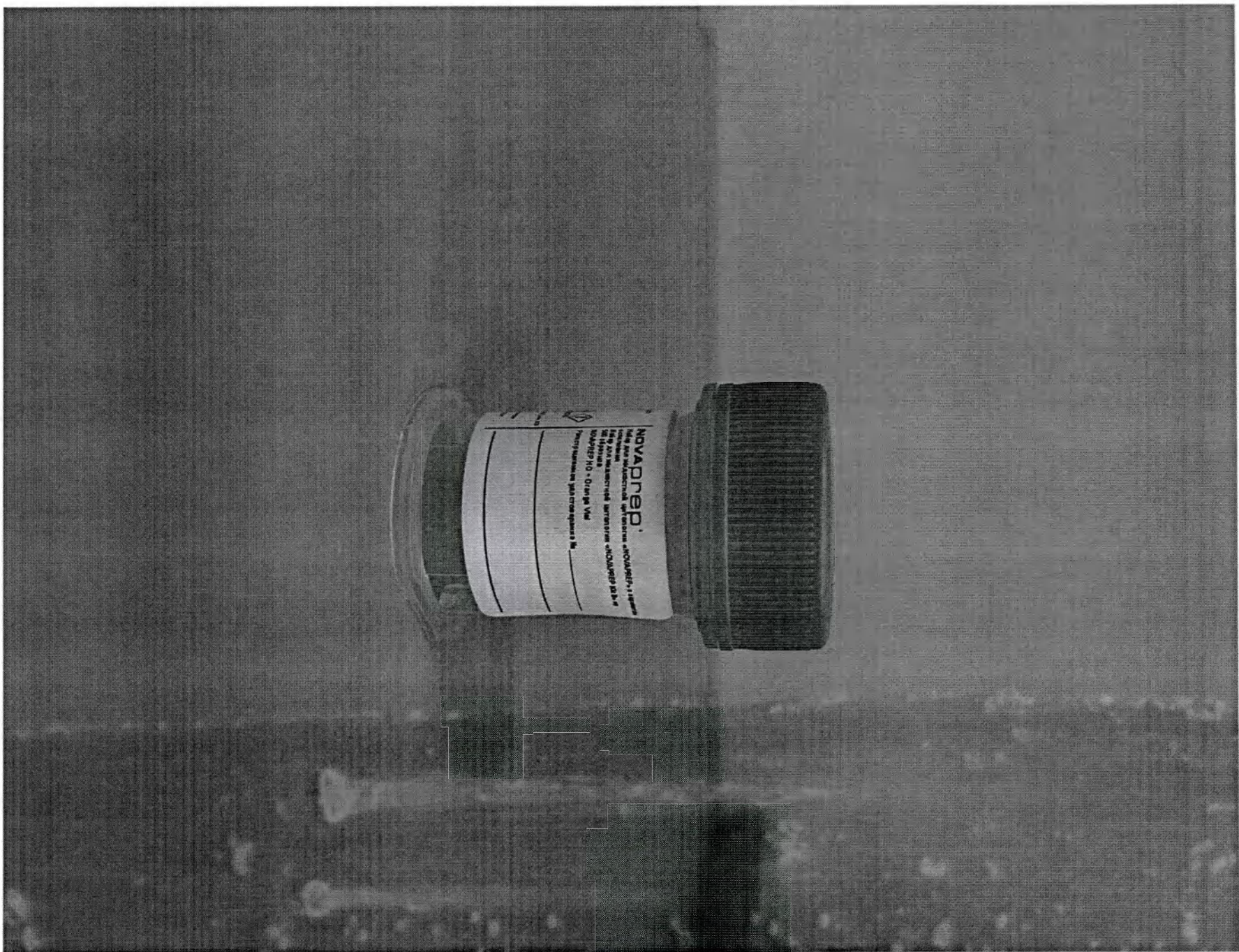

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 500 образцов. Инструкция по применению

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «Альгимед Техно»

Лютынский В.В.

« 09 » 10 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP»
в вариантах исполнения
Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 100, 500 образцов



ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Логойский, д. 12,
корп. 1 этаж 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 500 образцов. Паспорт качества

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ № 6 дата выдачи: 11.01.2023
---	--	--

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 500 образцов

Дата изготовления:	Номер партии:	Годеи до:	Срок хранения:
11.01.2023	110123	11.01.2025	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

1. NOVAPREP HQ + Orange Vial		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объем, мл	$12 \pm 2\%$	12
Электропроводность при 20 °C, мСм/см	$1,5 \pm 0,4$	1,45
Плотность при температуре 20 °C, г/мл	$0,95 \pm 0,02$	0,96

2. NOVAPREP Decantation Systems		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Без видимых нарушений	Без видимых нарушений
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Геометрические параметры блоттера	Длина блоттера, мм	243 ± 1
	Толщина блоттера по краю, мм отверстия	$0,6 \pm 0,2$
	Ширина блоттера, мм	$44 \pm 0,2$
	Толщина блоттера, мм	$1 \pm 0,1$
	Диаметр отверстия, мм	$19 \pm 0,25$
Геометрические параметры камер декантации	Длина спайки, мм	$237 \pm 1,2$
	Ширина спайки, мм	$30 \pm 0,28$
	Высота спайки, мм	$21 \pm 0,25$
	Диаметр внешней декантационной камеры, мм	$20 \pm 0,25$

2. NOVAPREP Decantation Systems			
Показатель		Характеристика	Результат контроля
Диаметр внутренней декантационной камеры, мм		$18 \pm 0,25$	18,12


Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit B» на 500 образцов **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества


Я.А.Бандык




Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 100 образцов (упаковка)

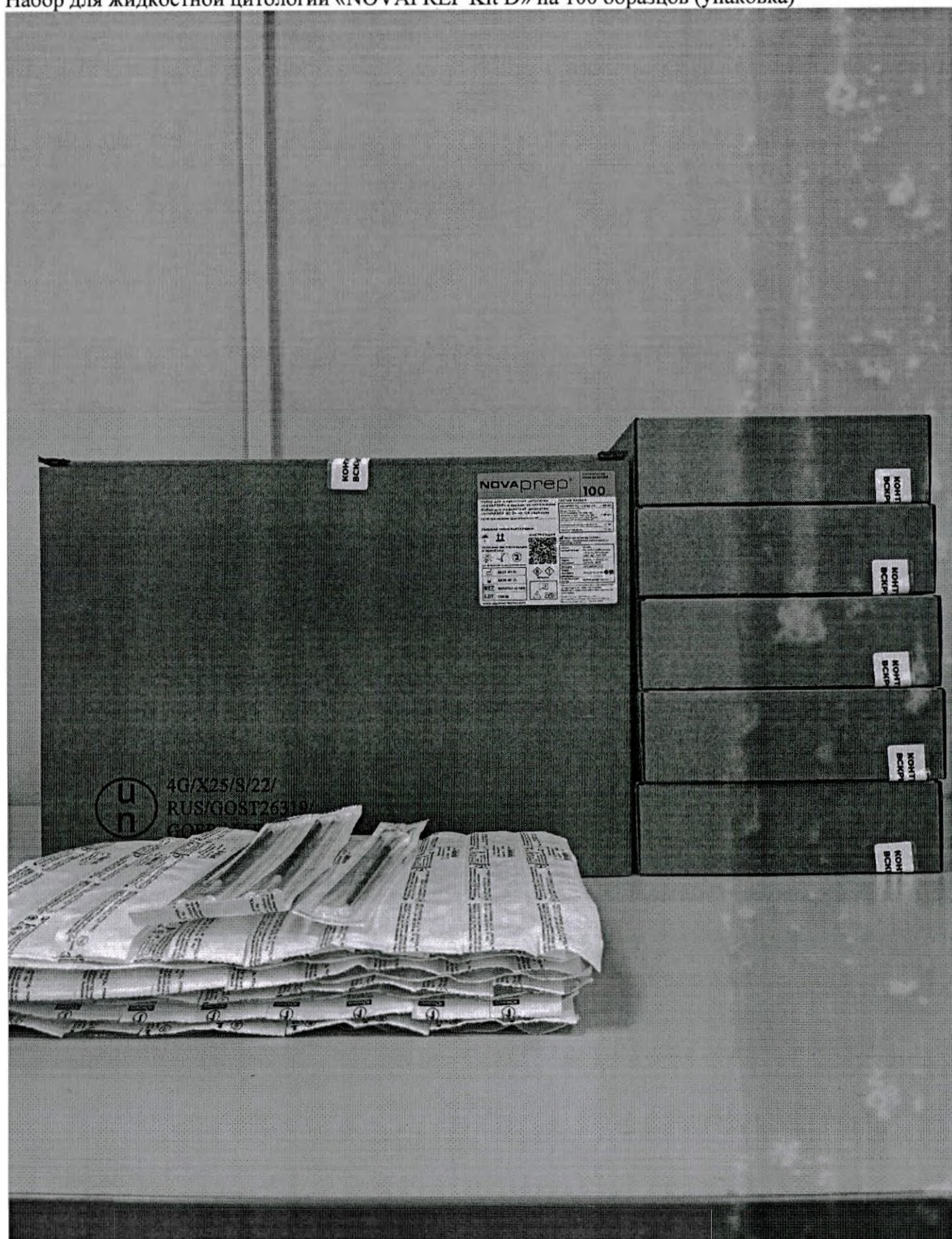


Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 100 образцов. NOVAPREP HQ + Orange Vial (упаковка)

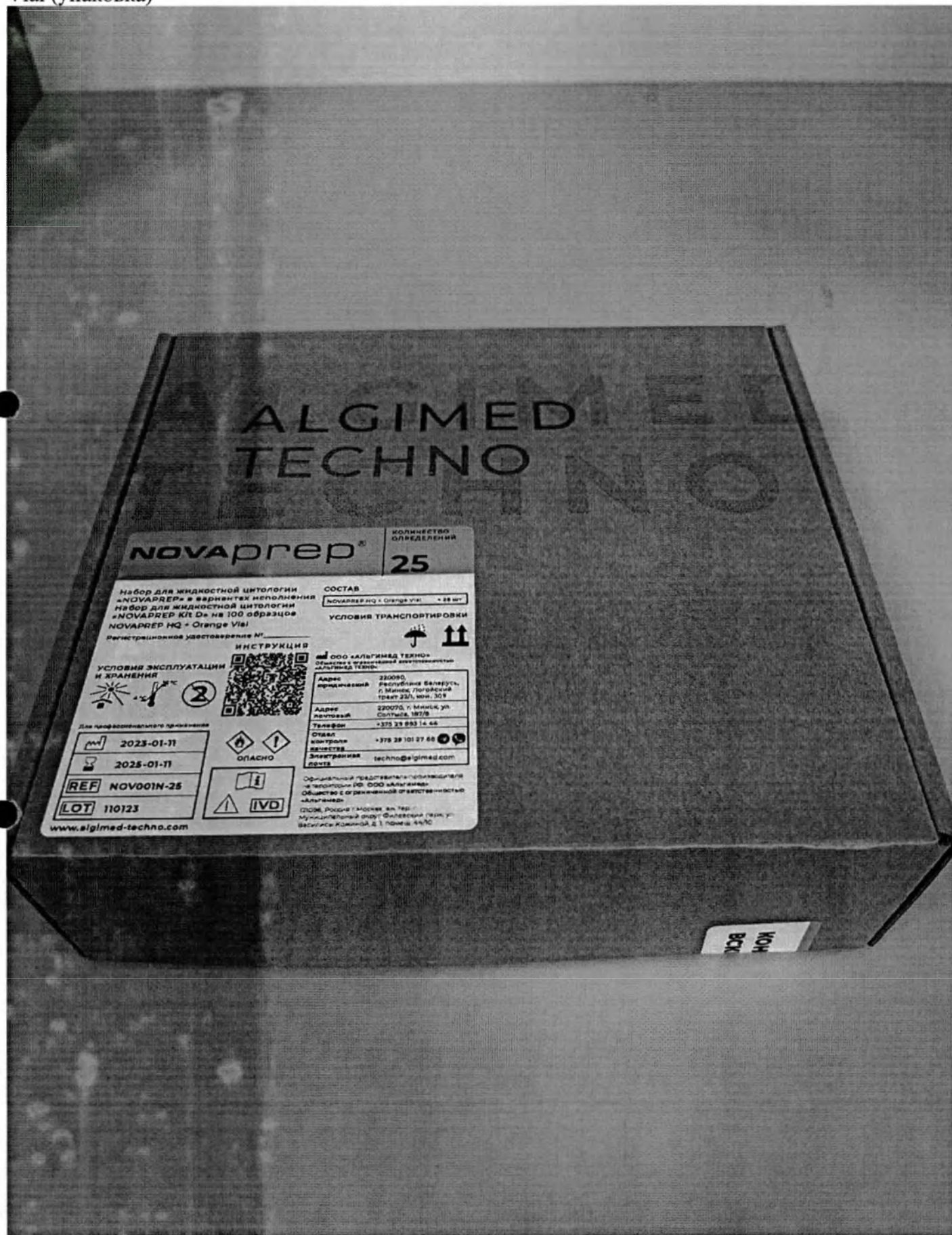


Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 100 образцов. NOVAPREP HQ + Orange Vial (флакон)

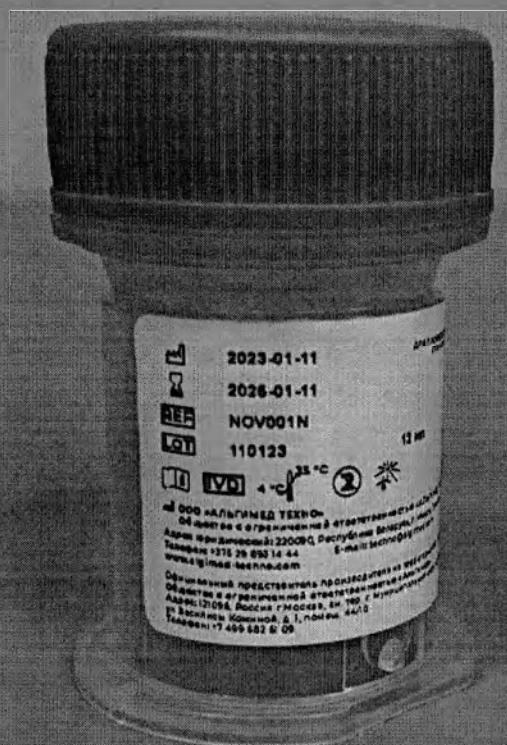

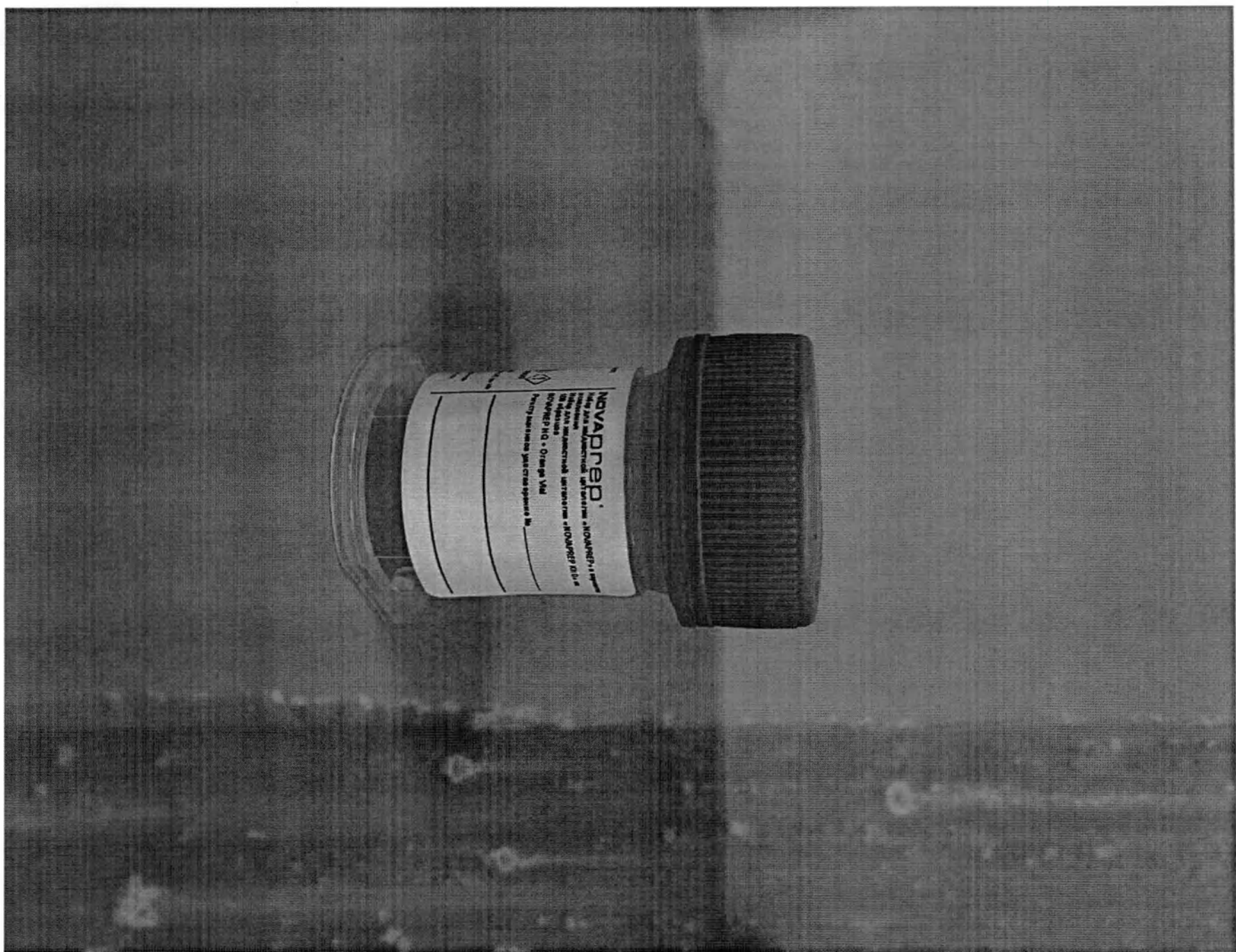

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 100 образцов. Зонды "Юнона" по ТУ
BY 300046934.013-2008, производитель ЗАО "Медицинское предприятие Симург", Республика
Беларусь, РУ № ФСЗ 2009/04877

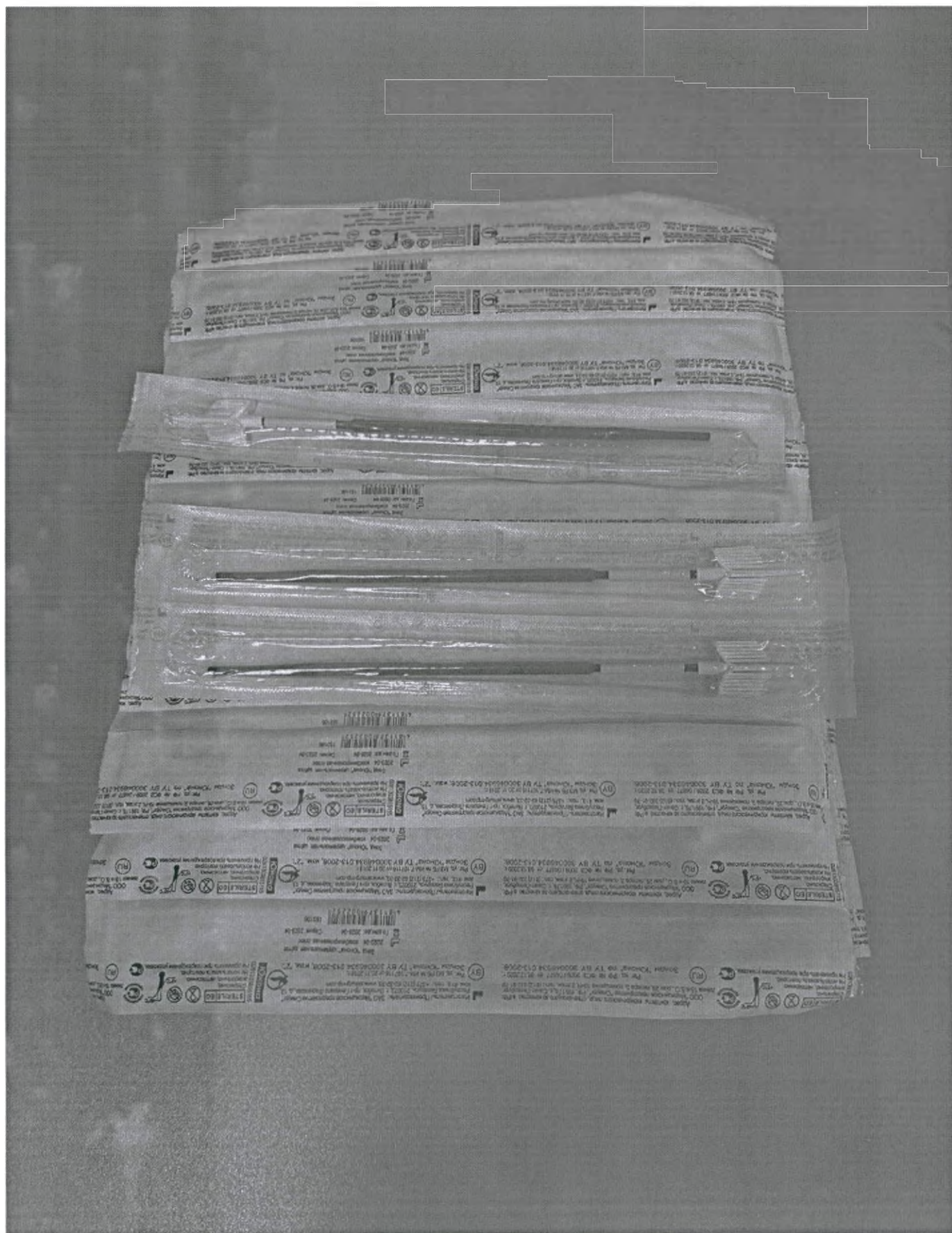

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 100 образцов. Инструкция по применению

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP»
в вариантах исполнения
Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 100, 500 образцов

ВНИМАНИЕ!
Изучите инструкцию перед
началом работы

ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Логойский, д.22,
итерп, комн. 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 100 образцов. Паспорт качества

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ № 190 дата выдачи: 11.01.2023
---	--	--

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 100 образцов

Дата изготовления:	Номер партии:	Годен до:	Срок хранения:
11.01.2023	110123	11.01.2025	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ


1. NOVAPREP HQ + Orange Vial		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объем, мл	$12 \pm 2\%$	12
Электропроводность при 20 °C, мСм/см	$1,5 \pm 0,4$	1,45
Плотность при температуре 20 °C, г/мл	$0,95 \pm 0,02$	0,96

2. Зонды "Юнона" по ТУ ВУ 300046934.013-2008, производитель ЗАО "Медицинское предприятие Симург", Республика Беларусь, РУ № ФСЗ 2009/04877		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Без видимых нарушений	Без видимых нарушений
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.


Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 100 образцов
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества

Я.А.Бандык

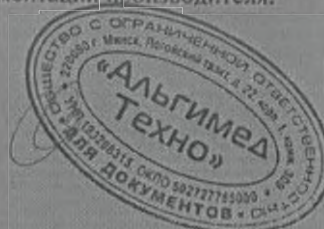


Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 500 образцов (упаковка)

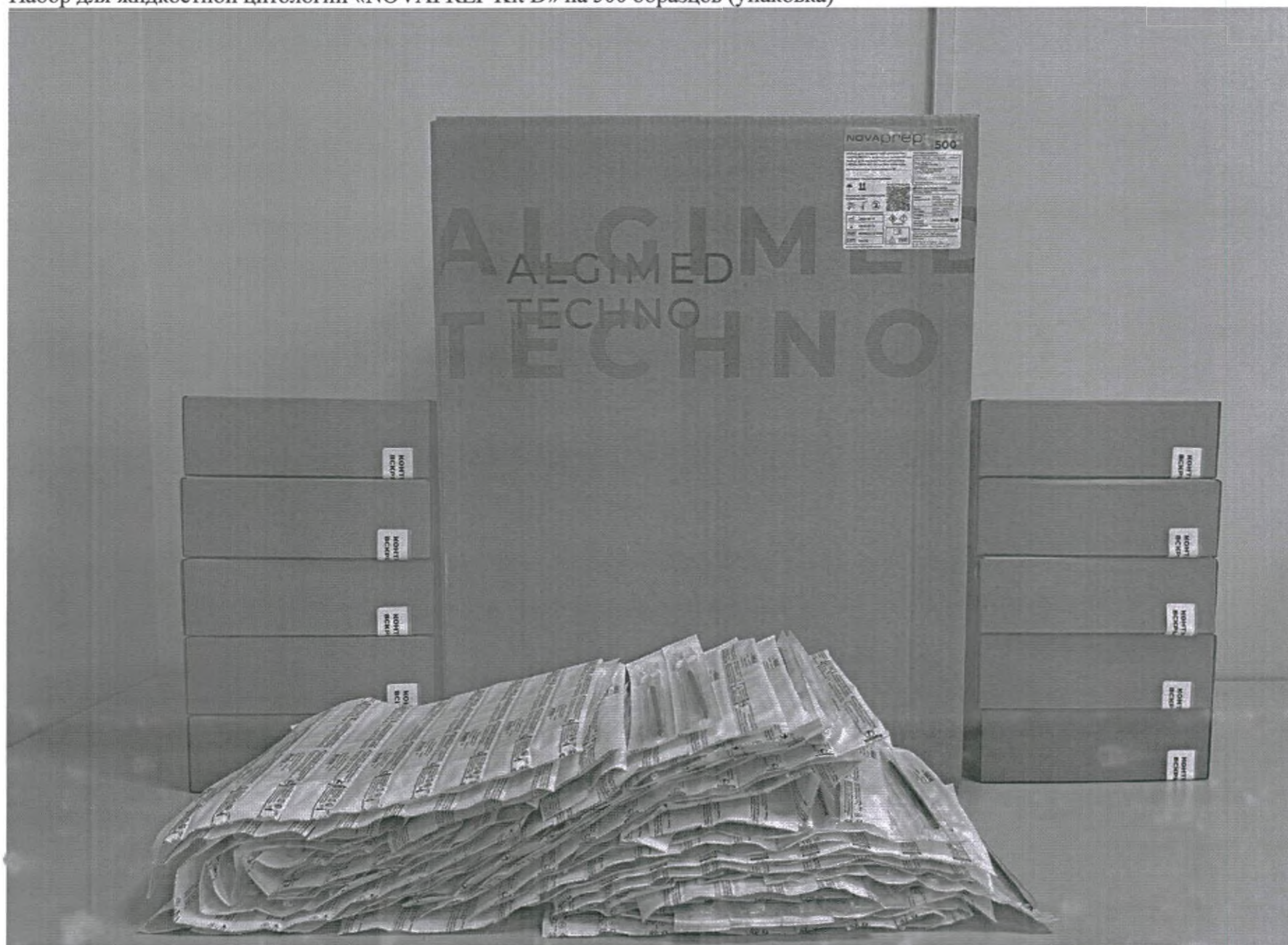



Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 500 образцов. NOVAPREP HQ + Orange Vial (упаковка)




Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 500 образцов. NOVAPREP HQ + Orange Vial (флакон)

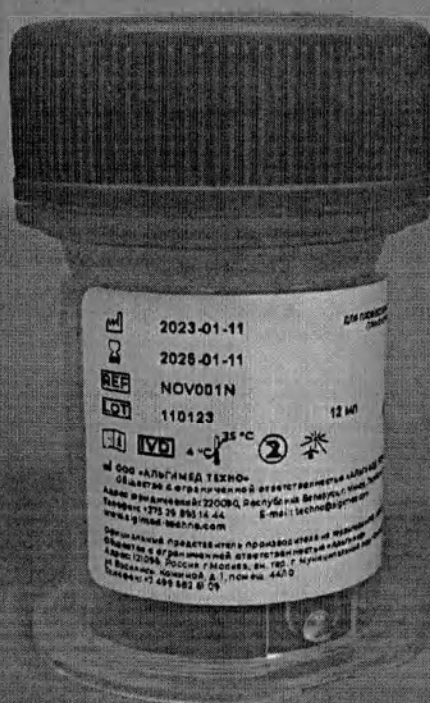

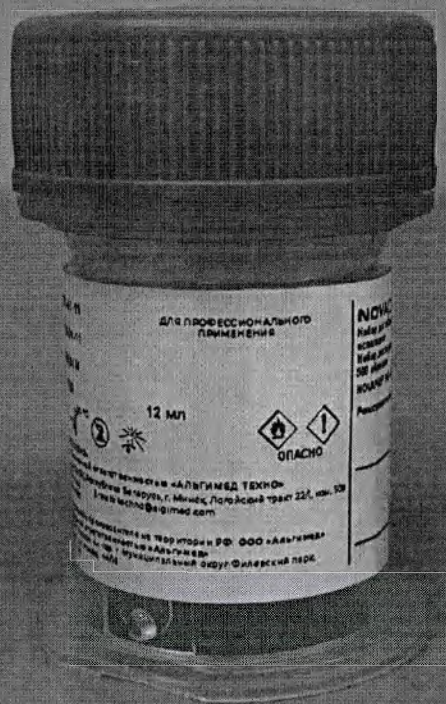

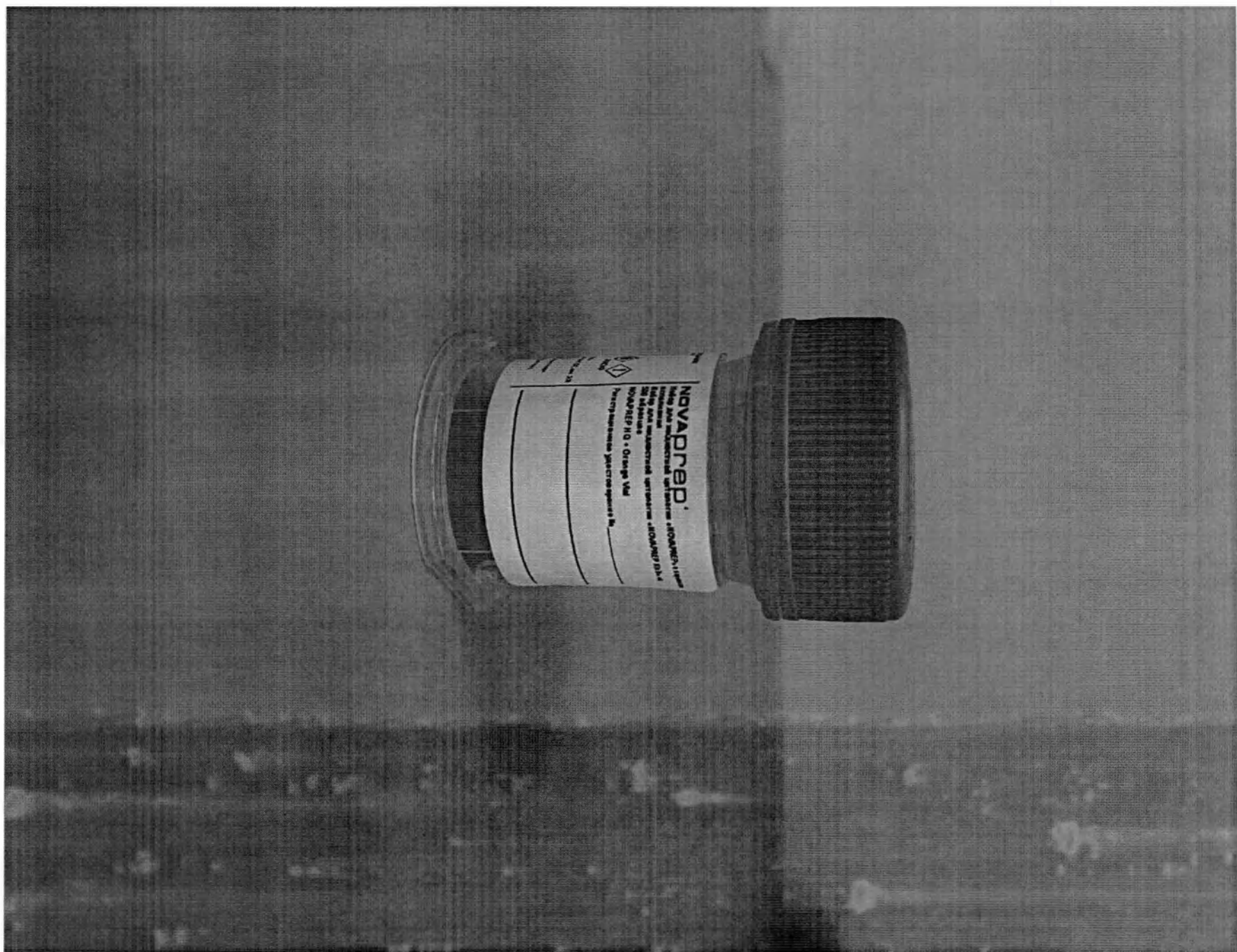

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 500 образцов. Зонды "Юнона" по ТУ ВУ 300046934.013-2008, производитель ЗАО "Медицинское предприятие Сатурн", Республика Беларусь, РУ № ФСЗ 2009/04877

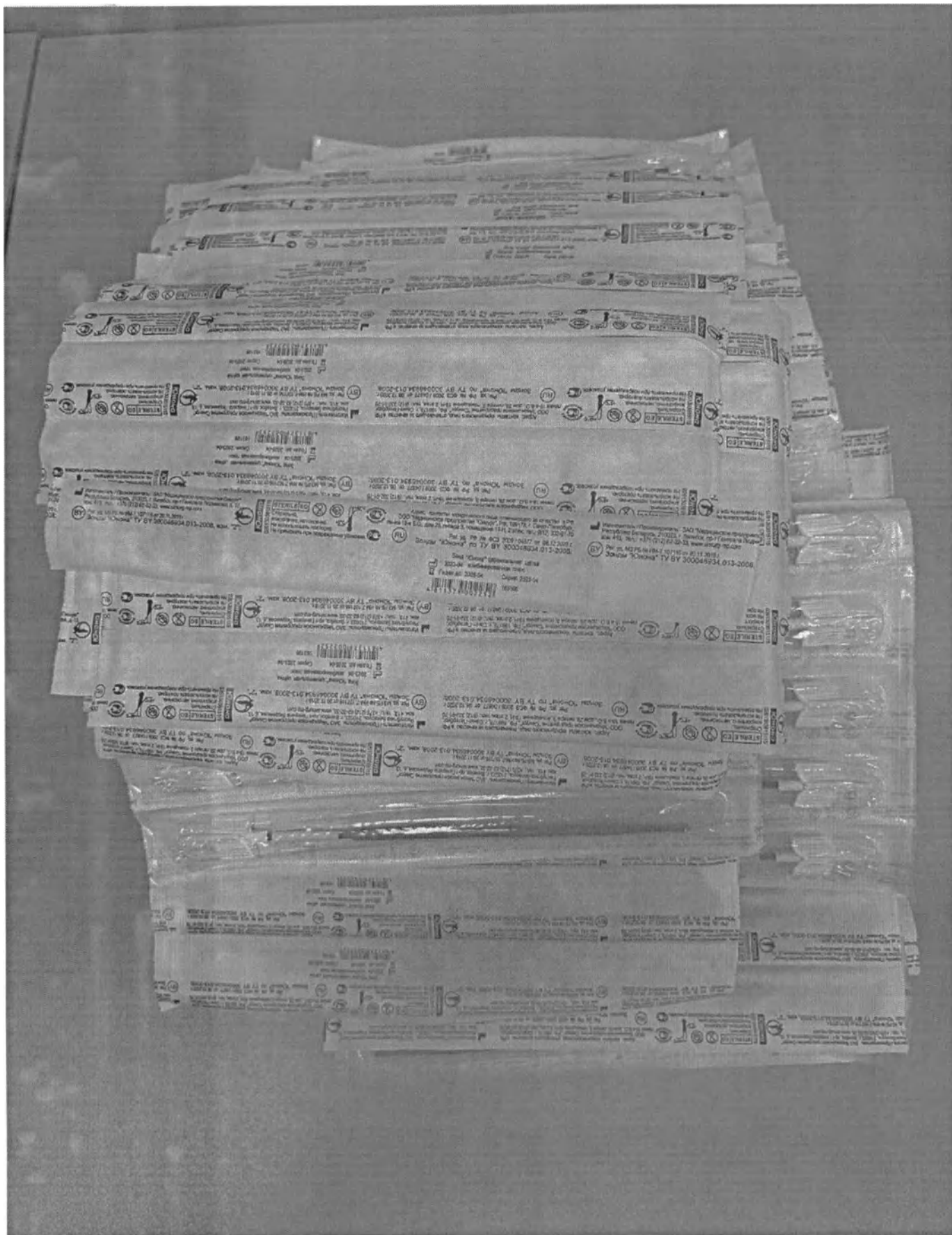

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 500 образцов. Инструкция по применению

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ



« 09 » 10 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP»
в вариантах исполнения
Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 100, 500 образцов

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы


ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь
г. Минск, тр. Полевиков, д.22,
корп.1, ком. 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ № 191 дата выдачи: 11.01.2023
---	--	--

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 500 образцов

Дата изготовления:	Номер партии:	Годе до:	Срок хранения:
11.01.2023	110123	11.01.2025	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ


1. NOVAPREP HQ + Orange Vial		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объем, мл	12 ± 2%	12
Электропроводность при 20 °С, мСм/см	1,5 ± 0,4	1,45
Плотность при температуре 20 °С, г/мл	0,95 ± 0,02	0,96
2. Зонды "Юнона" по ТУ ВУ 300046934.013-2008, производитель ЗАО "Медицинское предприятие Симург", Республика Беларусь, РУ № ФСЗ 2009/04877		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Без видимых нарушений	Без видимых нарушений
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP Kit D» на 500 образцов
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества

Я.А.Бандык




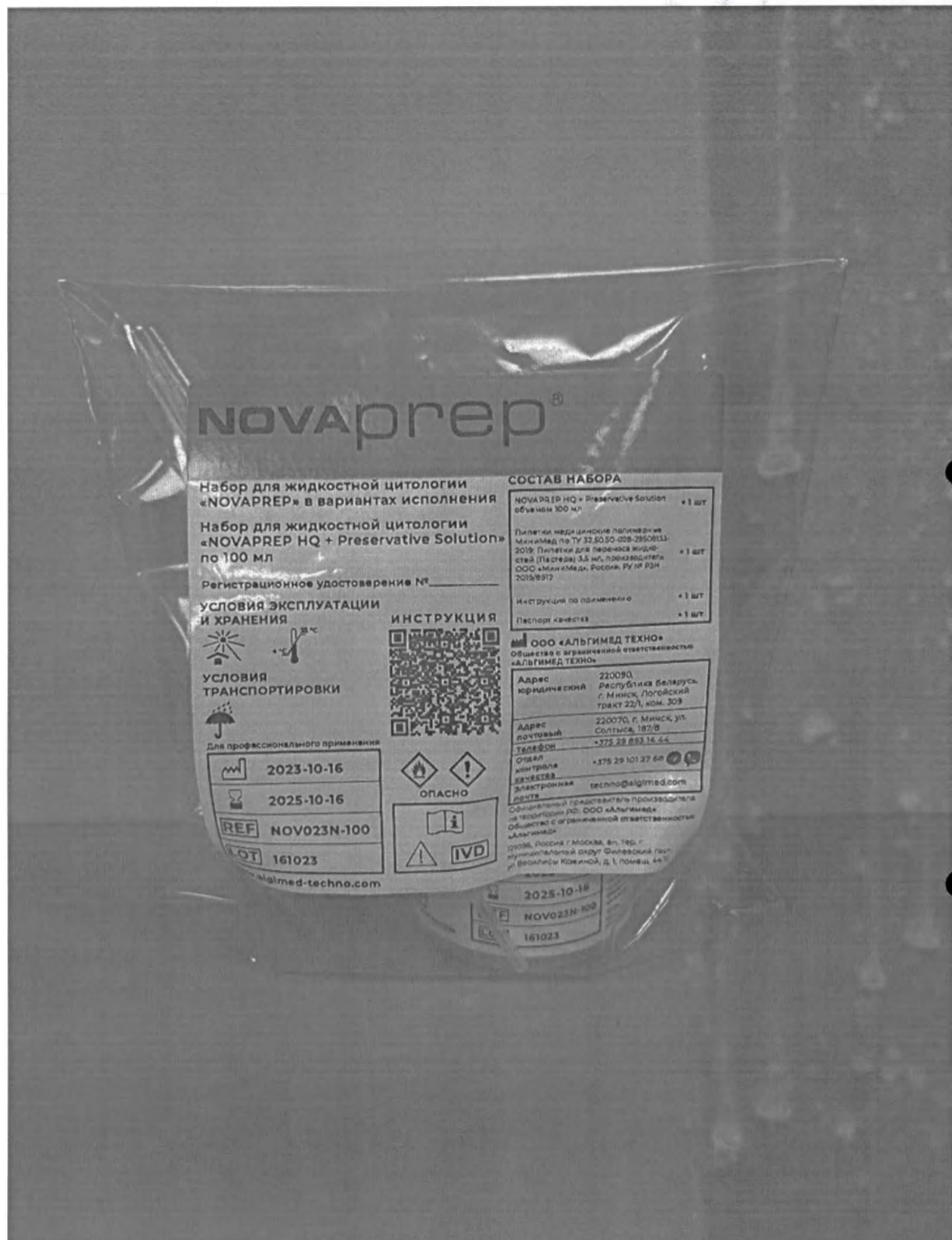

**Набор для жидкостной цитологии
«NOVAPREP» в вариантах исполнения**
**Набор для жидкостной цитологии
«NOVAPREP HQ + Preservative Solution»
по 100 мл**

Регистрационное удостоверение № _____

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ХРАНЕНИЯ**

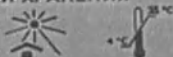

**УСЛОВИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ**



Для профессионального применения

	2023-10-16
	2025-10-16
REF	NOV023N-100
LOT	161023

alimed-techno.com

ИНСТРУКЦИЯ



СОСТАВ НАБОРА

NOVAPREP HQ + Preservative Solution объемом 100 мл	× 1 шт
Пилетки медицинские поликарбонатные МиниМед по ТУ 32.60.50-028-29508133- 2019; Пилетки для переноса жидко- стей (Пастера) 3,5 мл, производитель ООО «МиниМед», Россия, Р/ИР Р3Н 2019/8912	× 1 шт
Инструкция по применению	× 1 шт
Паспорт качества	× 1 шт

ООО «АЛЬГИМЕД ТЕХНО»

Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬГИМЕД ТЕХНО»

Адрес юридический	220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309
Адрес почтовый	220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187/Б
Телефон	+375 29 853 16 64
Отдел контроля качества	+375 29 101 27 64
Электронная почта	techno@alimed.com

Образовательный представитель производителя
на территории РБ: ООО «Альгимед»
Общество с ограниченной ответственностью
«Альгимед»


220096, Россия, г. Москва, вл. ТОО, с
муниципальной округой Филинский парк,
ул. Вешняковская, д. 1, пом. 44/1


2025-10-16

NOV023N-100


161023

Набор для жидкостной цитологии NOVAPREP HQ + Preservative Solution по 100 мл.
NOVAPREP HQ + Preservative Solution» объемом 100 мл.

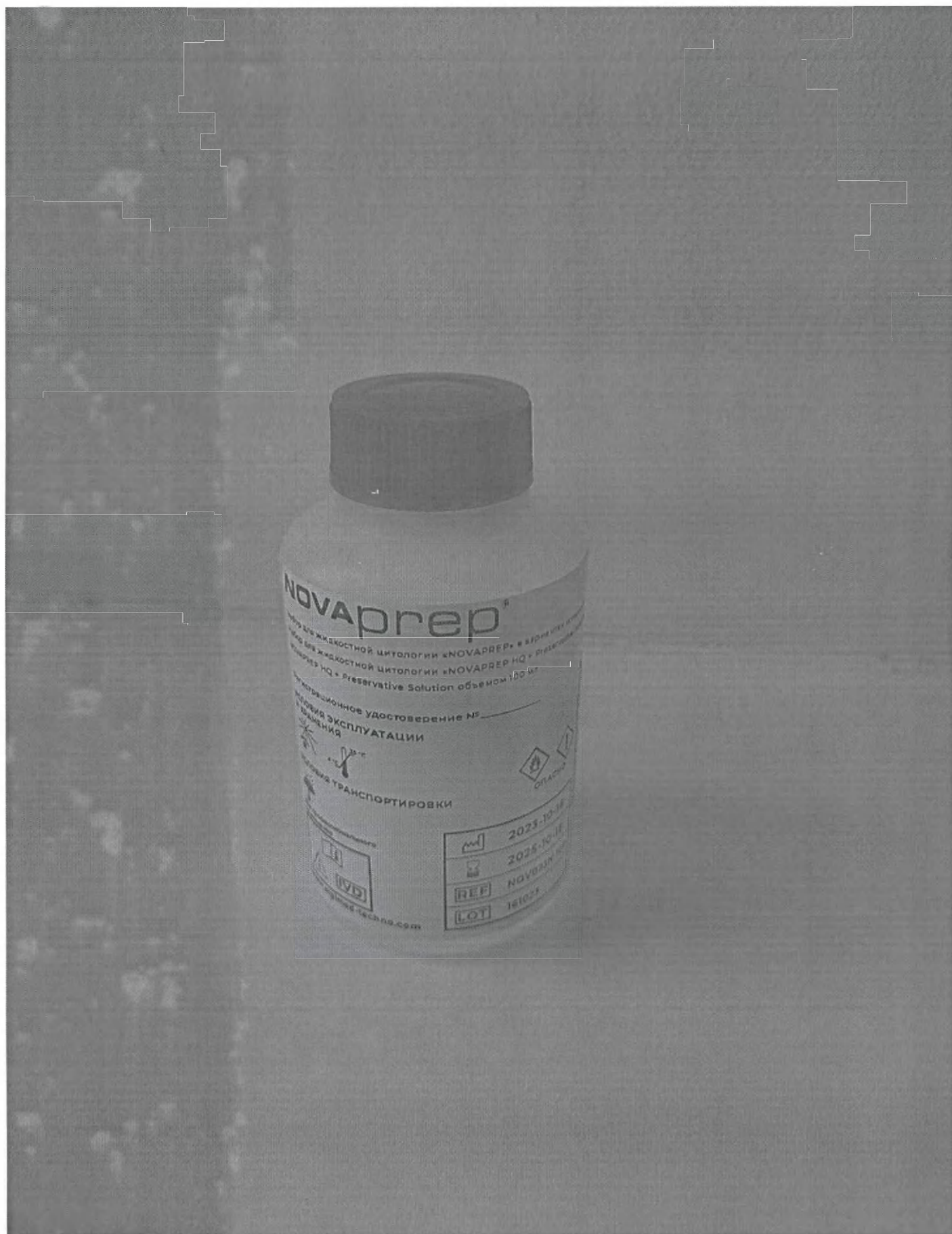

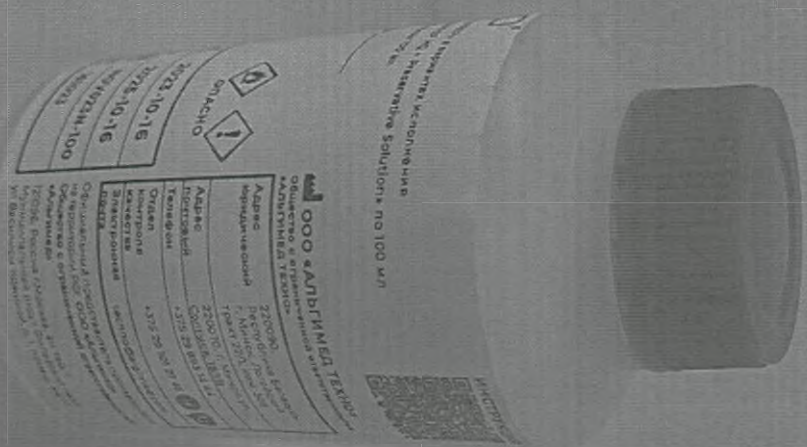

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 100 мл. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 3,5 мл, производитель ООО «МиниМед», Россия, РУ № РЗН 2019/8912

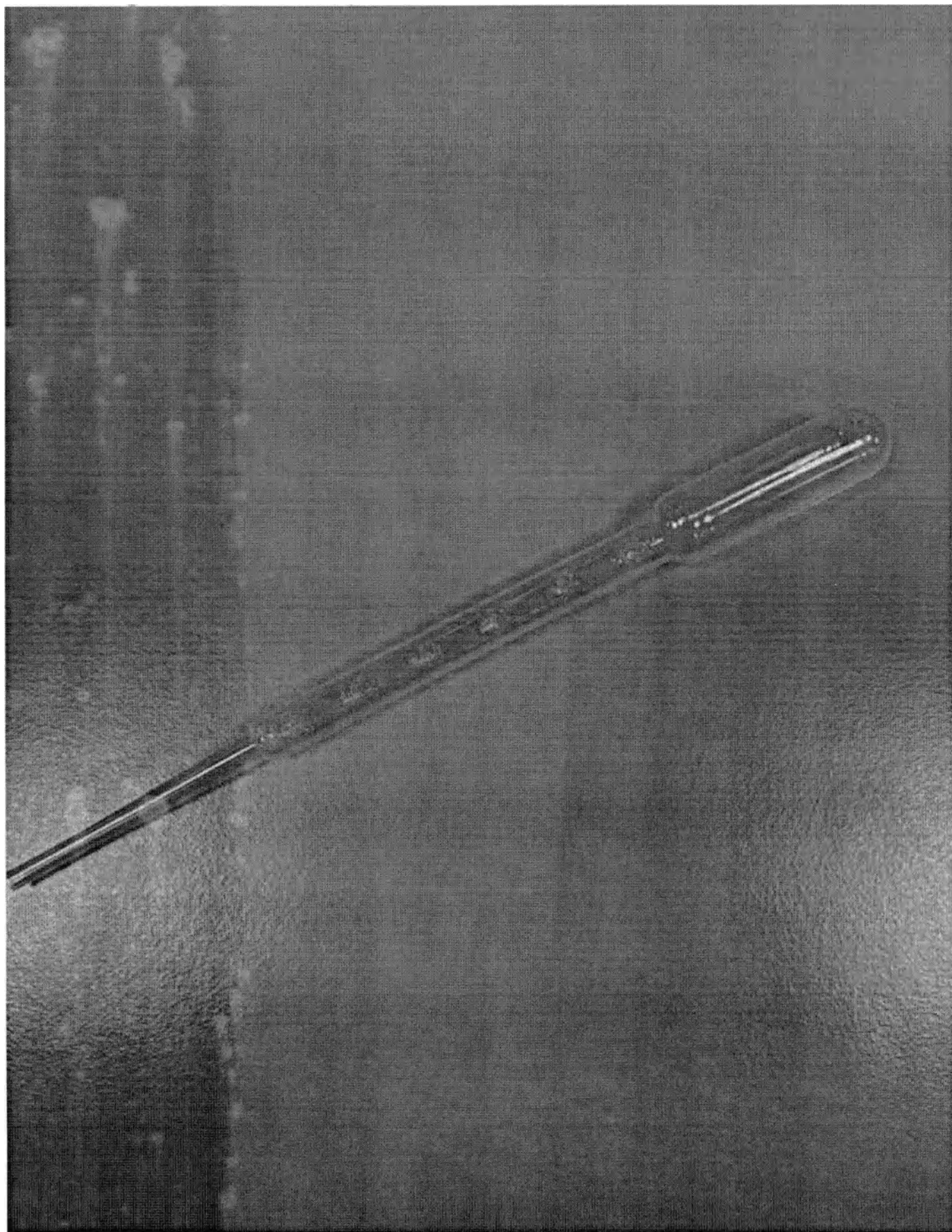

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 100 мл.
Инструкция по применению

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Льотынский В.В.

10 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP»

в вариантах исполнения

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 100 мл,
по 500 мл, по 1000 мл

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы


ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Латышский, д.22,
корп.1, пом. 509

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 100 мл. Паспорт качества

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ № 191 дата выдачи: 16.10.2023
---	--	--

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 100 мл

Дата изготовления:	Номер партии:	Годен до:	Срок хранения:
16.10.2023	161023	16.10.2025	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ


1. NOVAPREP HQ + Preservative Solution		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объем, мл	100 ± 2%	100
Электропроводность при 20 °С, мСм/см	1,5 ± 0,4	1,6
Плотность при температуре 20 °С, г/мл	0,95 ± 0,02	0,96
2. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 3,5 мл, производитель ООО «МиниМед», Россия, РУ № РЗН 2019/8912		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Без видимых нарушений	Без видимых нарушений
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 100 мл
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технической документации производителя.


Специалист отдела


А.Г. Грицкевич



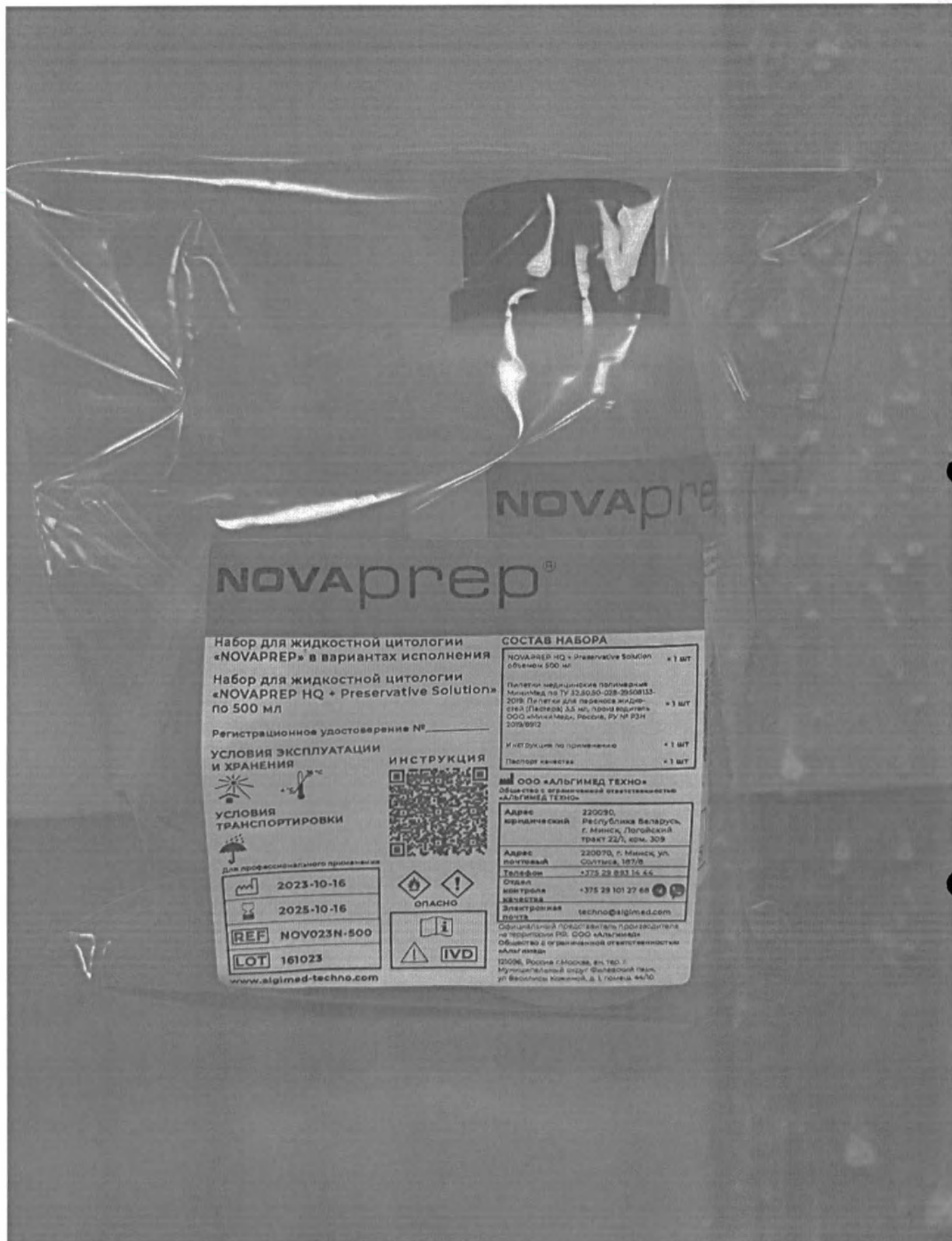

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 500 мл.
NOVAPREP HQ + Preservative Solution» объемом 500 мл

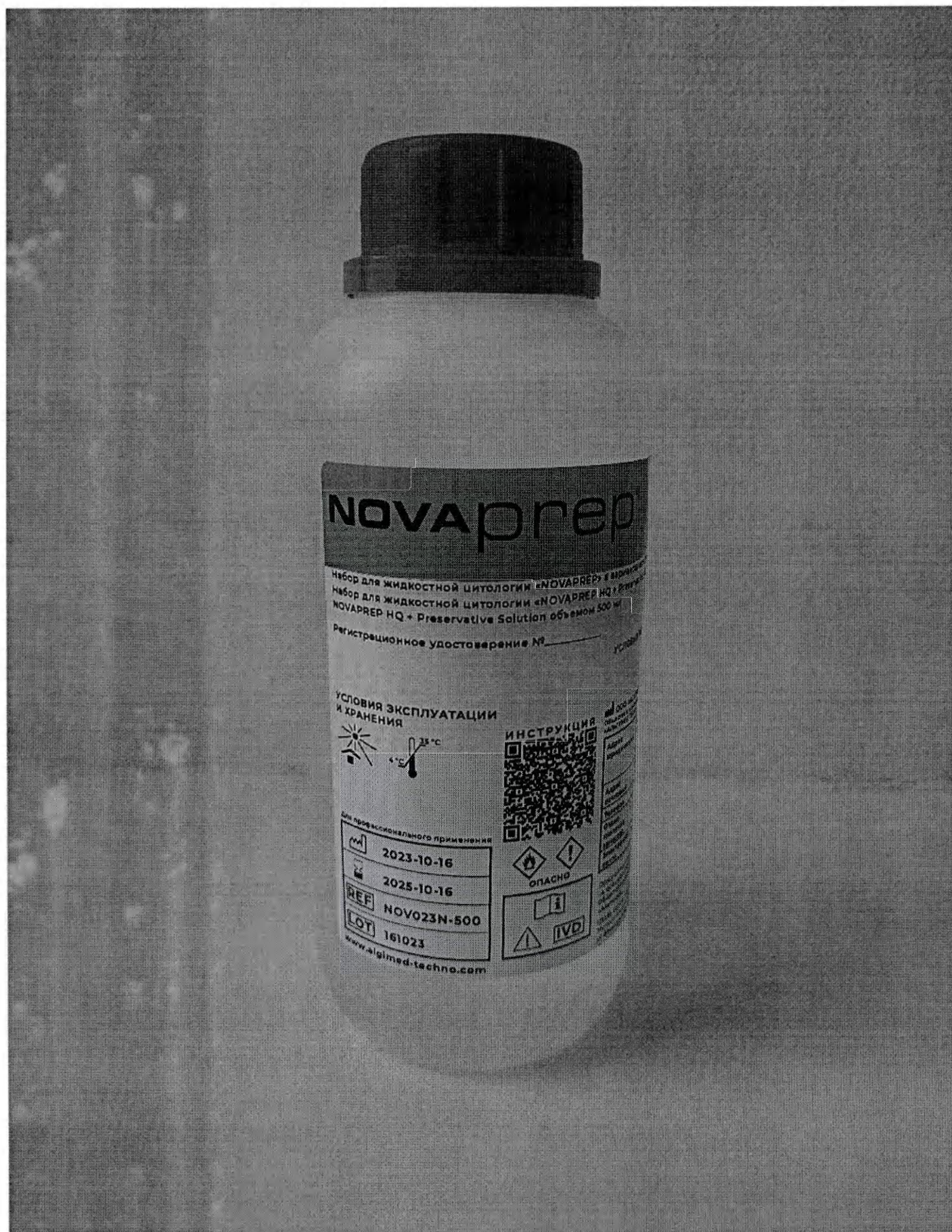

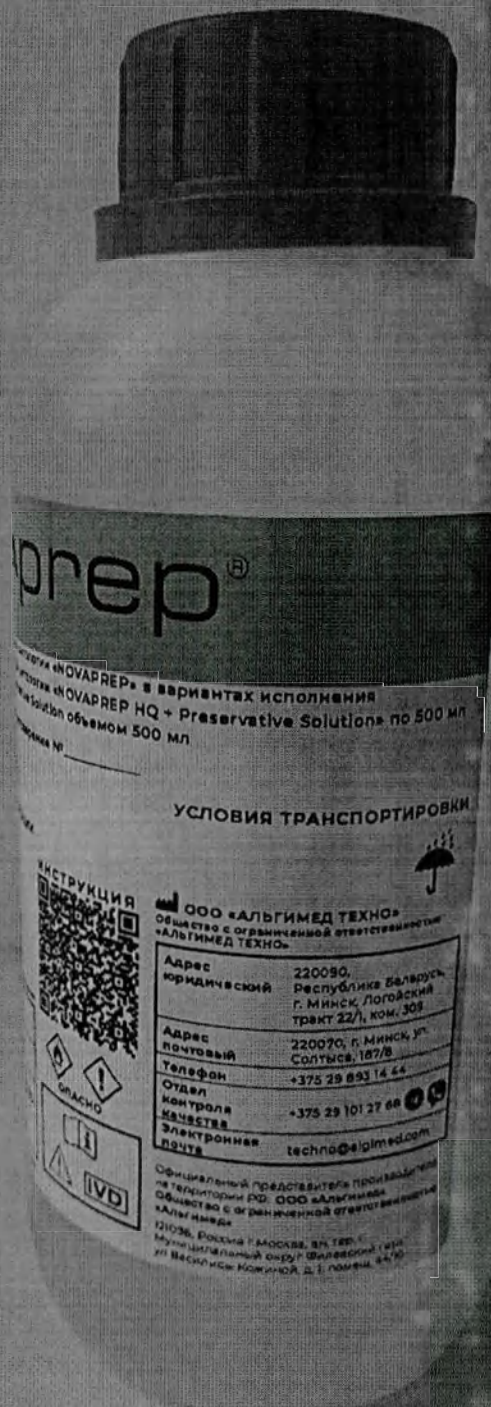

novaprep®

«NOVAPREP» в вариантах исполнения
«NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 500 мл
«Novaprep Solution» объемом 500 мл

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИНСТРУКЦИЯ




ООО «АЛЬГИМЕД ТЕХНО»
Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬГИМЕД ТЕХНО»

Адрес юридический	220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 308
Адрес почтовый	220070, г. Минск, ул. Солтыса, 18/8
Телефон	+375 29 693 14 44
Отдел контроля качества	+375 29 101 27 68
Электронная почта	techno@alpmid.com

Официальный представитель производителя
на территории РФ: ООО «Альгимед»
Общество с ограниченной ответственностью
«Альгимед»
121036, Россия г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Филимонское (г.м.)
ул. Вассилиса Кожиной, д.1, пом. 45/50

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 500 мл. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 3,5 мл, производитель ООО «МиниМед», Россия, РУ № РЗН 2019/8912.

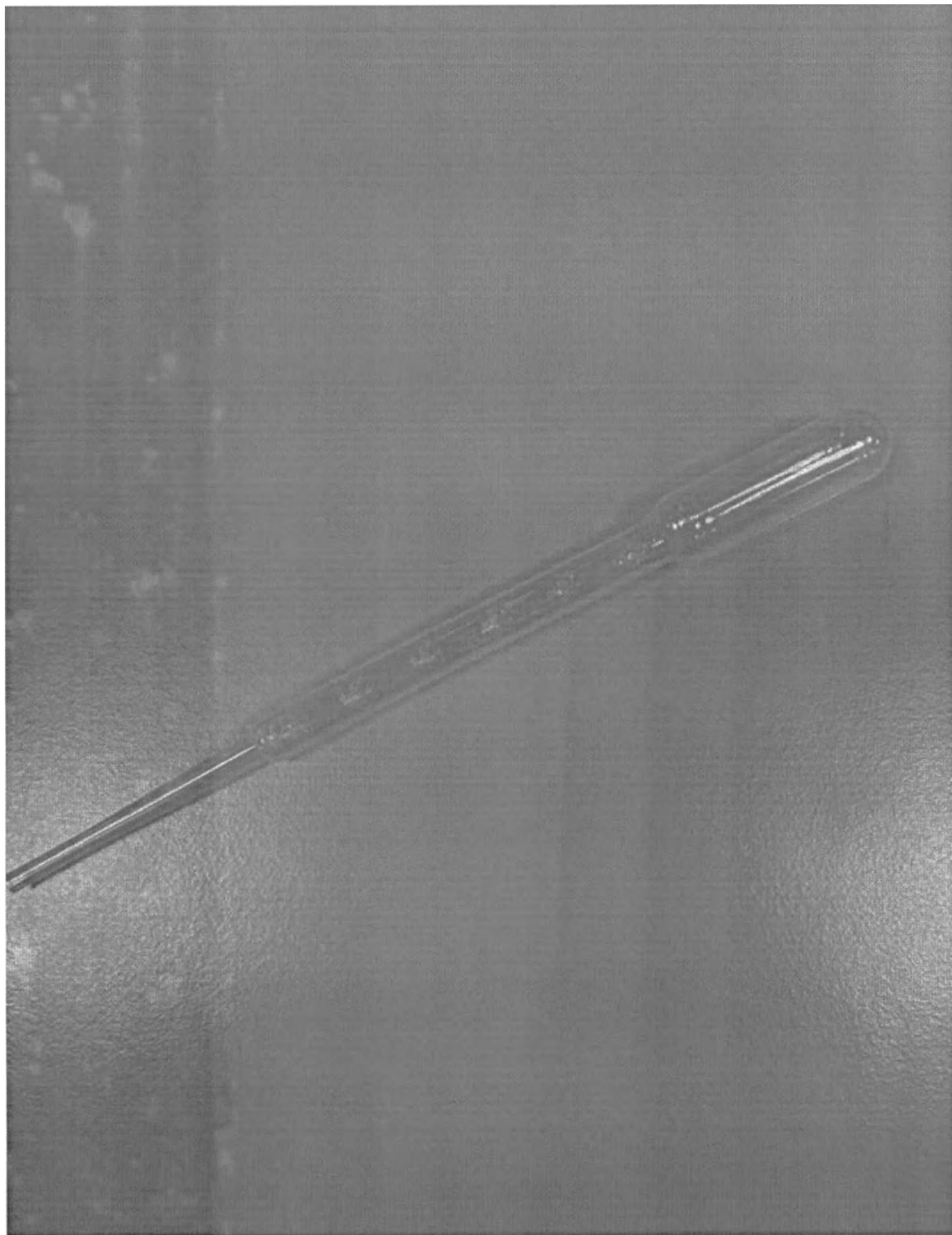

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 500 мл.
Инструкция по применению

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Лютынский В.В.

10 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP»
в вариантах исполнения
Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 100 мл,
по 500 мл, по 1000 мл

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы


ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Лютынский д.22,
кварт. 1, этаж 303

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 500 мл. Паспорт качества

220090, Республика Беларусь, г.
Минск, Логойский тракт, 22/1,
комната 309

тел: +375 29 893 14 44
e-mail: techno@algimed.com
сайт: www.algimed-techno.com

ПАСПОРТ № 192
дата выдачи: 16.10.2023

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 500 мл

Дата изготовления:	Номер партии:	Годен до:	Срок хранения:
16.10.2023	161023	16.10.2025	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

1. NOVAPREP HQ + Preservative Solution		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объем, мл	500 ± 2%	500,5
Электропроводность при 20 °С, мСм/см	1,5 ± 0,4	1,6
Плотность при температуре 20 °С, г/мл	0,95 ± 0,02	0,96


2. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019; Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 3,5 мл, производитель ООО «МиниМед», Россия, РУ № РЗН 2019/8912		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Без видимых нарушений	Без видимых нарушений
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 500 мл
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технической документации производителя.


Специалист отдела
А.Г. Грицкевич




Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 1000 мл.

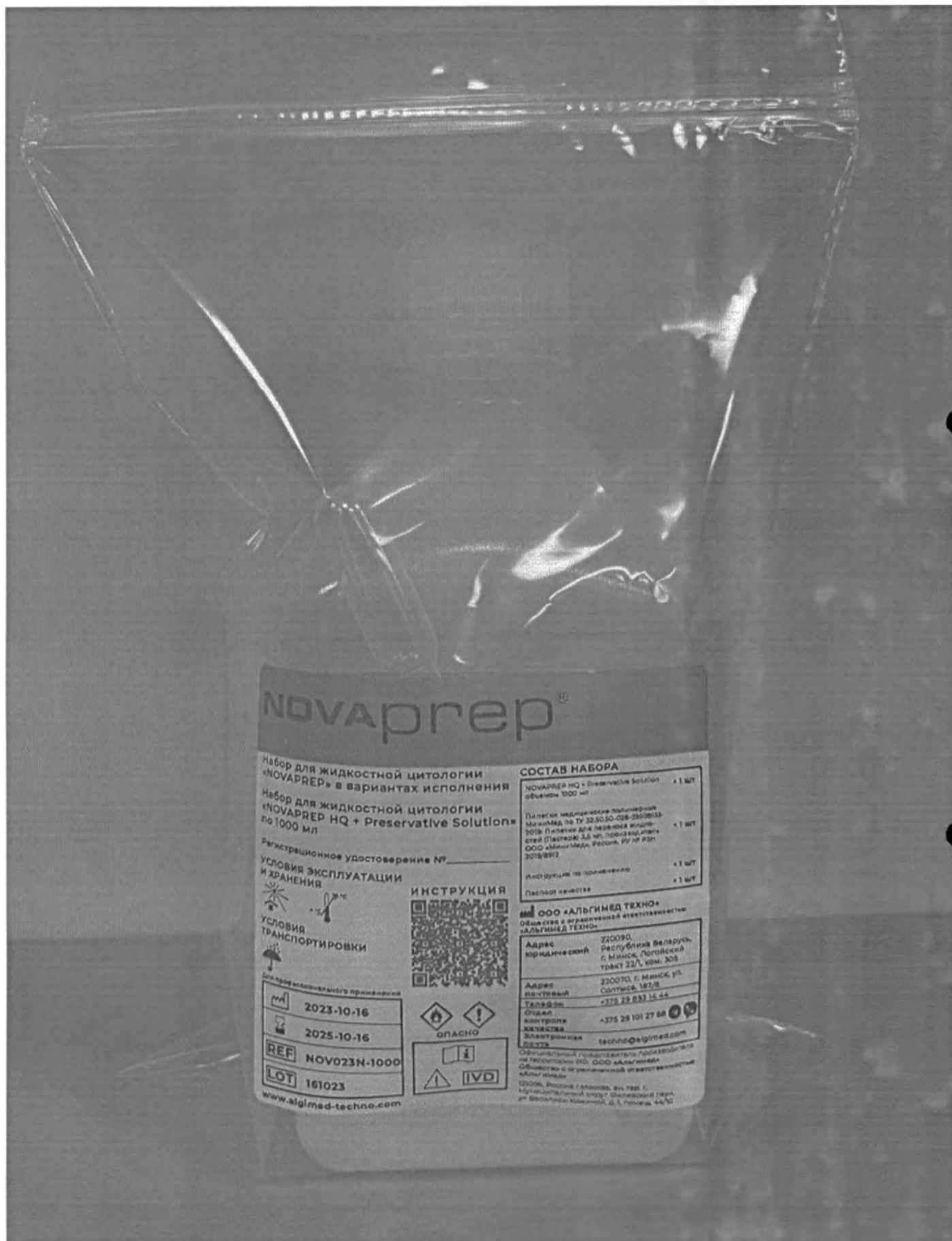

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 1000 мл.
NOVAPREP HQ + Preservative Solution» объемом 1000 мл

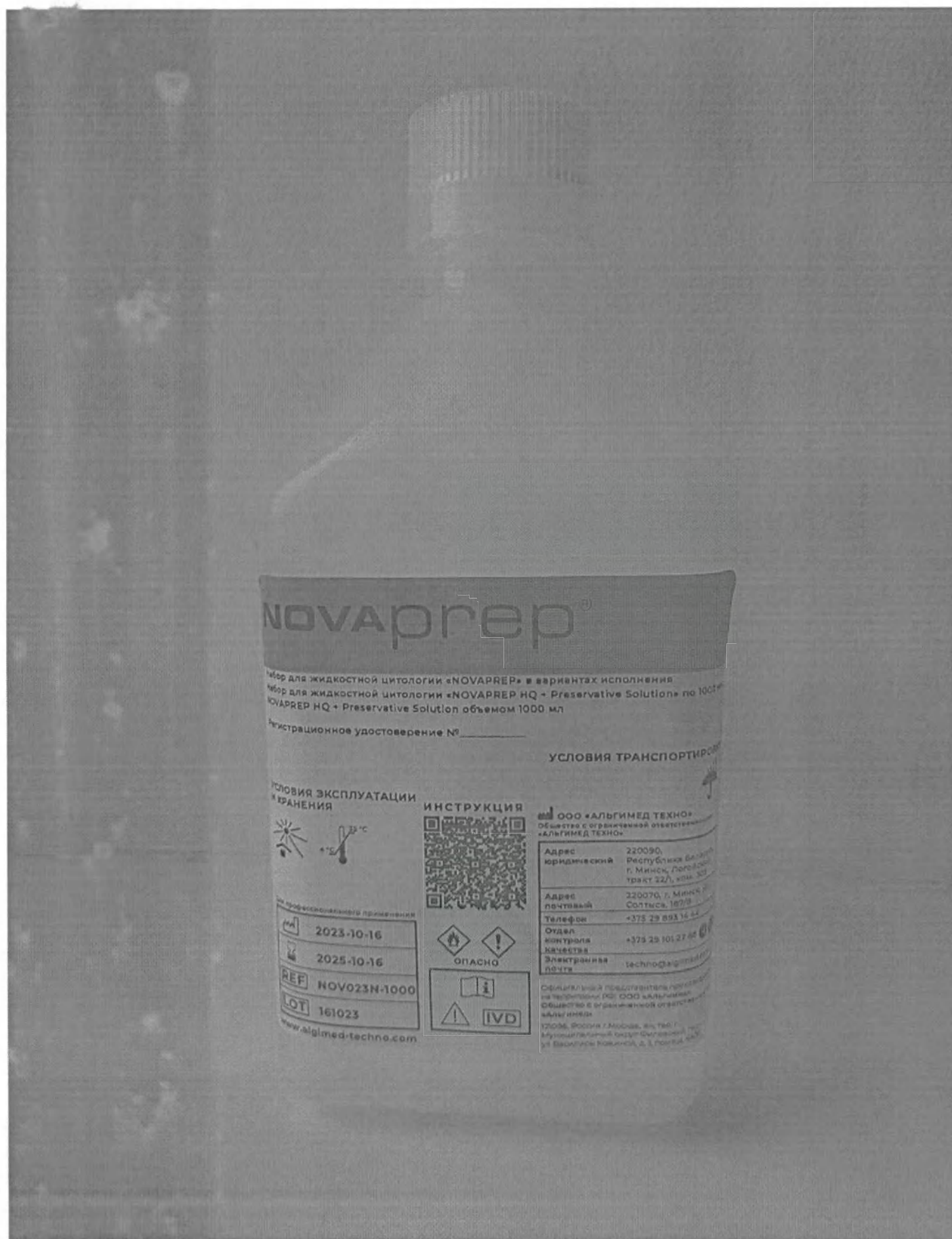

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 1000 мл. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 3,5 мл, производитель ООО «МиниМед», Россия, РУ № РЗН 2019/8912.

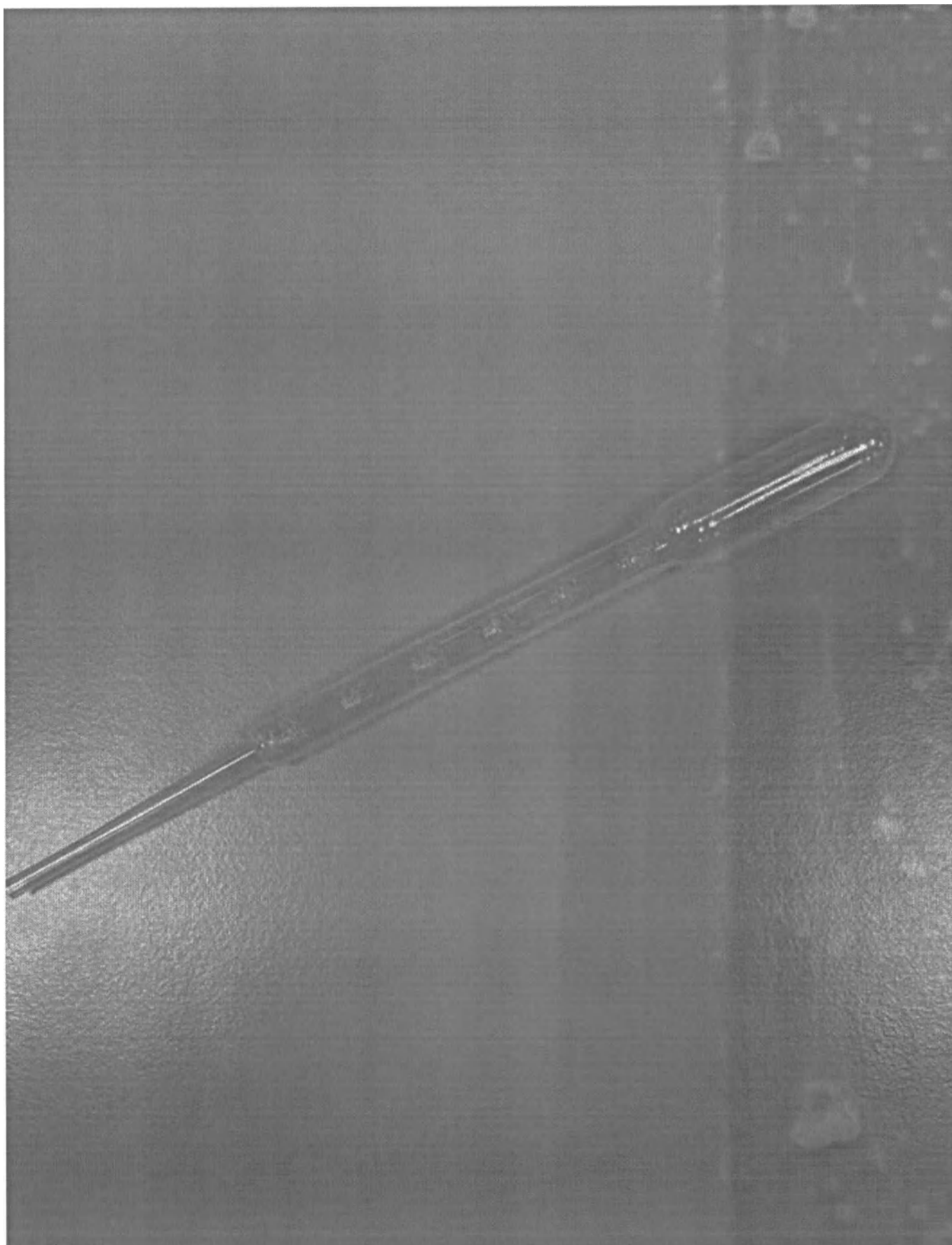

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 1000 мл.
Инструкция по применению

ALGIMED
TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»



Лютыйский В.В.

10 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP»
в вариантах исполнения
Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 100 мл,
по 500 мл, по 1000 мл

ВНИМАНИЕ!

Изучите инструкцию перед
началом работы


ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Логовский, д.22,
этаж 309

techno@algimed.com

+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ № 193 дата выдачи: 16.10.2023
---	--	--

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 1000 мл

Дата изготовления:	Номер партии:	Годен до:	Срок хранения:
16.10.2023	161023	16.10.2025	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

1. NOVAPREP HQ + Preservative Solution		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Бесцветная жидкость	Бесцветная жидкость
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объем, мл	1000 ± 2%	1000
Электропроводность при 20 °С, мСм/см	1,5 ± 0,4	1,6
Плотность при температуре 20 °С, г/мл	0,95 ± 0,02	0,96
2. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019; Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 3,5 мл, производитель ООО «МиниМед», Россия, РУ № РЗН 2019/8912		
Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Без видимых нарушений	Без видимых нарушений
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.

Набор для жидкостной цитологии «NOVAPREP HQ + Preservative Solution» по 1000 мл **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела

А.Г. Грицкевич



№ 27 (подписать сев)

листок

Генеральный директор

ООО «Альгимед»

Славашевич Д.Л.

«28» октября 2013 года М.П.

