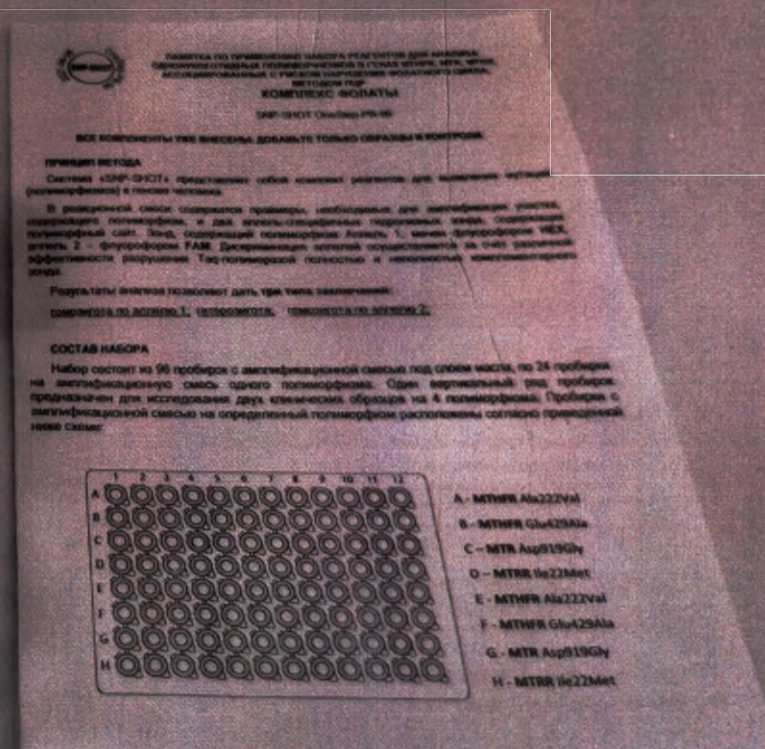
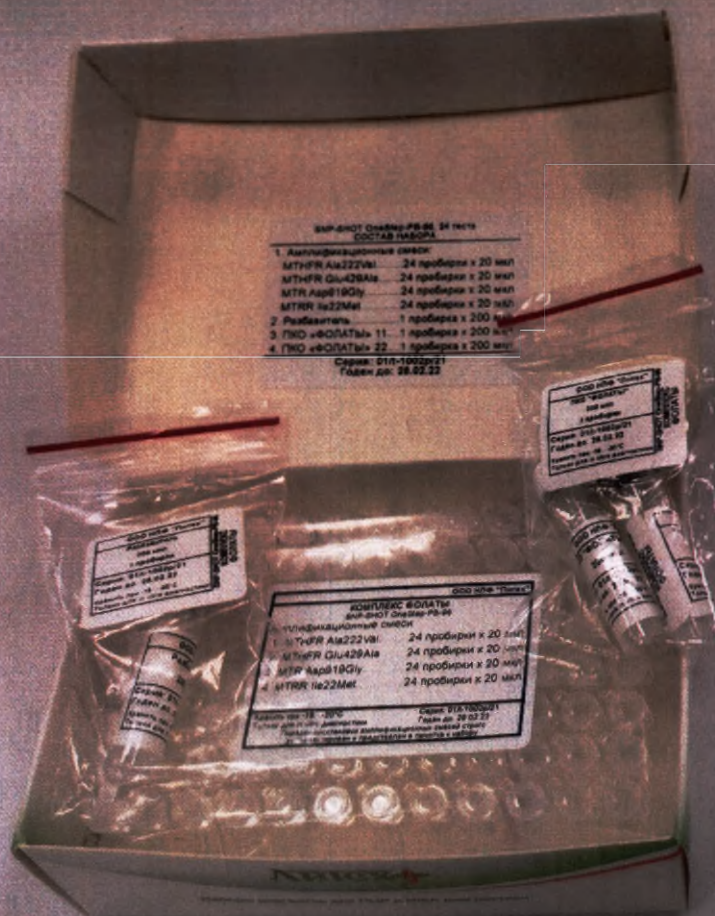
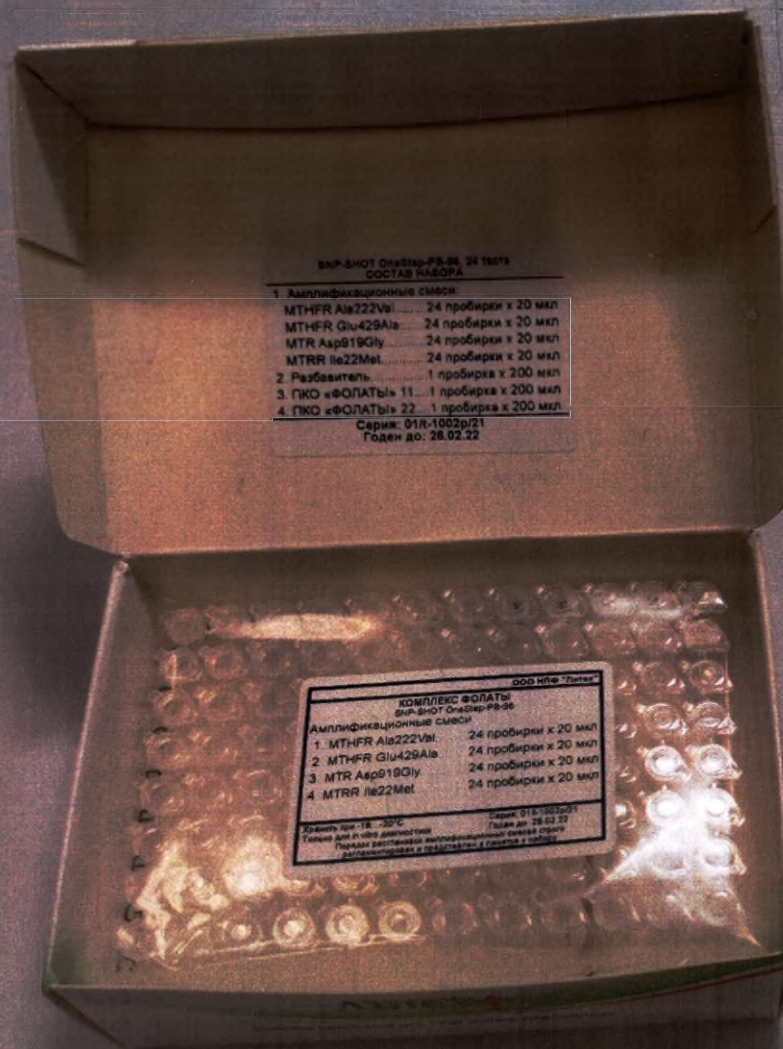




Фото 1. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ**, вариант исполнения **SNP-SHOT OneStep-PB-96**. Потребительская упаковка.





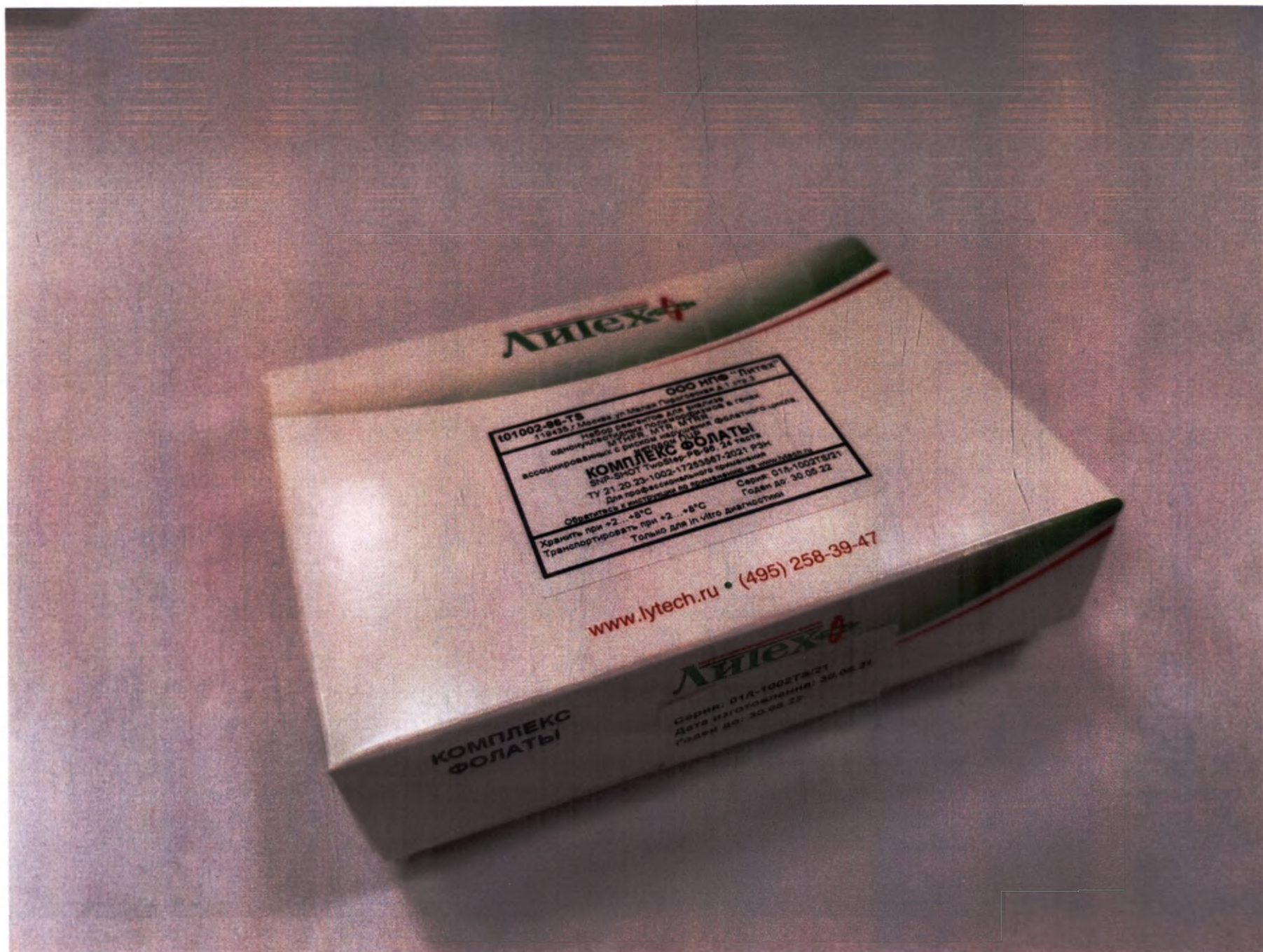


Фото 4. Набор реагентов КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ, вариант исполнения SNP-SHOT TwoStep-PB-96. Потребительская упаковка.



ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
ОДНОКУЛЕТОВЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ГЕНАХ MTHFR, MTR, MTRR,
АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА,
МЕТОДОМ TWO
КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ

SNP-SHOT TwoStep-PB-96

ПРИНЦИП МЕТОДА

Система «SNP-SHOT» представляет собой комплект реактивов для выявления мутаций (полиморфизмов) в геноме человека.

В реакционной смеси содержатся праймеры, необходимые для амплификации участка, содержащего полиморфизм, и два аллель-специфичных гидролизных зонда, содержащие полиморфный сайт. Зонд, содержащий полиморфизм Аллель 1, мечен флуорофором HEX, аллель 2 – флуорофором FAM. Дискриминация аллелей осуществляется за счет различной эффективности разрушения Taq-полимеразой полностью и неполностью комплементарного зонда.

Результаты анализа позволяют дать три типа заключения:

гомозигота по аллелю 1; гетерозигота; гомозигота по аллелю 2.

СОСТАВ НАБОРА

Набор состоит из 96 пробирок с реакционной смесью под слоем масла, по 24 пробирки на реакционную смесь одного полиморфизма. Один вертикальный ряд пробирок предназначен для исследования двух клинических образцов на 4 полиморфизма. Пробирки с реакционной смесью на определенный полиморфизм расположены согласно приведенной ниже схеме.



A - MTHFR Ala222Val
B - MTHFR Glu429Ala
C - MTR Asp919Gly
D - MTRR Ile22Met
E - MTHFR Ala222Val
F - MTHFR Glu429Ala
G - MTR Asp919Gly
H - MTRR Ile22Met

Отдельно вложены пробирка с раствором Taq-полимеразы, пробирка с разбавителем, который используется в качестве единого отрицательного контроля, и пробирки с положительными контрольными образцами для всех реакционных смесей в отдельном пакете.

Фото 5. Набор реактивов **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ**, вариант исполнения **SNP-SHOT TwoStep-PB-96**. Комплектность.

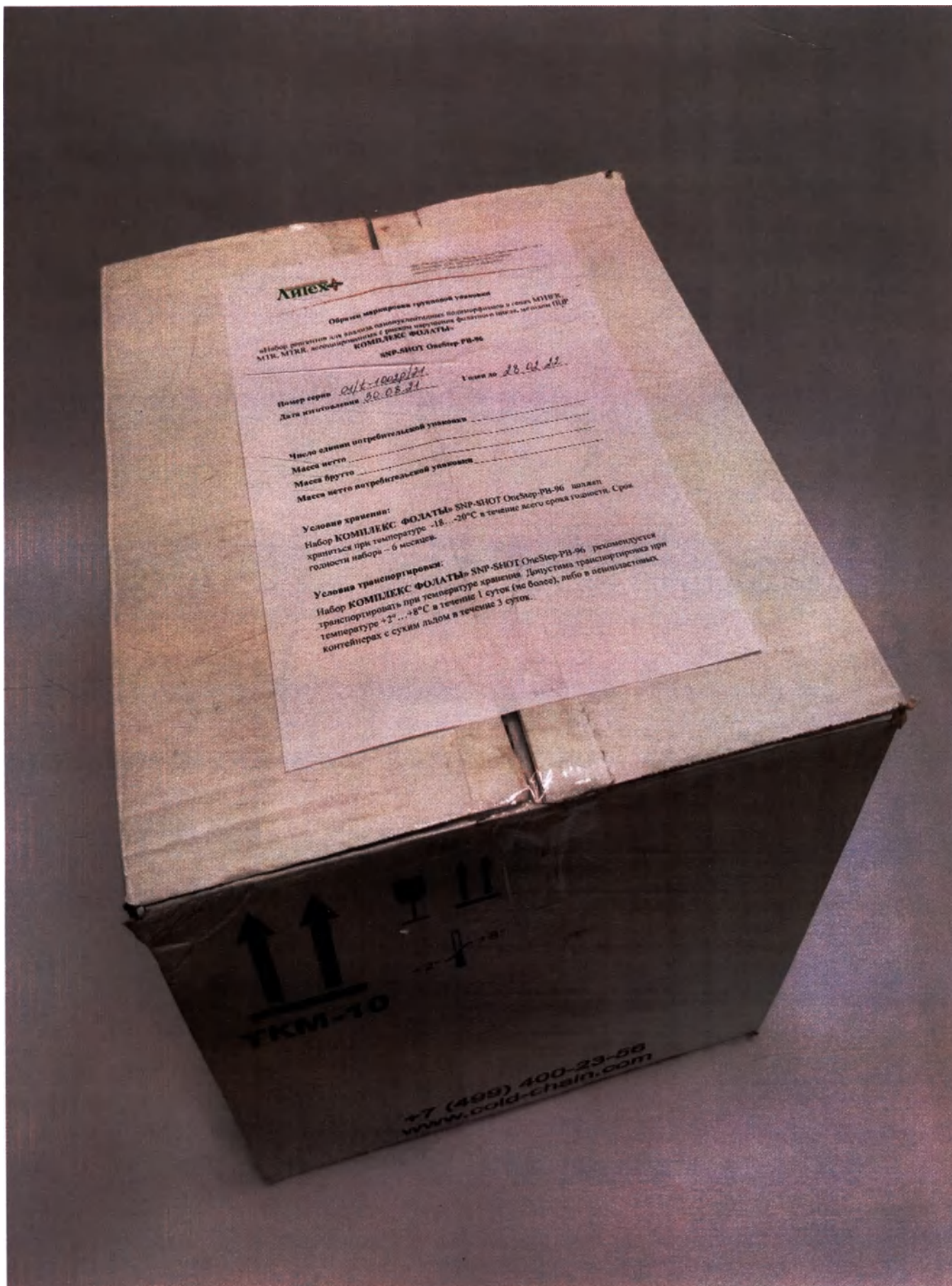


Фото 7. Набор реагентов КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ, групповая упаковка. Внешний вид.

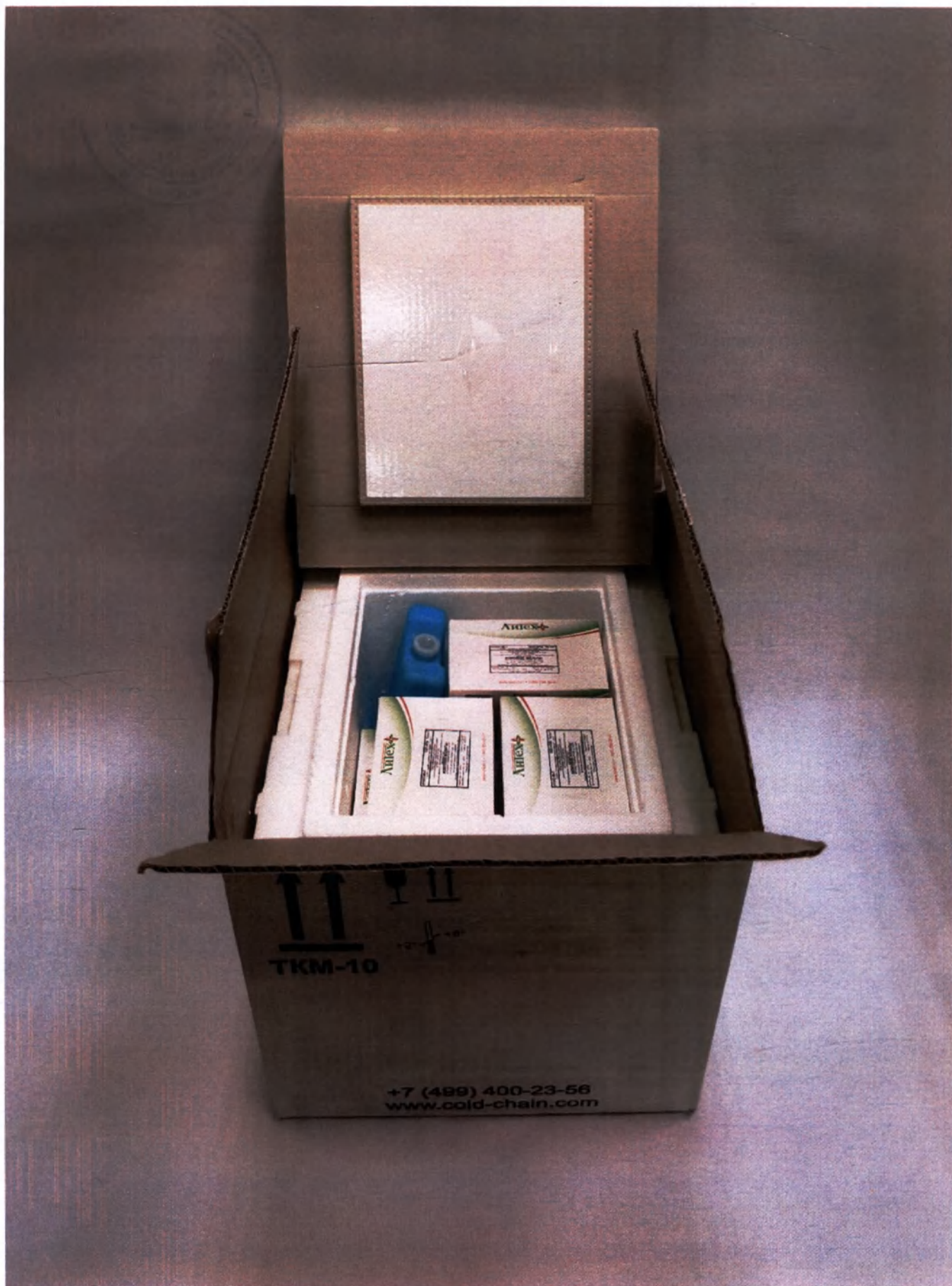


Фото 8. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ**, групповая упаковка. Внутренний вид.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов

шт.



Директор


Наумов А.Ю.





Фото 1. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ**, вариант исполнения *SNP-SHOT OneStep-PB-96*. Потребительская упаковка.

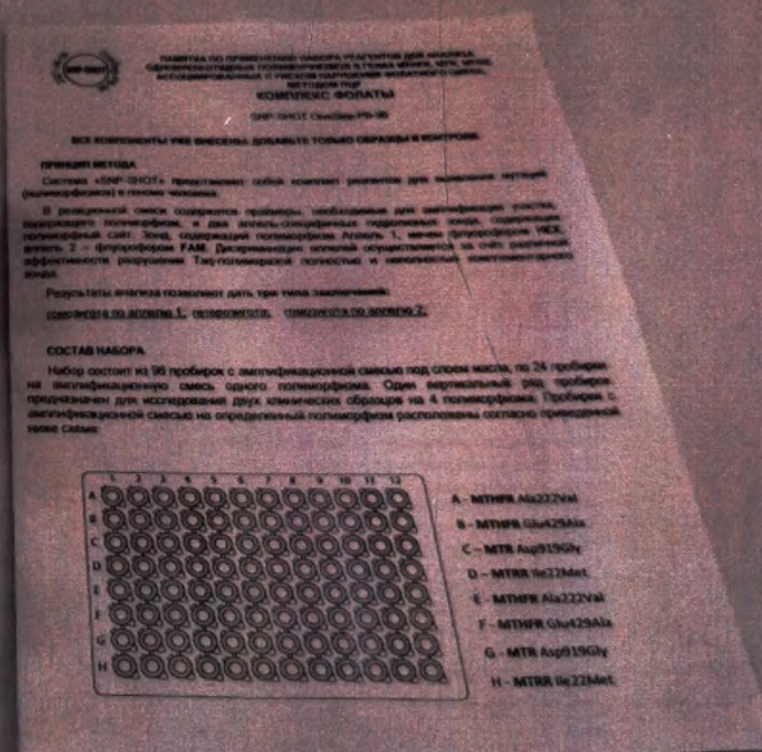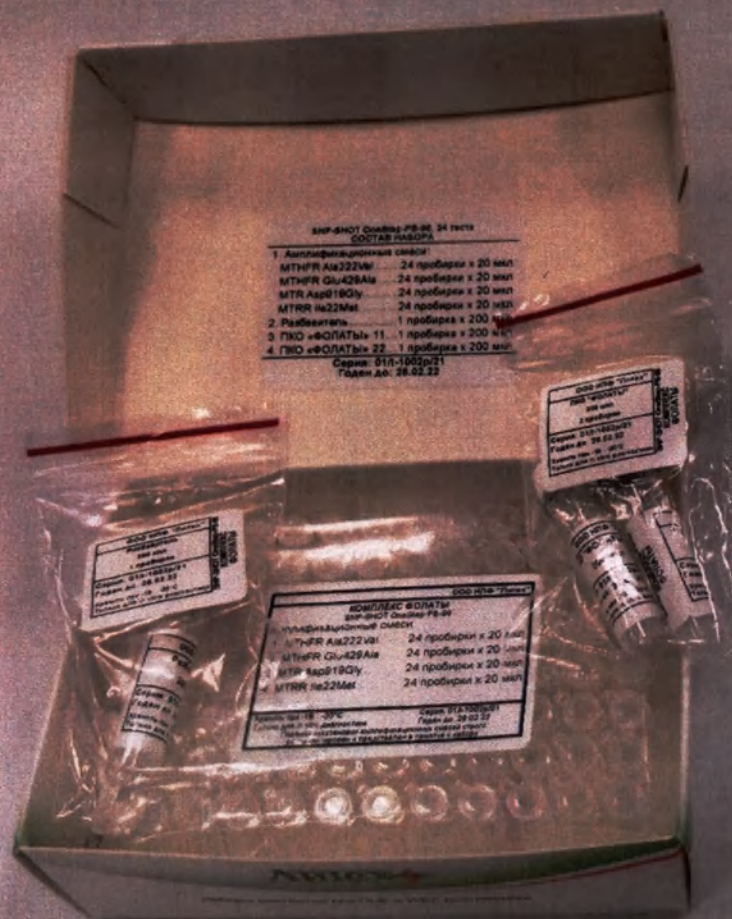

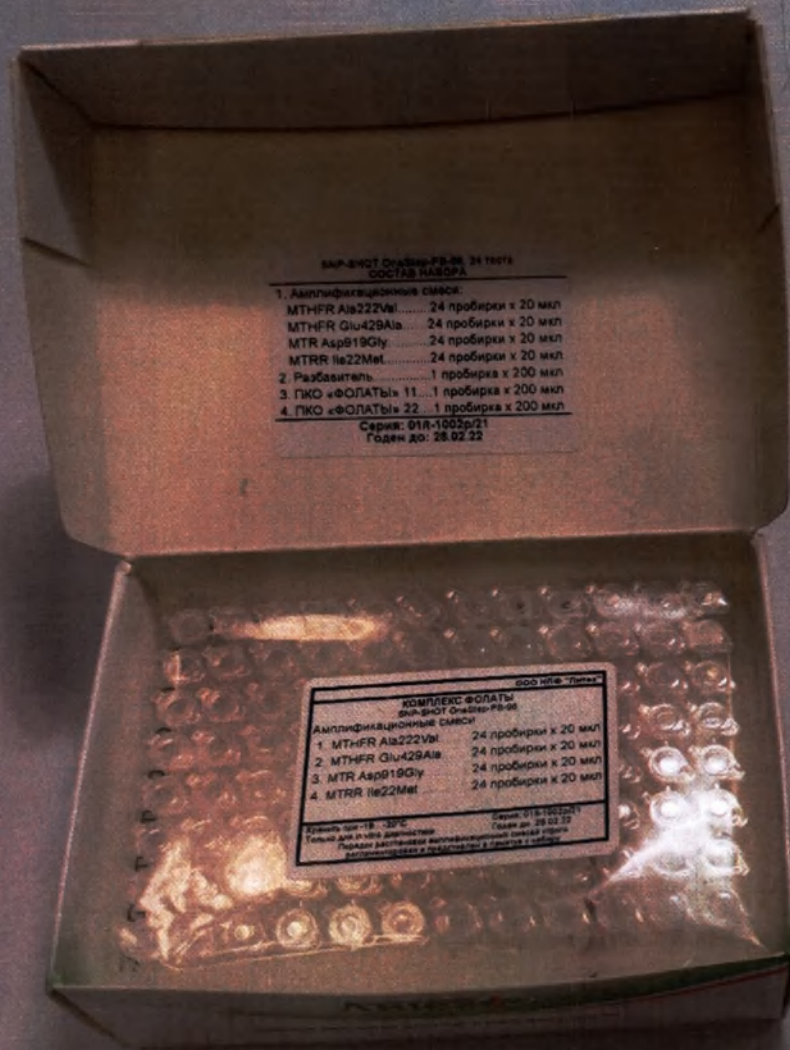

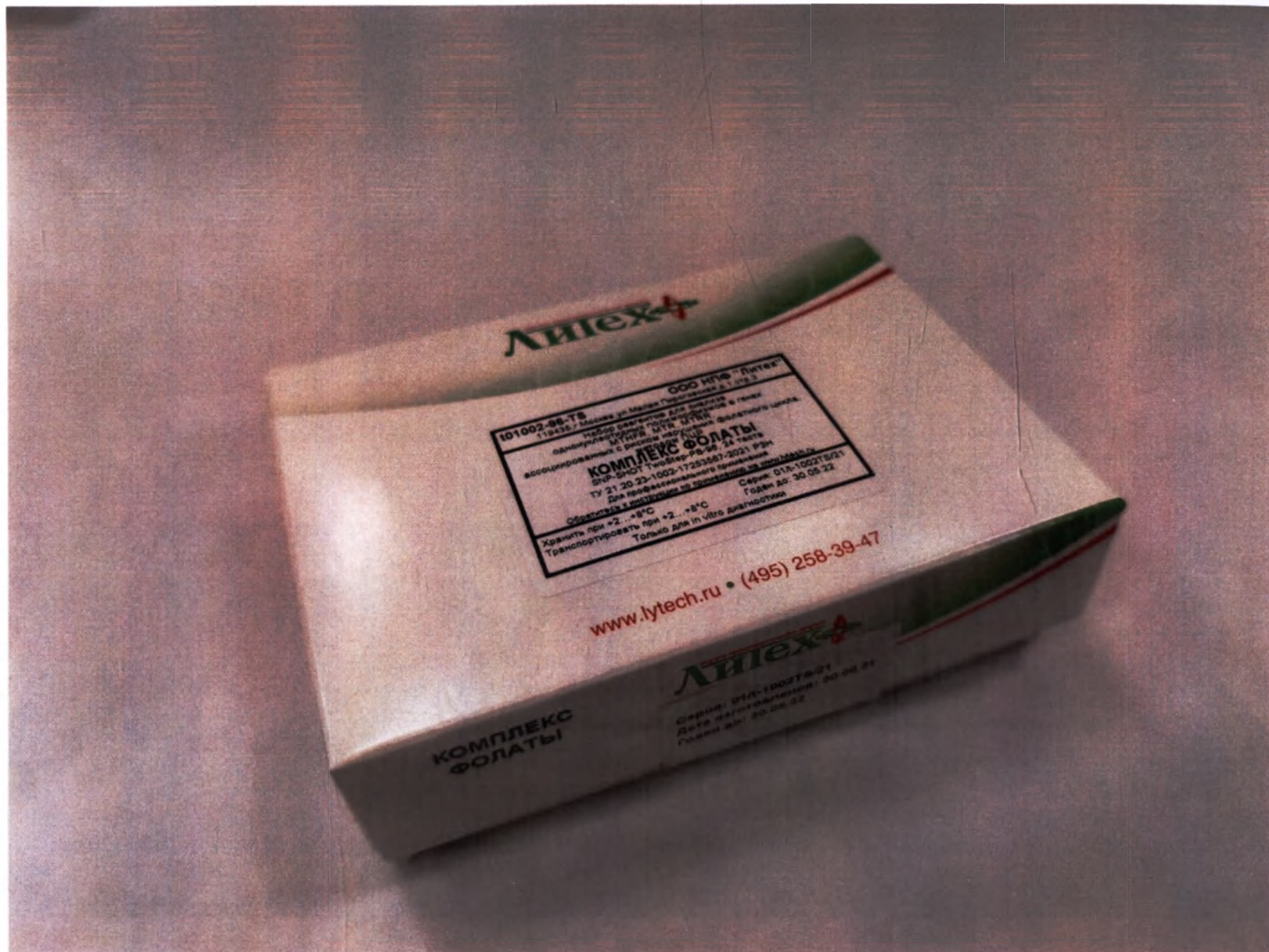


Фото 4. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ**, вариант исполнения **SNP-SHOT TwoStep-PB-96**. Потребительская упаковка.



ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
ОДНОКУЛЬДОВЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ГЕНАХ MTHFR, MTR, MTRR,
АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОМ НАРУШЕНИЯ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА,
МЕТОДОМ ПЦР
КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ
SNP-SHOT TwoStep-PB-96

ПРИНЦИП МЕТОДА

Система «SNP-SHOT» представляет собой комплект реагентов для выявления мутаций (полиморфизмов) в геноме человека.

В реакционной смеси содержатся праймеры, необходимые для амплификации участка, содержащего полиморфизм, и два аплет-специфичных гидролизных зонда, содержащих полиморфный сайт. Зонд, содержащий полиморфизм Апплет 1, мечен флуорофором HEX, аплет 2 – флуорофором FAM. Дискриминация аплетов осуществляется за счёт различной эффективности разрушения Taq-полимеразой полностью и неполностью комплементарного зонда.

Результаты анализа позволяют дать три типа заключения:

гомозигота по аллелю 1; гетерозигота; гомозигота по аллелю 2.

СОСТАВ НАБОРА

Набор состоит из 96 пробирок с реакционной смесью под слоем масла, по 24 пробирки на реакционную смесь одного полиморфизма. Один вертикальный ряд пробирок предназначен для исследования двух клинических образцов на 4 полиморфизма. Пробирки с реакционной смесью на определённый полиморфизм расположены согласно приведённой ниже схеме:



A - MTHFR Ala222Val
B - MTHFR Glu429Ala
C - MTR Asp919Gly
D - MTRR Ile22Met
E - MTHFR Ala222Val
F - MTHFR Glu429Ala
G - MTR Asp919Gly
H - MTRR Ile22Met

Отдельно вложены пробирка с раствором Taq-полимеразы, пробирка с разбавителем, который используется в качестве единого отрицательного контроля, и пробирки с положительными контрольными образцами для всех реакционных смесей в отдельном пакете.

Фото 5. Набор реагентов КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ, вариант исполнения SNP-SHOT TwoStep-PB-96. Комплектность.



Фото 6. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ**, вариант исполнения **SNP-SHOT TwoStep-PB-96**. Состав набора.

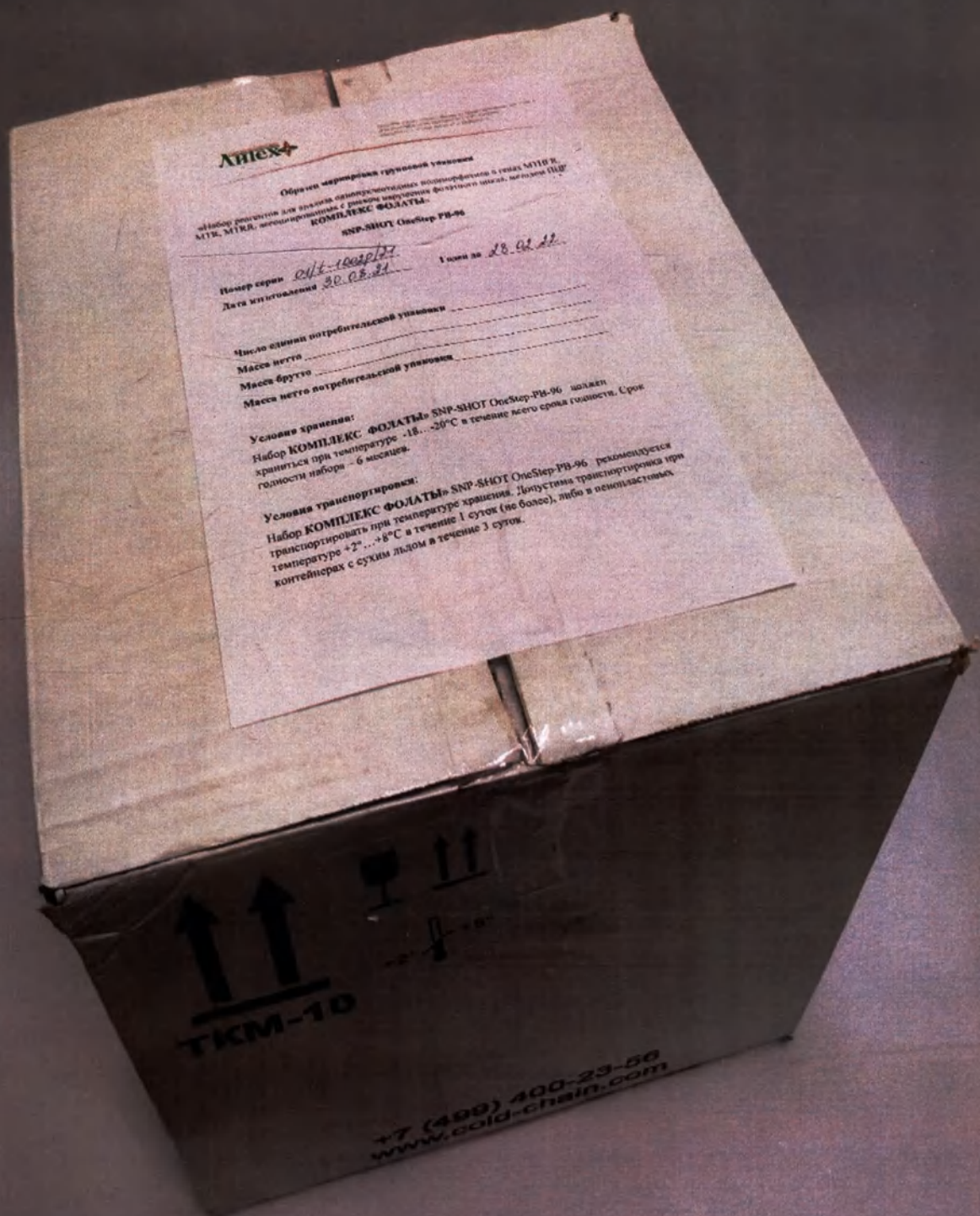


Фото 7. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ**, групповая упаковка. Внешний вид.

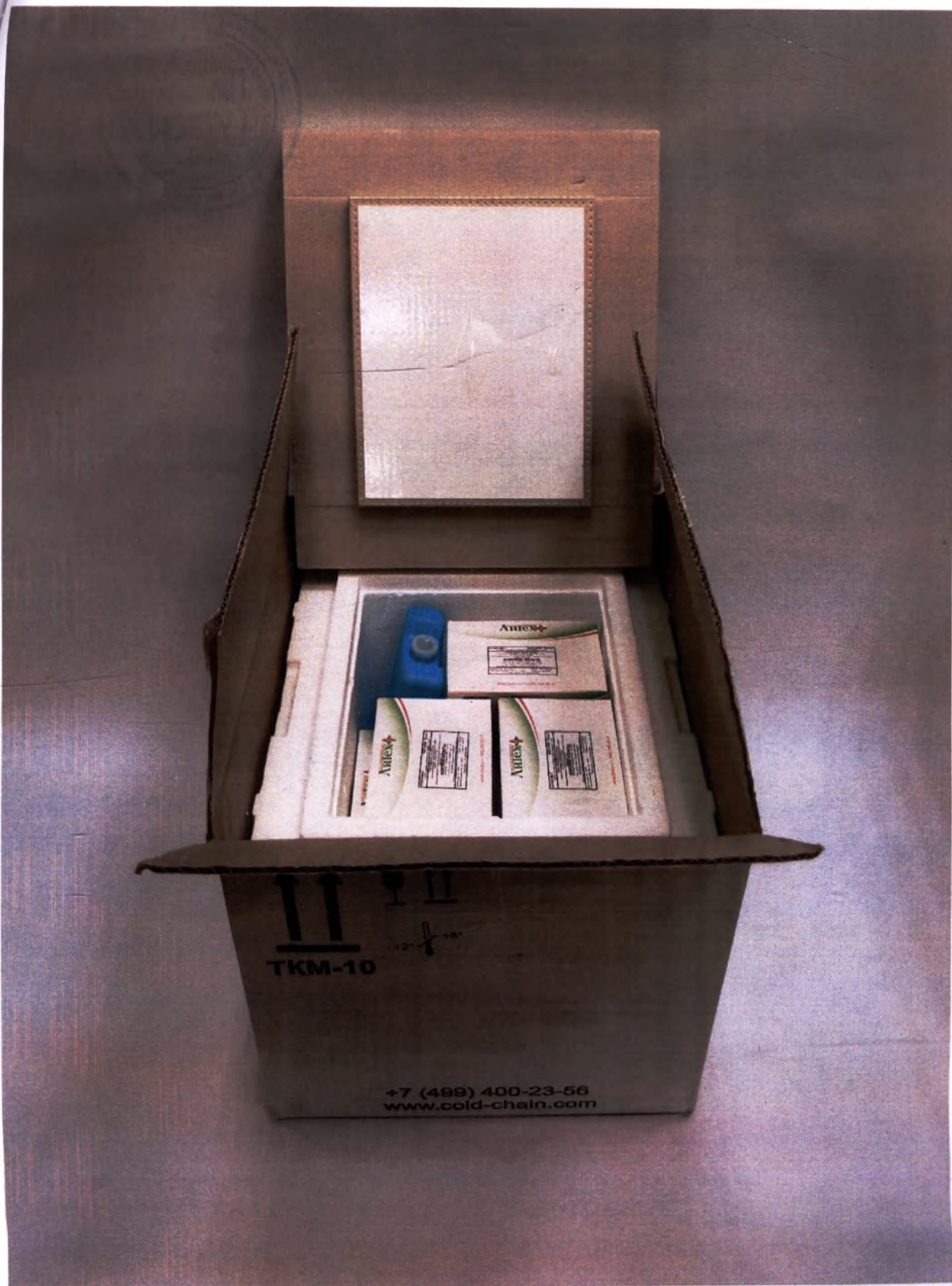


Фото 8. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ**, групповая упаковка. Внутренний вид.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов

шт.

Директор

Наумов А.Ю.





ООО НПФ «Литех»

Набор реагентов для анализа однонуклеотидных полиморфизмов в генах MTHFR, MTR, MTRR, ассоциированных с риском нарушения фолатного цикла, методом ПЦР

КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ

ТУ 21.20.23-1002-17253567-2021

КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ SNP-SHOT OneStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

t01002-96-C ООО НПФ «Литех» 119435 г. Москва ул. Малая Пироговская д. 1 стр. 3	
Набор реагентов для анализа однонуклеотидных полиморфизмов в генах MTHFR MTR MTRR ассоциированных с риском нарушения фолатного цикла методом ПЦР	
КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ SNP-SHOT OneStep-PB-96 24 теста ТУ 21.20.23-1002-17253567-2021 РЗН Для профессионального применения Обратиться к инструкции по применению на www.litex.ru	
Хранить при -18...-20°C	Серия 01/л-1002р/21
Транспортировать при -18...-20°C	Годен до 28.02.22
Только для in vitro диагностики	

SNP-SHOT OneStep-PB-96 24 теста
СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационные смеси:	
MTHFR Ala222Val	24 пробирки x 20 мкл
MTHFR Glu429Ala	24 пробирки x 20 мкл
MTR Asp919Gly	24 пробирки x 20 мкл
MTRR Ile22Met	24 пробирки x 20 мкл
2. Разбавитель	1 пробирка x 200 мкл
3. ПКО «ФОЛАТЫ» 11	1 пробирка x 200 мкл
4. ПКО «ФОЛАТЫ» 22	1 пробирка x 200 мкл

Серия: 01/л-1002р/21

Дата изготовления: 30.08.21

Годен до: 28.02.22

Серия: 01/л-1002р/21
Годен до: 28.02.22

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ «Литех» КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ SNP-SHOT OneStep-PB-96 Амплификационные смеси	
1 MTHFR Ala222Val	24 пробирки x 20 мкл
2 MTHFR Glu429Ala	24 пробирки x 20 мкл
3 MTR Asp919Gly	24 пробирки x 20 мкл
4 MTRR Ile22Met	24 пробирки x 20 мкл
Хранить при -18...-20°C	Серия 01/л-1002р/21
Только для in vitro диагностики	Годен до 28.02.22
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ «Литех» Разбавитель 200 мкл 1 пробирка	
Серия: 01/л-1002р/21	Годен до: 28.02.22
Хранить при -18...-20°C	Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех» ПКО «ФОЛАТЫ» 200 мкл 2 пробирки	
Серия: 01/л-1002р/21	Годен до: 28.02.22
Хранить при -18...-20°C	Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ «Литех» Разбавитель 200 мкл	
Серия: 01/л-1002р/21	Годен до: 28.02.22
Хранить при -18...-20°C	Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех» ПКО «ФОЛАТЫ» 11 200 мкл	
Серия: 01/л-1002р/21	Годен до: 28.02.22
Хранить при -18...-20°C	Только для in vitro диагностики

ООО НПФ «Литех» ПКО «ФОЛАТЫ» 22 200 мкл	
Серия: 01/л-1002р/21	Годен до: 28.02.22
Хранить при -18...-20°C	Только для in vitro диагностики

КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ SNP-SHOT TwoStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

101002-96-TS	ООО НПФ "Литех"
119435 г. Москва ул. Малая Пироговская д. 1 стр. 3	
Набор реагентов для анализа однонуклеотидных полиморфизмов в генах MTNFR, MTR, MTRR ассоциированных с риском нарушения фолатного цикла методом ПЦР	
КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ SNP-SHOT TwoStep-PB-96 24 теста	
Ту 21 20 23-1002-17253567-2021 РЭМ	
Для профессионального применения	
Эксплуатация в соответствии со спецификацией на www.litex.ru	
Хранить при +2...+8°C	Серия: 01/1-1002TS/21
Транспортировать при +2...+8°C	Годен до: 30.05.22
Только для in vitro диагностики	

SNP-SHOT TwoStep-PB-96, 24 теста		
СОСТАВ НАБОРА		
1	Реакционные смеси	
	MTNFR Ala222Val	24 пробирки x 15 мкл
	MTNFR Glu429Ala	24 пробирки x 15 мкл
	MTR Asp919Gly	24 пробирки x 15 мкл
	MTRR Ile22Met	24 пробирки x 15 мкл
2	Раствор Taq-полимеразы	1 пробирка x 550 мкл
3	Разбавитель	1 пробирка x 200 мкл
4	ПКО «ФОЛАТЫ» 11	1 пробирка x 200 мкл
5	ПКО «ФОЛАТЫ» 22	1 пробирка x 200 мкл
Серия: 01/1-1002TS/21		
Годен до: 30.05.22		

Серия: 01/1-1002TS/21
Дата изготовления: 30.08.21
Годен до: 30.05.22

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"	
КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ SNP-SHOT TwoStep-PB-96	
Реакционные смеси	
1	MTNFR Ala222Val 24 пробирки x 15 мкл
2	MTNFR Glu429Ala 24 пробирки x 15 мкл
3	MTR Asp919Gly 24 пробирки x 15 мкл
4	MTRR Ile22Met 24 пробирки x 15 мкл
Хранить при +2...+8°C	
Только для in vitro диагностики	
Серия: 01/1-1002TS/21	
Годен до: 30.05.22	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	SNP-SHOT TwoStep-PB-96
Раствор Taq-полимеразы	КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ
550 мкл	
1 пробирка	
Серия: 01/1-1002TS/21	
Годен до: 30.05.22	
Хранить при +2...+8°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	SNP-SHOT TwoStep-PB-96
Разбавитель	КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ
200 мкл	
1 пробирка	
Серия: 01/1-1002TS/21	
Годен до: 30.05.22	
Хранить при +2...+8°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	SNP-SHOT TwoStep-PB-96
ПКО «ФОЛАТЫ»	КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ
200 мкл	
2 пробирки	
Серия: 01/1-1002TS/21	
Годен до: 30.05.22	
Хранить при +2...+8°C	
Только для in vitro диагностики	

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"	SNP-SHOT TwoStep-PB-96
Раствор Taq-полимеразы	КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ
550 мкл	
Серия: 01/1-1002TS/21	
Годен до: 30.05.22	
Хранить при +2...+8°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	SNP-SHOT TwoStep-PB-96
Разбавитель	КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ
200 мкл	
Серия: 01/1-1002TS/21	
Годен до: 30.05.22	
Хранить при +2...+8°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	SNP-SHOT TwoStep-PB-96
ПКО «ФОЛАТЫ» 11	КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ
200 мкл	
Серия: 01/1-1002TS/21	
Годен до: 30.05.22	
Хранить при +2...+8°C	
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"	SNP-SHOT TwoStep-PB-96
ПКО «ФОЛАТЫ» 22	КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ
200 мкл	
Серия: 01/1-1002TS/21	
Годен до: 30.05.22	
Хранить при +2...+8°C	
Только для in vitro диагностики	

Образец маркировки групповой упаковки

«Набор реагентов для анализа однонуклеотидных полиморфизмов в генах MTHFR, MTR, MTRR, ассоциированных с риском нарушения фолатного цикла, методом ПЦР
КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ»

SNP-SHOT OneStep-PB-96

Номер серии 01/t-1002p/21

Дата изготовления 30.08.21

Годен до 28.02.22

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Набор **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ»** SNP-SHOT OneStep-PB-96 должен храниться при температуре $-18...-20^{\circ}\text{C}$ в течение всего срока годности. Срок годности набора – 6 месяцев.

Условия транспортировки:

Набор **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ»** SNP-SHOT OneStep-PB-96 рекомендуется транспортировать при температуре хранения. Допустима транспортировка при температуре $+2^{\circ}...+8^{\circ}\text{C}$ в течение 1 суток (не более), либо в пенопластовых контейнерах с сухим льдом в течение 3 суток.

Копия на 3 листах верна.



Директор ООО НПО «Литех»

Наумов А.Ю.

ООО НПФ «Литех»



Набор реагентов для анализа однонуклеотидных полиморфизмов в генах MTHFR, MTR, MTRR, ассоциированных с риском нарушения фолатного цикла, методом ПЦР

КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ

ТУ 21.20.23-1002-17253567-2021

КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ SNP-SHOT OneStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

101002-96-C	ООО НПФ "Литех"
119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская д. 1, стр. 3	
Набор реагентов для анализа однонуклеотидных полиморфизмов в генах MTHFR, MTR, MTRR ассоциированных с риском нарушения фолатного цикла методом ПЦР	
КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ SNP-SHOT OneStep-PB-96, 24 теста	
ТУ 21.20.23-1002-17253567-2021 РЗМ	
Для профессионального применения	
Обратитесь к инструкции по применению на сайте litech.ru	
Хранить при -18...-20°C	Серия: 01/л-1002р/21
Транспортировать при -18...-20°C	Годен до: 28.02.22
Только для in vitro диагностики	

SNP-SHOT OneStep-PB-96, 24 теста
СОСТАВ НАБОРА

- Амплификационные смеси:
MTHFR Ala222Val..... 24 пробирки x 20 мкл
MTHFR Glu429Ala..... 24 пробирки x 20 мкл
MTR Asp919Gly..... 24 пробирки x 20 мкл
MTRR Ile22Met..... 24 пробирки x 20 мкл
- Разбавитель..... 1 пробирка x 200 мкл
- ПКО «ФОЛАТЫ» 11..... 1 пробирка x 200 мкл
- ПКО «ФОЛАТЫ» 22..... 1 пробирка x 200 мкл

Серия: 01/л-1002р/21
Годен до: 28.02.22

Серия: 01/л-1002р/21

Дата изготовления: 30.08.21

Годен до: 28.02.22

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"	
КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ SNP-SHOT OneStep-PB-96	
Амплификационные смеси	
1 MTHFR Ala222Val	24 пробирки x 20 мкл
2 MTHFR Glu429Ala	24 пробирки x 20 мкл
3 MTR Asp919Gly	24 пробирки x 20 мкл
4 MTRR Ile22Met	24 пробирки x 20 мкл
Хранить при -18...-20°C	Серия: 01/л-1002р/21
Только для in vitro диагностики	Годен до: 28.02.22
Только для in vitro диагностики	

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель
200 мкл
1 пробирка
Серия: 01/л-1002р/21
Годен до: 28.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО «ФОЛАТЫ»
200 мкл
2 пробирки
Серия: 01/л-1002р/21
Годен до: 28.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель
200 мкл
Серия: 01/л-1002р/21
Годен до: 28.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО «ФОЛАТЫ» 11
200 мкл
Серия: 01/л-1002р/21
Годен до: 28.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО «ФОЛАТЫ» 22
200 мкл
Серия: 01/л-1002р/21
Годен до: 28.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ SNP-SHOT TwoStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

101002-96-TS ООО НПО "Литех"
119435 г. Москва ул. Малая Пироговская д. 1 стр. 3

Набор реагентов для анализа
однонуклеотидных полиморфизмов в генах
MTNFR, MTR, MTRR
ассоциированных с риском нарушения фолатного цикла
в геноме человека

КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ!
SNP-SHOT TwoStep-PB-96 24 теста
г. 21 20 23-1002-17253667-2021 РЗ-
Для профессионального применения
Упаковка и хранение по инструкции на упаковке

Хранить при +2...+8°C Серия: 01Л-1002ТБ/21
Транспортировать при +2...+8°C Годен до: 30.05.22
Только для in vitro диагностики

SNP-SHOT TwoStep-PB-96, 24 теста
СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционные смеси	
MTNFR A/a222V/a	24 пробирки x 15 мкл
MTNFR G/a429A/a	24 пробирки x 15 мкл
MTR Asp919G/y	24 пробирки x 15 мкл
MTRR H22Met	24 пробирки x 15 мкл
2. Раствор Taq-полимеразы	1 пробирка x 550 мкл
3. Разбавитель	1 пробирка x 200 мкл
4. ПКФ «ФОЛАТЫ» 11	1 пробирка x 200 мкл
5. ПКФ «ФОЛАТЫ» 22	1 пробирка x 200 мкл

Серия: 01Л-1002ТБ/21
Годен до: 30.05.22

Серия: 01Л-1002ТБ/21
Дата изготовления: 30.08.21
Годен до: 30.05.22

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПО "Литех"

КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ
SNP-SHOT TwoStep-PB-96

Реакционные смеси

1. MTNFR A/a222V/a	24 пробирки x 15 мкл
2. MTNFR G/a429A/a	24 пробирки x 15 мкл
3. MTR Asp919G/y	24 пробирки x 15 мкл
4. MTRR H22Met	24 пробирки x 15 мкл

Хранить при +2...+8°C Серия: 01Л-1002ТБ/21
Только для in vitro диагностики
Годен до: 30.05.22
Только для in vitro диагностики

ООО НПО "Литех"

Раствор Taq-полимеразы
550 мкл
1 пробирка

Серия: 01Л-1002ТБ/21
Годен до: 30.05.22
Хранить при +2...+8°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПО "Литех"

Разбавитель
200 мкл
1 пробирка

Серия: 01Л-1002ТБ/21
Годен до: 30.05.22
Хранить при +2...+8°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПО "Литех"

ПКФ «ФОЛАТЫ»
200 мкл
2 пробирки

Серия: 01Л-1002ТБ/21
Годен до: 30.05.22
Хранить при +2...+8°C
Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПО "Литех"

Раствор Taq-полимеразы
550 мкл

Серия: 01Л-1002ТБ/21
Годен до: 30.05.22
Хранить при +2...+8°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПО "Литех"

Разбавитель
200 мкл

Серия: 01Л-1002ТБ/21
Годен до: 30.05.22
Хранить при +2...+8°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПО "Литех"

ПКФ «ФОЛАТЫ» 11
200 мкл

Серия: 01Л-1002ТБ/21
Годен до: 30.05.22
Хранить при +2...+8°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПО "Литех"

ПКФ «ФОЛАТЫ» 22
200 мкл

Серия: 01Л-1002ТБ/21
Годен до: 30.05.22
Хранить при +2...+8°C
Только для in vitro диагностики

Образец маркировки групповой упаковки

«Набор реагентов для анализа однонуклеотидных полиморфизмов в генах MTHFR, MTR, MTRR, ассоциированных с риском нарушения фолатного цикла, методом ПЦР
КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ»

SNP-SHOT OneStep-PB-96

Номер серии 01/t-1002p/21

Дата изготовления 30.08.21

Гожен до 28.02.22

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Набор **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ»** SNP-SHOT OneStep-PB-96 должен храниться при температуре $-18...-20^{\circ}\text{C}$ в течение всего срока годности. Срок годности набора – 6 месяцев.

Условия транспортировки:

Набор **КОМПЛЕКС ФОЛАТЫ»** SNP-SHOT OneStep-PB-96 рекомендуется транспортировать при температуре хранения. Допустима транспортировка при температуре $+2^{\circ}...+8^{\circ}\text{C}$ в течение 1 суток (не более), либо в пенопластовых контейнерах с сухим льдом в течение 3 суток.

Копия на 3 листах верна.



Директор ООО НПФ «Литех»

Наумов А.Ю.