

Меры предосторожности

Не использовать изделие после окончания срока годности.

Не использовать повторно! Изделие предназначено для однократового применения. Пластина в плановом порядке меняется 1 раз в 3–5 дней, уrostомный мешок – ежедневно. При возникновении чувства жжения под адгезивной основой, отклейте пластину и, при выявлении содержимого, смените ее. При повторных аналогичных проблемах обратитесь к врачу. Производитель не несет ответственности за любые травмы и повреждения, полученные в результате несоблюдения рекомендаций производителя по применению данной продукции.

Транспортировка и хранение

Изделия должны транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств и в соответствии с правилами, установленными для каждого вида транспорта при температуре от +10°C до +35°C.

При соблюдении рекомендованного способа хранения качество изделий гарантируется до конца срока годности, отмеченного на упаковке. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей при температуре от +10°C до +35°C.

Срок годности

5 лет с даты производства.

Требования безопасности и охраны окружающей среды

Изделия безопасны при соблюдении указаний эксплуатационной документации, не оказывают вредного воздействия на организм человека. Обращение с ними не требует принятия особых мер предосторожности.

Утилизация

Мешок уrostомный необходимо опорожнить перед утилизацией. Положить использованное изделие в пакет и выбросить вместе с бытовыми отходами. В условиях стационара использованные по назначению изделия относятся к отходам класса Б (эпидемиологические опасные отходы) и утилизируются согласно СанПиН 1.2.3685-21.

Прием претензий

Производитель / Организация, принимающая претензии: ООО «ГемаТех».

Адрес Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, этаж 6, комната 8.1-23Н.

Тел: 8 800 511 20 20

Info@gamma-tech.ru

Символы, применяемые при маркировке медицинских изделий

- | | |
|--|--|
| | Код партии |
| | Дата изготовления |
| | Использовать до |
| | Изготовитель |
| | Обратитесь к инструкции по применению |
| | Не использовать при повреждении упаковки |
| | Для однократового использования |
| | Бережь от влаги |
| | Знак вторичной переработки |



Средство реабилитации для стомического использования при уrostомах: мешок уrostомный дренажный по ТУ 32.50.13-006-32952305-2021

ГемаТех

Назначение

Мешки уrostомные (далее – изделия) предназначены для использования при уrostомах для сбора мочи у стомированных пациентов. Мешки уrostомные применяются совместно с пластинами. Размер (диаметр) фланца уrostомного мешка должен соответствовать размеру фланца пластины. Изделия предназначены для использования в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях. Мешки уrostомные относятся к изделиям однократового применения.

Функциональные характеристики

Мешки уrostомные являются частью двухкомпонентного уroприемника. У пациентов с уrostомной отток мочи происходит непрерывно, поэтому уrostомные мешки следует регулярно опорожнять, для этого в нижней части мешка имеется сливной клапан, который надежно закрывается заглушкой.

Показания к применению:

- функционирующая уrostома.

Возможные побочные эффекты:

- перистомальный дерматит (раздражение кожи в области стомы);
- аллергический дерматит из-за повышенной чувствительности кожи к веществам или компонентам изделия.

Технические характеристики

Мешок уrostомный используется совместно с адгезивной пластиной (поставляется отдельно). Такая система представляет собой разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью фланцевого соединения: сменного уrostомного мешка со сливным клапаном и адгезивной пластины для фиксации уrostомного мешка на передней брюшной стенке. Размер (диаметр) фланца мешка должен соответствовать диаметру фланца пластины.

Мешок уrostомный изготовлен из многослойной не пропускающей запах барьерной пленки. Материал мешка прозрачный, что позволяет визуальное контролировать характер и количество мочи. Сторона мешка, обращенная к телу, оснащена нетканой подложкой. Представлены варианты исполнения мешков уrostомных с подложкой и без подложки.

Мешок уrostомный дренажный оснащен сливным клапаном в нижней части мешка, который позволяет опорожнять мешок по мере его наполнения. Также мешок уrostомный оснащен невозвратным (антирефлюксным) клапаном, который предотвращает обратный заброс мочи в стому и обеспечивает защиту от восходящей инфекции мочевыводящих путей.

Общие рекомендации

Производить замену/удаление изделия следует стоя или сидя (предпочтительнее стоя) перед зеркалом, чтобы можно было лучше видеть стому. Замену необходимо осуществлять за два часа до приема еды или питья. Лучше проводить замену мешка уrostомного утром.

Особые указания

ВНИМАНИЕ: во избежание отклеивания пластины не следует допускать наполнения мешка уrostомного более чем на половину. Для предупреждения травмирования кожи не отклеивайте пластину рывком или с использованием механических средств.

Противопоказания

Противопоказано использование лицам с повышенной чувствительностью к веществам или компонентам изделия.

PRTFU004/01

ГемаТех

1. Подготовка

1.1. Наклеивание пластины

Мешки уростомные применяются совместно с пластинами производства ООО «ГемаТех», РУ № 2023/20055 от 14.04.2023 (пластины **поставляются отдельно**). Размер (диаметр) фланца уростомного мешка должен соответствовать размеру фланца пластины.

Руки и кожа вокруг стомы должны быть чистыми и сухими. Если на коже вокруг стомы имеются волосы, их следует аккуратно удалить.

Наклейте пластину согласно инструкции по применению пластины (см. подробную инструкцию в упаковке пластины).

Длительность использования определяется в зависимости от состояния комфорта и безопасности пользователя и может быть различной.

2. Порядок применения мешка уростомного

2.1. Крепление мешка уростомного



Рис. 1

- Отделите переднюю и заднюю стенки мешка друг от друга так, чтобы в мешок попал воздух (рис. 1).



Рис. 2

- Совместите края фланцев пластины и мешка уростомного (рис. 2).
- Осторожно надавливая, наденьте фланец мешка на фланец пластины снизу вверх, соедините пластину с мешком уростомным по направлению снизу вверх. Потяните мешок, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.



Рис. 3

- Убедитесь, что сливной клапан герметично закрыт (рис. 3).

2.2. Удаление/замена мешка уростомного

Уростомный мешок можно отсоединить от адгезивной пластины, не отклеивая пластину.



Рис. 4

- Отсоедините мешок от пластины, аккуратно потянув сверху вниз за ушко, расположенное в верхней части фланца мешка (рис. 4). Отделите фланец пластины от фланца мешка сверху вниз.
- Прикрепите новый уростомный мешок.

3. Опорожнение мешка уростомного

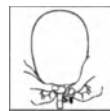


Рис. 5

- Поднимите горловину мешка вверх и зажмите сливной клапан.
- Откройте заглушку сливного клапана и аккуратно направьте сливное отверстие вниз, разожмите сливной клапан и опорожните уростомный мешок (рис. 5).



Рис. 6

- После полного опорожнения мешка закройте сливной клапан заглушкой.
- Убедитесь, что сливной клапан герметично закрыт (рис. 6).

Опорожнять уростомные мешки следует регулярно, не допуская их переполнения. Опорожнение уростомного мешка следует производить, не отклеивая пластину от кожи.

Для удобства и большей надежности при ношении изделия рекомендуется использовать эластичный пояс для крепления мешка к телу (**поставляются отдельно**).

Фланец мешка оснащен тремя пластиковыми ушками. Два из них предназначены для крепления пояса и одно - для отсоединения мешка от пластины. Прикрепите пояс к одному ушку на мешке, оберните пояс вокруг талии и прикрепите к другому ушку. Подтяните или ослабьте пояс по размеру.

4. Ножные/прикроватные мочеприемники (РУ № РЗН 2021/15077 от 27.07.2023)

Для увеличения объема дренажной системы, например, на ночь, используйте уростомные мешки совместно с ножными или прикроватными мочеприемниками.

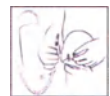


Рис. 7

- Соедините уростомный мешок с мочеприемником с помощью переходника, прилагаемого в комплекте.
- Узкий конец переходника вставьте в сливной клапан уростомного мешка, а другой конец подсоедините к дренажной трубке мочеприемника (рис. 7).

Комплектность

В одной групповой упаковке содержится:

1. Мешок уростомный – 30 шт.
2. Переходник для дренажной системы – 3 шт.
4. Инструкция-вкладыш – 1 шт.

Наименование изделий указано на упаковке.