

Стельки ортопедические и вкладные приспособления «LUOMMA» по ТУ 9396-001-63055870-2012

Стельки ортопедические и вкладные приспособления Luomma (далее – изделия) предназначены для лечения и профилактики при плоскостопии, нарушении орто-двигательной функции стопы взрослых и детей.

Варианты исполнения:

Стельки ортопедические бескаркасные Luomma: Lum 100 - Lum 150;
Стельки ортопедические каркасные Luomma: Lum 200 – Lum 250;
Пустельки ортопедические бескаркасные Luomma: Lum 300 – Lum 350;
Пустельки ортопедические каркасные Luomma: Lum 400 – Lum 450;
Стельки ортопедические детские Luomma: Lum 500 – Lum 550;
Плот ортопедический переднего отдела стопы Luomma: Lum 600 – Lum 650;
Пяточныйник ортопедический (анатомической формы) Luomma: Lum 700 – Lum 750;
Пальцевая перегородка силиконовая Luomma: Lum 800 – Lum 850;
Портизирующий протектор силиконовый Luomma: Lum 900 – Lum 950;
Силиконовая накладка Luomma: Lum 00 – Lum 50

Показания к применению:

1. Комбинированное фиксированное плоскостопие I-III степени;
2. Отечность;
3. Продольное плоскостопие;
4. Поперечное плоскостопие;
5. Фиксированное плоскостопие I-III степени;
6. Профилактика плоскостопия;
7. Вальгусная деформация стопы;
8. Нарушение осанки;
9. Заболевания позвоночника;
10. Венозная недостаточность и варикоз;
11. Боли в мышцах ног и спины
12. Деформация стоп;
13. Пяточная шпора;
14. Разная длина нижних конечностей.

Использование изделий позволяет снижать нагрузку с болевых участков стопы и обеспечивает коррекцию положения стопы.

Изготавливаются серийно для эксплуатации в стандартной, профилактической или ортопедической обуви.

Перед применением стелек ортопедических и вкладных приспособлений проконсультируйтесь с врачом.

При эксплуатации изделий следует соблюдать условия:

использовать строго по назначению и в соответствии с размерами стопы и обуви;
просушивать при комнатной температуре: не допускается сушка на обогревательных поверхностях (обогревательных радиаторах);
не подвергать воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 9396-001-55870-2012 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 месяца со дня приобретения.

Гарантийный срок хранения изделий – 24 месяца со дня изготовления.

В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит замену и ремонт изделий, преждевременно вышедших из строя не по вине потребителя, бесплатно.

Условия транспортирования

Изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена сохранность от загрязнений, механических повреждений.

Не допускается хранение и транспортирование изделий с маслами, кислотами, щелочами.

Стельки и полустельки ортопедические

Наименование	Модель	Размеры штихмасовые	Применяемые материалы
Стельки ортопедические бескаркасные Luomma	Lum 100 - Lum 150	с 35 по 45	Натуральная кожа, вулканизированный латекс, абсорбирующая смесовая ткань, пробка
Стельки ортопедические каркасные Luomma	Lum 200 – Lum 250	с 35 по 45	Натуральная кожа, упругий полимерный каркас, вулканизированный латекс, абсорбирующая смесовая ткань, силиконовые вставки
Полустельки ортопедические бескаркасные Luomma	Lum 300 – Lum 350	с 35 по 45	Натуральная кожа, вулканизированный латекс, абсорбирующая смесовая ткань, пробка
Полустельки ортопедические каркасные Luomma	Lum 400 – Lum 450	с 35 по 45	Натуральная кожа, упругий полимерный каркас, вулканизированный латекс, абсорбирующая смесовая ткань, силиконовые вставки.
Стельки ортопедические детские Luomma	Lum 500 – Lum 550	с 22 по 35	Натуральная кожа, вулканизированный латекс, упругий полимерный каркас, абсорбирующая смесовая ткань, силиконовые вставки

Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом.

Подбирается в соответствии с размерами стопы.

Стельки и полустельки ортопедические вкладывают в стандартную обувь с закрытой пяткой и с каблуком высотой не более сорока мм так, чтобы пятка минатора упиралась в задник обуви, а положение вставок совпадало с анатомическими сводами стопы.

Следует исключать подгибание передней, мягкой части стелек вниз.

Каждый день вынимайте стельки и полустельки ортопедические из обуви и храните их вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей.

Загрязненные стельки и полустельки ортопедические (кроме кожаных) мойте холодной водой с мылом и сушите без применения нагревательных приборов. При высокой температуре воды или сушке у нагревательных приборов стельки теряют форму и эластические свойства.

Кожаные поверхности стелек и полустелек ортопедических протирайте мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором, и обязательно дайте им высохнуть.

При ношении стелек и полустелек ортопедических в течение первых дней возможны дискомфортные ощущения, связанные с "отвыканием" стопы от привычного положения. Спустя короткое время дискомфорт исчезает.

По мере снашивания стелек и полустелек ортопедических их следует заменить новыми.

Пелот ортопедический переднего отдела стопы Luomma

Наименование	Модель	Размеры штихмассовые	Применяемые материалы
Пелот ортопедический переднего отдела стопы Luomma	Lum 600 – Lum 650	№ 1 (35-37), № 2 (38-40), № 3 (41-43)	Натуральная кожа, вулканизированный латекс

Подбирается в соответствии с размерами стопы.

Вкладывается в носочную часть обуви.

Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом.

Кожаные поверхности протирайте мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором, и обязательно дайте им высохнуть.

По мере снашивания пелота, его следует заменить на новый.

Межпальцевая перегородка

Наименование	Модель	Размеры штихмассовые	Применяемые материалы
Межпальцевая перегородка силиконовая Luomma	Lum 800 – Lum 850	S, M, L	Медицинский силикон

Межпальцевая перегородка вкладывается между пальцами ноги и обеспечивает им правильное анатомическое положение. Более широкая часть должна располагаться с подошвенной стороны стопы. Межпальцевая перегородка разделяет прижатые друг к другу пальцы, предотвращает трение, потертости, мозоли, уменьшает давление и потоотделение между пальцами.

Подбирается в соответствии с размерами стопы.

Протирайте слабым мыльным раствором. Сушить вдали от нагревательных приборов.

По мере снашивания изделия, его следует заменить на новое.

Подпяточник ортопедический (анатомической формы) Luomma

Наименование	Модель	Размеры штихмассовые	Применяемые материалы
Подпяточник ортопедический анатомической формы) Luomma	Lum 700 – Lum 750	№ 1 (35-37), № 2 (38-40), № 3 (41-43)	Натуральная кожа, вулканизированный латекс

Подбирается по размеру стопы.

Устанавливается плотно к заднику обуви. Может быть зафиксирован при помощи клеевого фиксатора.

Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом.

Кожаные поверхности протирайте мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором, и обязательно дайте им высохнуть.

По мере снашивания изделия, его следует заменить на новое.

Ортопедизирующий протектор силиконовый Luomma

Наименование	Модель	Размеры штихмассовые	Применяемые материалы
Ортопедизирующий протектор силиконовый Luomma	Lum 900 – Lum 950	S, M, L	Медицинский силикон

Подбирается по размеру стопы.

Разделяет прижатые друг к другу пальцы, предотвращает трение, потертости, мозоли;

Ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе;

Помещается между пальцами ступни.

Протирать слабым мыльным раствором. Сушить вдали от нагревательных приборов.

По мере снашивания изделия, его следует заменить на новое.

Защитная наклейка Luomma

Наименование	Модель	Размеры штихмассовые	Применяемые материалы
Защитная наклейка Luomma	Lum 00 – Lum 50		Натуральная кожа, медицинский силикон


Наклеивается внутри обуви в любом желаемом месте.

Применяется при потертостях, мозолях и воспалениях кожных покровов.

Позволяет уменьшить болевые ощущения.

Кожаные поверхности протирайте мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором, и обязательно дайте им высохнуть.

По мере снашивания изделия, его следует заменить на новое.

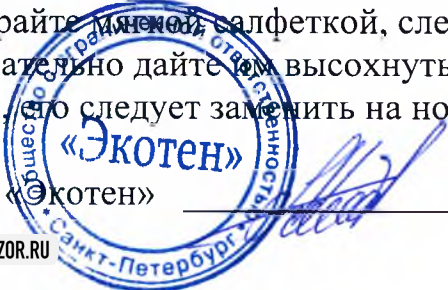

Генеральный директор ООО «Экотен» _____ А.Г. Осипов

Пронумеровано и прошнуровано 4 листов

Генеральный директор Г.Осипов

