

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор ООО  
«Биомеханические системы»

\_\_\_\_\_ Липнер Б.С.

«01» марта 2010 г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
по эксплуатации**

**БИНТЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ**

**ORTHOFORMA CAST, ORTHOFORMA SPLINT**

**«СОГЛАСОВАНО»**

Директор ФГУ  
«ГНЦ ЛМ ФМБА РФ»

Проф. А.В. Гейниц



2010 год



1. Перед применением полиуретанового бинта на поврежденную поверхность желательно надеть специальный подшиновый чулок и обернуть его слоем специальной ваты.
2. Единоновременно открывайте только одну упаковку с бинтом.
3. Для бинтов **ORTHOFORMA CAST**: Поместите рулон полиуретанового бинта в воду комнатной температуры (21-25 градусов Цельсия) на 5-10 секунд. Чтобы сократить время приготовления повязки, рекомендуется отжать рулон 2-3 раза. Время приготовления зависит от температуры воды. Чем выше температура воды, тем меньше время приготовления повязки. Повязка накладывается спиралевидно в течение 2-3 минут. Каждый последующий виток должен захватывать от половины до 2/3 ширины предыдущего. Отмоделируйте повязку и придайте ей необходимую форму. Не рекомендуется накладывать более 6 слоев (это может привести к ухудшению вентиляции).
4. Для бинтов **ORTHOFORMA SPLINT**: Поместите шину в воду комнатной температуры (21-25 градусов Цельсия) на 5-10 секунд. Чтобы сократить время приготовления шины, рекомендуется отжать ее 2-3 раза. Время приготовления зависит от температуры воды. Чем выше температура воды, тем меньше время приготовления. Отмоделируйте шину и придайте ей необходимую форму для правильной фиксации конечности.
5. Для приобретения окончательной жесткости необходимо подождать 25-30 минут.
6. При контакте незатвердевшего бинта с кожей место контакта необходимо обработать спиртом.



1 Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23  
Тел. (812)740 70 68, факс (812)740 70 68,  
[info@atletika.ru](mailto:info@atletika.ru), [www.atletika.ru](http://www.atletika.ru)



7. Бинт нельзя использовать при поврежденной упаковке.
8. Бинт может находиться на поврежденной поверхности до образования костного мозоля.
9. Бинт рекомендуется снимать с поврежденной поверхности только в амбулаторных условиях специально обученным персоналом.
10. Если снятие бинта происходит в домашних условиях, то снятие бинта следует проводить с помощью специальных ножниц, соблюдая осторожность (предотвращение повреждения кожных покровов).
11. После снятия бинта рекомендуется обработать поверхность снятия бинта теплой водой с мылом или лосьоном, не содержащим спирт.



2 Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23  
Тел. (812)740 70 68, факс (812)740 70 68,  
[info@atletika.ru](mailto:info@atletika.ru), [www.atletika.ru](http://www.atletika.ru)