

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «НПФ «МЕДИКОН»



С. А. Захаров

« 15 » апреля 2021 г.

КОРЗИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
КММ – «МЕДИКОН»

Руководство по эксплуатации
ИПОС.942319.200 РЭ

Версия 2/2021

Инв. № подл.	Подпись и дата	Вз

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователя с Корзинами металлическими медицинскими КММ-«МЕДИКОН» с принадлежностями (далее – корзины с принадлежностями, корзины, принадлежности).

Руководство устанавливает правила эксплуатации Корзин с принадлежностями.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150-69.

Корзины с принадлежностями в зависимости от степени потенциального риска применения относятся к классу 1 по приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н.

По режиму применения корзины с принадлежностями относятся к изделиям многократного циклического использования.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Корзины металлические медицинские КММ-«МЕДИКОН» с принадлежностями (в дальнейшем корзины) предназначены для размещения, транспортировки и хранения в них медицинских инструментов и стерильных материалов, проведения предстерилизационной очистки механизированным способом в автоматических моечно-дезинфекционных машинах, водоструйных и ультразвуковых, для стерилизации инструментов в паровых и воздушных стерилизаторах, хранение и транспортировка инструментов для стерилизации, комплектования наборов инструментов на операции или медицинские манипуляции.

2.2 Область применения: специализированные отделения медицинских лечебных, лечебно-профилактических учреждений.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


3.1 Перечень исполнений корзин и принадлежностей приведен в Таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Исполнение	Наименование изделия	Обозначение комплекта документации
КМКр-«МЕДИКОН»	Корзина моечная с крышкой	ИПОС.942319.201
КСрК-«МЕДИКОН»	Корзина сетчатая с ручками и крышкой	ИПОС.942319.202
КМП-«МЕДИКОН»	Корзина моечная проволочная	ИПОС.942319.203
КПКЭ -«МЕДИКОН»	Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой	ИПОС.942319.204
КПЦ-«МЕДИКОН»	Корзина проволочная цилиндрическая с крышкой	ИПОС.942319.205
КПСМ-«МЕДИКОН»	Корзина проволочная для стерильных материалов	ИПОС.942319.206
Принадлежности:		
ЛдЭ-«МЕДИКОН»	Ложемент для эндоскопов	ИПОС.942319.207
ВдК-«МЕДИКОН»	Вкладыш- делитель в корзину	ИПОС.942319.208
НШК-«МЕДИКОН»	Настенные шины с кронштейнами для корзин	ИПОС.942319.209
ТКК-«МЕДИКОН»	Тележка с кронштейнами для корзин	ИПОС.942319.210

3.2 Габаритные размеры, масса и максимальная рабочая нагрузка корзин и принадлежностей к ним указаны в таблицах на рисунках 1-10.

					ИПОС.942319.200 РЭ				
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата					
Разработал		Иливанов		19.04.11	Корзины металлические медицинские КММ-«МЕДИКОН» Руководство по эксплуатации				
Проверил		Захаров		19.04.11					
Н. контр.		Карпова		19.04.11	ООО «НПФ «МЕДИКОН»				
Утвердил		Захаров		19.04.11					
					Литер.		Лист		Листов
							2		20

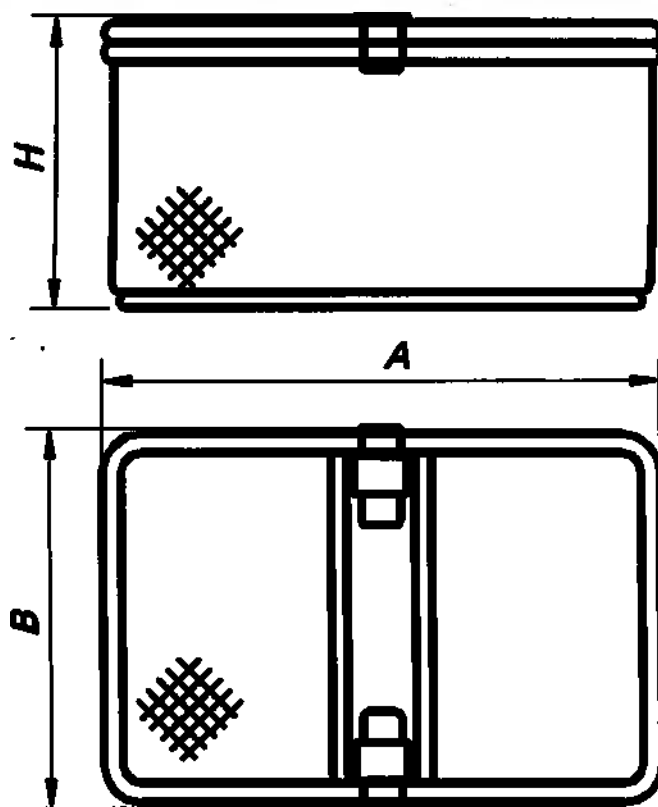

Обозначение	А, мм		В, мм		Н*, мм		Масса, кг не более	Макс.(кг) рабочая нагрузка
ИПОС.942319.201	80	±5,0	80	±5,0	40÷80	±5,0	0,5	0,5
-01	100	±5,0	100	±5,0	40÷80	±5,0	0,6	0,6
-02	120	±5,0	120	±5,0	50÷90	±5,0	0,7	0,7
-03	200	±8,0	100	±5,0	50÷90	±5,0	0,8	0,8
-04	250	±8,0	170	±5,0	50÷90	±5,0	1,1	1,1
-05	300	±10,0	200	±8,0	60÷100	±5,0	1,2	1,9
-06	340	±10,0	250	±8,0	60÷100	±5,0	1,5	2,4
-07	450	±10,0	340	±8,0	60÷100	±5,0	1,7	3,2
-08	80	±5,0	40	±5,0	20÷40	±5,0	0,4	0,5
-09	105	±5,0	70	±5,0	20÷60	±5,0	0,6	0,6
-10	150	±5,0	50	±5,0	20÷60	±5,0	0,7	0,7
-11	150	±8,0	140	±5,0	20÷60	±5,0	0,8	0,8
-12	190	±8,0	85	±5,0	20÷60	±5,0	0,8	0,8
-13	200	±8,0	100	±5,0	20÷60	±5,0	0,8	0,8
-14	220	±8,0	140	±5,0	20÷60	±5,0	0,9	0,9
-15	210	±8,0	150	±5,0	20÷60	±5,0	0,9	0,9
-16	240	±8,0	90	±5,0	20÷60	±5,0	0,9	0,9
-17	240	±8,0	120	±5,0	20÷60	±5,0	1	1,1


* Шаг изменения высоты Н – 20 мм.

Рисунок 1. Корзина моечная с крышкой КМКр – «МЕДИКОН».
Габаритные размеры.

ИПОС.942319.200 РЭ

Лист


3

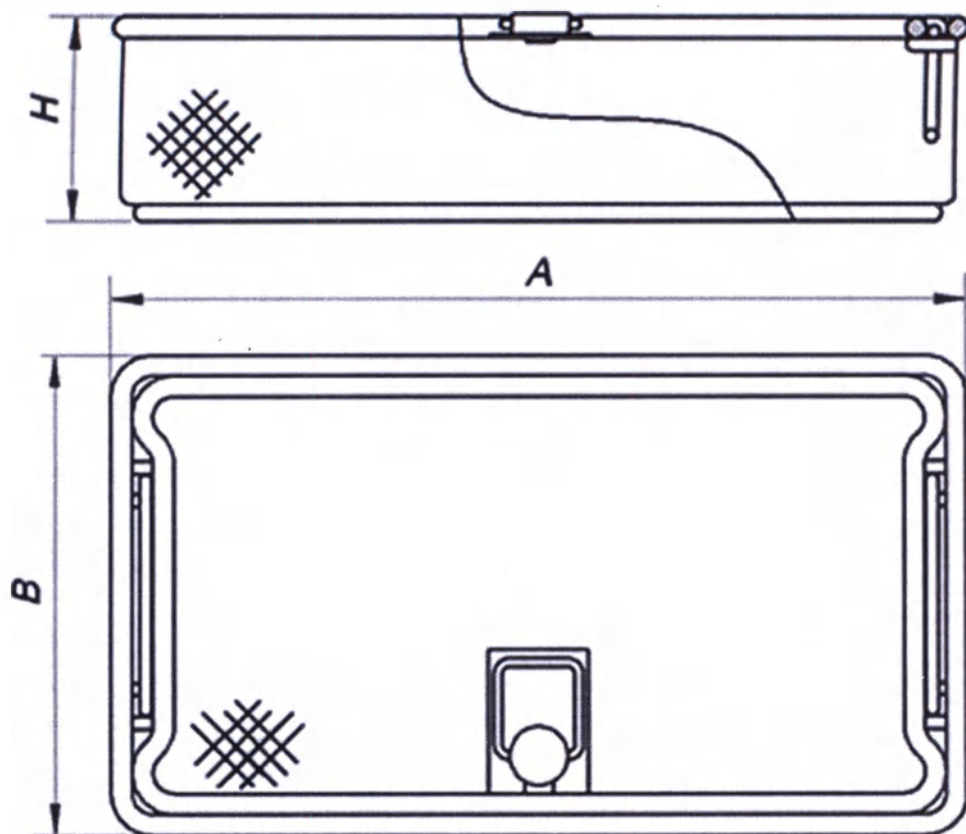

Обозначение	А, мм		В, мм		Н, мм		Масса, кг не более	Макс.(кг) рабочая нагрузка
ИПОС.942319.202	240	±5,0	250	±5,0	50	±5,0	1,05	4,0
-01	240	±5,0	250	±5,0	70	±5,0	1,1	4,0
-02	240	±5,0	250	±5,0	100	±5,0	1,16	4,0
-03	480	±10,0	250	±5,0	50	±5,0	1,9	6,0
-04	480	±10,0	250	±5,0	70	±5,0	2	6,0
-05	480	±10,0	250	±5,0	100	±5,0	2,1	6,0
-06	405	±10,0	250	±5,0	50	±5,0	1,7	5,0
-07	405	±10,0	250	±5,0	70	±5,0	1,8	5,0
-08	405	±10,0	250	±5,0	100	±5,0	1,9	5,0
-09	450	±10,0	225	±5,0	50	±5,0	1,75	5,0
-10	450	±10,0	225	±5,0	70	±5,0	1,85	5,0
-11	450	±10,0	225	±5,0	100	±5,0	1,95	5,0
-12	540	±10,0	250	±5,0	50	±5,0	2,5	7,0
-13	540	±10,0	250	±5,0	70	±5,0	2,6	7,0
-14	540	±10,0	250	±5,0	100	±5,0	2,7	7,0
-15	600	±10,0	250	±5,0	50	±5,0	3,13	8,0
-16	600	±10,0	250	±5,0	70	±5,0	3,23	8,0
-17	600	±10,0	250	±5,0	100	±5,0	3,33	8,0

Рисунок 2 – Корзина сетчатая с ручками и крышкой КСрК – «МЕДИКОН».
Габаритные размеры.


					ИПОС.942319.200 РЭ	Лист
						4
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

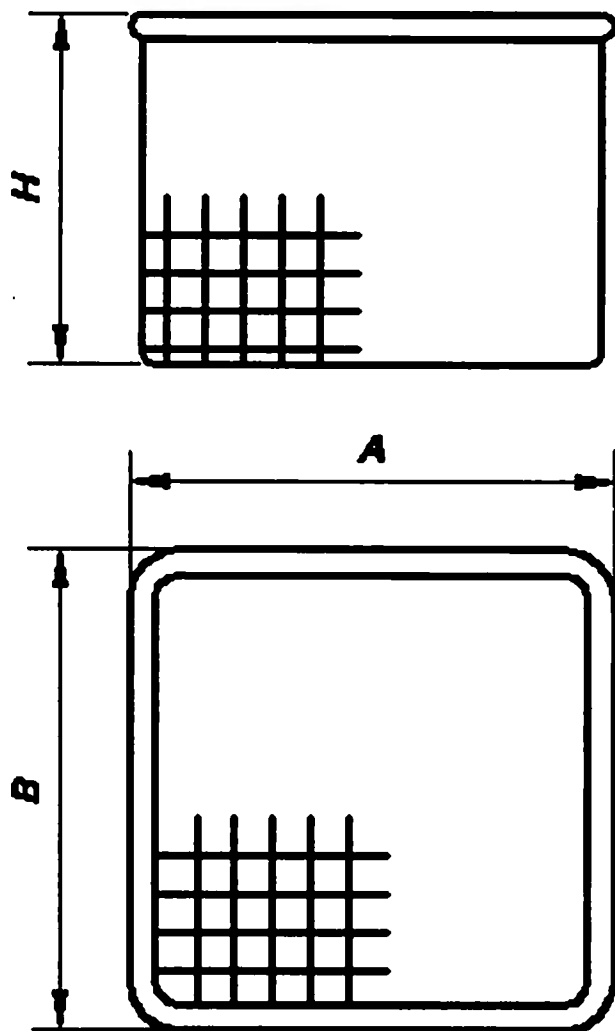

Обозначение	А, мм		В, мм		Н, мм		Масса, кг не более	Макс.(кг) рабочая нагрузка
ИПОС.942319.203	100	±5,0	100	±5,0	100	±5,0	0,2	0,6
-01	120	±5,0	120	±5,0	100	±5,0	0,23	0,8
-02	150	±5,0	150	±5,0	120	±5,0	0,31	1,1
-03	180	±5,0	180	±5,0	180	±5,0	0,48	1,4
-04	200	±8,0	200	±8,0	200	±8,0	0,63	1,8
-05	300	±10,0	200	±8,0	200	±8,0	0,8	2,1
-06	400	±10,0	200	±8,0	200	±8,0	1,4	2,9

Рисунок 3. Корзина моечная проволочная КМП – «МЕДИКОН».
Габаритные размеры.


					ИПОС.942319.200 РЭ	Лист
						5
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

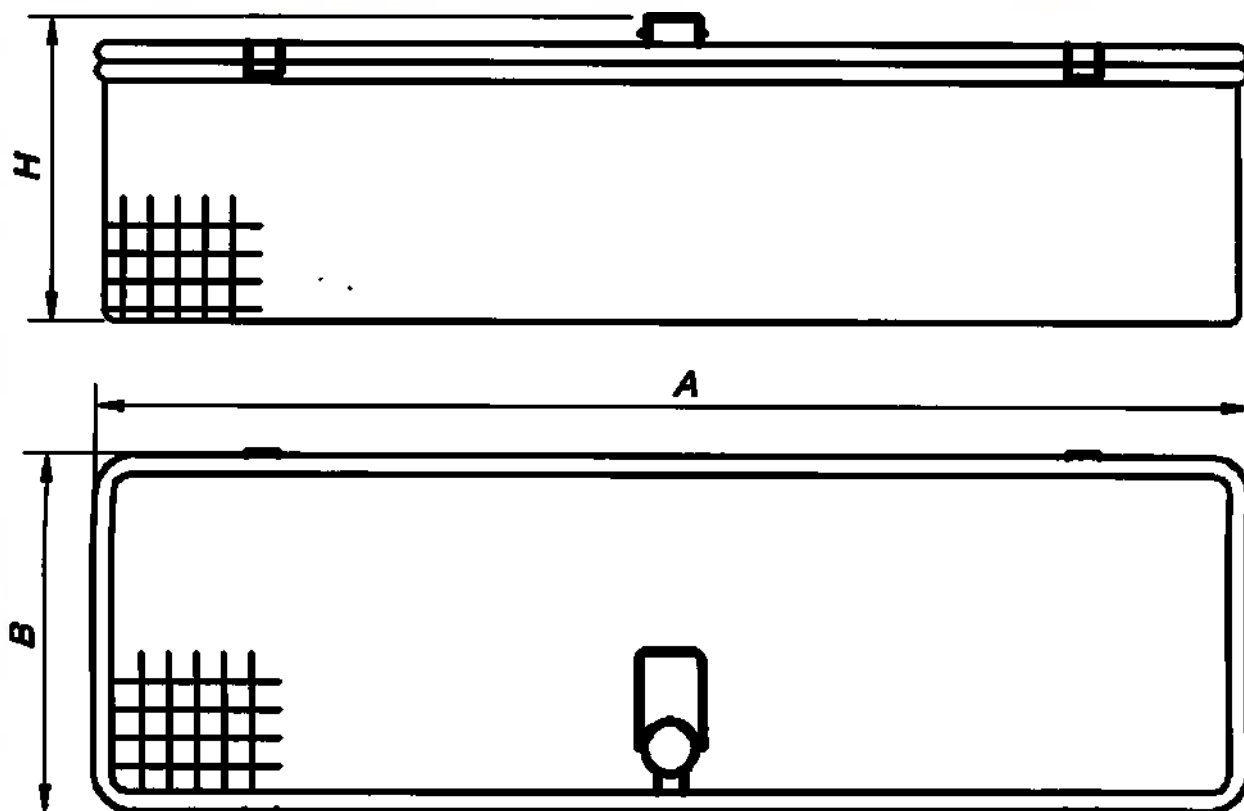

Обозначение	А, мм		В, мм		Н, мм		Масса, кг не более	Макс.(кг) рабочая нагрузка
ИПОС.942319.204	290	±5,0	80	±5,0	55	±5,0	0,58	1,2
-01	290	±5,0	80	±5,0	65	±5,0	0,60	1,2
-02	465	±10,0	80	±5,0	55	±5,0	0,64	2,0
-03	465	±10,0	80	±5,0	65	±5,0	0,66	2,0
-04	290	±5,0	150	±5,0	65	±5,0	0,68	2,1
-05	465	±10,0	150	±5,0	55	±5,0	0,92	3,9
-06	700	±15,0	250	±5,0	85	±5,0	1,4	4,2
-07	640	±15,0	150	±10,0	80	±5,0	1,2	4,0
-08	670	±15,0	80	±10,0	55	±5,0	1,4	4,0
-09	350	±10,0	125	±10,0	55	±5,0	0,6	2,0
-10	480	±10,0	320	±10,0	75	±5,0	0,72	3,5
-11	460	±10,0	150	±10,0	80	±5,0	0,68	3,0
-12	500	±15,0	135	±10,0	55	±5,0	1,1	3,5

Рисунок 4. Корзина проволочная для эндоскопов с крышкой
КПКЭ – «МЕДИКОН». Габаритные размеры.

					ИПОС.942319.200 РЭ	Лист
						6
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

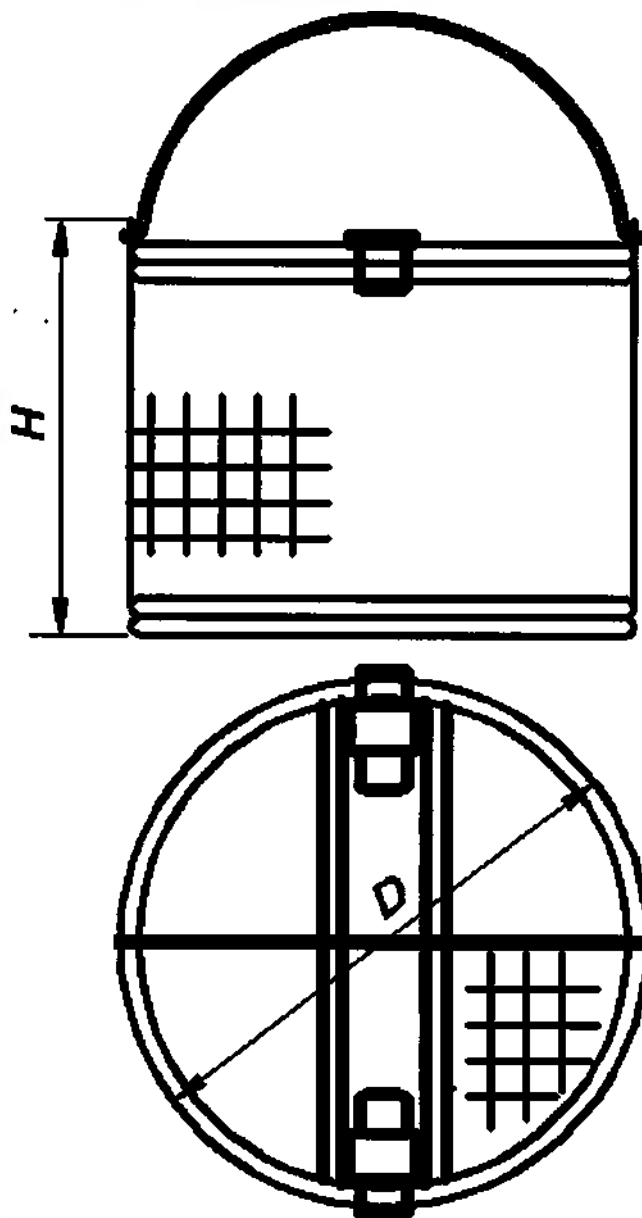

Обозначение	D, мм		H*, мм		Масса, кг не более	Макс.(кг) рабочая нагрузка
ИПОС.942319.205	200	±10,0	100÷200	±5,0	0,85	4,0
- 01	250	±15,0	150÷250	±8,0	1,35	4,5
-02	300	±15,0	150÷250	±8,0	1,41	5,0
-03	340	±20,0	150÷250	±10,0	1,72	6,0
-04	390	±20,0	200÷300	±10,0	2,2	6,0

*Шаг изменения высоты – 25 мм.


Рисунок 5. Корзина проволочная цилиндрическая с крышкой
КПЦ – «МЕДИКОН». Габаритные размеры.

Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата

ИПОС.942319.200 РЭ

Лист

7

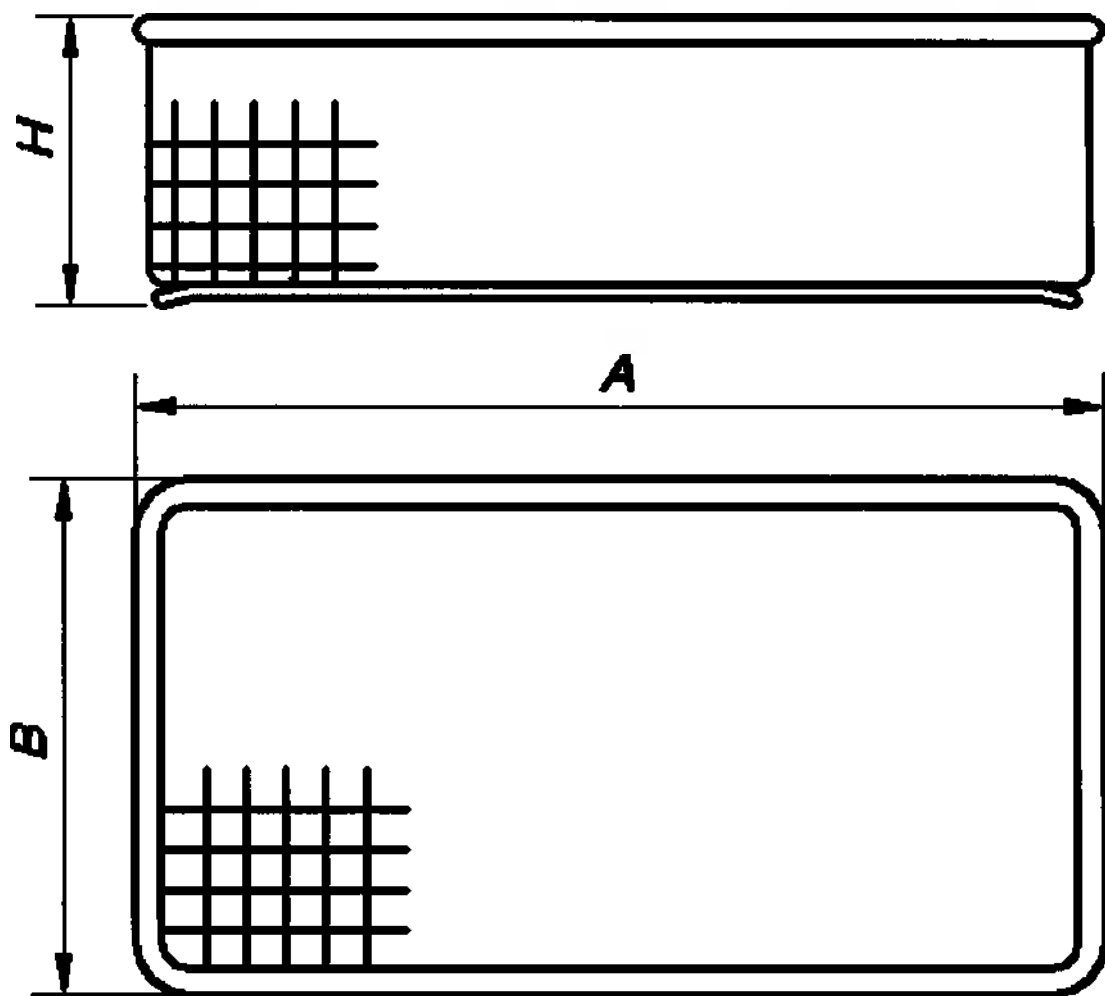

Обозначение	А, мм		В, мм		Н, мм		Масса, кг не более	Макс.(кг) рабочая нагрузка
ИПОС.942319.206	575	±25,0	280	±10,0	135	±5,0	1,38	10,0
-01	575	±25,0	280	±10,0	265	±5,0	1,98	10,0
-02	600	±25,0	400	±15,0	95	±5,0	1,3	10,0
-03	600	±25,0	400	±15,0	125	±5,0	1,9	10,0
-04	600	±25,0	400	±15,0	190	±5,0	2,5	10,0
-05	300	±15,0	300	±15,0	130	±5,0	1,0	10,0
-06	300	±15,0	300	±15,0	280	±5,0	1,4	10,0
-07	600	±25,0	300	±15,0	130	±5,0	1,5	10,0
-08	600	±25,0	300	±15,0	280	±5,0	2,2	10,0


Рисунок 6. Корзина проволочная для стерильных материалов
КПСМ – «МЕДИКОН». Габаритные размеры.

Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата
-----	------	-------------	-------	------

ИПОС.942319.200 РЭ

Лист


8

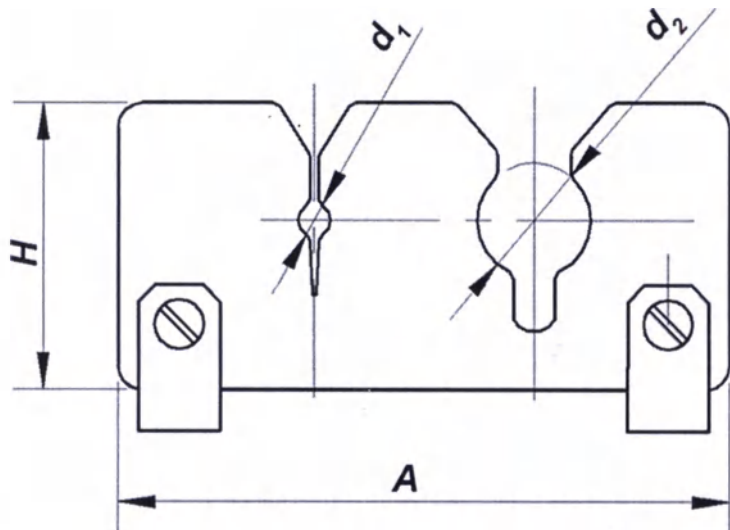

Обозначение	A, мм	B, мм	H, мм	B ₁ , мм	d ₁ , мм	d ₂ , мм	Масса (комплект), кг не более
ИПОС.942319.207	75 ±4	6,5 ±1,5	35±5,0	25 ±5	4±0,5	14±1,5	0,08

Рисунок 7. Ложемент для эндоскопов
ЛдЭ-«МЕДИКОН». Габаритные размеры

					ИПОС.942319.200 РЭ	Лист
						9
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

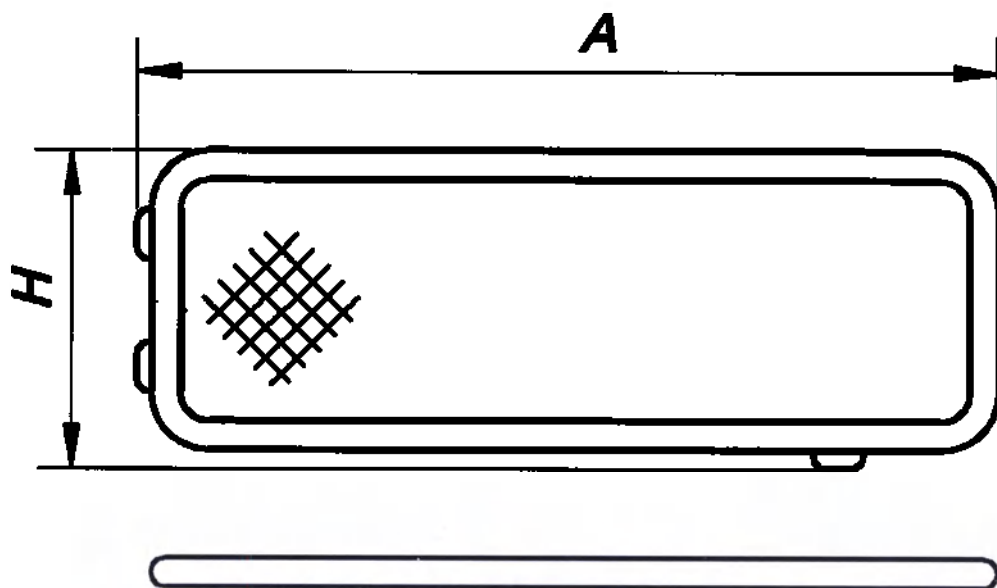

Обозначение	А, мм		Н, мм		Масса, кг не более
ИПОС.942319.208	170	±2,0	40	±2,0	0,15
-01	250	±2,0	40	±2,0	0,20
-02	340	±3,0	40	±2,0	0,24
-03	450	±3,0	40	±2,0	0,30
-04	170	±2,0	60	±2,0	0,17
-05	250	±2,0	60	±2,0	0,23
-06	340	±3,0	60	±2,0	0,28
-07	450	±3,0	60	±2,0	0,32
-08	170	±2,0	90	±2,0	0,19
-09	250	±2,0	90	±2,0	0,25
-10	340	±3,0	90	±2,0	0,31
-11	450	±3,0	90	±2,0	0,35
-12	280	±3,0	125	±3,0	0,32
-13	280	±3,0	280	±3,0	0,65

Рисунок 8. Вкладыш-делитель в корзину ВдК – «МЕДИКОН».
Габаритные размеры.


					Лист
ИПОС.942319.200 РЭ					10
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата	



Обозначение	Кол-во кронштейнов на 1 шине	H, см		Масса (комплект а), кг не более	Макс. рабочая нагрузка на 2 шины, кг	Нагрузка на каждый кронштейн, кг.
ИПОС.942319.209	3	100	±5,0	4,0	30,0	5,0
-01	4	150	±5,0	6,0	40,0	5,0

Рисунок 9. Настенная шина с кронштейнами для корзин НШК – МЕДИКОН». Габаритные размеры.

					ИПОС.942319.200 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата		11

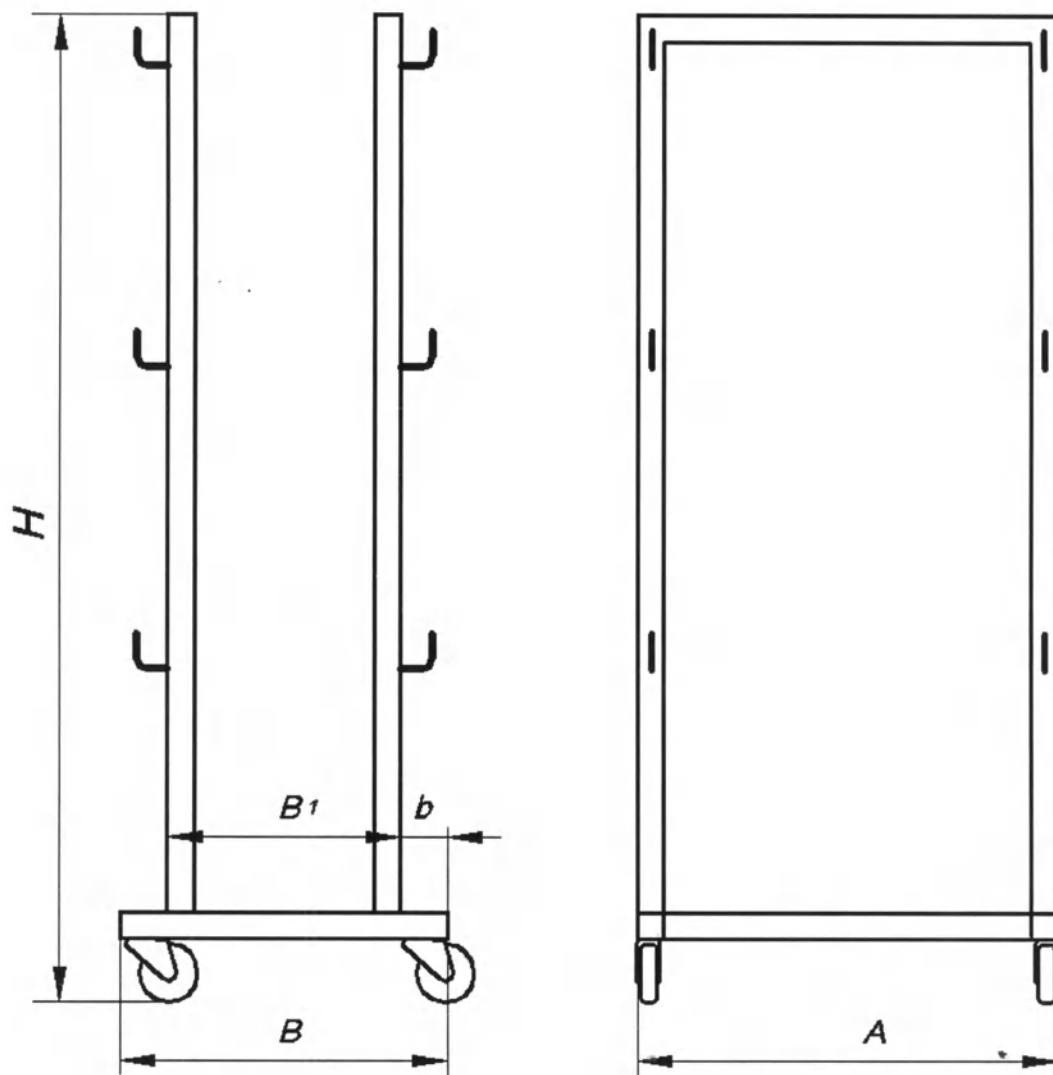

Обозначение	A, см	B, см	H, см	B1, см	b, см	Масса, кг, не более	Макс.кг, рабочая нагрузка	Нагрузка на кронштейн, кг
ИПОС.942319.210	59±5,0	58±5,0	150±5,0	0	25±3,0	7,0	50,0	5,0
-01	59±5,0	58±5,0	150±5,0	0	45±3,0	7,0	50,0	5,0
-02	59±5,0	80±5,0	150±5,0	30±2,0	25±3,0	10,4	60,0	5,0

Рисунок 10. Тележка с кронштейнами для корзин ТКК – МЕДИКОН». Габаритные размеры.

ИПОС.942319.200 РЭ

Лист

12

Изм Лист № документа Подп. Дата

3.3 Корзины, ложемент для эндоскопов, вкладыш-делитель в корзину, настенные шины с кронштейнами для корзин и тележка с кронштейнами для корзин изготовлены из ряда нержавеющей сталей: 12X18Н9Т, 12X18Н10Т, 08X18Н10Т по ГОСТ 5632-2014. Мягкая часть ложемента изготовлена из медицинской силиконовой резины типа Elastosil R Plus (4305 серия).

3.4 Наружные металлические поверхности корзин и принадлежностей блестящие или матовые. На поверхностях корзин и принадлежностей отсутствуют трещины, раковины, забоины, царапины, выкрошенные места, заусенцы. Сварные швы ровные, плотные, без наплывов, прожогов, непроваренных мест. Швы зачищены. Прорези в мягкой части ложемента для эндоскопов ровные, без заусенцев.

3.5 Корзины обладают коррозионной стойкостью в условиях эксплуатации и хранения.

3.6 Корзины обладают устойчивостью на горизонтальной плоскости стола.

3.7 Тележка для корзин с размещенной максимальной рабочей нагрузкой легко, без заеданий перемещается по горизонтальной поверхности бесшовного каменного пола с усилием перемещения не более 50 Н.

3.8 Тележка (с полной, односторонней и без нагрузки) устойчива на горизонтальной плоскости.

3.9 Крышка для корзины свободно одевается и плотно по ограничителям (направляющим) прилегает к верхнему краю корзины. Фиксация крышки на корзине осуществляется одним или двумя замками.

3.10 Вкладыш-делитель в корзину и ложемент для эндоскопов фиксируются в пазах корзины, обеспечивая разделение стерилизуемых изделий внутри корзины и размещение эндоскопа соответственно.

3.11 Корзины проволочные для стерильных материалов КПСМ – «МЕДИКОН»), имеют внизу рамку с подгибами на углах для обеспечения устойчивости при вертикальном штабелировании.

3.12 Тележка оснащена четырьмя поворотными колесами с защитным бампером диаметром не более, 75 мм, из них два – со стопором. При фиксации стопоров тележка не должна перемещаться/колеса не должны прокручиваться при приложении усилия перемещения менее 120 Н.

3.13 Корзины с принадлежностями при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ Р 50444-2020 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

3.14 Корзины с принадлежностями при эксплуатации устойчивы к воздействию механических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для изделий группы 2.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки корзин входят:

- корзина одного наименования - 1 шт.
- крышка (если предусмотрено) - 1 шт.
- руководство по эксплуатации ИПОС.942319.200 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- ложемент для эндоскопов* (при необходимости) - 1 комп.**
- вкладыш-делитель*** в корзину (при необходимости) - 1 шт.
- настенные шины с кронштейнами для корзин (при необходимости) - 1 комп.**
- тележка с кронштейнами для корзин (при необходимости) - 1 шт.
- * поставляется только для исполнения КПКЭ – «МЕДИКОН»;
- ** комплект 2 штуки;

ИПОС.942319.200 РЭ

Лист

13

-*** поставляется только для исполнений КСрК – «МЕДИКОН», КМКр-«МЕДИКОН», КПСМ-«МЕДИКОН»;

- по желанию заказчика корзины исполнений КМКр-«МЕДИКОН», КПЦ-«МЕДИКОН» могут поставляться без крышки.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Перед использованием необходимо провести расконсервацию корзин. Извлечь корзины и принадлежности их транспортной тары и освободить от полиэтилена. Законсервированные поверхности протереть марлевым тампоном, слабо смоченным спиртом или бензином.

5.2 Произвести проверку комплектности согласно разделу 4 Комплект поставки.

5.3 Корзины необходимо установить на ровное место и проверить на устойчивость.

5.4 Тележку собрать в соответствии со схемой на Рис. 11, а именно:- стойку поз.1 вставить в направляющие основания поз.2 и закрепить при помощи 4 винтов М6х16 ГОСТ 11738-84 поз.4; в резьбовые гнезда основания 2 завинтить колесные опоры 3;- собранную тележку установить на ровное место и проверить на устойчивость.

5.5 Настенную шину поз.1 закрепить на вертикальной стене (кирпичной или бетонной) по схеме на Рис. 12 при помощи шурупов с полукруглой головкой (Шуруп 2-5х40.2 ГОСТ 1144-80) поз.3, которые ввинчивают в предварительно установленные в стену дюбели полиамидные для строительства (Дюбель 45-5-8У3 ГОСТ 26998-86) поз.2.

5.6 Перед использованием корзины, крышка для корзины, ложемент для эндоскопов и вкладыш-делитель в корзину должны быть подвержены дезинфекции согласно МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа “Лотос” по ГОСТ 25644-96. Корзины устойчивы к стерилизации методом автоклавирования при температуре пара (132+2) С в течение 20 мин. или (120+2) С в течение 45 мин.

5.7 Настенные шины с кронштейнами для корзин и тележка с кронштейнами для корзин должны быть подвержены дезинфекции согласно МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа “Лотос” по ГОСТ 25644-96.

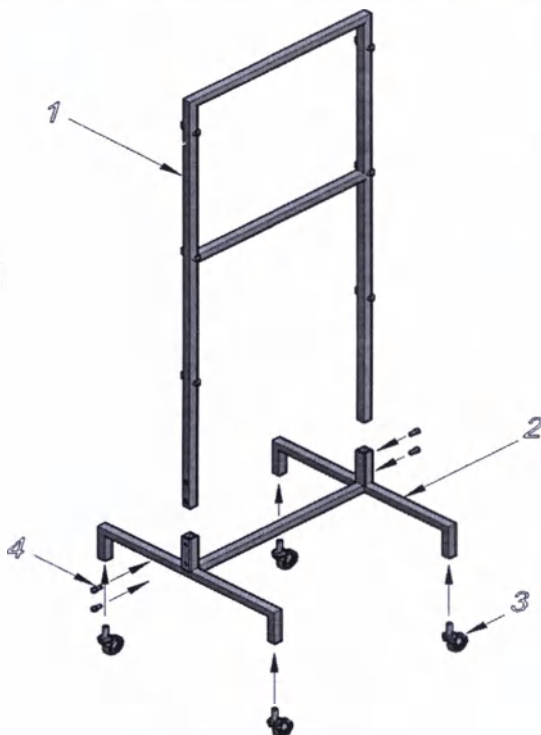


Рисунок11 Схема сборки тележки с кронштейнами для корзин ТКК-«МЕДИКОН»



Рисунок 12 Схема монтажа настенных шин с кронштейнами для корзин НШК-«МЕДИКОН»

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ)

6.1 Корзины необходимо установить на ровное место и расположить в них инструмент и закрыть крышкой (при наличии).

6.2 Установить корзину в моечно-дезинфекционной машине (при проведении дезинфекции) или в стерилизаторе (при проведении стерилизации).

6.3 После окончания цикла дезинфекции или стерилизации извлечь корзины и установить их на ровное место (для извлечения продезинфицированных или простерилизованных материалов), на тележку или на настенную шину с кронштейнами (для хранения).

7. МАРКИРОВКА

7.1 На каждой корзине и на принадлежностях (на дне или боковой поверхности) указываются:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условный знак “Н” или “Нержавеющая сталь”;
- наименование корзины (с указанием исполнения);
- размеры корзины или принадлежности (длина, ширина, высота или высота и диаметр)

в соответствии с таблицами на рисунках 1-10 настоящего руководства;

- дата изготовления (месяц и год);
- срок службы (не менее 5 лет);
- обозначение технических условий;

ИПОС.942319.200 РЭ					Лист
					15
Изм	Лист	№ документа	Подп	Дата	
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU					

- наименование материала;
- номер лицензии на производство медицинской техники;
- номер и дата регистрационного удостоверения.

Маркировка выполняется механическим или электрохимическими способом шрифтом ПО 1,5 . . . ПО 2,0 по ГОСТ 2930-62.

7.2 На каждой коробке приклеивается ярлык, на котором указываются:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование корзины или принадлежности (с указанием исполнения);
- условный знак “Н” или “Нержавеющая сталь”;
- обозначение технических условий;
- номер лицензии на производство медицинской техники;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- количество корзин или принадлежностей;
- дата изготовления (месяц и год);
- срок службы (не менее 5 лет);
- отметка о приемке изделия ОТК.

7.3 Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192-96. На ящики наносятся манипуляционные знаки, соответствующие значениям: “Хрупкое, осторожно!” “Беречь от влаги”.

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

8.1. К эксплуатации корзин с принадлежностями допускаются лица медицинского персонала, внимательно изучившие настоящее руководство, освоившие правила эксплуатации корзин и используемых моечно-дезинфекционных машин и стерилизаторов.

8.2. Персонал должен пройти подготовку о применении средств предстерилизационной очистки и дезинфицирующих средств, а также действиях по оказанию первой помощи в случаях отравления согласно действующим нормативным и методическим документам.

8.3. Запрещается эксплуатировать в следующих случаях:

Корзины, вкладыши, ложементы:

- наличие следов коррозии на поверхности корзин;
- наличие механических повреждений.

Тележки:

- неустойчивое положение на поверхности;
- наличие механических повреждений;
- неисправность тормозных устройств (стопоров)

Настенные шины с кронштейнами:

- наличие механических повреждений;
- отсутствие или неисправность хотя бы одного из пары кронштейнов для закрепления

корзин.

8.4. Не следует допускать к работе с дезинфекционными средствами лиц с повышенной чувствительностью к данным препаратам.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Гарантированный срок эксплуатации корзин и принадлежностей– не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Средний срок службы корзин с принадлежностями до списания – не менее 5 лет. Основным признаком отказа является появление коррозии

					ИПОС.942319.200 РЭ	Лист
						16
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

- 9.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 9.3 Адрес предприятия-изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «МЕДИКОН»;
- юридический адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д. 14/41
 - адрес производства: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Химическая, д.21
 - тел./ факс (843) 528-28-09, E-mail: medikon@bk.ru

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 10.1 Корзины транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 10.2 Условия транспортирования корзин – по ГОСТ 15150-69 для условий хранения 5.
- 10.3 Корзины должны храниться в защищенных от атмосферных осадков и солнечного излучения, отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре от 5 до 40 °С.

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

- 11.1 Упаковка корзин и принадлежностей выполняется по ГОСТ Р 50444-2020.
- 11.2 Перед упаковкой корзины и принадлежности обезжирены и законсервированы по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 1.
- 11.3 Срок защиты без переконсервации - 5 лет.
- 11.4 Корзины и принадлежности упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и уложены в картонные коробки типа 1 ГОСТ 33781-2016, выполненные из коробочного картона марки А, Б или В ГОСТ 7933-89.
- 11.5 Каждая коробка оклеена лентой полиэтиленовой с липким слоем по ГОСТ 20477-86 или липкой лентой из бумаги по ГОСТ 18510-87, чтобы исключить возможность вскрытия их без нарушения целостности.
- 11.6 Для транспортирования коробки с корзинами и принадлежностями укладываются в дощатые ящики типа II-1 или III-1 ГОСТ 2991-85, или фанерные ящики ГОСТ 5959-80, или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014, выложенные внутри влагонепроницаемыми материалами по ГОСТ 515-77 или ГОСТ 8828-89.
- 11.7 Масса ящика (брутто) - не более 50 кг.
- 11.8 В каждый ящик вкладывается упаковочный лист по ГОСТ Р 50444-2020.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Корзины металлические медицинские КММ-«МЕДИКОН» (с принадлежностями) ТУ 9452-005-27846954-2015

наименование исполнения изделия
ТУ 9452-005-27846954-2015

Обозначение

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Корзины металлические медицинские КММ-«МЕДИКОН» (с принадлежностями) ТУ 9452-005-27846954-2015

Заводской номер _____ подвергнут

(наименование и шифр предприятия, производившего консервацию)

консервации согласно требованиям, предусмотренным настоящим руководством.

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию произвел _____ (подпись) М.П.

Изделие после консервации принял _____ (подпись)

					ИПОС.942319.200 РЭ	Лист
						18
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Корзины металлические медицинские КММ-«МЕДИКОН» (с принадлежностями) ТУ 9452-005-27846954-2015

Заводской номер _____упакован

(наименование или шифр предприятия, производившего упаковку)

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией
Дата упаковки _____
Упаковку произвел _____(подпись) М.П.
Изделие после упаковки принял _____(подпись)

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

15.1 Рекламация в установленном порядке с приложением этикетки и руководства по эксплуатации предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д. 14/41, пом.3, ООО «НПФ «МЕДИКОН».

16. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

16.1 Утилизация должна проводиться по правилам, установленным СанПиН 2.1.3684-21 и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий.

17. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

17.1 В случае загрязнения корзин и принадлежностей провести дезинфекцию.
17.2 Тележки и настенные кронштейны – затяжка ослабленных креплений, проверка в работе 1 раз в месяц.

1 подл. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

					ИПОС.942319.200 РЭ	Лист
						19
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

Директор ООО «НПФ «МЕДИКО

С.А.Захар

Прошито и пронумеровано

19 (Десять экземпляров)

листа (ов)

