

Макеты упаковки

**Пенал для лекарственных препаратов –
«Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014**

2023

Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день
Инструкция по применению

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке согласно времени суток, закройте крышки. В определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Дезинфекция: Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут; или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Основные параметры изделия: длина — (60±5) мм; ширина — (60±5) мм; высота — (17±3) мм; масса не превышает 100 г.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.



Тиснение



СМΥК

Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день

Инструкцию по применению смотри на внутренней части упаковки.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения потребителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Пенал для лекарственных препаратов — «Таблетница «Альпина Пласт»

по ТУ 9398-019-17707123-2014 «Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день».

Правообладателем товарного знака «Wellfix» является ООО «ИРИС».

Производитель: ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.

Сделано в России

Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР», 115201, Москва, Каширский проезд,

д. 13, пом. XIV.

WELLFIX

Таблетница
на один день


WELLFIX

Таблетница на один день



WELLFIX

Таблетница
на один день

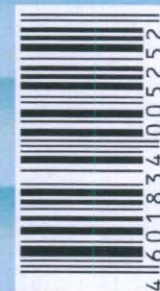

Дата производства

Партия №

Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день
Инструкция по применению

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке согласно времени суток, закройте крышки. В определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Дезинфекция: Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут; или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Основные параметры изделия: длина — (60±5) мм; ширина — (60±5) мм; высота — (17±3) мм; масса не превышает 100 г.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.



Тиснение



CMYK

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Инструкцию по применению смотри
на внутренней части упаковки.

Таблетница предназначена для
расфасовки, упорядоченного и
компактного хранения твердых
форм лекарственных средств
(капсулы, таблетки, драже) с целью
их режимного приема.

Показания: необходимость упо-
рядоченного режимного приема
твердых форм лекарственных
препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Гарантийный срок годности 5 лет
со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации —
1 год со дня получения потреби-
телем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Не подлежит обязательной серти-
фикации и декларированию в РФ.

Пенал для лекарственных препара-
тов — «Таблетница «Альпина Пласт»
по ТУ 9398-019-17707123-2014 «Таблет-
ница ПИЛЮЛЯ на 7 дней».

Правообладателем товарного знака
«Wellfix» является ООО «ИРИС».

Производитель:

ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603,
Московская обл., г. Клин, Ленинград-
ское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.

Сделано в России

Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР»,
115201, Москва, Каширский проезд,
д. 13, пом. XIV.

WELLFIX
Таблетница
на 7 дней

WELLFIX
Таблетница
на 7 дней

WELLFIX
Таблетница
на 7 дней




УДОБНАЯ В ПРИМЕНЕНИИ



Дата производства

Партия №

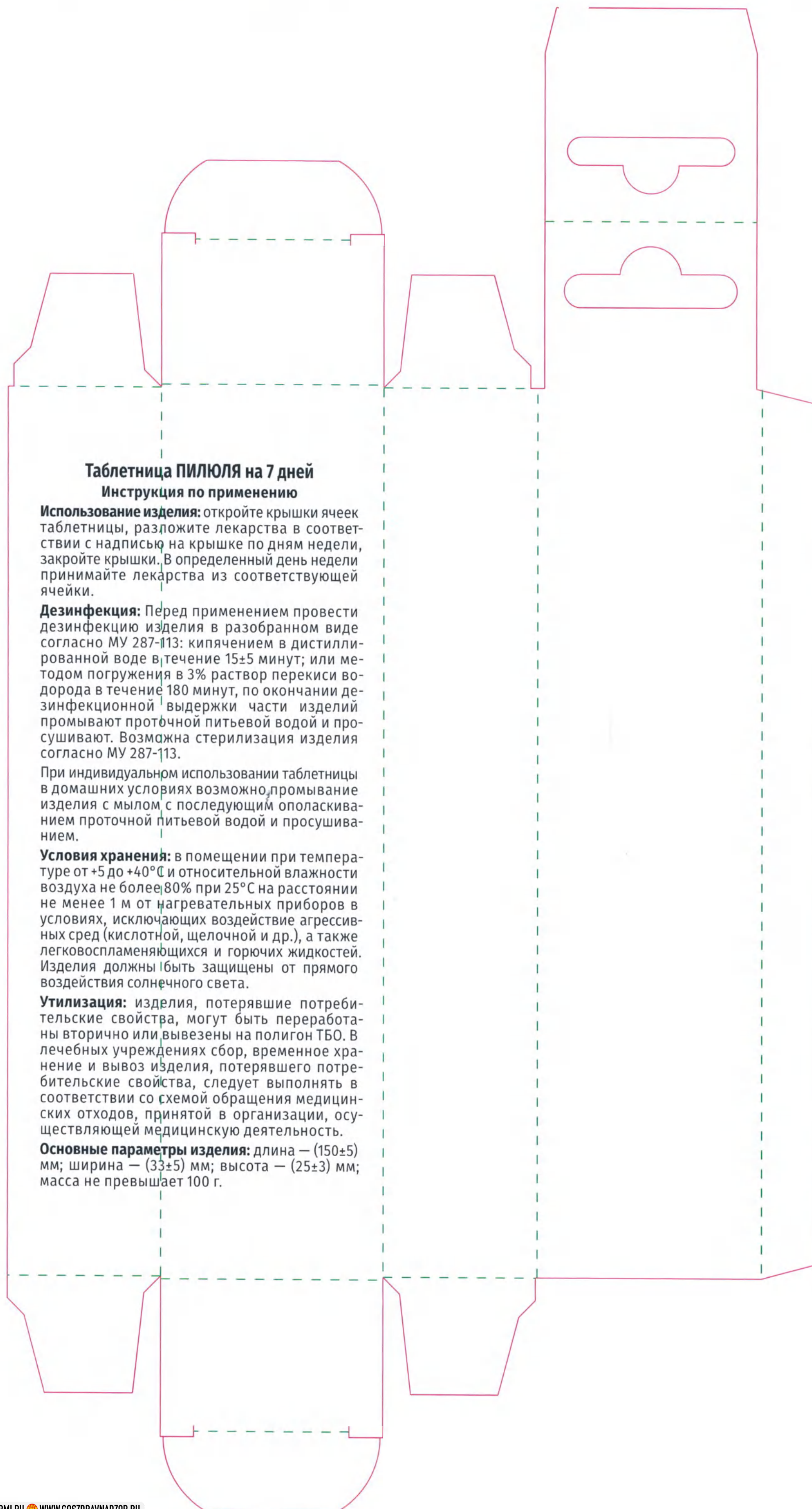

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Инструкция по применению

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели, закройте крышки. В определенный день недели принимайте лекарства из соответствующей ячейки.

Дезинфекция: Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут; или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Основные параметры изделия: длина — (150±5) мм; ширина — (33±5) мм; высота — (25±3) мм; масса не превышает 100 г.



Тиснение



СМУК

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Инструкция по применению смотри на внутренней части упаковки.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения потребителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Пенал для лекарственных препаратов — «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014 «Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней».

Правообладателем товарного знака «Wellfix» является ООО «ИРИС».

Производитель:

ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.

Сделано в России

Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР», 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.

WELLFIX

Таблетница
на 7 дней

WELLFIX

Таблетница
на 7 дней

WELLFIX

Таблетница
на 7 дней



УДОБНАЯ В ПРИМЕНЕНИИ



4 601834 005269

Дата изготовления:

Срок годности:

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Инструкция по применению

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели, закройте крышки. В определенный день недели принимайте лекарства из соответствующей ячейки.

Дезинфекция: Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут; или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Основные параметры изделия: длина — (150±5) мм; ширина — (33±5) мм; высота — (25±3) мм; масса не превышает 100 г.

Лицо

Оборот

RU Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день
Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашних условиях.
Для серии и маркировки на крышках отделений нанесены надписи в виде вытравки Самара-2014.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.
Противопоказания: отсутствуют.
Инструкция по применению находится на внутренней стороне упаковки.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/0549 от 15.07.2020 г.
Гарантийный срок годности: 5 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год со дня получения потребителем.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Издание соответствует требованиям: ТУ 9398-019-17707123-2014.
И изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 181-50-42.
И изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР», Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru
Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР Белград», 220124, г. Минск, ул. М. Липинька, д. 120 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-26.
Импортер в Казахстан: ТОО «Болеар Казахстан», Казахстан, 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 221/2. Тел.: +7 (727) 310-34-21.
Сделано в России.
Номинальные размеры изделия:



ТАБЛЕТНИЦА

ПИЛЮЛЯ
НА ОДИН
ДЕНЬ

ТАБЛЕТНИЦА

ПИЛЮЛЯ
НА ОДИН ДЕНЬ



ТАБЛЕТНИЦА

ПИЛЮЛЯ
НА ОДИН
ДЕНЬ



www.pilula.info

Дата производства

Партия №

Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день
Инструкция по применению

Таблетница представляет собой пенал, состоящий из 4-х отделений для размещения и хранения лекарственных средств.

Основные параметры изделия: длина - (60±5) мм; ширина - (60±5) мм; высота - (17±8) мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Дезинфекция: перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут или методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке согласно времени суток, закройте крышки. В определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Пенал для лекарственных препаратов - «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014».

И изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 181-50-42, +7 (495) 787-93-66. Email: info@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru
И изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР». Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru



RU Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней «Организер»

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их регулярного приема в лечебных учреждениях и в домашних условиях.

Показания: необходимость упорядоченного регулярного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Инструкция по применению находится на внутренней стороне упаковки.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Правильный срок годности — 5 лет со дня изготовления.

Срок годности — 1 год со дня получения потребителем.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Изделие соответствует требованиям ТУ 6398-019-17707123-2014.

■ Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 161-50-42.

Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Коширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Импортер в Казахстане: ТОО «Болеар Казмед».

050016, Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 221/2. Тел.: +7 (727) 313-24-21.

Сделано в России.

Номинальные размеры изделия:



ТАБЛЕТНИЦА

ПИ ЛЮ ЛЯ

НА 7 ДНЕЙ
«ОРГАНИЗАЙЗЕР»

ТАБЛЕТНИЦА

ПИ ЛЮ ЛЯ

НА 7 ДНЕЙ «ОРГАНИЗАЙЗЕР»



ТАБЛЕТНИЦА

ПИ ЛЮ ЛЯ

НА 7 ДНЕЙ
«ОРГАНИЗАЙЗЕР»



www.pilula.info

Дата производства

Л0Т Партия №

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней «Органайзер»

Инструкция по применению

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней «Органайзер» представляет собой «чемоданчик», состоящий из двух блоков. Один блок содержит четыре отделения для суточного распределения лекарственных средств, второй блок содержит шесть пронумерованных отделений для ежедневного распределения лекарственных средств.

Основные параметры изделия: длина (в открытом виде) – (195±10) мм; ширина – (64±5) мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Дезинфекция: перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут; методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели и времени суток, закройте крышки. В определенный день недели и в определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Гарантийные обязательства: изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, эксплуатации. Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня получения потребителем. Изделие, у которого во время гарантийного срока будет обнаружена функциональная неисправность, безвозмездно заменяется годным аналогичным изделием за счет завода-изготовителя.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Пенал для лекарственных препаратов — Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014.

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш.,
тер. 88 км. к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 181-50-42, +7 (495) 787-93-66.
E-mail: info@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

ЛИЦО

ОБОРОТ

ВУ Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Для снятия и соблюдения на крышках отделившихся капсул, таблеток и драже, выпуклых символов и букв Брейля.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют. Инструкция по применению находится на внутренней стороне упаковки.

Регистрационное удостоверение: № ФСН 2015/2545 от 15.07.2020 г.

Гарантийный срок годности: 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня получения потребителем. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Изделие соответствует требованиям ТУ 9398-019-17707123-2014.

И изготовитель ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 181-50-42.

Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР», 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-66.


www.bolear.ru

Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР БИМЕД», 220124, г. Минск, ул. М. Рыльского, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 573-83-20.

Импортер в Казахстане: ТОО «Болеар Казахстан», Казахстан, 050018, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 22/2. Тел.: +7 (727) 313-24-21.

Сделано в России.

Номинальные размеры изделия:

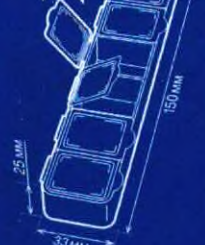

ТАБЛЕТНИЦА

ПИ ЛЮ ЛЯ
НА 7 ДНЕЙ

ТАБЛЕТНИЦА


ПИ ЛЮ ЛЯ
НА 7 ДНЕЙ

ТАБЛЕТНИЦА

ПИ ЛЮ ЛЯ
НА 7 ДНЕЙ



www.pilula.info

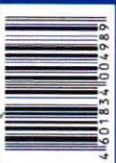

Pantone 300 c

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней **Инструкция по применению**

Таблетница представляет собой пенал, состоящий из семи отделений для размещения и хранения лекарственных средств.

Основные параметры изделия: длина - (150±5) мм, ширина - (33±5) мм, высота - (25±3) мм, масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Дезинфекция: перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут или методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели, закройте крышки. В определенный день недели принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность. Пенал для лекарственных препаратов – «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014».

И изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 181-50-42, +7 (495) 787-92-66. Email: info@alpina-plast.ru

www.alpina-plast.ru
Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР»,
Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

ЛИЦО

RU Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Для слепых и слабовидящих на крышках отделений нанесены надписи в виде выпуклых символов азбуки Брайля.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

Инструкция по применению находится на внутренней стороне упаковки.

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Гарантийный срок годности: 5 лет

со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня получения потребителем.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Изделие соответствует требованиям ТУ 9398-019-17707123-2014.

■ **Изготовитель:** ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 181-50-42.

Изготовлено по заказу ООО «БОЛЕАР». 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.


www.bolear.ru

Импортер в РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Импортер в Казахстане: ТОО «Болеар Казмед», Казахстан, 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 221/2. Тел.: +7 (727) 313-24-21.

Сделано в России.

Номинальные размеры изделия:

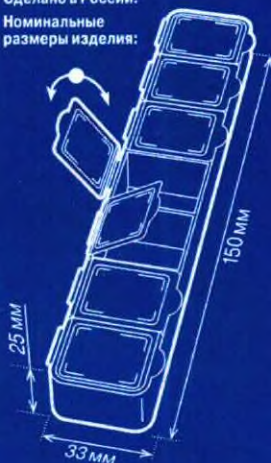

ТАБЛЕТНИЦА


ПИ ЛЮ ЛЯ
НА 7 ДНЕЙ

ТАБЛЕТНИЦА


ПИ ЛЮ ЛЯ
НА 7 ДНЕЙ

ТАБЛЕТНИЦА

ПИ ЛЮ ЛЯ
НА 7 ДНЕЙ

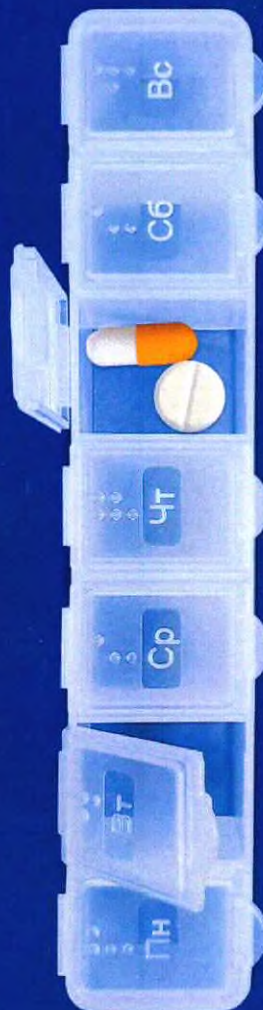

www.pilula.info

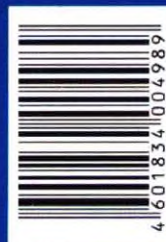

Pantone 300 c

Дата производства

Партия №

ОБОРОТ

Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней Инструкция по применению

Таблетница представляет собой пенал, состоящий из семи отделений для размещения и хранения лекарственных средств.

Основные параметры изделия: длина – (150±5) мм; ширина – (33±5) мм; высота – (25±3) мм; масса не превышает 100 г.

Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашнем использовании.

Дезинфекция: перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут или методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода в течение 180 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке по дням недели, закройте крышки. В определённый день недели принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО.

В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность. Пенал для лекарственных препаратов – «Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014».

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603,
Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 181-50-42, +7 (495) 787-93-66. Email: info@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru

Изготовлено по заказу ООО "БОЛЕАР".

Адрес: 115201, Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

**Пенал для лекарственных препаратов –
«Таблетница «Альпина Пласт»
по ТУ 9398-019-17707123-2014
«Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день»**

Инструкцию по применению смотри на внутренней части упаковки. Таблетница предназначена для расфасовки, упорядоченного и компактного хранения твердых форм лекарственных средств (капсулы, таблетки, драже) с целью их режимного приема в лечебных учреждениях и в домашних условиях. Для слепых и слабовидящих людей на крышках отделений нанесены надписи в виде выпуклых символов азбуки Брайля.

Материал изделия: полипропилен.

Количество: 1 шт

Соответствуют требованиям ТУ 9398-019-17707123-2014.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня получения потребителем.

Противопоказания: отсутствуют.

Показания: необходимость упорядоченного режимного приема твердых форм лекарственных препаратов.

Изготовитель: ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103 Б. Сделано в России.
Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР», Россия, 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV.

Изготовлено для: АО «ТАНДЕР» 350002, Россия, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185,

тел./факс: (861) 210-98-10,
e-mail: info@magnit.ru.

Отзывы о продукции принимаем по телефону горячей линии:
8 800 200 900 2 Звонок бесплатный




ЗДОРОВЬЕ

ТАБЛЕТНИЦА
на один день

ЗДОРОВЬЕ

ТАБЛЕТНИЦА
на один день

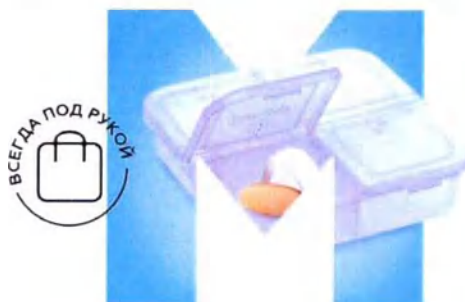

ЗДОРОВЬЕ

ТАБЛЕТНИЦА
на один день

Дата изготовления:

Партия №

ЛИЦО

Таблетница ПИЛЮЛЯ на один день инструкция по применению

Использование изделия: откройте крышки ячеек таблетницы, разложите лекарства в соответствии с надписью на крышке согласно времени суток, закройте крышки. В определенное время суток принимайте лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Дезинфекция: перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113: кипячением в дистиллированной воде в течение 15 ± 5 минут; или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113.

При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Условия хранения: в помещении при температуре от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Основные параметры изделия: длина – (60 ± 5) мм, ширина – (60 ± 5) мм, высота – (17 ± 3) мм, масса не превышает 100 г

ОБОРОТ

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ НА ОДИН ДЕНЬ
Инструкция по применению (продолжение)

Дезинфекция: Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде согласно МУ 287-113, кипячением в дистиллированной воде в течение 15±5 минут, или методом погружения в 3% раствор перекиси водорода в течение 180 минут, по окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой и просушивают. Возможна стерилизация изделия согласно МУ 287-113. При индивидуальном использовании таблетницы в домашних условиях возможно промывание изделия с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

Утилизация: изделия, потерявшие потребительские свойства, могут быть переработаны вторично или вывезены на полигон ТБО. В лечебных учреждениях сбор, временное хранение и вывоз изделия, потерявшего потребительские свойства, следует выполнять в соответствии со схемой обращения медицинских отходов, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

Таблетница на один день

Поможет для лекарственных препаратов -
«Таблетница «Альбина Пласт» по
ТУ 9398-019-17707123-2014 «Таблетница
ПИЛЮЛЯ на один день»

Инструкция по применению:
Таблетница предназначена для
расфасовки, упорядоченного
и компактного хранения
твердых форм лекарственных
средств (капсулы, таблетки,
драже) с целью их режимного
приема в лечебных учреждениях
и в домашних условиях.

Для слепых и слабовидящих
людей на крышках отделений
нанесены надписи в виде
выпуклых символов азбуки
Брайля.

Показания: необходимость
упорядоченного режимного
приема твердых форм
лекарственных препаратов.

Дезинфекция: смотри внутри
упаковки.

Использование изделия: откройте крышки ячеек
таблетницы, разложите лекарства в соответствии с
надписью на крышке согласно времени суток, закройте
крышки. В определенное время суток принимайте
лекарства из соответствующей ячейки таблетницы.

Условия хранения: в помещении при температуре от +5 до
+40°C и относительной влажности воздуха не более 80%
при 25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных
приборов в условиях, исключающих воздействие
агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия
должны быть защищены от прямого воздействия
солнечного света.

Утилизация: смотри внутри упаковки.
Материал: полипропилен

Гарантийный срок годности — 5 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения
потребителем.

Соответствуют требованиям ТУ 9398-019-17707123-2014.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2549 от
15.07.2020 г. Не подлежит обязательной сертификации и
декларированию в РФ.

Изготовитель и организация, уполномоченная на принятие претензий от
потребителя в РФ: ООО «Альбина Пласт», Россия, 141601 Московская обл., г.
Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км к. 3А, стр. 1035 (адрес производства
Россия, 141601, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км к. 3А,
стр. 1035)

Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом.


таблетница

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

РЯДОМ С КАЖДЫМ

таблетница

4 601834 005

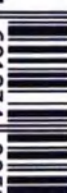

Утилизация: смотри внутри
упаковки.

Изготовлено по заказу: ООО «ТРАНСПОРТМАРКЕТ»,
660118, г. Красноярск, Северное шоссе, зд. 11в/1, пом. 2,
тел.: +7 (391) 205-11-80

Таблетница
на один день



Дата изготовления

Партия №

таблетница

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

таблетница

Таблетница
на 7 дней

Исключительное право

использования

на территории

губернии


губернии

губернии

губернии

губернии



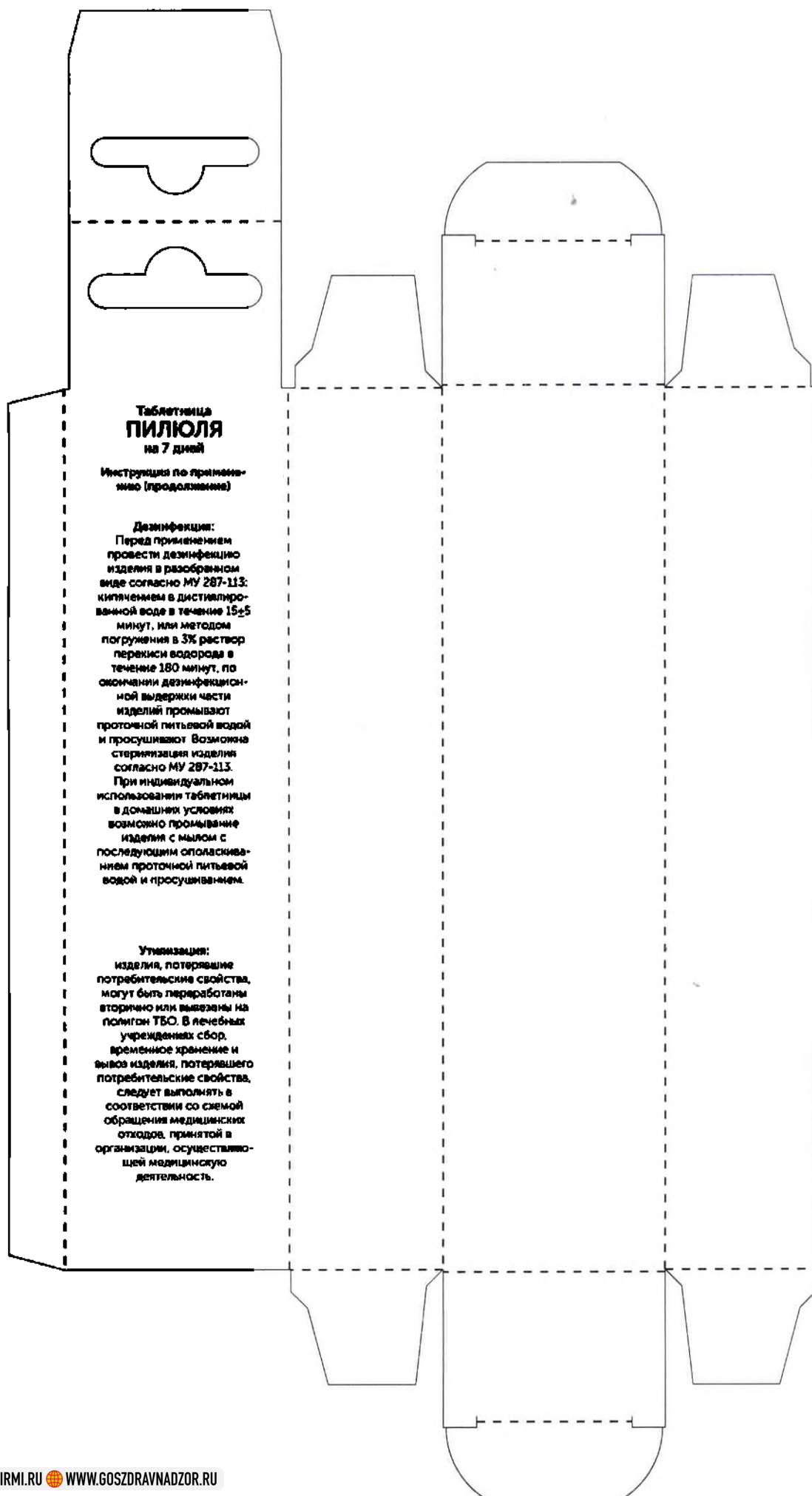

Таблетница на 7 дней

Пенал для лекарственных препаратов -
«Таблетница «Альпина Пласт» по
ТУ 9398-019-17707123-2014
«Таблетница ПИЛЮЛЯ на 7 дней»

Инструкция по применению.

Таблетница предназначена
для расфасовки, упорядоченного
и компактного хранения твердых
форм лекарственных средств (капсулы,
таблетки, драже) с целью их режимного
приема в лечебных учреждениях и в
домашних условиях.

Для слепых и слабовидящих людей на
крышках отделений нанесены надписи в
виде выпуклых символов азбуки Брайля.

Показания: необходимость
упорядоченного режимного приема
твердых форм лекарственных
препаратов.

Противопоказания: отсутствуют.

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

«РЯДОМ С КАЖДЫМ»



таблет


таблет

ТНИЦА



Таблетница
на 7 дней

ТНИЦА

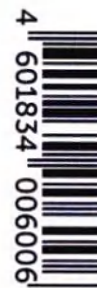

Вскрыть: таблетница разложить
лекарства в соответствии с надписью на
крышке по дням недели, закрыть
крышки. В определенный день недели
принимайте лекарства из
соответствующей ячейки.

Условия хранения: в помещении
при температуре от +5 до +40°C и
относительной влажности воздуха
не более 80% при 25°C на расстоянии
не менее 1 м от нагревательных
приборов
в условиях, исключающих воздействие
агрессивных сред (кислотной, щелочной
и др.), а также легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей. Изделия должны
быть защищены от прямого воздействия
солнечного света.

Дезинфекция: смотри внутри упаковки.
Утилизация: смотри внутри упаковки.
Материал: полипропилен

Гарантийный срок годности — 5 лет со
дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год
со дня получения потребителем.

Соответствуют требованиям
ТУ 9398-019-17707123-2014.
Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2015/2549 от 15.07.2020 г.
Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию в РФ.

Изготовитель и организация,
уполномоченная на принятие претензий от
потребителя в РФ: ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б
(адрес производства: Россия, 141603,
Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш.,
тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б)

Дистрибьютор: ООО «БОЛЕАР», 115201,
г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV,
тел.: +7 (495) 787-92-68.

Изготовлено по заказу:
ООО «ТРАНСПОРТМАРКЕТ», 660118,
г. Красноярск, Северное шоссе, зд. 11и/1,
пом. 2, тел.: +7 (391) 205-11-80

Дата изготовления



Партия №

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
23/364 фча в гр листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
_____ Е.Н. Игутов



Фото медицинского изделия с упаковкой

**Пенал для лекарственных препаратов –
«Таблетница «Альпина Пласт» по ТУ 9398-019-17707123-2014**

2023

«Здравствуй, МАМА!» на одну сторону



"Ташкентский институт
ПИИОН и др."



"Таблетка ПИМОНА" и "Пананол"





WELLFIX

Таблетница
на 7 дней



УДОБНАЯ В ПРИМЕНЕНИИ













ТАБЛЕТНИЦА

П И Л Ю Л Я

НА 7 ДНЕЙ

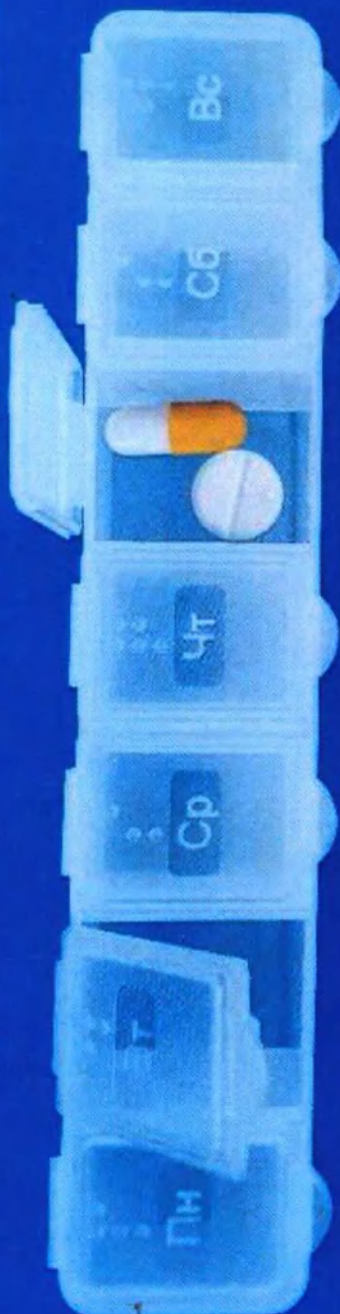

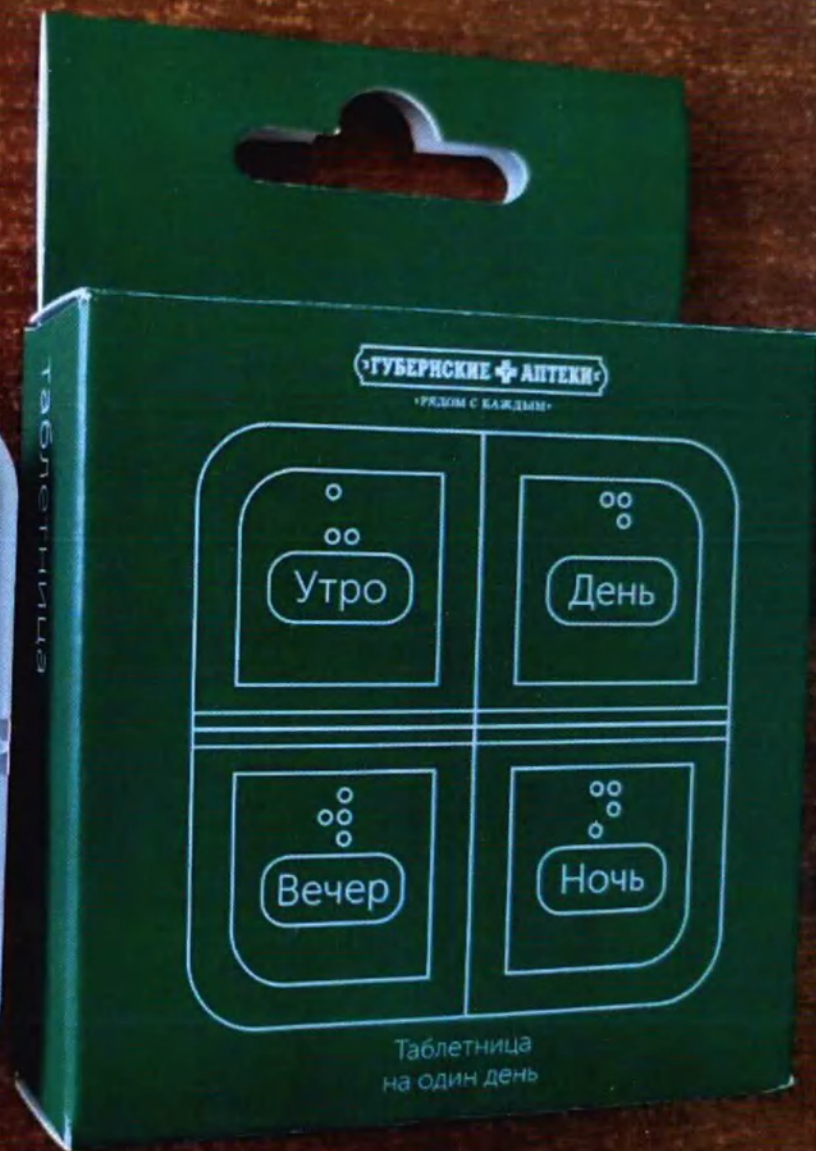



Губернский Аптеки
Рядом с каждым



Таблетница
на 7 дней





Всего прошито, процифровано
и скреплено печатью
Е.Н. Игутов листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
Е.Н. Игутов