

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации молокоотсоса-отсасывателя
индивидуального ручного МОН-«АП»

Молокоотсос применяется для отсасывания молока у кормящих матерей.

Область применения – индивидуальное использование в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Молокоотсос разъемный и состоит из пластизольного баллона и резервуара из стекла или пластмассы. Перед использованием молокоотсос следует продезинфицировать: резервуар прокипятить в течении (10±5) минут, а баллон обработать 6%-ным раствором перекиси водорода с последующим промыванием в проточной воде.

После применения молокоотсос промывают горячей водой и просушивают.

Хранение молокоотсоса должно осуществляться в помещении при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Изготовитель гарантирует качество молокоотсоса при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности молокоотсоса – 5 лет со дня изготовления.



Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя:
Московская область, Клинский р-он,
д. Новошапово, д.16, стр. 2