



АЛЬПИНА
П Л А С Т

Здоровье - это красиво!

**Банки медицинские вакуумные
по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018**

Фото

Июнь 2024





АЛЬПИНА
ПЛАСТ


Здоровье - это красиво!



«Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 8шт.»
фото медизделия с упаковкой

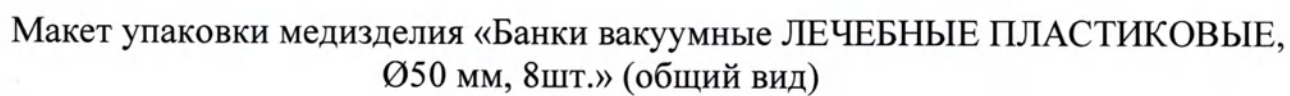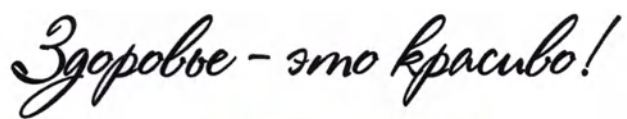

Банки ваку-
ЛЕЧЕБНЫЕ
ø50 мм,

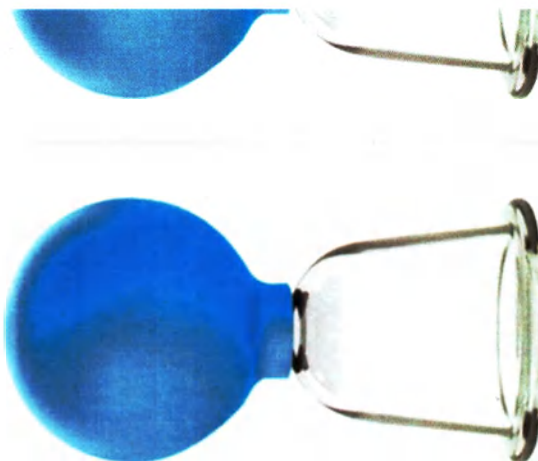

ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

ПРИ ПРОСТУДНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ПРИ МИОЗИТАХ,
РАДИКУЛИТЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
+7 (495) 787-93-66
info@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Макет упаковки медизделия «Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ,
Ø50 мм, 8шт.» (увеличенный фрагмент)



АЛПИНА
ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!

RUS

Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, ø50 мм,

8
шт.

Предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж – лечебный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты, пневмонии, плевриты, профилактика гипостатических пневмоний), миозиты, нейромиозиты, невралгии, невриты и периневриты, остеохондрозы, воспалительные заболевания мышц и нервных стволов, период реабилитации после операций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.


МАТЕРИАЛ РЕЗЕРВУАРА — ПОЛИКАРБОНАТ.

Руководство по эксплуатации внутри упаковки.

Банки медицинские вакуумные
по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018.
Регистрационное удостоверение
№РЗН 2019/8071 от 19.09.2023г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации —
1 год со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты
изготовления.
Срок годности/службы — не установлен.

www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru

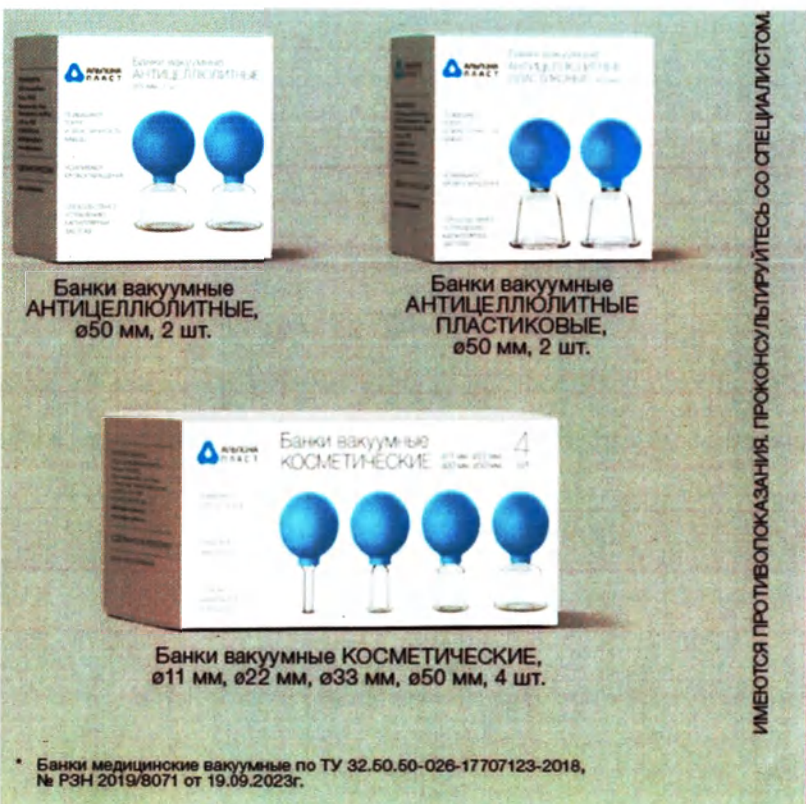

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

* Банки медицинские вакуумные по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018,
№ РЗН 2019/8071 от 19.09.2023г.

Макет упаковки медицинского изделия «Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, ø50 мм, 8шт.» (увеличенный фрагмент)



«Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2шт.»
фото медизделия с упаковкой



Макет упаковки медицинского изделия «Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2шт.» (общий вид)



АЛПИНА
ПЛАСТ

Здоровье – это счастье!

RUS

Банки вакуумные
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ,
ø33 мм,

2
шт.

Предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж: антицеллюлитный, косметический, лечебный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: миозиты, нейрмиозиты, остеохондроз, невралгия, период реабилитации после операций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.

МАТЕРИАЛ РЕЗЕРВУАРА — СТЕКЛО.

Руководство по эксплуатации внутри упаковки.

Банки медицинские вакуумные
по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение
№РЗН 2019/8071 от 19.09.2023г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ. Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения потребителем. Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления. Срок годности/службы — не установлен.

ENG

THERAPY
Vacuum Cups,
ø33 mm,

2
pieces

Intended for physiotherapy, static and kinetic vacuum therapy (anti-cellulite, cosmetic, therapeutic vacuum massage); for manually creating suction sites on the skin surface. Vacuum cups influence blood and lymph circulation, causing local and reflective distention of blood and lymphatic vessels. They provide antiinflammatory, analgetic and resolving effects.

INDICATIONS FOR VACUUM MASSAGE ARE: overweight, fat deposits in the hips, belly, legs, neuralgia, neuritis, rehabilitation period after operations.

CONTRAINDICATIONS TO USE: skin diseases, skin damage, period of pregnancy and lactation, high blood pressure, varicose veins.

Vacuum cups should be stored indoors at temperatures from +5 to + 40°C and a relative humidity of 80% at 25°C.
Manufacturer: ALPINA PLAST LLC, Russia, 141603, Moscovskaya oblast, Klin, Leningradskoe shosse, 88 km, stroenie 103.
Tel.: +7 (495) 787-93-66. E-mail: info@alpina-plast.ru

www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «АЛПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603,

Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш.,
км 88-й, стр. 103.

+7 (495) 787-93-66

info@alpina-plast.ru

www.alpina-plast.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Макет упаковки медицинского «Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2шт.»
(увеличенный фрагмент)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье – это красота!




АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, ø33 мм, 2 шт.

СНИЖАЮТ
БОЛЕВЫЕ
СИНДРОМЫ

УСИЛИВАЮТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ
И ПРИТОК ЛИМФЫ

УЛУЧШАЮТ
СОКРАТИТЕЛЬНУЮ
ФУНКЦИЮ МЫШЦ

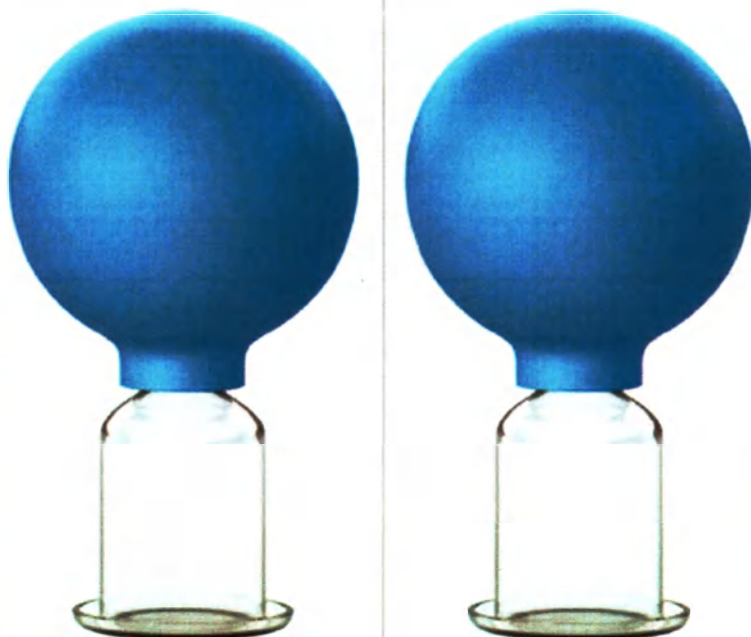

Банки вакуумные
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ,
ø50 мм, 2 шт.



Банки вакуумные
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ,
ø50 мм, 2 шт.

* Банки медицинские вакуумные
по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018,
№ РЗН 2019/8071 от 19.09.2023г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Макет упаковки медицинского «Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2шт.»
(увеличенный фрагмент)



«Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.»
фото медизделия с упаковкой



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

RUS

Банки вакуумные
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ,
Ø50 мм,

2
шт.

Предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж – антицеллюлитный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: избыточный вес, жировые отложения в области бедер, живота, ног, невралгии, невриты, период реабилитации после операций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.

МАТЕРИАЛ РЕЗЕРВУАРА — СТЕКЛО.

Руководство по эксплуатации внутри упаковки.

Банки медицинские вакуумные
по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение
№РЗН 2019/8071 от 19.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ. Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения потребителем. Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления. Срок годности/службы — не установлен.

ENG

ANTI-CELLULITE
Vacuum Glass Cups,
Ø50 mm,

2
pieces

Intended for physiotherapy, static and kinetic vacuum therapy (anti-cellulite, cosmetic, therapeutic vacuum massage); for manually creating suction sites on the skin surface. Vacuum cups influence blood and lymph circulation, causing local and reflective distention of blood and lymphatic vessels. They provide antiinflammatory, analgetic and resolving effects.

INDICATIONS FOR VACUUM MASSAGE ARE: overweight, fat deposits in the hips, belly, legs, neuralgia, neuritis, rehabilitation period after operations.

CONTRAINDICATIONS TO USE: skin diseases, skin damage, period of pregnancy and lactation, high blood pressure, varicose veins.

Vacuum cups should be stored indoors at temperatures from +5 to + 40°C and a relative humidity of 80% at 25°C.

Manufacturer: ALPINA PLAST LLC, Russia, 141603, Moscovskaya oblast, Klin, Leningradskoe shosse, 88 km, stroenie 103.

Tel.: +7 (495) 787-93-66. E-mail: info@alpina-plast.ru

www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru

Макет упаковки медизделия «Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.»
(увеличенный фрагмент)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603,
Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш.,
км 88-й, стр. 103.

+7 (495) 787-93-66

info@alpina-plast.ru

www.alpina-plast.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Банки
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
Ø50 мм, 2

ПОВЫШАЮТ
ТОНУС
И ЭЛАСТИЧНОСТЬ
МЫШЦ


УСИЛИВАЮТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ

СПОСОБСТВУЮТ
УСТРАНЕНИЮ
КАПИЛЛЯРНЫХ
ЗАСТОЕВ




Лакет упаковки медизделия «Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.»
(увеличенный фрагмент)

Банки вакуумные
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ,
ø50 мм, 2 шт.

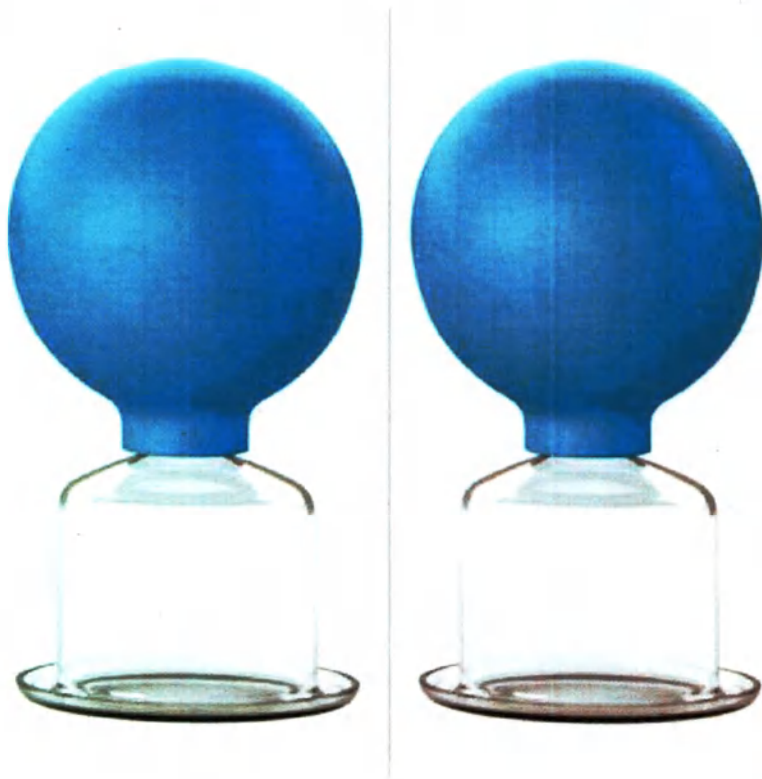


Макет упаковки медизделия «Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.» (увеличенный фрагмент)

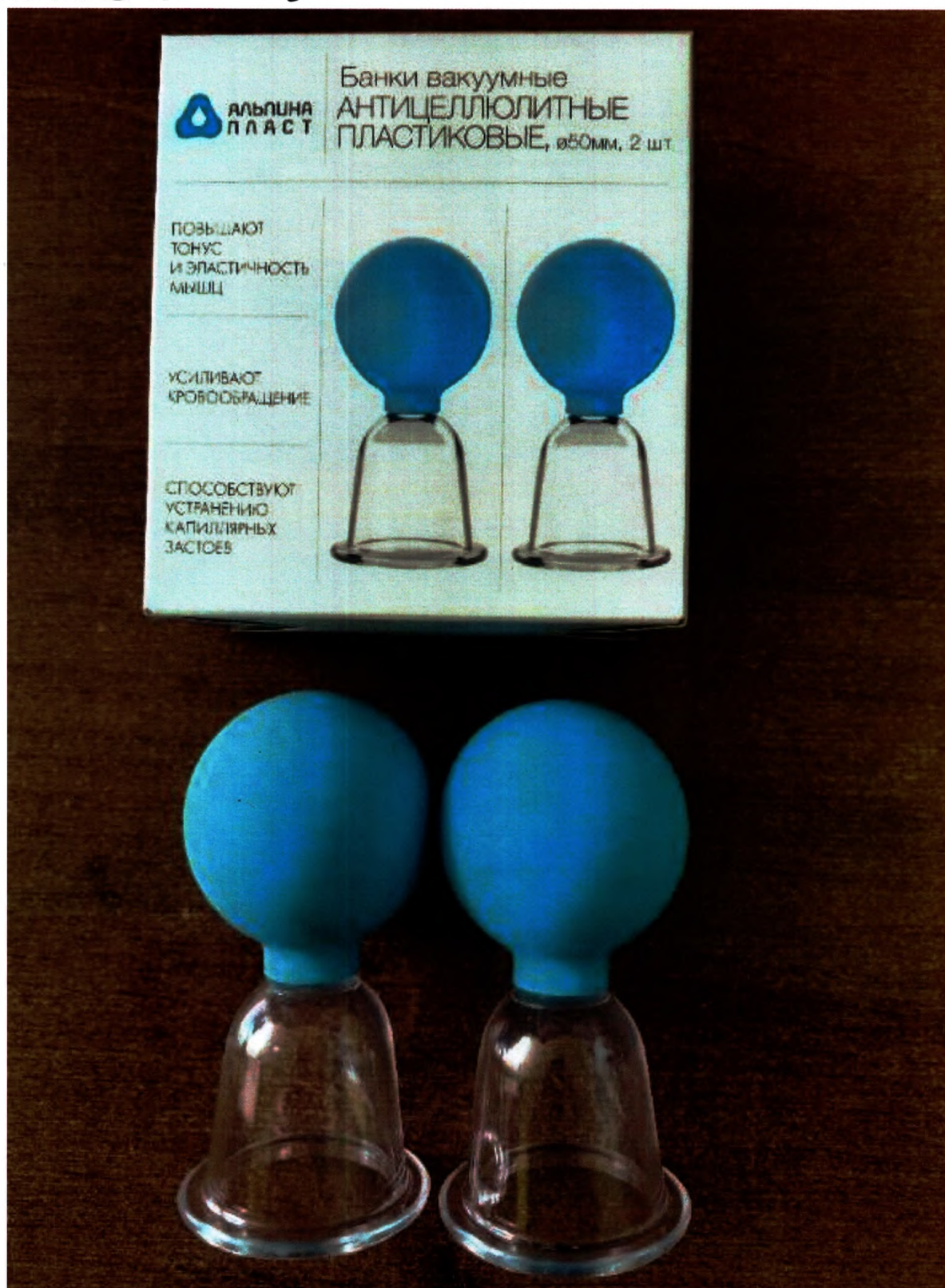

«Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2шт.»
фото медизделия с упаковкой



Здоровье - это красиво!

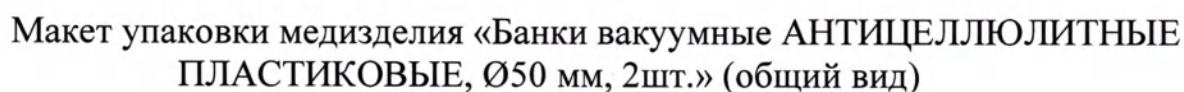



**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

Здоровье – это красиво!

RUS

Банки вакуумные
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2 шт.

Предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж – антицеллюлитный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

избыточный вес, жировые отложения в области бедер, живота, ног, невралгии, невриты, период реабилитации после операций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: кожные

заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.

МАТЕРИАЛ РЕЗЕРВУАРА – ПОЛИКАРБОНАТ.

Руководство по эксплуатации внутри упаковки.

Банки медицинские вакуумные
по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение
№РЗН 2019/8071 от 19.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ. Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения потребителем. Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.

Срок годности/службы — не установлен.

ENG

ANTI-CELLULITE
Vacuum Plastic Cups, 2 pieces
Ø50 mm,

Intended for physiotherapy, static and kinetic vacuum therapy (anti-cellulite, cosmetic, therapeutic vacuum massage); for manually creating suction sites on the skin surface. Vacuum cups influence blood and lymph circulation, causing local and reflective distention of blood and lymphatic vessels. They provide antiinflammatory, analgetic and resolving effects.

INDICATIONS FOR VACUUM MASSAGE ARE: overweight, fat deposits in the hips, belly, legs, neuralgia, neuritis, rehabilitation period after operations.

CONTRAINDICATIONS TO USE: skin diseases, skin damage, period of pregnancy and lactation, high blood pressure, varicose veins.


Vacuum cups should be stored indoors at temperatures from +5 to +40°C and a relative humidity of 80% at 25°C.

Manufacturer: ALPINA PLAST LLC, Russia, 141603, Moscovskaya oblast, Klin, Leningradskoe shosse, 88 km, stroenie 103.

Tel.: +7 (495) 787-93-66. E-mail: info@alpina-plast.ru

www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru

Макет упаковки медизделия «Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2шт.» (увеличенный фрагмент)

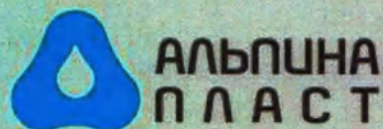

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603,
Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш.,
км 88-й, стр. 103.
+7 (495) 787-93-66
info@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:



Банки вакуум
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ

ПОВЫШАЮТ
ТОНУС
И ЭЛАСТИЧНОСТЬ
МЫШЦ

УСИЛИВАЮТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ

СПОСОБСТВУЮТ
УСТРАНЕНИЮ
КАПИЛЛЯРНЫХ
ЗАСТОЕВ



Макет упаковки медизделия «Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2шт.» (увеличенный фрагмент)



**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

Здоровье - это красиво!

Банки вакуумные
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2 шт.



Банки вакуумные
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ,
Ø50 мм, 2 шт.



Банки вакуумные
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ,
Ø33 мм, 2 шт.

* Банки медицинские вакуумные
по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018,
№ РЗН 2019/8071 от 19.09.2023 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Макет упаковки медизделия «Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2шт.» (увеличенный фрагмент)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!




Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.
фото медизделия с упаковкой



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

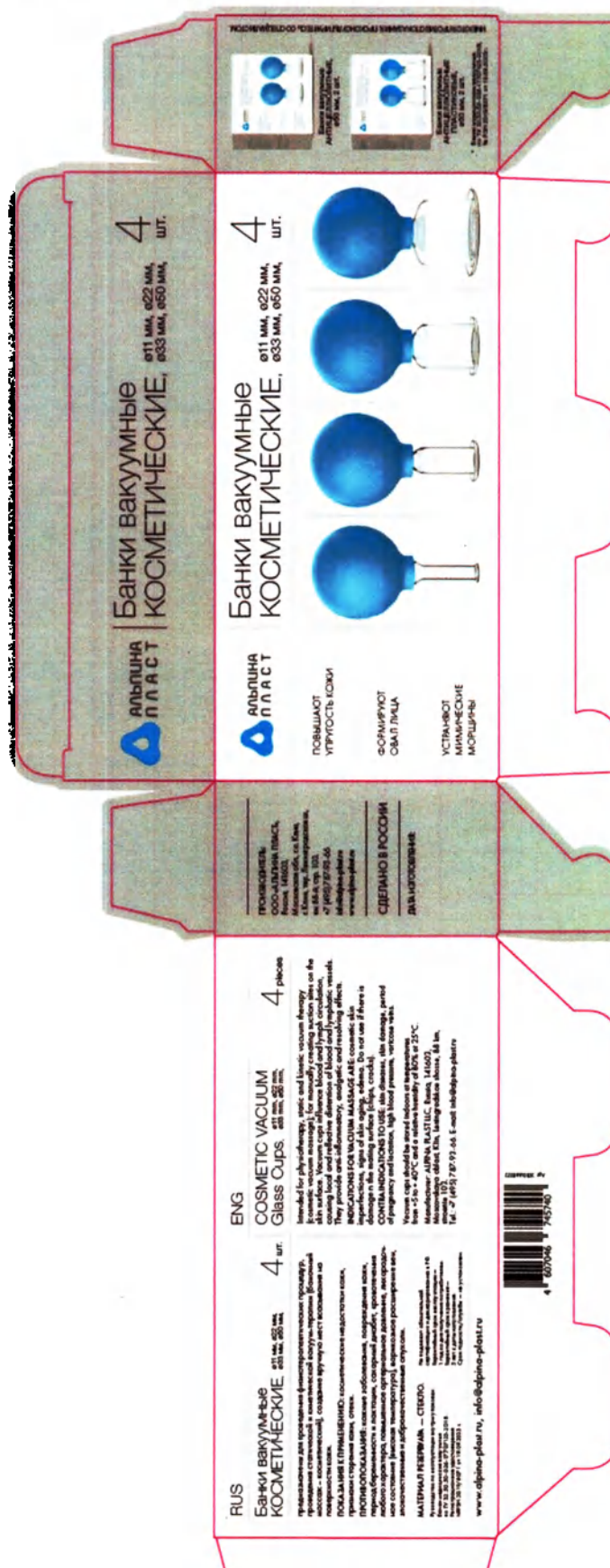

Макет упаковки медизделия «Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.» (общий вид)



**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

Здоровье - это красиво!

RUS

ENG

**Банки вакуумные
КОСМЕТИЧЕСКИЕ,** Ø11 мм, Ø22 мм,
Ø33 мм, Ø50 мм,

4 шт.

**COSMETIC
Glass Cup**

предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж – косметический), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: косметические недостатки кожи, признаки старения кожи, отеки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.

МАТЕРИАЛ РЕЗЕРВУАРА — СТЕКЛО.

Руководство по эксплуатации внутри упаковки.

Банки медицинские вакуумные
по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение
№РЗН 2019/8071 от 19.09.2023 г.

Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок эксплуатации —
1 год со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения —
5 лет с даты изготовления.

Срок годности/службы — не установлен.

Intended for physiotherapy
(cosmetic vacuum therapy) on
skin surface. Vacuum cups
causing local and general
They provide anti-inflammatory

INDICATIONS FOR USE:
skin imperfections, signs of
damage on the mature skin.
CONTRAINDICATIONS:
of pregnancy and lactation.

Vacuum cups should be used
from +5 to + 40°C at room temperature.

Manufacturer: ALPINA
Moscovskaya oblast,
stroenie 103.

Tel.: +7 (495) 787-93

www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru



Макет упаковки медизделия «Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.» (увеличенный фрагмент)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.
фото подарочной упаковки




АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



Total Beauty

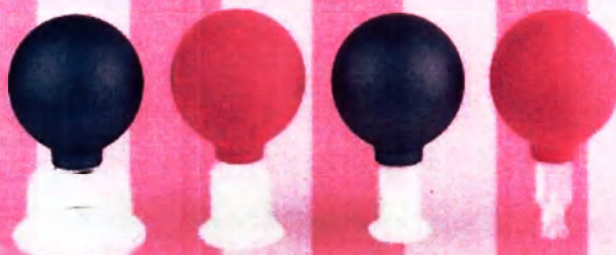

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ,
Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.**

Банки медицинские вакуумные по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018.
Регистрационное удостоверение №РЭН 2019/8071 от 19.09.2023г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы — не установлен.
СДЕЛАНО В РОССИИ ИЗГОТОВЛЕНО:
Производитель ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл.,
г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш.,
км 88-й, стр. 103.
Тел.: +7(495)787-93-66.
Материал резервуара — стекло.

Артикул 3016446092



4 607046 746952

Макет упаковки медизделия «Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.» (подарочная упаковка (общий вид))



Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.
фото медизделия в подарочной упаковке (коробка с крышкой на магните)



**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

Здоровье - это красиво!

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.

Предназначены для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж — косметический), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи. Баночный массаж усиливает кровообращение и приток лимфы в зоне воздействия, способствует устранению капиллярных застоев, дополнительному поступлению кислорода и питательных веществ. После массажа кожа становится упругой, повышается ее сопротивляемость к температурным и физическим воздействиям, улучшается сократительная функция мышц, повышается их тонус и эластичность.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- КОСМЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ КОЖИ,
- ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ,
- ОТЕКИ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- кожные заболевания, повреждения кожи, кровотечения любого характера;
- период беременности и лактации;
- сахарный диабет, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура);
- варикозное расширение вен;
- злокачественные и доброкачественные опухоли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дезинфекция: перед применением изделие дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут.

Разъединив баллон и резервуар, погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения.

Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды, дезинфекция должна осуществляться при умеренном кипении. Контролируйте уровень воды при проведении дезинфекции (вода должна покрывать изделие полностью). После дезинфекции банку собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона.

Перед началом баночного массажа нанести масло или крем на руки, чтобы разогреть его до температуры тела и равномерно нанести на массируемую поверхность.

Установить банку необходимого диаметра: сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите резервуар банки к лицу/телу. Отпуская баллон, создайте необходимый вакуум. Плавными скользящими движениями, по направлению массажных линий массируйте лицо/тело, удерживая банку за баллон.

Степень вакуума баллона можно регулировать сжатием баллона, при этом необходимо учитывать чувствительность кожи пациента, его возраст и физическое состояние, не допуская сильных болевых ощущений.

Для увеличения срока службы изделия, минимизируйте контакт пластикового баллона с маслосодержащими средами. После применения части изделия нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора, просушить, собрать.

Макет упаковки медицинского изделия «Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.» (подарочная упаковка (увеличенный фрагмент))



**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

Здоровье – это красиво!

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Нельзя ставить банки на позвоночник, область сердца, почек и на молочные железы у женщин, не использовать банки на передней части шеи, в районе щитовидной железы и вдоль крупных кровеносных сосудов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- не использовать банки при наличии на привалочной поверхности резервуаров механических повреждений (сколы, трещины);
- банки хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ банок в упаковке предприятия-изготовителя: Изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Банки вакуумные ремонту не подлежат. При использовании в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов – подлежат утилизации вместе с коммунальными отходами.

Перед применением банок вакуумных проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА

Перед массажем очистите лицо. На чистое очищенное лицо нанесите масло или крем. Кожа должна быть эластичной и мягкой.

- 1. МАССАЖ ШЕИ.** ЭФФЕКТ: подтягивается кожа, выравнивается линия шеи, устраняются признаки старения. Используется банка Ø33 мм. Степень вакуума: ниже среднего, слабая.
- 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА.** ЭФФЕКТ: формируется овал лица, подтягивается и устраняется обвисание кожи. Используются банки Ø33 мм, Ø50 мм. Степень вакуума: средняя, сильная.
- 3. МАССАЖ НОСА.** ЭФФЕКТ: выравнивается линия носа и носогубная складка, подтягивается кожа. Используются банки Ø11 мм, Ø22 мм. Степень вакуума: средняя, выше средней.
- 4. АУТОГЕМОТЕРАПИЯ ВОКРУГ ГЛАЗ И ВЕК.** ЭФФЕКТ: устраняются отеки, убираются морщины, подтягивается кожа вокруг глаз и век. Используется банка Ø11 мм. Степень вакуума: слабая.
- 5. МАССАЖ ЛБА, БРОВЕЙ.** ЭФФЕКТ: устраняются морщины, подтягивается кожа, выравниваются линии лба. Используются банки Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм. Степень вакуума: средняя, сильная.
- 6. МАССАЖ ГУБ.** ЭФФЕКТ: выравнивается линия губ и носогубной складки, устраняются мимические морщины. Используются банки Ø11 мм, Ø22 мм. Степень вакуума: средняя, выше средней.
- 7. МАССАЖ ЛИНИИ ПОДБОРОДКА.** ЭФФЕКТ: выравнивается линия подбородка. Используются банки Ø33 мм, Ø50 мм. Степень вакуума: средняя, сильная.



Макет упаковки медизделия «Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.» (подарочная упаковка (увеличенный фрагмент))



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм (красная)
фото медизделия в упаковке





АЛЬПИНА
П Л А С Т

Здоровье - это красиво!



СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм (красная)
фото медизделия с упаковкой

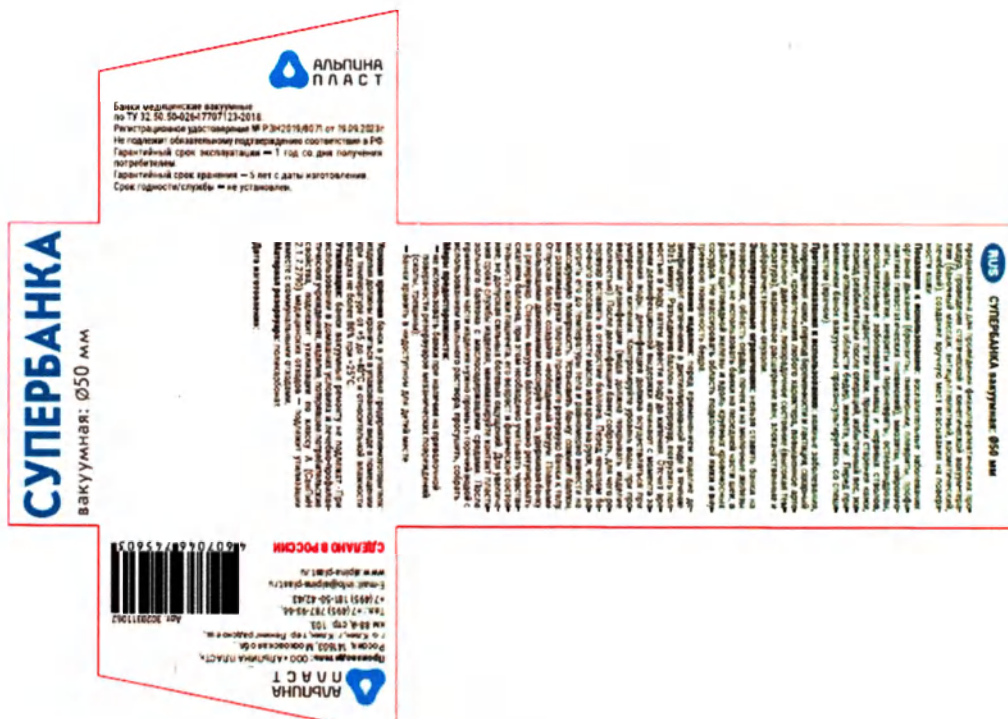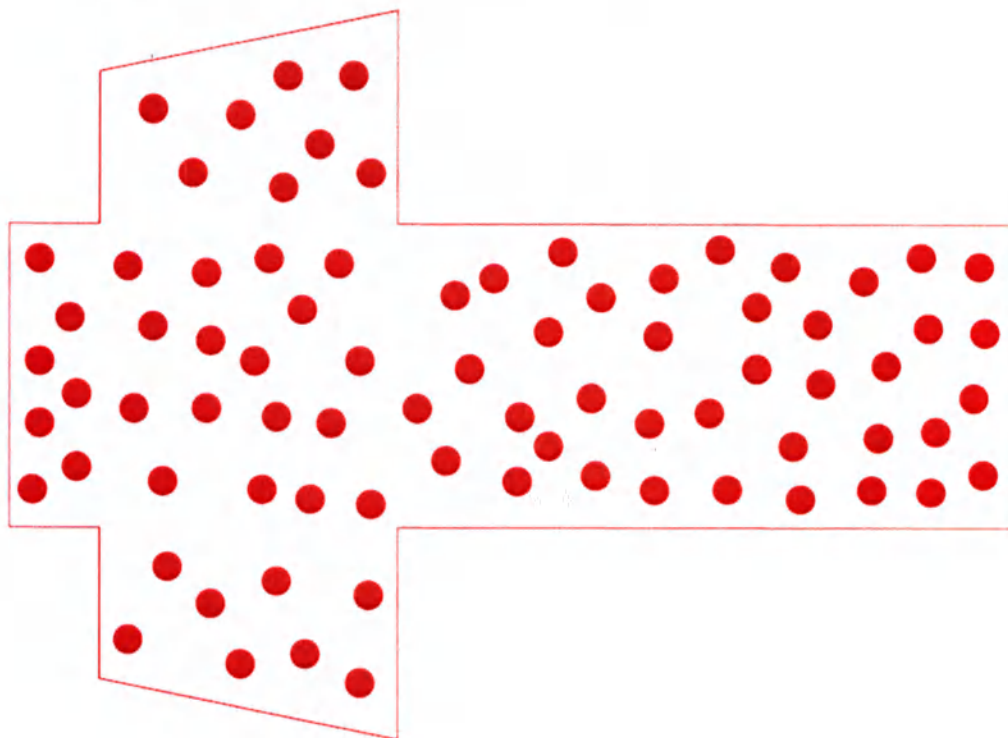

Макет упаковки медизделия «СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм»
(красная) (общий вид)

RUS**СУПЕРБАНКА вакуумная: Ø50 мм**

предназначена для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж: антицеллюлитный, косметический, лечебный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

Показания к использованию: воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты, пневмонии, плевриты, профилактика гипостатических пневмоний), миозиты, нейромииозиты, невралгии, невриты и периневриты, остеохондрозы, воспалительные заболевания мышц и нервных стволов, косметические недостатки кожи, признаки старения кожи, период реабилитации после операций, избыточный вес, жировые отложения в области бедер, живота, ног. Перед применением банок вакуумных проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

Противопоказания к использованию: кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.


Эксплуатационные ограничения: нельзя ставить банки на позвоночник, область сердца, почек и на молочные железы у женщин, не использовать банки на передней части шеи, в районе щитовидной железы и вдоль крупных кровеносных сосудов. Не массировать область подколенной ямки и внутреннюю поверхность бедра.

Использование изделия: перед применением изделие дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Разъединив баллон и резервуар, погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды, дезинфекция должна осуществляться при умеренном кипении. Контролируйте уровень воды при проведении дезинфекции (вода должна покрывать изделие полностью). После дезинфекции банку собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед началом баночного массажа нанести масло или крем на руки, чтобы разогреть его до температуры тела и равномерно нанести на массируемую поверхность. Установить банку: сожмите баллон, не разжимая руки плотно прижмите резервуар банки к телу. Отпуская баллон создайте необходимый вакуум. Плавными скользящими движениями массируйте тело, удерживая банку за резервуар. Степень вакуума баллона можно регулировать сжатием баллона, при этом необходимо учитывать чувствительность кожи пациента, его возраст и физическое состояние, не допуская сильных болевых ощущений. Для увеличения срока службы изделия, минимизируйте контакт пластикового баллона с маслосодержащими средами. После применения части изделия нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора, просушить, собрать.

Меры предосторожности:

- не использовать банки при наличии на привалочной поверхности резервуаров механических повреждений (сколы, трещины);
- банки хранить в недоступном для детей месте.

Макет упаковки медизделия «СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм» (красная)
(увеличенный фрагмент)

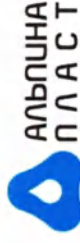

Банки медицинские вакуумные
по ТУ 32.50-50-026-17707123-2018.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8071 от 19.09.2023г.
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня получения
потребителем.
Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы — не установлен.

СУПЕРБАНКА
вакуумная: Ø50 мм

Условия хранения банок в упаковке предприятия-изготовителя:
изделия должны храниться в упакованном виде в помещении
при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности
воздуха не более 80% при +25°C.

Утилизация: банки вакуумные ремонту не подлежат. При
использовании в домашних условиях и лечебно-профилак-
тических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские
свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПиН
2.1.7.2790) медицинских отходов — подлежит утилизации
вместе с коммунальными отходами.

Материал резервуара: поликарбонат.

Дата изготовления:



СДЕЛАНО В РОССИИ

**АЛЬПИНА
П Л А С Т**
Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл.,
г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш.,
км 88-й, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66,
+7 (495) 181-50-42/43.
E-mail: info@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru

Арт. 3020311062

Макет упаковки медицинского изделия «СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм» (красная)
(увеличенный фрагмент)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!




СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм (фиолетовая)
фото медизделия с упаковкой



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

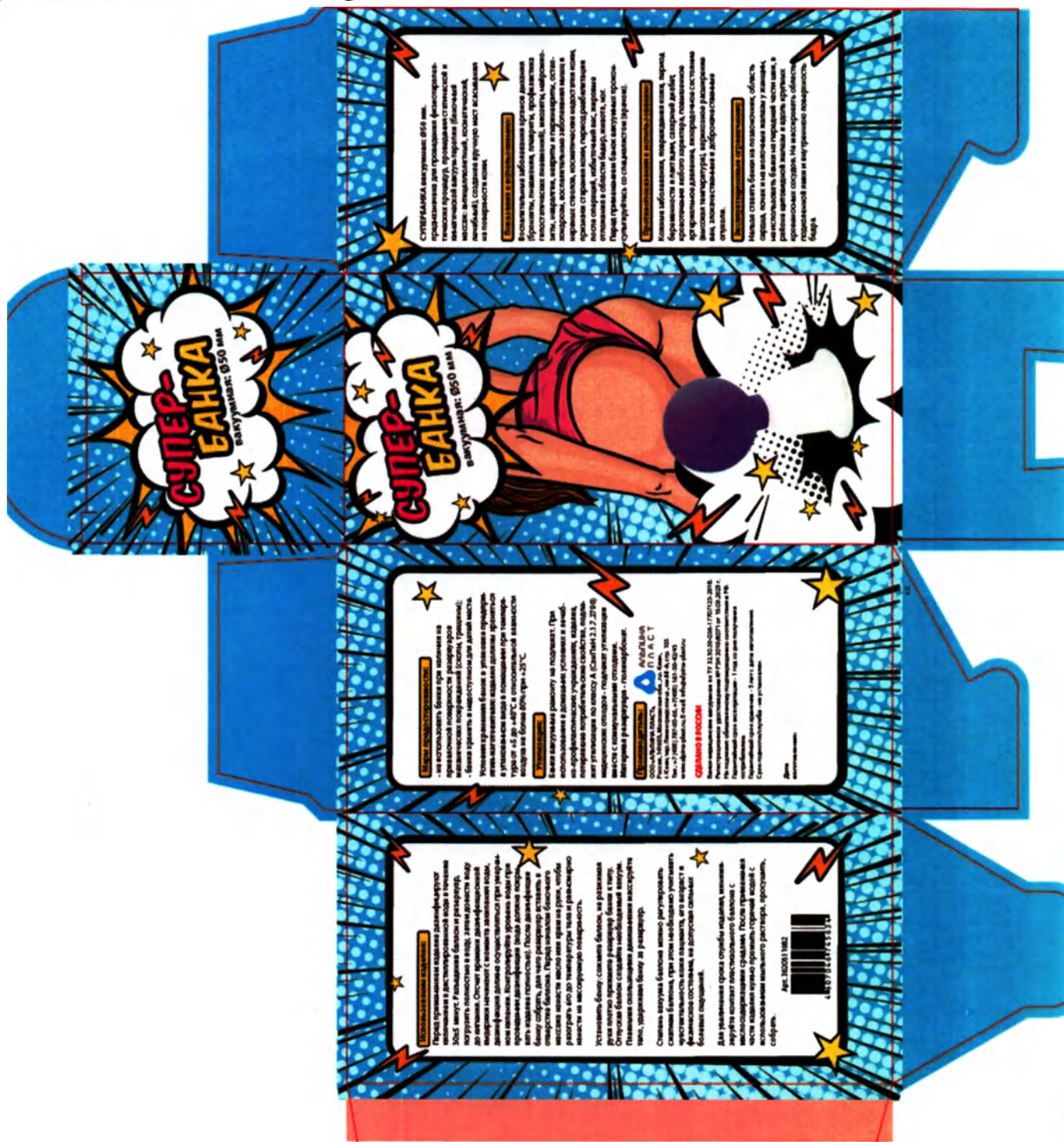

Макет упаковки медизделия «СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм» (фиолетовая)
(общий вид)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

Использование изделия:

Перед применением изделие дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30 ± 5 минут. Разъединив баллон и резервуар, погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды, дезинфекция должна осуществляться при умеренном кипении. Контролируйте уровень воды при проведении дезинфекции (вода должна покрывать изделие полностью). После дезинфекции банку собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед началом баночного массажа нанести масло или крем на руки, чтобы разогреть его до температуры тела и равномерно нанести на массируемую поверхность.

Установить банку: сожмите баллон, не разжимая руки плотно прижмите резервуар банки к телу. Отпуская баллон создайте необходимый вакуум. Плавными скользящими движениями массируйте тело, удерживая банку за резервуар.

Степень вакуума баллона можно регулировать сжатием баллона, при этом необходимо учитывать чувствительность кожи пациента, его возраст и физическое состояние, не допуская сильных болевых ощущений.

Для увеличения срока службы изделия, минимизируйте контакт пластизольного баллона с маслосодержащими средами. После применения части изделия нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора, просушить, собрать.

Арт. 3020311082



4 607046 745634

Макет упаковки медизделия «СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм» (фиолетовая)
(увеличенный фрагмент)

Меры предосторожности:

- не использовать банки при наличии на привалочной поверхности резервуаров механических повреждений (сколы, трещины);
- банки хранить в недоступном для детей месте.

Условия хранения банок в упаковке предприятия-изготовителя: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C.

Утилизация:

Банки вакуумные ремонту не подлежат. При использовании в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с коммунальными отходами.

Материал резервуара - поликарбонат.

Производитель:**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин,
г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7(495) 181-50-42/43
www.alpina-plast.ru, E-mail: info@alpina-plast.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Банки медицинские вакуумные по ТУ 32.50.50-026-17707123-2018.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8071 от 19.09.2023 г.
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы - не установлен.

Дата
изготовления:

Макет упаковки медизделия «СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм» (фиолетовая)
(увеличенный фрагмент)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

СУПЕРБАНКА вакуумная: Ø50 мм.
предназначена для проведения физиотерапевтических процедур, проведения статической и кинетической вакуум-терапии (баночный массаж антицеллюлитный, косметический, лечебный), создание вручную мест всасывания на поверхности кожи.

Показания к использованию:
Воспалительные заболевания органов дыхания (бронхиты, пневмонии, плевриты, профилактика гипостатических пневмоний), миозиты, нейромиозиты, невралгии, невриты и периневриты, остеохондрозы, воспалительные заболевания мышц и нервных стволов, косметические недостатки кожи, признаки старения кожи, период реабилитации после операций, избыточный вес, жировые отложения в области бедер, живота, ног. Перед применением банок вакуумных проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

Противопоказания к использованию:
Кожные заболевания, повреждения кожи, период беременности и лактации, сахарный диабет, кровотечения любого характера, повышенное артериальное давление, лихорадочное состояние (высокая температура), варикозное расширение вен, злокачественные и доброкачественные опухоли.


Эксплуатационные ограничения:
Нельзя ставить банки на позвоночник, область сердца, почек и на молочные железы у женщин, не использовать банки на передней части шеи, в районе щитовидной железы и вдоль крупных кровеносных сосудов. Не массировать область подколенной ямки и внутреннюю поверхность бедра.

Макет упаковки медизделия «СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм» (фиолетовая)
(увеличенный фрагмент)



АЛПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

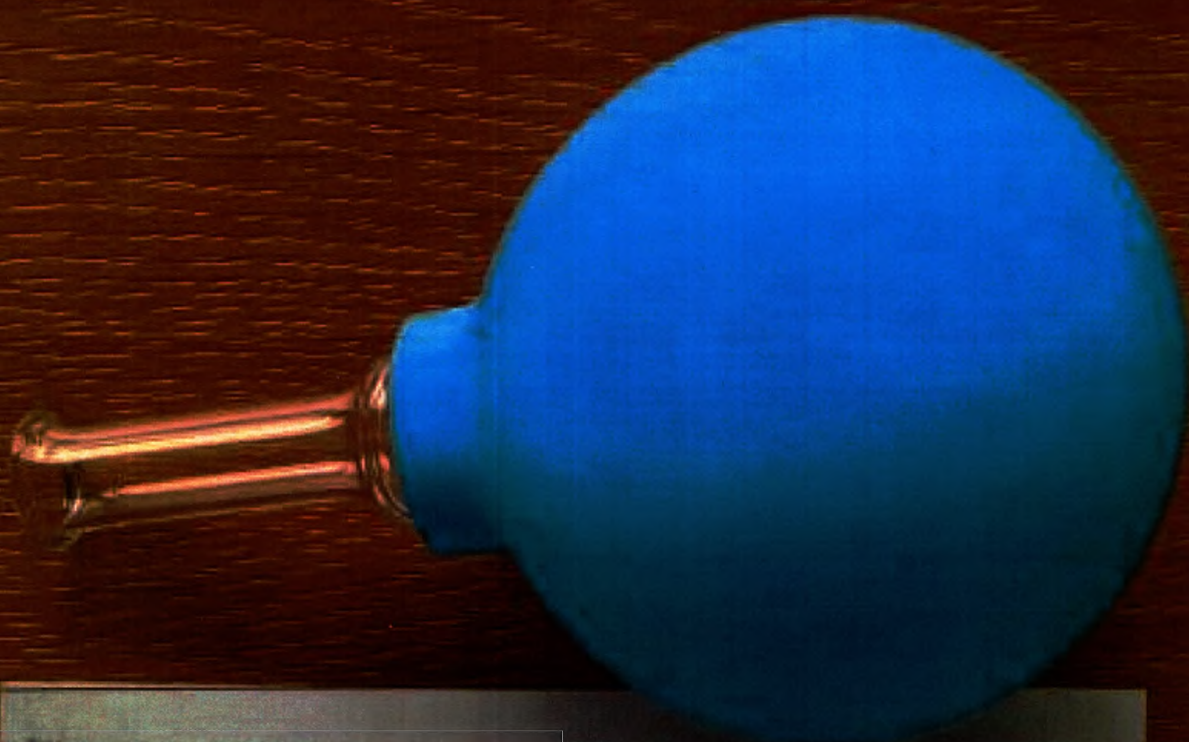

**Банка вакуумная 11 мм (резервуар: стекло
(изготовитель ООО «Медлабстекло»))**

Входит в состав:


**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм,
Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт**

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм,
Ø50 мм, 5 шт**



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

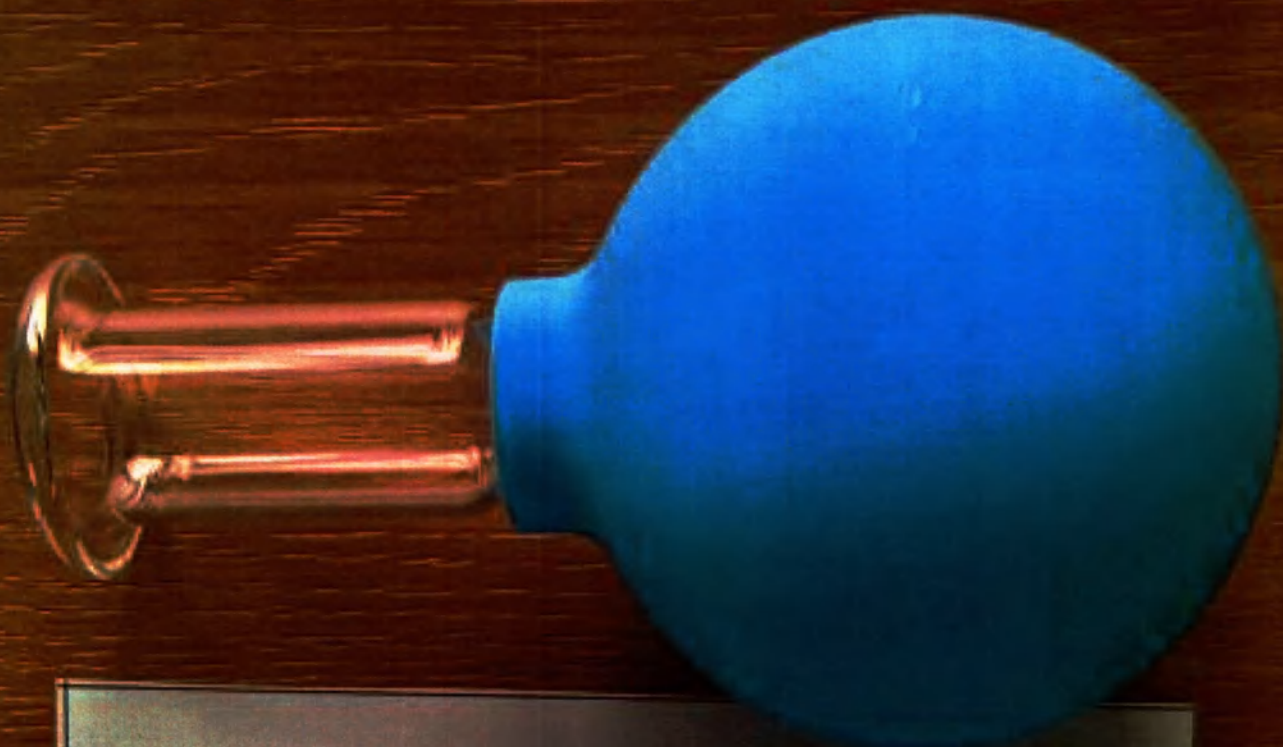

**Банка вакуумная 22 мм (резервуар: стекло
изготовитель ООО «Медлабстекло»)**

Входит в состав:

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ,
Ø22 мм, Ø33 мм, 2 шт.**


**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм,
Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.**

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм,
Ø50 мм, 5 шт**



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

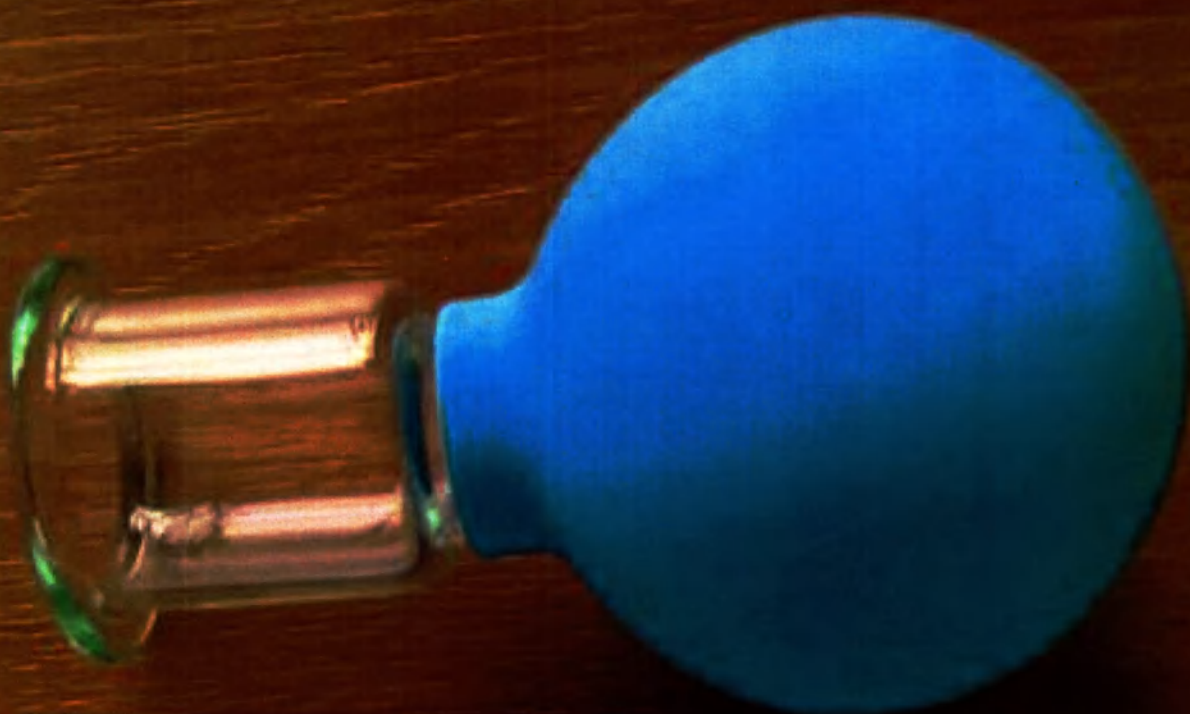

**Банка вакуумная 33 мм (резервуар: стекло
изготовитель ООО «Медлабстекло»)**


Входит в состав:

Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2 шт.

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ,
Ø22 мм, Ø33 мм, 2 шт.**

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм,
Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.**

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм,
Ø50 мм, 5 шт.**

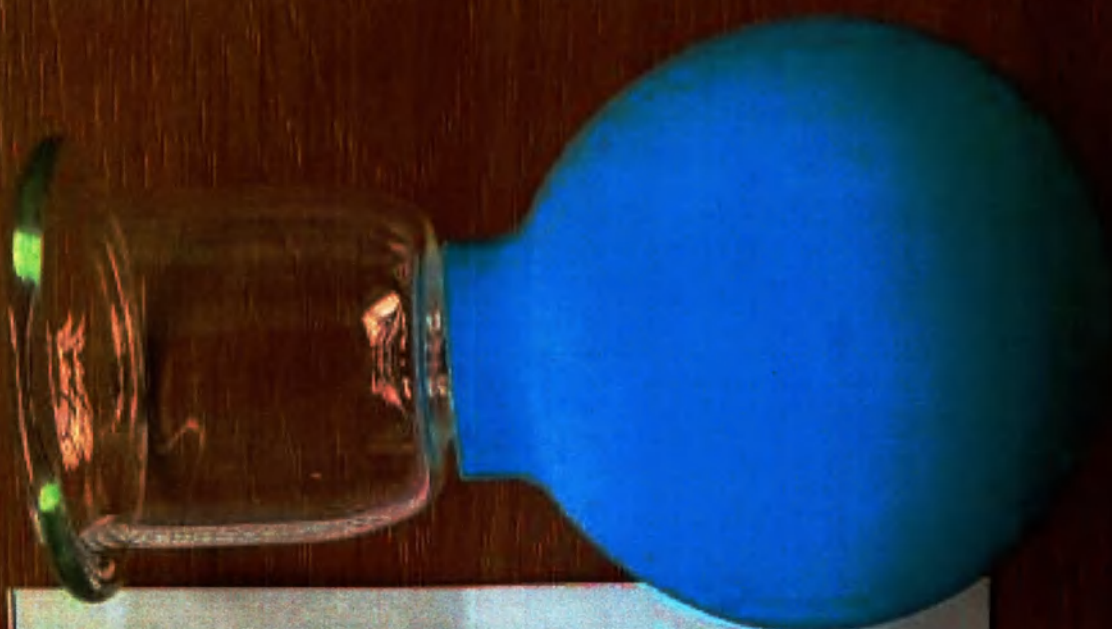

**Банка вакуумная 42 мм (резервуар: стекло
(изготовитель ООО «Медлабстекло»))**


Входит в состав:

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм,
Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.**



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

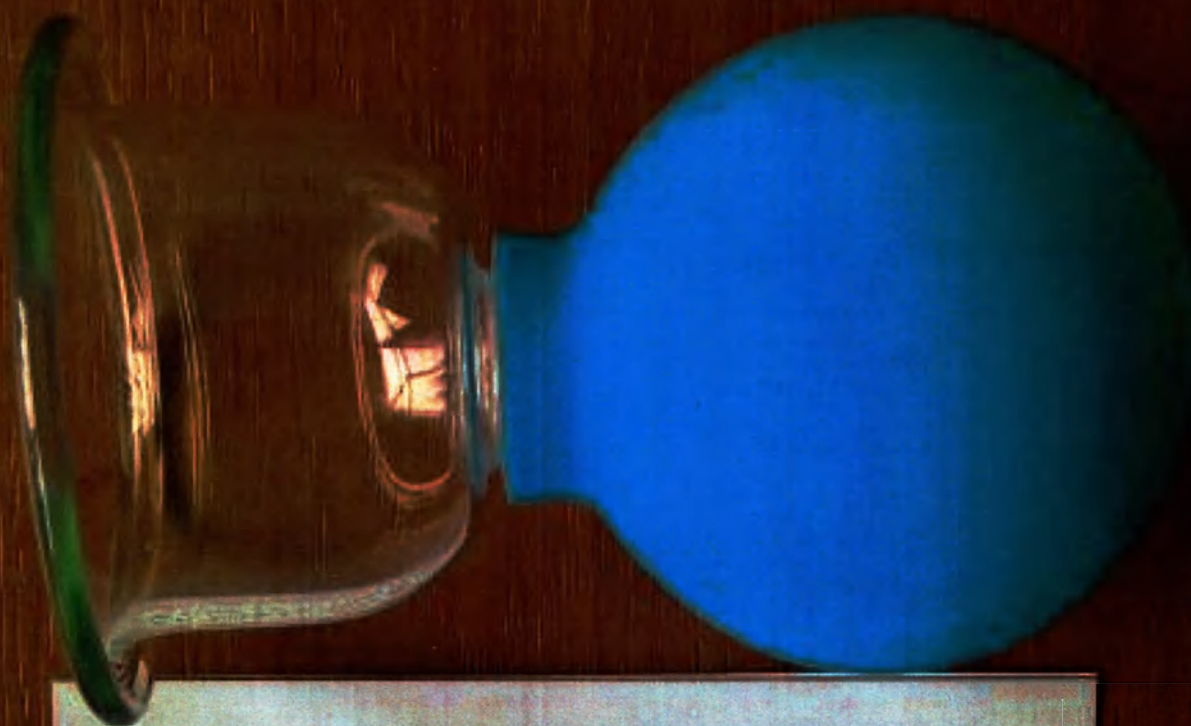

**Банка вакуумная 50 мм (резервуар: стекло
изготовитель ООО «Медлабстекло»)**

Входит в состав:

Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ, Ø50 мм, 8 шт.

Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2 шт.


**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм,
Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.**

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм,
Ø50 мм, 5 шт**



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

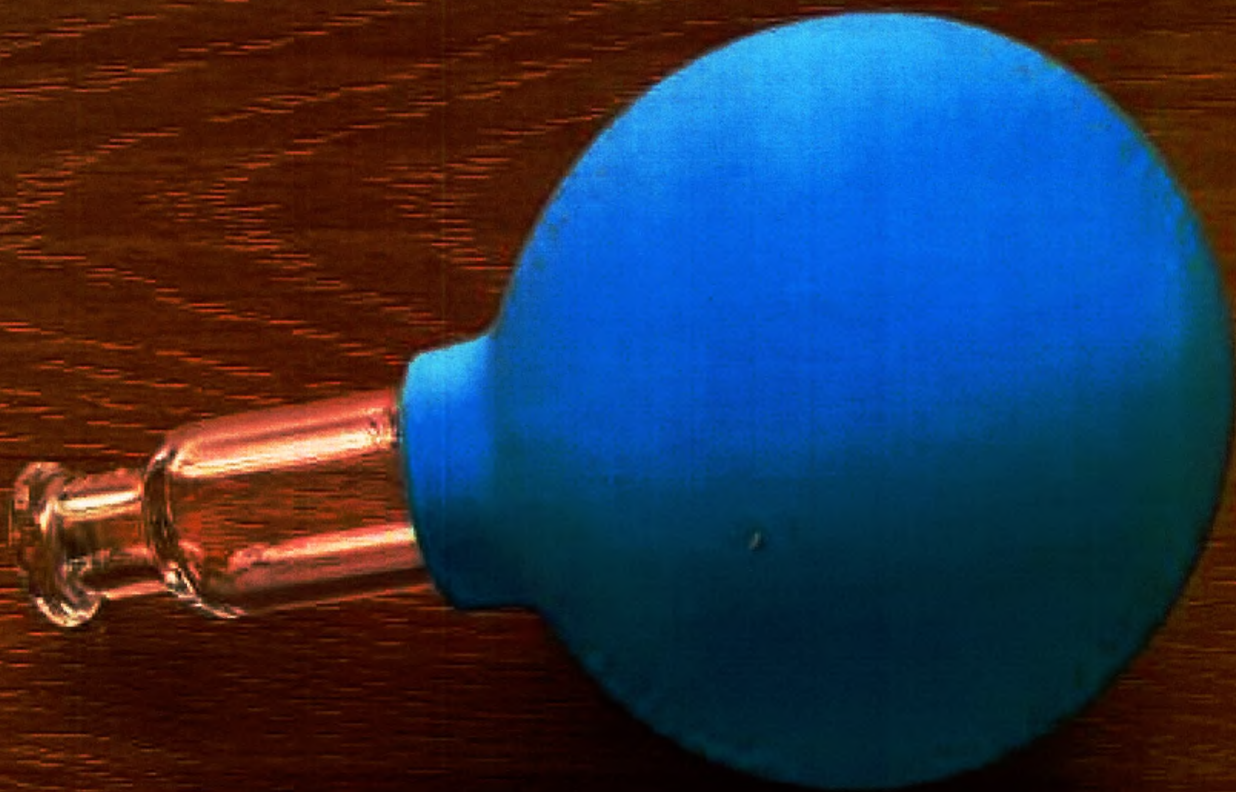

**Банка вакуумная 11 мм (резервуар: стекло
(изготовитель ПАО «Химлаборприбор»))**

Входит в состав:

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм,
Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт**

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм,
Ø50 мм, 5 шт**



Банка вакуумная 22 мм (резервуар: стекло изготовитель ПАО «Химлаборприбор»)

Входит в состав:

- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ, Ø22 мм, Ø33 мм, 2 шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.;

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.



АЛПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



**Банка вакуумная 33 мм (резервуар: стекло
изготовитель ПАО «Химлаборприбор»)**

Входит в состав:

Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2 шт.

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ,
Ø22 мм, Ø33 мм, 2 шт.**


**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм,
Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.**

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм,
Ø50 мм, 5 шт.**




АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

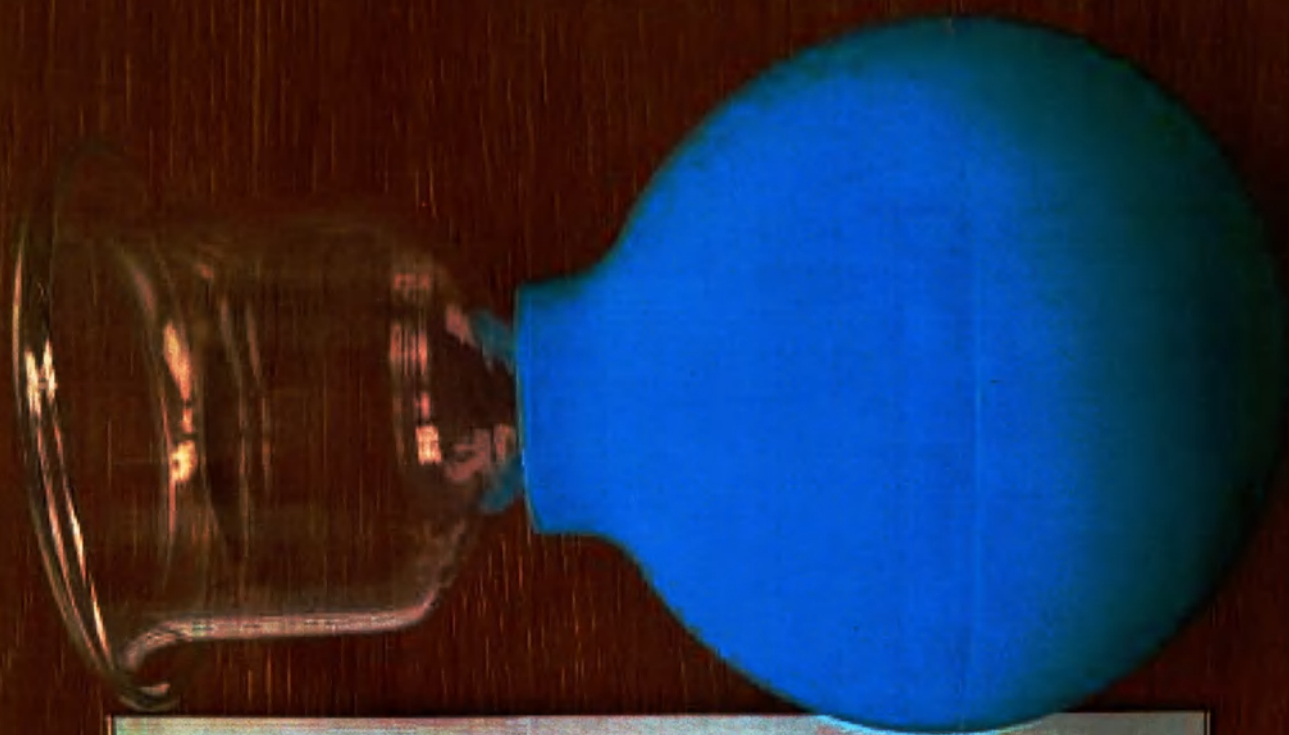

**Банка вакуумная 42 мм (резервуар: стекло
(изготовитель ООО «ПАО «Химлаборприбор»))**
Входит в состав:
Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм,
Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.

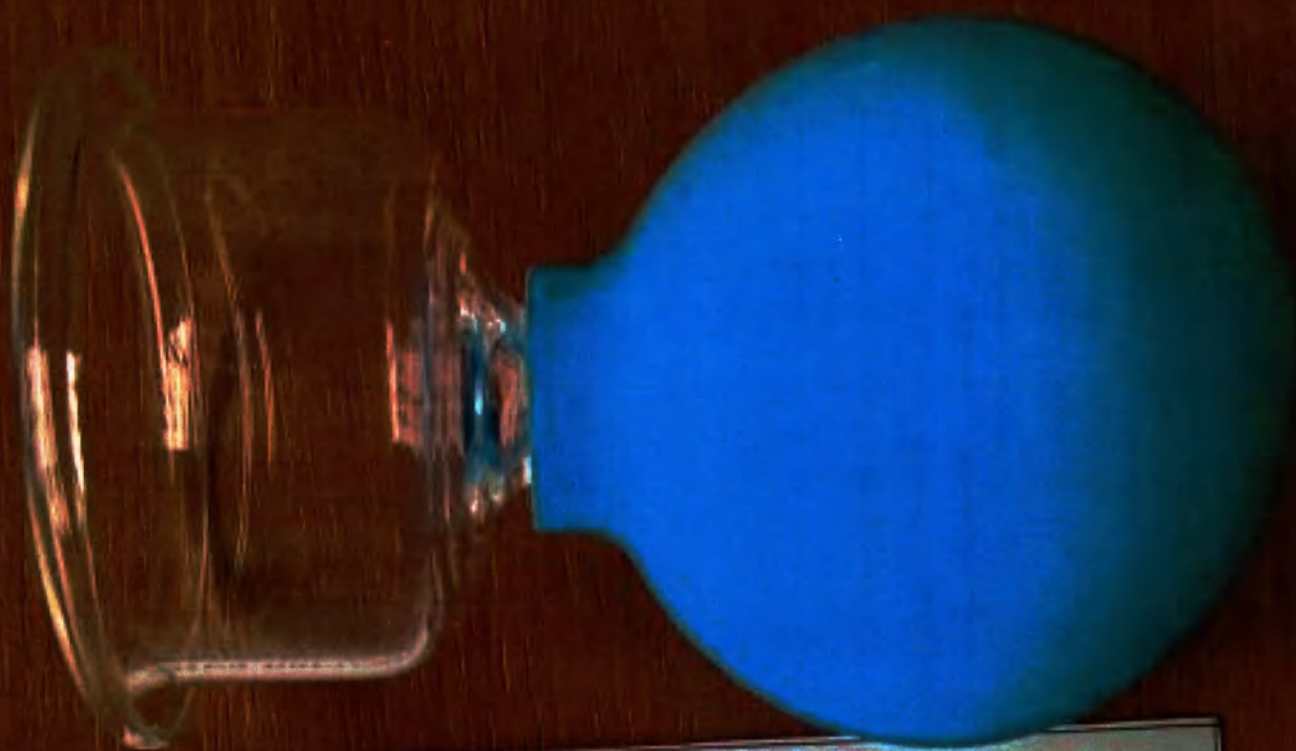

Банка вакуумная 50 мм (резервуар: стекло
(изготовитель ПАО «Химлаборприбор»)

Входит в состав:

Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ, Ø50 мм, 8 шт.

Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2 шт.

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм,
Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм,
Ø50 мм, 5 шт.



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



Банка вакуумная 50 мм (резервуар: поликарбонат
изготовитель ООО "Альпина Пласт")

Входит в состав:

Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ,
Ø50 мм 8 шт.


Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2 шт.

СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

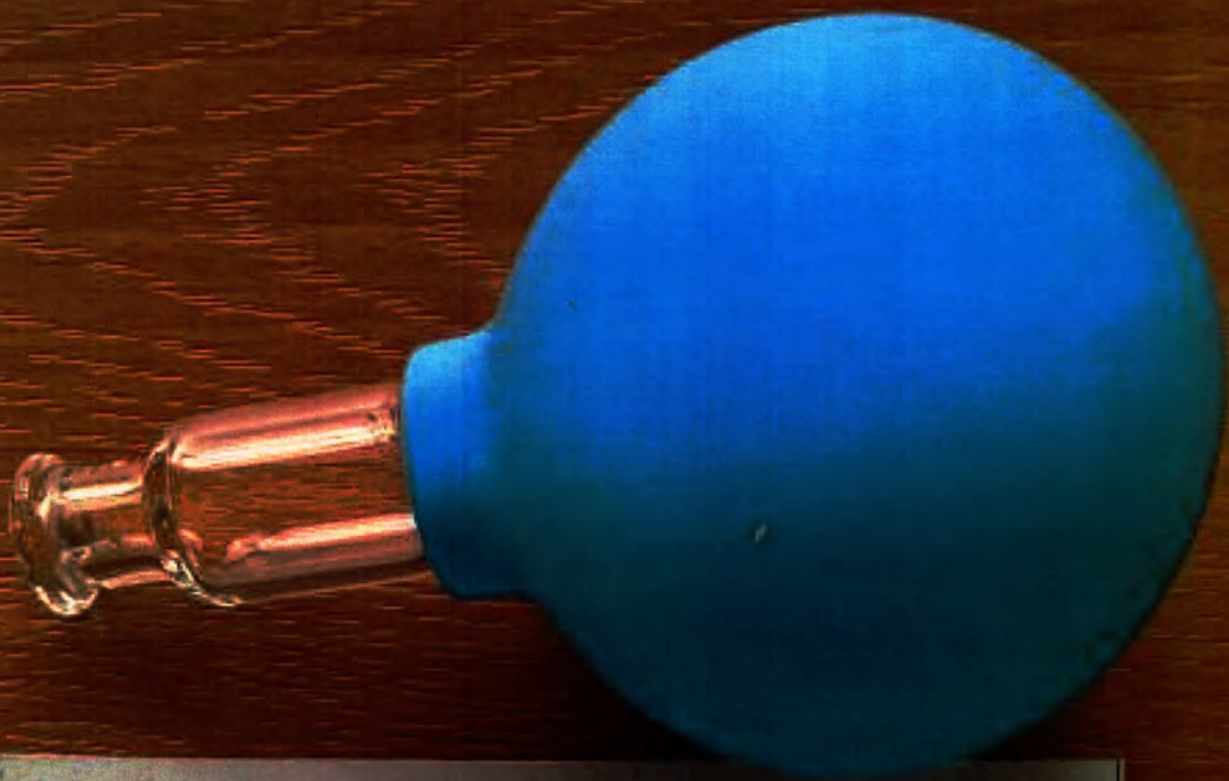

Банка вакуумная 11 мм (резервуар: стекло
изготовитель GmbH Glasbläserei Schneider
(Германия))

Входит в состав:


Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм,
Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм,
Ø50 мм, 5 шт



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

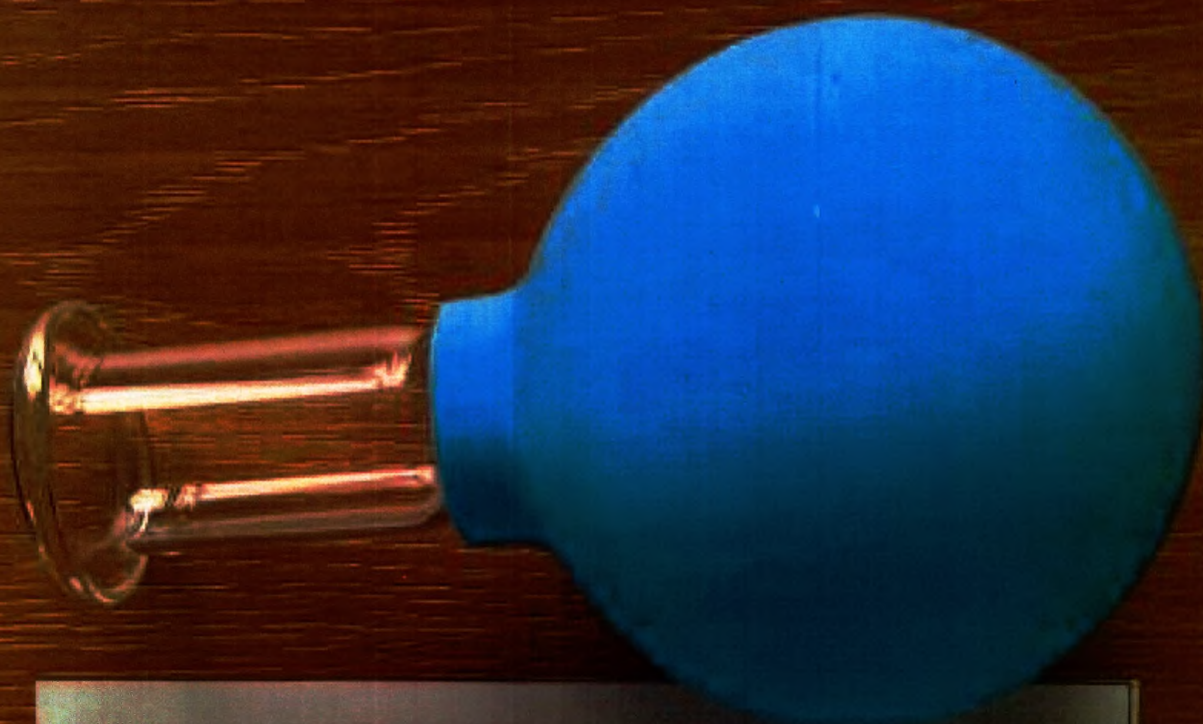

Банка вакуумная 22 мм (резервуар: стекло,
изготовитель GmbH Glasbläserei Schneider
(Германия))

Входит в состав:

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ,
Ø22 мм, Ø33 мм, 2 шт.


Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм,
Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм,
Ø50 мм, 5 шт



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

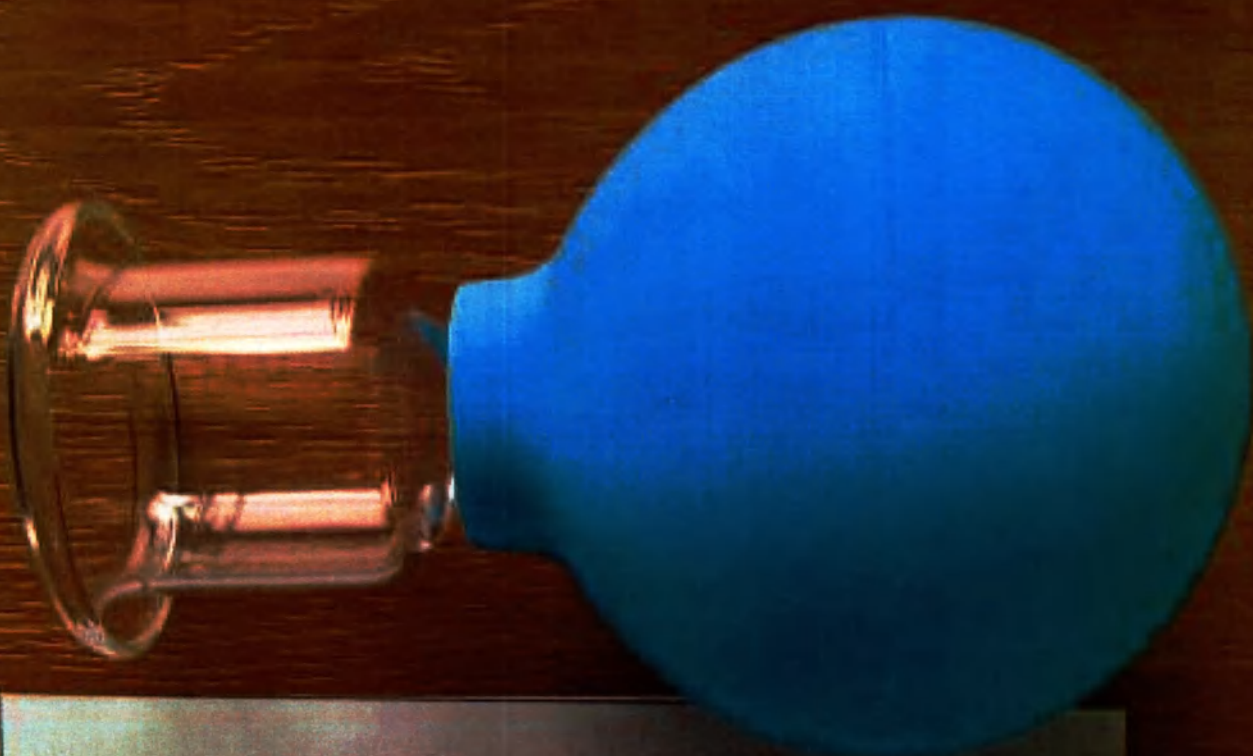

Банка вакуумная 33 мм (резервуар: стекло, изготовитель GmbH Glasbläserei Schneider (Германия))

Входит в состав:

Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2 шт.

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ, Ø22 мм, Ø33 мм, 2 шт.


Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.



АЛЬПИНА
П Л А С Т

Здоровье - это красиво!

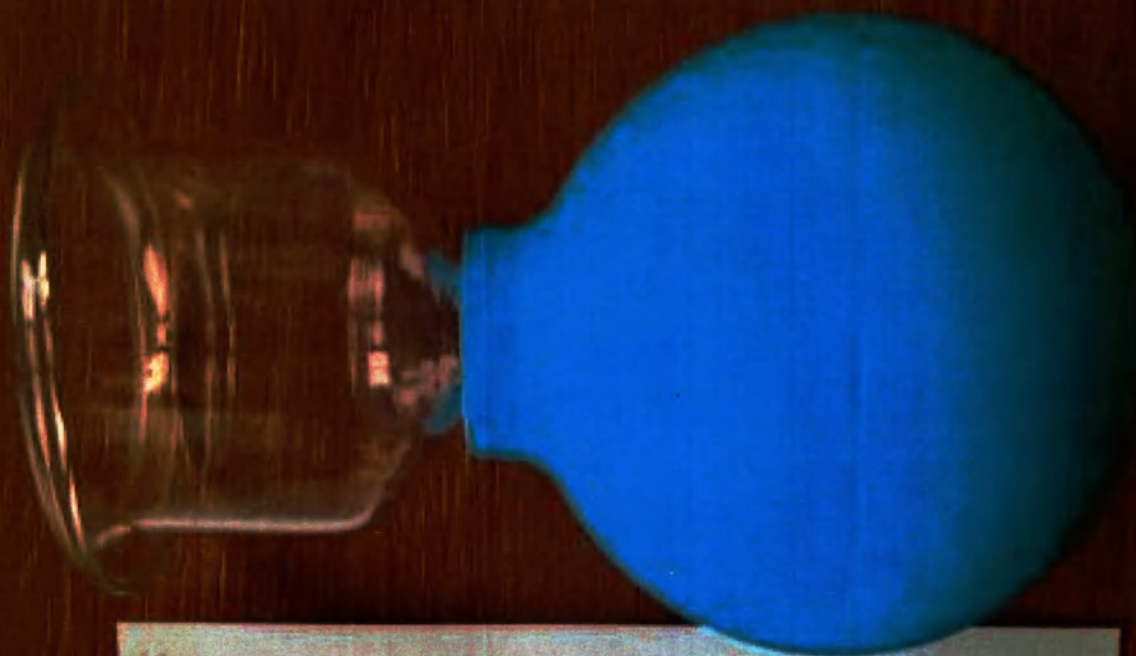

Банка вакуумная 42 мм (резервуар: стекло,
изготовитель GmbH Glasbläserei Schneider
(Германия)).

Входит в состав:


Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм,
Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

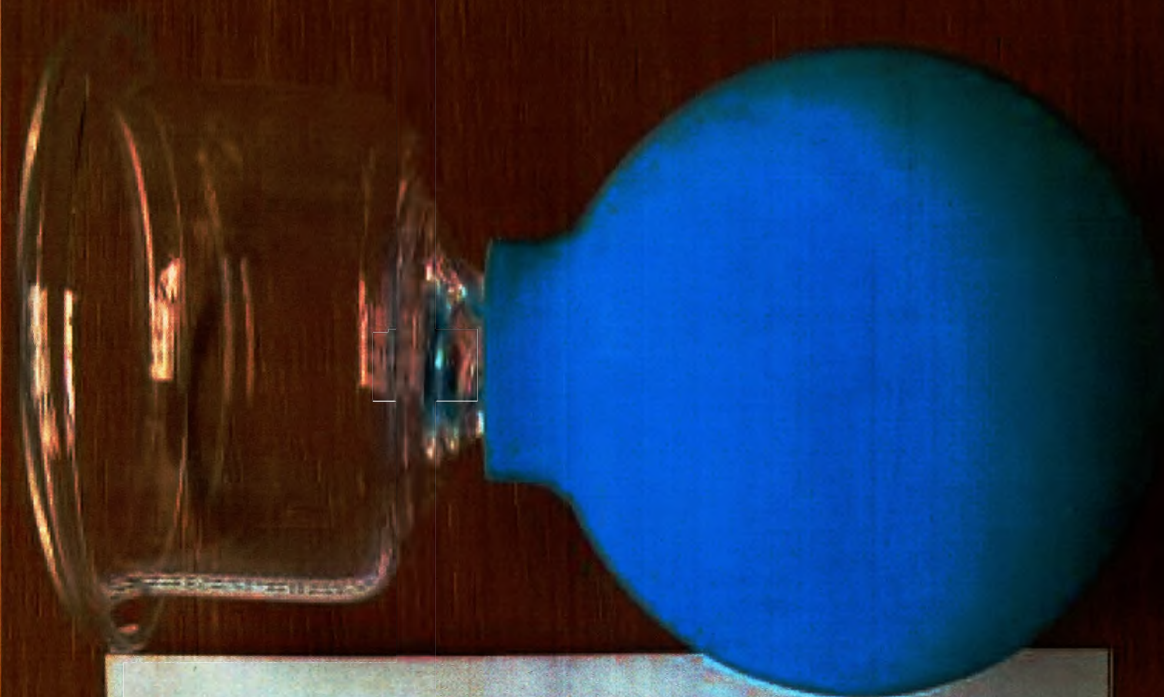

**Банка вакуумная 50 мм (резервуар: стекло
изготовитель GmbH Glasbläserei Schneider
(Германия))**

Входит в состав:

Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ, Ø50 мм, 8 шт.

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм,
Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.**

**Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм,
2 шт.**

**Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм,
Ø50 мм, 5 шт.**



Банка вакуумная 70 мм (переукуп: стекло,
соединение «ребенкой», изготонител: Glasbläserei
Schneider, Германия)
Входит в состав:
Банка вакуумная АНТИЦЕЛЛЮЛЮЗНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Ø70 мм;
Линия вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛЮЗНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø70 мм, 2шт.

АВАНГА
НАСТ



Здоровье - это красота!



**АЛПИНА
ПЛАСТ**

Здоровье – это красиво!



Банка вакуумная, Ø50 мм (цвет баллона – голубой)


Баллоны голубого цвета производятся в вариантах исполнения:

- Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ, Ø50 мм, 8шт.;
- Банки вакуумные ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 8шт.;
- Банки вакуумные ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, Ø33 мм, 2шт.;
- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;
- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;
- Банка вакуумная АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Ø70 мм;
- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø70 мм, 2шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМ, Ø22 мм, Ø33 мм, 2шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.; СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм.



АЛПИНА
П Л А С Т

Здоровье - это красиво!

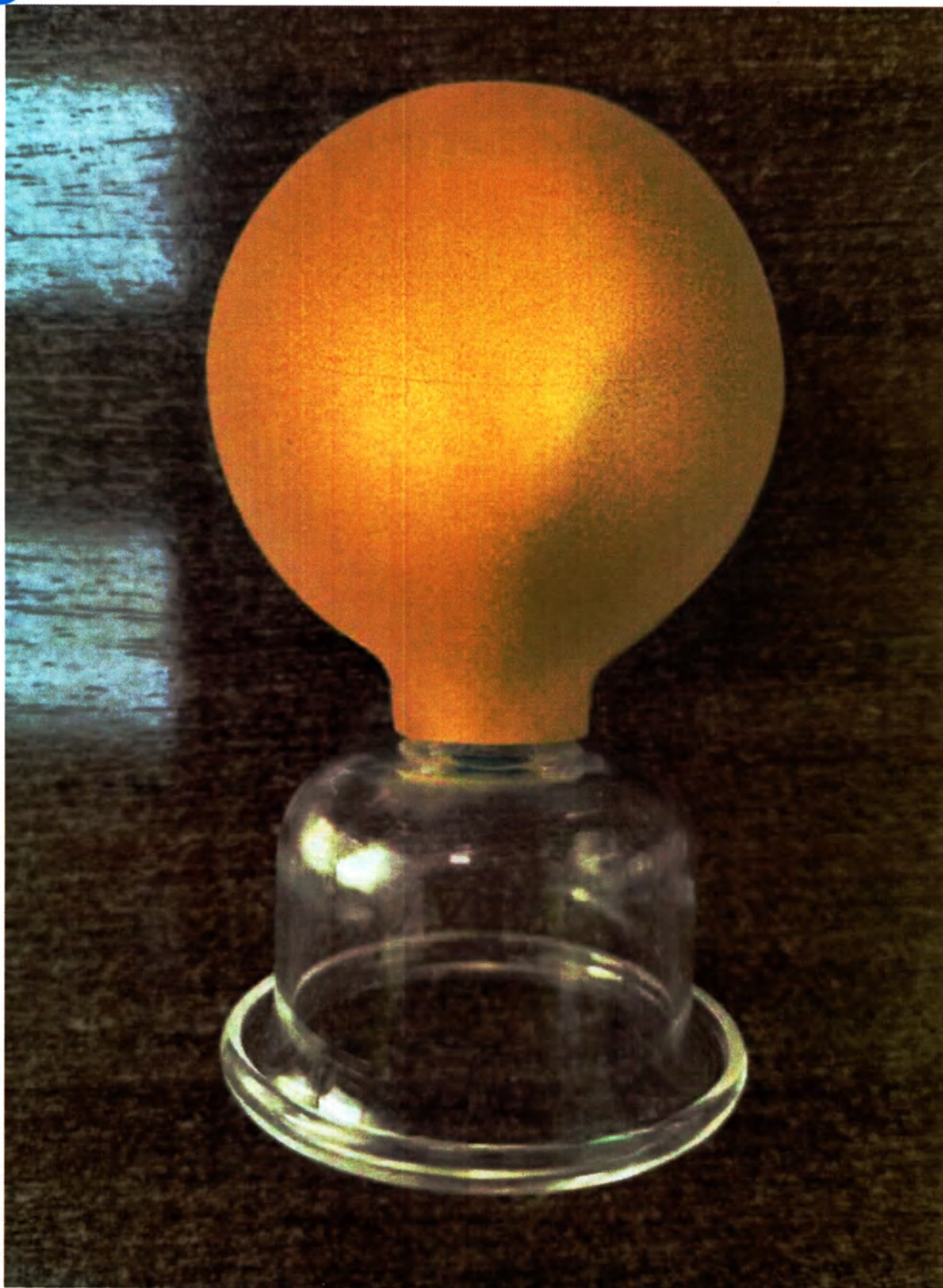

Банка вакуумная, Ø50 мм (цвет баллона – золотой)

Баллоны золотого цвета производятся в вариантах исполнения:

Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;

Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм,
Ø42 мм, Ø50 мм, 5шт.



**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

Здоровое - это красиво!



Банка вакуумная, Ø50 мм (цвет баллона – красный)
Баллоны красного цвета производятся в варианте исполнения:
СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!




Банка вакуумная, Ø50 мм (цвет баллона – розовый)
Баллоны розового цвета производятся в варианте исполнения:
СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!

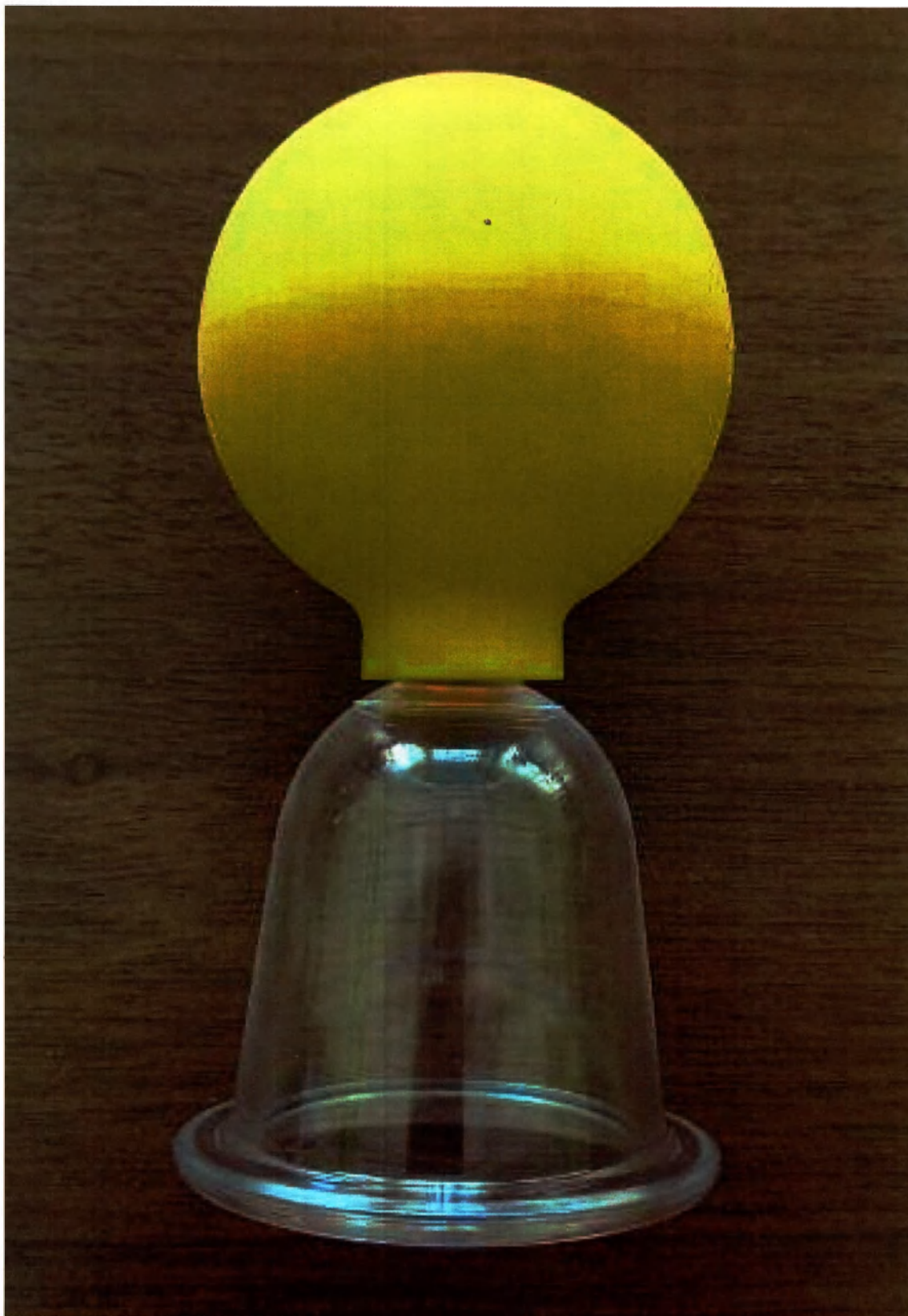

Банка вакуумная, Ø50 мм (цвет баллона – желтый)
Баллоны желтого цвета производятся в варианте исполнения:
СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье – это красиво!




Банка вакуумная, Ø50 мм (цвет баллона – фиолетовый)
Баллоны фиолетового цвета производятся в варианте исполнения:
СУПЕРБАНКА вакуумная, Ø50 мм



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

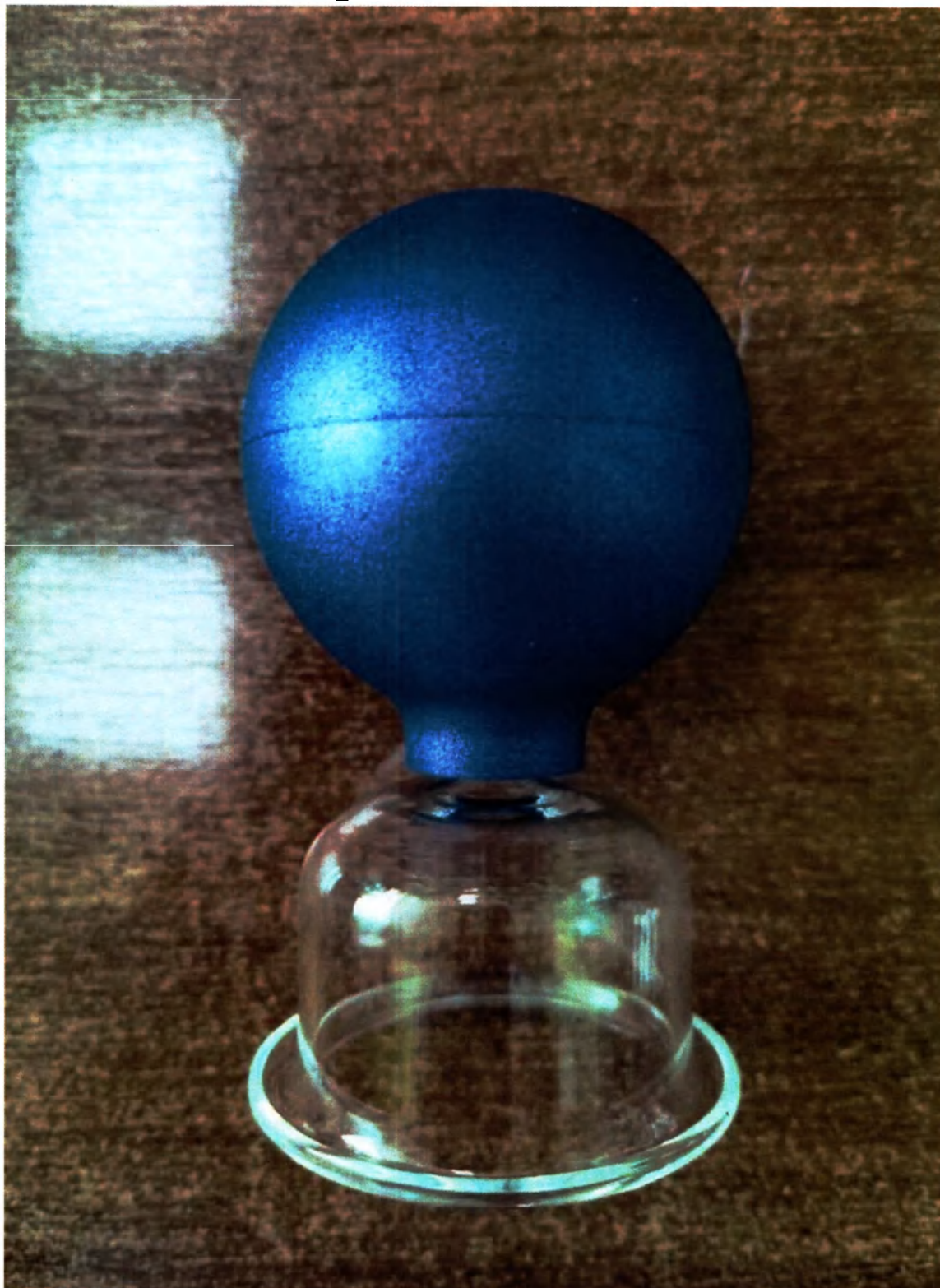

Банка вакуумная, Ø50 мм (цвет баллона серебристо-фиолетовый)

Баллоны серебристо-фиолетового цвета производятся в вариантах исполнения:

- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;
 - Банка вакуумная АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Ø70 мм;
 - Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø70 мм, 2шт.;
 - Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



Банка вакуумная, Ø22 мм (цвет баллона серебристо-розовый)

Баллоны серебристо-розового цвета производятся в вариантах исполнения:

- Банки вакуумные АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ, Ø50 мм, 2шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø50 мм, 4 шт.;
- Банки вакуумные КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, Ø11 мм, Ø22 мм, Ø33 мм, Ø42 мм, Ø50 мм, 5 шт.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

Листа(ов) _____
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игутов