


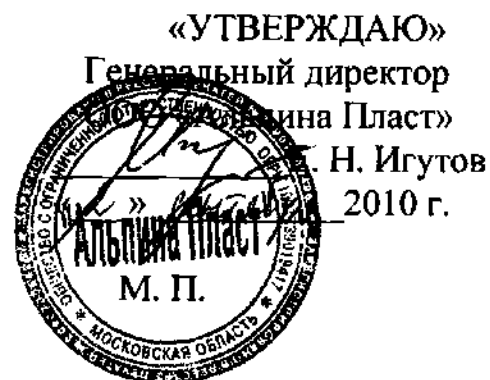

ИНСТРУКЦИЯ по применению

«Кружки Эсмарха КЭ-«Альпина Пласт»

Кружки Эсмарха КЭ-«Альпина Пласт» (далее Кружки Эсмарха) предназначены для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования: для ирригации (орошения) влагалища и кишечника.

Для удобства на резервуаре кружки Эсмарха есть обозначения объемов вмещаемой жидкости.

Ирригация кишечника применяется в следующих случаях: при устранении кишечной непроходимости и зашлакованности кишечника, в качестве вспомогательного средства при интоксикациях, перед операциями и родами, перед различными исследованиями пищеварительного тракта (рентгенологическими, эндоскопическими и др.). Ирригация влагалища применяется в гигиенических и лечебных целях (в составе комплексной терапии).

Противопоказания к проведению ирригации кишечника: желудочно-кишечные кровотечения, опухоли кишки, острый аппендицит, острый перитонит, после операций на органах брюшной полости. **Противопоказания к проведению ирригации влагалища:** острые параметрит, метроэндометрит, пельвиоперитонит и др., во время менструации и беременности, в первые недели после родов и аборта.

Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде следующим образом:

все детали промывают в горячей воде ($t=50\pm5$ °C) с применением нейтрального моющего средства и мягкой губки, не царапающей поверхность;

дезинфекцию наконечников проводят методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода или в 3% раствор хлорамина в течение 80 минут.

По окончании дезинфекции части изделий промывают проточной питьевой водой.

Перед применением соберите изделие: соедините резервуар (емкость) с трубкой через переходник (штулку с резьбой); к концу трубки присоедините поворотный кран и соответствующий наконечник. Резервуар кружки Эсмарха подвесьте за ручку таким образом, чтобы предотвратить загрязнение или попадание в него других веществ. Давление потока жидкости из кружки Эсмарха зависит от высоты расположения резервуара. Закройте поворотный кран, заполните резервуар лекарственным раствором. С помощью поворотного крана отрегулируйте напор жидкости.

Кружки Эсмарха не должны контактировать с лекарственным раствором более 30 минут.

После применения кружку Эсмарха разобрать, части изделия промыть проточной водой с мылом, ополоснуть, высушить.

Кружки Эсмарха следует хранить в помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Изделия не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

Главный технолог

Дементьева Т. А.