


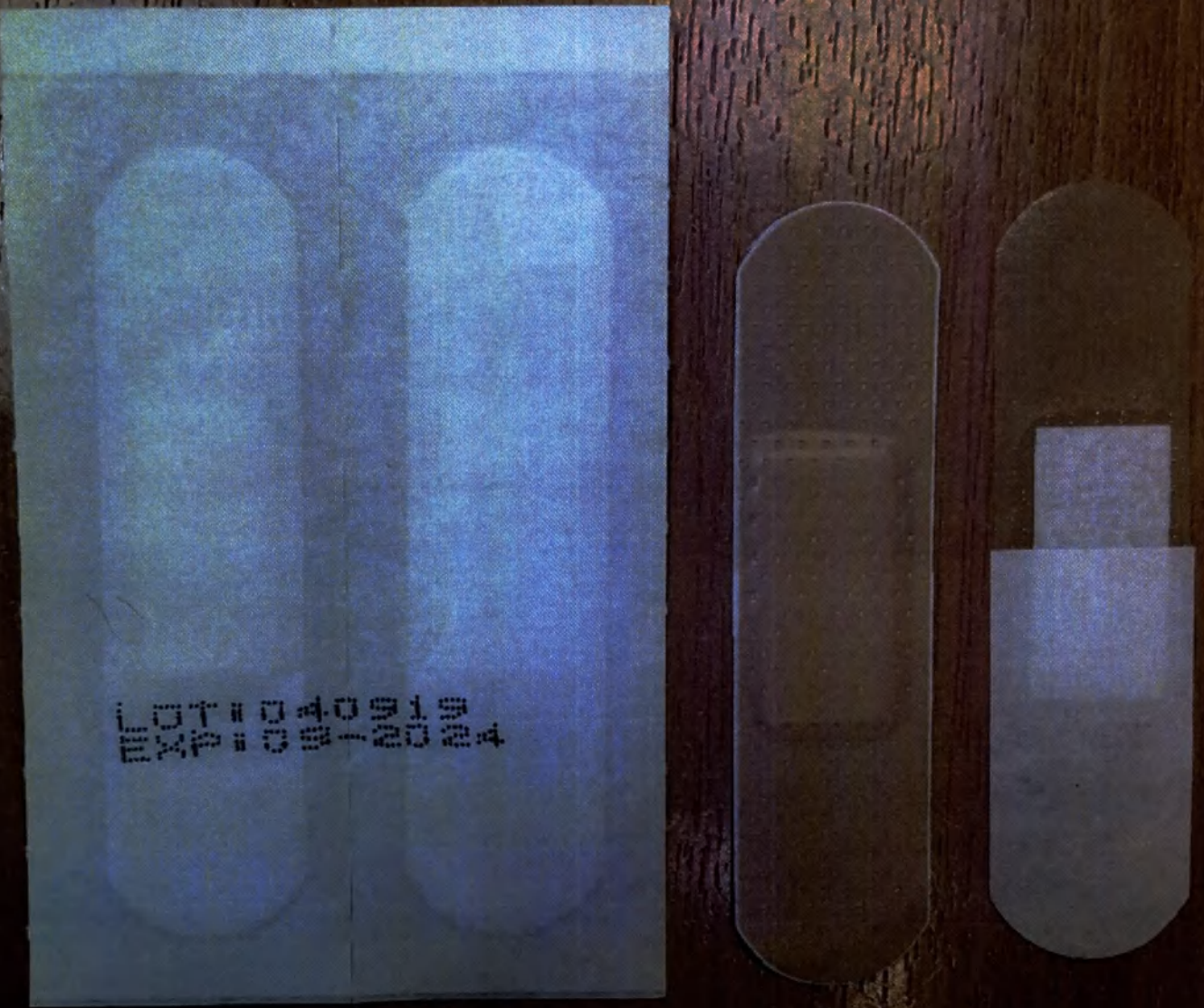

LOT: 040919
EXP: 09-2024

Пластыри медицинские КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ на полимерной основе по ТУ 21.20.24-038-17707123-2018

Соответствует по ТУ 21.20.24-038-17707123-2018,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б

Дата производства: 09.2019 Партия: 040919

Срок годности - 5 лет

Гарантийный срок годности - 5 лет.

20
шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ

20
шт.

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

LUXPLAST®



СТЕРИЛЬНО

72x19 мм

LUXPLAST®

LUXPLAST®

Пластыри медицинские
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ

на полимерной основе
по ТУ 21.20.24-038-17707123-2018

Инструкция по применению

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, остановок капиллярного кровотечения.

Пластыри: асептические, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

Размер: 72x19 мм – 20 шт.

Показания: поверхностные раны, порезы, ссадины, капиллярные кровотечения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; открытые

раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие

индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: перед использованием обработайте рану (царапину,

ссадину) антисептическим средством (перекись водорода, зеленкой и т.д.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь

на сухой и чистой поверхности кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала

раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости,

но не реже одного раза в сутки.

Меры предосторожности: не рекомендуется касаться руками функциональной

подушечки.

Условия хранения: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении

при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%

при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: в домашних условиях после использования по назначению пластыри

подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри

после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПиН

2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.luxplast.info

Соответствует ТУ 21.20.24-038-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение № _____

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка пропитанная гемостатическим веществом – перекисью водорода
- 3 Перфорированная полимерная основа

STERILE EO

PG

LATEX

2

VER. 13 RU

Лот
Дата
Подпись

ШТ.

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

20
ШТ.

 LUXPLAST®



СТЕРИЛЬНО

72x19 мм

Изготовитель:
ООО «Альпина Пласт»

LUXPLAST®

Пластыри медицинские КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ на полимерной основе по ТУ 21.20.24-038-17707123-2018

Инструкция по применению

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, остановки капиллярного кровотечения.

Пластыри: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.
Размер: 72x19 мм — 20 шт.

Показания: поверхностные раны, порезы, ссадины, капиллярные кровотечения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.). Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

Меры предосторожности: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

Условия хранения: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.luxplast.info


Соответствуют ТУ 21.20.24-038-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение № _____

Срок годности — 5 лет. Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

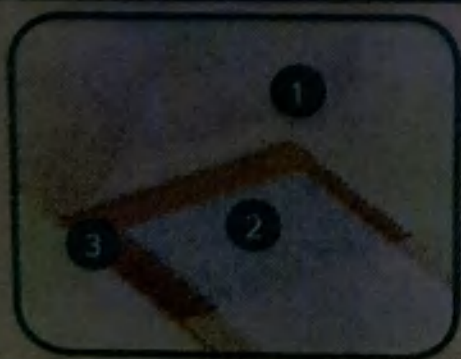

1 Защитный бумажный слой

2 Абсорбирующая подушечка пропитанная гемостатическим веществом — перекисью водорода

3 Перфорированная полимерная основа

Пластыри: атраматичные, сорбционные, на полимерной основе, с антибактериальным эффектом.
Размер: 72x19 мм — 20 шт.

Показания: поверхностные раны, порезы, ссадины, капиллярные кровотечения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

Меры предосторожности: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

Условия хранения: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.luxplast.info

Соответствуют ТУ 21.20.24-038-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение №

Срок годности — 5 лет. Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка пропитанная гемостатическим веществом — перекисью водорода
- 3 Перфорированная полимерная основа

STERILE EO



13 RU

Лот №

Дата изготовления

Годен до



Изготовитель:

ООО «Альпина Пласт».

Россия, 141603, Московская область, г. Клин,
Ленинградское ш., территория 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

на сухом и чистом
раневую поверхно
но не реже одного
Меры предосторо
подушечки.

Условия хранения
при температуре о
при +25°C, в защи

Утилизация: в дом
подлежат утилиза
после использован
2.1.7.2790) медици

Заказчик: ООО «Б

Адрес: 115201, г. М


www.luxplast.info

Соответствуют ТУ

Регистрационное у

Срок годности — 5

Не использовать п

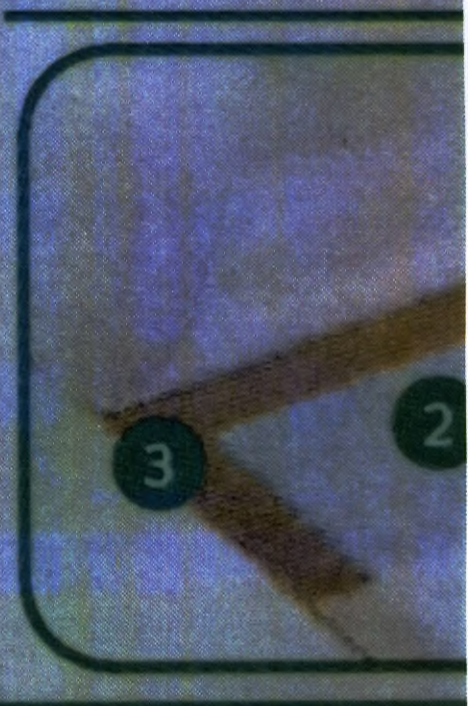

тири: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.
Размер: 72x19 мм — 20 шт.

Назначения: поверхностные раны, порезы, ссадины, капиллярные кровотечения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Возможные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: перед использованием обработайте рану (царапину, порез) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.). Снимите упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, не реже одного раза в сутки.

Меры предосторожности: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

Условия хранения: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении с температурой от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 172790) медицинских отходов.

Производитель: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

Сайт: luxplast.info


Сертификат соответствия ТУ 21.20.24-038-17707123-2018.

Сертификат соответствия № _____

Срок годности — 5 лет. Гарантийный срок годности — 5 лет.

Использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

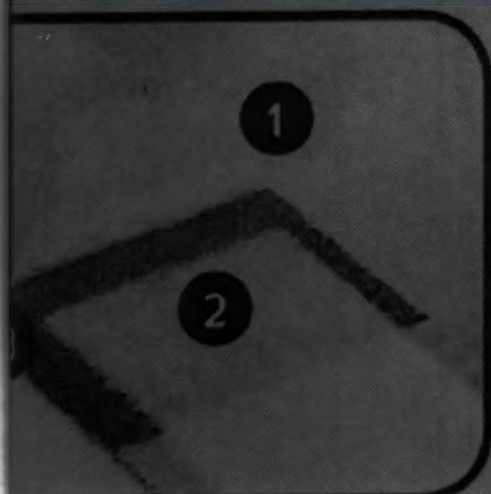

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка пропитанная гемостатическим веществом — перекисью водорода
- 3 Перфорированная полимерная основа

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ

на полимерной основе

по ТУ 21.20.24-038-17707123-2018

Инструкция по применению

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, остановки капиллярного кровотечения.

Пластыри: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.
Размер: 72x19 мм — 20 шт.

Показания: поверхностные раны, порезы, ссадины, капиллярные кровотечения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).
Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

Меры предосторожности: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

Условия хранения: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении

+25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПиН 17.2790) медицинских отходов.

Издавец: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68

www.luxplast.info


Соответствуют ТУ 21.20.24-038-17707123-2018.

Сертификатное удостоверение № _____

Срок годности — 5 лет. Гарантийный срок годности — 5 лет.

Использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

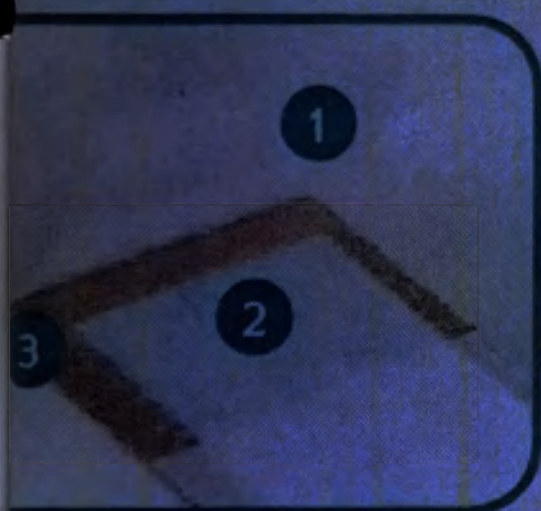

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка пропитанная гемостатическим веществом — перекисью водорода
- 3 Перфорированная полимерная основа

STERILE EO



Партия № _____

Дата изготовления: _____

Срок до: _____

72x19mm
20 штук

СТЕРИЛЬНО
20 шт. 72x19 мм

ТЕМОСТАТИЧЕСКИЕ

LUXPLAST® 20 ШТ.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

20
ШТ.

Исготовитель:
ООО «ЦИРМИ»
Рос. на. 141403, Московская область, г. Клин,
Ленинградское ш., территория 88 км. к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@cirmi-plast.ru, www.cirmi-plast.ru

STERILE EO



VER. 01V



Подпись:
Дата изготовления:
LOT Партия №

LUXPLAST®

Пластыри медицинские
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
на полимерной основе
по ТУ 21.20.24-038-17707123-2018

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, остановки капиллярного кровотечения.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

Размер: 72x19 мм – 20 шт.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины, капиллярные кровотечения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (заразную, ссадину) антисептическим средством (перекись водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушка закрывала раневую поверхность. Рекомендуются менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПиТ 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV.

Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.luxplast.info

Совместителю ТУ 21.20.24-038-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение №

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ


- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка, пропитанная гемостатическим веществом - перекисью водорода
- 3 Перфорированная полимерная основа



LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

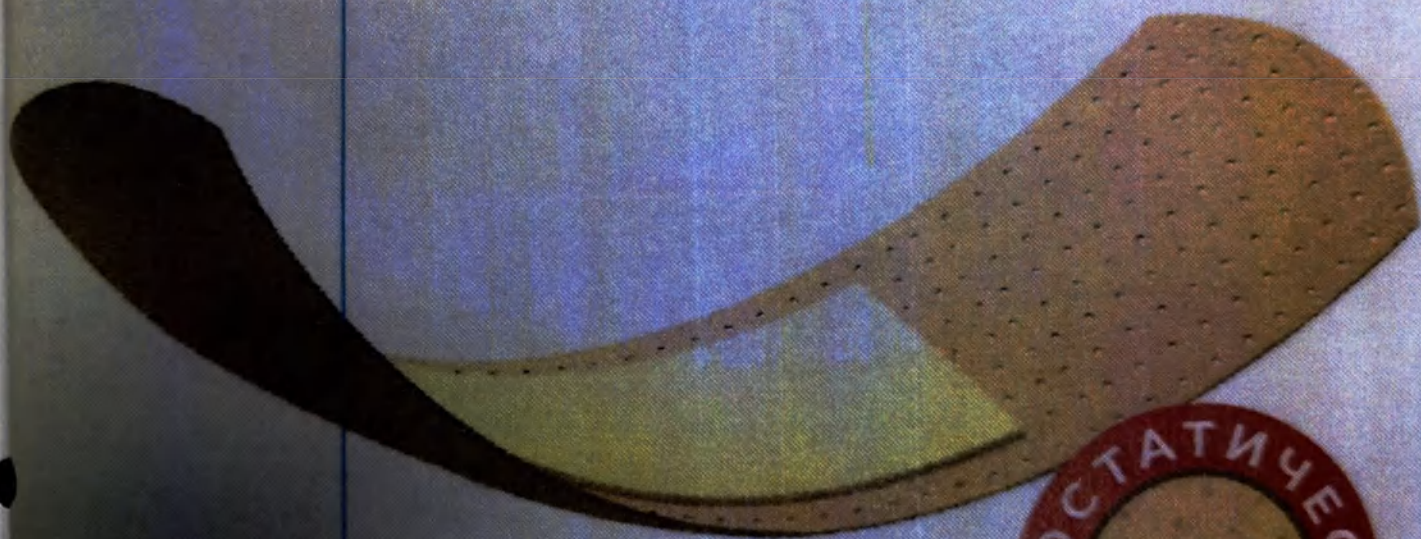

72x19mm
20 штук

СТЕРИЛЬНО
20 шт. 72x19 мм



Годен до:



Дата
изготовления:



Партия №



Пластыри медицинские КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ на полимерной основе по ТУ 21.20.24-038-17707123-2018

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран, порезов, ссадин, остановки капиллярного кровотечения.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.
Размер: 72x19 мм - 20 шт..

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины, капиллярные кровотечения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытового мусора. В медицинских организациях пластырь после использования по

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины, капиллярные кровотечения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV.

Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.luxplast.info

Соответствуют ТУ 21.20.24-038-17707123-2018.


Регистрационное удостоверение

№ _____

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок годности – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

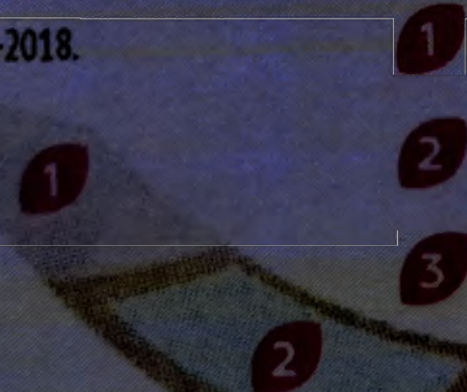- 
- 1 Защитный бумажный слой
 - 2 Абсорбирующая подушечка, пропитанная гемостатическим веществом – перекисью водорода
 - 3 Перфорированная полимерная основа



Изготовитель:

ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская область, г. Клин,
Ленинградское ш., территория 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

STERILE EO



Соответствуют ТУ 21.20.24-038-17707

Регистрационное удостоверение
№ _____

Срок годности — 5 лет.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (содержит латекс).
пину, ссадину) антисептичес

Вскройте упаковку, снимите з
участке кожи так, чтобы фун
дуется менять пластырь по м

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изд
пературе от +5 до +30°C и отн
ном от прямых солнечных лу

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних
утилизации как бытовой мусо
назначению подлежит утили

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»

Адрес: 115201, г. Москва, Кац

Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.luxplast.info

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (четырнадцать) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игудов

