

Макеты упаковки

Трубка детская газоотводная по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017

2023

для однократного
использования

Детские продукты
МалышОк!



Анализатор кишечных
газов
Рег. № 2014/0179 от 15.01.2016



Маскировщик с однократным
раскрытием
Рег. № 2014/0179 от 15.01.2016



Пакет для сбора
каловых масс
Рег. № 2014/0179 от 15.01.2016



Набор для анализа
для уроча за младенцем
Рег. № 2014/0179 от 15.01.2016

Рег. № 2014/0179 от 15.01.2016

МалышОк!

**Трубка
детская
газоотводная**

по ТУ 32.50.50-030-1770123-2017



**5
штук**

Арт. 2162055213



Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42
www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru
malish-ok.info



СДЕЛАНО В РОССИИ

Инструкция по применению внутри упаковки.

Трубка детская газоотводная по ТУ 32.50.50-030-1770123-2017
предназначена для выведения газов из кишечника у новорожденных и детей
до 2 лет.

Показания к применению: болезненное колики у детей, метеоризм, вялая
перистальтика, подготовка к ультразвуковому исследованию ЖКТ.

Противопоказания: наличие кровотечек, злокачественные
новообразования прямой кишки, острые воспалительные и язвенные
процессы в области толстой кишки и заднего прохода; трещины в области
заднего прохода и выделение прямой кишки; кровотечения геморрой.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения:

- не использовать при наличии механических повреждений изделия
(вздутия, трещины, расщепления, утолщения и т.д.);
- не ставить трубку более 3 раз за сутки и не вытаскивать через 3-4 часа
после последней процедуры.

Номинальные размеры: 4х70 см.

Материал: поливинилхлорид.

Использование изделия:

Для стимуляции отхождения газов провести массаж живота по часовой стрелке:



- уложить ребенка на левый бок с приведенными к животу ногами
- для детей до 6 месяцев допускается использовать подомение на спине
с подтянутыми и слегка прижатыми к животу ногами;
- закрытый конец трубки склеить пластырем или другим крепящим
одной рукой раздвинуть вводить, другой вращательными движениями
медленно ввести в заднепроходное отверстие трубку;
- трубка должна вводиться свободно, при ощущении препятствий —
прекратить продвижение трубки вперед!

Глубина ввода трубки в прямую кишку

Возраст	Глубина ввода, см	Время процедуры, мин
Новорожденные, дети до года	до 50	до 10
Дети 1-2 года	50-70	

Говорящий срок хранения — 5 лет с даты изготовления.

Срок годности: ТУ 32.50.50-030-1770123-2017.

Регистрационное удостоверение № ФСН 2017/06-14 от 30.09.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР БЕЛКА»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4, тел. +375 (17) 373-83-20.

Дистрибьютор в Республике Узбекистан: ООО «ВОЛЕАР МЕДИКО»,
100060, г. Ташкент, Имбирбадский р-н, проспект Амира Темура, дом 45, кв. 1.

Тел.: +998 (90) 990-60-45.

ИЗГОТОВЛЕНО:

для одноразового
использования

МалышОк!

**Трубка
детская
газоотводная**

по ТУ 32.50.50-030-1770123-2017



**10
штук**



Другие продукты
МалышОк!



Анализатор кишечных
сигналов новорожденных
РТУ-3М-2016/17 от 15.07.2016



Модельный комплект
разрешен
ТУ 32.50.50-030-1770123-2017




Пакеты для сбора и хранения
фекалий
БАНС-01.2 от 26.03.18 846402



Насос безбарьерный
Альпина Пласт
для ухода за новорожденными
и детьми до 3 лет
РТУ-02-2020/03/2 от 18.07.2020

Анализатор кишечных
сигналов новорожденных
РТУ-3М-2016/17 от 15.07.2016

Арт. 2162105213

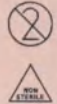

Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42
www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru
malish-ok.info
СДЕЛАНО В РОССИИ



Инструкция по применению трубки упаковки.
Трубка детская газоотводная по ТУ 32.50.50-030-1770123-2017
предназначена для выведения газов из кишечника у новорожденных и детей
до 2 лет.

Показания к применению: болезненные колики у детей, метеоризм, вялая
перистальтика, подготовка к ультразвуковому исследованию ЖКТ.

Противопоказания: кишечное кровотечение, запоры, воспалительные и язвенные
новорожденная правая кишка, острые воспалительные и язвенные
процессы в области толстой кишки и заднего прохода, трещины в области
заднего прохода и выпадение прямой кишки, кровоточащий геморрой.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения:

- не подвергать пропариванию, воздействию влаги
- не подвергать воздействию температуры выше +20°С.
- не ставить трубку более 3 раз за сутки и не чаще чем через 3-4 часа
после последней процедуры.

Номинальные размеры: 4х70см.

Количество в упаковке: 10 шт.

Материал: поливинилхлорид.

Использование изделия:

для стимуляции отхождения газов провести массаж живота по часовой стрелке



- уложить ребенка на левый бок с приподнятыми и живыми ногами
- для детей до 6 месяцев допускается использовать подолечение на спине
с подтянутыми и слегка прижатыми к животу ногами;
- завернутый конец трубки смазать вазелином или детским кремом;
- одной рукой раздвинуть ягодицы, другой вращательными движениями
неделно ввести в заднепроходное отверстие трубку;
- трубка должна вводиться свободно, при ощущении препятствий —
прекратить продвижение трубки вперед.

Глубина ввода трубки в прямую кишку

Возраст	Глубина ввода, см	Время процедуры, мин
Новорожденные, дети до года	до 50	до 10
Дети 1-2 года	50-70	

Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.

Соответствует ТУ 32.50.50-030-1770123-2017

Регистрационное удостоверение № РЭН 2017/64/4 от 30.09.2020 г.

Не подлежат обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Димитрова, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-63-20.
Дистрибьютор в Республике Узбекистан: ООО «ВОЛЕАР МЕДТОНС»,
100060, г. Ташкент, Мирбадский р-н, проспект Амира Темура, дом 45, кв. 1.
Тел.: +998 (90) 990-60-45.

ИЗГОТОВЛЕНО:



ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ **МалышОК!**



АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ
САЛЮТИН-НАСОНОВИЧКОМ
РУ ИРРН 2017/5172
от 15.07.2020



АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ
ДЕТОСКИН-АЛЬПИНА ПЛАСТ
по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017
РУ ИРРН 2017/5172
от 16.07.2020



МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ
РУ ИРРН 2018/7359
от 15.07.2020



КОРРЕКТОР ФОРМЫ
СОСКА-СТАНДАРТ
РУ ИРРН 2017/5144
от 16.07.2020



ПАКЕТЫ ДЛЯ СБОРА
ИЗЛИВОВ ГРУДНОГО
МОЛОКА
ЕАСМ RU ДРУ АЕЛ1 В.08066



НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ
АЛЬПИНА ПЛАСТ
ДЛЯ УКОЛА ЗАМЛАДЕНЦЕМ
по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017
РУ ИРРН 2017/5172
от 16.07.2020

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ОБРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИНЦИПАЛЬНОВИЧКОМ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

malish-ok.info

МалышОК!



Трубка детская газоотводная

по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017

5 см.

для одноразового использования

Инструкция по применению внутри упаковки.

Трубка детская газоотводная
по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017
предназначена для выведения газов
из кишечника у новорожденных
и детей до 2 лет.

Показания к применению:
— болезненные колики у детей,
метеоризм, вялая перистальтика,
подготовка к ультразвуковому
исследованию ЖКТ.

Противопоказания:
кишечное кровотечение;
злокачественные новообразования
прямой кишки; острые воспалительные
и язвенные процессы в области
толстой кишки и заднего прохода;
трещины в области заднего прохода
и выпадение прямой кишки;
кровооточающий геморрой.

Побочные действия отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения:
— не использовать при наличии
механических повреждений изделия
(ваздухи, трещины, расслоения,
утолщения и т.д.);
— не ставить трубку более 3 раз за сутки
и не ранее чем через 3-4 часа после
последней процедуры.

Размер: 4х70 мм.
Количество в упаковке — 5 шт.

Производитель:
ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская обл.,
г. Клин, Ленинградское ш.,
тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел. +7(495)787-93-66
www.alpina-plast.ru

**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

СДЕЛАНО В РОССИИ

Дистрибутор в Республике Беларусь:
ООО «БЮЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М.Лынькова,
123-68 (первый этаж)
Тел. +375 (17) 373-83-20.

Использование изделия:

для стимуляции отхождения газов
необходимо провести массаж живота
по часовой стрелке:



— уложить ребенка на левый бок
с приведенными к животу ногами
(для детей до 6 месяцев допускается
использовать положение на спине
с поднятыми и слегка прижатыми
к животу ногами);

— закрученный конец трубки смазать
вазелином или детским кремом;

— одной рукой раздвинуть ягодицы,
другой вращательными движениями
медленно ввести в заднепроходное
отверстие трубку;

— трубка должна вводиться свободно,
при ощущении препятствий — прекратить
продвижение трубки вперед!

Глубина ввода трубки

Возраст	Глубина ввода	Время процедуры
0-1 год	до 5 см	до 10 мин
1-2 года	5-7 см	

Гарантийный срок хранения — 5 лет
с даты изготовления.

Соответствует
ТУ 32.50.50-030-17707123-2017.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2017/6414 от 30.09.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.
ИЗГОТОВЛЕНО:

Арт. 2162955213



4 607046 1746488



ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
МалышОК!



АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ
СМЯГЧИТЕЛЬНО-НАСОСНЫЙ
RU №ФСН 2017/5172
от 15.07.2020



АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ
«АЛЬПИНА ПЛАСТ»
по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017
RU №ФСН 2012/14103
от 16.07.2020



МОЛОКООТСОС
С ПЛАСТИКОВЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ
RU №ФСН 2018/7359
от 16.07.2020



КОРРЕКТОР ФОРМЫ
СОСКА СТАНДАРТ
RU №ФСН 2017/5144
от 16.07.2020



ПАКЕТЫ ДЛЯ СБОРА
И ХРАНЕНИЯ ГРУДНОГО
МОЛОКА
ЕАСЗ М-РУ ДИ-АЕБ1 В.08066



НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ
«АЛЬПИНА ПЛАСТ»
ДЛЯ УХОДА ЗА МАЛЕНЬКИМ
по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017
RU №ФСН 2018/67612
от 16.07.2020

ИМЕТЬСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО
ПО СПЕЦИАЛИСТУ

malish-ok.info

МалышОК!

0+



**Трубка детская
газоотводная**

по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017

10 шт.

Инструкция по применению
внутри упаковки.

Трубка детская газоотводная
по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017
предназначена для выведения газов
из кишечника у новорожденных
и детей до 2 лет.

Показания к применению:

• болезненные колики у детей,
метеоризм, вялая перистальтика,
подготовка к ультразвуковому
исследованию ЖКТ.

Противопоказания:

кишечное кровотечение;
злокачественные новообразования
прямой кишки; острые воспалительные
и язвенные процессы в области
толстой кишки и заднего прохода;
трещины в области заднего прохода
и выделение прямой кишки;
кровоточащая геморрой.

Побочные действия отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения:
— не использовать при наличии
механических повреждений изделия
(вздутия, трещины, расслоения,
уплотнения и т.д.);
— не ставить трубку более 3 раз за сутки
и не ранее чем через 2-4 часа после
последней процедуры.

Размер: 4х70 мм.

Количество в упаковке — 10 шт.

Производитель:

ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская обл.,
г. Клин, Ленинградское ш.,
тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7(495)787-93-66

www.alpina-plast.ru

**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

СДЕЛАНО В РОССИИ

Дистрибутор в Республике Беларусь:

ООО «БОЛЕАР Белмех»,
220124 г. Минск, ул. М.Лынькова,
123-68 (первый этаж).
Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Использование изделия:

для стимуляции отхождения газов
необходимо провести массаж живота
по часовой стрелке:



— уложить ребенка на левый бок
с приведенными к животу ногами
(для детей до 6 месяцев допускается
использовать положение на спине
с поджатыми и слегка прижатыми
к животу ногами);

— закругленный конец трубки смазать
вазелином или детским кремом;

— одной рукой раздвинуть ягодицы,
другой вращательными движениями
медленно ввести в заднепроходное
отверстие трубку;

— трубка должна вводиться свободно,
при ощущении препятствий — прекратить
продвижение трубки вперед!

Глубина ввода трубки

Возраст	Глубина ввода	Время процедуры
0-1 год	до 5 см	до 10 мин
1-2 года	5-7 см	

Гарантийный срок хранения — 5 лет
с даты изготовления.

Соответствует
ТУ 32.50.50-030-17707123-2017.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2017/6414 от 30.09.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

ИЗГОТОВЛЕНО:

Арт. 2162105213



4 607046 1746495

Для одноразового использования

для одноразового
использования

Другие продукты
МалышОк!



Аспиратор назальный
с мягким наконечником
РУН РЗН 2017/6172 от 15.07.2020



Молокоотсос с пластиковым
резервуаром
РУН РЗН 2018/7359 от 15.07.2020



Пакеты для сбора и хранения
грудного молока
ЕАЭС № RU Д- RU. PA03.B.56564/23



Набор подарочный
«Альпина Пласт»
для ухода за младенцем
по ТУ 9398-009-17707123-2011
РУН ФСР 2010/07612 от 16.07.2020

ВНИМАНИЕ! ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
С СПЕЦИАЛИСТОМ

МалышОк!

Трубка детская газоотводная


по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017

0+

5
штук



Арт. 2162055213


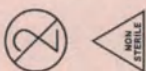


Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б,
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42
www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru
malish-ok.info

**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

СДЕЛАНО В РОССИИ

v.1

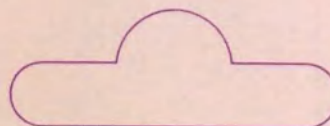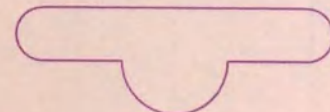

Инструкция по применению внутри упаковки.

Трубка детская газоотводная по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017
предназначена для выведения газов из кишечника у новорожденных и детей
до 2 лет.

Показания к применению: болезненные колики у детей, метеоризм, вялая
перистальтика, подготовка к ультразвуковому исследованию ЖКТ.

Противопоказания: кишечное кровотечение; злокачественные
новообразования прямой кишки; острые воспалительные и язвенные
процессы в области толстой кишки и заднего прохода; трещины в области
заднего прохода и выпадение прямой кишки; кровоточащий геморрой.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения:

- не использовать при наличии механических повреждений изделия
(вздутия, трещины, расслоения, утолщения и т.д.);
- не ставить трубку более 3 раз за сутки и не ранее чем через 3-4 часа
после последней процедуры.

Номинальные размеры: 4x70мм.

Количество в упаковке: 5 шт.

Материал: поливинилхлорид.

Использование изделия:

для стимуляции отхождения газов провести массаж живота по часовой стрелке:



- уложить ребенка на левый бок с приведенными к животу ногами
(Для детей до 6 месяцев допускается использовать положение на спине
с поднятыми и слегка прижатыми к животу ногами);
- закругленный конец трубки смазать вазелином или детским кремом;
- одной рукой раздвинуть ягодичцы, другой вращательными движениями
медленно ввести в заднепроходное отверстие трубку;
- трубка должна вводиться свободно, при ощущении препятствий —
прекратить продвижение трубки вперед!

Глубина ввода трубки в прямую кишку

Возраст	Глубина ввода, мм	Время процедуры, мин
Новорожденные, дети до года	до 50	до 10
Дети 1-2 года	50-70	

Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.

Соответствует ТУ 32.50.50-030-17707123-2017.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6414 от 30.09.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Дистрибьютор в Республике Узбекистан: ООО «BOLEAR MEDTORG»,
100060, г. Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 45, кв. 1.
Тел.: +998 (90) 990-60-45.

ИЗГОТОВЛЕНО:

для одноразового
использования

Другие продукты
МалышОк!



Аспиратор назальный
с мягким наконечником
РУН РЭН 2017/76172 от 15.07.2020



Молокоотсос с пластиковым
резервуаром
РУН РЭН 2018/7359 от 15.07.2020



Пакеты для сбора и хранения
грудного молока
ЕАЭС № RU Д- RU. PA03.B 56564/23



Набор подарочный
«Альпина Пласт»
для ухода за младенцем
по ТУ 9398-009-17707123-2011
РУН ФСП 2010/07612 от 16.07.2020

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МалышОк!

Трубка детская газоотводная

по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017

0+

10
штук



Арт. 2162105213





Изготовитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42
www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru
malish-ok.info

сДЕЛАНО В РОССИИ

**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

v.1

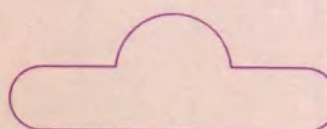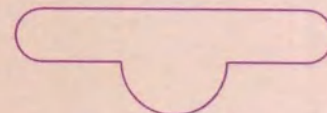

Инструкция по применению внутри упаковки.

Трубка детская газоотводная по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017
предназначена для выведения газов из кишечника у новорожденных и детей
до 2 лет.

Показания к применению: болезненные колики у детей, метеоризм, вялая
перистальтика, подготовка к ультразвуковому исследованию ЖКТ.

Противопоказания: кишечное кровотечение; злокачественные
новообразования прямой кишки; острые воспалительные и язвенные
процессы в области толстой кишки и заднего прохода; трещины в области
заднего прохода и выпадение прямой кишки; кровоточащий геморрой.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения:

- не использовать при наличии механических повреждений изделия
(вздутия, трещины, расслоения, утолщения и т.д.);
- не ставить трубку более 3 раз за сутки и не ранее чем через 3-4 часа
после последней процедуры.

Номинальные размеры: 4х70мм.

Количество в упаковке: 10 шт.

Материал: поливинилхлорид.

Использование изделия:

для стимуляции отхождения газов провести массаж живота по часовой стрелке:



- уложить ребенка на левый бок с приведенными к животу ногами
(Для детей до 6 месяцев допускается использовать положение на спине
с поднятыми и слегка прижатыми к животу ногами);
- закругленный конец трубки смазать вазелином или детским кремом;
- одной рукой раздвинуть ягодицы, другой вращательными движениями
медленно ввести в заднепроходное отверстие трубку;
- трубка должна вводиться свободно, при ощущении препятствий —
прекратить продвижение трубки вперед!

Глубина ввода трубки в прямую кишку

Возраст	Глубина ввода, мм	Время процедуры, мин
Новорожденные, дети до года	до 50	до 10
Дети 1-2 года	50-70	

Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.

Соответствует ТУ 32.50.50-030-17707123-2017.

Регистрационное удостоверение № РЭН 2017/6414 от 30.09.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб.4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Дистрибьютор в Республике Узбекистан: ООО «BOLEAR MEDTORG»,
100060, г. Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 45, кв. 1.
Тел.: +998 (90) 990-60-45.

ИЗГОТОВЛЕНО:



ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
МалышОК!



АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ
ДЕТСКИЙ «АЛЬПИНА ПЛАСТ»
ПУ №РЗН 2017/6172
от 15.07.2020



АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ
ДЕТСКИЙ «АЛЬПИНА ПЛАСТ»
ПУ №РЗН 2017/6172
от 15.07.2020



МОЛОКОБОРТОС
С ПЛАСТИКОВЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ
ПУ №РЗН 2018/7359
от 15.07.2020



КОРРЕКТОР ФОРМЫ
СОСКА СТАНДАРТ
ПУ №РЗН 2017/5744
от 16.07.2020



ПАКЕТЫ ДЛЯ СБОРА
И ХРАНЕНИЯ ГРУДНОГО
МОЛОКА
ЕАЭС №РЗН Д-РУ АЕ61 В 08066



НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ
«АЛЬПИНА ПЛАСТ»
ДЛЯ УХОДА ЗА МЛАДЕНЦЕМ
ПУ №РЗН 2010/07612
от 16.07.2020

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

malish-ok.info

МалышОК!

0+



**Трубка детская
газоотводная**

по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017

5 см.

**Инструкция по применению
внутри упаковки.**

Трубка детская газоотводная
по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017
предназначена для выведения газов
из кишечника у новорожденных
и детей до 2 лет.

Показания к применению:

★ болезненные колики у детей,
метеоризм, вялая перистальтика,
подготовка к ультразвуковому
исследованию ЖКТ.

Противопоказания:

кишечное кровотечение;
злокачественные новообразования
прямой кишки; острые воспалительные
и язвенные процессы в области
толстой кишки и заднего прохода;
трещины в области заднего прохода
и выпадение прямой кишки;
кровооточающий геморрой.

Побочные действия отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения:

— не использовать при наличии
механических повреждений изделия
(вздутия, трещины, расслоения,
утолщения и т.д.);
— не ставить трубку более 3 раз за сутки
и не ранее чем через 3-4 часа после
последней процедуры.

Размер: 4х70 мм.

Количество в упаковке — 5 шт.

Производитель:

ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская обл.,
г. Клин, Ленинградское ш.,
тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7(495)787-93-66

www.alpina-plast.ru

**АЛЬПИНА
ПЛАСТ**

СДЕЛАНО В РОССИИ

Дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М.Лынькова,
123-68 (первый этаж).
Тел.: +375 (17) 373-83-20.



Использование изделия:

для стимуляции отхождения газов
необходимо провести массаж живота
по часовой стрелке:



— уложить ребенка на левый бок
с приведенными к животу ногами
(для детей до 6 месяцев допускается
использовать положение на спине
с поднятыми и слегка прижатыми
к животу ногами);

— закругленный конец трубки смазать
вазелином или детским кремом;

— одной рукой раздвинуть ягодицы,
другой вращательными движениями
медленно ввести в заднепроходное
отверстие трубку;

— трубка должна вводиться свободно,
при ощущении препятствий — прекратить
продвижение трубки вперед!

Глубина ввода трубки

Возраст	Глубина ввода	Время процедуры
0-1 год	до 5 см	до 10 мин
1-2 года	5-7 см	

Гарантийный срок хранения — 5 лет
с даты изготовления.

Соответствует

ТУ 32.50.50-030-17707123-2017.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2017/6414 от 30.09.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

ИЗГОТОВЛЕНО:

Арт. 2162055213



4 607046 1746488

Для одноразового использования



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 листов листа(ов)

Генеральный директор


ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игутов

Фото медицинского изделия с упаковкой
Трубка детская газоотводная по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017

2023

Билгәләгән берекмә 2017001600498 нд ТУ 32.50.50-030-
-17707123-2017 (5 нч.)

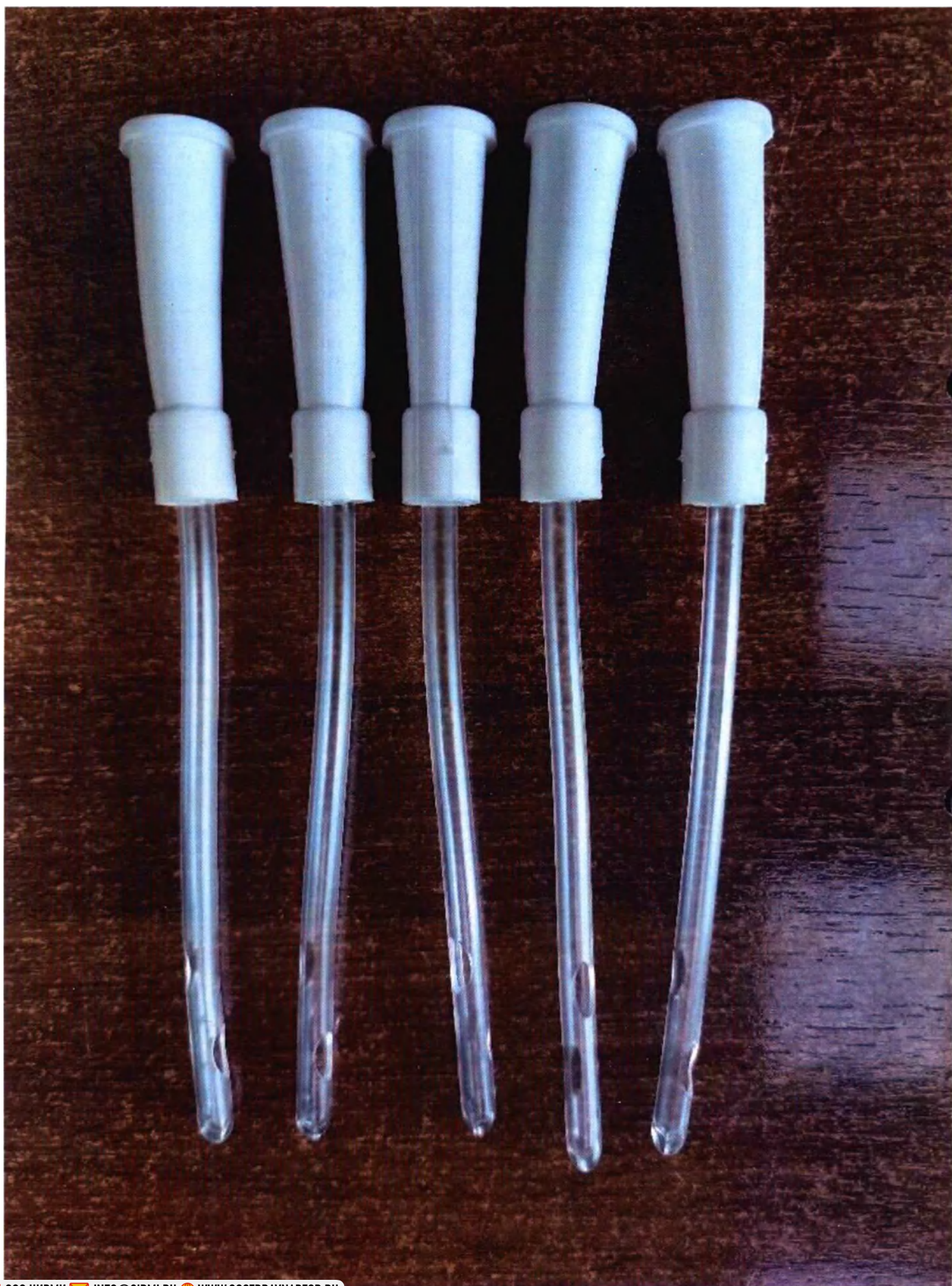



Трубка детская газоотводная по ТУ 32.50.50-030-
-17707123-2017 (10 шт.)

МалышОК!

0+



Трубка детская
газоотводная

по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017

5 см.

Для санитариального использования

Инструкция по применению*:

Трубка детская газоотводная по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017 предназначена для выведения газов из кишечника у новорожденных и детей до 2 лет.

Сфера применения — для индивидуального применения в лечебно-профилактических учреждениях и в домашнем использовании.

Показания к применению: болезненные колики у детей, метеоризм, вялая перистальтика, подготовка к ультразвуковому исследованию ЖКТ.


Противопоказания к применению: кишечное кровотечение; злокачественные новообразования прямой кишки; острые воспалительные и язвенные процессы в области толстой кишки и заднего прохода; трещины в области заднего прохода и выпадение прямой кишки; кровоточащий геморрой.

Побочные действия отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: не использовать при наличии механических повреждений изделия (изгибов, трещин, расхождений, утолщений и т.д.), не ставить трубку более 3 раз за сутки и не ранее чем через 3-4 часа после последней процедуры.

Подготовка изделия к использованию: перед использованием трубка дезинфицируется методом кипячения в дистиллированной воде, в течение (30±5) минут, при полном погружении изделия в воду, отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды.

Использование изделия: для стимуляции отхождения газов провести массаж живота по часовой стрелке. Уложить ребенка на левый бок с приподнятым тазом и ввести кончик трубки в задний проход.

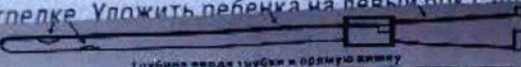

Возраст	Глубина ввода, мм	Время процедуры, мин
Новорожденные, дети до года	до 50	до 10
Дети 1-2 года	50-70	

При сильных запорах необходимо перед введением трубки сделать микроклизму (например, с глицерином или лактулозой). Для предотвращения спазма кишечника, если не проходит, можно попробовать ввести трубку на 1-2 см, дав выстоять это положение 10-15 минут. При неэффективности процедуры, извлечь трубку из заднего прохода. После извлечения трубки термизировать область заднего прохода с помощью трубки, утилизировать.

Условия хранения: в упакованном виде при температуре от +5 до +40°C на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей и загрязнений месте.

МалышОК!

0+



Трубка детская
газоотводная

по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017

10 шт.

для однократного использования

Инструкция по применению*:

Трубка детская газоотводная по ТУ 32.50.50-030-17707123-2017 предназначена для выведения газов из кишечника у новорожденных и детей до 2 лет.

Сфера применения — для индивидуального применения в лечебно-профилактических учреждениях и в домашнем использовании.

Показания к применению: болезненные колики у детей, метеоризм, вялая перистальтика, подготовка к ультразвуковому исследованию ЖКТ.

Противопоказания к применению: кишечное кровотечение; злокачественные новообразования прямой кишки; острые воспалительные и язвенные процессы в области толстой кишки и заднего прохода; трещины в области заднего прохода и выпадение прямой кишки; кровоточащий геморрой.

Побочные действия отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: не использовать при наличии механических повреждений оболочки (трещины, разрывы, утолщения и т.д.); не ставить трубку более 3 раз за сутки и не ранее чем через 3-4 часа после последней процедуры.

Подготовка изделия к использованию: перед использованием трубка дезинфицируется методом кипячения в дистиллированной воде, в течение (30±5) минут, при полном погружении изделия в воду, отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды.

Использование изделия: для стимуляции отхождения газов провести массаж живота по часовой стрелке. Уложить ребенка на левый бок с приподнятыми и выпрямленными конечностями.



Возраст	Глубина ввода, мм	Время процедуры, мин
Новорожденные, дети до года	до 50	до 10
Дети 1-2 года	50-70	

Условия хранения: в упакованном виде при температуре от +5 до +40°C на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей и загрязнений месте.

Утилизация: в домашних условиях — вместе с бытовыми отходами; в лечебных учреждениях —

ШТУН



Побочные действия отсутствуют.

Условия применения: препарат не использовать при наличии кожных заболеваний, повреждений, аллергии. При применении, строго соблюдать инструкцию (7 д.н.) не ставить трубку более 3 раз за сутки.

Способ применения: для стимуляции сосиски использовать по инструкции. После использования изделия к использованию: перед использованием трубка дезинфицируется методом кипячения в дистиллированной воде в течение (30-45) минут, при полном потуге изделия в воду, отсчет времени дезинфекции начинать с момента закипания воды.

Использование изделий: для стимуляции отхождения слизи провести массаж живота по часовой стрелке. Уложить ребенка на правый бок с приподнятым животом, провести массаж живота по часовой стрелке.



Возраст	Глубина жвала, мм	Время процедуры, мин
Новорожденные, дети до года	до 30	до 10
Дети 1-2 года	30-70	

изнутри трубки, а также в трубку извне комковато выйдут наружу. При скоплении в канальце плазмы с кровью, масс скопления перед вышедшим трубкой сделать микропунктуру (надрезом, с помощью иглы или лакулятором — по рекомендации специалиста). Если газы не выходят, можно попробовать микропунктуру сделать глубже (надрез трубки на 1,5 см). Делать это надо предельно осторожно! Но после этого, возможно, понадобится проколлоть заднюю трубку из латеральной кишки. После успешной трубки перидуральной области вытереть салфеткой трубку и утилизовать.

Условия хранения: в упакованном виде при температуре от +5 до +40°C на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей и загрязнений месте.

Утилизация: в домашних условиях – вместе с бытовыми отходами; в лечебных учреждениях –

Малышок!

Трубка детская газоотводная

по ТУ 32.50.50-030-1770123-2017

0+

10
штук



Инструкция по применению*

Трубка детская газоотводная по ТУ 32.50.50-030-1770123-2017 предназначена для выведения газов из кишечника у новорожденных и детей до 2 лет.

Сфера применения — для индивидуального применения в лечебно-профилактических учреждениях и в домашнем использовании.

Показания к применению: болезненные колики у детей, метеоризм, вялая перистальтика, подготовка к ультразвуковому исследованию ЖКТ.


Противопоказания к применению: кишечное кровотечение; злокачественные новообразования прямой кишки; острые воспалительные и язвенные процессы в области толстой кишки и заднего прохода; трещины в области заднего прохода и выпадение прямой кишки; кровоточащий геморрой.

Побочные действия отсутствуют.

Дезинфекция изделия: не использовать при наличии механических повреждений. Изделие (трубку, соединитель, коннектор, утолщенный шт. д.) не ставить более 3 раз за сутки в дезинфицирующий раствор 3-4 часа после последней процедуры.

Подготовка изделия к использованию: перед использованием трубка дезинфицируется методом кипячения в дистиллированной воде, в течение (30±5) минут, при полном погружении изделия в воду, отсчет времени дезинфекционной выдержки начинают с момента закипания воды.

Использование изделия: для стимуляции отхождения газов провести массаж живота по часовой стрелке. Уложить ребенка на левый бок с приподнятыми и вывернутыми наружу ногами.

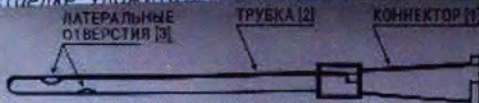

Глубина ввода трубки в прямую кишку

Возраст	Глубина ввода, мм	Время процедуры, мин
Новорожденные, дети до 1 года	до 50	до 10
Дети 1-2 года	50-70	

Через латеральные отверстия на конце трубки газы из кишечника ребенка в трубку и через коннектор выйдут наружу. При этом сила выталкивания газа, создаваемая необходимыми газами, задерживающимися в микрокамерах (на концах латеральных отверстий) — по рекомендациям специалистов. Если газы не отходят, можно попробовать увеличить или уменьшить глубину введения трубки на 1-2 см (делать это надо предельно осторожно). По истечении времени процедуры, при отсутствии отхождения газов из трубки, можно извлечь трубку и сделать паузу. После вывернутой наружу трубки уложить ребенка.

Условия хранения: в упакованном виде при температуре от +5 до +40°C на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей и загрязнений месте.

Утилизация: в домашних условиях — вместе с бытовыми отходами; в лечебных учреждениях —

1
Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

4 (силь) листа(ов)

Генеральный директор

ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игутов

