

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Альпина Пласт»

Е. Н. Игутов

2012 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

«Аспиратор назальный детский «Альпина Пласт»

«Аспиратор назальный детский «Альпина Пласт» (далее аспиратор) предназначен для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования: для удаления слизистых выделений из носа детей (в том числе, детей до трех лет).

Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде следующим образом:

все детали промывают в горячей воде ($t=50\pm 5$ °C) с применением нейтрального моющего средства и мягкой губки, не царапающей поверхность;

дезинфекцию наконечника, трубки и мундштука проводят методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода или в 3% раствор хлорамина в течение 80 минут. В домашних условиях возможно проведение дезинфекции наконечника, трубки и мундштука кипячением в дистиллированной воде в течение (10 ± 5) мин.

По окончании дезинфекции части изделий промывают проточной питьевой водой.

Перед применением соберите изделие: соедините емкость с наконечником, наденьте трубку на отвод наконечника и вставьте мундштук в свободный конец трубки.

После применения аспиратор разобрать, части изделия промыть проточной водой с мылом, ополоснуть, высушить.

Аспиратор следует хранить в помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C . Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

Главный технолог ООО «Альпина Пласт»

Т. А. Дементьева

Главный врач МУЗ «Детская городская больница»,
г. Клин Московской области

О.П. Стебловская

