



Фото медизделия «Аспиратор назальный с мягким наконечником»
в блистерной упаковке с маркировкой ТЗ «Пупсики»



Руководство по эксплуатации Аспиратор назальный с мягким наконечником

Аспиратор предназначен для медицинских или санитарно-гигиенических целей: для удаления слизистых выделений из носа младенцев и детей раннего возраста.

Показания к использованию: гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях, при аллергическом рините; ежедневная гигиена носовой полости.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность слизистой носа, повреждение слизистой носа. При индивидуальных особенностях строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют. Перед применением аспиратор следует продезинфицировать, предварительно разделив баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона. После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой (t=40±5°С) с использованием мыльного раствора и просушить.

Использование изделия: перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом). Манипуляции проводятся взрослыми лицами. Сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите наконечник аспиратора к носовой полости и разожмите баллон. Протрите наконечник салфеткой и повторите манипуляции со второй ноздрей. Перед удалением засохших или густых слизистых выделений закапайте в носик ребенка изотонический раствор хлорида натрия.

а через некоторое время воспользуйтесь аспиратором.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упакованном виде согласно требованиям технических условий при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить и продезинфицировать.

Комплектность: аспиратор назальный с мягким наконечником — 1шт.

Материал наконечника: поливинилхлорид.

Производитель: ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.

Тел.: +7 (495) 787-93-66.

info@alpina-plast.ru

www.alpina-plast.ru



СДЕЛАНО В РОССИИ

ИЗГОТОВЛЕНО:



Аспиратор назальный по ТУ 9398-027-17707123-2016.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6172 от 15.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы — не установлен.

Максим Маркоровки упаковкой
Биссерной

Пупсики

АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ
с мягким наконечником

0+
мес.

Руководство по эксплуатации Аспиратор назальный с мягким наконечником

Аспиратор предназначен для медицинских или санитарно-гигиенических целей: для удаления слизистых выделений из носа младенцев и детей раннего возраста.

Показания к использованию: гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях, при аллергическом рините; ежедневная гигиена носовой полости.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность слизистой носа, повреждение слизистой носа. При индивидуальных особенностях строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют. Перед применением аспиратор следует продезинфицировать, предварительно разведя баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона. После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой ($t=40\pm5^{\circ}\text{C}$) с использованием мыльного раствора и просушить.

Использование изделия: перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом). Манипуляции проводятся взрослыми лицами. Сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите наконечник аспиратора к носовой полости и разожмите баллон. Протрите наконечник салфеткой и повторите манипуляции со второй ноздрей. Перед удалением засохших или густых слизистых выделений закапайте в носик ребенка изотонический раствор хлорида натрия,

а через некоторое время воспользуйтесь аспиратором.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упакованном виде согласно требованиям технических условий при температуре от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить и продезинфицировать.

Комплектность: аспиратор назальный с мягким наконечником — 1 шт.

Материал наконечника: поливинилхлорид.

Производитель: ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.

Тел.: +7 (495) 787-93-66.

info@alpina-plast.ru


www.alpina-plast.ru



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

СДЕЛАНО В РОССИИ

ИЗГОТОВЛЕНО:

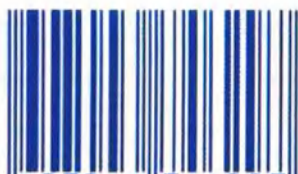

4 607046 746297

Аспиратор назальный по ТУ 9398-027-17707123-2016.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6172 от 15.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.

Срок годности/службы — не установлен.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (четыре) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игутов

