



Здоровье - это красиво!

Макеты упаковки

**Набор подарочный "Альпина Пласт" для ухода за младенцем
по ТУ9398-009-17707123-2011**

2023

Внимание! Спринцовки для маслосодержащих средств не применять!
из носа новорожденных и грудных детей.

- Спринцовка-аспиратор тип Б1 предназначена для удаления выделений для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма;
- Спринцовки с мягким наконечником, тип А №3, №7 предназначены для отсасывания молока у кормящих матерей;
- Молокоотсос-отсасыватель индивидуальной ручкой МОН-«АП».

Назначение:

Гарантийный срок годности — 5 лет со дня изготовления.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07612 от 16.07.2020г.
Набор подарочный соответствует требованиям ТУ 9398-009-17707123-2011

СДЕЛАНО В РОССИИ

info@alpina-plast.ru

mail@ok.info

www.alpina-plast.ru

Исполнитель: ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км. к 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42

АЛЬПИНА



Изготовлено:

Тел.: +375 (17) 373-83-20

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4.

Дистрибутор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед».

Инструкцию по использованию смотрите на внутренней стороне вкладыша.

- Молокоотсос-отсасыватель МОН-«АП» — 1 шт;
- спринцовка с мягким наконечником, тип А №3 — 1 шт;
- спринцовка с мягким наконечником, тип А №7 — 1 шт;
- спринцовка-аспиратор, тип Б1 — 1 шт.

по ТУ 9398-009-17707123-2011:

Набор подарочный «Альпина Пласт» для ухода за младенцем

Малышок!



Набор подарочный «Альпина Пласт» для ухода за младенцем

no TV 9398-009-17707123-2011

- эффективен и безопасен при использовании
- все необходимое для ухода за младенцем
- отличный подарок молодой маме!



Оборот:

Инструкция по использованию:

Набор подарочный «Альпина Пласт» для ухода за младенцем по ТУ 9398-009-17707123-2011: в составе:

- Молокоотсос-отсасыватель МОН-«АП» предназначен для отсасывания молока у кормящих матерей;
- Спринцовки с мягким наконечником, тип А №3, №7 предназначены для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма;
- Спринцовка-аспиратор тип Б1 предназначена для удаления выделений из носа новорожденных и грудных детей.

Область применения — в медицинских учреждениях и индивидуальное использование в домашних условиях.

Перед применением провести дезинфекцию изделий в разобранном виде. Баллон и поликарбонатный резервуар молокоотсоса, баллон и полипропиленовый наконечник спринцовки-аспиратора, спринцовки с мягким наконечником продезинфицировать методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода с последующим ополаскиванием в кипяченой воде или методом кипячения в дистиллированной воде в течение 10±5 минут. В лечебных учреждениях баллоны и наконечники дезинфицируют погружением в 3%- раствор перекиси водорода или в 3%- раствор хлорамина согласно МУ 287-113 с последующим промыванием проточной питьевой водой. Перед применением молокоотсос, спринцовку-аспиратор тип Б1 собрать, для чего наконечник/резервуар вставить в отверстие баллона. Наконечник спринцовки смазать вазелином, ланолином или другим нейтральным жиром. Спринцовка не должна контактировать с лекарственным раствором более 30 минут. После применения изделие промыть горячей водой и просушить.

Подарочный набор следует хранить в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Изделия при хранении не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а также смазочных материалов, керосина, бензина, кислот, щелочей, а также и других веществ, разрушающих изделия.

Лицо:

Исследования при хранении не показали появления каких-либо вредных веществ, а также и вредных веществ, разлагающихся при нагревании, конденсации, окисления, карбоксилирования.



ИЗЛОЖЕНИЕ:

$+40^{\circ}\text{C}$
 $+5^{\circ}\text{C}$

СДЕЛАНО В РОССИИ
www.alpina-plast.ru

Проектная организация: ООО «Альпина Платс»,
Россия, 141063, Московская обл., г. Клин, Ленинградская обл.,
г. Зв. с/п. 1036. Тел: +7 (495) 181-50-42/43. E-mail: info@alpin-plat.ru.
Отдел продаж: +7 (495) 181-89-33-66.
Набор подпрограмм соответствует требованиям ТУ 9398-009-17702123-2011
Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07612 от 16.07.2020г.
Не подлежит обязательному сертификации и декларированию в РФ.
Гарантийный срок годности – 5 лет со дня изготовления.

Выбор подпорочной «Альпина Плат» для ухода за медоносами
Инструкция по использованию смотрите на внутренней стороне вкладыша

Комплект поставки:

- морковотос-отсаиватель МОН-А11 – 1 шт.
- спринцовка с мяким наконечником, тип А №3 – 1 шт.
- спринцовка с мяким наконечником, тип А №7 – 1 шт.
- спринцовка-аспиратор, тип В1 – 1 шт.



Малышок!



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

- ✔ Эффективен и безопасен при использовании
- ✔ Всё необходимое для ухода за младенцем
- ✔ Отличный подарок молодой маме!



Оборот:

Инструкция по использованию:

Набор подарочный «Альпина Пласт» для ухода за младенцем по ТУ 9398-009-17707123-2011, набор включает в себя:

- Молокоотсос-отсасыватель МОН-«АП» предназначен для отсасывания молока у кормящих матерей.
- Спринцовки с мягким наконечником, тип А №3, №7 предназначены для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма.
- Спринцовка-аспиратор тип Б1 предназначена для удаления выделений из носа новорожденных и грудных детей.

Область применения — в медицинских учреждениях и индивидуальное использование в домашних условиях.

Перед применением провести дезинфекцию изделий в разобранном виде. Баллон и поликарбонатный резервуар молокоотсоса, баллон и полипропиленовый наконечник спринцовки-аспиратора, спринцовку с мягким наконечником продезинфицировать методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода с последующим ополаскиванием в кипящей воде или методом кипячения в дистиллированной воде в течение 10±5 минут. В лечебных учреждениях баллоны и наконечники дезинфицируют погружением в 3%- раствор перекиси водорода или в 3%-растворе хлорамина согласно МУ 287-113 с последующим промыванием проточной питьевой водой. Перед применением молокоотсос, спринцовку-аспиратор тип Б1 собрать, для чего наконечник/резервуар вставить в отверстие баллона. Наконечник спринцовки смазать вазелином, ланолином или другим нейтральным жиром. Спринцовка не должна контактировать с лекарственным раствором более 30 минут. После применения изделие промыть горячей водой и просушить.

Лицо:

СДЕЛАНО В РОССИИ

www.alpina-plast.ru
mail@alpina-plast.ru
alpina-plast



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, к. 3А, стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42

Малышок!

Набор подарочный «Альпина Пласт» для ухода за младенцем

по ТУ 9398-009-17707123-2011

- эффективен и безопасен при использовании
- все необходимое для ухода за младенцем
- отличный подарок молодой маме!



Арт. 2042004022



Набор подарочный «Альпина Пласт» для ухода за младенцем
по ТУ 9398-009-17707123-2011:
в составе:
• молокоотсос-отсасыватель МОН-«АП» – 1 шт;
• спринцовка с мягким наконечником, тип А №3 – 1 шт;
• спринцовка с мягким наконечником, тип А №7 – 1 шт;
• спринцовка-аспиратор, тип Б1 – 1 шт.
Инструкцию по использованию смотрите на внутренней стороне вкладыша.
Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БО/ЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4.
Тел.: +375 (17) 373-83-20
Изготовлено:

Назначение:
Молокоотсос-отсасыватель индивидуального ручного МОН-«АП»
предназначен для отсасывания молока у кормящих матерей;
• Спринцовки с мягким наконечником, тип А №3, №7 предназначены
для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма;
• Спринцовка-аспиратор тип Б1 предназначена для удаления выделений
из носа новорожденных и грудных детей.
Внимание! Спринцовки для маслосодержащих средств не применять!

Инструкция по использованию:

Набор подарочный «Альпина Пласт» для ухода за младенцем по ТУ 9398-009-17707123-2011 в составе:

- Молокоотсос-отсасыватель МОН-«АП» предназначен для отсасывания молока у кормящих матерей;
- Спринцовки с мягким наконечником, тип А №3, №7 предназначены для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма;
- Спринцовка-аспиратор тип Б1 предназначена для удаления выделений из носа новорожденных и грудных детей.


Перед применением провести дезинфекцию изделий в разобранном виде. Баллон и поликарбонатный резервуар молокоотсоса, баллон и полипропиленовый наконечник спринцовки-аспиратора, спринцовки с мягким наконечником продезинфицировать методом погружения в 70% этиловый спирт. Дезинфекция проводится в течение 15 минут.

и полипропиленовый наконечник спринцовки-аспиратора, спринцовки с мягким наконечником продезинфицировать методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода с последующим ополаскиванием в кипяченой воде или методом кипячения в дистиллированной воде в течение 10±5 минут. В лечебных учреждениях баллоны и наконечники дезинфицируют погружением в 3-% раствор перекиси водорода или в 3-% раствор хлорамина согласно МУ 287-113 с последующим промыванием проточной питьевой водой. Перед применением молокоотсос, спринцовку-аспиратор тип Б1 собрать, для чего наконечник/резервуар вставить в отверстие баллона. Наконечник спринцовки смазать вазелином, ланолином или другим нейтральным жиром. Спринцовка не должна контактировать с лекарственным раствором более 30 минут. После применения изделие промыть горячей водой и просушить.

Подарочный набор следует хранить в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Изделия при хранении не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а также смазочных материалов, керосина, бензина, кислот, щелочей, а также и других веществ, разрушающих изделия.

Лицо:

Подарочный набор следует хранить в помещении при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °C. Изделия при хранении не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а также смазочных материалов, керосина, бензина, кислот, щелочей, а также и других веществ, разбухающих изделий.

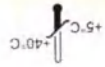

СДЕЛАНО В РОССИИ
www.alpina-plast.ru

Гарантийный срок годности — 5 лет со дня изготовления. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ. Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07612 от 16.07.2020г. Набор подарочный соответствует требованиям ТУ 9398-009-17707123-2011. Отдел продаж: +7 (495) 787-93-66. К. 3А, стр. 103Б, Тел.: +7 (495) 181-50-42/43, E-mail: info@alpina-plast.ru. Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км. Производителю: ООО «Альпина Пласт».



ИЗГОТОВЛЕНО:

- монокоотсос-отсасыватель МОН-«АП» — 1 шт;
- спринцовка с мягким наконечником, тип А №3 — 1 шт;
- спринцовка с мягким наконечником, тип А №7 — 1 шт;
- спринцовка-аспиратор, тип Б1 — 1 шт;

Комплект поставки:

Инструкцию по использованию смотрите на внутренней стороне вкладыша.

Набор подарочный «Альпина Пласт» для ухода за младенцем



Малышок!

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР



- ✓ Эффективен и безопасен при использовании
- ✓ Всё необходимое для ухода за младенцем
- ✓ Отличный подарок молодой маме!



Оборот:

Инструкция по использованию:

Набор подарочный «Альпина Пласт» для ухода за младенцем по ТУ 9398-009-17707123-2011, набор включает в себя:

- Молокоотсос-отсасыватель МОН-«АП» предназначен для отсасывания молока у кормящих матерей.
- Спринцовки с мягким наконечником, тип А №3, №7 предназначены для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма.

— Предназначена для удаления выделений из носа новорожденных и грудных детей.

Область применения — в медицинских учреждениях и индивидуальное использование в домашних условиях.

Перед применением провести дезинфекцию изделий в разобранном виде. Баллон и поликарбонатный резервуар молокоотсоса, резервуар механической спринцовки-аспиратора, спринцовки с мягким наконечником продезинфицировать

Перед применением провести дезинфекцию изделий в разобранном виде. Баллон и поликарбонатный резервуар молокоотсоса, баллон и полипропиленовый наконечник спринцовки-аспиратора, спринцовки с мягким наконечником продезинфицировать методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода с последующим ополаскиванием в кипяченой воде или методом кипячения в дистиллированной воде в течение 10 ± 5 минут. В лечебных учреждениях баллоны и наконечники дезинфицируют погружением в 3-% раствор перекиси водорода или в 3-% раствор хлорамина согласно МУ 287-113 с последующим промыванием проточной питьевой водой. Перед применением молокоотсос, спринцовку-аспиратор тип Б1 собрать, для чего наконечник/резервуар вставить в отверстие баллона. Наконечник спринцовки смазать вазелином, ланолином или другим нейтральным жиром. Спринцовка не должна контактировать с лекарственным раствором более 30 минут. После применения изделие промыть горячей водой и просушить.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (incl 76) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игутов



Фото медицинского изделия с упаковкой
Набор подарочный "Альпина Пласт" для ухода за младенцем по
ТУ9398-009-17707123-2011

2023

МалышОк!




Набор подарочный «Альпина Пласт» для ухода за младенцем

№ 17.02.05-005-17.02.05-1001

- эффективен и безопасен при использовании
- все необходимое для ухода за младенцем
- отличный подарок молодой маме!



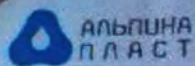

МалышОк!



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

- ✓ Эффективен и безопасен при использовании
- ✓ Всё необходимое для ухода за младенцем
- ✓ Отличный подарок молодой маме!

0+



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (три) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»

Е.Н. Игутов

