

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации спринцовок пластизольных поливинилхлоридных

Спринцовки применяют для медицинских целей в лечебных учреждениях для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из полостей организма и для индивидуального пользования.

Номер спринцовки указан на основании изделия.

ВНИМАНИЕ: спринцовки для маслосодержащих сред не применять!

Перед применением спринцовки следует продезинфицировать методом кипячения в дистиллированной воде в течение (10 ± 5) мин.

Наконечники стерилизуют обработкой в 6%-ном растворе перекиси водорода с последующим промыванием в проточной воде.

Перед применением наконечники спринцовок смазывают вазелином, ланолином или другим нейтральным жиром.

Спринцовки не должны контактировать с лекарственными растворами более 30 мин.

После применения спринцовку промывают горячей водой для удаления лекарственного раствора и просушивают.

Хранение спринцовок должно осуществляться в помещении при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Изготовитель гарантирует качество спринцовок при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности спринцовок 5 лет со дня изготовления.



Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя:

Московская область, Клинский р-он,
д. Новошапово, д.16, стр. 2