

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
Е. Н. Игутов
« 25 » *февраля* 2013 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

«Баллон Политцера «Альпина Пласт»

и зав
тб
«Баллон Политцера «Альпина Пласт» (далее баллон Политцера) предназначен для медицинских целей в лечебных учреждениях: для использования врачом оториноларингологом (ЛОР) в медицинских целях - для продувания евстахиевых труб. **Внимание! Баллон Политцера предназначен для использования только врачом. Не предназначен для домашнего использования!**

Е. Н.
«Показания: нарушения проходимости евстахиевой трубы и ее вентиляции, при выпотных воспалениях среднего уха по окончании острых явлений, при нарушении подвижности цепи слуховых косточек, при адгезивных процессах в среднем ухе.

«Противопоказания: острые воспаления слизистых носа, глотки, уха; при всех заболеваниях лабиринта и слухового нерва; отосклероз, острые инфекционные заболевания».

«Перед применением провести дезинфекцию изделия в разобранном виде следующим образом:

- баллон дезинфицируют методом погружения в 3%-ый раствор перекиси водорода или в 3% раствор хлорамина, или методом кипячения в дистиллированной воде в течение 15±5 минут. Переходник и наконечники дезинфицируют методом кипячения в дистиллированной воде в течение 15±5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделий промывают проточной питьевой водой.

Возможна стерилизация переходника и наконечников согласно МУ 287-113.

Перед применением соберите изделие: вставьте переходник в баллон, прикрутите соответствующий наконечник к переходнику.

После применения баллон Политцера разобрать, части изделия промыть проточной водой, ополоснуть, высушить.

Баллон Политцера следует хранить в помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

14.05.2013 г.

Производство:

ООО «Альпина Пласт»

Россия, 141640, Московская область,

Клинский р-н, дер. Новошапово,

д. 16, строение 2.

Тел./факс: 8(495) 747-94-95, 8(49624) 40-135

www.alpina-plast.ru

klin@alpina-plast.ru