



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Круг медицинский подкладной Ø39 см
Соответствует ТУ 32.50.50-043-17707123-2019,
Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"
Адрес: 141603, Россия, Московская область г. Клин, Ленинградское
 шоссе, 88 км, строение 103
Дата производства: 08.19 Партия: 191
Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления
Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи
Срок годности: срок не установлен



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Круг медноникелевый подкладной Ø45 см

Соответствует ТУ 32.50.50-043-17707123-2019.

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 100

Дата производства: 08.09.2024г.

Гарантийный срок хранения: 7 лет в заводской упаковке

Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи

Срок годности: в соответствии с инструкцией



КРУГ МЕДИЦИНСКИЙ ПОДКЛАДНОЙ

Ø 39 см



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт»,
Рязань, 411603, Московская область, г. Клин,
Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-83-66, +7 (495) 181-50-42/43,
www.alpina-plast.ru, E-mail: info@alpina-plast.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ

Арт. 5020391032



КРУГ МЕДИЦИНСКИЙ ПОДКЛАДНОЙ

Ø 39 см

RUС Круг медицинский подкладной Ø39 см.

Круг медицинский подкладной (далее круг подкладной «Альпина Пласт») предназначен для медицинских и профилактических целей в лечебных учреждениях и в домашнем использовании для лечения и профилактики пролежней, стимуляции и релаксации мышечных тканей, улучшения кровообращения.

Показания: при уходе за больными со склонностью или с уже образовавшимися пролежнями; ослабление нагрузки после операций на прямой кишке, ушибе копчика; ослабление нагрузки на промежность при геморрое; ослабление нагрузки при состоянии после эпизиотомии.

Противопоказания: отсутствуют.

Возможные побочные эффекты: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Дезинфекция: перед использованием круг подкладной продезинфицируйте методом погружения в 3% раствор хлорамина на 60 минут (предварительно закрыв воздушный клапан). При использовании одним пациентом, дезинфекцию проводите протиранием изделия салфеткой из бязи или марли, смоченной 3% раствором хлорамина. По окончании дезинфекционной выдержки круг подкладной промойте проточной питьевой водой и просушите.

Использование изделия: перед применением круг подкладной надуйте ртом (предварительно протерев клапан спиртом) до упругого, но не жесткого состояния, закройте воздушный клапан и вдавите его внутрь круга. Круг подкладной разместите на поверхности стула или кровати подложив его под участок тела, испытывающий нагрузку, накрыв круг пленкой. При использовании для тяжелобольных: подкладной круг помещают под простыней (или пленкой) так, чтобы подвергающийся давлению участок тела (обычно крестец) находился над отверстием круга. После применения круг подкладной промойте горячей водой с использованием мыльного раствора и просушите.

Условия хранения: круги подкладные следует хранить в помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации вместе с коммунальными отходами.

При использовании в лечебно-профилактических учреждениях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А медицинских отходов согласно СанПиН 2.1.7.2790.

Круг медицинский подкладной по ТУ 32.50.50-043-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение №

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.

Срок годности/службы не установлен.

Изготовлено:

501

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (три) листову
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»
Е.Н. Чеутов Е.Н. Чеутов

