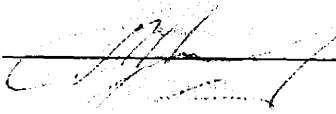


ОКП 94 3131

Группа Р22

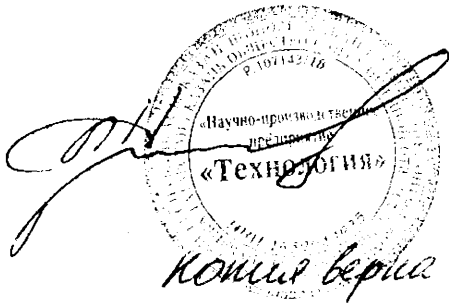
УТВЕРЖДАЮ
Директор ДГУП «Технология»


А.Г. Низамов.
« » г.

Коронкосниматель с автоматическим взводом
КС-«ТЕХ»

ЭТИКЕТКА
ТЕХ 006.000.000.ЭТ

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Копия верна *фиг. 1-*

2002

Коронкосниматель предназначен для поставки в районы с умеренным и холодным климатом (исполнением УХЛ 4.2).

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Коронкосниматель подвергают дезинфекции двукратным протиранием салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода, с интервалами между протираниями 15 минут.

Стерилизуют стерилизации сухим горячим воздухом температурой $(180^{+5}_{-10})^{\circ}\text{C}$ в течение (60^{+5}) минут.

4. ХРАЩЕНИЕ

Коронкосниматели в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытых помещениях на стеллажах в интервале температур от минус 50 до плюс 50 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 80% при плюс 25 $^{\circ}\text{C}$.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Коронкосниматель КС-ТЕХ соответствует техническим условиям ТУ9439-003-47096440-01 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Инициалы ОТК _____

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие — изготовитель гарантирует безотказную работу коронкоснимателя при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

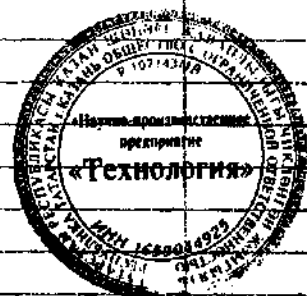
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке с приложениями принимаются предприятием-изготовителем по адресу: 425013, г. Казань, ул. Гайдара, д. 31.



Копия Версия
[Signature]

Лист регистрации изменений

[illegible]

Конец Всплеска

В настоящем документе
пронумеровано,
скреплено и
заверен печатью
4 листов



Константин Сергеевич
А.И.