



А. Ушаков

2009 г.

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАСШИРЕНИЮ ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА ИЗДЕЛИЙ
«НАБОРА ИМПЛАНТАТОВ ТИТАНОВЫХ ДЛЯ НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИХ УСТАНОВКИ,
ИТИП -«Конмет»
(ТУ 9438-004-11458417-01)**

С использованием титановых имплантатов производства ООО «Конмет» в нейрохирургическом отделении проводились операции на шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника.

Данный Набор имплантатов, предназначенный для применения при хирургических операциях на позвоночнике, позволяет создавать первичный надежный спондилодез и длительную переднюю фиксацию костными винтами поврежденных сегментов шейного отдела позвоночника при травмах и их последствиях, а также при дегенеративных заболеваниях и опухолях.

В результате совместной работы врачей нашего института и специалистов ООО «Конмет» для проведения хирургических операций при переломах С1, С2 позвонков или их комбинации дополнительно были отработаны оптимальные типоразмеры и форма костных канюлированных винтов для трансдентальной фиксации переломов зубовидного отростка второго шейного позвонка и трансартикулярного спондилодеза С1, С2 позвонков, а также полный набор инструментов для установки вышеуказанных канюлированных винтов.

Поскольку за Заказчиком в нормативном документе закреплено право, в случае необходимости, менять тип исполнения при обязательном выполнении требований нормативного документа, были разработаны и изготовлены костные канюлированные винты и набор инструмента, с помощью которых были успешно проведены операции пациентам с переломами С1 и С2 позвоночника.

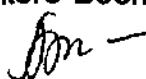
Реабилитация пациентов с установленными имплантатами прошла удачно, без каких-либо осложнений с отличными клинико-ортопедическими результатами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для расширения возможности адекватного хирургического лечения пациентов с переломами верхнего шейного отдела позвоночника и их реабилитации предлагаем дополнить состав базового «НАБОРА ИМПЛАНТАТОВ ТИТАНОВЫХ ДЛЯ НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИХ УСТАНОВКИ, ИТИП-«Конмет» следующими изделиями:

1. Имплантаты с укороченной длиной резьбовой части – 4 типоразмера.
2. Имплантат с резьбой на всей длине – 4 типоразмера.
3. Инструмент для установки имплантатов
 - Направитель стержня винтового
 - Направитель
 - Направитель двойной
 - Шило
 - Сверло канюлированное
 - Измеритель
 - Стержни винтовые
 - Ручка стержня винтового
 - Отвертка канюлированная

Предоставить возможность ООО «Конмет» по требованию Заказчика корректировать характеристики типоразмеров изделий из Набора при обязательном соблюдении требований нормативных документов.

Главный нейрохирург Приволжско-Уральского Военного Округа, начальник нейрохирургического отделения полковник м.с.  В. Манащук

Врач-нейрохирург отделения нейрохирургии 354 ОБКТ
подполковник м.с.  В. Чечель

Организация
"СИНТЕЗ"
ОКРБА
ПРОИЗВОДСТВО



РЕКОМЕНДАЦИИ

по внесению дополнений в номенклатуру изделий базового набора

«НАБОРА ИМПЛАНТАТОВ ТИТАНОВЫХ ДЛЯ НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИХ УСТАНОВКИ, ИТИП -«Конмет»

Начиная с 2001 года в отделении НИИ СП им. Н.В. Склифосовского проводились операции на шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника с использованием титановых имплантатов производства ООО «Конмет».

Данный Набор имплантатов, предназначенный для применения при хирургических операциях на позвоночнике, позволяет создавать первичный надежный спондилодез и длительную переднюю фиксацию костными винтами поврежденных сегментов шейного отдела позвоночника при травмах и их последствиях, а также при дегенеративных заболеваниях и опухолях.

Однако этот Набор невозможно использовать для проведения хирургических операций при переломах С1, С2 позвонков или их комбинации.

В результате совместной работы врачей нашего института и специалистов ООО «Конмет» дополнительно были отработаны оптимальные типоразмеры и форма костных канюлированных винтов для трансдентальной фиксации переломов зубовидного отростка второго шейного позвонка и трансартикулярного спондилодеза С1, С2 позвонков, а также полный набор инструментов для установки вышеуказанных канюлированных винтов.

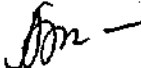
Все конструкции изготавливались из того же материала и по той же технологии, что и серийные изделия.

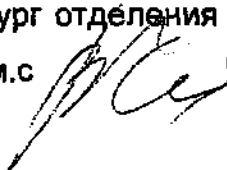
При использовании указанных канюлированных винтов у пациентов с переломами С1 и С2 позвонков получены отличные клинко-ортопедические результаты. Реабилитация пациентов с установленными костными канюлированными винтами прошла удачно, без каких-либо осложнений.

Для расширения возможности адекватного хирургического лечения пациентов с переломами верхнего шейного отдела позвоночника и их реабилитации предлагаем дополнить состав базового «НАБОРА ИМПЛАНТАТОВ ТИТАНОВЫХ ДЛЯ НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИХ УСТАНОВКИ, ИТИП-«Конмет» следующими изделиями:

1. Имплантаты с укороченной длиной резьбовой части – 4 типоразмера.
2. Имплантат с резьбой на всей длине – 4 типоразмера.
3. Инструмент для установки имплантатов
 - Направитель стержня винтового
 - Направитель
 - Направитель двойной
 - Шило
 - Сверло канюлированное
 - Измеритель
 - Стержни винтовые
 - Ручка стержня винтового
 - Отвертка канюлированная

Предоставить возможность ООО «Конмет» по требованию Заказчика корректировать характеристики типоразмеров изделий из Набора при обязательном соблюдении требований нормативных документов.

Главный нейрохирург Приволжско-Уральского Военного Округа, начальник нейрохирургического отделения полковник м.с.  В. Манащук

Врач-нейрохирург отделения нейрохирургии 354 ОБКГ
подполковник м.с.  В. Чечель

Организация
Зависимая

