

Криоконсоль 106E2/106A2-K

Руководство по эксплуатации

Руководство по настройке и эксплуатации криоконсоли 106E2/106A2-K

Данные наименования являются товарными знаками корпорации Medtronic:
Arctic Front, CryoCath, Freezor, Medtronic.

Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Содержание

	Объяснение символов, нанесенных на упаковку и продукты	9
	О данном руководстве по эксплуатации	12
1	Общая информация о криоконсоли	13
	Описание и назначение	14
	Предостережения	14
	Меры предосторожности	15
	Показания	17
	Противопоказания	17
	Побочные эффекты	17
	Функции безопасности	17
	Криоконсоль, ее компоненты и катетеры	19
2	Настройка криоконсоли для процедуры	25
	Размещение криоконсоли и фиксация ее колес	26
	Открытие клапана емкости для охлаждающего вещества	27
	Подсоединение нестерильных компонентов на задней панели	29
	Подсоединение систем регистрации электрофизиологических показателей или кабеля с байонетным коннектором (дополнительно)	30
	Включение криоконсоли	31
	Подсоединение нестерильных компонентов на передней панели	33
	Подсоединение стерильного электрического кабеля	35
	Подсоединение стерильного коаксиального кабеля	36
	Проверка уровня охлаждающего вещества	37
	Другие соединения и элементы управления системы	39
3	Заполнение карты пациента	41
	Выбор на основном (исходном) экране	42
	Введение имени пациента	43
	Введение регистрационного номера пациента или лечебного учреждения (дополнительно)	44
	Выбор даты рождения пациента (дополнительно)	45

Руководство по эксплуатации криоконсоли

6 | Содержание

Выбор пола пациента (дополнительно)	45
Выбор имени врача, выполняющего процедуру (дополнительно)	46
4 Выполнение криотерапии	47
Выполнение криоабляции с помощью баллонного катетера	48
Выполнение криоабляции с помощью точечного катетера	59
5 Завершение процедуры	69
Добавление диагноза и исхода (дополнительно)	70
Закрытие карты пациента	72
Завершение работы системы	73
6 Просмотр и загрузка карт пациентов	75
Просмотр карты пациента на экране криоконсоли	76
Загрузка карты пациента на дискету или накопитель USB	79
7 Техническое обслуживание	81
Интерпретация показаний индикатора уровня охлаждающего вещества в емкости	82
Замена емкости для охлаждающего вещества	82
Применение и хранение охлаждающего вещества	86
Транспортировка емкости для охлаждающего вещества	87
Чистка криоконсоли и компонентов	88
Профилактические технические проверки	88
8 Поиск и устранение неисправностей	89
Работа с сообщениями системы	90
Загрузка сервисных файлов на дискету или накопитель USB	93
Перечень сообщений системы	94
Поиск и устранение неисправностей сенсорного экрана	102
Поиск и устранение неисправностей, связанных с током охлаждающего вещества	102
Настройка правильной даты	103

Руководство по эксплуатации криоконсоли

9	Технические характеристики	105
	Параметры окружающей среды	106
	Технические характеристики криоконсоли	106
	Способ поставки	107
	Правила утилизации	107
A	Информация о компонентах криоконсоли	109
	Набор для ручного извлечения	110
	Блок автоматического подсоединения	118
	Коаксиальный кабель	120
	Электрический кабель	122
	Электрокардиографический (ЭКГ) кабель	124
	Шланг для удаления отработанного газа	125
	Емкость для охлаждающего вещества	127
	Гаечный ключ	131
	Шнур питания	132

Полный вариант инструкции на диске!!!

Всего прошнуровано, пронумерован

И скреплено печатью 6 листов

