

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

«26» июня 2023-г.



**Фотографические изображения общего вида медицинского
изделия для диагностики in vitro**

**«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов
для иммунохроматографического определения
поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021**

Вариант комплектации в пакете полиэтиленовом с замком





Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru

**«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического определения
поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
вариант исполнения 1
ПУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.**

Состав набора

- | | |
|---|-------|
| 1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе: | 1 шт. |
| - Тестовое устройство - 1 шт.; | |
| - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-026-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. | 1 шт. |
| 2. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta
(ПУ № РЗН 2013/822) | 1 шт. |
| 3. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance
однократного применения (ПУ № ФСЗ 2009/04308) | 1 шт. |
| 4. Схема использования ланцета | 1 шт. |
| 5. Инструкция по применению | |



Для клинической
лабораторной диагностики



REF ET-HBV-1

LOT 23001p


07.06.2023

07.06.2026

Только для профессионального использования

«МБС-Экспресс HBsAg»

ИЛИ

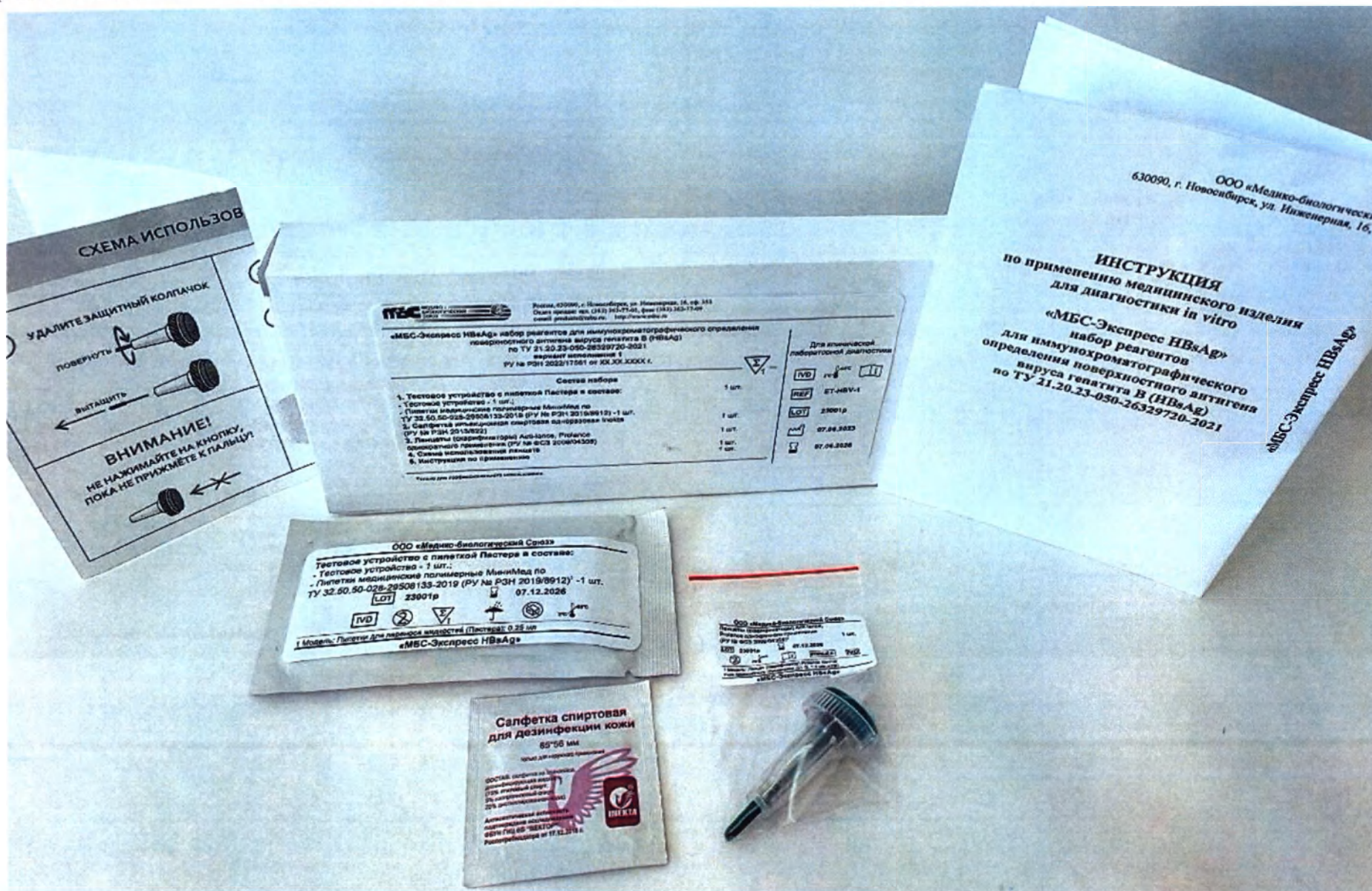



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru

**«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического определения
поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
вариант исполнения 1
РУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.**

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
 - Тестовое устройство - 1 шт.;
 - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.
2. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inecta
(РУ № РЗН 2013/822)
3. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance
однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)
4. Схема использования ланцета
5. Инструкция по применению

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.



Для клинической
лабораторной диагностики



REF ET-HBV-1


LOT 23001p


07.06.2023

07.06.2026

Только для профессионального использования



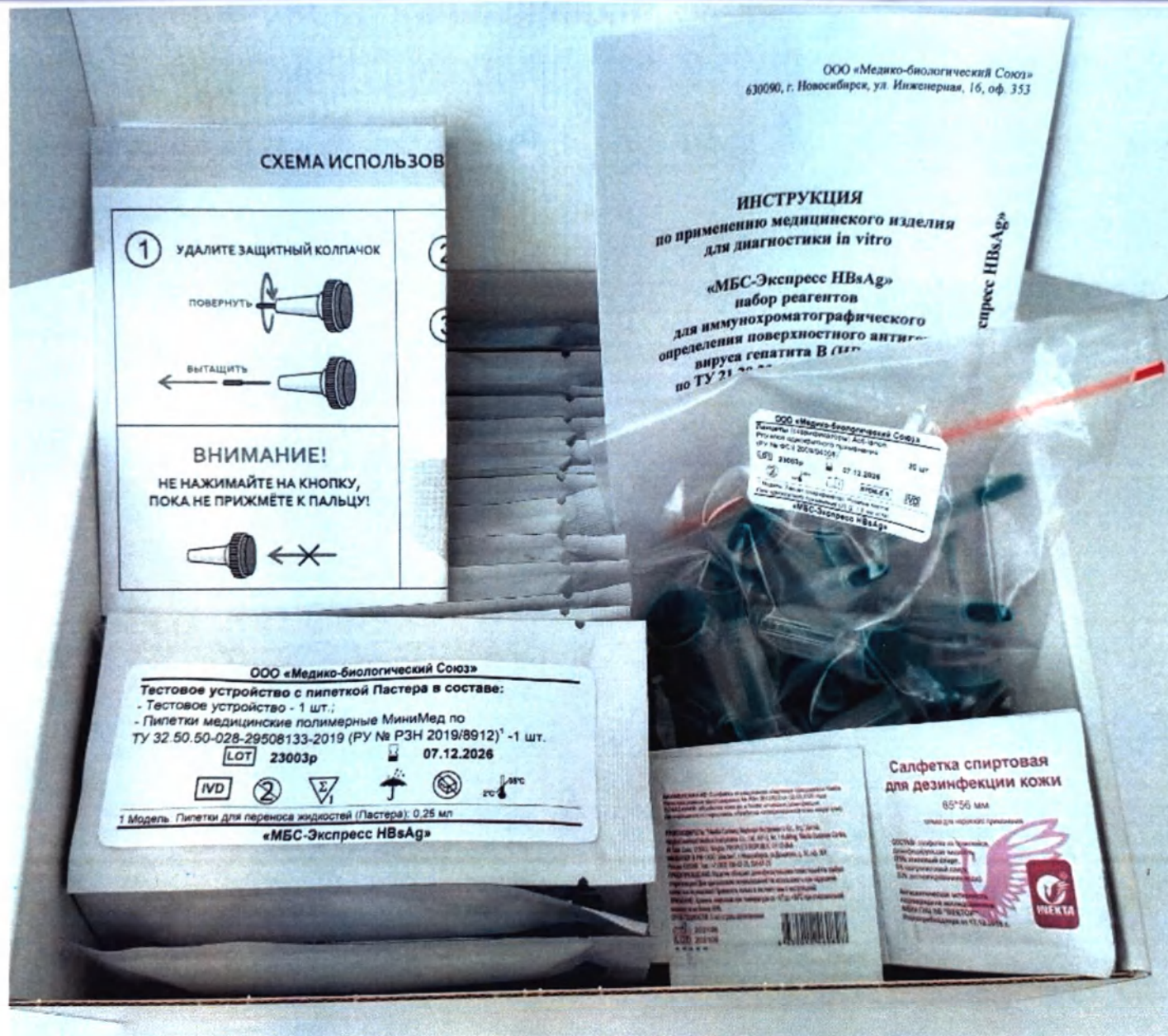

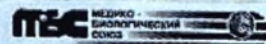

Россиа, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru


«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического определения
поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
вариант исполнения 2
ПУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

- | | |
|---|--------|
| 1. Тестовое устройство с липеткой Пастера в составе: | 20 шт. |
| - Тестовое устройство - 1 шт.; | |
| - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. | |
| 2. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta
(ПУ № РЗН 2013/822) | 20 шт. |
| 3. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance
однократного применения (ПУ № ФСЗ 2009/04308) | 20 шт. |
| 4. Схема использования ланцета | 1 шт. |
| 5. Инструкция по применению | 1 шт. |



Для клинической
лабораторной диагностики

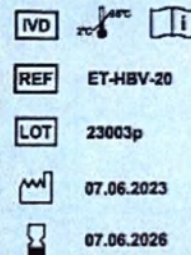

Только для профессионального использования

ИЛИ

Брендируванна пачка/коробка




Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического
 определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
 по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
 вариант исполнения 2
 РУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

- | | |
|---|--------|
| 1. Тестовое устройство с пилеткой Пастера в составе: | 20 шт. |
| - Тестовое устройство - 1 шт.; | |
| - Пилетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29506133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. | |
| 2. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekla
(РУ № РЗН 2013/822) | 20 шт. |
| 3. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance
однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04306) | 20 шт. |
| 4. Схема использования ланцетов | 1 шт. |
| 5. Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для профессионального использования

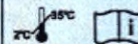

REF ET-HBV-20

LOT 23003p

07.06.2023

07.06.2026



Для клинической лабораторной диагностики







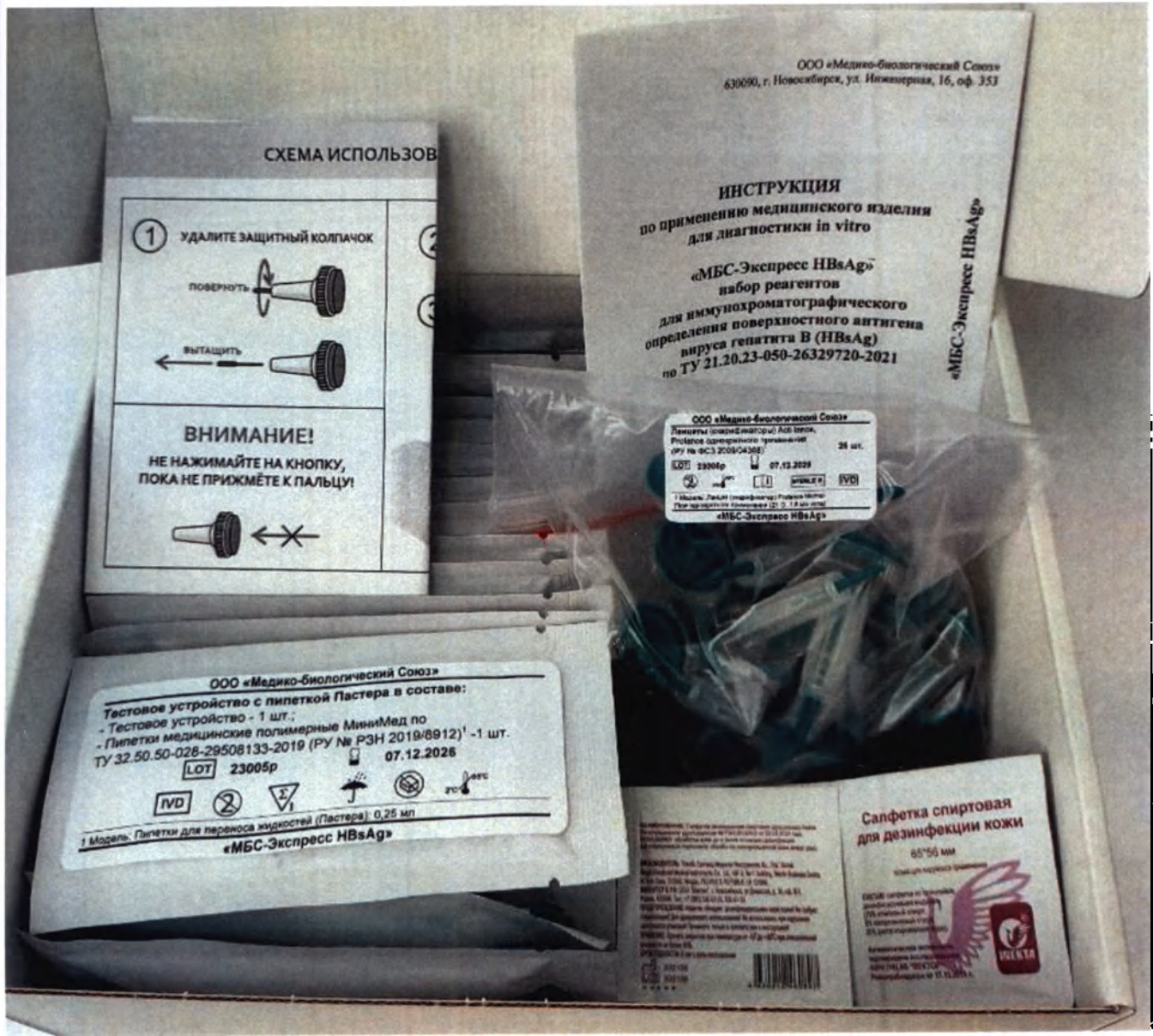


СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 УДАЛИТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК

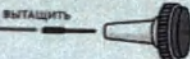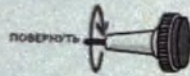

ВНИМАНИЕ!

НЕ НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКУ,
ПОКА НЕ ПРИЖМЁТЕ К ПАЛЬЦУ!



ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
для диагностики in vitro

«МБС-Экспресс HBsAg»
набор реагентов
для иммунохроматографического
определения поверхностного антигена
вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021

«МБС-Экспресс HBsAg»

ООО «Медико-биологический Союз»
Ленинградская область, г. Лосино-Петровский, д. 10, стр. 1
Почтовый адрес: 400000, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10
(П/У № ФСЗ 2009/04368)
28 шт.
LOT 23005p 07.12.2026
1 Модель: Лейка (информация) Родитель: МБС
Пир. права: ООО «Медико-биологический Союз» (П/У № ФСЗ 2009/04368)
«МБС-Экспресс HBsAg»


ООО «Медико-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-026-29506133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912)¹ - 1 шт.
LOT 23005p 07.12.2026

1 Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл
«МБС-Экспресс HBsAg»

Салфетка спиртовая
для дезинфекции кожи
65х55 мм
10 шт. в упаковке



Небрендированная пачка/коробка

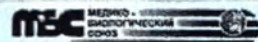

Россиа, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09
e-mail: prod@mbc.ru; <http://www.mbc.ru>

«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического определения
поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
вариант исполнения 3
ПУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.



Состав набора

- | | |
|---|--------|
| 1. Тестовое устройство с пилеткой Пастера в составе: | 25 шт. |
| - Тестовое устройство - 1 шт.; | |
| - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по | |
| ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) -1 шт. | |
| 2. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta | 25 шт. |
| (ПУ № РЗН 2013/822) | |
| 3. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance | 25 шт. |
| однократного применения (ПУ № ФСЗ 2009/04308) | |
| 4. Схема использования ланцета | 1 шт. |
| 5. Инструкция по применению | 1 шт. |

Для клинической
лабораторной диагностики



REF ET-HBV-25

LOT 23005p

07.06.2023

07.06.2026

Только для профессионального использования

или

Брендированная пачка/коробка



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического
определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
вариант исполнения 3
РУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

- | | |
|---|--------|
| 1. Тестовое устройство с липеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. | 25 шт. |
| 2. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta
(РУ № РЗН 2013/822) | 25 шт. |
| 3. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Pro lance
однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308) | 25 шт. |
| 4. Схема использования ланцета | 1 шт. |
| 5. Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для профессионального использования



REF ET-HBV-25

LOT 23005p

07.06.2023

07.06.2026

IVD

Для клинической лабораторной диагностики



ООО «Медино-биологический Союз»
630900, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 313

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
для диагностики in vitro

«МБС-Экспресс НВсAg»
набор реагентов
для иммуноэлектрографического
определения поверхностного антигена
вируса гепатита В (НВсAg)
по ТУ 21.20.23-050-26379720-2021

ООО «Медино-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство полимерное МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РЭН 2019/8912) - 1 шт.
LOT 23007P 07.12.2026
1. Меры: Пипетка для измерения жидкостей (Пипетка) 0,25 мл
«МБС-Экспресс НВсAg»

ООО «Медино-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.
- Тестовое устройство полимерное МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РЭН 2019/8912) - 1 шт.
LOT 23007P 07.12.2026
1. Меры: Пипетка для измерения жидкостей (Пипетка) 0,25 мл
«МБС-Экспресс НВсAg»

ООО «Медино-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.
- Тестовое устройство полимерное МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РЭН 2019/8912) - 1 шт.
LOT 23007P 07.12.2026
1. Меры: Пипетка для измерения жидкостей (Пипетка) 0,25 мл
«МБС-Экспресс НВсAg»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУК
ВСЕК

МБС МЕДИКО -
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
СОЮЗ



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического
определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
вариант исполнения 4
РУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.



Состав набора

- | | |
|---|--------|
| 1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера | 40 шт. |
| в составе: | |
| - Тестовое устройство - 1 шт.; | |
| - Пипетки медицинские полимерные МиниМед | |
| по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 | |
| (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. | |
| 2. Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для профессионального использования



REF ET-HBV-40


LOT 23007p

07.06.2023

07.06.2026

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

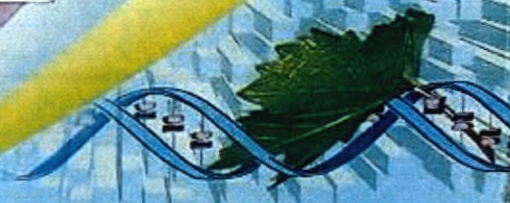



ООО «Медико-биологический Союз»
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
для диагностики *in vitro*

«МБС-Экспресс HBsAg»
набор реагентов
для иммунохроматографического
определения поверхностного антигена
вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021

«МБС-Экспресс HBsAg»

ООО «Медико-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912)¹ - 1 шт.
LOT 23009p 08.12.2026
IVD 2 3 VI 4 PC
1 Модель: Пипетка для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл
«МБС-Экспресс HBsAg»

ООО «Медико-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912)¹ - 1 шт.
LOT 23009p 08.12.2026
IVD 2 3 VI 4 PC
1 Модель: Пипетка для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл
«МБС-Экспресс HBsAg»

ООО «Медико-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912)¹ - 1 шт.
LOT 23009p 08.12.2026
IVD 2 3 VI 4 PC
1 Модель: Пипетка для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл
«МБС-Экспресс HBsAg»

МБС МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического
определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
вариант исполнения 5
РУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера 50 шт.
в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.
2. Инструкция по применению 1 шт.

Только для профессионального использования



REF ET-HBV-50


LOT 23009p

08.06.2023


08.06.2026

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

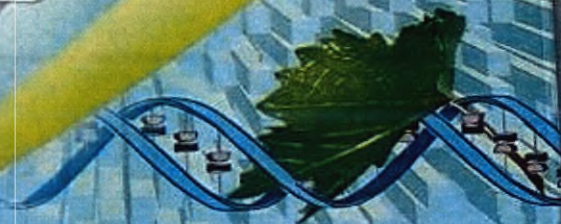



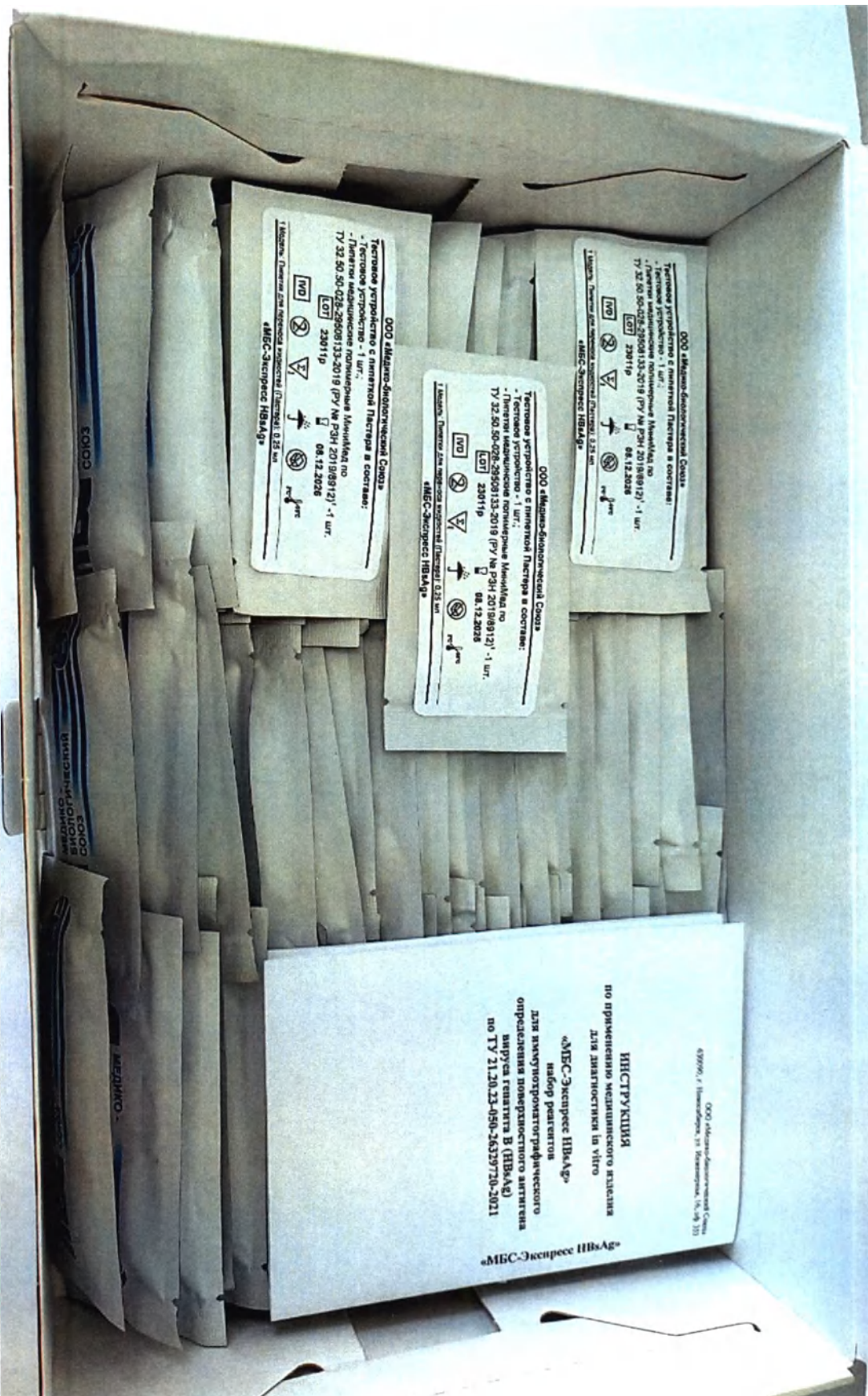



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического
определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
вариант исполнения 6
РУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.




Состав набора

1. Тестовое устройство с пилеткой Пастера
в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пилетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.
2. Инструкция по применению

100 шт.

1 шт.

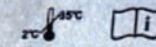

REF ET-HBV-100

LOT 23011p

08.06.2023

08.06.2026

Только для профессионального использования

IVD

Для клинической лабораторной диагностики



Внутренняя маркировка набора реагентов

Тестовое устройство с пипеткой Пастера

Варианты исполнения 1-6







Ланцет

Вариант исполнения 1



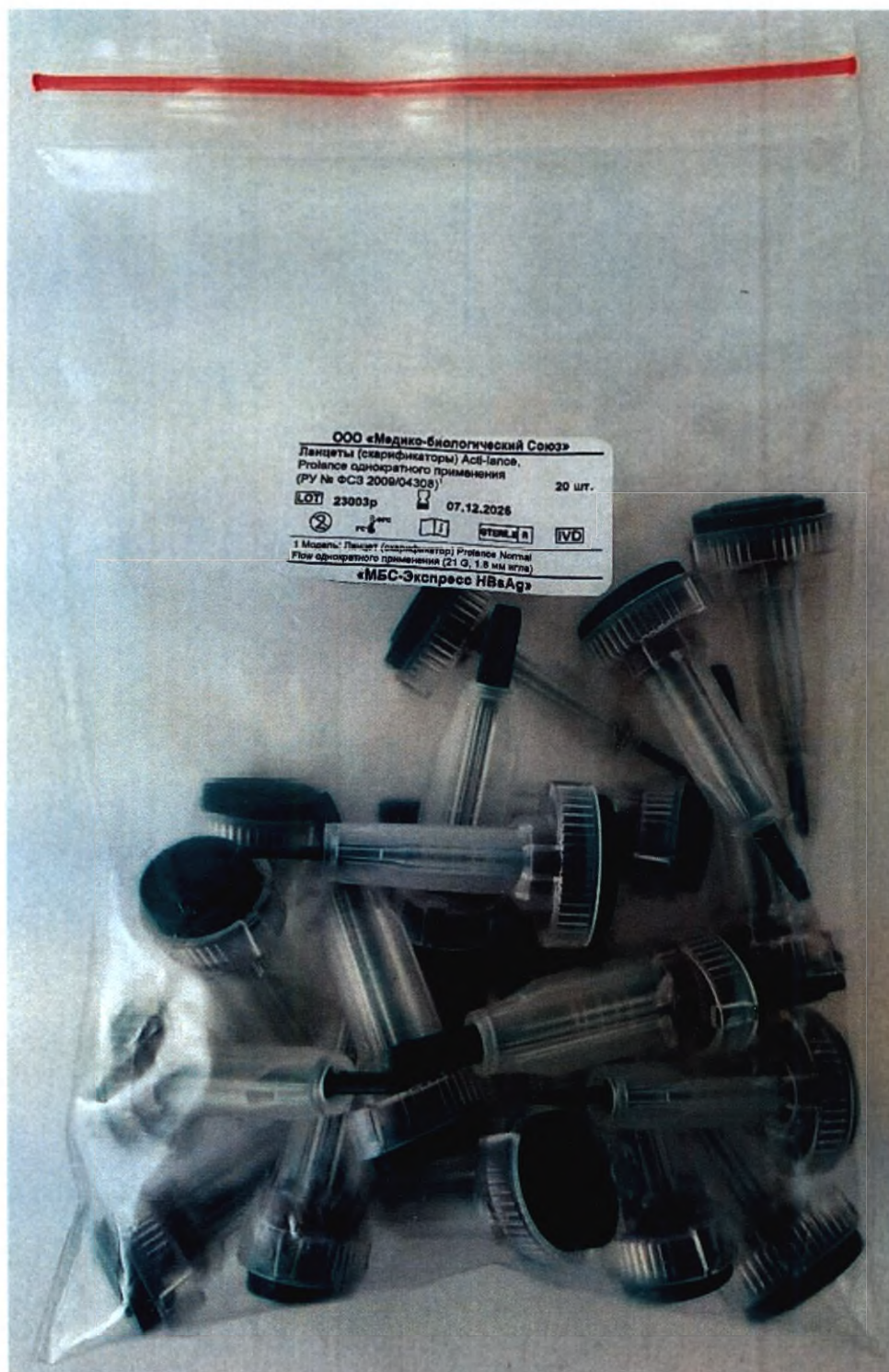

Вариант исполнения 3

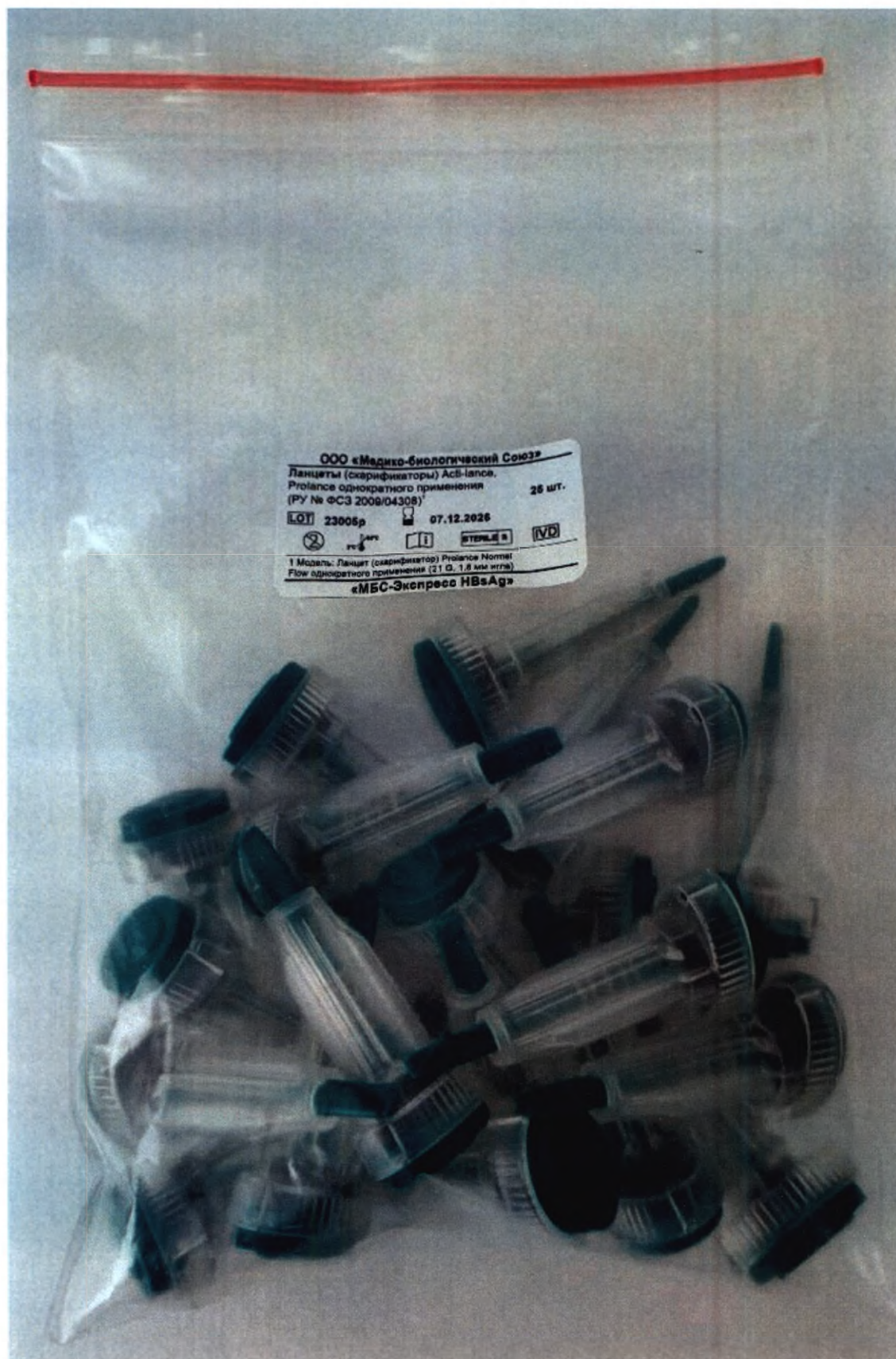


Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (ПУ № РЗН 2013/822) (упаковка от производителя МИ)

Варианты исполнения 1-3



Лицевая сторона салфетки инъекционной спиртовой одноразовой Inekta (ПУ № РЗН 2013/822)

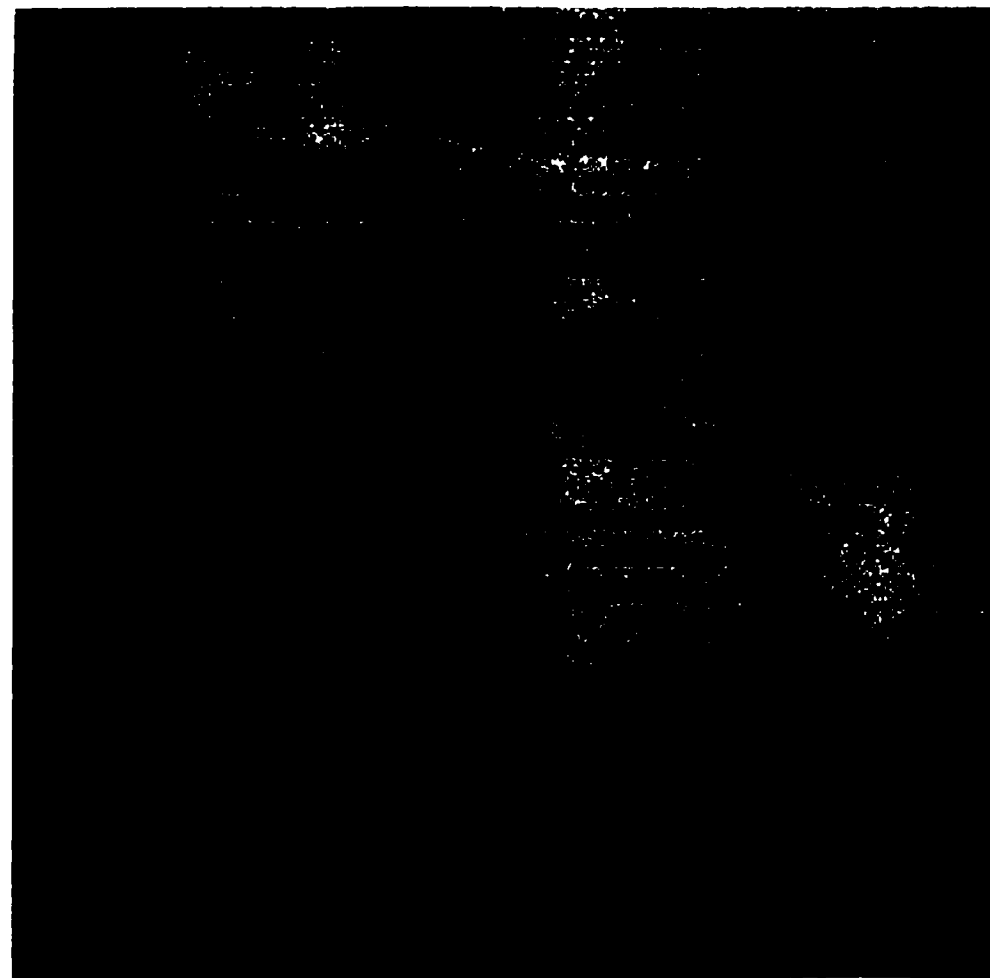

Обратная сторона салфетки инъекционной спиртовой одноразовой Inekta (ПУ № РЗН 2013/822)

Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (28) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

«01» июня 2023 г. *



Образцы маркировки медицинского изделия

с изменением № 1

«МБС-Экспресс HBsAg»


**набор реагентов для иммунохроматографического определения
поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021**


Небрендированная пачка/коробка/пакет

4

Вариант исполнения 2


Небрендированная пачка/коробка

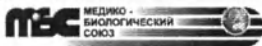	Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09 e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru
«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021 вариант исполнения 2 РУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.	
Состав набора	
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе: - Тестовое устройство - 1 шт.; - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. 2. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822) 3. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance одноразового применения (РУ № ФСЗ 2009/04308) 4. Схема использования ланцета 5. Инструкция по применению	20 шт. 20 шт. 20 шт. 1 шт. 1 шт.
Только для профессионального использования	

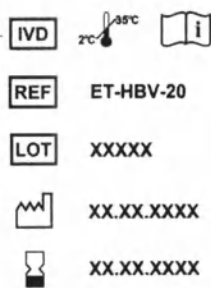Для клинической лабораторной диагностики


ИЛИ

Брендированная пачка/коробка

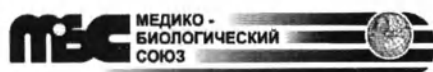

Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021 вариант исполнения 2 РУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.	
Состав набора	
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе: - Тестовое устройство - 1 шт.; - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. 2. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822) 3. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance одноразового применения (РУ № ФСЗ 2009/04308) 4. Схема использования ланцета 5. Инструкция по применению	20 шт. 20 шт. 20 шт. 1 шт. 1 шт.
Только для профессионального использования	

Для клинической лабораторной диагностики


IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Вариант исполнения 3 Небрендированная пачка/коробка

		Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09 e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru	
«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021 вариант исполнения 3 РУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.			
Состав набора		Для клинической лабораторной диагностики	
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе: - Тестовое устройство - 1 шт.; - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. 2. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822) 3. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308) 4. Схема использования ланцета 5. Инструкция по применению	25 шт. 25 шт. 25 шт. 1 шт. 1 шт.	    	  ET-HBV-25 XXXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX
Только для профессионального использования			

ИЛИ

Брендированная пачка/коробка



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

		Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09 e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru	
«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021 вариант исполнения 3 РУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.			
Состав набора		Для клинической лабораторной диагностики	
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе: - Тестовое устройство - 1 шт.; - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. 2. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822) 3. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308) 4. Схема использования ланцета 5. Инструкция по применению	25 шт. 25 шт. 25 шт. 1 шт. 1 шт.	  ET-HBV-25 XXXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX	
Только для профессионального использования			

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Вариант исполнения 4
Брендированная пачка/коробка



Россия, 630080, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического
определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-28329720-2021
вариант исполнения 4
ПУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.



Состав набора

- | | |
|--|--------|
| 1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера
в составе: | 40 шт. |
| - Тестовое устройство - 1 шт.; | |
| - Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. | |
| 2. Инструкция по применению | 1 шт. |



REF ET-HBV-40

LOT XXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

ИД

Для клинической лабораторной диагностики

Вариант исполнения 5
Брендированная пачка/коробка



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 18, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического
определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
вариант исполнения 5
ПУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

- | | |
|--|--------|
| 1. Тестовое устройство с липеткой Пастера
в составе: | 50 шт. |
| - Тестовое устройство - 1 шт.; | |
| - Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. | |
| 2. Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для профессионального использования



REF ET-HBV-50

LOT XXXXX



XX.XX.XXXX




XX.XX.XXXX



Для клинической лабораторной диагностики

Вариант исполнения 6
Брендированная пачка/коробка

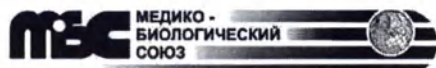

Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов для иммунохроматографического
определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021
вариант исполнения 6
ПУ № РЗН 2022/17561 от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера
в составе:

100 шт.

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

2. Инструкция по применению

1 шт.

Только для профессионального использования



REF ET-HBV-100

LOT XXXXX

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Внутренняя маркировка
Варианты исполнения 1, 2, 3, 4, 5 и 6

ООО «Медико-биологический Союз»

Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
 ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912)¹ -1 шт.

LOT

XXXXX

XX.XX.XXXX

IVD

2

Σ_1

☂

X

37°C

1 Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл

«МБС-Экспресс HBsAg»

ООО «Медико-биологический Союз»

**Ланцеты (скарifikаторы) Acti-lance,
 Prolance однократного применения
 (ПУ № ФСЗ 2009/04308)¹**

X шт.

LOT

XXXXX

XX.XX.XXXX

2

37°C

i

STERILE R

IVD

1 Модель: Ланцет (скарifikатор) Prolance Normal Flow однократного применения (21 G, 1,8 мм игла)

«МБС-Экспресс HBsAg»

Маркировка тестового устройства


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8

Маркировка транспортной тары



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
<http://www.mbu.ru>

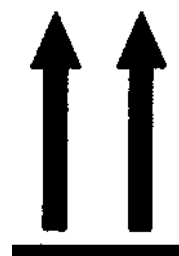

**«МБС-Экспресс HBsAg» набор реагентов
 для иммунохроматографического определения
 поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)
 по ТУ 21.20.23-050-26329720-2021**



Кат. №	ЕТ-HBV-XXX
Серия	XXXXXX
Дата изготовления	XX.XX.XXXX
Срок годности	XX.XX.XXXX
Число потребительских упаковок в транспортной таре	XX шт.
Масса нетто транспортной тары	X,XX кг
Масса брутто транспортной тары	X,XX кг
Масса нетто потребительской упаковки	X,XX кг

Срочный груз

Не бросать

Не замораживать!

Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (9) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев

