


Схема сборки:

«Тележки медицинской универсальной ТМ-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50-090-11769436-2023 в исполнениях:


ТМп(н)-«КРОНТ»-1(3)п



ТМп(н)-«КРОНТ»-1(3)н

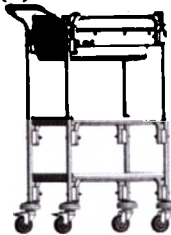

ТМп(н)-«КРОНТ»-1(3)м

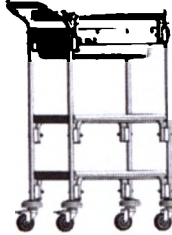

1

Порядок сборки тележки:

Для сборки тележки необходимы ключи гасные (с открытым или кольцевым зевом 10 мм и 13 мм) и отвертка слесарно-монтажная для винтов с крестообразным шлицем (не входят в комплект поставки). Номера рамных конструкции соответствуют нанесенной на них маркировке.

Комплект крепежный №1:

1. Ложемент – 8 шт.
2. Втулка – 2 шт.
3. Винт М 6х60 – 8 шт.
4. Винт М 6х40 – 2 шт.
5. Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт.
6. Шайба ø6 – 10 шт.

Комплект крепежный №2:

1. Ложемент – 4 шт.
2. Винт М 6х60 – 4 шт.
3. Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт.
4. Шайба ø6 – 4 шт.

Комплект крепежный №3:

1. Винт М 5х30 – 4 шт.
2. Гайка М5 (самоконтрящаяся) – 2 шт.
2. Гайка М5 (колпачковая) – 2 шт.
3. Шайба М5 – 4 шт.

Комплект колес:


- Колесо с тормозом – 2 шт.
- Колесо без тормоза – 2 шт.
- Болт 8х16 – 4 шт.
- Шайба М8 – 4 шт.

Комплект отражателей:

- Отражатель – 4 шт.


1.1

- Установить Отражатели на Стойку(054) и Стойку-ручку(050);
- Установить два колеса с тормозом на Стойку-ручку(050);
- Установить два колеса без тормоза на Стойку(054);
- Зафиксировать колеса крепежными элементами из комплекта колес.

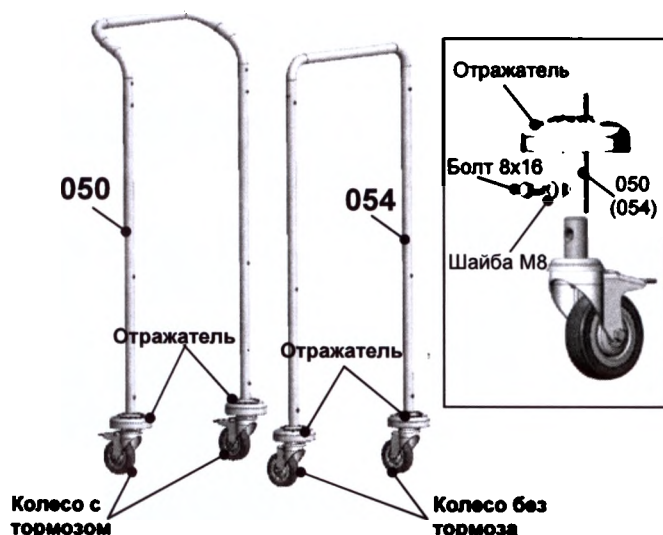


1.2

- Соединить Стойку-ручку(050) и Стойку(054) при помощи Стяжек верхних (125) и Стяжек нижних (127);
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №1.

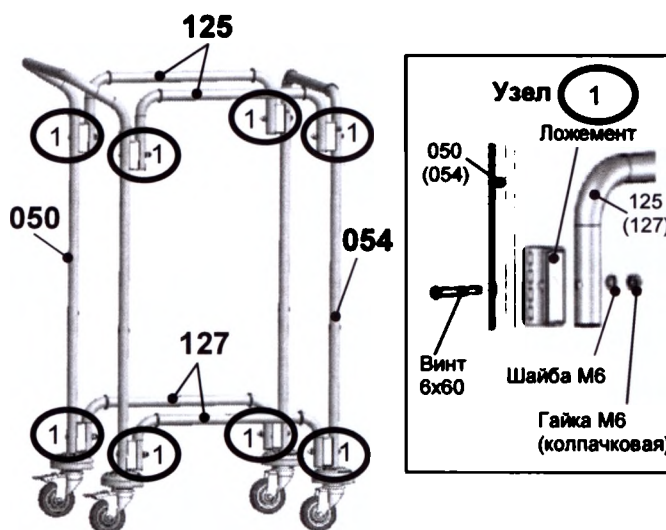


1.3

- Соединить Стяжки нижние (127) при помощи поперечины (207);
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №1.

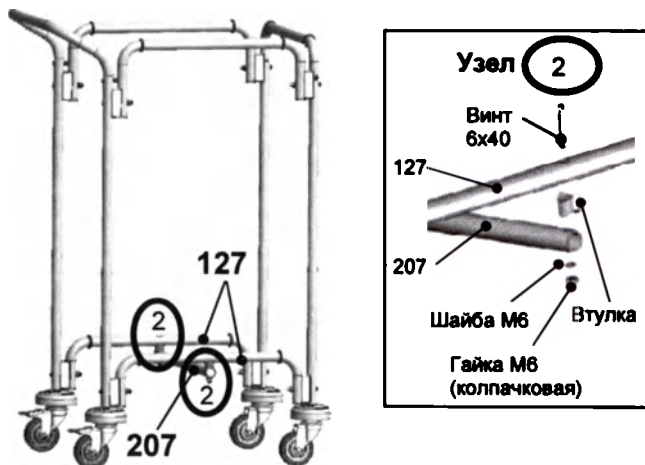

1.4

- Соединить Стойку-ручку(050) и Стойку(054) при помощи Стяжек средних (126);
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №2.

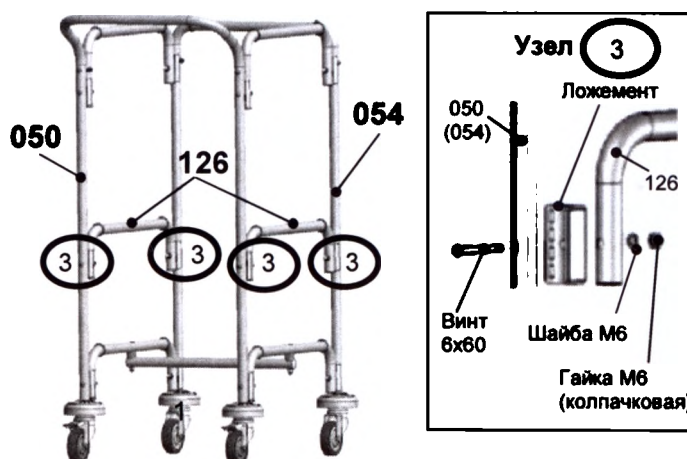

- Установить Кожух с ящиком на Стойку-ручку(050) и Стойку(054);
- Зафиксировать Кожух с ящиком на стойках при помощи крепежных элементов из комплекта крепежного №3.



1.6

- Установить Поддон верхний на тележку;
- Установить Поддоны нижние на тележку.
- Наклеить Маркировочную табличку на ложемент;



*Внимание! Внешний вид поддона верхнего зависит от исполнения тележки.

2

Порядок установки принадлежности (при необходимости):


Держатель контейнера для сбора острого инструмента, комплект:

1. Держатель – 2 шт.
2. Кронштейн – 1 шт.
3. Винт 6х65 – 2 шт.
6. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт




2.1

- Установить Держатели на Стойку-ручку (050);
- Зафиксировать Держатели на стойке при помощи крепежных элементов из комплекта держателя контейнера для сбора острого инструмента.

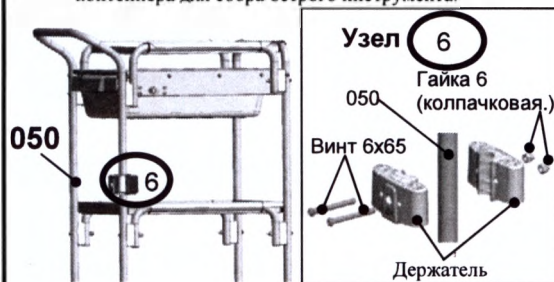

2.2

- Установить Кронштейн в отверстия Держателя;

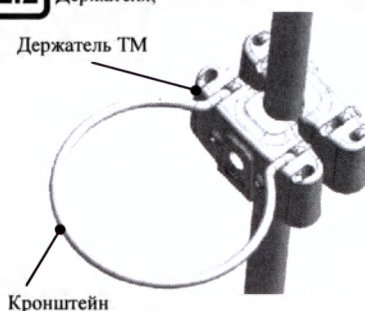

2.3

- Установить контейнер** для сбора острого инструмента в Кронштейн;



**Контейнер для сбора острого инструмента не входит в комплект поставки.

3

Порядок установки принадлежности (при необходимости):

Контейнеры для сбора медицинских отходов, комплект:

1. Держатель – 4 шт.
2. Кронштейн №1 – 1 шт.
3. Кронштейн №2 – 1 шт.
4. Контейнер – 2 шт.
3. Винт 6х65 – 4 шт.
6. Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт.




3.1

- Установить Держатели на Стойку (054);
- Зафиксировать Держатели на стойке при помощи крепежных элементов из комплекта Контейнеры для сбора медицинских отходов.



3.2

- Установить Кронштейн №1 наружный в отверстия Держателей;
- Установить Кронштейн №2 внутренний в отверстия Держателей;

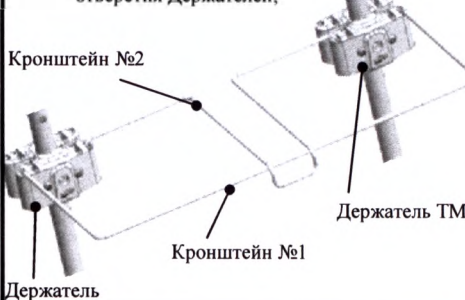

3.3

- Установить Контейнеры для сбора медицинских отходов в Кронштейны;



4

Порядок установки принадлежности (при необходимости):

Ящик для использования в виде лотка:

- Ящик для использования в виде лотка размещается на поддоне нижнем.

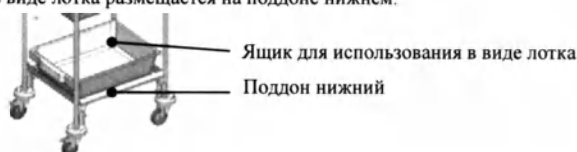



Схема сборки:

«Тележки медицинской универсальной ТМ-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50-090-11769436-2023 в исполнениях:

ТМп(н)-«КРОНТ»-2(4)п

ТМп(н)-«КРОНТ»-2(4)н

ТМп(н)-«КРОНТ»-2(4)м

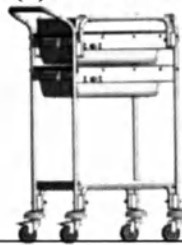


1 Порядок сборки тележки:


Для сборки тележки необходимы ключи гаечные (с открытым или кольцевым зевом 10 мм и 13 мм) и отвертка слесарно-монтажная для винтов с крестообразным шлицем (не входят в комплект поставки). Номера рамных конструкции соответствуют нанесенной на них маркировке.

Комплект крепежный №1: 1. Ложемент – 8 шт. 2. Втулка – 2 шт. 3. Винт М 6х60 – 8 шт. 4. Винт М 6х40 – 2 шт. 5. Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт. 6. Шайба ø6 – 10 шт.	Комплект крепежный №3: 1. Винт М 5х30 – 4 шт. 2. Гайка М5 (самоконтрящаяся) – 2 шт. 2. Гайка М5 (колпачковая) – 2 шт. 3. Шайба М5 – 4 шт.	Комплект крепежный №4: 1. Винт М 5х30 – 4 шт. 2. Гайка М5 (колпачковая) – 4 шт. 3. Шайба М5 – 4 шт.	Комплект колес: - Колесо с тормозом – 2 шт. - Колесо без тормоза – 2 шт. - Болт 8х16 – 4 шт. - Шайба М8 – 4 шт.	Комплект отражателей: - Отражатель – 4 шт.
---	--	---	--	--


- 1.1** - Установить Отражатели на Стойку(055) и Стойку-ручку(051);
- Установить два колеса с тормозом на Стойку-ручку(051);
- Установить два колеса без тормоза на Стойку(055);
- Зафиксировать колеса крепежными элементами из комплекта колес.

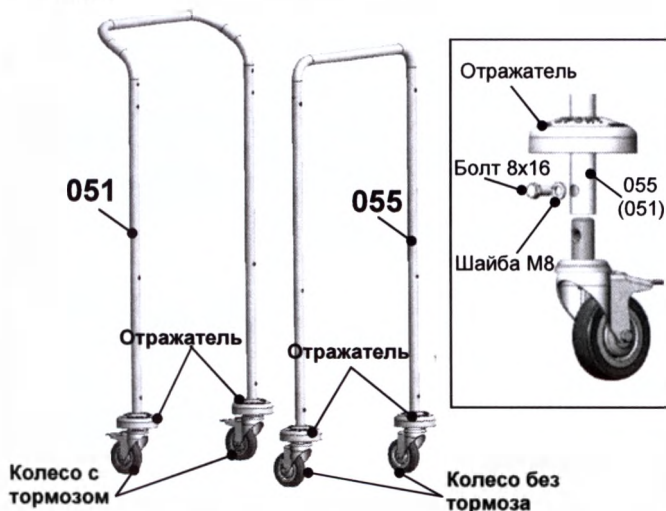



- 1.2** - Соединить Стойку-ручку(051) и Стойку(055) при помощи Стяжек верхних(125) и Стяжек нижних(127);
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №1.

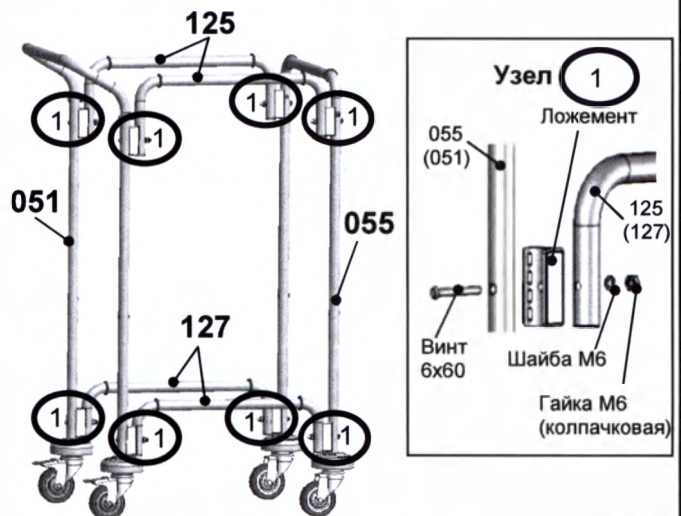

- 1.3** - Соединить Стяжки нижние(127) при помощи поперечины(207);
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №1.

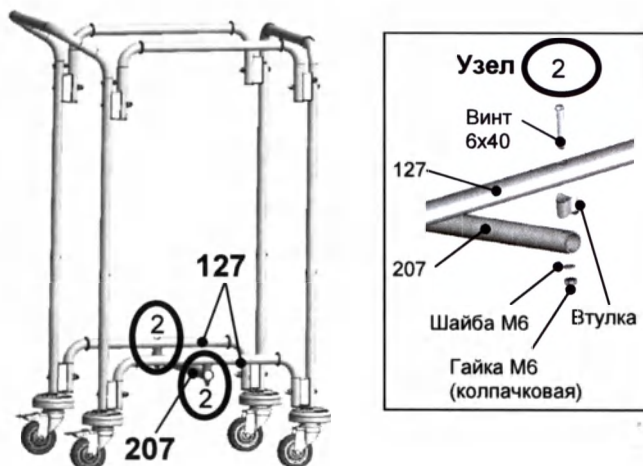


- 1.4** - Установить Кожух с ящиком на Стойку-ручку(051) и Стойку (055);
- Зафиксировать Кожух с ящиком на стойках при помощи крепежных элементов из комплекта крепежного №3.

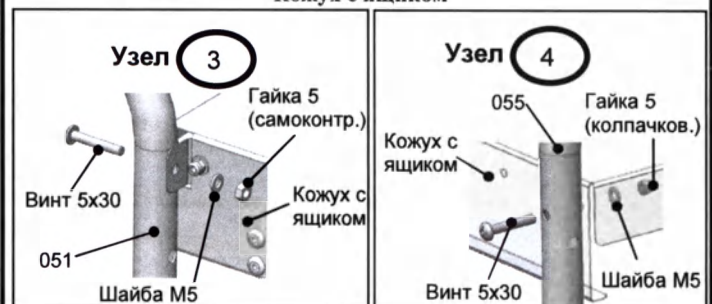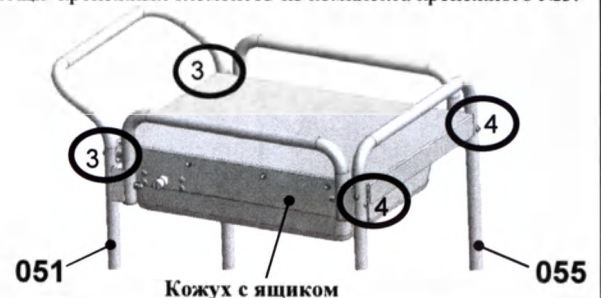

- 5** - Установить Кожух с ящиком на Стойку(051) и Стойку(055);
5 - Зафиксировать Кожух с ящиком на стойках при помощи крепежных элементов из комплекта крепежного №4.

Внимание! Узел 5 расположенный на обратной стороне тележки на рисунке не показан.

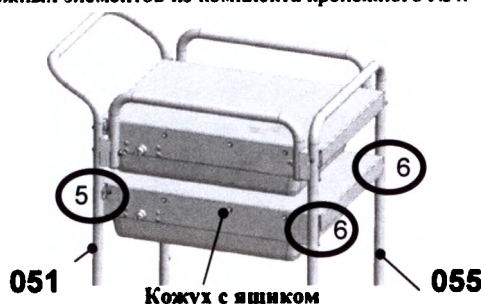

- 1.6** - Установить Поддон верхний на тележку;
 - Установить Поддон нижний на тележку.
 - Наклеить Маркировочную табличку на ложемент;



место наклеивания Маркировочной таблички на ложемент


**Внимание! Внешний вид поддона верхнего зависит от исполнения тележки.*

2 Порядок установки принадлежности (при необходимости):


Держатель контейнера для сбора острого инструмента, комплект:

1. Держатель – 2 шт.
2. Кронштейн – 1 шт.
3. Винт 6х65 – 2 шт.
6. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт

- 2.1** - Установить Держатели на Стойку-ручку(051);
 - Зафиксировать Держатели на стойке при помощи крепежных элементов из комплекта держателя контейнера для сбора острого инструмента.

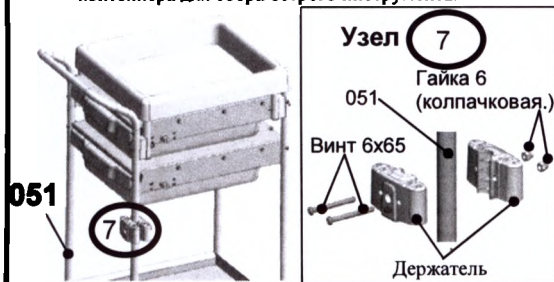

- 2.2** - Установить Кронштейн в отверстия Держателя;

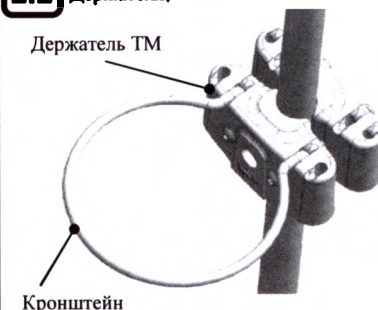

- 2.3** - Установить контейнер** для сбора острого инструмента в Кронштейн;



***Контейнер для сбора острого инструмента не входит в комплект поставки.*


3 Порядок установки принадлежности (при необходимости):

Контейнеры для сбора медицинских отходов, комплект:


1. Держатель – 4 шт.
2. Кронштейн №1 – 1 шт.
3. Кронштейн №2 – 1 шт.
4. Контейнер – 2 шт.
3. Винт 6х65 – 4 шт.
6. Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт.



- 3.1** - Установить Держатели на Стойку(055);
 - Зафиксировать Держатели на стойке при помощи крепежных элементов из комплекта Контейнеры для сбора медицинских отходов.

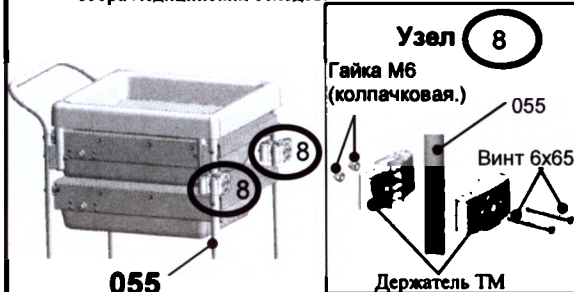

- 3.2** - Установить Кронштейн №1 наружный в отверстия Держателей;
 - Установить Кронштейн №2 внутренний в отверстия Держателей;

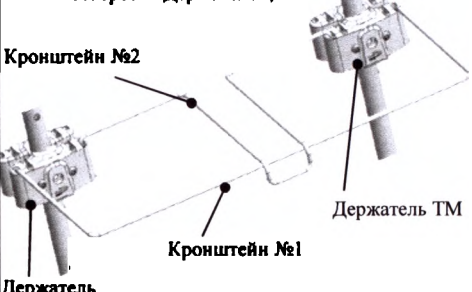

- 3.3** - Установить Контейнеры для сбора медицинских отходов в Кронштейны;



4 Порядок установки принадлежности (при необходимости):

Ящик для использования в виде лотка:

- Ящик для использования в виде лотка размещается на поддоне нижнем.

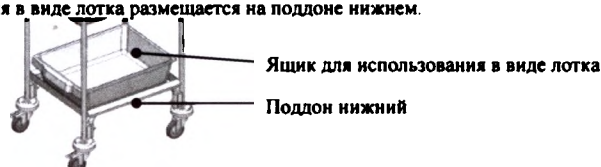




Схема сборки:

«Тележки медицинской универсальной ТМ-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50-090-11769436-2023 в исполнениях:

ТМп(н)-«КРОНТ»-5(6)п

ТМп(н)-«КРОНТ»-5(6)н

ТМп(н)-«КРОНТ»-5(6)м

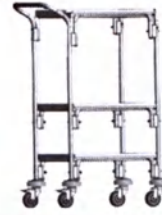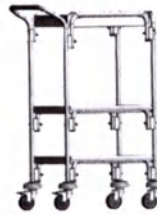

1 Порядок сборки тележки:

Для сборки тележки необходимы ключи гаечные (с открытым или кольцевым зевом 10 мм и 13 мм) и отвертка слесарно-монтажная для винтов с крестообразным шлицем (не входит в комплект поставки). Номера рамных конструкций соответствуют нанесенной на них маркировке.

Комплект крепежный №1:

1. Ложемент – 8 шт.
2. Втулка – 2 шт.
3. Винт М 6х60 – 8 шт.
4. Винт М 6х40 – 2 шт.
5. Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт.
6. Шайба ø6 – 10 шт.

Комплект крепежный №2:

1. Ложемент – 4 шт.
2. Винт М 6х60 – 4 шт.
3. Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт.
4. Шайба ø6 – 4 шт.

Комплект колес:


- Колесо с тормозом – 2 шт.
- Колесо без тормоза – 2 шт.
- Болт 8х16 – 4 шт.
- Шайба М8 – 4 шт.

Комплект отражателей:

- Отражатель – 4 шт.


1.1

- Установить Отражатели на Стойку(053) и Стойку-ручку(049);
- Установить два колеса с тормозом на Стойку-ручку(049);
- Установить два колеса без тормоза на Стойку(053);
- Зафиксировать колеса крепежными элементами из комплекта колес.

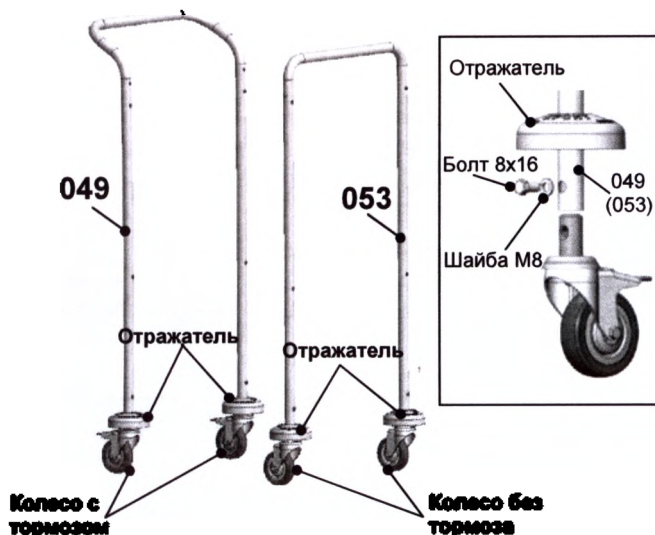


1.2

- Соединить Стойку-ручку(049) и Стойку(053) при помощи Стяжек верхних (125) и Стяжек нижних (127);
- Зафиксировать соединения крепежными элементами из комплекта крепежного №1.

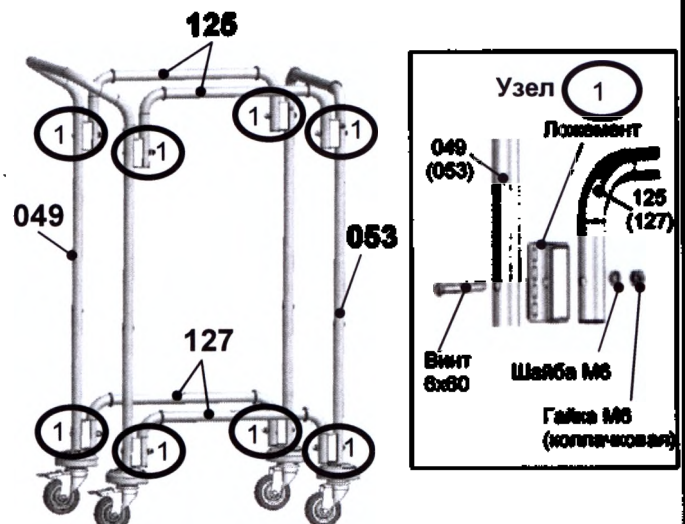


1.3

- Соединить Стяжки нижние (127) при помощи поперечины (207);
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №1.

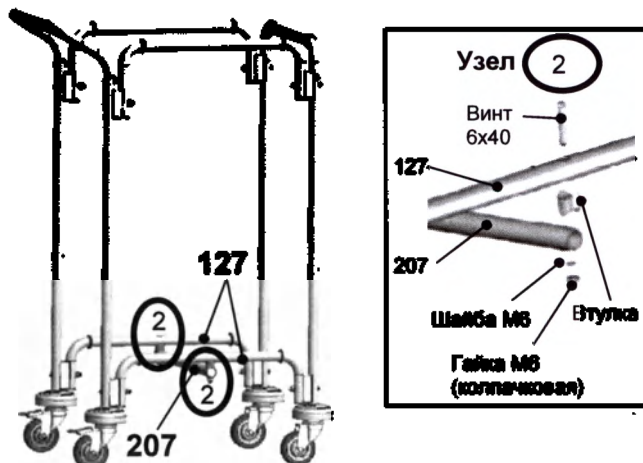


1.4

- Соединить Стойку-ручку(049) и Стойку(053) при помощи Стяжек средних (126);
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №2.

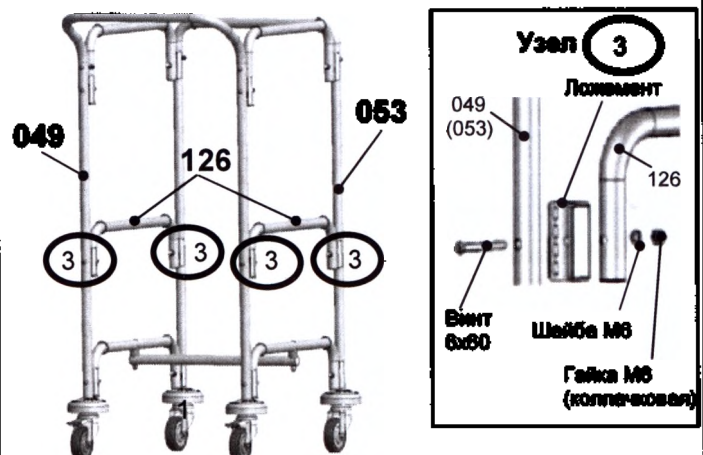

1.5

- Установить Поддон верхний на тележку;
- Установить Поддоны нижние на тележку.
- Наклеить Маркировочную табличку на ложемент;

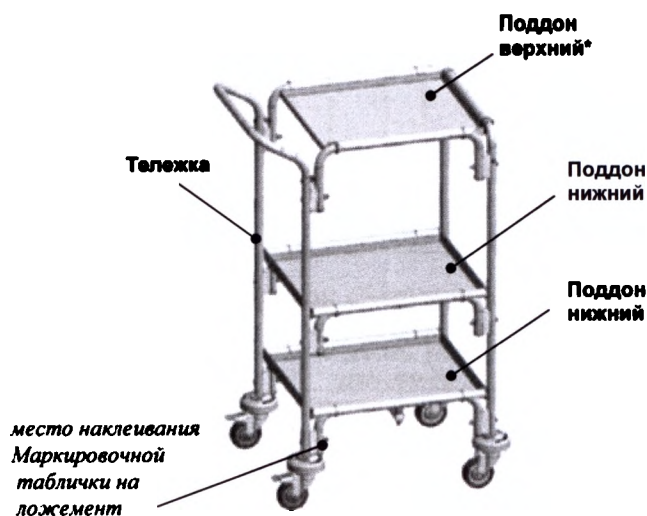

**Внимание! Внешний вид поддона верхнего зависит от исполнения тележки.*

2


Порядок установки принадлежности (при необходимости):

Держатель контейнера для сбора острого инструмента, комплект:

1. Держатель – 2 шт.
2. Кронштейн – 1 шт.
3. Винт 6х65 – 2 шт.
6. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт


2.1

- Установить Держатели на Стойку-ручку (049);
- Зафиксировать Держатели на стойке при помощи крепежных элементов из комплекта держателя контейнера для сбора острого инструмента.

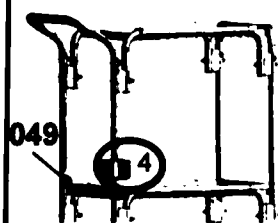


2.2

- Установить Кронштейн в отверстия Держателя;

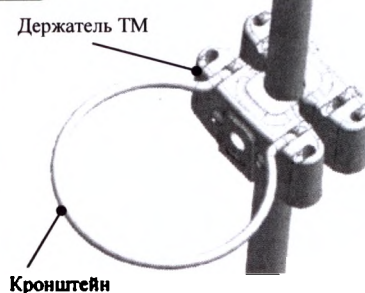

2.3

- Установить контейнер** для сбора острого инструмента в Кронштейн;

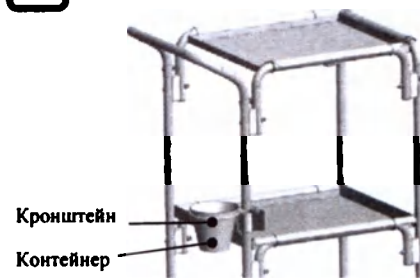

***Контейнер для сбора острого инструмента не входит в комплект поставки.*

3

Порядок установки принадлежности (при необходимости):


Контейнеры для сбора медицинских отходов, комплект:

1. Держатель – 4 шт.
2. Кронштейн №1 – 1 шт.
3. Кронштейн №2 – 1 шт.
4. Контейнер – 2 шт.
3. Винт 6х65 – 4 шт.
6. Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт.



3.1

- Установить Держатели на Стойку (053);
- Зафиксировать Держатели на стойке при помощи крепежных элементов из комплекта Контейнеры для сбора медицинских отходов.

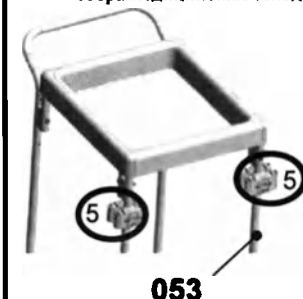


3.2

- Установить Кронштейн №1 наружный в отверстия Держателей;
- Установить Кронштейн №2 внутренний в отверстия Держателей;



3.3

- Установить Контейнеры для сбора медицинских отходов в Кронштейны;

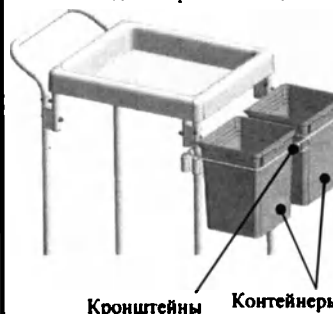

4

Порядок установки принадлежности (при необходимости):

Ящик для использования в виде лотка:

- Ящик для использования в виде лотка размещается на поддоне нижнем.

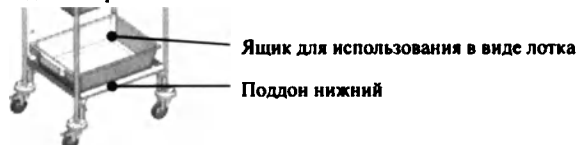




Схема сборки:

«Тележки медицинской универсальной ТМ-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50-090-11769436-2023 в исполнениях:

ТМп(н)-«КРОНТ»-7(8)п

ТМп(н)-«КРОНТ»-7(8)н

ТМп(н)-«КРОНТ»-7(8)м

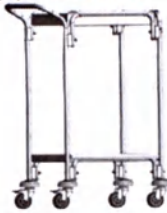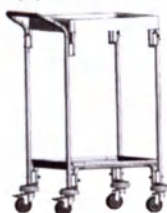

1 Порядок сборки тележки:

Для сборки тележки необходимы ключи гаечные (с открытым или кольцевым зевом 10 мм и 13 мм) и отвертка слесарно-монтажная для винтов с крестообразным шлицем (не входят в комплект поставки). Номера рамных конструкции соответствуют нанесенной на них маркировке.

Комплект крепежный №1:

1. Ложемент – 8 шт.
2. Втулка – 2 шт.
3. Винт М 6х60 – 8 шт.
4. Винт М 6х40 – 2 шт.
5. Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт.
6. Шайба ø6 – 10 шт.

Комплект колес:


- Колесо с тормозом – 2 шт.
- Колесо без тормоза – 2 шт.
- Болт 8х16 – 4 шт.
- Шайба М8 – 4 шт.

Комплект отражателей:

- Отражатель -4 шт.


1.1

- Установить Отражатели на Стойку(052) и Стойку-ручку(048);
- Установить два колеса с тормозом на Стойку-ручку(048);
- Установить два колеса без тормоза на Стойку(052);
- Зафиксировать колеса крепежными элементами из комплекта колес.

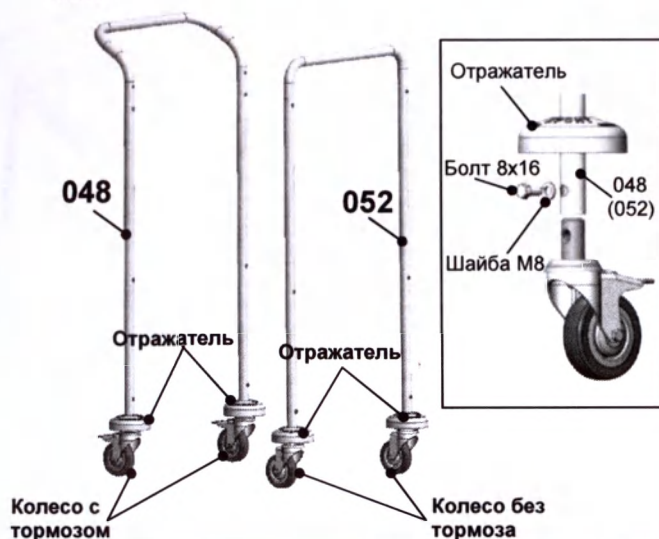


1.2

- Соединить Стойку-ручку(048) и Стойку(052) при помощи Стяжек верхних (125) и Стяжек нижних (127);
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №1.

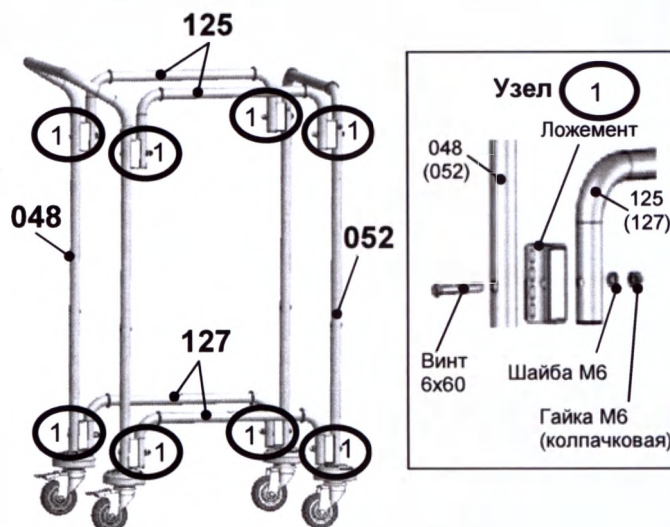


1.3

- Соединить Стяжки нижние (127) при помощи поперечины (207);
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №1.

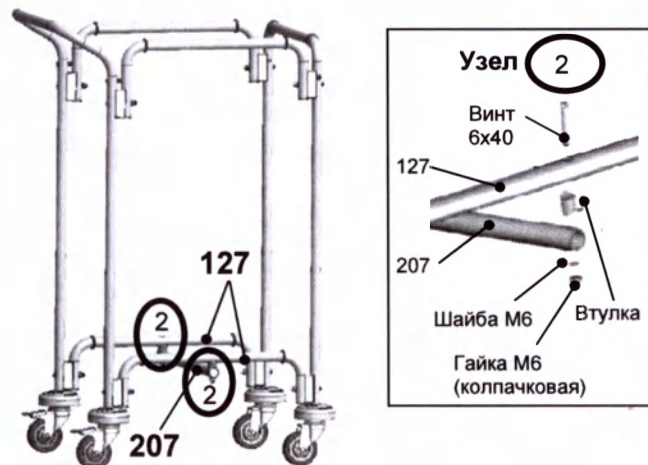

1.4

- Установить Поддон верхний на тележку;
- Установить Поддон нижний на тележку.
- Наклеить Маркировочную табличку на ложемент;

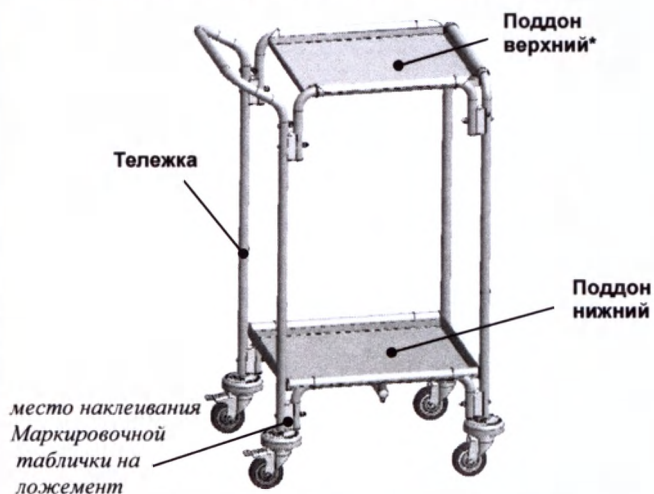

*Внимание! Внешний вид поддона верхнего зависит от исполнения тележки.

2


Порядок установки принадлежности (при необходимости):

Держатель контейнера для сбора острого инструмента, комплект:

1. Держатель – 2 шт.
2. Кронштейн – 1 шт.
3. Винт 6x65 – 2 шт.
6. Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт.


2.1

- Установить Держатели на Стойку-ручку (048);
- Зафиксировать Держатели на стойке при помощи крепежных элементов из комплекта держателя контейнера для сбора острого инструмента.

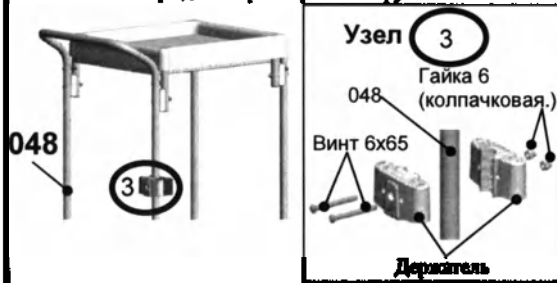

2.2

- Установить Кронштейн в отверстия Держателя;

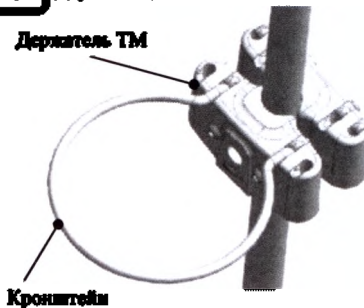

2.3

- Установить контейнер** для сбора острого инструмента в Кронштейн;



3

Порядок установки принадлежности (при необходимости):


Контейнеры для сбора медицинских отходов, комплект:

1. Держатель – 4 шт.
2. Кронштейн №1 – 1 шт.
3. Кронштейн №2 – 1 шт.
4. Контейнер – 2 шт.
3. Винт 6x65 – 4 шт.
6. Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт.



3.1

- Установить Держатели на Стойку (052);
- Зафиксировать Держатели на стойке при помощи крепежных элементов из комплекта Контейнера для сбора медицинских отходов.

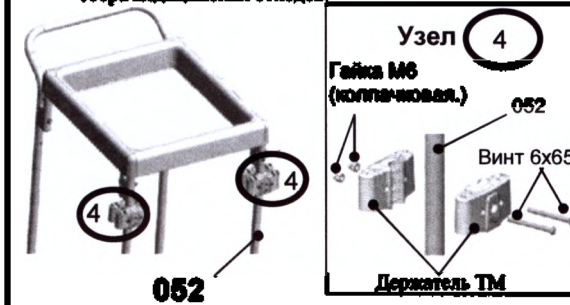


3.2

- Установить Кронштейн №1 наружный в отверстия Держателей;
- Установить Кронштейн №2 внутренний в отверстия Держателей;



3.3

- Установить Контейнеры для сбора медицинских отходов в Кронштейны;

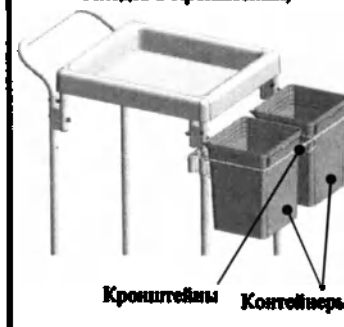

4

Порядок установки принадлежности (при необходимости):

Ящик для использования в виде лотка:

- Ящик для использования в виде лотка размещается на поддоне нижнем.


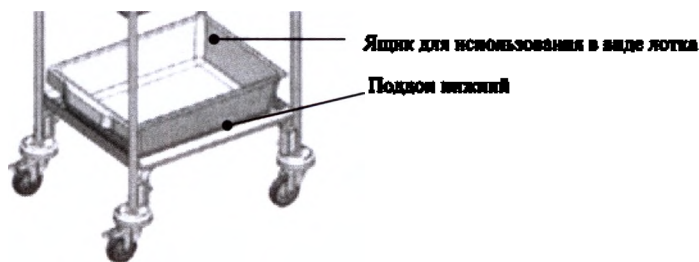


Схема сборки:
«Тележки медицинской универсальной ТМ-«КРОНТ»
 по ТУ 32.50.50-090-11769436-2023 в исполнении:
ТМп-«КРОНТ»-9п

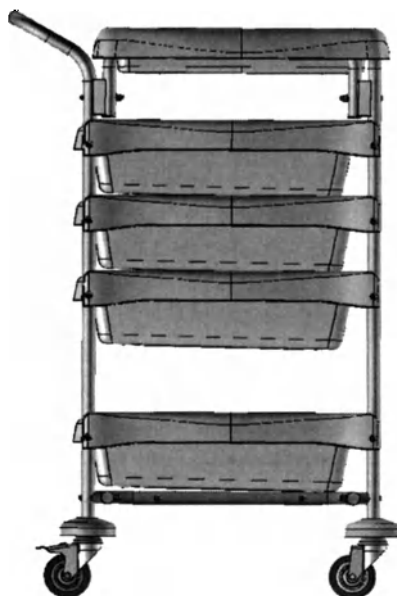

1 Порядок сборки тележки:

Для сборки тележки необходимы ключи гаечные (с открытым или кольцевым зевом 10 мм и 13 мм) и отвертка слесарно-монтажная для винтов с крестообразным шлицем (не входят в комплект поставки). Номера рамных конструкций соответствуют нанесенной на них маркировке.

Комплект крепежный №3:

1. Винт М 5х30 – 16 шт.
2. Гайка М5 (копачковая) – 16 шт.
3. Шайба ø5 – 16 шт.

Комплект крепежный №6:

1. Ложемент – 6 шт.
2. Втулка – 4 шт.
3. Винт М 6х60 – 10 шт.
4. Гайка М6 (копачковая) – 10 шт.
5. Шайба ø6 – 10 шт.


Комплект колес:

- Колесо с тормозом – 2 шт.
- Колесо без тормоза – 2 шт.
- Болт 8х16 – 4 шт.
- Шайба М8 – 4 шт.


Комплект отражателей:

- Отражатель – 4 шт.


- 1.1**
- Установить Отражатели на Стойку(056) и Стойку-ручку(057);
 - Установить два колеса с тормозом на Стойку-ручку(057);
 - Установить два колеса без тормоза на Стойку(056);
 - Зафиксировать колеса крепежными элементами из комплекта колес.

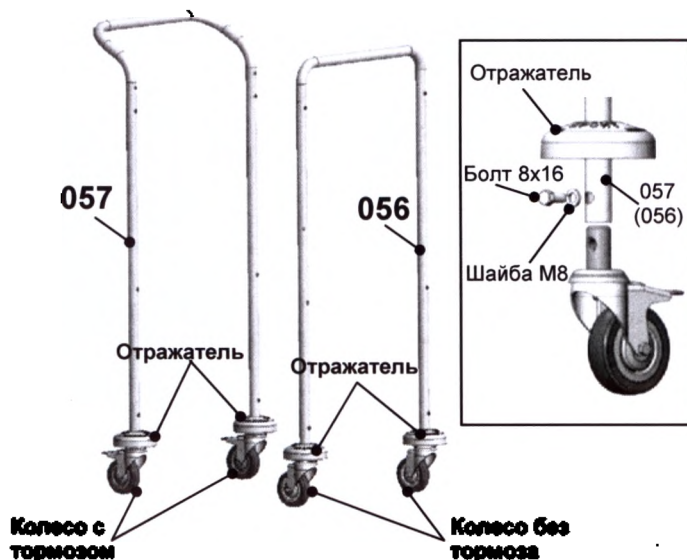


- 1.2**
- Соединить Стойку-ручку(057) и Стойку(056) при помощи Стяжек верхних (132);
 - Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №6.

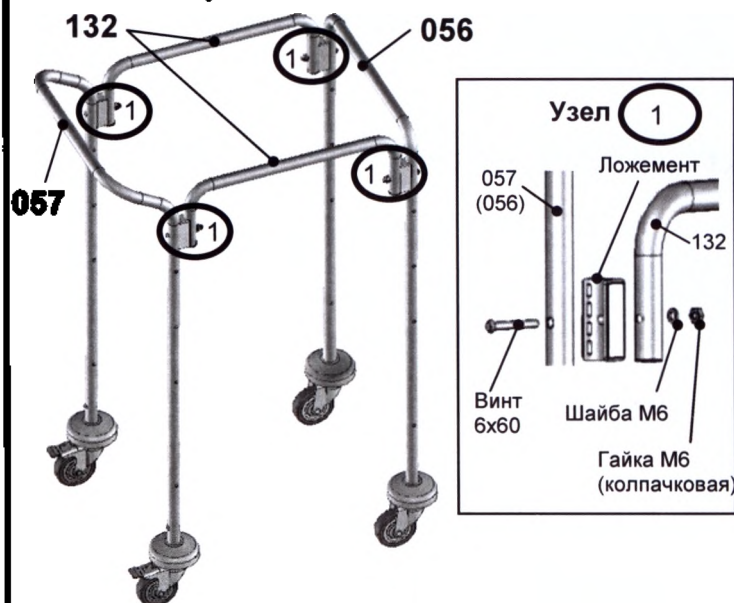


- Соединить Стяжки нижние (133) между собой;
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №6.

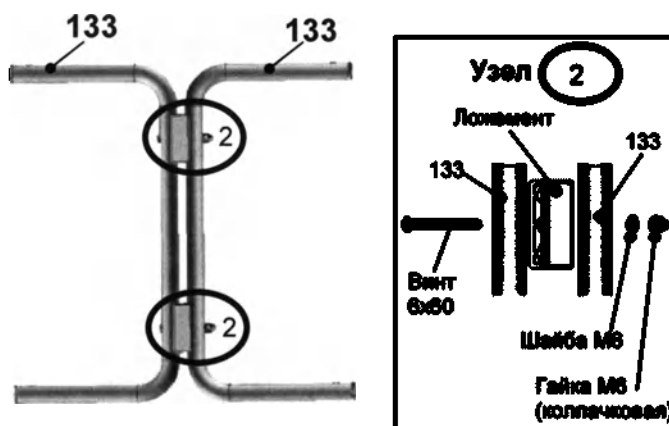

- 1.4** - Соединить Стойку-ручку(057) и Стойку(056) при помощи Стяжек нижних (133)
- Зафиксировать соединение крепежными элементами из комплекта крепежного №6.

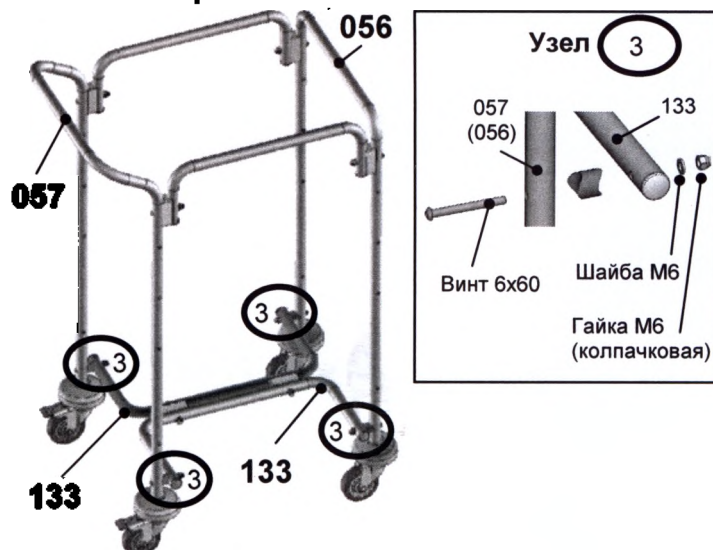

- 1.5** - Установить направляющие на Стойку(056) и Стойку-ручку(057);
- Зафиксировать направляющие крепежными элементами из комплекта крепежного №5.

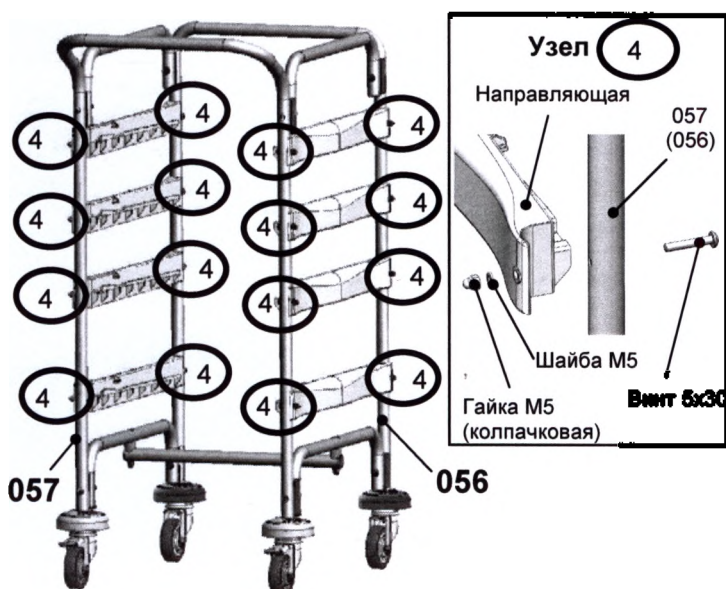

- 1.6** - Установить Поддон верхний на тележку;
- Установить ящики на направляющие;
- Наклеить Маркировочную табличку на ложемент;



Прошнуровано и скреплено

печатью 10 листов



Генеральный директор
В.П.Сизиков



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

«Тележка медицинская универсальная
ТМ-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50-090-11769436-2023

Комплект поставки Тележки медицинской универсальной ТМ-«КРОНТ»:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Тележка (согласно спецификации), комплект	1
2.	Маркировочная табличка	1
3.	Схема сборки	1
4.	Упаковочный лист	1
5.	Паспорт	1

Спецификация (состав) комплекта Тележка:

Наименование		Количество исполнение ТМ-«КРОНТ»				
		ТМп(н) «КРОНТ» 1(3)	ТМп(н) «КРОНТ» 2(4)	ТМп(н) «КРОНТ» 5(6)	ТМп(н) «КРОНТ» 7(8)	ТМп- «КРОНТ» 9п
1.	Стойка	1	1	1	1	1
2.	Стойка-ручка	1	1	1	1	1
3.	Стяжка верхняя	2	2	2	2	2
4.	Стяжка средняя	2	-	2	-	-
5.	Стяжка нижняя	2	2	2	2	2
6.	Поперечина	1	1	1	1	-
7.	Направляющие	-	-	-	-	8
8.	Поддон верхний	1	1	1	1	1
9.	Поддон нижний	2	1	2	1	-
10.	Кожух с ящиком (с установленным замком)	1	2	-	-	-
11.	Ящик	-	-	-	-	4
12.	Комплект колес: - Колесо с тормозом – 2 шт. - Колесо без тормоза – 2 шт. - Болт 8х16 – 4 шт. - Шайба М8 – 4 шт.	1	1	1	1	1
13.	Комплект отражателей: - Отражатель – 4 шт.	1	1	1	1	1
14.	Комплект крепежный №1: - Ложемент – 8 шт. - Втулка – 2 шт. - Винт М 6х60 – 8 шт. - Винт М 6х40 – 2 шт. - Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт.	1	1	1	1	-

15.	Комплект крепежный №2: - Ложемент – 4 шт. - Винт М 6х60 – 4 шт. - Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт. - Шайба ø6 – 4 шт.	1	-	1	-	-
16.	Комплект крепежный №3: - Винт М 5х30 – 4 шт. - Гайка М5 (самоконтрящаяся) – 2 шт. - Гайка М5 (колпачковая) – 2 шт. - Шайба М5 – 4 шт.	1	1	-	-	-
17.	Комплект крепежный №4: - Винт М 5х30 – 4 шт. - Гайка М5 (колпачковая) – 4 шт. - Шайба М5 – 4 шт.	-	1	-	-	-
18.	Комплект крепежный №5: - Винт М 5х30 – 16 шт. - Гайка М5 (колпачковая) – 16 шт. - Шайба М5 – 16 шт.	-	-	-	-	1
19.	Комплект крепежный №6: - Ложемент – 6 шт. - Втулка – 4 шт. - Винт М 6х60 – 10 шт. - Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт. - Шайба ø6 – 10 шт.	-	-	-	-	1

Принадлежности (при необходимости):

Наличие в комплекте поставки	Наименование/состав	Количество
	1. Держатель контейнера для сбора острого инструмента, комплект: - Держатель – 2 шт. - Кронштейн – 1 шт. - Винт 6х65 – 2 шт. - Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт.	1
	2. Контейнеры для сбора медицинских отходов, комплект: - Держатель – 4 шт. - Кронштейн №1 – 1 шт. - Кронштейн №2 – 1 шт. - Контейнер – 2 шт. - Винт 6х65 – 4 шт. - Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт.	1
	3. Ящик для использования в виде лотка	1

Упаковщик №

Дата упаковывания

В.П. СИЗИКОВ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРОНТ-М»

Тележка медицинская универсальная
ТМ-«КРОНТ»
по ТУ 32.50.50-090-11769436-2023

П А С П О Р Т
КРПФ.942819.4500ПС
ред.2

Прошнуровано и скреплено
печатью _____ листов

г. Химки
Московская область

2.6. Габаритные размеры ящика:

- Внешние размеры: (450x350x120) ±20 мм;
- Внутренние размеры: (375x270x100) ±20 мм

2.7. Габаритные размеры принадлежностей:

2.7.1. Комплект: «Держатель контейнера для сбора острого инструмента»:

- Диаметр держателя: (100 – 120) мм

2.7.2. Комплект: «Контейнеры для сбора медицинских отходов»:

- Внешние размеры контейнера – (215x210x255) ±20 мм
- Объем контейнера: 8±1 л

2.7.3. Ящика для использования в виде лотка:

- Внешние размеры: (450x350x120) ±20 мм;
- Внутренние размеры: (375x270x100) ±20 мм

2.5. Наружные поверхности тележки устойчивы к дезинфекции способом протирания в соответствии с МУ 287-113, действующими методическими документами по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ для дезинфекции поверхностей.

2.6. Грузоподъемность – 40 кг

2.7. Усилие перемещения не более 120 Н.

2.8. Климатическое исполнение УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150.

2.9. Средний срок службы 5 лет.

2.10 Маркировочные символы:

2.10.1 Маркировка тележки:

Маркировочная табличка	Описание
 АО «КРОНТ-М» Тележка медицинская универсальная ТМ-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50-090-11769436-2023 в исполнении ТМ _____-«КРОНТ»-_____ РУ № _____ Россия Месяц/Год выпуска: ____/20 ____ Зав № _____	- товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; - наименование изделия; - номер регистрационного удостоверения; - месяц/год выпуска; - заводской номер; - страна происхождения.

2.10.2 На внешней стороне упаковки нанесены манипуляционные знаки

								
«Хрупкое. Осторожно»	«Верх»	«Беречь от влаги»	«Крюками не брать»	Штрих код* по заказу	«Пределы температуры»	«Предел по количеству ярусов в штабеле»	Изготовитель	Дата изготовления

*«Штрих код» может быть указан на транспортировочной табличке.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тележка поставляется в разобранном виде, по заказу может поставляться в собранном виде.

3.1. Комплект поставки Тележки медицинской универсальной ТМ-«КРОНТ»

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Тележка (согласно спецификации), комплект	1
2.	Маркировочная табличка	1
3.	Схема сборки	1
4.	Упаковочный лист	1
5.	Паспорт	1
6.	Принадлежности (при необходимости): - Держатель контейнера для сбора острого инструмента - комплект; - Контейнеры для сбора медицинских отходов – комплект. - Ящик для использования в виде лотка —шт.	1 1 1

3.2. Спецификация (состав) комплекта Тележка:

Таблица 4

Наименование		Количество исполнение ТМ-«КРОНТ»				
		ТМп(н) «КРОНТ» 1(3)	ТМп(н) «КРОНТ» 2(4)	ТМп(н) «КРОНТ» 5(6)	ТМп(н) «КРОНТ» 7(8)	ТМп- «КРОНТ» 9п
1.	Стойка	1	1	1	1	1
2.	Стойка-ручка	1	1	1	1	1
3.	Стяжка верхняя	2	2	2	2	2
4.	Стяжка средняя	2	-	2	-	-
5.	Стяжка нижняя	2	2	2	2	2
6.	Поперечина	1	1	1	1	-
7.	Направляющие	-	-	-	-	8
8.	Поддон верхний	1	1	1	1	1
9.	Поддон нижний	2	1	2	1	-
10.	Кожух с ящиком (с установленным замком)	1	2	-	-	-
11.	Ящик	-	-	-	-	4
12.	Комплект колес: - Колесо с тормозом – 2 шт. - Колесо без тормоза – 2 шт. - Болт 8x16 – 4 шт. - Шайба М8 – 4 шт.	1	1	1	1	1
13.	Комплект отражателей: - Отражатель -4 шт.	1	1	1	1	1
14.	Комплект крепежный №1:	1	1	1	1	-

	- Ложемент – 8 шт. - Втулка – 2 шт. - Винт М 6х60 – 8 шт. - Винт М 6х40 – 2 шт. - Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт. - Шайба ø6 – 10 шт.				
15.	Комплект крепежный №2: - Ложемент – 4 шт. - Винт М 6х60 – 4 шт. - Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт. - Шайба ø6 – 4 шт.	1	-	1	-
16.	Комплект крепежный №3: - Винт М 5х30 – 4 шт. - Гайка М5 (самоконтрящаяся) – 2 шт. - Гайка М5 (колпачковая) – 2 шт. - Шайба М5 – 4 шт.	1	1	-	-
17.	Комплект крепежный №4: - Винт М 5х30 – 4 шт. - Гайка М5 (колпачковая) – 4 шт. - Шайба М5 – 4 шт.	-	1	-	-
18.	Комплект крепежный №5: - Винт М 5х30 – 16 шт. - Гайка М5 (колпачковая) – 16 шт. - Шайба М5 – 16 шт.	-	-	-	1
19.	Комплект крепежный №6: - Ложемент – 6 шт. - Втулка – 4 шт. - Винт М 6х60 – 10 шт. - Гайка М6 (колпачковая) – 10 шт. - Шайба ø6 – 10 шт.				1

3.3. Состав принадлежностей (при необходимости):

Таблица 5

1.	Держатель контейнера для сбора острого инструмента, комплект: - Держатель – 2 шт. - Кронштейн – 1 шт. - Винт 6х65 – 2 шт. - Гайка М6 (колпачковая) – 2 шт.
2.	Контейнеры для сбора медицинских отходов, комплект: - Держатель – 4 шт. - Кронштейн №1 – 1 шт. - Кронштейн №2 – 1 шт. - Контейнер – 2 шт. - Винт 6х65 – 4 шт. - Гайка М6 (колпачковая) – 4 шт.

3. СБОРКА ТЕЛЕЖКИ

4.1 Освободить составляющие части тележки от упаковки.

4.2. На один из ложементов наклеить маркировочную табличку, предварительно сняв защитный слой с клеящейся поверхности. Место установки ложемента с табличкой указано на схеме сборки.

4.4. Сборка тележки производится в соответствии со схемой сборки, входящей в комплект поставки.

Внимание!!! Для сборки тележки необходимы ключи гаечные (с открытым или кольцевым зевом 10 мм и 13 мм) и отвертка слесарно-монтажная для винтов с крестообразным шлицем (не входят в комплект поставки). Номера рамных конструкции соответствуют нанесенной на них маркировке.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Не реже 1 раза в месяц проверять затяжку всех крепежных элементов тележки, при необходимости подтянуть.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«Тележка медицинская универсальная ТМ-«КРОНТ» в исполнениях (*) по ТУ 32.50.50-090-11769436-2023 признана годной к эксплуатации и соответствует техническим условиям.




Заводской номер _____

(*)Исполнения ТМ-«КРОНТ»:

Нижний поддон: из металла ☐

из пластика ☐

ТМп-«КРОНТ»-1п ☐ ТМн-«КРОНТ»-3п ☐ 	ТМп-«КРОНТ»-1н ☐ ТМн-«КРОНТ»-3н ☐ 	ТМп-«КРОНТ»-1м ☐ ТМн-«КРОНТ»-3м ☐ 
ТМп-«КРОНТ»-2п ☐ ТМн-«КРОНТ»-4п ☐ 	ТМп-«КРОНТ»-2н ☐ ТМн-«КРОНТ»-4н ☐ 	ТМп-«КРОНТ»-2м ☐ ТМн-«КРОНТ»-4м ☐ 

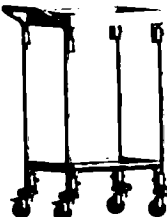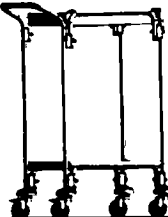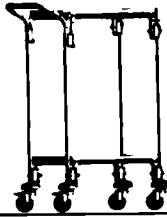ТМп-«КРОНТ»-5п ☐ ТМн-«КРОНТ»-6п ☐ 	ТМп-«КРОНТ»-5н ☐ ТМн-«КРОНТ»-6н ☐ 	ТМп-«КРОНТ»-5м ☐ ТМн-«КРОНТ»-6м ☐ 
ТМп-«КРОНТ»-7п ☐ ТМн-«КРОНТ»-8п ☐ 	ТМп-«КРОНТ»-7н ☐ ТМн-«КРОНТ»-8н ☐ 	ТМп-«КРОНТ»-7м ☐ ТМн-«КРОНТ»-8м ☐ 
ТМп-«КРОНТ»-9п ☐ 	Принадлежности (при необходимости):	
☐ комплект держателя контейнера для сбора острого инструмента 	☐ Комплект контейнеров для сбора медицинских отходов 	☐ ящик для использования в виде лотка 

Дата изготовления _____ Подпись (и/или) штамп ОТК _____

Штамп предприятия

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Тележка в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от -50 °С до +40 °С;
- относительная влажность воздуха не более 98 % при температуре 25 °С, при более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной;
- в помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, вызывающих коррозию металла.
- Число рядов тележек на стеллаже не должно превышать- 10 шт.

7.2. Тележка должна транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя.

Допускается транспортирование всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 100 % при температуре +25 °С.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. Утилизация Аппарата после истечения срока службы должна производиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым коммунальным отходам).

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям ТУ 32.50.50-090-11769436-2023.

9.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не влекущие ухудшения технических характеристик тележки.

9.3. Гарантийный срок – 2 года со дня изготовления изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 2 года.

9.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его части в случае неисправности

при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Срок устранения неисправности не более 30 дней после получения изготовителем.

9.5. При отправке тележки на гарантийный ремонт необходимо заполнить гарантийный талон.

Внимание! Предприятие-изготовитель оплачивает услуги транспортной компании по доставке и отправке оборудования при гарантийном ремонте от терминала в городе потребителя до терминала в городе Москве и обратно.

Для ускорения процесса доставки предпочтительно пользоваться услугами транспортной компании Деловые линии.

ВНИМАНИЕ: Грузополучатель АО «КРОНТ-М», ИНН5047004056, телефон +7(985)861-30-56

Адрес предприятия-изготовителя: АО «КРОНТ-М»

141402, МО, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1

Тел./факс +7(495) 500-48-84 (многоканальный).

E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com.

Сервисный центр: телефон +7(985)861-30-56, E-mail: service@kront.com

☎ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ +7(495) 500-48-84

Внимание! В послегарантийный период предприятие-изготовитель осуществляет на договорной основе ремонт тележки медицинской универсальной ТМ-«КРОНТ».

АО «КРОНТ-М»

Россия, 141402, МО, г. Химки, ул. Спартаковская, 9 пом.1,

тел. +7(495) 500-48-84 (многоканальный)

E-mail: info@kront.com, Internet: www.kront.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт Тележки медицинской универсальной ТМ-«КРОНТ»

в исполнении ☐ ТМп-«КРОНТ» - _____

☐ ТМв-«КРОНТ» - _____

Нижний поддон: из металла ☐

из пластика ☐

Комплект держателя ☐

Комплект контейнеров ☐ Ящик ☐

зав. № _____

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г.

Штамп предприятия

_____ подпись, штамп ОТК

Владелец и его адрес _____

название организации (полностью)

индекс, город, область/район, улица, дом, строение, телефон

Характер неисправности _____

заполняется лицом, ответственным за техническое обслуживание

Контактное лицо, ответственное за техническое обслуживание: _____

ФИО, телефон, e-mail

Дата возникновения неисправности _____

Подпись _____

Выполнена работа по устранению неисправностей: _____

дата

подпись

Штамп предприятия

