



Руководство по эксплуатации

Матрасы противопротезные «Orthoforma» с компрессором.

1. Установите компрессор на ровное место у ног больного или подвесьте за крюк
2. Положите матрас на постель
3. соедините матрас и компрессор входящими в комплект трубками
4. Подготовьте кровать ко сну, как Вы это делаете обычно. Накройте матрас простыней большего размера, не используйте булавки для крепления простыни к матрасу (они могут проткнуть поверхность матраса). Внимание: проверьте трубки, убедитесь, что поток воздуха поступает непрерывно
5. Матрас должен лежать вверх стороной, наполненной воздухом
6. Для использования матраса в постели, сделанной из жестких материалов, необходимо подстелить под него легкое одеяло
7. Установите выключатель давления на компрессоре на максимум. Вставьте вилку в розетку. Включите компрессор. Загорится зеленая лампочка, которая будет гореть, пока прибор находится во включенном состоянии
8. Отрегулируйте переключатель давления в соответствии с весом пациента согласно таблице, имеющейся на компрессоре

Генеральный директор
ООО «Компания Ортопедических Систем»

Липнер Б.С.

Дата: 22 сентября 2008г.