



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИННОРТО»

620091, Свердловская область, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д. 11В,
ПОМЕЩ. 48, ОФИС 1.

тел. +7(922)236-21-81, e-mail: dbakanev@gmail.com

ОГРН 1226600046672, ИНН 6678122102, КПП 667801001

БИК 044525999, к/с 30101810845250000999, р/с 40702810401500141232

Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Иннорто»

Д.А. Баканев

«09»

Января

2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ медицинского изделия

**Изделия медицинские ортопедические для поддержки свода стопы, пятки
по ТУ 32.50.22-010-98981863-2023, в вариантах исполнения**

1. Наименование медицинского изделия

Изделия медицинские ортопедические для поддержки свода стопы, пятки по ТУ 32.50.22-010-98981863-2023, в вариантах исполнения

Варианты исполнения:

1. Вкладыши «INNORTO», мужские-женские, артикул 52069, типоразмер универсальный. - 1 пара.
2. Вкладыши «INNORTO», мужские-женские, артикул 65270, типоразмер универсальный. - 1 пара.
3. Пелоты «INNORTO», мужские-женские, артикул 40480, типоразмер L. - 1 пара.
4. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 21214-2.3, типоразмер 35-45. - 1 пара.
5. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 21214-3.3, типоразмер 35-45. - 1 пара.
6. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 21214-4.3, типоразмер 35-45. - 1 пара.
7. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 40589, типоразмер универсальный. - 1 пара.
8. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 40610, типоразмеры 35-38, 39-42, 43-46. - 1 пара.
9. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52057, типоразмеры M, L. - 1 пара.
10. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52058, типоразмеры M, L. - 1 пара.
11. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52059, типоразмеры M, L. - 1 пара.
12. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52061, типоразмер 37-46. - 1 пара.
13. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52062, типоразмер 37-46. - 1 пара.
14. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52063, типоразмер 37-46. - 1 пара.
15. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52075-синий, типоразмер универсальный. - 1 пара.
16. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52075-черный, типоразмер универсальный. - 1 пара.
17. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52119, типоразмер универсальный. - 1 пара.
18. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52120-35-38, типоразмер 35-38. - 1 пара.
19. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 52120-39-42, типоразмер 39-42. - 1 пара.
20. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 55868-35-39, типоразмер 35-39. - 1 пара.
21. Подпяточники «INNORTO», мужские-женские, артикул 55868-40-46, типоразмер 40-46. - 1 пара.
22. Подушечки «INNORTO», мужские-женские, артикул 52034, типоразмер универсальный. - 1 пара.
23. Подушечки «INNORTO», мужские-женские, артикул 52040, типоразмеры 35-39, 40-46. - 1 пара.
24. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 21293, типоразмер универсальный. - 1 пара.
25. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 40164, типоразмер универсальный. - 1 пара.
26. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 40829, типоразмер универсальный. - 1 пара.
27. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 47933, типоразмер универсальный. - 1 пара.
28. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 49313, типоразмер универсальный. - 1 пара.
29. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 50443, типоразмер универсальный. - 1 пара.
30. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 52065, типоразмер универсальный. - 1 пара.
31. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 52125, типоразмеры 35-39, 40-44. - 1 пара.
32. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 52142, типоразмеры 37-41, 42-48. - 1 пара.
33. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 52148, типоразмер 35-38. - 1 пара.
34. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 52363, типоразмеры XS, S. - 1 пара.
35. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 60006, типоразмеры 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46. - 1 пара.
36. Полустельки «INNORTO», мужские-женские, артикул 80008, типоразмеры 35-36, 37-38, 39-40, 41-42. - 1 пара.
37. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 21226, типоразмер 35-41. - 1 пара.
38. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 21229, типоразмер универсальный. - 1 пара.
39. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 30124, типоразмеры 35-38, 39-44. - 1 пара.
40. Стельки «INNORTO», мужские, женские, артикул 30125, типоразмеры 35-38, 39-42. - 1 пара.
41. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 30135, типоразмеры 35-39, 40-42,5. - 1 пара.
42. Стельки «INNORTO», мужские, женские, артикул 40004, типоразмеры 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44. - 1 пара.
43. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 40822, типоразмеры 36-42, 43-47. - 1 пара.
44. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 40830, типоразмер 35-40. - 1 пара.

45. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 50376-23, типоразмер 35-41. - 1 пара.
46. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 50376-33, типоразмер 35-41. - 1 пара.
47. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 50376-43, типоразмер 35-41. - 1 пара.
48. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52001, типоразмер универсальный. - 1 пара.
49. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52066, типоразмеры 35-38, 39-41. - 1 пара.
50. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52067, типоразмеры 35-38, 39-43. - 1 пара.
51. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52068, типоразмеры 35-39, 40-43. - 1 пара.
52. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52112, типоразмеры 34-35, 36-37. - 1 пара.
53. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52115-35-41, типоразмер 35-41. - 1 пара.
54. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52115-42-46, типоразмер 42-46. - 1 пара.
55. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52117, типоразмеры 38-43, 44-47. - 1 пара.
56. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52118, типоразмеры 36-42, 43-47. - 1 пара.
57. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52122, типоразмеры 35-42, 43-46. - 1 пара.
58. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52123, типоразмеры 37-41, 42-48. - 1 пара.
59. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52124, типоразмеры 37-43, 44-48. - 1 пара.
60. Стельки «INNORTO», мужские, женские, артикул 52126, типоразмеры 35-37, 38-40, 41-43, 44-46. - 1 пара.
61. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52127, типоразмеры 36-41, 42-46. - 1 пара.
62. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52129, типоразмеры 36-42, 43-47. - 1 пара.
63. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52131, типоразмер 41-46. - 1 пара.
64. Стельки «INNORTO», детские, артикул 52132, типоразмеры 21-24, 25-28, 29-31, 32-35. - 1 пара.
65. Стельки «INNORTO», мужские, женские, артикул 52133, типоразмеры 36-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46. - 1 пара.
66. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52134, типоразмер 43-48. - 1 пара.
67. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52135, типоразмеры 35-39, 40-45. - 1 пара.
68. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52137, типоразмеры 37-42, 43-47. - 1 пара.
69. Стельки «INNORTO», мужские, женские, артикул 52138, типоразмеры 35-38, 39-45. - 1 пара.
70. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52139, типоразмеры 37-41, 42-45. - 1 пара.
71. Стельки «INNORTO», мужские, женские, артикул 52140, типоразмеры 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44. - 1 пара.
72. Стельки «INNORTO», мужские, женские, артикул 52141, типоразмеры 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45. - 1 пара.
73. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52144, типоразмер 35-39. - 1 пара.
74. Стельки «INNORTO», мужские, артикул 52145, типоразмеры 37-41, 42-46. - 1 пара.
75. Стельки «INNORTO», детские, артикул 52146, типоразмеры 36-38, 39-41. - 1 пара.
76. Стельки «INNORTO», детские, артикул 52248, типоразмер 35-39. - 1 пара.
77. Стельки «INNORTO», детские, артикул 63939-синий, типоразмер 36-40. - 1 пара.
78. Стельки «INNORTO», детские, артикул 63939-прозрачный, типоразмер 36-40. - 1 пара.
79. Стельки «INNORTO», мужские, женские, артикул 90084, типоразмеры 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46. - 1 пара.
80. Стельки «INNORTO» детские, артикул 52150, типоразмеры 23-24, 25-27, 28-30, 31-34. - 1 пара.
81. Стельки под пятку «INNORTO», мужские-женские, артикул 40600, типоразмеры 35-39, 40-46. - 1 пара.
82. Стельки под пятку «INNORTO», мужские-женские, артикул 40608, типоразмеры 35-39, 40-46. - 1 пара.
83. Стяжки для стопы «INNORTO», мужские-женские, артикул 21312, типоразмер универсальный. - 1 пара.
84. Стяжки для стопы «INNORTO», мужские-женские, артикул 21328, типоразмер универсальный. - 1 пара.
85. Стяжки для стопы «INNORTO», мужские-женские, артикул 50058, типоразмер универсальный. - 1 пара.
86. Стяжки для стопы «INNORTO», мужские, артикул 50127, типоразмер универсальный. - 1 пара.
87. Стяжки для стопы «INNORTO», мужские-женские, артикул 51397, типоразмер универсальный. - 1 пара.

88. Супинаторы «INNORTO», мужские-женские, артикул 40824, типоразмер универсальный. - 1
89. Супинаторы «INNORTO», мужские-женские, артикул 52331Б, типоразмеры S, L. - 1 пара.
90. Супинаторы «INNORTO», мужские-женские, артикул 52331П, типоразмеры S, L. - 1 пара.
91. Супинаторы «INNORTO», мужские-женские, артикул 52331Р, типоразмеры S, L. - 1 пара.
Инструкция по применению – 1 шт.

2. Производитель:

ООО «Иннорто»

620091, Свердловская область, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ
КОСМОНАВТОВ, Д. 11В, ПОМЕЩ. 48, ОФИС 1.

Адрес места производства медицинского изделия:

«Dongguan City Since Household Care Co., Ltd.», адрес: Китай, No. 11, River Road 1st Road, Baihao
District, Houjie Town, Dongguan, Guangdong, China.

Телефоны для принятия претензий от потребителя:

+7(922)236-21-81.

3. Медицинское
по Ту 32
предназ
боле
по

3. Назначение

Медицинское изделие «Изделия медицинские ортопедические для поддержки свода стопы, пятки по ТУ 32.50.22-010-98981863-2023, в вариантах исполнения» (далее по тексту – изделие), предназначено для обеспечения дополнительной поддержки свода стопы и пятки с целью разгрузки болезненных участков поверхности деформированных стоп взрослых и детей при продольно-поперечном, продольном, поперечном плоскостопии, а также при пяточных шпорах.

4. Область применения:

Ортопедия. Изделия применяются для оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических и клинических учреждениях различного профиля, а также для домашнего применения.

5. Потенциальный потребитель:

✓ пользователь/пациент без специальной подготовки (при индивидуальном/ самостоятельном использовании в домашних условиях).

✓ По половозрастным группам изделия делятся на взрослые и детские подростковые. Взрослые – для пользователей старше 18 лет. Детские, подростковые – для пользователей младше 18 лет. Взрослые подразделяются на мужские и женские, а также мужские-женские (подходит как для женщин, так и для мужчин).

Медицинские изделия многоразового применения.

6. Условия применения

Рекомендуемая температура эксплуатации от +5 до +40 °С, и влажности 90 % при температуре 25 °С.

7. Основные технические характеристики

Таблица 1. Основные параметры изделия

Вариант исполнения	Половозрастная группа	Типоразмер	Длина, А, см	Ширина, В, см	Толщина, С, см		Масса, г
					в передней части	в задней части	
1) Вкладыши «INNORTO», артикул 52069	мужские-женские	универсальный	8,3	4,9	0,2	0,9	48,4
2) Вкладыши «INNORTO», артикул 65270	мужские-женские	универсальный	13	8	0,2		21,7
3) Пелоты «INNORTO», артикул 40480	мужские-женские	L	8,7	4,7	1		31,9
4) Подпяточники «INNORTO», артикул 21214-2.3	мужские-женские	35-45	12,5	6	0,2	4,4	42,6
5) Подпяточники «INNORTO», артикул 21214-3.3	мужские-женские	35-45	12,5	6	0,1	3,3	42,6
6) Подпяточники «INNORTO», артикул 21214-4.3	мужские-женские	35-45	12,5	6	0,1	4,3	45,2
7) Подпяточники «INNORTO», артикул 40589	мужские-женские	универсальный	9	5	0,2	1	35,5
8) Подпяточники «INNORTO», артикул 40610	мужские-женские	35-38	8,5	5,5	0,5		46,3
		39-42	9,5	6	0,2	0,7	60,5
		43-46	10,5	6,6	0,4		73,5
		M	5,3	8,4	1		45,4

Вариант исполнения	Половозрастная группа	Типоразмер	Длина, А, см	Ширина, В, см	Толщина, С, см		
					в передней части	в задней части	
9) Подпяточники «INNORTO», артикул 52057	мужские-женские	L	6	9	1		58
10) Подпяточники «INNORTO», артикул 52058	мужские-женские	M	5,5	8,3	0,1	2	108,6
		L	6	9	0,1	2	84,6
11) Подпяточники «INNORTO», артикул 52059	мужские-женские	M	5	8,5	0,1	3	118
		L	6,3	9,1	0,1	3	159,9
12) Подпяточники «INNORTO», артикул 52061	мужские-женские	37-46	11	6,2	0,3	3,5	188,2
13) Подпяточники «INNORTO», артикул 52062	мужские-женские	37-46	10,7	6,2	0,3	2,5	124
14) Подпяточники «INNORTO», артикул 52063	мужские-женские	37-46	10,7	6,2	0,3	1,5	59,4
15) Подпяточники «INNORTO», артикул 52075-синий	мужские-женские	универсальный	12,2	6,8	0,3	3,5	87,1
16) Подпяточники «INNORTO», артикул 52075-черный	мужские-женские	универсальный	12,2	6,8	0,3	3,5	87,1
17) Подпяточники «INNORTO», артикул 52119	мужские-женские	универсальный	14,5	8,3	0,4	0,8	72,9
18) Подпяточники «INNORTO», артикул 52120-35-38	мужские-женские	35-38	11	6,1	0,4		31,9
19) Подпяточники «INNORTO», артикул 52120-39-42	мужские-женские	39-42	11,3	7,3	0,7		47,4
20) Подпяточники «INNORTO», артикул 55868-35-39	мужские-женские	35-39	10,5	6	0,6		58
21) Подпяточники «INNORTO», артикул 55868-40-46	мужские-женские	40-46	11	7	0,6		78
22) Подушечки «INNORTO», артикул 52034	мужские-женские	универсальный	8,5	6,7	0,2		30,2
23) Подушечки «INNORTO», артикул 52040	мужские-женские	35-39	8,5	5,5	0,5		32,1
		40-46	9,5	6,5	0,7		51,4
24) Полустельки «INNORTO», артикул 21293	мужские-женские	универсальный	14	6	1,5	3/1,5/1,5	226
25) Полустельки «INNORTO», артикул 40164	мужские-женские	универсальный	9,5	6,3	0,3		25,8

Вариант исполнения	Половозрастная группа	Типоразмер	Длина, А, см	Ширина, В, см	Толщина, С, см		Масса, г
					в передней части	в задней части	
26) Полустельки «INNORTO», артикул 40829	мужские-женские	универсальный	12,5	6	0,8		37,5
27) Полустельки «INNORTO», артикул 47933	мужские-женские	универсальный	13	7	0,25	3,3/1,65	141,6
28) Полустельки «INNORTO», артикул 49313	мужские-женские	универсальный	12	5,6	0,1	2/1,5	116,7
29) Полустельки «INNORTO», артикул 50443	мужские-женские	универсальный	19	6,5	1		66
30) Полустельки «INNORTO», артикул 52065	мужские-женские	универсальный	15,5	8	0,1	3	135
31) Полустельки «INNORTO», артикул 52125	мужские-женские	35-39	17,5	8	0,1	0,7	104,7
		40-44	19,5	9,2	0,1	0,7	133,4
32) Полустельки «INNORTO», артикул 52142	мужские-женские	37-41	17,5	8	0,5		96
	мужские-женские	42-48	20,8	9,4	0,5		131,8
33) Полустельки «INNORTO», артикул 52148	мужские-женские	35-38	19	6,7	0,3		67,8
34) Полустельки «INNORTO», артикул 52363	мужские-женские	XS	17,8	9	0,5		81,8
		S	18	9	0,5	0,7	91,7
35) Полустельки «INNORTO», артикул 60006	мужские-женские	35-36	14,5	6,5	0,3	0,5	44,1
		37-38	15,8	7,1	0,3	0,5	52
		39-40	17	7,5	0,3	0,5	61,7
		41-42	17,6	7,9	0,3	0,5	67
		43-44	18,	8,2	0,3	0,5	64,9
		45-46	19,5	8,6	0,3	0,5	83,9
36) Полустельки «INNORTO», артикул 80008	мужские-женские	35-36	20,2	7,5	0,3		40,5
		37-38	21,2	7,5	0,3		37,5
		39-40	22,1	7,5	0,3		40,1
		41-42	23,2	7,5	0,3		45
37) Стельки «INNORTO», артикул 21226, типоразмер	мужские	35-41	27	8,5	0,4	3,3/1,9/1,9	306
38) Стельки «INNORTO», артикул 21229, типоразмер	мужские	универсальный	27,5	8,4	0,3	3/2/2/2	367
39) Стельки «INNORTO», артикул 30124, типоразмеры,	мужские	35-38	25,5	9	0,6	1	68,6
		39-44	28,5	10	0,6	1	82,9
40) Стельки «INNORTO», артикул 30125	женские	35-38	24,5	8,1	1		24,6
	мужские	39-42	28,5	9,1	1		32,1
	мужские	35-39	25,8	8,8	0,3	0,6	52

Вариант исполнения	Половозрастная группа	Типоразмер	Длина, А, см	Ширина, В, см	Толщина, С, см		
					в передней части	в задней части	
41) Стельки «INNORTO», артикул 30135		40-42,5	28,8	9,5	0,3	0,6	56,4
42) Стельки «INNORTO», артикул 40004	женские	35-36	23,7	7,9	0,3	0,5	61
	женские	37-38	24,7	9	0,3	0,5	67
	мужские	39-40	25,8	9,4	0,3	0,5	83
	мужские	41-42	26,6	8,7	0,3	0,5	84
	мужские	43-44	28,5	9,4	0,3	0,5	112
43) Стельки «INNORTO», артикул 40822	мужские	36-42	28	8,5	0,5		136,6
		43-47	30,5	9,6	0,5		181
44) Стельки «INNORTO», артикул 40830	детские	35-40	20,8	6,4	0,2		54,6
45) Стельки «INNORTO», артикул 50376-23	мужские	35-41	27,4	8,5	0,5	2,3	68,6
46) Стельки «INNORTO», артикул 50376-33	мужские	35-41	27,4	8,5	0,5	3,3	71,6
47) Стельки «INNORTO», артикул 50376-43	мужские	35-41	27,4	8,5	0,5	4,3	93,4
48) Стельки «INNORTO», артикул 52001	мужские	универсальный	29,2	8,5	0,2	0,7	24
49) Стельки «INNORTO», артикул 52066	мужские	35-38	25	8,6	0,2	2,3/1,7	252,5
		39-41	26,5	8,8	0,2	2,3/1,7	313,7
50) Стельки «INNORTO», артикул 52067	мужские	35-38	25,6	8,6	0,4	4/1,2	197,9
		39-43	27,4	9,2	0,1	4/1,2	219,7
51) Стельки «INNORTO», артикул 52068	мужские	35-39	25	8,7	0,5	2,5	127,1
		40-43	27,4	9,5	0,5	2,5	126,2
52) Стельки «INNORTO», артикул 52112	женские	34-35	22	6,5	0,2		69,5
		36-37	24,5	7,2	0,2		88,3
53) Стельки «INNORTO», артикул 52115-35-41	мужские	35-41	27	8,4	0,2	0,6	132,5
54) Стельки «INNORTO», артикул 52115-42-46	мужские	42-46	31,5	9,6	0,2	0,6	186,2
55) Стельки «INNORTO», артикул 52117	мужские	38-43	28	8,8	0,2	1	154,6
		44-47	31,5	9,7	0,2	1	209
56) Стельки «INNORTO», артикул 52118	мужские	36-42	27,5	8,6	0,1	0,5	138
		43-47	30,7	9,3	0,1	0,5	180,2
57) Стельки «INNORTO», артикул 52122	мужские	35-42	27	9,3	0,2	0,9	140,8
		43-46	29,5	9,7	0,2	0,9	169,9
	мужские	37-41	28	8,7	0,3	0,8	194,8

Вариант исполнения	Половозрастная группа	Типоразмер	Длина, А, см	Ширина, В, см	Толщина, С, см		Масса, г
					в передней части	в задней части	
58) Стельки «INNORTO», артикул 52123		42-48	31,5	9,6	0,3	0,8	235,2
59) Стельки «INNORTO», артикул 52124	мужские	37-43	28,2	9,3	0,4	0,5	189,6
		44-48	31	9,5	0,4	0,5	213,2
60) Стельки «INNORTO», артикул 52126	женские	35-37	24,5	8,5	0,4	1	157,4
	мужские	38-40	26	8,9	0,4	1	177,9
		41-43	27,5	9,3	0,5	0,9	199,4
		44-46	29,5	9,7	0,4	1	224,3
61) Стельки «INNORTO», артикул 52127	мужские	36-41	27,2	9	0,4	1	94,8
		42-46	31	10,2	0,4	1	148,1
62) Стельки «INNORTO», артикул 52129	мужские	36-42	27,5	9,6	0,3	0,7	195,4
		43-47	30	10,1	0,3	0,7	237,2
63) Стельки «INNORTO», артикул 52131	мужские	41-46	30,6	9,8	0,4	0,7	131,6
64) Стельки «INNORTO», артикул 52132	детские	21-24	15,5	6,3	0,2	0,6	57,8
		25-28	18,3	7	0,2	0,6	75,5
		29-31	20,3	7,5	0,2	0,6	84,4
		32-35	23	8,1	0,2	0,6	99,9
65) Стельки «INNORTO», артикул 52133	женские	36-38	24,2	8,9	0,2	0,5	87,5
	мужские	39-40	26	9	0,2	0,5	101
		41-42	27,7	9,5	0,2	0,5	104,4
		43-44	29,5	10	0,2	0,5	111,6
		45-46	30,7	10,3	0,2	0,5	112,6
66) Стельки «INNORTO», артикул 52134	мужские	43-48	31	10	0,4	1	126,7
67) Стельки «INNORTO», артикул 52135	мужские	35-39	25,2	8,2	0,4	0,8	69,5
		40-45	29	9,5	0,4	0,8	98,4
68) Стельки «INNORTO», артикул 52137	мужские	37-42	26,5	9,2	0,4	1,2	134,2
		43-47	30,2	9,7	0,4	1,2	157,6
69) Стельки «INNORTO», артикул 52138	женские	35-38	24,4	9	0,6	2	86,1
	мужские	39-45	30,4	10	0,6	2	125
70) Стельки «INNORTO», артикул 52139	мужские	37-41	28,4	8,4	0,5		134,4
		42-45	31,2	9,6	0,5		170
71) Стельки «INNORTO», артикул 52140	женские	35-36	22,7	8	0,2		67,6
		37-38	24,3	8,2	0,2		81,4
	мужские	39-40	25,6	8,9	0,2		89,2
		41-42	26,7	9,1	0,2		106,5
		43-44	28,5	9,6	0,2		103,3
72) Стельки «INNORTO», артикул 52141	женские	36-37	23,7	8,1	0,3		109,4
	мужские	38-39	25,2	8,5	0,3		123,4
		40-41	26,5	8,7	0,3		135,9
		42-43	27,7	9	0,3		147,7
		44-45	29,4	9,7	0,3		162,5
73) Стельки «INNORTO», артикул 52144	мужские	35-39	25	7,3	0,5		22,6
	мужские	37-41	26,5	9,4	0,4	1,4	106,6

Вариант исполнения	Половозрастная группа	Типоразмер	Длина, А, см	Ширина, В, см	Толщина, С, см		
					в передней части	в задней части	
74) Стельки «INNORTO», артикул 52145		42-46	29,5	10	0,4	1,4	132,6
75) Стельки «INNORTO», артикул 52146	детские	36-38	20,5	7,5	0,1	1	49
		39-41	21,5	9,2	0,1	1	52,4
76) Стельки «INNORTO», артикул 52248	детские	35-39	19,5	6,5	0,3		12,3
77) Стельки «INNORTO», артикул 63939-синий	детские	36-40	21	7,5	0,7		66,6
78) Стельки «INNORTO», артикул 63939-прозрачный	детские	36-40	21	7,5	0,7		66,6
79) Стельки «INNORTO», артикул 90084	женские	37-38	24,1	8,3	0,5		165,6
	мужские	39-40	25	8,5	0,5		177,6
		41-42	26,6	9	0,5		188,2
		43-44	27,5	9,6	0,5		204,2
		45-46	39,4	9,8	0,5		217,9
80) Стельки «INNORTO», артикул 52150	детские	23-24	14,5	5,9	0,1	0,5	25,3
		25-27	16,5	6,5	0,1	0,5	28
		28-30	19	7	0,1	0,5	32
		31-34	22,5	8,8	0,2	0,3	34,6
81) Стельки под пятку «INNORTO», артикул 40600	мужские-женские	35-39	10,8	6	0,4		30,5
		40-46	11	7,5	0,4		53,1
82) Стельки под пятку «INNORTO», артикул 40608	мужские-женские	35-39	10	6,5	0,2	0,5	54,1
		40-46	11	7	0,5		66,3
83) Стяжки для стопы «INNORTO», артикул 21312	мужские-женские	универсальный	9,5	7,5	0,7		20
84) Стяжки для стопы «INNORTO», артикул 21328	мужские-женские	универсальный	11,9	7,3	0,3	1,2	55,5
85) Стяжки для стопы «INNORTO», артикул 50058	мужские-женские	универсальный	5	28,8	0,8		68,5
86) Стяжки для стопы «INNORTO», артикул 50127	мужские	универсальный	26	5,3	0,8		43,4
87) Стяжки для стопы «INNORTO», артикул 51397	мужские-женские	универсальный	9,5	8,9	0,2		51,8

Вариант исполнения	Половозрастная группа	Типоразмер	Длина, А, см	Ширина, В, см	Толщина, С, см		Масса, г
					в передней части	в задней части	
88) Супинаторы «INNORTO», артикул 40824	мужские-женские	универсальный	9,5	5,3	0,2		27,5
89) Супинаторы «INNORTO», артикул 52331Б	мужские-женские	S	8,5	4	0,5		17,3
		L	9,6	5,5	0,5		28,1
90) Супинаторы «INNORTO», артикул 52331П	мужские-женские	S	8,5	4	0,5		20
		L	9,6	5,5	0,5		27,6
91) Супинаторы «INNORTO», артикул 52331Р	мужские-женские	S	8,5	4,7	0,2		17
		L	9,6	5,5	0,5		27

Примечание:

- 1) неуказанные предельные отклонения линейных размеров – $\pm 5\%$, предельные отклонения массы – $\pm 10\%$ или ± 1 г (большее из значений);
- 2) размеры должны соответствовать ГОСТ Р 54739 в части применимых требований (половозрастные группы: мужская, женская, детская).

8. Показания к применению

- деформация стоп;
- статическая недостаточность стоп (плоская, плоско-вальгусная стопа, распластанность переднего отдела стопы);
- неврома Мортон;
- динамическая недостаточность стоп (врожденные или ампутиационные эффекты стоп, укорочение нижней конечности);
- при диабетической патологии стоп;
- пяточная шпора;
- разность длин ног;
- подагра;
- отклонение первого пальца стопы;
- беременность;
- боли в суставах и спине;
- разгрузка болезненных участков поверхности стоп.

9. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость материала – аллергические реакции.

10. Возможные побочные действия

Возникновение индивидуальных аллергических реакций.

11. Меры предосторожности при применении

Стирка изделий не допускается.

Не использовать стиральный порошок.

Не гладить.

Не отбеливать.

Изделие не должно подвергаться химической чистке.

Не рвать, не колоть.

Запрещено просушивать изделия вблизи открытого огня или на горячей батарее.

Запрещено соприкосновение изделий с красящими веществами, растворителями и маслами.

Не подвергать резким нагрузкам (прыжки, падения и т.п.) для сохранения целостности швов.

Изделия отвечают требованиям безопасности по ГОСТ Р 54739.

По санитарно-химическим и токсикологическим показателям изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 52770.

Изделия должны быть изготовлены из материалов, не оказывающие вредного влияния на организм человека, безопасных для здоровья пациента.

Изделия обладают биосовместимостью с кожным покровом потребителя, не вызывают у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями по ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-10, ГОСТ Р 52770.

12. Указания по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Не допускается соприкосновение изделий с острыми предметами, с красящими веществами, растворителями и маслами.

ВНИМАНИЕ! При возникновении на кожных покровах воспалительных явлений, болей (в т.ч. в вышележащих сегментах нижних конечностей) следует прекратить пользование изделия и обратиться к врачу.

При эксплуатации изделий следует соблюдать следующие условия:

- просушивать ежедневно при комнатной температуре;
- проводить очистку изделия.

ВНИМАНИЕ! Очистку изделий из натуральной кожи осуществлять только отжатой салфеткой, смоченной в моющем растворе.

ВНИМАНИЕ! По истечении срока хранения изделие использовать запрещено.

1) Стельки должны располагаться под всей плантарной поверхностью стопы и заменять в обуви вкладную стельку. Изделия вкладываются в стандартную повседневную обувь на низком и среднем каблуке с задником. Изделия могут эксплуатироваться и в летней открытой обуви при условии их фиксации с помощью клеящего слоя.

2) Полустельки должны располагаться под задним отделом стопы и помещаться в пяточно-геленочной части обуви.

3) В первые дни ношения ортопедических супинаторов возможно ощущение некоторого дискомфорта или чего-то непривычного. Пусть Вас это не тревожит: Ваши мышцы забыли, какое положение они должны занимать, когда стопа стоит правильно, и им придется вспоминать и учиться этому заново.

4) В первый день носите изделия не дольше одного часа, на следующий день — 2 часа, на третий 3 часа и т.д.

5) Если в эти первые дни Вы будите ощущать неудобство при носке, сократите время до 30 минут, соответственно увеличивая срок привыкания каждый день только на пол часа.

6) Вы можете носить изделия в своей привычной обуви. Но помните, что слишком узкая, тесная обувь, может уменьшить или свести на нет биомеханический эффект изделий и даже вызвать повреждение стопы.

7) Снимая обувь на ночь, вынимайте изделия для просушки.

8) Синтетические изделия можно мыть в теплом растворе нейтрального мыла, промыть водой и сушить в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, в расправленном положении на горизонтальной поверхности. Изделия, имеющие кожаное покрытие, мыть нельзя, а загрязненные места можно протереть влажной салфеткой.

9) Ежедневно, после снятия обуви, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов стопы, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж и гимнастика стопы, обработка кожи стопы защитными, питательными кремами и лосьонами.

ВНИМАНИЕ! Самостоятельная разборка стелек супинаторов категорически запрещаются!

На каждой потребительской упаковке нанесена маркировка посредством самоклеящейся этикетки. На маркировке потребительской упаковки указаны:

- наименование и (или) торговое наименование изделия;
- наименование и (или) торговое наименование варианта исполнения изделия;
- сведения о производителе, включая полное и сокращенное (при наличии) наименование, почтовый адрес производителя, страна происхождения медицинского изделия;
- место производства изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- размер изделия;
- номер партии изделия;
- дату изготовления (месяц, год) и срок годности;
- срок годности
- условия утилизации;
- условия хранения
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- количество изделий в упаковке
- символ «Не стерильно»
- символ «Обратиться к эксплуатационной документации»
- символ «Беречь от солнечных лучей»
- символ «Беречь от влаги»

Символы, указанные на маркировке

Символ	Обозначения
	Производитель
	Дата изготовления
	Норме партии
	Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Беречь от солнечных лучей
	Изделие не стерильно

13. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий следует производить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

Изделия в упаковке на транспортных средствах должны быть закреплены для исключения перемещений, соударений и механических нагрузок.

Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов: по условиям хранения 5 в соответствии с требованиями ГОСТ 15150, раздел 10.

Изделия должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и правилами по безопасности, защищенные от воздействия прямых солнечных лучей.
Расстояние от отопительных приборов при хранении изделий не должно быть менее 1 м.
Запрещается хранение и транспортирование изделий с маслами, кислотами, щелочными растворителями, красящими веществами.
В случае транспортирования и хранения изделия без упаковки производитель не гарантирует сохранность. Изделия, поврежденные в результате транспортирования или хранения без упаковки подлежат утилизации.

14. Гарантии изготовителя

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий на протяжении всего срока хранения при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации стелек для пользователей с диагностированным диабетом – 2 месяца со дня выдачи потребителю. В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие-изготовитель производит замену изделия бесплатно.

Для остальных категорий пользователей гарантийный срок эксплуатации 3 месяца со дня выдачи потребителю готовых изделий. В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие-изготовитель производит замену изделия бесплатно.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке, при условии сохранения целостности упаковки, а также при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Установленный срок службы стелек, полустелек и корректирующих приспособлений должен быть 3 года.

15. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

16. Требования к дезинфекции, стерилизации и очистке

Требования к очистке и дезинфекции

Очистку изделий проводить путем протирания теплой водой с температурой плюс (40±2) °С раствором детского мыла по ГОСТ 28546 или раствором нейтральных моющих средств по ГОСТ 25644.

ВНИМАНИЕ! Очистку изделий из натуральной кожи осуществлять только отжатой салфеткой, смоченной в моющем растворе.

Требования к дезинфекции

Дезинфекции не подлежит.

Требования к стерилизации

Изделие поставляется нестерильным.

Стерилизации не подлежит.

17. Требования безопасности и охрана окружающей среды

Производственные технологические процессы изготовления изделий должны исключать загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными веществами, перерабатываемыми материалами и Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

- неорганизованного захоронения отходов материалов на территории производителя или вне его;
- произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

Отходы, образующиеся при производстве, подлежат вторичной переработке. Отходы, не пригодные для вторичной переработки, подлежат размещению и утилизации, которую осуществляют на договорной основе с фирмой, имеющей надлежащую лицензию.

Изделие в поставляемом виде и в условиях эксплуатации экологически безопасно.

18. Порядок осуществления утилизации и уничтожения.

Материалы изделия являются нетоксичными, не аллергенными и не содержат вредных веществ, способных нанести вред окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (медицинском применении) и утилизации.

Изделие в процессе эксплуатации не производит негативных воздействий на окружающие среды и не является источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и водоёмов. При медицинском применении изделия необходимо руководствоваться соответствующими разделами эксплуатационной документации и не допускать утилизации изделия в установленном порядке.

Упаковку изделия утилизируют в места сбора бытового мусора.

Неиспользованные изделия в поврежденной упаковке и изделия с истёкшим сроком годности подлежат утилизации, как отходы класса А (эпидемиологически неопасные отходы) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 15.309-98	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ Р 27.102-2021	Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения
ГОСТ 6656-76	Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ ISO 10993-3-2018	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 16534-89	Коробки из картона для обуви. Технические условия
ГОСТ Р ИСО 17694-2020	Обувь. Методы испытаний верха и подкладки обуви. Прочность на изгиб
ГОСТ ISO 17700-2011	Обувь. Методы испытаний материалов верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению
ГОСТ Р ИСО 17704-2014	Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладной стельки. Сопротивление истиранию
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 20869-2011	Обувь. Метод испытания подошв, стелек, подкладок и вкладных стелек. Определение содержания водорастворимых веществ
ГОСТ Р ИСО 22649-2014	Обувь. Методы испытаний стелек и вкладных стелек. Адсорбция и десорбция воды
ГОСТ Р ИСО 22652-2014	Обувь. Метод испытаний стелек, подкладок и вкладных стелек. Устойчивость к поту
ГОСТ Р ИСО 22653-2017	Обувь. Методы испытаний подкладки и вкладных стелек. Статическое трение

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 28546-2002	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 51632-2021	Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р 54739-2021	Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия
ГОСТ Р 56432-2015	Система менеджмента качества. Изделия медицинские. Руководство по управлению продукцией и услугами, получаемыми от поставщиков
СанПин 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на



2-х листах