

КОД ОКП 93 9814

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО

«МЕДИКОМ»

Агафонов И. В.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Набор для новорожденных APXMED

Соответствует требованиям национальных стандартов
ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009,
ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р 52770- 2007

2011

1. Назначение.

1. Набор для новорожденных APExMED, в составе:

1. Браслет для фиксации на ручках малыша - 2 шт.,
2. Идентификационный медальон с устройством крепления к кровати - 1 шт.

Производства: Цзянсу Яда Текнолоджи Груп Ко., Лтд., Китай

Jiangsu Yada Technology Group, Co., Ltd.,

Xinqiao Road, Hanjiang District, Yanzhou, Jiangsu, 225109, China .

предназначен для идентификации новорожденных в роддомах.

2. Основные технические характеристики.



браслеты и медальон изготовлены из мягкого нетоксичного полиэтилена

набор стерильный, в индивидуальной упаковке

предназначен для одноразового использования

размеры браслета – 170x24 мм, медальона – 120x90 мм

срок годности – 5 лет

количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт.

Отличительные характеристики:

два вида наборов: с голубым либо розовым браслетом

надежная атравматичная защелка исключает самопроизвольное расстегивание и потерю браслета.

Снятие закрытого браслета возможно только разрезав его ножницами

встроенная полоска для записи данных (Ф.И.О. матери, номер отделения и т.п.) в

браслетах и медальоне. После занесения данных на полоску браслета перфорированную часть удаляют для исключения изъятия информации

герметичный карман браслета предотвращает попадание влаги и стирание информации браслеты имеют эстетически приятный вид, что немаловажно, учитывая традицию сохранения их родителями новорожденных
гладкие, мягкие, атравматические края браслета и защелки не доставляют дискомфорта детям

3. Инструкция по применению

- внимательно заполнить указанные графы во вкладышах именных браслетиков и медальона
- тщательно проверить соответствие указанных данных во всех вкладышах
- вложить вкладыши в браслетики и медальон, оторвать перфорированную часть вкладыша
- закрепить браслетики при помощи специальной защелки

– медальон с данными крепится к кроватке ребенка с помощью ремешка в комплекте
ВНИМАНИЕ! Необходимо избегать чрезмерного стягивания браслетика на руке новорожденного.

Расстегнуть защелку нельзя. Браслетик снимается путем разрезания.

4. Правила хранения и использования

- для одноразового использования
- не подлежит дезинфекции и стерилизации с целью повторного использования
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке
- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
- хранить при температуре от -30 до +45°C
- перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов
- использовать комплект только для одного новорожденного

Генеральный директор
ООО «МЕДИКОМ»



Агафонов И. В.