

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

02054566

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



233302A0/031472

号码 No.

兹证明：所附文件的影印件与原件相符。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the annexed photostated copy of
DOCUMENT is in conformity with the original.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature: Yang Dixin

日期: 2023年11月08日
(Date: Nov. 08, 2023)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.

Unit 93, building 12, No.818, Qiming Rd,
Yinzhou, Ningbo, China. 315105

Tel: +86-574-8778 6632

Fax: +86-574-8778 6644

greatcare@greatcare.cn



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Трубки дренажные АРЕХМЕД, в вариантах исполнения

Производитель медицинского изделия:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. (Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.),
Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок
93, корпус №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105, Нинбо, Чжэцзян, Китай).

Место производства:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. (Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.),
Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок
93, корпус 12, №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105, Нинбо, Чжэцзян, Китай).

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.,
(Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.)

Директор / Director
(должность/position)

Hu Yong Xiang
(имя/name)

(подпись/signature)

«08» 11 / 2008»
«день» месяц / «day» month



СОДЕРЖАНИЕ

1	НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	3
2	НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА.....	22
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	22
4	ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	40
5	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.....	42
6	СТЕРИЛИЗАЦИЯ.....	42
7	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	42
8	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	57
8.1	Требования к используемым материалам, марки материалов, красителей и пигментов, используемых для изготовления МИ.	74
9	МАРКИРОВКА.....	75
10	СРОК ГОДНОСТИ	80
11	УТИЛИЗАЦИЯ.....	80
12	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ- ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НА ПРИНЯТИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА	81

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Трубки дренажные медицинские APREXMED, в вариантах исполнения:

1. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 7, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 7 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
2. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
3. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
4. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
5. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
6. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
7. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
8. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 7, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 7 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

9. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
10. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
11. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
12. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
13. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
14. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
15. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 7, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 7 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
16. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
17. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

18. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
19. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
20. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
21. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
22. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 7, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 7 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
23. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
24. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
25. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
26. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

27. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
28. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
29. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
30. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
31. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
32. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
33. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
34. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 22, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
35. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
36. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 26, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 26 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
37. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 28, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 28 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
38. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 30, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 30 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
39. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 32, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 32 - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.
- 40. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 34, в составе:
 - Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 34 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 41. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 36, в составе:
 - Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 36 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 42. Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
 - Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 43. Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
 - Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 44. Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 30, в составе:
 - Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 30 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 45. Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 36, в составе:
 - Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 36 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 46. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 8, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 8 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 47. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 48. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 49. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 50. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.
- 51. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 52. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 53. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 8, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 8 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 54. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 55. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 56. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 57. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 58. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 59. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
 - Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.
60. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором XS, длина 900 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
61. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором XS, длина 900 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
62. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором S, длина 900 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер S - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
63. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
64. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
65. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
66. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором L, длина 900 мм, размер CH/FR: 22, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
67. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором L, длина 900 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

68. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором XS, длина 900 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
69. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором XS, длина 900 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
70. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором S, длина 900 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер S - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
71. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
72. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
73. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
74. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором L, длина 900 мм, размер CH/FR: 22, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
75. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором L, длина 900 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

76. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором XS, длина 1200 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
77. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
78. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 19, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 19 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
79. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором L, длина 1200 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
80. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором L, длина 1200 мм, размер CH/FR: 28, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 28 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
81. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором XS, длина 1200 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
82. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
83. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 19, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 19 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
84. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором L, длина 1200 мм, размер CH/FR: 24, в составе:

- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
85. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором L, длина 1200 мм, размер CH/FR: 28, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 28 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
86. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
87. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
88. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
89. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
90. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
91. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
92. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

93. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
94. Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
95. Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
96. Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
97. Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
98. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
99. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
100. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
101. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
102. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;

- [illegible]

- 15

- Инструкция по применению - 1 шт.
- 121. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, со стилетом, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 32, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, со стилетом, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 32 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 122. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 123. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 124. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 125. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 126. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 127. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 128. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 22, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 129. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;

- [illegible]

- Инструкция по применению - 1 шт.
139. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
140. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 22, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
141. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
142. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 26, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 26 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
143. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 28, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 28 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
144. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 30, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 30 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
145. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 32, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 32 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
146. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 6 мм, в составе:
- Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 6 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
147. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 8 мм, в составе:
- Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 8 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
148. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 10 мм - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.
- 149. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 12 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 12 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 150. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 6 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 6 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 151. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 8 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 8 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 152. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 10 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 153. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 12 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 12 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 154. Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см, размер CH/FR: 10, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 155. Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 156. Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 12, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 157. Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 158. Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 16, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 159. Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 18, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 160. Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 20, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 161. Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 22, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- [illegible]

- Инструкция по применению - 1 шт.

176. Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см. размер CH/FR: 28, в составе:

- Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см. размер CH/FR: 28 - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.

177. Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см. размер CH/FR: 30. в составе:

- Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см. размер CH/FR: 30 - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.

2 НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА

Производитель:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. (Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.),
Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок 93,
корпус 12, №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105, Нинбо, Чжэцзян, Китай).

Место производства:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. (Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.),
Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок 93,
корпус 12, №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105, Нинбо, Чжэцзян, Китай).

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

1. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 7, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 7 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
2. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
3. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
4. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
5. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
6. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
7. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 18, в составе:

- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

- 8. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 7, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 7 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- 9. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- 10. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- 11. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- 12. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- 13. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- 14. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- 15. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 7, в составе:
 - Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 7 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- 16. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 10, в составе:

- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
17. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
18. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
19. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
20. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
21. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
22. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 7, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 7 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
23. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
24. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
25. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 14, в составе:

- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
26. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
27. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
28. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
29. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
30. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
31. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
32. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
33. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
34. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 22, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
35. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
36. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 26, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 26 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

37. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 28, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 28 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
38. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 30, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 30 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
39. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 32, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 32 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
40. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 34, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 34 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
41. Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 36, в составе:
- Трубка дренажная, длина 500 мм, размер CH/FR: 36 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
42. Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
- Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
43. Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
44. Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 30, в составе:
- Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 30 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
45. Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 36, в составе:
- Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размер CH/FR: 36 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
46. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 8, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 8 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
47. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
48. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

49. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
50. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
51. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
52. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
53. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 8, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 8 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
54. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
55. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
56. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
57. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

58. Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
59. Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
60. Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, с коннектором XS, длина 900 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
61. Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, с коннектором XS, длина 900 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
62. Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, с коннектором S, длина 900 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер S - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
63. Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
64. Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
65. Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
66. Трубка дренажная силиконовая. круглая с перфорацией, с коннектором L, длина 900 мм, размер CH/FR: 22, в составе:

- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
67. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором L, длина 900 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
68. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором XS, длина 900 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
69. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором XS, длина 900 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
70. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором S, длина 900 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер S - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
71. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
72. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
73. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
74. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором L, длина 900 мм, размер CH/FR: 22, в составе:

- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
75. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором L, длина 900 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
76. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором XS, длина 1200 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
77. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 15, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
78. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 19, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 19 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
79. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором L, длина 1200 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
80. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором L, длина 1200 мм, размер CH/FR: 28, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размер CH/FR: 28 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
81. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором XS, длина 1200 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер XS - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
82. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 15, в составе:

- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 15 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
83. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 19, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 19 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
84. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором L, длина 1200 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
85. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором L, длина 1200 мм, размер CH/FR: 28, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размер CH/FR: 28 - 1 шт.;
 - Коннектор, размер L - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
86. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
87. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
88. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
89. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
90. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

91. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
92. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
93. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
94. Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
95. Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
96. Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер 7 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
97. Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
98. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
99. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
100. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
- Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;

- 34

- Инструкция по применению - 1 шт.
119. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 28, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, со стилетом, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 28 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 120. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, со стилетом, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 30, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, со стилетом, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 30 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 121. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, со стилетом, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 32, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, со стилетом, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 32 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 122. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 123. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 124. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 125. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 16, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 126. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 18, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм, размер CH/FR: 18 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 127. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 20, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 20 - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.
- 128. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 22, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 129. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 24, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 130. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 26, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 26 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 131. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 28, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размер CH/FR: 28 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 132. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 30, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 30 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 133. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 32, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 335 мм, размер CH/FR: 32 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 134. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 10, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 135. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 12, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 136. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, со стилетом, прямая, длина 290 мм, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.
- 146. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 6 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 6 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 147. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 8 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 8 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 148. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 10 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 149. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 12 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр 12 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 150. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 6 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 6 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 151. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 8 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 8 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 152. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 10 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 10 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 153. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 12 мм, в составе:
 - Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр 12 мм - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 154. Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см, размер CH/FR: 10, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см, размер CH/FR: 10 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 155. Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 156. Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 12, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 12 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 157. Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 14, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 14 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 158. Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 16, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размер CH/FR: 16 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- 39

- Инструкция по применению - 1 шт.
- 173. Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размер CH/FR: 22, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размер CH/FR: 22 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 174. Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размер CH/FR: 24, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размер CH/FR: 24 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 175. Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размер CH/FR: 26, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размер CH/FR: 26 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 176. Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размер CH/FR: 28, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размер CH/FR: 28 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.
- 177. Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размер CH/FR: 30, в составе:
 - Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размер CH/FR: 30 - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.

4 ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Назначение.

Стерильное изделие в форме трубки, предназначенное для удаления патологических отделений из полостей операционных ран, для минимизации накопления жидкости и риска инфицирования раны. Гладкая поверхность и наличие перфорационных отверстий уменьшает адгезию фибрина, способствует более эффективному оттоку жидкости. Различная форма, размер и длина трубки подходит для дренирования сложных полостей и применяется в разных областях хирургии.

Показания к применению.

- Пневмоторакс;
- Плевральный выпот;
- Хилоторакс;
- Эмпиема: гнойная инфекция плевральной полости.
- Гемоторакс;
- Послеоперационный гидроторакс, напр. после торакотомии, резекции пищевода, кардиохирургической операции.
- Жидкость в плевральной полости;
- Уриноторакс.

Показания для использования дренирования устанавливаются врачом, который и производит введение дренажа больному. Наблюдение за последующим самочувствием больного, состоянием дренажа, качеством и количеством удаляемой жидкости осуществляет младший медицинский персонал, в обязанности которого также входит проверка целостности и правильности размещения дренажной трубки, отсутствие на ней перегибов и сдавливаний.

Противопоказания.

- Геморрагический диатез;
- Инфекция в месте введения;

- Коагулопатия;
- Наличие диафрагмальной грыжи;
- Гидроторакс печени;
- Лёгочные, плевральные или грудные спайки;
- Плохая свёртываемость крови;
- Нерегулируемое повышение давления;
- Пациенты с гиперчувствительностью к используемым материалам.

Возможные побочные действия и осложнения.

При использовании изделия возможны следующие побочные действия:

- Аллергическая реакция на материал изделия;
- Избыточное повреждение тканей вследствие приложения чрезмерных усилий при использовании;
- Инфекции поверхностных и глубоких тканей;
- Закупорка дренажной трубки сгустками крови, омертвевшими тканями или ее перекручивание;
- Смещение трубки, требующее замены;
- Рецидив отека легких;
- Сосудистое повреждение;
- Кровотечение;
- Подкожная гематома или серома;
- Подкожная эмфизема;
- Распространение опухолевых клеток;
- Зияние, которое может привести к грыже брюшной полости;
- Травма легкого;
- Повреждения межреберных нервов;
- Электролитный дисбаланс.

Дренирование пациента и дальнейшее его лечение требует тщательного выполнения всех асептических процедур, так как дренажное отверстие может служить входными воротами для заражения внутригоспитальной инфекцией.

Меры предосторожности при применении.

Для применения только квалифицированным медицинским персоналом.

Выберите правильный размер перед использованием.

Не используйте, если стерильная упаковка вскрыта или повреждена.

Прочитайте все предупреждения и инструкции перед использованием, неправильное применение может привести к серьезной травме.

Не используйте изделие после истечения срока годности.

Изделие предназначено для одноразового применения, не подлежит повторной стерилизации, повторное использование продукта может быть опасно для пациента.

После использования изделия должны приниматься меры предосторожности, утилизация устройства должна производиться в соответствии с действующими национальным инструкциями в отношении биологических опасных отходов.

Область применения.

В лечебно-профилактических учреждениях, приемных отделениях, отделениях общей терапии, онкологии, ортопедической, пластической/реконструктивной хирургии, нейрохирургии, гинекологической, сердечно-сосудистой и общей хирургии, реанимации и инфекционных отделениях квалифицированным медицинским персоналом.

Требования безопасности.

Трубки дренажные APEXMED – медицинское изделие однократного применения, не подлежит повторному использованию. «Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.» («Нинбо Грейткеа

Трейдинг Ко., Лтд.)), Китай не несет ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в результате многократного или неправильного использования изделия.

Не используйте изделие после истечения срока годности.

Придерживайтесь национальных стандартов при утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей и влаги.

5 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

В лечебно-профилактических учреждениях, приемных отделениях, отделениях общей терапии, онкологии, ортопедической, пластической/реконструктивной хирургии, нейрохирургии, гинекологической, сердечно-сосудистой и общей хирургии, реанимации и инфекционных отделениях квалифицированным медицинским персоналом.

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

Температура: от +5 °C до +50 °C.

Относительная влажность воздуха до 95 %.

Атмосферное давление 700 гПа до 1060 гПа.

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5 °C до +35 °C;

- Относительная влажность воздуха: 35-85 %;

- Атмосферное давление: от 500 гПа до 1060 гПа.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Только для одноразового использования. Изделие сохраняет стерильность в течение всего срока годности.

Условия эксплуатации медицинского изделия:

- Температура эксплуатации: от +10°C до +35°C

- Относительная влажность воздуха: от 20% до 85%

- Атмосферное давление: 700 гПа до 1060 гПа

Применение изделия согласно утвержденным методикам и общепринятой медицинской практике.

6 СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Трубки дренажные APEXMED — это изделия одноразового использования, которые поставляются стерильными. Метод стерилизации – оксидом этилена, повторной стерилизации не подлежат. Срок сохранения стерильности указан на упаковке и составляет 5 лет.

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Краткое описание медицинского изделия/конструкции медицинского изделия.

Трубка дренажная – это медицинское изделие, предназначенное для проведения процедуры дренирования, с целью удаления жидкости, гноя, экссудата из раны, полости тела или инфекционного участка. Как правило, трубка дренажная используется вместе

с закрытой дренажной системой, которая подает низкое отрицательное давление через дренажный просвет, так называемое активное дренирование. В этом случае трубки дренажные присоединяются к емкостям для сбора дренируемой жидкости (экссудата). Трубки дренажные совместимы с любыми типами дренажных емкостей или устройствами для вакуум-аспирации. На конце трубки дренажных емкостей как правило имеется универсальный коннектор (ступенчатого типа), с помощью которого емкость герметично соединяется с трубками дренажными разных диаметров, обеспечивая эффективную аспирацию.



Емкости дренажные выполненные из силикона на крышке имеют несколько разъемов для соединения с трубками дренажными.

Кроме того, в составе некоторых вариантов трубок дренажных (круглых) имеется дополнительный универсальный коннектор (ступенчатого типа).

С помощью дренирования также проводится промывание раны или полости жидкими антисептиками.

Если раневая поверхность неглубокая и имеет открытую полость, как правило используют пассивное (гравитационное) дренирование. Для удаления жидкости используются трубки дренажные без каких-либо дополнительных устройств, они имеют капиллярные свойства и не только отводят содержимое, но еще дополнительно служат профилактикой слипания тканей.

Сроки нахождения трубки в ране или полости, как и выбор метода дренирования, зависят от характера хирургического вмешательства и физиологических особенностей пациента, они устанавливаются лечащим врачом индивидуально, согласно утвержденным методикам и общепринятой медицинской практике.

Трубка дренажная изготавливается из различных материалов, таких как ПВХ, силикон, полиуретан, латекс. Выпускаются изделия различных конструкций и размеров для использования в разных областях хирургии.

Изделие может включать в себя одноразовые устройства для установки дренажа (например, острый металлический стилет, коннектор), но не включает мешки/контейнеры для сбора жидкости. Это стерильное изделие для одноразового использования.

Гладкая поверхность, наличие перфорационных/латеральных отверстий или пазов уменьшает адгезию фибрина и способствует более эффективному оттоку.

1. **Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм;**
Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм;
Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм;
Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм.

Трубка дренажная из прозрачного термопластичного поливинилхлорида с боковыми отверстиями по Редону и интегрированным металлическим стилетом-проводником (для вариантов исполнения трубок со стилетом). Трубка выпускается в двух длинах 500 и 1000 мм и разных размерах. По всей длине трубки проходит рентгеноконтрастная линия, дополнительно имеется маркировочная отметка глубины введения позволяющая безошибочно расположить трубку дренажную в ране.

Стиллет изготовлен из высококачественной медицинской стали и имеет на своем конце защитный колпачок, который защищает острие и предотвращает его загрязнение. Пирамидальная заточка стилета делает процедуру менее травматичной и болезненной, снижая период послеоперационного восстановления.

2. **Трубка дренажная, длина 500 мм.**
Трубка изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида, имеет открытый дистальный конец и три боковых латеральных отверстия. Трубка устойчива к слипанию при критических перегибах.
3. **Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм.**
Трубка дренажная двухходовая выполнена из поливинилхлорида и представлена полый двухканальной трубкой. Основной канал трубки имеет три отверстия на дистальном конце, расположенных в шахматном порядке. Дополнительный «промывной» канал также имеет три отверстия на дистальном конце трубки и дает возможность вводить растворы в рану для улучшения оттока по основному каналу. Трубка меньшего размера имеет защитный колпачок, обеспечивающий герметичность.

Трубка предназначена для активного вакуумного дренирования патологического отделяемого из полостей и после операционных ран, а также для длительного промывания раны антисептическими растворами, что обеспечивает наиболее эффективное активное дренирование.

4. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм.

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией изготовлена из прозрачного силикона, имеет открытый дистальный конец и боковые перфорационные отверстия. Трубка устойчива к слипанию при критических перегибах. По всей длине трубки проходит рентгеноконтрастная линия. На конце рабочей части трубки расположен стилет (для вариантов исполнения трубок со стилетом), выполненный из высококачественной нержавеющей стали. Стилет имеет на своем конце защитный колпачок, который защищает острие и предотвращает его загрязнение. Пирамидальная заточка стилета делает процедуру менее травматичной и болезненной, снижая период послеоперационного восстановления.

5. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором XS, длина 900 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором S, длина 900 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором L, длина 900 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором XS, длина 900 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором S, длина 900 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором L, длина 900 мм.

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией изготовлена из прозрачного силикона, имеет открытый дистальный конец и боковые перфорационные отверстия.

Для удобства расположения в ране трубка имеет маркировочные отметки глубины введения, они расположены на расстоянии 50, 60 и 70 мм от перфорационной части трубки. По всей длине трубки расположена рентгеноконтрастная линия, позволяющая безопасно и надежно проводить работу специалиста. Трубка устойчива к слипанию при критических перегибах. Для некоторых размеров трубок имеется универсальный коннектор ступенчатого типа.

На конце рабочей части трубки расположен стилет (для вариантов исполнения трубок со стилетом), выполненный из высококачественной нержавеющей стали. Стилет имеет на своем конце защитный колпачок, который защищает острие и предотвращает его загрязнение. Пирамидальная заточка стилета делает процедуру менее травматичной и болезненной, снижая период послеоперационного восстановления.

6. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором XS, длина 1200 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором L, длина 1200 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором XS, длина 1200 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором L, длина 1200 мм.

Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами выполнена из высококачественного мягкого силикона без швов и выступающих соединений. Трубка имеет 4 непрерывных дренирующих канала, которые значительно увеличивают площадь контакта с окружающими тканями. Обладает повышенной прочностью и гибкостью. При сильном скручивании не деформируется и не

повреждается. Обеспечивает эффективный отток биологических жидкостей, предупреждая осложнения и интоксикацию организма. Для удобства расположения в ране трубка имеет маркировочные отметки глубины введения, они расположены на расстоянии 50 мм от окончания части трубки с пазами. По всей длине трубки расположена рентгеноконтрастная линия, позволяющая безопасно и надежно проводить работу специалиста. Для некоторых размеров трубок имеется универсальный коннектор ступенчатого типа.

На конце дистальной части трубки расположен стилет (для вариантов исполнения трубок со стилетом), выполненный из высококачественной нержавеющей стали. Стиллет имеет на своем конце защитный колпачок, который защищает острие и предотвращает его загрязнение. Пирамидальная заточка стилета делает процедуру менее травматичной и болезненной, снижая период послеоперационного восстановления.

7. **Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине;**
Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом;
Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины;
Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом.

Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине или с пазами на 3/4 длины состоит из двух частей, непрерывно соединенных между собой, минимизируя риск травмирования тканей. Одна часть представляет собой плоскую, полностью профилированную трубку из полимера (силикона и рентгеноконтрастного вещества), которая имеет четыре непрерывных дренирующих канала на всю длину этой части трубки или на 3/4 длины этой плоской части трубки. Вторая часть представляет собой круглую прозрачную трубку из силикона (проводящая часть). Благодаря своему строению трубка не врастает в ткани и может быть использована для длительного дренирования послеоперационных ран.

На конце дистальной части трубки расположен стилет (для вариантов исполнения трубок со стилетом), выполненный из высококачественной нержавеющей стали. Стиллет имеет на своем конце защитный колпачок, который защищает острие и предотвращает его загрязнение. Пирамидальная заточка стилета делает процедуру менее травматичной и болезненной, снижая период послеоперационного восстановления.

8. **Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией;**
Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом.

Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией состоит из двух частей, непрерывно соединенных между собой, минимизируя риск травмирования тканей.

Одна часть представляет собой плоскую, полностью перфорированную трубку из полимера (силикона и рентгеноконтрастного вещества), внутренняя поверхность которой оснащена 2-3 зубцами, служащими для предотвращения слипания и окклюзии (7 мм- 2 зубца; 10 мм- 3 зубца). Вторая часть представляет собой круглую прозрачную трубку из силикона (проводящая часть). Благодаря своему строению трубка не врастает в ткани и может быть использована для длительного дренирования послеоперационных ран.

На конце дистальной части трубки расположен стилет (для вариантов исполнения трубок со стилетом), выполненный из высококачественной нержавеющей стали. Стиллет имеет на своем конце защитный колпачок, который защищает острие и предотвращает его загрязнение. Пирамидальная заточка стилета делает процедуру менее травматичной и болезненной, снижая период послеоперационного восстановления.

9. **Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм;**
Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 315 мм;
Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 320 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 35 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 290 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 315 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 320 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 335 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 335 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 290 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 315 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 320 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 335 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости выполнена из полиуретана или ПВХ (поливинилхлорид) и применяется для эффективного дренажа после кардиоторакальной и торакальной хирургии. Она разработана для введения через межреберное пространство в плевральную полость с целью создания канала для удаления жидкости (плеврального выпота, крови, хилуса), воздуха (при пневмотораксе) или гноя (при эмпиеме) для обеспечения полного расширения легких.

От дистального конца трубка имеет маркировочную шкалу, что позволяет оценивать глубину погружения дренажной трубки. Дренажные отверстия расположены на дистальном конце для обеспечения эффективного оттока воздуха и биологических жидкостей. Рентгеноконтрастная линия, нанесенная по всей длине трубки, дает возможность визуализации положения трубки под рентгеноконтролем во время и после ее установки.

На проксимальном конце трубки имеется конический "язычок" для выведения трубки через грудную стенку.

При варианте исполнения трубки дренажной торакальной для плевральной полости со стилетом трубка состоит из двух частей: проводящего стилета (троакара), выполненного из алюминия или высококачественной нержавеющей стали и полый дренажной трубки.

10. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм;

Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм.

Трубка дренажная Пенроуз — одноразовая медицинская трубка, выполненная из силикона, предназначена для пассивного отведения жидкости (дренаж крови, лимфы, других жидкостей) из послеоперационной раны, чтобы минимизировать ее накопление и риск заражения. Трубка дренажная Пенроуз производится в двух вариантах длины 300 и 500 мм. с различными диаметрами. Материал и конструкция трубки минимизирует повреждение окружающих тканей и не вызывает появления пролежней при длительном нахождении в ране. Наличие просвета у трубки Пенроуз позволяет использовать его как «сигарный» дренаж (например, с марлевым наполнителем). Эластичность материала позволяет минимизировать повреждение окружающих тканей и при длительном нахождении дренажной трубки в ране предотвращает появление пролежней. Имеет рентгеноконтрастную линию по всей длине трубки.

11. Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см;

● Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см;

Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см.

Трубка дренажная Кера - одноразовая медицинская трубка, выполненная из силикона или латекса, предназначена преимущественно для интраоперационного дренирования общего желчного протока.

Рабочая часть помещается в раневую полость, а проводящая часть выводится наружу и соединяется со сборником экссудата. Трубка сохраняет свою форму и эластичность на протяжении всего времени нахождения в холедохе. Трубка Кера обеспечивает эффективный отток биологических жидкостей, снижая давление внутри протока, предупреждая осложнения и интоксикацию организма. Трубка в силиконовом исполнении имеет рентгеноконтрастную линию по всей длине трубки. Производится в широком спектре размеров.

Внешний вид МИ представлен на рисунках ниже.

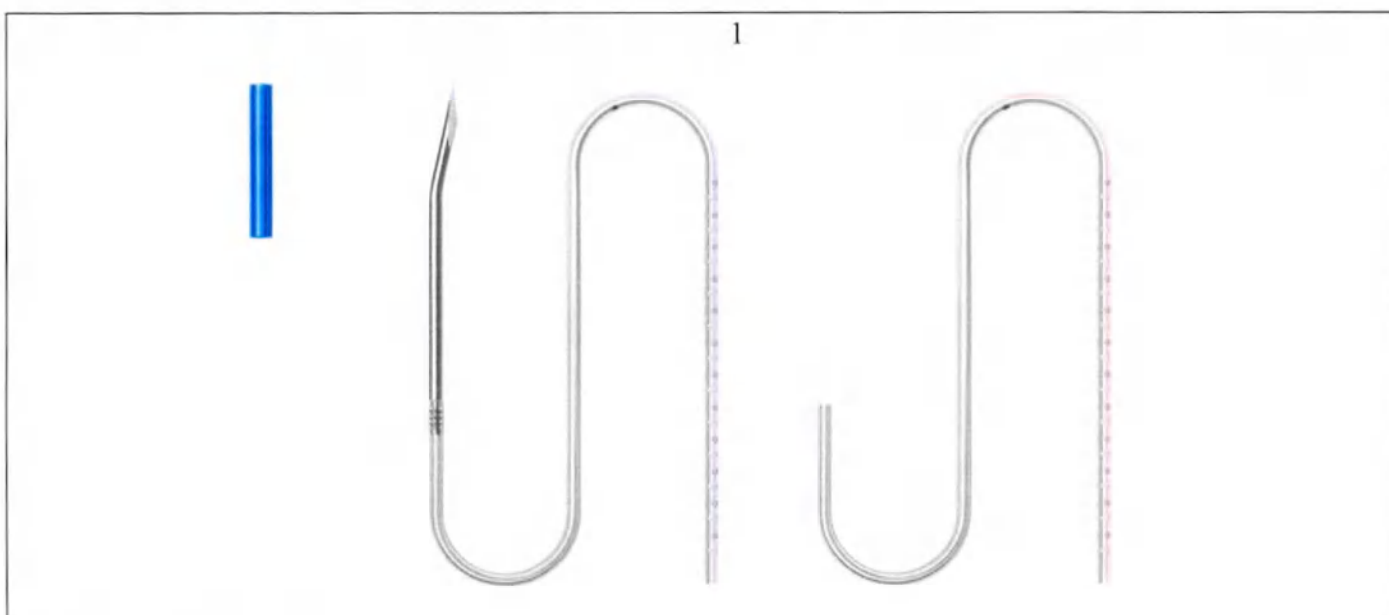


Рисунок 1

Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм;

Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм;

Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм;

Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм.

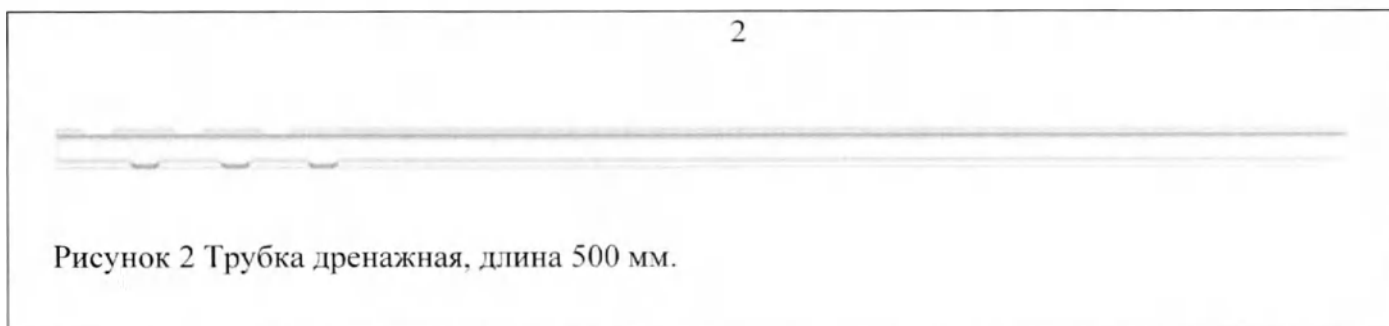


Рисунок 2 Трубка дренажная, длина 500 мм.

3



Рисунок 3 Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм.

4

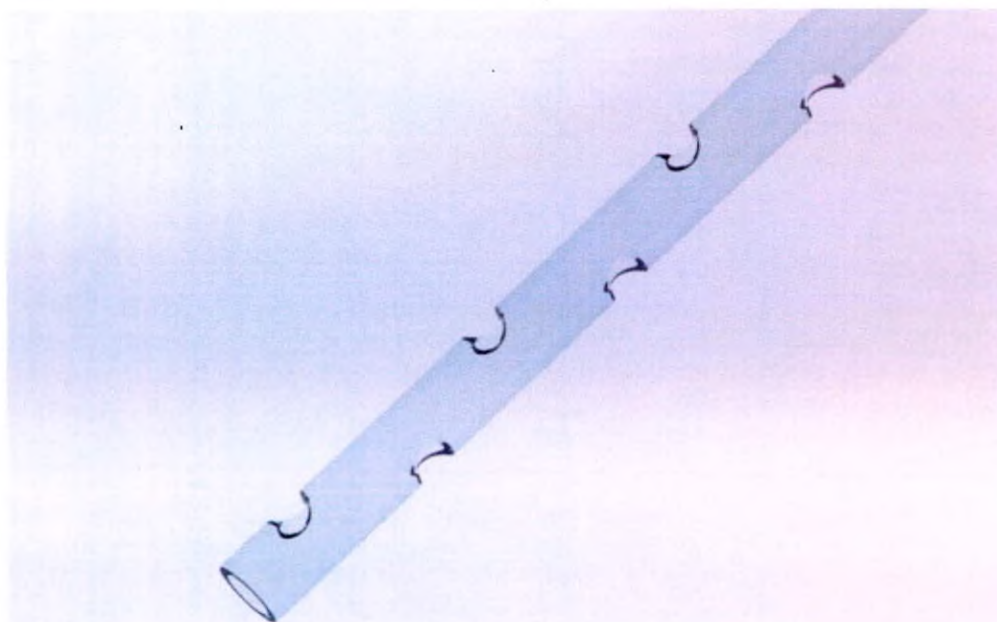


Рисунок 4

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм.

5



Рисунок 5

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором XS, длина 900 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором S, длина 900 мм;

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм;
 Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором L, длина 900 мм;
 Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором XS, длина 900 мм;
 Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором S, длина 900 мм;
 Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм;
 Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором L, длина 900 мм;

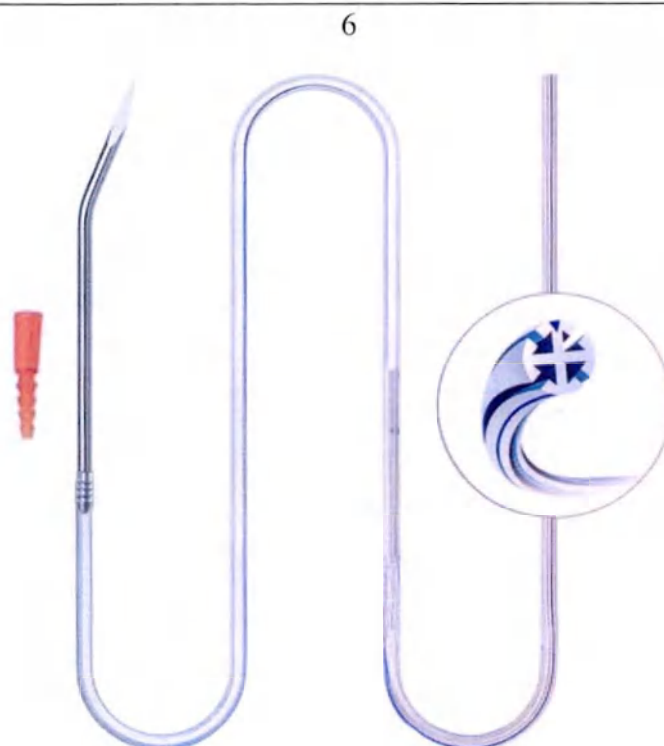


Рисунок 6

Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором XS, длина 1200 мм;
 Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм;
 Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором L, длина 1200 мм;
 Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором XS, длина 1200 мм;
 Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм;
 Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором L, длина 1200 мм.

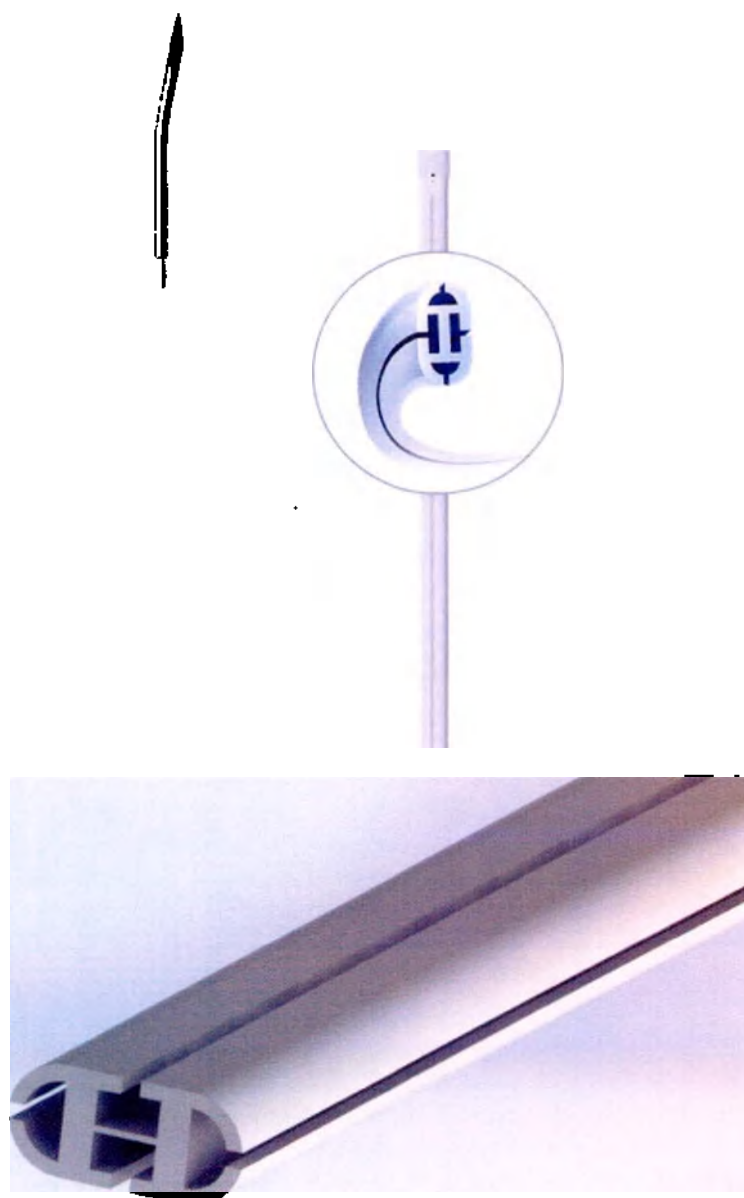


Рисунок 7

Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине;

Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине со стилетом;

Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины;

Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины со стилетом.

8

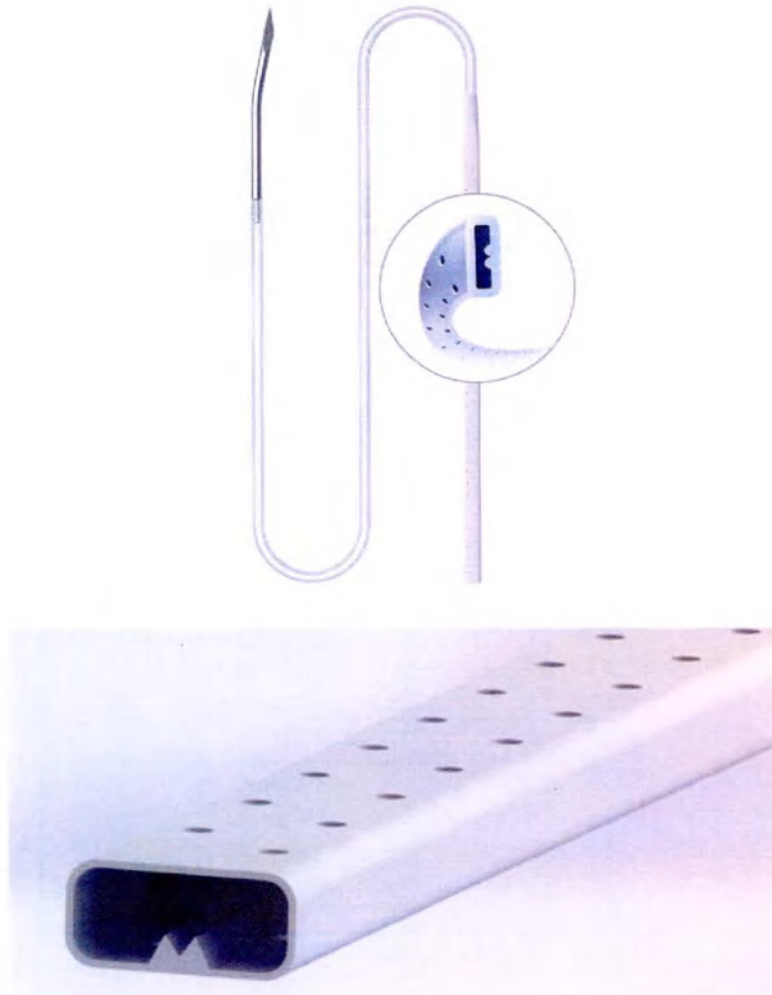


Рисунок 8

Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией;

Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом.

9



Рисунок 9

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 315 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 320 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 335 мм.



Рисунок 10

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 290 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 315 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 320 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 335 мм.



Рисунок 11

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 335 мм.

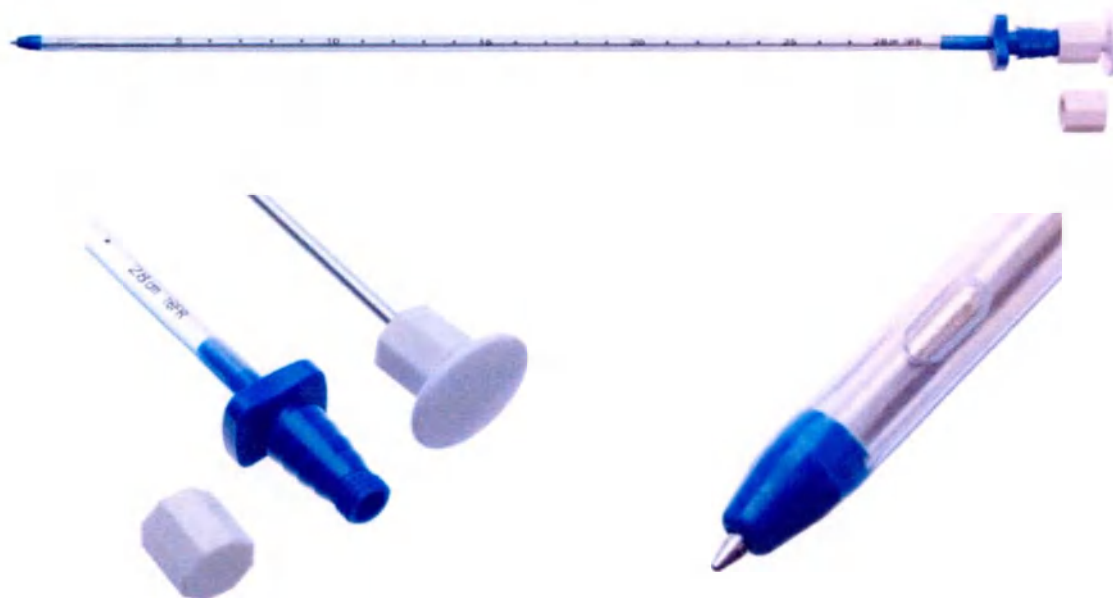


Рисунок 12

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 290 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 315 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 320 мм;

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 335 мм.

13



Рисунок 14

Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм;
Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм.

14

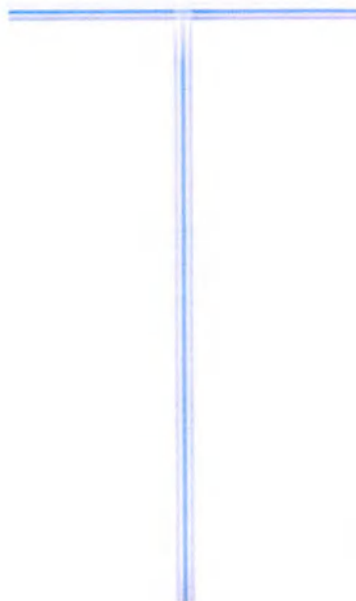


Рисунок 15

Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см.



Рисунок 16

Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см;

Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см.

Порядок работы

Трубка дренажная, в вариантах исполнения

- Прозеинфицируйте и подготовьте область прокола, сделайте обезболивание пациенту;
- Проверьте срок годности трубки дренажной и ее упаковку на целостность и отсутствие следов повреждения;
- Используя асептические методы, осторожно вскройте защитную упаковку и извлеките стерильную трубку дренажную;
- При необходимости отмерьте и отрежьте трубку необходимой длины в соответствии с размером раны;
- Поместите трубку дренажную в место сбора жидкости подходящим способом, например с помощью стилета;
- Закрепите трубку дренажную утвержденными методами;
- Подсоединение трубку к подходящему всасывающему устройству для отвода дренажа (обычно к дренажному мешку/емкости или вакуумному аспиратору);
- Для трубки дренажной двухходовой используйте дополнительный «промывной» канал трубки (трубка меньшего размера с защитным колпачком) для введения в рану раствора антибиотика или дезинфицирующего раствора.
- По завершении дренажа снимите дренажную систему.

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости

- Прозеинфицируйте и подготовьте область прокола, сделайте обезболивание пациенту;
- Проверьте срок годности трубки дренажной и ее упаковку на целостность и отсутствие следов повреждения;
- Используя асептические методы, осторожно вскройте защитную упаковку и извлеките стерильную трубку дренажную;
- Удерживайте пациента в положении лежа на боку.

- Пациента следует расположить соответствующим образом под углом 45 °, подняв руку за голову.
- Техника введения, расположение и выбор размера трубки остаются на усмотрение хирурга для оптимизации эффективности дренажа. При установке трубки дренажной троакальной необходимо соблюдать осторожность, чтобы не проколоть легкое и / или другие органы.
- Сделайте небольшой разрез для введения трубки в соответствии с действующей медицинской практикой.
- Вставьте трубку дренажную троакальную через отверстие, направляя стилет (троакар), на необходимую глубину, которая контролируется по маркировочной шкале, указанной на теле трубки.
- Удалите стилет и закрепите трубку дренажную утвержденными методами;
- Соедините трубку с подходящим всасывающим устройством для отвода дренажа, используя универсальный коннектор трубки для дренажа;
- При необходимости используйте рентгенологический контроль грудной клетки, чтобы убедиться, что дренаж установлен корректно и дренирование происходит правильно;
- По завершении дренажа снимите дренажную систему.

Трубка дренажная Пенроуз

Дренаж Пенроуза - это открытая дренажная система, которая размещается на линии разреза. Дренаж будет собираться на повязке, позволяя гравитации вытягивать дренаж наружу.

- Проверьте срок годности трубки дренажной и ее упаковку на целостность и отсутствие следов повреждения;
- Используя асептические методы, осторожно вскройте защитную упаковку и извлеките стерильную трубку дренажную;
- При необходимости отмерьте и отрежьте трубку необходимой длины в соответствии с размером раны;
- Поместите трубку дренажную в место сбора жидкости;
- Закрепите трубку дренажную на коже пациента утвержденными методами;
- По завершении дренажа снимите дренажную систему.

Трубка дренажная Кера

Трубка дренажная Кера используется в качестве временного послеоперационного дренажа общего желчного протока.

- Проверьте срок годности трубки дренажной и ее упаковку на целостность и отсутствие следов повреждения;
- Используя асептические методы, осторожно вскройте защитную упаковку и извлеките стерильную трубку дренажную;
- В соответствии с фактическими клиническими требованиями, отрежьте желчную Т-образную трубку до определенной формы;
- Поместите Т-образную дренажную трубку в желчевыводящие пути;
- Закрепите вертикальную трубку на коже пациента утвержденными методами;
- По завершении дренажа снимите дренажную систему.

8 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

8.1 Основные параметры, конструкция и технические характеристики МИ. Основные параметры и технические характеристики.

По основным параметрам и техническим характеристикам трубки дренажные APEXMED должны соответствовать нормам, приведённым ниже.

1. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размеры CH/FR: 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18

Общая длина трубки: (500 ± 50) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Длина перфорированной части трубки, мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г
7	$1,0 \pm 0,2$	$2,4 \pm 0,2$	150 ± 15	$1,0 \pm 0,2$	12 ± 1
10	$1,7 \pm 0,2$	$3,2 \pm 0,3$	150 ± 15	$1,2 \pm 0,2$	14 ± 1
12	$2,6 \pm 0,2$	$4,0 \pm 0,4$	150 ± 15	$1,5 \pm 0,2$	18 ± 2
14	$2,9 \pm 0,2$	$4,8 \pm 0,4$	200 ± 20	$2,4 \pm 0,2$	23 ± 2
15	$3,0 \pm 0,3$	$5,0 \pm 0,5$	200 ± 20	$2,5 \pm 0,3$	28 ± 2
16	$3,3 \pm 0,3$	$5,3 \pm 0,5$	200 ± 20	$2,5 \pm 0,3$	32 ± 3
18	$3,5 \pm 0,3$	$6,0 \pm 0,6$	200 ± 20	$3,0 \pm 0,4$	36 ± 4

2. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм, размеры CH/FR: 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18

Общая длина трубки: (500 ± 50) мм;


Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина стилета: (150 ± 15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: $(165 \pm 20)^\circ$;

Угол заточки стилета, не более: $(20 \pm 10)^\circ$.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Длина перфорированной части трубки, мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм
7	$1,0 \pm 0,2$	$2,4 \pm 0,2$	150 ± 15	$1,0 \pm 0,2$	18 ± 2	$2,4 \pm 0,2$
10	$1,7 \pm 0,2$	$3,2 \pm 0,3$	150 ± 15	$1,2 \pm 0,2$	23 ± 2	$3,3 \pm 0,3$
12	$2,6 \pm 0,2$	$4,0 \pm 0,4$	150 ± 15	$1,5 \pm 0,2$	27 ± 3	$4,0 \pm 0,4$
14	$2,9 \pm 0,2$	$4,8 \pm 0,4$	200 ± 20	$2,4 \pm 0,2$	32 ± 3	$4,8 \pm 0,4$
15	$3,0 \pm 0,3$	$5,0 \pm 0,5$	200 ± 20	$2,5 \pm 0,3$	36 ± 4	$5,0 \pm 0,5$
16	$3,3 \pm 0,3$	$5,3 \pm 0,5$	200 ± 20	$2,5 \pm 0,3$	41 ± 4	$5,3 \pm 0,5$
18	$3,5 \pm 0,3$	$6,0 \pm 0,6$	200 ± 20	$3,0 \pm 0,4$	50 ± 5	$6,0 \pm 0,6$

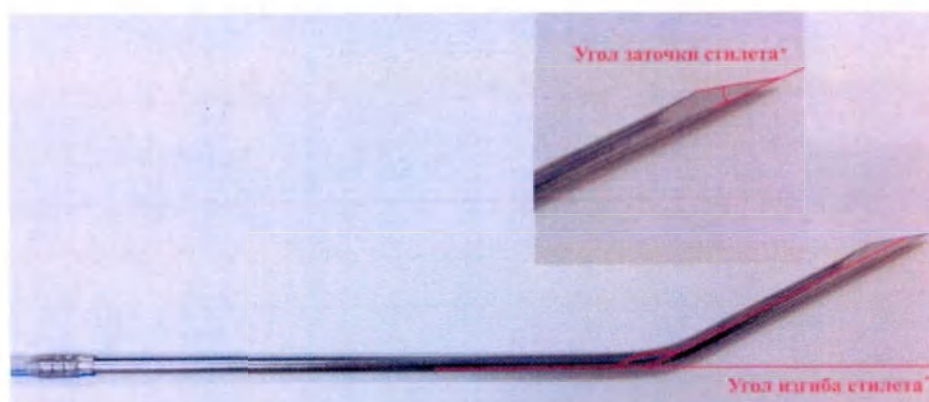

Обозначение угла заточки и угла изгиба стилета

3. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, длина 1000 мм, размеры CH/FR: 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18

Общая длина трубки: (1000 ± 100) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Длина перфорированной части трубки, мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г
7	$1,0 \pm 0,2$	$2,4 \pm 0,2$	300 ± 30	$1,0 \pm 0,2$	23 ± 2
10	$1,7 \pm 0,2$	$3,2 \pm 0,3$	300 ± 30	$1,2 \pm 0,2$	27 ± 3
12	$2,6 \pm 0,2$	$4,0 \pm 0,4$	300 ± 30	$1,5 \pm 0,2$	32 ± 3
14	$2,9 \pm 0,2$	$4,8 \pm 0,4$	400 ± 40	$2,4 \pm 0,2$	41 ± 4
15	$3,0 \pm 0,3$	$5,0 \pm 0,5$	400 ± 40	$2,5 \pm 0,3$	43 ± 5
16	$3,3 \pm 0,3$	$5,3 \pm 0,5$	400 ± 40	$2,5 \pm 0,3$	45 ± 5
18	$3,5 \pm 0,3$	$6,0 \pm 0,6$	400 ± 40	$3,0 \pm 0,4$	63 ± 7

4. Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 1000 мм, размеры CH/FR: 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18

Общая длина трубки: (1000 ± 100) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина стилета: (150 ± 15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: $(165 \pm 20)^\circ$;

Угол заточки стилета, не более: $(20 \pm 10)^\circ$.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Длина перфорированной части трубки, мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм
7	$1,0 \pm 0,2$	$2,4 \pm 0,2$	300 ± 30	$1,0 \pm 0,2$	23 ± 2	$2,4 \pm 0,2$
10	$1,7 \pm 0,2$	$3,2 \pm 0,3$	300 ± 30	$1,2 \pm 0,2$	27 ± 3	$3,4 \pm 0,3$
12	$2,6 \pm 0,2$	$4,0 \pm 0,4$	300 ± 30	$1,5 \pm 0,2$	32 ± 3	$4,0 \pm 0,4$
14	$2,9 \pm 0,2$	$4,8 \pm 0,4$	400 ± 40	$2,4 \pm 0,2$	41 ± 4	$4,7 \pm 0,4$
15	$3,0 \pm 0,3$	$5,0 \pm 0,5$	400 ± 40	$2,5 \pm 0,3$	43 ± 5	$5,0 \pm 0,5$
16	$3,3 \pm 0,3$	$5,3 \pm 0,5$	400 ± 40	$2,5 \pm 0,3$	45 ± 5	$5,3 \pm 0,5$
18	$3,5 \pm 0,3$	$6,0 \pm 0,6$	400 ± 40	$3,0 \pm 0,4$	63 ± 7	$6,0 \pm 0,6$

5. Трубка дренажная, длина 500 мм, размеры CH/FR: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Общая длина трубки: (500 ± 50) мм;

Гладкие латеральные отверстия, 3 штуки.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Размер отверстий, длина x ширина, мм
12	$2,7 \pm 0,5$	$4,0 \pm 0,5$	$3,7 \pm 0,5$	$(4,5 \times 2,0) \pm 0,2$
14	$3,2 \pm 0,5$	$4,7 \pm 0,5$	$6,0 \pm 0,5$	$(4,5 \times 2,0) \pm 0,2$
16	$3,7 \pm 0,5$	$5,3 \pm 0,5$	$6,5 \pm 0,5$	$(5,0 \times 2,5) \pm 0,3$
18	$4,1 \pm 0,5$	$6,0 \pm 0,5$	$7,5 \pm 1$	$(5,0 \times 2,5) \pm 0,3$
20	$4,4 \pm 0,5$	$6,7 \pm 0,5$	11 ± 1	$(5,0 \times 2,5) \pm 0,3$
22	$4,9 \pm 0,5$	$7,3 \pm 0,5$	14 ± 1	$(6,0 \times 3,0) \pm 0,3$
24	$5,4 \pm 0,5$	$8,0 \pm 0,5$	15 ± 2	$(7,0 \times 3,5) \pm 0,4$
26	$5,9 \pm 0,5$	$8,7 \pm 0,5$	21 ± 2	$(8,0 \times 4,0) \pm 0,4$
28	$6,3 \pm 0,5$	$9,3 \pm 0,5$	24 ± 2	$(8,0 \times 4,0) \pm 0,4$

30	6,9±0,5	10,0±0,5	25,5 ± 3	(9,0 × 4,0) ±0,4
32	7,5±0,5	10,7±0,5	30 ± 3	(9,0 × 4,0) ±0,4
34	7,9±0,5	11,3±0,5	31 ± 3	(10,0 × 5,0) ±0,5
36	8,4±0,5	12,0±0,5	32 ± 3	(10,0 × 5,0) ±0,5

6. Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм, размеры CH/FR: 20, 24, 30, 36

Общая длина трубки: (500±50) мм;

Длина трубки 1: (500±50) мм;

Гладкие латеральные отверстия, 3 основных и 3 дополнительных отверстия;

Длина коннектора: (20,0±2,0) мм;

Внутренний диаметр коннектора (ID): (4,0±0,4) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки 1 (ID), мм	Внешний диаметр трубки 1 (OD), мм	Масса трубки, г	Размер отверстий, длина х ширина, мм	Длина трубки 2, мм	Внутренний диаметр трубки 2 (ID), мм	Внешний диаметр трубки 2 (OD), мм
20	5,0±0,5	6,7±0,7	14 ± 1	(4,0 × 3,0) ±0,3	105±10	1,5±0,2	2,7±0,3
24	5,8±0,5	8,0±0,7	18 ± 2	(4,0 × 3,0) ±0,3	105±10	1,5±0,2	2,7±0,3
30	7,0±0,7	10,0±1,0	23 ± 2	(4,0 × 3,0) ±0,3	115±10	2,0±0,2	3,3±0,3
36	8,2±0,8	12,0±1,0	27 ± 3	(4,0 × 3,0) ±0,3	115±10	2,0±0,2	3,3±0,3



7. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 500 мм, размеры CH/FR: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Общая длина трубки: (500±50) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина перфорированной части трубки: (115±15) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Длина перфорированной части трубки, мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г
8	1,4±0,5	2,7±0,5	115±15	1,1 ± 0,3	9 ± 1
10	1,9±0,5	3,3±0,5	115±15	1,3 ± 0,3	14 ± 1
12	2,4±0,5	4,0±0,5	115±15	1,6 ± 0,3	18 ± 2
14	2,9±0,5	4,7±0,5	115±15	1,8 ± 0,3	23 ± 2
16	3,3±0,5	5,3±0,5	115±15	1,8 ± 0,3	27 ± 3
18	4,0±0,5	6,0±0,5	115±15	2,0 ± 0,3	32 ± 3
20	4,5±0,5	6,7±0,5	115±15	2,2 ± 0,3	45 ± 5

8. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 500 мм.

Размеры CH/FR: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Общая длина трубки: (500 ± 50) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина перфорированной части трубки: (115 ± 15) мм;

Длина стилета: (150 ± 15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: $(170 \pm 20)^\circ$;

Угол заточки стилета, не более: $(20 \pm 10)^\circ$.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм
8	$1,4 \pm 0,5$	$2,7 \pm 0,5$	$1,1 \pm 0,3$	18 ± 2	$2,7 \pm 0,3$
10	$1,9 \pm 0,5$	$3,3 \pm 0,5$	$1,3 \pm 0,3$	23 ± 2	$3,4 \pm 0,3$
12	$2,4 \pm 0,5$	$4,0 \pm 0,5$	$1,6 \pm 0,3$	27 ± 3	$3,4 \pm 0,3$
14	$2,9 \pm 0,5$	$4,7 \pm 0,5$	$1,8 \pm 0,3$	32 ± 3	$5,2 \pm 0,5$
16	$3,3 \pm 0,5$	$5,3 \pm 0,5$	$1,8 \pm 0,3$	41 ± 4	$5,2 \pm 0,5$
18	$4,0 \pm 0,5$	$6,0 \pm 0,5$	$2,0 \pm 0,3$	45 ± 5	$6,2 \pm 0,6$
20	$4,5 \pm 0,5$	$6,7 \pm 0,5$	$2,2 \pm 0,3$	72 ± 8	$8,0 \pm 0,6$

9. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором XS, длина 900 мм, размеры CH/FR: 10, 12

Общая длина трубки: (900 ± 90) мм;

Длина перфорированной части трубки: (300 ± 30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 -> 60 -> 70 мм от части трубки с перфорацией (± 10 мм);

Длина коннектора: $(29,5 \pm 3)$ мм;

Внутренний диаметр коннектора (ID): $(4,7 \pm 0,3)$ мм;

Внешний диаметр коннектора (OD), min-max: $(1,8-8,0 \pm 0,2)$ мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г	Масса коннектора, г
10	$1,7 \pm 0,3$	$3,3 \pm 0,3$	$1,2 \pm 0,3$	32 ± 5	$0,9 \pm 0,1$
12	$2,4 \pm 0,4$	$4,0 \pm 0,4$	$1,2 \pm 0,3$	36 ± 4	$0,9 \pm 0,1$

10. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором S, длина 900 мм, размер CH/FR: 14

Общая длина трубки: (900 ± 90) мм;

Длина перфорированной части трубки: (300 ± 30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 -> 60 -> 70 мм от части трубки с перфорацией (± 10 мм);

Длина коннектора: $(36,0 \pm 3)$ мм;

Внутренний диаметр коннектора (ID): $(4,7 \pm 0,3)$ мм;

Внешний диаметр коннектора (OD), min-max: $(3,3-4,6 \pm 0,3)$ мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г	Масса коннектора, г
14	$4,7 \pm 0,3$	$10,0 \pm 0,3$	$2,0 \pm 0,3$	100 ± 10	$1,5 \pm 0,1$

14	2,9±0,4	4,7±0,4	1,5±0,3	41 ± 4	1,3 ± 0,2
----	---------	---------	---------	--------	-----------

11. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, длина 900 мм, размеры CH/FR: 16, 18, 20

Общая длина трубки: (900±90) мм;

Длина перфорированной части трубки: (300±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 -> 60 -> 70 мм от части трубки с перфорацией (±10 мм).

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г
16	3,3±0,5	5,3±0,5	2,0±0,3	50 ± 5
18	3,7±0,6	6,0±0,6	2,5±0,3	54 ± 6
20	4,3±0,6	6,7±0,6	2,5±0,3	68 ± 7

12. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, с коннектором I., длина 900 мм, размеры CH/FR: 22, 24

Общая длина трубки: (900±90) мм;

Длина перфорированной части трубки: (300±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 -> 60 -> 70 мм от части трубки с перфорацией (±10 мм);

Длина коннектора: (35,0±3) мм;

Внутренний диаметр коннектора (ID): (4,7±0,3) мм;

Внешний диаметр коннектора (OD), min-max: (5,4-7,9 ±0,3) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г	Масса коннектора, г
22	4,7±0,6	7,3±0,6	2,5±0,3	78 ± 7	1,8 ± 0,3
24	5,4±0,6	8,0±0,6	2,5±0,3	86 ± 9	1,8 ± 0,3

13. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором XS, длина 900 мм, размеры CH/FR: 10, 12

Общая длина трубки: (900±90) мм;

Длина перфорированной части трубки: (300±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 -> 60 -> 70 мм от части трубки с перфорацией (±10 мм);

Длина стилета: (150±15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: (150±20)°;

Угол заточки стилета, не более: (20±10)°;

Длина коннектора: (29,5±3) мм;

Внутренний диаметр коннектора (ID): (4,7±0,3) мм;

Внешний диаметр коннектора (OD), min-max: (1,8-8,0 ±0,2) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Масса коннектора, г
10	1,7±0,3	3,3±0,3	1,2±0,3	32 ± 3	3,3±0,3	0,9 ± 0,1

12	2,4±0,4	4,0±0,4	1,2±0,3	36 ± 4	4,0±0,4	0,9 ± 0,1
----	---------	---------	---------	--------	---------	-----------

14. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором S, длина 900 мм, размер CH/FR: 14

Общая длина трубки: (900±90) мм;

Длина перфорированной части трубки: (300±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 -> 60 -> 70 мм от части трубки с перфорацией (±10 мм);

Длина стилета: (150±15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: (150±20)°;

Угол заточки стилета, не более: (20±10)°;

Длина коннектора: (36,0±3) мм;

Внутренний диаметр коннектора (ID): (4,7±0,3) мм;

Внешний диаметр коннектора (OD), min-max: (3,3-4,6 ±0,3) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Масса коннектора, г
14	2,9±0,4	4,7±0,4	1,5±0,3	41 ± 4	4,7±0,5	1,3 ± 0,2

15. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, длина 900 мм, размеры CH/FR: 16, 18, 20

Общая длина трубки: (900±90) мм;

Длина перфорированной части трубки: (300±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 -> 60 -> 70 мм от части трубки с перфорацией (±10 мм);

Длина стилета: (150±15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: (150±20)°;

Угол заточки стилета, не более: (20±10)°.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм
16	3,3±0,5	5,3±0,5	2,0±0,3	50 ± 5	5,3±0,5
18	3,7±0,6	6,0±0,6	2,5±0,3	54 ± 6	6,0±0,6
20	4,3±0,6	6,7±0,6	2,5±0,3	68 ± 7	6,7±0,6

16. Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, с коннектором L, длина 900 мм, размеры CH/FR: 22, 24

Общая длина трубки: (900±90) мм;

Длина перфорированной части трубки: (300±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 -> 60 -> 70 мм от части трубки с перфорацией (±10 мм);

Длина стилета: (150±15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: (150±20)°;

Угол заточки стилета, не более: (20±10)°;

Длина коннектора: (35,0±3) мм;

Внутренний диаметр коннектора (ID): (4,7±0,3) мм;

Внешний диаметр коннектора (OD), min-max: (5.4-7.9 ±0.3) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Диаметр отверстий, мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Масса коннектора, г
22	4.7±0.6	7.3±0.6	2.5±0.3	77 ± 8	7.3±0.6	1.8 ± 0.3
24	5.4±0.6	8.0±0.6	2.5±0.3	86 ± 9	8.0±0.6	1.8 ± 0.3

17. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором XS, длина 1200 мм, размер CH/FR: 10

Общая длина трубки: (1200±50) мм;

Длина части трубки с пазами: (325±10) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 мм от окончания части трубки с пазами (±5 мм);

Длина коннектора: (29.5±3) мм;

Внутренний диаметр коннектора (ID): (4.7±0.3) мм;

Внешний диаметр коннектора (OD), min-max: (1.8-8.0 ±0.2) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Масса коннектора, г
10	2.2±0.2	3.3±0.3	9 ± 1	1.3 ± 0.2

18. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, длина 1200 мм, размеры CH/FR: 15, 19

Общая длина трубки: (1200±50) мм;

Длина части трубки с пазами: (325±10) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 мм от окончания части трубки с пазами.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г
15	3.0±0.2	5.0±0.3	20 ± 2
19	4.2±0.2	6.4±0.3	29 ± 3

19. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, с коннектором L, длина 1200 мм, размеры CH/FR: 24, 28

Общая длина трубки: (1200±50) мм;

Длина части трубки с пазами: (325±10) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 мм от окончания части трубки с пазами (±5 мм);

Длина коннектора: (35.0±3) мм;

Внутренний диаметр коннектора (ID): (4.7±0.3) мм;

Внешний диаметр коннектора (OD), min-max: (5.4-7.9 ±0.3) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр	Масса трубки, г	Масса коннектора, г
----------------	------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------

		трубки (OD). мм		
24	5,5±0,2	8,0±0,3	44 ± 4	1,8 ± 0,3
28	6,4±0,2	9,4±0,4	54 ± 6	1,8 ± 0,3

20. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором XS, длина 1200 мм, размер CH/FR: 10

Общая длина трубки: (1200±50) мм;

Длина части трубки с пазами: (325±10) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки:

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 мм от окончания части трубки с пазами;

Длина стилета: (150±15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: (150±20)°;

Угол заточки стилета, не более: (20±10)°;

Длина коннектора: (29,5±3) мм;

Внутренний диаметр коннектора (ID): (4,7±0,3) мм;

Внешний диаметр коннектора (OD). min-max: (1,8-8,0 ±0,2) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Масса коннектора, г
10	2,2±0,2	3,3±0,3	9 ± 1	3,3±0,3	1,3 ± 0,2

21. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, длина 1200 мм, размеры CH/FR: 15, 19

Общая длина трубки: (1200±50) мм;

Длина части трубки с пазами: (325±10) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки:

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 мм от окончания части трубки с пазами (±5 мм);

Длина стилета: (150±15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: (150±20)°;

Угол заточки стилета, не более: (20±10)°.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм
15	3,0±0,2	5,0±0,3	20 ± 2	5,0±0,5
19	4,2±0,2	6,4±0,3	29 ± 3	6,3±0,6

22. Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, с коннектором L, длина 1200 мм, размеры CH/FR: 24, 28

Общая длина трубки: (1200±50) мм;

Длина части трубки с пазами: (325±10) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки:

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 50 мм от окончания части трубки с пазами (±5 мм);

Длина стилета: (150±15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: (150±20)°;

Угол заточки стилета, не более: (20±10)°;

Длина коннектора: (35.0 ± 3) мм:

Внутренний диаметр коннектора (ID): (4.7 ± 0.3) мм:

Внешний диаметр коннектора (OD), min-max: $(5.4-7.9 \pm 0.3)$ мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Масса коннектора, г
24	5.5 ± 0.2	8.0 ± 0.3	44 ± 4	8.0 ± 0.6	1.8 ± 0.3
28	6.4 ± 0.2	9.4 ± 0.4	54 ± 6	8.6 ± 0.6	1.8 ± 0.3

23. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, размеры мм: 7, 10


Общая длина трубки: (1100 ± 90) мм:

Длина части трубки с пазами: (200 ± 20) мм:

Длина рентгеноконтрастной линии: (800 ± 80) мм:

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 30 мм от окончания части трубки с пазами (± 3 мм).

Размер, мм	Внутренний диаметр круглой части трубки (ID), мм	Внешний диаметр круглой части трубки (OD), мм	Внешний диаметр плоской части трубки (bxa), мм	Масса трубки, г
7	3.0 ± 0.4	5.0 ± 0.5	$(7.3 \times 3.5) \pm 0.3$	17 ± 2
10	3.0 ± 0.4	5.0 ± 0.5	$(10.3 \times 3.8) \pm 0.3$	24 ± 2

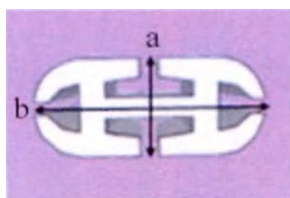

24. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размеры мм: 7, 10

Общая длина трубки: (1100 ± 90) мм:

Длина части трубки с пазами: (200 ± 20) мм:

Длина рентгеноконтрастной линии: (800 ± 80) мм:


Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 30 мм от окончания части трубки с пазами (± 3 мм):

Длина стилета: (150 ± 15) мм:

Угол изгиба стилета, не более: $(150 \pm 20)^\circ$:

Угол заточки стилета, не более: $(20 \pm 10)^\circ$.

Размер, мм	Внутренний диаметр круглой части трубки (ID), мм	Внешний диаметр круглой части трубки (OD), мм	Внешний диаметр плоской части трубки (bxa), мм	Масса трубки без стилета, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Масса стилета, г
7	3.0 ± 0.4	5.0 ± 0.5	$(7.3 \times 3.5) \pm 0.3$	17 ± 2	5.0 ± 0.5	23 ± 2
10	3.0 ± 0.4	5.0 ± 0.5	$(10.3 \times 3.8) \pm 0.3$	24 ± 2	5.0 ± 0.5	23 ± 2

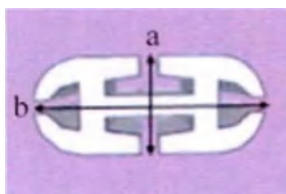

25. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, размеры мм: 7, 10


Общая длина трубки: (1100 ± 90) мм;

Длина части трубки с пазами: (150 ± 15) мм;

Длина рентгеноконтрастной линии: (800 ± 80) мм;

Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 30 мм от окончания части трубки с пазами (± 3 мм).

Размер, мм	Внутренний диаметр круглой части трубки (ID), мм	Внешний диаметр круглой части трубки (OD), мм	Внешний диаметр плоской части трубки (bxa), мм	Масса трубки, г
7	$3,0 \pm 0,4$	$5,0 \pm 0,5$	$(7,3 \times 3,5) \pm 0,3$	18 ± 2
10	$3,0 \pm 0,4$	$5,0 \pm 0,5$	$(10,3 \times 3,8) \pm 0,3$	25 ± 2

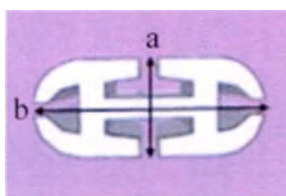

26. Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размеры мм: 7, 10

Общая длина трубки: (1100 ± 90) мм;

Длина части трубки с пазами: (150 ± 15) мм;

Длина рентгеноконтрастной линии: (800 ± 80) мм;


Маркировочная отметка глубины введения трубки: на расстоянии 30 мм от окончания части трубки с пазами (± 3 мм);

Длина стилета: (150 ± 15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: $(150 \pm 20)^\circ$;

Угол заточки стилета, не более: $(20 \pm 10)^\circ$.


Размер, мм	Внутренний диаметр круглой части трубки (ID), мм	Внешний диаметр круглой части трубки (OD), мм	Внешний диаметр плоской части трубки (bxa), мм	Масса трубки без стилета, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Масса стилета, г
7	$3,0 \pm 0,4$	$5,0 \pm 0,5$	$(7,3 \times 3,5) \pm 0,3$	18 ± 2	$5,0 \pm 0,5$	23 ± 2
10	$3,0 \pm 0,4$	$5,0 \pm 0,5$	$(10,3 \times 3,8) \pm 0,3$	25 ± 2	$5,0 \pm 0,5$	23 ± 2

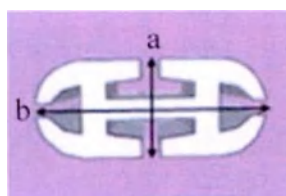

27. Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, размеры мм: 7, 10
- Общая длина трубки: (1100 ± 90) мм;
- Длина перфорированной части трубки: (200 ± 20) мм;

Длина рентгеноконтрастной линии: (800 ± 80) мм.

Размер, мм	Внутренний диаметр круглой части трубки (ID), мм	Внешний диаметр круглой части трубки (OD), мм	Внешний диаметр плоской части трубки (bxa), мм	Масса трубки, г
7	$3,0 \pm 0,4$	$5,0 \pm 0,5$	$(7,2 \times 3,3) \pm 0,3$	16 ± 2
10	$3,0 \pm 0,4$	$5,0 \pm 0,5$	$(10,2 \times 4,2) \pm 0,3$	17 ± 2

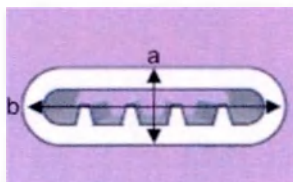

28. Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размеры мм: 7, 10

Общая длина трубки: (1100 ± 90) мм;

Длина перфорированной части трубки: (200 ± 20) мм;


Длина рентгеноконтрастной линии: (800 ± 80) мм.

Длина стилета: (150 ± 15) мм;

Угол изгиба стилета, не более: $(150 \pm 20)^\circ$;

Угол заточки стилета, не более: $(20 \pm 10)^\circ$.

Размер, мм	Внутренний диаметр круглой части трубки (ID), мм	Внешний диаметр круглой части трубки (OD), мм	Внешний диаметр плоской части трубки (bxa), мм	Масса трубки без стилета, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Масса стилета, г
7	$3,0 \pm 0,4$	$5,0 \pm 0,5$	$(7,2 \times 3,3) \pm 0,3$	16 ± 2	$5,0 \pm 0,5$	23 ± 2
10	$3,0 \pm 0,4$	$5,0 \pm 0,5$	$(10,2 \times 4,2) \pm 0,3$	17 ± 2	$5,0 \pm 0,5$	23 ± 2

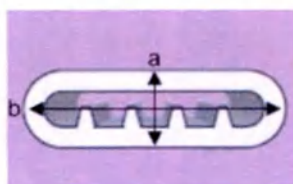

29. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 290 мм, размеры CH/FR: 10, 12, 14

Общая длина трубки: (290 ± 30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
10	$2,5 \pm 0,5$	$3,3 \pm 0,5$	7 ± 1	$3,3 \pm 0,3$	30 ± 3
12	$2,8 \pm 0,5$	$4,0 \pm 0,5$	8 ± 1	$4,0 \pm 0,4$	30 ± 3
14	$3,0 \pm 0,5$	$4,7 \pm 0,5$	9 ± 1	$4,7 \pm 0,5$	30 ± 3

30. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 315 мм, размеры CH/FR: 16, 18

Общая длина трубки: (315 ± 30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
16	4,0±0,5	5,3±0,5	9 ± 1	3,1±0,3	47±4
18	4,5±0,5	6,0±0,5	12 ± 1	3,6±0,3	47±4

31. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 320 мм, размеры CH/FR: 20, 22, 24, 26, 28

Общая длина трубки: (320±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
20	5,0±0,5	6,7±0,5	14 ± 1	4,0±0,4	47±4
22	5,5±0,5	7,3±0,5	15 ± 1	4,2±0,4	47±4
24	6,0±0,5	8,0±0,5	15 ± 1	4,6±0,4	47±4
26	6,5±0,5	8,7±0,8	16 ± 1	5,0±0,5	47±4
28	7,0±0,5	9,4±0,5	17 ± 1	5,9±0,5	47±4

32. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая, прямая, длина 335 мм, размеры CH/FR: 30, 32

Общая длина трубки: (335±40) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки:

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
30	7,3±0,5	10,0±0,8	20 ± 2	5,9±0,5	47±4
32	7,5±0,5	10,5±0,5	23 ± 2	5,9±0,5	47±4

33. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 290 мм, размеры CH/FR: 10, 12, 14

Общая длина трубки: (290±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина стилета: (345±30) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Размер коннектора	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
10	2,5±0,5	3,3±0,5	8 ± 1	1,0 ± 0,1	3,3	3,3±0,3	30±3
12	2,8±0,5	4,0±0,5	13 ± 1	1,5±0,2	4,0	4,0±0,4	30±3
14	3,0±0,5	4,7±0,5	17 ± 1	2,0±0,2	4,7	4,7±0,5	30±3

34. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 315 мм, размеры CH/FR: 16, 18

Общая длина трубки: (315±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина стилета: (350±30) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Размер коннектора	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
16	4,0±0,5	5,3±0,5	18 ± 2	3,0±0,3	5,3	3,1±0,3	47±4
18	4,5±0,5	6,0±0,5	19 ± 2	3,3±0,3	5,9	3,6±0,3	47±4

35. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 320 мм, размеры CH/FR: 20, 22, 24, 26, 28

Общая длина трубки: (320±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина стилета: (360±30) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Размер коннектора	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
20	5,0±0,5	6,7±0,5	20 ± 2	3,5 ± 0,3	6,7	4,0±0,4	47±4
22	5,5±0,5	7,3±0,5	25 ± 3	3,9 ± 0,4	7,1	4,2±0,4	47±4
24	6,0±0,5	8,0±0,5	27 ± 3	4,3 ± 0,4	8,0	4,6±0,4	47±4
26	6,5±0,5	8,7±0,8	34 ± 4	4,3 ± 0,4	8,9	5,0±0,5	47±4
28	7,0±0,5	9,4±0,5	41 ± 4	5,6 ± 0,5	9,7	5,9±0,5	47±4

36. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости полиуретановая со стилетом, прямая, длина 335 мм, размеры CH/FR: 30, 32

Общая длина трубки: (335±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина стилета: (380±30) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Размер коннектора	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
30	7,3±0,5	10,0±0,8	42 ± 5	5,6 ± 0,5	10,1	5,9±0,5	47±4
32	7,5±0,5	10,5±0,5	44 ± 5	5,6 ± 0,5	10,5	5,9±0,5	47±4

37. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 290 мм, размеры CH/FR: 10, 12, 14

Общая длина трубки: (290±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
10	2,5±0,5	3,3±0,5	7 ± 1	3,3±0,3	30±3
12	2,8±0,5	4,0±0,5	8 ± 1	4,0±0,4	30±3
14	3,0±0,5	4,7±0,5	9 ± 1	4,7±0,5	30±3

38. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 315 мм, размеры CH/FR: 16, 18

Общая длина трубки: (315±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
16	4,0±0,5	5,3±0,5	9 ± 1	3,1±0,3	47±4
18	4,5±0,5	6,0±0,5	12 ± 1	3,6±0,3	47±4

39. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 320 мм, размеры CH/FR: 20, 22, 24, 26, 28

Общая длина трубки: (320±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
20	5,0±0,5	6,7±0,5	14 ± 1	4,0±0,4	47±4
22	5,5±0,5	7,3±0,5	15 ± 1	4,2±0,4	47±4
24	6,0±0,5	8,0±0,5	15 ± 1	4,6±0,4	47±4
26	6,5±0,5	8,7±0,8	16 ± 1	5,0±0,5	47±4
28	7,0±0,5	9,4±0,5	17 ± 1	5,9±0,5	47±4

40. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости, прямая, длина 335 мм, размеры CH/FR: 30, 32

Общая длина трубки: (335±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
30	7,3±0,5	10,0±0,8	20 ± 2	5,9±0,5	47±4
32	7,5±0,5	10,5±0,5	23 ± 2	5,9±0,5	47±4

41. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 290 мм, размеры CH/FR: 10, 12, 14

Общая длина трубки: (290±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Длина стилета: (345±30) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Размер коннектора	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
10	2,5±0,5	3,3±0,5	8 ± 1	1,0±0,1	3,3	3,3±0,3	30±3
12	2,8±0,5	4,0±0,5	13 ± 1	1,5±0,2	4,0	4,0±0,4	30±3
14	3,0±0,5	4,7±0,5	17 ± 3	2,0±0,2	4,7	4,7±0,5	30±3

42. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 315 мм, размеры CH/FR: 16, 18

Общая длина трубки: (315±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина стилета: (350±30) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Размер коннектора	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
16	4,0±0,5	5,3±0,5	18 ± 2	3,0±0,3	5,3	3,1±0,3	47±4
18	4,5±0,5	6,0±0,5	19 ± 2	3,3±0,3	5,9	3,6±0,3	47±4

43. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 320 мм, размеры CH/FR: 20, 22, 24, 26, 28

Общая длина трубки: (320±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина стилета: (360±30) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Размер коннектора	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
20	5,0±0,5	6,7±0,5	20 ± 2	3,5 ± 0,3	6,7	4,0±0,4	47±4
22	5,5±0,5	7,3±0,5	25 ± 3	3,9 ± 0,4	7,1	4,2±0,4	47±4
24	6,0±0,5	8,0±0,5	27 ± 3	4,3 ± 0,4	8,0	4,6±0,4	47±4
26	6,5±0,5	8,7±0,8	34 ± 4	4,3 ± 0,4	8,9	5,0±0,5	47±4
28	7,0±0,5	9,4±0,5	41 ± 4	5,6 ± 0,5	9,7	5,9±0,5	47±4

44. Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 335 мм, размеры CH/FR: 30, 32

Общая длина трубки: (335±30) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки;

Длина стилета: (380±30) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г	Внешний диаметр стилета (OD), мм	Размер коннектора	Внутренний диаметр коннектора (ID), мм	Длина коннектора, мм
30	7,3±0,5	10,0±0,8	42 ± 5	5,6 ± 0,5	10,1	5,9±0,5	47±4
32	7,5±0,5	10,5±0,5	44 ± 5	5,6 ± 0,5	10,5	5,9±0,5	47±4

45. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 300 мм, диаметр мм: 6, 8, 10, 12

Общая длина трубки: (300±10) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Общая длина трубки, мм	Внешний Диаметр (OD), мм	Масса трубки, г
300±10	6,0±0,5	10,1 ± 1
300±10	8,0±0,5	12,6 ± 1
300±10	10,0±0,5	13,5 ± 2
300±10	12,0±0,5	15,4 ± 3

46. Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая, длина 500 мм, диаметр мм: 6, 8, 10, 12;

Общая длина трубки: (500±10) мм;

Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Общая длина трубки, мм	Внешний Диаметр (OD), мм	Масса трубки, г
500±10	6,0±0,5	13,5 ± 1

500±10	8,0±0,5	16,6 ± 2
500±10	10,0±0,5	19,8 ± 2
500±10	12,0±0,5	23,0 ± 2

47. Трубка дренажная Кера, силиконовая, 18×50 см, размеры CH/FR: 10, 14
Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки.

Размер (Ch/Fr)	Общая длина трубки, мм	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Длина перфорированной части трубки, мм	Масса трубки, г
10	(180,0×500,0) ±20,0	1,8±0,1	3,3±0,3	180,0±20,0	9 ± 1
14	(180,0×500,0) ±20,0	2,9±0,5	4,7±0,5	180,0±20,0	14 ± 3

48. Трубка дренажная Кера, латексная, 15×30 см, размеры CH/FR: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Общая длина трубки: (150,0×300,0 ±20) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г
12	2,0±0,5	4,0±0,3	6,5 ± 0,5
14	2,5±0,5	4,7±0,3	8 ± 1
16	3,0±0,5	5,3±0,3	9 ± 1
18	3,5±0,5	6,0±0,3	11 ± 1
20	4,0±0,5	6,7±0,3	12 ± 2
22	4,5±0,5	7,3±0,3	14 ± 2
24	5,0±0,5	8,0±0,3	18 ± 2
26	5,5±0,5	8,7±0,3	19 ± 2
28	6,0±0,5	9,3±0,3	23 ± 2
30	6,5±0,5	10,0±0,3	26 ± 3

49. Трубка дренажная Кера, латексная, 20×40 см, размеры CH/FR: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Общая длина трубки: (200,0×400,0 ±30) мм.

Размер (Ch/Fr)	Внутренний диаметр трубки (ID), мм	Внешний диаметр трубки (OD), мм	Масса трубки, г
8	1,7±0,5	2,7±0,3	5,5 ± 0,5
10	1,7±0,5	3,3±0,3	5,5 ± 0,5
12	2,0±0,5	4,0±0,3	7 ± 1
14	2,0±0,5	4,7±0,3	9 ± 1
16	3,0±0,5	5,3±0,3	11 ± 1
18	3,5±0,5	6,0±0,3	13 ± 2
20	4,0±0,5	6,7±0,3	18 ± 2
22	4,5±0,5	7,3±0,3	18 ± 2
24	5,0±0,5	8,0±0,3	23 ± 2
26	5,5±0,5	8,7±0,3	27 ± 3
28	6,0±0,5	9,3±0,3	32 ± 3
30	6,5±0,5	10,0±0,3	36 ± 4

8.2 Требования к используемым материалам, марки материалов, красителей и пигментов, используемых для изготовления МИ.

Требования к используемым материалам и красителям приведены в таблице ниже.
Марки материалов и красителей, применяемые для изготовления медицинского изделия

Вариант исполнения	Наименование компонента	Материал/ Марка материала	Марка материала	Изготовитель
Трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией со стилетом и без, длины: 500 мм, 1000 мм; Трубка дренажная, длина 500 мм; Трубка дренажная двухходовая, длина 500 мм	Трубка, Защитный колпачок стилета, коннектор	Поливинилхлорид (PVC)	M-3072	Shanghai Hopefinder Polymer Sci.&Tech.Co.,Ltd (Китай)
	Рентгеноконтрастная линия	Сульфат бария	Barium sulfat	Qingdao Dongfeng Chemical Co., Ltd (Китай)
	Стилет	Нержавеющая сталь	SUS 304	Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd. (Китай)
	Маркировочные метки глубины введения	Черный краситель, T1J	INKJET	Wuxi Aote Printing Ink Factory, (Китай)
Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией со стилетом и без с коннектором и без, длина 900 мм; Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами со стилетом и без с коннектором и без, длина 1200 мм; Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине или на ¾ длины со стилетом и без; Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией со стилетом или без	Трубка	Силикон	GA3065A/B	China National Bluestar (Group) Co.,Ltd. (Китай)
	Рентгеноконтрастная линия	Сульфат бария	Barium sulfat	Qingdao Dongfeng Chemical Co., Ltd (Китай)
	Стилет	Алюминий/ Нержавеющая сталь	6061-T6/ SUS304	Suzhou Tangweide Feixiang Metal Material Co., Ltd. (Китай) Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd. (Китай)
	Коннектор, защитный колпачок стилета	Поливинилхлорид (PVC)	M-3072	Shanghai Hopefinder Polymer Sci.&Tech.Co.,Ltd (Китай)
	Маркировочные метки глубины введения	Черный краситель, T1J	INKJET	Wuxi Aote Printing Ink Factory, (Китай)
Трубка дренажная торакальная для плевральной полости из ПВХ или полиуретана, прямая со стилетом или без	Трубка, коннектор наконечника, ручка стилета, универсальный коннектор, колпачок	Поливинилхлорид (PVC)	M-3072	Shanghai Hopefinder Polymer Sci.&Tech.Co.,Ltd (Китай)
	Трубка	Полиуретан	ESTANE S198A-2	The Lubrizol corporation. (США)

	Рентгеноконтрастная линия	Сульфат бария	Barium sulfat	Qingdao Dongfeng Chemical Co., Ltd (Китай)
	Стилет	Нержавеющая сталь	SUS 304	Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd. (Китай)
	Маркировочные метки глубины введения (чернила)	Черный краситель, T1J	INKJET	Wuxi Aote Printing Ink Factory. (Китай)
Трубка дренажная Пенроуз, силиконовая; Трубка дренажная Кера, силиконовая	Трубка	Силикон	GA3065A/B	China National Bluestar (Group) Co.,Ltd. (Китай)
Трубка дренажная Кера, латексная	Трубка	Латекс	CT03 REVULTEX	Revevtext Malaysia Sdn. Bhd. (Малайзия)

Вид контакта: Длительный контакт с мягкими тканями и внутренней средой организма, слизистыми оболочками.


9 МАРКИРОВКА


Символы, встречающиеся на индивидуальной этикетке (упаковке) МИ - Трубки дренажные APEXMED, в вариантах:

На упаковку медицинского изделия нанесена следующая информация:

- Наименование медицинского изделия;
- Наименование и адрес изготовителя;
- Дата изготовления;
- Номер партии;
- Номер по каталогу;
- Дата истечения срока годности;
- Размер трубки;
- «Обратитесь к инструкции по применению»;
- Сведения о стерильности и методе стерилизации;
- «Запрет на повторное применение»;
- «Не стерилизовать повторно»;
- «Апирогенно»;
- «Нетоксично»;
- «Не содержит латекс»;
- «Не использовать при повреждении упаковки»;
- «Беречь от влаги»;
- «Не допускать воздействия солнечного света»;
- «Утилизация по установленным правилам»;
- «Температурный диапазон»;
- Дата и номер РУ.
- Информация об уполномоченном представителе:
ООО "Апексмед Рус"
ул. Электrozаводская д.24, стр. 1, ком. 606.
107023, Москва, Россия. www.apexmed.ru

Таблица 1. Символы, присутствующие на индивидуальной упаковке изделия медицинского – Трубки дренажные АРЕХМЕД. в вариантах исполнения:

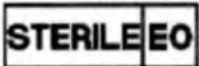Символ	Наименование символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Использовать до
	Обратитесь к инструкции по применению
	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
	Апирогенно
	Нетоксично
	Не содержит латекс
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света

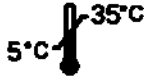	
	Не использовать при повреждении упаковки
	Утилизация устройства по установленным правилам
	Температурный диапазон

Символы, встречающиеся на групповой упаковке (этикетке) медицинского изделия
– Трубки дренажные АРЕХМЕД. в вариантах:

На упаковку медицинского изделия нанесена следующая информация:

- Наименование медицинского изделия;
- Наименование и адрес изготовителя;
- Размер трубки;
- Количество;
- Дата изготовления;
- Номер партии;
- Номер по каталогу;
- Дата истечения срока годности;
- «Обратитесь к инструкции по применению»;
- Сведения о стерильности и методе стерилизации;
- «Запрет на повторное применение»;
- «Не стерилизовать повторно»;
- «Апирогенно»;
- «Нетоксично»;
- «Не содержит латекс»;
- «Беречь от влаги»;
- «Не допускать воздействия солнечного света»;
- «Утилизация по установленным правилам»;
- «Температурный диапазон»;
- Дата и номер РУ;
- Информация об уполномоченном представителе:
ООО "Апексмед Рус"
ул. Электрозаводская д.24, стр. 1, ком. 606.
107023, Москва, Россия, www.apexmed.ru

Таблица 2. Символы, присутствующие на групповой упаковке изделия медицинского –
Трубки дренажные АРЕХМЕД. в вариантах исполнения:

Символ	Наименование символа
	Изготовитель

	Дата изготовления
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
	Использовать до
	Обратитесь к инструкции по применению
STERILE EO	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
	Апирогенно
NON TOXIC	Нетоксично
	Не содержит латекс
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
5°C  35°C	Температурный диапазон



Символы, встречающиеся на транспортной этикетке (упаковке) медицинского изделия – Трубки дренажные АРЕХМЕД, в вариантах:

На упаковку медицинского изделия нанесена следующая информация:

- Наименование медицинского изделия;
- Наименование и адрес изготовителя;
- Размер трубки;
- Количество;
- Дата изготовления;
- Номер партии;
- Номер по каталогу;
- Дата истечения срока годности;
- «Обратитесь к инструкции по применению»;
- Сведения о стерильности и методе стерилизации;
- «Запрет на повторное применение»;
- «Не стерилизовать повторно»;
- «Апирогенно»;
- «Нетоксично»;
- «Не содержит латекс»;
- «Хрупкое, обращаться осторожно»;
- «Беречь от влаги»;
- «Не допускать воздействия солнечного света»;
- «Утилизация по установленным правилам»;
- «Вверх»;
- «Температурный диапазон»;
- Дата и номер РУ.

Таблица 3. Символы, присутствующие на транспортной упаковке изделия медицинского – Трубки дренажные АРЕХМЕД, в вариантах исполнения:

Символ	Наименование символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Использовать до
	Обратитесь к инструкции по применению

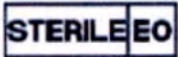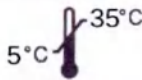	
	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
	Апирогенно
	Нетоксично
	Не содержит латекс
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Верх
	Температурный диапазон

10 СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Только для одноразового использования. Изделие сохраняет стерильность в течение всего срока годности.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

В условиях стационара, склада и т.п., при необходимости, медицинское изделие утилизируют и уничтожают в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами, регламентируемые СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Использованные изделия должны быть утилизированы в соответствии с требованиями к утилизации медицинских отходов. Класс опасности медицинских отходов исходя из характеристик морфологического состава – класс Б (эпидемиологически опасные отходы).

При истечении срока годности и/или нарушения целостности герметичной упаковки изделие относится к классу А и утилизируется как эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенных к твердым бытовым отходам, в соответствии с правилами, действующими в стране применения на момент утилизации.

Придерживайтесь национальных стандартов при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ- ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НА ПРИНЯТИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

Производитель гарантирует, что при разработке и производстве данного изделия были соблюдены разумные меры предосторожности. Производитель гарантирует соответствие изделий заявленным в документации показателям качества и характеристикам. Производитель гарантирует сохранность всех свойств медицинского изделия в течение 5 лет с даты производства, при целостности упаковки и соблюдений условий транспортировки и хранения. В случае применения изделий за пределами параметров спецификации не может быть гарантирована правильность работы изделий. Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия; не несет ответственности в отношении изделий, подвергаемых повторной обработке или стерилизации, используемых повторно, подвергаемых воздействию климатических и механических факторов при транспортировании и хранении, отличных от указанных в документации производителя, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению в отношении таких изделий.

Уполномоченный представитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Апексмед Рус"

Почтовый адрес - Россия, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская д.24, стр. 1, ком. 606.

Юридический адрес - Россия, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская д.24, стр. 1, ком. 606.

Телефон - 8-495-108-03-64,

Веб.сайт - apexmed.ru

e-mail - info@apexmed.ru, quality@apexmed.ru

ИНН - 7717777072



Производитель:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. (Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.).
Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок 93,
корпус 12, №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105, Нинбо, Чжэцзян, Китай).

Место производства:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. (Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.).
Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок 93,
корпус 12, №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105 Нинбо, Чжэцзян, Китай).

Рекламации

В случае возникновения претензий, по всем вопросам обращайтесь к уполномоченному представителю в Российской Федерации компании. Организация, уполномоченная производителем на принятие и удовлетворение требований от потребителей в отношении товара ненадлежащего качества:

Общество с ограниченной ответственностью «Апексмед Рус»

ООО «Апексмед Рус»

Почтовый адрес: 107023, Россия, г. Москва, Электрозаводская улица, дом 24 строение 1,
комната 606

Юридический адрес: 107023, Россия, г. Москва, Электрозаводская улица, дом 24 строение 1,
комната 606

Тел.: +7(495)108-03-64, www.apexmed.ru,

info@apexmed.ru

ИНН 7717777072

**Китайский Совет Содействия Международной Торговле
Китайская Палата Международной Торговли**

СЕРТИФИКАТ

№: 233302A0/031472

Настоящим свидетельствует, что приложенная копия документа
соответствует оригиналу.

Китайский Совет Содействия
Международной Торговле

[Печать для сертификации]


Уполномоченное лицо: Янг Дисин

Подпись: Янг Дисин

Дата: 08 ноября 2023

[Печать Нинбо Грейткэа Трэйдинг Ко., Лтд]

Перевод с английского и китайского языков на русский выполнил переводчик Чечеткин
Сергей Владимирович.

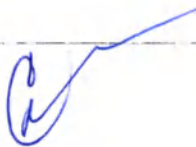Чечеткин Сергей Владимирович 

Российская Федерация

Город Москва

Четырнадцатого декабря две тысячи двадцать третьего года

Я, Сахарчук Юлия Михайловна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Шараповой Екатерины Петровны, свидетельствую подлинность перевода Чечеткина Сергея Владимировича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/1965-н/77-2023-8-397.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Ю.М.Сахарчук



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 86 (восемьдесят шесть) листов.

Ю.М.Сахарчук