The logo for medi GmbH & Co. KG, featuring the word "medi" in a white, lowercase, sans-serif font on a dark grey rectangular background.

medi GmbH & Co. KG Medicusstraße 1 · D-95448 Bayreuth

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
phone +49 921 912-0
fax +49 921 912-57
medi@medi.de
www.medi.de

To whom it may concern

Subject: instruction for use

The company medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany, hereby provides instruction for use for registration of the medical devices (medical compression hosiery), listed below:

1. mediven angio
2. medi Rehab one
3. duomed smooth
4. mediven cotton
5. thrombex

Best regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Weihermueller", written over a horizontal line.

medi GmbH & Co. KG
General Manager
Stefan Weihermueller

Seal: **medi GmbH & Co. KG**
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth

medi. I feel better.

Commercial Registry Bayreuth HRA 529/HRB 166
USt-ID Nr. DE 132354257
Personally liable partner medi Verwaltungsgesellschaft mbH
Management Stefan Weihermueller · Gerhard Kolb · Dirk Treiber
AEOF Nr. DE AEOF 100167

HypoVereinsbank
IBAN DE26 7732 0072 0003 0241 48
BIC HYVEDE33HAN

VR Bank Bayreuth-Hof
IBAN DE42 7806 0896 0006 2059 76
BIC GENODEF1H01

I hereby certify that the signature on this document was signed in my presence by

Mr. Stefan Herbert Weihermüller,
born on 30 July 1961,
business Address: Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth/GERMANY,
identified by his ID Card,
according to his statement here acting on behalf of

**medi Verwaltungsgesellschaft mbH,
based in 95448 Bayreuth, Medicusstraße 1.**

This entity is here acting on behalf of

**medi GmbH & Co. KG,
based in 95448 Bayreuth, Medicusstraße 1.**

Upon my inspection of the Companies' Register of the Local court of Bayreuth on 7. november 2023.

I hereby certify,

- a) that the said company medi GmbH & Co. KG having its principal place of business in Bayreuth, is entered in Section A of the said Register under Nr. 529 and medi Verwaltungsgesellschaft mbH, a company having its registered office in Bayreuth, is authorized to represent the said company as a general partner therein;

that the said medi Verwaltungsgesellschaft mbH is entered in Section B of the said Register under Nr. 166 and that Mr. Stefan Weihermüller is authorized to represent it.

Bayreuth, 07.11.2023



Manuel Mairgünther, notary

**Инструкция по применению
на медицинского изделие:**

**«Медицинский компрессионный трикотаж на
нижние конечности»,**

производства

меди ГмбХ & Ко. КГ (medi GmbH & Co. KG), Германия



Умная и эффективная продукция

Более 70 лет исследований и совместной творческой работы врачей, инженеров, технологов и дизайнеров компании medi по совершенствованию компрессионных изделий позволили создать и внедрить

в производство комплекс уникальных инновационных технологий, объединенных под товарным знаком компании – medi compression. Медицинские компрессионные изделия, производимые по этим технологиям, гарантируют правильное с медицинской точки зрения распределение давления и исключительные потребительские свойства.

medi compression – ключ к успеху в компрессионном лечении, к хорошему самочувствию в повседневной жизни и спорте. Сделано в Германии.



Наименование

Медицинский компрессионный трикотаж на нижние конечности (также далее по тексту «компрессионные изделия», «компрессионный трикотаж», медицинский компрессионный трикотаж»).



Производитель

Наименование: меди ГмбХ & Ко. КГ (medi GmbH & Co. KG) (далее по тексту «medi»)

Адрес: Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany (Медикусштрассе 1, 95448, Байройт, Германия),

телефон: +49 921 912-2829,

e-mail: m.hollstein@medi.de



Назначение

Медицинский компрессионный трикотаж на нижние конечности предназначен для профилактики и лечения хронических заболеваний вен и лимфатических отеков нижних конечностей

Физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению, определенному производителем

Пациент, которому изделие показано для профилактики и лечения хронических заболеваний вен и лимфатических отеков нижних конечностей.

Изделие предназначено для самостоятельного использования.

Показания

I класс компрессии

(18-21 мм рт. ст. на уровне лодыжек) Синдром «тяжелых ног». Склонность к отекам. Профилактика варикозной болезни у беременных. Ретикулярный (сетчатый) варикоз, телеангиэктазии. Функциональные флебопатии. Физическая пред-, интра- и послеоперационная профилактика тромбоза глубоких вен у соблюдающих постельный режим или частично подвижных пациентов. Профилактика и лечение послеоперационных и посттравматических отеков.

II класс компрессии

(23-32 мм рт. ст. на уровне лодыжек) Варикозная болезнь, в том числе у беременных. Варикотромбофлебит. Компрессионная терапия после флебосклерозирования и оперативных

вмешательств на венах нижних конечностей. Физическая пред-, интра- и послеоперационная профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска, а также у частично подвижных пациентов. Профилактика и лечение послеоперационных и посттравматических отеков и гематом, а также уменьшение сопровождающих их болей (например, при ортопедических хирургических вмешательствах или при хирургических вмешательствах в ходе лечения заболеваний вен).

Компрессионные гольфы mediven angio оптимально приспособлены для пациентов с сопутствующими болезнями, такими, как, например, диабетом или облитерирующий эндартериит легкой или средней степени (ABPI > 0,6). Безопасность mediven angio для таких пациентов была доказана клиническим исследованием.¹

¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diabetes Res Care 2020;8(1):e001316

Компрессионное лечение будет наиболее эффективным, если Вы предварительно проконсультируетесь у врача-флеболога.

Противопоказания

Абсолютные

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, когда регионарное систолическое давление на а. tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст. Тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии. Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность. Трофические язвы венозной этиологии. Острая инфекция мягких тканей. Септический флебит. Индивидуальная непереносимость материала.

Относительные

Нарушение чувствительности.

Компания medi не несет ответственности за использование компрессионного трикотажа при наличии вышеперечисленных противопоказаний.

Побочные эффекты

При неправильном обращении с изделиями, медицинский компрессионный трикотаж может вызывать некроз кожи и/или обусловленное избыточным давлением повреждение периферических нервов. Если у пациента чувствительная кожа, медицинский компрессионный трикотаж может вызвать зуд, шелушение или признаки воспаления. В таком случае, обязательным условием при применении изделия является нанесение под компрессионный трикотаж соответствующего средства по уходу за кожей.

Информация об обстоятельствах, при которых пользователь должен проконсультироваться с медицинским специалистом

Если во время использования медицинского компрессионного трикотажа появляются боли или усиливается раздражение кожи, незамедлительно снимите компрессионное изделие и проконсультируйтесь со своим врачом или медицинскими специалистами.

Принцип действия

- Компрессия межмышечных венозных сплетений и перфорантных вен приводит к значительному увеличению пропульсивной способности мышечно-венозной помпы голени и снижению патологической венозной «емкости» нижних конечностей.
- Уменьшение калибра подкожных и глубоких вен приводит к улучшению функционирования относительно недостаточного клапанного аппарата и возрастанию скорости венозного кровотока.
- Повышение тканевого давления увеличивает резорбцию внеклеточной жидкости в венозном колене капилляра и уменьшает ее фильтрацию в артериальном, что приводит к регрессу отека.
- Увеличение фибринолитической активности крови за счет более интенсивной выработки тканевого активатора плазминогена (феномен, связанный с сокращением мышц в ограниченном объеме) улучшает реологические свойства крови.

- Увеличение скорости лимфотока способствует выведению избытка жидкости из тканей.

Рекомендации по надеванию компрессионных изделий с закрытым носком

Надевайте компрессионный трикотаж утром сразу после пробуждения и гигиенических процедур. Выверните изделие наизнанку до той части, которая надевается на стопу. Наденьте изделие на стопу. Обратите внимание на правильность расположения пяточной части. Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по ноге. Убедитесь, что изделие не образует складок и не вызывает сдавливания.

Рекомендации по надеванию компрессионных изделий с открытым носком

Наденьте на ступню специальный носочек, улучшающий скольжение трикотажа. Соберите в гармошку верхнюю часть изделия и надевайте его поверх специального носочка. Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по ноге. Обратите внимание на правильность расположения пяточной части. Удалите специальный носочек, вытянув его вперед. Расправьте изделие на тыльной и подошвенной сторонах стопы так, чтобы оно достигало основания пальцев. Убедитесь, что изделие не образует складок и не вызывает сдавливания. Если Вы чрезмерно растянули изделие вверх, то опустите его вниз до уровня лодыжек и затем снова расправьте, не растягивая так сильно.

Рекомендации по снятию компрессионного трикотажа

Снимите украшения с пальцев, возьмите изделие двумя руками чуть ниже резинки. Аккуратно выворачивая, стягивайте его вниз. Стяните изделие до щиколотки. Вставьте два больших пальца по обе стороны пятки и снимите чулок со стопы, полностью вывернув его.

Рекомендации по хранению и гарантийные периоды



Для mediven angio, mediven cotton, medi Rehab one и duomed smooth

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

Дата изготовления отмечена знаком () и цифрами на наклейке изготовителя на упаковке «год-

месяц». Срок годности – 42 месяца от даты изготовления (отмечен знаком ) и цифрами на наклейке изготовителя на упаковке «год-месяц»). Гарантийный срок сохранения компрессионных свойств при ежедневном использовании и соблюдении рекомендаций, изложенных в инструкции по использованию: 6 месяцев при условии начала использования не позднее 6 месяцев до окончания срока годности. По истечении срока годности товар подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.

Для thrombex

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

Срок годности – 60 месяцев от даты изготовления (отмечен знаком ) и цифрами «год-месяц» на полиэтиленовой упаковке изготовителя, а также на вшитом в изделие ярлыке). Дата

изготовления отмечена знаком () и цифрами «год-месяц» на вшитом в изделие ярлыке. Изготовитель гарантирует сохранение компрессионных свойств изделия в течение 10 циклов «использование–стирка» (в пределах срока годности и при соблюдении рекомендаций, изложенных в инструкции по использованию). По истечении срока годности товар подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.

Особые указания


Никогда не подворачивайте верхний край изделия: это приводит к локальному повышению давления (так называемому эффекту жгута), ухудшению кровотока и неприятным ощущениям.

Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, чтобы компрессионные гольфы, чулки или колготки лучше скользили по коже. Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти или если Вы носите кольца. Чтобы избежать повреждений при надевании компрессионного трикотажа, целесообразно использовать резиновые перчатки. Шершавая и ороговевшая кожа на пятках может быть причиной повреждения трикотажа, так как в процессе надевания пятка должна скользить через узкую часть изделия.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы внутренняя поверхность Вашей обуви была в хорошем состоянии, так как ее дефекты могут привести к повреждению изделия. Компрессионный трикотаж *medi* устойчив к различным мазям, кремам и увлажнителям кожи, однако некоторые их комбинации со временем могут привести к снижению прочности изделия. Также при использовании кремов, мазей и масел для тела возможно снижение фиксирующей способности резинки на *еи*лижоневой *еен*ове у чулок.

В связи с особенностями технологии круговой вязки, в некоторых местах могут присутствовать свободные остатки нитей (компрессионных из эластана и/или вязальных из полиамида), предотвращающие образование спущенных петель и «стрелок». Как правило, эти остатки нитей при использовании изделий не ощущаются, не доставляют неудобств и не влияют на внешний вид изделия. В случае, если Вы все же ощущаете эти нити, допускается их немного укоротить ножницами. Ни в коем случае не следует тянуть за эти нити, их отрывать или удалять полностью. При укорачивании нити важно помнить следующее: свободный остаток вязальной нити должен быть не менее 2-3 мм, а свободный остаток компрессионной нити должен быть не менее 5-7 мм. Не допускается укорачивать нить в ее натянутом состоянии! Консультанты специализированных салонов дадут Вам рекомендации, как правильно надевать и снимать изделие лечебного трикотажа, ухаживать за ним. Пожалуйста, следуйте этим рекомендациям.

Рекомендации по уходу

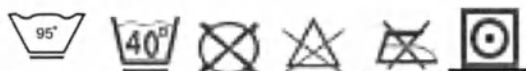


Первый раз стирайте Ваше компрессионное изделие отдельно от другого белья. Компрессионный трикотаж следует стирать ежедневно вручную или в стиральной машине (40°C) в деликатном режиме (кроме *thrombex*). Компрессионные чулки *thrombex* можно стирать при температуре до 95°C. Используйте моющие средства для цветного белья, не содержащие отбеливатели и кондиционеры. После стирки многократно прополощите компрессионное изделие, аккуратно отожмите руками или в стиральной машине, используя деликатный режим, и повесьте сушиться в хорошо проветриваемом месте. Не оставляйте влажные компрессионные изделия лежать на полотенце или под прямыми солнечными лучами. Не сушите компрессионный трикотаж на отопительной батарее, не подвергайте химической чистке.

Рекомендации по подбору размера

Размер изделия подбирается строго по индивидуальным анатомическим меркам конечности. Верхний край медицинского компрессионного трикотажа должен располагаться на 5-10 см выше уровня пораженной вены. При склонности к отекам необходимо производить измерения в утреннее время.

Длина окружности, см
(маленькие буквы)

Длина, см
(большие буквы)

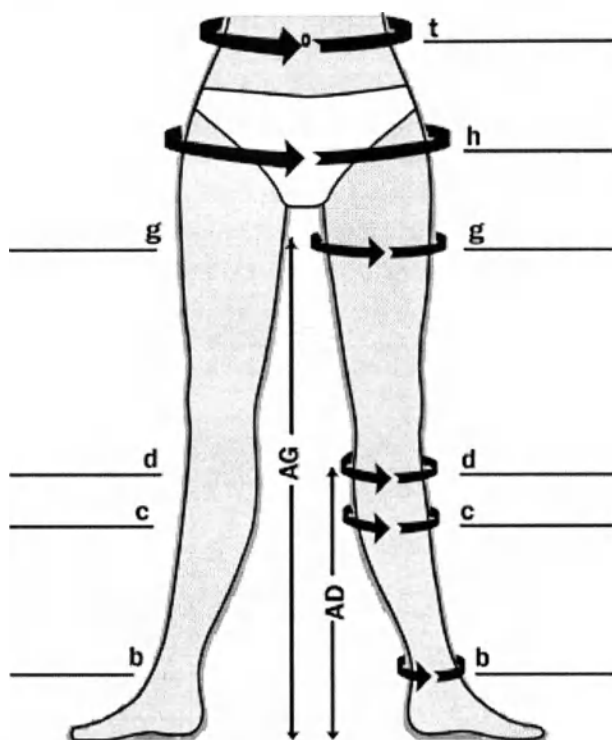

b – длина окружности самой узкой части голени над лодыжками

c – длина окружности самой широкой части голени

d – длина окружности голени ниже подколенной складки на ширину 2-х пальцев

g – длина окружности бедра на 5 см ниже промежности

h – длина окружности самой широкой части бедер

t – длина окружности талии

AD – длина от пятки до измерения d

AG – длина от пятки до измерения g

Размер стандартного изделия определяется с помощью специальных таблиц medi.


Таблица по подбору размеров пользователем для модельных рядов mediven angio, mediven cotton. 1 и 2 классы компрессии.

Для подбора размера изделия необходимо произвести измерения, указанные в первом и втором столбцах таблицы (см. также схему). Для подбора длины изделия необходимо произвести измерения, указанные в предпоследнем и последнем столбцах таблицы (см. также схему). Полученные измерения необходимо сопоставить с данными в таблице и выбрать подходящий размер и длину изделия. Важно: определяющим для подбора размера изделия служит измерение b (длина окружности самой узкой части голени над лодыжками); остальные измерения служат для того, чтобы подтвердить выбранный размер, или понять, что серийное изделие не подходит и требуется изготовление другого изделия на заказ.

Стандартные размеры		I	II	III	IV	V	VI	VII	Длина, см	
Для чулок с резинкой на основе при широких бедрах	g	49-57	52-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	AG для чулок и колготок Стандартная малая	72-83 62-71
Для чулок с резинкой на основе	g	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72		
Для колготок и чулок	g	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85	AD для Гольфов стандартная малая	39-44 34-38
Для гольфов, чулок и колготок	d	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50		
Для гольфов, чулок и колготок	c	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51		
Для гольфов, чулок и колготок	b	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32		

Длина окружности, см
(маленькие буквы)

Длина, см
(большие буквы)

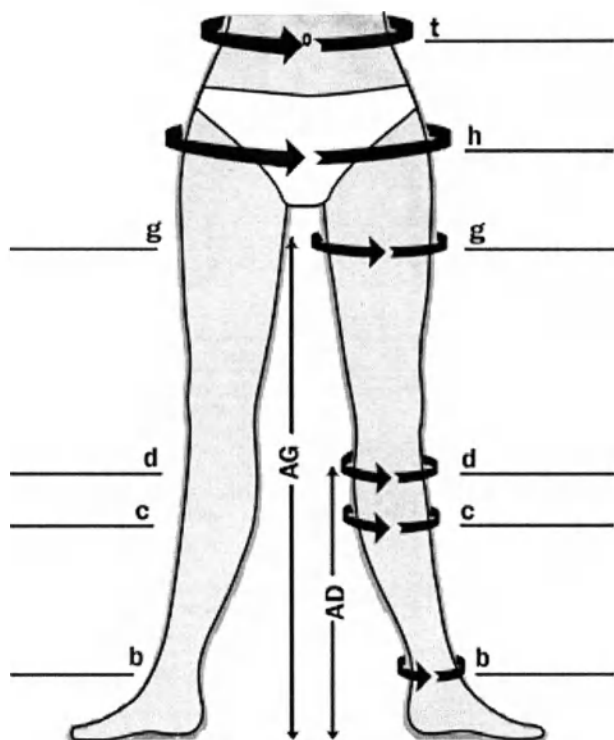


Вид изделия (гольфы, чулки или колготки) и класс компрессии рекомендует врач. Размер и длина изделия подбираются по анатомическим меркам конечности (см. таблицу и схему выше).

Таблица по подбору размеров пользователем для модельного ряда duomed smooth. 1 и 2 классы компрессии

Для подбора размера изделия необходимо произвести измерения, указанные в первом и втором столбцах таблицы (см. также схему). Для подбора длины изделия необходимо произвести измерения, указанные в предпоследнем и последнем столбцах таблицы (см. также схему). Полученные измерения необходимо сопоставить с данными в таблице и выбрать подходящий размер и длину изделия. Важно: определяющим для подбора размера изделия служит изменение *b* (длина окружности самой узкой части голени над лодыжками); остальные измерения служат для того, чтобы подтвердить выбранный размер, или понять, что серийное изделие не подходит и требуется изготовление другого изделия на заказ.

Длина окружности, см
(маленькие буквы)

Длина, см
(большие буквы)

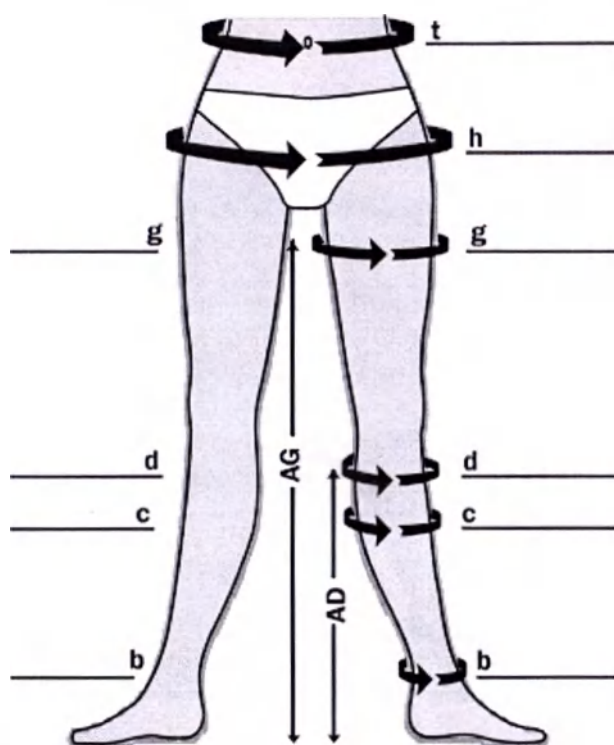

Стандартные размеры		S	M	L	XL	XXL	Длина, см	
Для чулок с резинкой на основе	g	47-54	52-60	56-65	62-72	65-76	AG для чулок и колготок	72-83 62-71
							Стандартная малая	
Для колготок и чулок	g	42-57	48-64	54-71	60-78	65-85	AD для Гольфов стандартная малая	39-44 34-38
Для гольфов, чулок и колготок	d	27-33	31-37	35-41	39-45	41-49		
Для гольфов, чулок и колготок	c	28-34	32-38	36-42	40-46	42-50		
Для гольфов, чулок и колготок	b	19-21	22-24	25-27	28-30	30-32		


Вид изделия (гольфы, чулки или колготки) и класс компрессии рекомендует врач. Размер и длина изделия подбираются по анатомическим меркам конечности (см. таблицу и схему выше).

Таблица по подбору размеров пользователем для модельного ряда medi Rehab one. 1 и 2 классы компрессии.

Для подбора размера изделия необходимо произвести измерения, указанные в первом и втором столбцах таблицы (см. также схему). Для подбора длины изделия необходимо произвести измерения, указанные в предпоследнем и последнем столбцах таблицы (см. также схему). Полученные измерения необходимо сопоставить с данными в таблице и выбрать подходящий размер и длину изделия. Важно: определяющим для подбора размера изделия служит измерение *b* (длина окружности самой узкой части голени над лодыжками); остальные измерения служат для того, чтобы подтвердить выбранный размер, или понять, что серийное изделие не подходит и требуется изготовление другого изделия на заказ.

Длина окружности, см
(маленькие буквы)

Длина, см
(большие буквы)

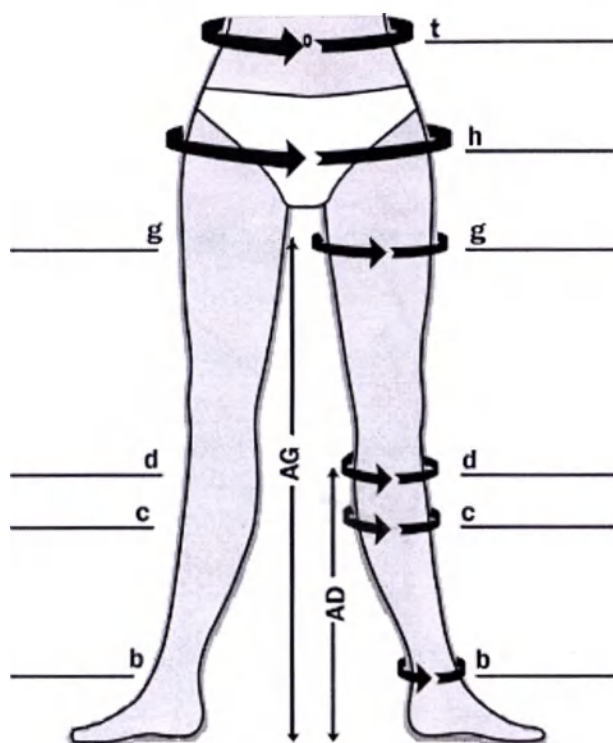

Стандартные размеры		II	III	IV	V	VI	Длина, см	
Для чулок с резинкой на основе при широких бедрах	<i>g</i>	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	AG для чулок Стандартная малая	72-83 62-71
Для чулок с резинкой на основе	<i>g</i>	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68		
Для гольфов и чулок	<i>d</i>	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	AD для Гольфов стандартная малая	39-44 34-38
Для гольфов и чулок	<i>c</i>	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49		
Для гольфов и чулок	<i>b</i>	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30		

Вид изделия (гольфы, чулки или колготки) и класс компрессии рекомендует врач. Размер и длина изделия подбираются по анатомическим меркам конечности (см. таблицу и схему выше).



**Таблица по подбору размеров пользователем для модельного ряда thrombex.
18 мм рт. ст на уровне лодыжек (1 класс компрессии).**

Для подбора размера изделия необходимо произвести измерение b (длина окружности самой узкой части голени над лодыжками) и измерение g (длина окружности бедра на 5 см ниже промежности) (см. также схему). Максимальная длина измерения AG (у пациента) - длина от пола/пятки до верхней трети бедра, при которой чулки будут подходить по длине равна 89 см (см. также схему).

Полученные измерения необходимо сопоставить с данными в таблице и выбрать подходящий размер изделия. Важно: определяющим для подбора размера изделия служит изменение остальные измерения служат для того, чтобы подтвердить выбранный размер, или понять, что серийное изделие не подходит и требуется изготовление другого изделия на заказ.

Длина окружности, см
(маленькие буквы)

Длина, см
(большие буквы)

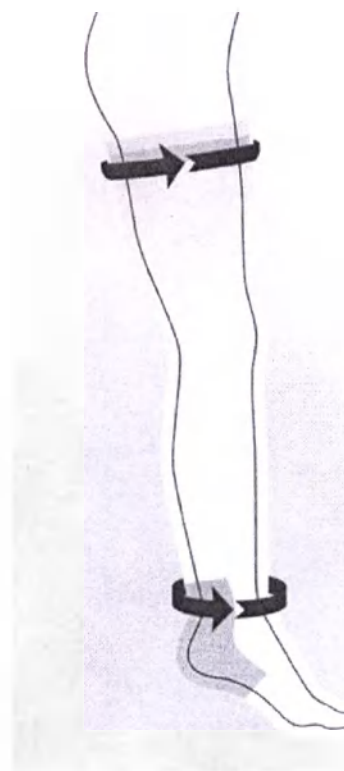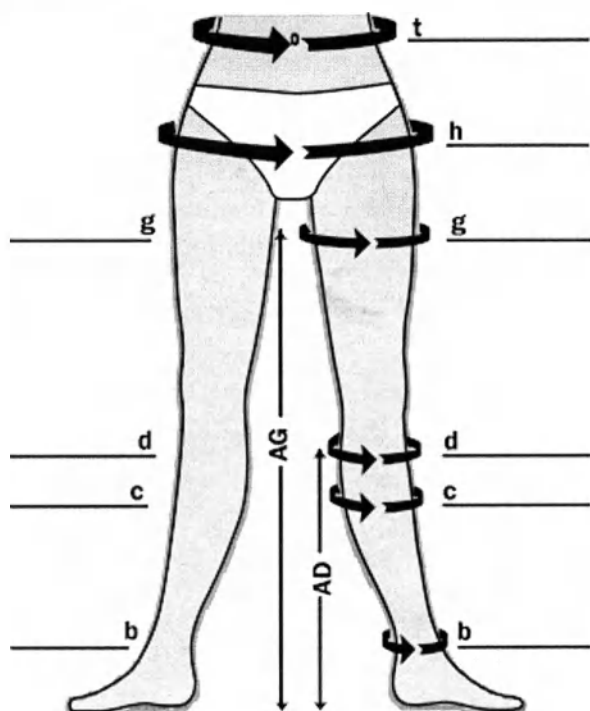

Размер	Длина окружности голени в надлодыжечной области (b), см	Длина окружности верхней трети бедра (g), см
Small (S)	20-22	46-60
Medium (M)	23-25	56-70
Large (L)	26-28	64-80
Extra Large (XL)	29-31	72-90

Класс компрессии рекомендует врач. Размер изделия подбирается по анатомическим меркам конечности (см. таблицу и схему выше).

Обобщенные результаты клинических испытаний, проведенных в целях регистрации медицинского изделия, или ссылка на источник, где такая информация доступна для пользователя

Клиническая оценка компрессионных изделий medi обеспечивает клиническую эффективность и безопасность в соответствии с самыми строгими международными и российскими отраслевыми стандартами.

Технические характеристики, необходимые пользователю для применения медицинского изделия по назначению, определенному производителем

Вариант исполнения	Характеристики	Форма выпуска/ Размеры
Вариант исполнения	Характеристики	1) Форма выпуска/ Размеры/цвет
mediven angio	1) Класс компрессии: CCL 1 = 18 – 21 мм. рт. ст. CCL 2 = 23 – 32 мм. рт. ст. 2) Длина*: Стандартная длина AD=39-44 см Малая длина AD=34-38 см 3) Размер стопы малый: 36 — 40 большой: 40 — 46 4) Тип носка Закрытый	Гольфы (AD) / Стандартные размеры (размер I – VII)/ Цвет исполнения: черный, карамель
mediven cotton	Класс компрессии: CCL 1 = 18 – 21 мм. рт. ст. CCL 2 = 23 – 32 мм. рт. ст. Длина <u>Гольфы**</u>: Стандартная длина AD=39-44 см Малая длина AD=34-38 см <u>Колготки и чулки*</u>: Стандартная длина AG=72-83 см Малая длина AG=62-71 см 3) Размер стопы 36 – 43 4) Тип носка закрытый открытый 5) Тип бедра: <u>Чулки</u>	1) Гольфы (AD) / Стандартные размеры (размер I – VII)/ цвет исполнения: бронза, карамель, черный 2) Чулки (AG) / Стандартные размеры (размер I – VII) / цвет исполнения: бронза, карамель, черный 3) Колготки (AT) / Стандартные размеры (размер I – VII)/ цвет исполнения: бронза, карамель, черный

	Стандартное 43-72 см Широкое 49-85 см <u>Колготки</u> Стандартное 43-85 см	
duomed smooth	1) Класс компрессии: CCL 1 = 18 – 21 мм. рт. ст. CCL 2 = 23 – 32 мм. рт. ст. 2) Длина: <u>Гольфы**</u>: Стандартная длина AD=39-44 см Малая длина AD=34-38 см <u>Колготки и чулки*</u>: Стандартная длина AG=72-83 см Малая длина AG=62-71 см 3) Размер стопы Стандартный 36-43, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный 4) Тип носка Закрытый Открытый 5) Тип бедра <u>Чулки</u> Стандартное 47-76 см <u>Колготки</u> Широкое 42-85 см	1) Гольфы (AD) / Стандартные размеры duomed (S, M, L, XL, XXL) / цвет исполнения: черный, карамель 2) Чулки (AG) / Стандартные размеры duomed (S, M, L, XL, XXL) / цвет исполнения: черный, карамель 3) Колготки (AT) / Стандартные размеры (S, M, L, XL, XXL) / цвет исполнения: черный, карамель
medi Rehab one	1) Класс компрессии CCL 1 = 18 – 21 мм. рт. ст. 2) Длина: <u>Гольфы**</u>: Стандартная длина AD=39-44 см Малая длина AD=34-38 см 3) Размер стопы с открытым носком универсальный с закрытым носком: для изделий стандартной длины 39-43 для изделий малой длины 36-39	1) Гольфы AD / Стандартные размеры II-VI/ цвет исполнения комбинированный: лайм/синий

	4) Тип носка Закрытый Открытый	
	1) Класс компрессии CCL 1 = 18 – 21 мм. рт. ст. 2) Длина: <u>Чулки*</u>: Стандартная длина AG=72-83 см Малая длина AG=62-71 см 3) Размер стопы с открытым носком универсальный с закрытым носком: для изделий стандартной длины 39-43 для изделий малой длины 36-39 4) Тип носка Закрытый Открытый 5) Тип бедра: Стандартное 45-68 см Широкое 53-81см	Чулки AG/ Стандартные размеры II-VI / цвет исполнения комбинированный: лайм/синий
thrombex	1) Класс компрессии: CCL 1 = 18 мм рт. ст. 2) Длина: <u>Чулки*</u>: универсальная длина (до 89 см) 3) Размер стопы: Универсальный (до 46) 4) Тип носка: закрытый с отверстием под пальцами 5) Тип бедра: Стандартное 48-90 см	2) Чулки AG / Стандартные размеры S, M, L, XL / цвет исполнения: белый

* максимальная длина измерения AG (у пациента) - длина от пола/пятки до верхней трети бедра, при которой чулки и колготки будут подходить по длине.

** максимальная длина измерения AD (у пациента) - длина от пола/пятки до голени ниже подколенной складки на ширину 2-х пальцев, при которой гольфы будут подходить по длине.

Информация об условиях применения, хранения, транспортировки

Условия хранения

Хранить в сухом месте и вдали от солнечных лучей.

- Температура -40 до +50°C

- Не подвергать воздействию влажности выше 80%.

Условия транспортировки

Температура -50 до +50°C

Условия применения

- температурный диапазон эксплуатации: от -30°C до +40°C

- относительная влажность: от 30% до 97%

Утилизация



Утилизировать вместе с бытовыми отходами, как отходы класса А.

Символы с расшифровкой

Символ	Расшифровка символы	Место расположения символа
	Стирать изделие вручную в цикле деликатной стирки при 40°C с мягким моющим средством и без кондиционера	Инструкция по применению
	Стирать изделие в цикле деликатной стирки при 95°C с мягким моющим средством и без кондиционера (только для thrombex)	Инструкция по применению
	Не подвергать химчистке	Инструкция по применению
	Не отбеливать	Инструкция по применению
	Не гладить утюгом	Инструкция по применению
	Сушить при низкой температуре	Инструкция по применению
	Не содержит латекса	Инструкция по применению, упаковка
	Изделие можно утилизировать в составе бытовых отходов	Инструкция по применению
	Логотип производителя	Инструкция по применению, упаковка
	Произведено в Германии	Инструкция по применению, упаковка

	Инструкция по применению	Упаковка
	Хранить в защищенном от света месте	Инструкция по применению
	Знак CE	Инструкция по применению, упаковка
	Хранить в сухом месте	Инструкция по применению
	Лаборатория Дермскан (доктор Фейза Бен Аммар): Клиническая оценка переносимости кожей медицинского изделия - исследование по использованию было проведено под дерматологическим контролем, Тунис 2012/2013	упаковка
	Логотип ASQUAL JUILLET (Франция)	упаковка
	QR - код	упаковка
	Логотип "medi world of compression"	упаковка
	Один пациент - многократное использование	упаковка
 Или 	Знак соответствия стандарту RAL-GZ 387	упаковка

	Лесной попечительский совет (FSC) FSC-сертифицированные леса, переработанные материалы и материалы из подтвержденных источников (подтвержденная продукция)	упаковка
	Штрих-код	упаковка
	Производитель	Инструкция по применению, упаковка
	Дата изготовления	упаковка
	Использовать до	упаковка
	Код партии	упаковка
	Номер по каталогу	упаковка
 Или  Или 	Соответствие стандарту OEKO-TEX STANDARD 100 Международной ассоциации исследований и испытаний в области текстильной экологии (Международная ассоциация OEKO-TEX)	упаковка

Сведения о его уполномоченном представителе

Наименование: ООО «МЕДИ РУС»

Адрес: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, дом 4, корп. 1, помещение П 42

Телефон: +7 (495) 374-04-56

e-mail: info@medirus.ru

I. Варианты исполнения:

1. Гольфы компрессионные *mediven angio*, класс компрессии CCL 1, CCL 2; цвет исполнения: черный, карамель; размер I-VII; длина изделия: стандартная, малая; размер стопы: малый (36-40), большой (40-46); тип носка: закрытый, в составе:

- Гольфы компрессионные,
- Инструкция по применению.

2. Гольфы компрессионные *medi Rehab one*, класс компрессии CCL 1, цвет исполнения комбинированный: лайм/синий, размер II-VI, длина изделия: стандартная, малая, тип носка: закрытый или открытый; размер стопы с открытым носком: универсальный, с закрытым носком: 36-46, в составе:

- Гольфы компрессионные,
- Инструкция по применению.

3. Гольфы компрессионные *duomed smooth*, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: черный, карамель; размер (S, M, L, XL, XXL), длина изделия: стандартная, малая; тип носка: закрытый или открытый; размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, в составе:

- Гольфы компрессионные,
- Инструкция по применению.

4. Гольфы компрессионные *mediven cotton*, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: бронза, карамель, черный, размер I-VII, длина изделия: стандартная, малая, тип носка: закрытый или открытый; размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, в составе:

- Гольфы компрессионные,
- Инструкция по применению.

5. Чулки компрессионные *medi Rehab one*, класс компрессии CCL 1, цвет исполнения комбинированный: лайм/синий, размер II-VI, длина изделия: стандартная, малая, размер стопы с открытым носком: универсальный, с закрытым носком: стандартная или малая, тип носка: закрытый или открытый, размер стопы с открытым носком: универсальный, с закрытым носком: 36-46, тип бедра: стандартное, широкое, в составе:

- Чулки компрессионные,
- Инструкция по применению.

6. Чулки компрессионные *duomed smooth*, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: черный, карамель, размер (S, M, L, XL, XXL), длина изделия: стандартная, малая, размер стопы: стандартный, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип носка: закрытый или открытый, размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип бедра: стандартное, в составе:

- Чулки компрессионные,
- Инструкция по применению.

7. Чулки компрессионные *thrombex*, класс компрессии CCL 1, цвет исполнения: белый, размер (S, M, L, XL), длина изделия: универсальная, размер стопы: до 46 размера, тип носка: закрытый с отверстием под пальцами, тип бедра: стандартное, в составе:

- Чулки компрессионные,
- Инструкция по применению.

8. Чулки компрессионные *mediven cotton*, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: бронза, карамель, черный, размер I-VII, длина изделия: стандартная, малая, тип носка: закрытый или открытый, размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип бедра: стандартное, широкое, в составе:

- Чулки компрессионные,
- Инструкция по применению.

9. Колготки компрессионные *duomed smooth*, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: черный, карамель, размер (S, M, L, XL, XXL), длина изделия: стандартная, малая, размер стопы: стандартный, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип носка: закрытый или открытый, размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип бедра: широкое, в составе:

- Колготки компрессионные,
- Инструкция по применению.

10. Колготки компрессионные *mediven cotton*, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: бронза, карамель, черный, размер I-VII, длина изделия: стандартная, малая, тип носка: закрытый или открытый, размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип бедра: широкое, в составе:

- Колготки компрессионные,
- Инструкция по применению.

Данные о выпуске или последнем пересмотре инструкции по применению

Версия 02 от 11.2023

/Логотип: меди (medi)/

«меди ГмбХ & Ко. КГ» (medi GmbH & Co. KG) Медикусштрассе 1 • D-95448 Байройт
(Medicusstraße 1 • D-95448 Bayreuth)

ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ

«меди ГмбХ & Ко. КГ»
Медикусштрассе 1
95448 Байройт
Германия
(Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany)
Тел. +49 921 912-0
Факс +49 921 912-57
medi@medi.de
www.medi.de

Тема: Инструкция по применению

Компания «меди ГмбХ & Ко. КГ», зарегистрированный офис которой располагается по адресу Медикусштрассе 1, 95448 Байройт, Германия, настоящим предоставляет инструкцию по применению для регистрации медицинских изделий (медицинские компрессионный трикотаж), перечисленных ниже:

1. mediven angio
2. medi Rehab one
3. duomed smooth
4. mediven cotton
5. thrombex

С уважением,

/Подпись/

«меди ГмбХ & Ко. КГ»

Генеральный директор

Штефан Вайермюллер (Stefan Weihermueller)

Печать:

/Штамп: меди ГмбХ & Ко. КГ
Медикусштрассе 1
D-95448 Байройт/

«меди». чувствую себя лучше.

Рег. номер в Торговом реестре Байройта HRA 529/HRB 166

Номер плательщика НДС DE 132354257

Лично ответственный партнер:

«меди Фервальтунгсгезельшафт мбХ»

(medi Verwaltungsgesellschaft mbH)

Директора: Штефан Вайермюллер • Герхард Кольб (Gerhard Kolb) •

Дирк Трайбер (Dirk Treiber)

№ сертификата AEOF: DE AEOF 100167

«ХюпоФерайнсбанк» (HypoVereinsbank)

IBAN DE26 7732 0072 0003 0241 48

BIC HYVEDEMM412

«ФР Банк Байройт-Хоф»

(VR Bank Bayreuth-Hof)

IBAN DE42 7806 0896 0006 2059 76

BIC GENODEF1HO1

Настоящим удостоверяю, что подпись на настоящем документе, поставленная в моем присутствии, является собственноручной подписью

г-на Штефана Герберта Вайермюллера (Stefan Herbert Weihermuller)
дата рождения: 30 июля 1961 г.
юридический адрес: Медикусштрассе 1, 95448 Байройт/ГЕРМАНИЯ,
личность которого мною установлена по его удостоверению личности,
действующего от имени и по поручению компании

**«меди Фервальтунгсгезелльшафт мбХ»,
зарегистрированной по адресу: 95448 Байройт, Медикусштрассе 1**

Данное юридическое лицо осуществляет деятельность от имени

**«меди ГмбХ & Ко. КГ»,
зарегистрированной по адресу: 95448 Байройт, Медикусштрассе 1.**

На основании проверки Торгового реестра Земельного суда г. Байройта, проведенной мною 7 ноября 2023 года,

настоящим удостоверяю,

а) что указанная компания «меди ГмбХ & Ко. КГ», расположенная в г. Байройте, зарегистрирована в Разделе А указанного Реестра под № 529, и что компания «меди Фервальтунгсгезелльшафт мбХ», расположенная в Байройте, уполномочена представлять указанную компанию в качестве ее генерального партнера;

б) и что указанная компания «меди Фервальтунгсгезелльшафт мбХ» зарегистрирована в Разделе В указанного Реестра за № 166, и что г-н Штефан Вайермюллер уполномочен представлять указанную компанию.

Байройт, 07.11.2023

/Подпись/
Мануэль Майргюнтер (Manuel Mairgünther), нотариус

*/Рельефный оттиск на самоклеящемся лейбле: Мануэль Майргюнтер * Нотариус г. Байройта/*

Перевод данного текста выполнен переводчиком Пахтуновым Алексеем Владимировичем.

**Российская Федерация
Город Москва
Восьмого декабря две тысячи двадцать третьего года**

Я, Симонян Диана Артуровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Пахтунова Алексея Владимировича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.


Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2023-23-3517

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Симонян

Д.А. Симонян

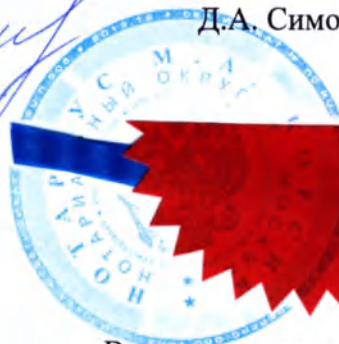

Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью *44* лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

Симонян