

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АЛС МЕДИКА»



А.А. Свистунов
«04» июля 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

№ ИП АЛС/М-004(ИП)/2022

КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ «ALSMED» по ТУ 32.50.13-004-53772808-2022, вариант исполнения (с изменением 2)

Производитель (изготовитель) медицинского изделия:

ООО "АЛС МЕДИКА"

107589, Россия, г. Москва, ул. Алтайская, д. 21, кв. 47

Место производства:

1. JIANGXI YIKANG MEDICAL INSTRUMENT GROUP CO., LTD.

No.188 Liduaihua Ave, Jinxian County, Nanchang, 331725, Jiangxi, P.R. China


2. HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD.

No. 1288 South Jinxi Road Linglong Industrial Park Lin'an District 311301 Hangzhou City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Дата выпуска документа: 14.01.2022 г.

Дата пересмотра документа: 04.07.2023 г.

Без ограничения срока действия

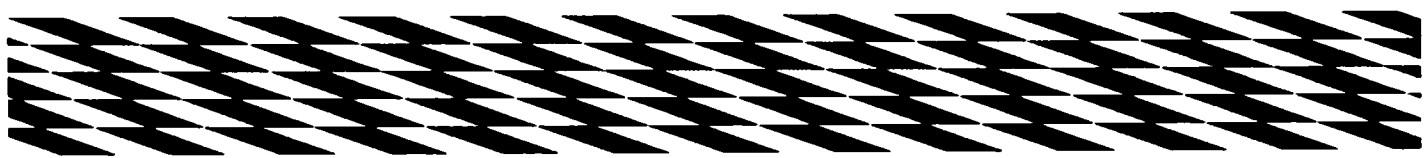

Наименование товара	КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ ФОЛЕЯ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ «ALSMED» по ТУ 32.50.13-004-53772808-2022, вариант исполнения
Дата пересмотра	04.07.2023
Номер документа	№ ИП АЛС/М-004(ИП)/2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ)	4
2. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА).....	5
3. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	6
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	21
5. ПРИНАЛЕЖНОСТИ	51
6. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	52
7. ОБЛАСТЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ.....	53
8. ОСНОВНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.....	54
9. КЛАССИФИКАЦИЯ	55
10. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	56
11. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	57
12. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ЭФФЕКТЫ).....	58
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ИЗДЕЛИЮ.....	59
14. ОПИСАНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	123
15. СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ	128
16. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	129
17. МАРКИРОВКА	135
18. УПАКОВКА.....	142
19. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ.....	148
20. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	150
21. УТИЛИЗАЦИЯ	151
22. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	152
23. РЕКЛАМАЦИИ	153
24. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ.....	154
ДЛЯ ЗАМЕТОК	156

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛС МЕДИКА"
ООО "АЛС МЕДИКА"
107589, Россия, г. Москва, ул. Алтайская, д. 21, кв. 47

2. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА)

1. JIANGXI YIKANG MEDICAL INSTRUMENT GROUP CO., LTD.

No.188 Liduaihua Ave, Jinxian County, Nanchang, 331725, Jiangxi, P.R. China

2. HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD.

**No. 1288 South Jinxi Road Linglong Industrial Park Lin'an District 311301
Hangzhou City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.**

3. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Медицинское изделие:

Катетер урологический Фолея стерильный одноразовый «ALSMED» по ТУ 32.50.13-004-53772808-2022, вариант исполнения

I. Катетер Фолея двухходовой латексный, вариант исполнения:

1. Катетер Фолея двухходовой (размер 6 Ch/FR (2,0 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- проводник - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

2. Катетер Фолея двухходовой (размер 8 CH/FR (2,7 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- проводник - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

3. Катетер Фолея двухходовой (размер 10 CH/FR (3,3 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- проводник - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

4. Катетер Фолея двухходовой (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-10 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

5. Катетер Фолея двухходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

6. Катетер Фолея двухходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

7. Катетер Фолея двухходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

8. Катетер Фолея двухходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

9. Катетер Фолея двухходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

10. Катетер Фолея двухходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 11. Катетер Фолея двухходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 12. Катетер Фолея двухходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 13. Катетер Фолея двухходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 14. Катетер Фолея двухходовой (размер 6 Ch/FR (2,0 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - проводник - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 15. Катетер Фолея двухходовой (размер 8 CH/FR (2,7 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - проводник - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 16. Катетер Фолея двухходовой (размер 10 CH/FR (3,3 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - проводник - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 17. Катетер Фолея двухходовой (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-10 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 18. Катетер Фолея двухходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 19. Катетер Фолея двухходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 20. Катетер Фолея двухходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 21. Катетер Фолея двухходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем

баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

22. Катетер Фолея двухходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

23. Катетер Фолея двухходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

24. Катетер Фолея двухходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

25. Катетер Фолея двухходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

26. Катетер Фолея двухходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

27. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 5-10 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

28. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

29. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

30. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

31. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

32. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 33. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 34. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 35. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 5-10 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 36. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 37. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 38. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 39. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 40. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 41. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 42. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 43. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, мягкий клапан) в составе:
 - катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
- 44. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 14 CH/FR (4,7 мм),

длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

45. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

46. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

47. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

48. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

49. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

50. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

51. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

52. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

53. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

54. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

55. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

56. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

57. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

58. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

59. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

60. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

61. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

62. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

II. Катетер Фолея трехходовой латексный, вариант исполнения:

63. Катетер Фолея трехходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

64. Катетер Фолея трехходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

65. Катетер Фолея трехходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

66. Катетер Фолея трехходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

67. Катетер Фолея трехходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

68. Катетер Фолея трехходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

69. Катетер Фолея трехходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

70. Катетер Фолея трехходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

71. Катетер Фолея трехходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

72. Катетер Фолея трехходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

73. Катетер Фолея трехходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

74. Катетер Фолея трехходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

75. Катетер Фолея трехходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

76. Катетер Фолея трехходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

77. Катетер Фолея трехходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

78. Катетер Фолея трехходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
79. Катетер Фолея трехходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
80. Катетер Фолея трехходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
81. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 10 мл, объем баллона №2 - 30 мл, мягкий клапан) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
82. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
83. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
84. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
85. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
86. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
87. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
88. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 26 CH/FR (8,7

мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

89. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

90. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

91. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 10 мл, объем баллона №2 - 30 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

92. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

93. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

94. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

95. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

96. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

97. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий

клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

98. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

99. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

100. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

III. Катетер Фолея двухходовой силиконовый, вариант исполнения:

101. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 6 Ch/Fr (2,0 мм), длина 330 мм, объем баллона 1,5 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- проводник - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

102. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 8 CH/FR (2,7 мм), длина 330 мм, объем баллона 2 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- проводник - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

103. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 10 CH/FR (3,3 мм), длина 330 мм, объем баллона 3-5 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- проводник - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

104. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

105. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

106. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

107. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

108. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

109. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

110. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

111. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

112. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

113. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

114. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 5 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

115. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

116. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

117. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

118. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
119. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
120. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
121. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
122. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
123. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
124. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
125. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
126. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
127. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
128. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.
129. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
 - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

IV. Катетер Фолея трехходовой силиконовый, вариант исполнения:

130. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

131. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

132. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

133. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

134. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

135. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

136. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

137. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

138. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

139. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

140. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 10 мл, объем баллона №2 - 30 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

141. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

142. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

143. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

144. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

145. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

146. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

147. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

148. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

149. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

150. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм),

длина 250 мм, объем баллона 5 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

151. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

152. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

153. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

154. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

155. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.

Место производства:

1. JIANGXI YIKANG MEDICAL INSTRUMENT GROUP CO., LTD.

No.188 Liduaihua Ave, Jinxian County, Nanchang, 331725, Jiangxi, P.R. China

2. HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD.

No. 1288 South Jinxi Road Linglong Industrial Park Lin'an District 311301 Hangzhou City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Подробная информация о количестве изделий в упаковках указана в таблице 1.

Дополнительные комплектующие или принадлежности вместе с катетерами не поставляются.

Таблица 1.

Наименование изделия (вариант исполнения)	Состав	Кол-во в индивидуальной упаковке катетера одного исполнения	Кол-во индивидуальных упаковок в групповой упаковке (пенале)	Кол-во индивидуальных упаковок в транспортной упаковке
Катетер Фолея двухходовой латексный, вариант исполнения:				
Катетер Фолея двухходовой (размер 6 CH/FR (2,0 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 8 CH/FR (2,7 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 10 CH/FR (3,3 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-10 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

Катетер Фолея двухходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

Катетер Фолея двухходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 6 Ch/FR (2,0 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 8 CH/FR (2,7 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 10 CH/FR (3,3 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, жесткий	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по	1	10	500

клапан) в составе:	применению - 1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-10 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению -	1	10	500

30 мл, жесткий клапан) в составе:	1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 5-10 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 260 мм, объем	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению -	1	10	500

баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 260 мм, объем	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению -	1	10	500

баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 5-10 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 260 мм, объем	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению -	1	10	500

баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой женский (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по	- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	1	10	500

Тиманну (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея трехходовой латексный, вариант исполнения:				
Катетер Фолея трехходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

Катетер Фолея трехходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

Катетер Фолея трехходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

Катетер Фолея трехходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 10 мл, объем баллона №2 - 30 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 18 CH/FR (6,0 мм),	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению -	1	10	500

длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:	1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

№1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:				
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 10 мл, объем баллона №2 - 30 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

№2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:				
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан)	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

в составе:				
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

Катетер Фолея двухходовой силиконовый, вариант исполнения:

Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 6 CH/FR (2,0 мм), длина 330 мм, объем баллона 1,5 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 8 CH/FR (2,7 мм), длина 330 мм, объем баллона 2 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 10 CH/FR (3,3 мм), длина 330 мм, объем баллона 3-5 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на	1	10	500

30-50 мл) в составе:	каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500

30-50 мл) в составе:	каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 5 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 250 мм, объем	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на	1	10	500

баллона 30-50 мл) в составе:	каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый с	- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	1	10	500

концом по Тиманну (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на	1	10	500

мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	каждые 10 шт.			
Катетер Фолея трехходовой силиконовый, вариант исполнения:				
Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5- 15 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на	1	10	500

30-50 мл) в составе:	каждые 10 шт.			
Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 10 мл, объем баллона №2 - 30 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый с	- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	1	10	500

дополнительным баллоном (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:	- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по	1	10	500

(размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:	применению - 1 шт. на каждые 10 шт.			
Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 30 CH/FR (10,0 мм),	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на	1	10	500

длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе:	каждые 10 шт.			
Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 5 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	- катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	1	10	500
Катетер Фолея трехходовой силиконовый	- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	1	10	500

женский (размер
22 CH/FR (7,3
мм), длина 250
мм, объем
баллона 30-50
мл) в составе:

- инструкция
по
применению -
1 шт. на
каждые 10 шт.

5. ПРИНАЛЕЖНОСТИ

Принадлежности отсутствуют.

6. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия предназначены для дренирования мочевого пузыря в среднесрочном и долгосрочном периоде до или после хирургических и урологических вмешательств и/или диагностических манипуляций.

7. ОБЛАСТЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения изделия - в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях квалифицированным и подготовленным персоналом (медработником).

Катетеры Фолея предназначены для применения в мочевыводящих путях пациентов.

Катетер Фолея - медицинское приспособление, изготовленное из латекса с силиконовым покрытием или силикона и применяемое в медицине при лечении некоторых урологических заболеваний, затрудняющих или даже полностью останавливающих самостоятельный процесс мочеиспускания.

Латекс используется в качестве основного материала благодаря способности изменять жесткость катетера в зависимости от температуры окружающей среды: при комнатной температуре установка катетера Фолея из латекса облегчается из-за повышенной жесткости латекса, а после катетер размягчается за счет тепла тела, что исключает возникновение дискомфорта у пациента.

Силиконовый катетер применяется у пациентов с аллергией на латекс.

8. ОСНОВНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Основной потребитель:

Изделия могут использоваться в ЛПУ различного профиля квалифицированным медицинским персоналом для пациентов.

Доступ к изделиям детей и подростков без наблюдения квалифицированного медицинского персонала не допускается.

Условия применения (эксплуатации) медицинского изделия:

Катетеры в условиях эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения У6 (от +32 до +42 С).

Условия транспортирования:

Изделие транспортируется любыми видами транспорта, такими как крытые железнодорожные вагоны, контейнеры, грузовой автотранспорт, судовые трюмы, обогреваемые герметичные авиационные модули в соответствии с правилами для этих видов транспорта с соблюдением условий транспортировки без риска повреждения упаковки.

- Температура транспортировки от +5°C до +35°C.

- Атмосферное давление 84-106,7 кПа.

- Относительная влажность воздуха: не более 96%.

При перевозке изделий в упаковке изготовителя (картонной коробке) не допускается бросать ее, прикладывать к ней усилия или ставить на нее предметы, приводящие к ее деформации. Не допускается попадание на упаковку влаги и агрессивных сред.

Условия хранения:

Катетер до использования должен храниться на складах в закрытой упаковке и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от влаги и прямых солнечных лучей. Воздух помещения не должен содержать коррозионно-активных примесей.

- Температура хранения от +5°C до +35°C.

- Атмосферное давление 84-106,7 кПа.

- Относительная влажность воздуха: не более 96%.

9. КЛАССИФИКАЦИЯ

Медицинскому изделию присвоен класс 2а.

Регуляторный орган	Класс	Ссылка	Документ
Министерство здравоохранения РФ	Класс 2а	Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 ГОСТ 31508	Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 ГОСТ 31508

10. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Показания к применению по использованию катетера:

- эвакуация мочи из мочевыводящих путей, когда самостоятельный ее отход невозможен или очень сильно затруднен в связи с травмами или заболеваниями.

Также изделие применяется в следующих случаях:

- необходимость удаления сгустков крови;
- при новообразованиях простаты, мочевого пузыря и мочеочника;
- для послеоперационного восстановления просвета уретры (бужирование);
- при доброкачественной гиперплазии предстательной железы;
- наличие рубцов после травм уретры;
- отечность уретры вследствие воспалительных процессов.

Катетеризации подлежат пациенты, сознательно не контролирующие мочеиспускание, больные в коме, пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, пациенты с травмами позвоночника, во время проведения общей анестезии.

В целях диагностики катетеризация выполняется при наличии таких показаний:

- забор мочи для исследования;
- введение контрастных веществ для ультразвуковой диагностики; выявление патологий и нарушений целостности, проходимости мочевыводящих путей;
- ретроградное введение рентгеноконтраста (цистоуретерография);
- уродинамическое обследование;
- введение лекарственных препаратов;

Введение в баллон большого количества жидкости (30 - 50 мл.) позволяет использовать катетер для остановки уретральных кровотечений.

11. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Катетер Фолея не применяется при наличии следующих случаев:

- аллергическая реакция на материал изделия;
- уретрит инфекционного происхождения;
- анурия;
- спастическое сужение сфинктера уретры;
- острые воспалительные процессы в мочеиспускательном канале и мочевом пузыре (так как способствует распространению инфекции);
- травма мочевого пузыря;
- острый простатит;
- выраженная стриктура уретры;
- новообразования простаты;
- перелом полового члена;
- острый уретрит;
- цистит;
- орхоэпидидимит;
- абсцесс простаты;
- спазмы сфинктера;
- подозрение на разрыв уретры;
- травмы, которые сопровождаются перфорацией уретры.

12. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ЭФФЕКТЫ)

Нежелательные реакции и возможные осложнения при применении медицинского изделия: к числу нежелательных реакций при применении катетеров Фолея относятся:

- Уретрит;
- Септицемия;
- Катетер-ассоциированная инфекция мочевых путей;
- Инкрустация катетера;
- Спастическая боль в области мочевого пузыря;
- Дискомфорт над лоном.


К числу известных возможных осложнений относятся:

- Повреждение слизистой оболочки мочеиспускательного канала;
- Инкрустация катетера с последующим нарушением его проходимости.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ИЗДЕЛИЮ


Катетер должен соответствовать требованиям технических условий и изготавливаться по технологической документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

Конструктивное исполнение компонентов катетера должно соответствовать схематичным изображениям, приведенным на рисунках 1 – 19.

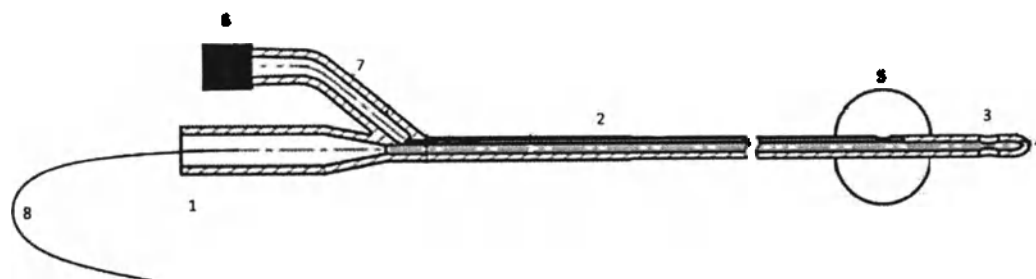


1. Дренажная воронка 2. Трубка катетера 3. Дренажные отверстия
4. Дистальный конец 5. Баллон 6. Клапан (мягкий)
7. Порт для наполнения баллона 8. Встроенный проводник

Рисунок 1 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея двухходовой», исполнение латекс,
размеры 6 CH/FR, 8 CH/FR, 10 CH/FR

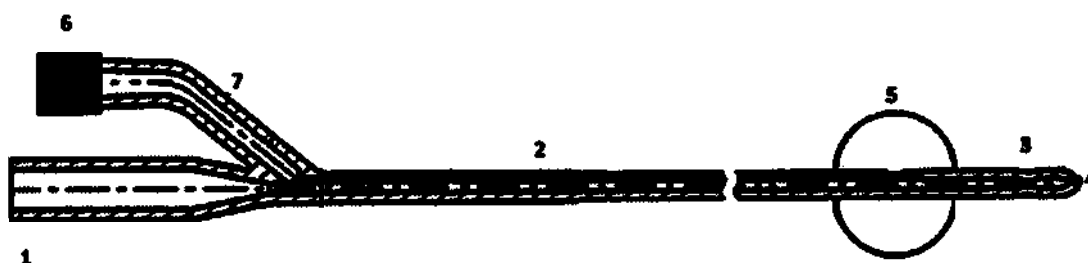


1. Дренажная воронка 2. Трубка катетера 3. Дренажные отверстия
4. Дистальный конец 5. Баллон 6. Клапан (мягкий)
7. Порт для наполнения баллона


Рисунок 2 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея двухходовой», исполнение латекс

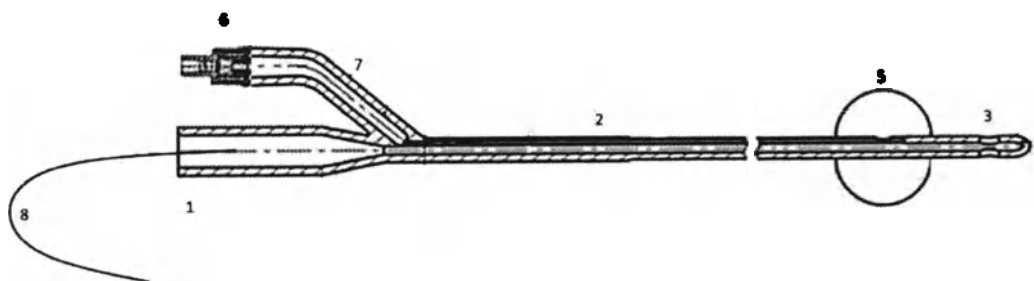


1. Дренажная воронка 2. Трубка катетера 3. Дренажные отверстия
4. Дистальный конец 5. Баллон 6. Клапан (жесткий)
7. Порт для наполнения баллона 8. Встроенный проводник
Рисунок 3 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея двухходовой», исполнение латекс,
размеры 6 CH/FR, 8 CH/FR, 10 CH/FR

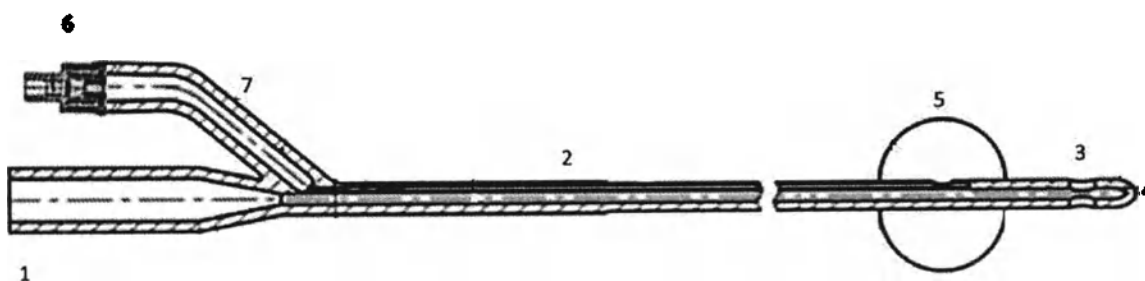

1. Дренажная воронка 2. Трубка катетера 3. Дренажные отверстия
4. Дистальный конец 5. Баллон 6. Клапан (жесткий)
7. Порт для наполнения баллона
Рисунок 4 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея двухходовой», исполнение латекс

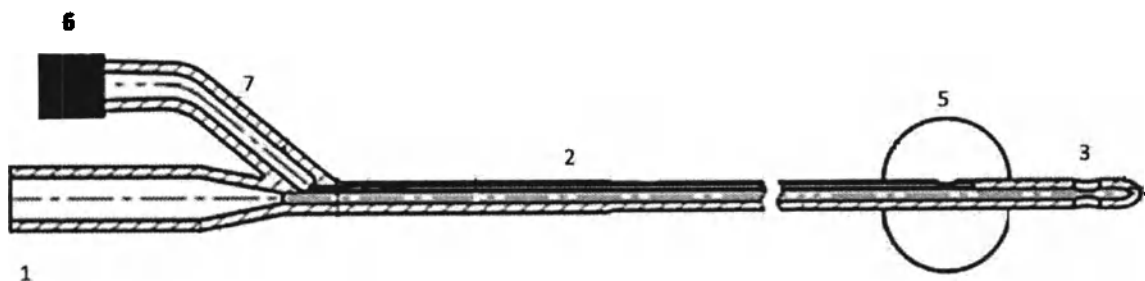


1. Дренажная воронка 2. Трубка катетера 3. Дренажные отверстия
4. Дистальный конец 5. Баллон 6. Клапан (мягкий)
7. Порт для наполнения баллона
Рисунок 5 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея двухходовой женский», исполнение латекс

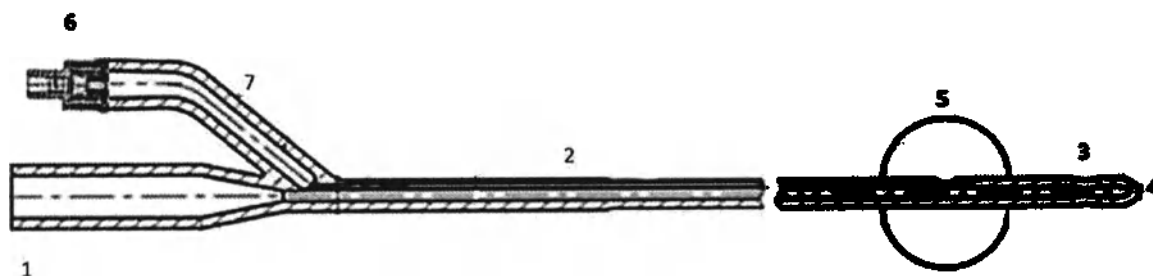


1. Дренажная воронка 2. Трубка катетера 3. Дренажные отверстия
4. Дистальный конец 5. Баллон 6. Клапан (жесткий)
7. Порт для наполнения баллона

Рисунок 6 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея двухходовой женский», исполнение латекс

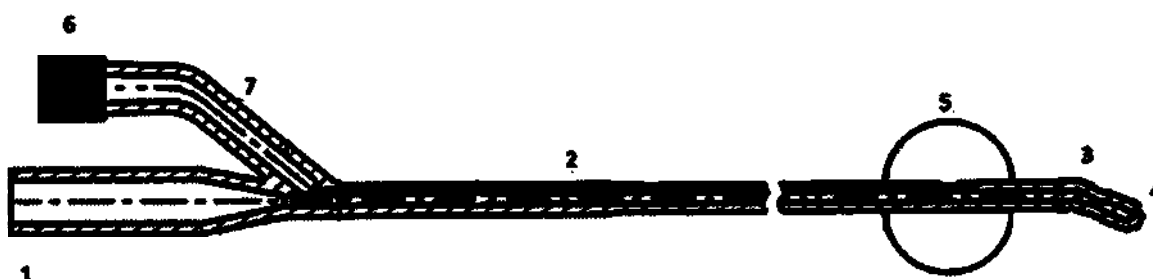


1. Дренажная воронка 2. Трубка катетера 3. Дренажные отверстия
4. Дистальный конец 5. Баллон 6. Клапан (мягкий)
7. Порт для наполнения баллона

Рисунок 7 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну», исполнение латекс

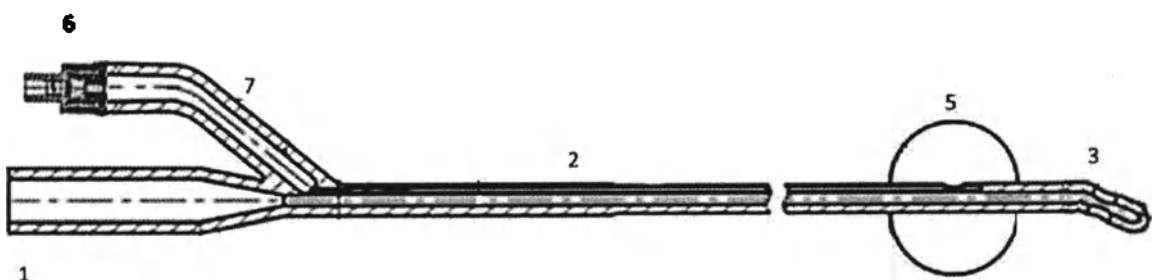


1. Дренажная воронка 2. Трубка катетера 3. Дренажные отверстия
4. Дистальный конец 5. Баллон 6. Клапан (жесткий)
7. Порт для наполнения баллона


Рисунок 8 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну», исполнение латекс

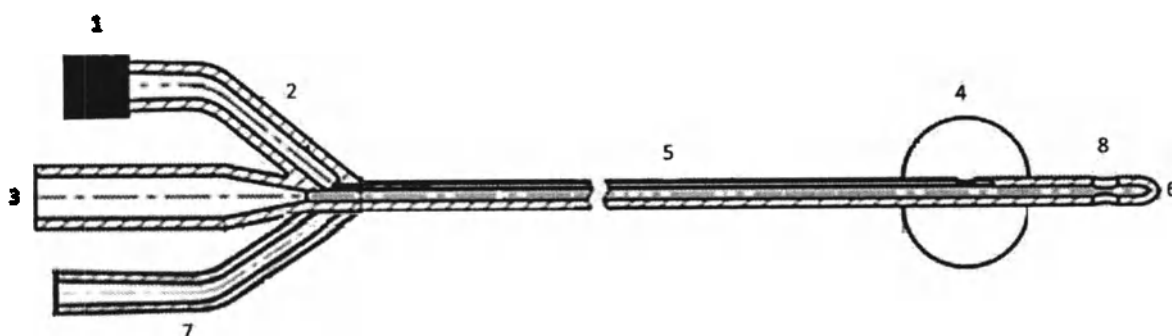

1. Клапан (мягкий) 2. Порт для наполнения баллона
3. Дренажная воронка
4. Баллон 5. Трубка катетера 6. Дистальный конец
7. Порт для введения медикаментов 8. Дренажные отверстия
Рисунок 9 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея трехходовой», исполнение латекс

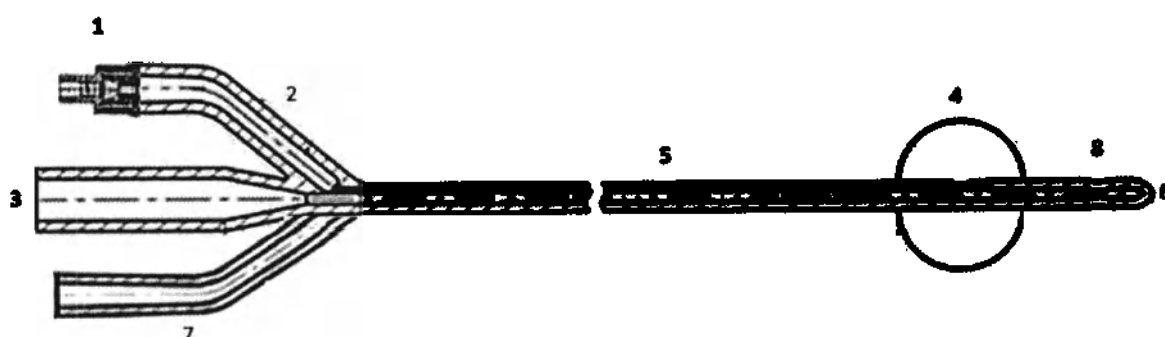


1. Клапан (жесткий) 2. Порт для наполнения баллона
3. Дренажная воронка
4. Баллон 5. Трубка катетера 6. Дистальный конец
7. Порт для введения медикаментов 8. Дренажные отверстия
Рисунок 10 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея трехходовой», исполнение латекс

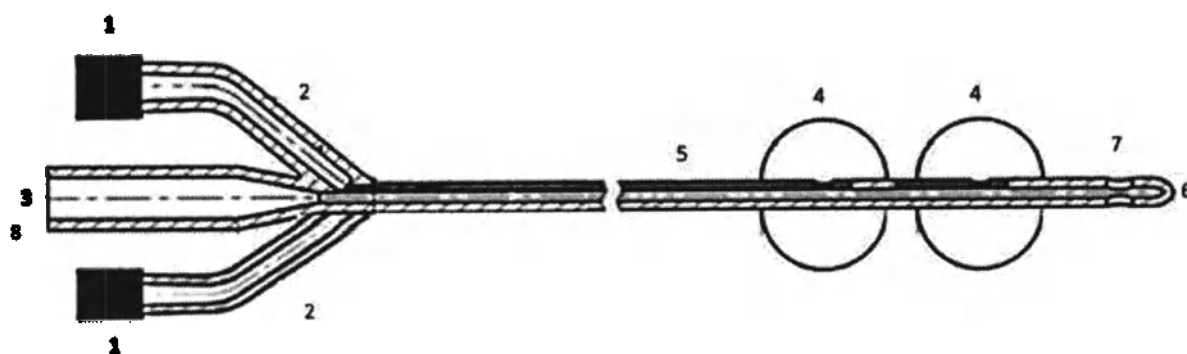


1. Клапан (мягкий) 2. Порт для наполнения баллона
3. Дренажная воронка 4. Баллон 5. Трубка катетера 6. Дистальный конец
7. Дренажные отверстия 8. Ход для введения медикаментов

Рисунок 11 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном», исполнение латекс

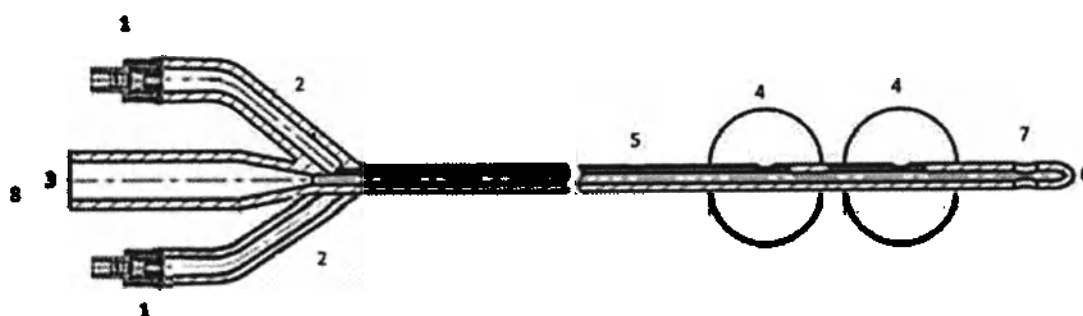


1. Клапан (жесткий) 2. Порт для наполнения баллона
3. Дренажная воронка 4. Баллон 5. Трубка катетера 6. Дистальный конец
7. Дренажные отверстия 8. Ход для введения медикаментов

Рисунок 12 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном», исполнение латекс

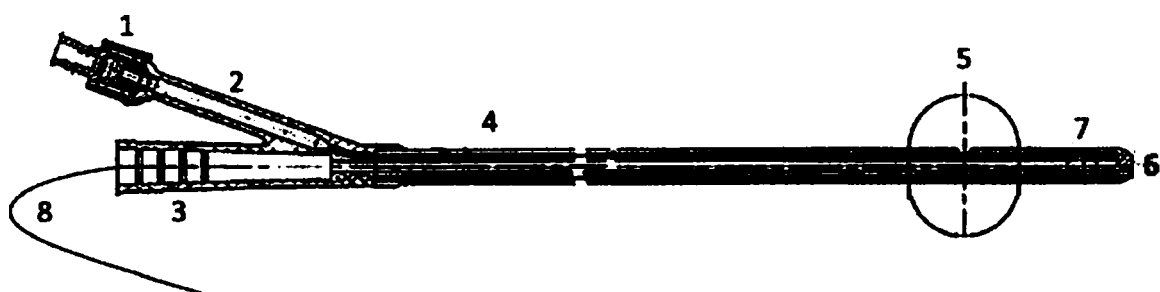

1. Клапан (жесткий) 2. Порт для наполнения баллона
 3. Дренажная воронка 4. Трубка катетера 5. Баллон
 6. Дистальный конец 7. Дренажные отверстия 8. Встроенный проводник
- Рисунок 13 – Типовое схематическое изображение
 «Катетер Фолея двухходовой силиконовый», исполнение силикон
 размеры 6 CH/FR, 8 CH/FR, 10 CH/FR

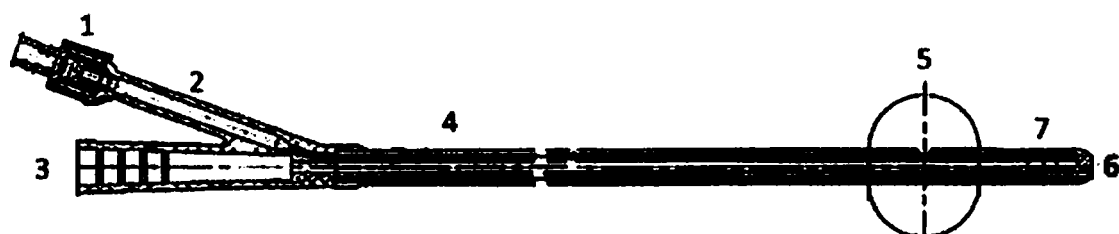


1. Клапан (жесткий) 2. Порт для наполнения баллона
 3. Дренажная воронка 4. Трубка катетера 5. Баллон
 6. Дистальный конец 7. Дренажные отверстия
- Рисунок 14 – Типовое схематическое изображение
 «Катетер Фолея двухходовой силиконовый», исполнение силикон




1. Клапан (жесткий) 2. Порт для наполнения баллона
3. Дренажная воронка 4. Трубка катетера 5. Баллон
6. Дистальный конец 7. Дренажные отверстия

**Рисунок 15 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский», исполнение силикон**

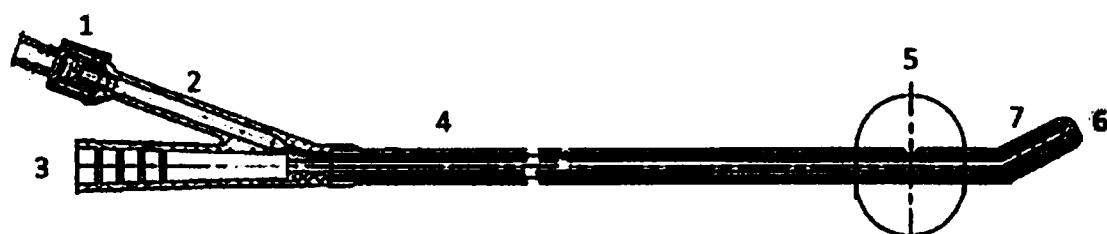

1. Клапан (жесткий) 2. Порт для наполнения баллона
3. Дренажная воронка 4. Трубка катетера 5. Баллон
6. Дистальный конец 7. Дренажные отверстия

**Рисунок 16 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну»,
исполнение силикон**

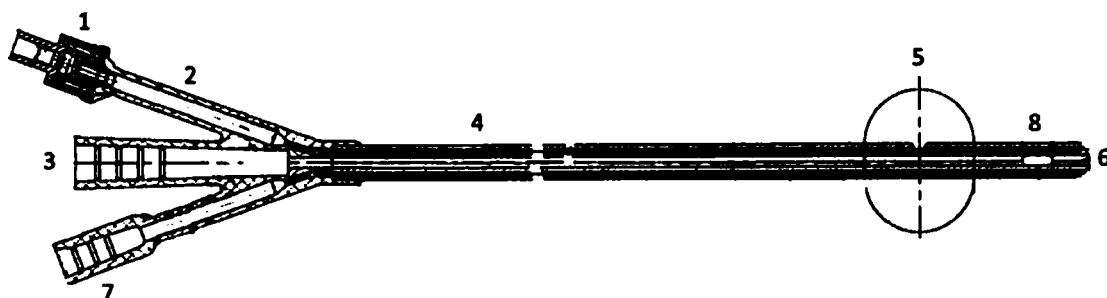


1. Клапан (жесткий) 2. Порт для наполнения баллона
3. Дренажная воронка 4. Трубка катетера 5. Баллон
6. Дистальный конец 7. Порт для введения медикаментов
8. Дренажные отверстия

Рисунок 17 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея трехходовой силиконовый», исполнение силикон



1. Клапан (жесткий) 2. Порт для наполнения баллона
3. Дренажная воронка 4. Трубка катетера 5. Баллон
6. Дистальный конец 7. Дренажные отверстия 8. Ход для введения
медикаментов

Рисунок 18 – Типовое схематическое изображение
«Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном»,
исполнение силикон

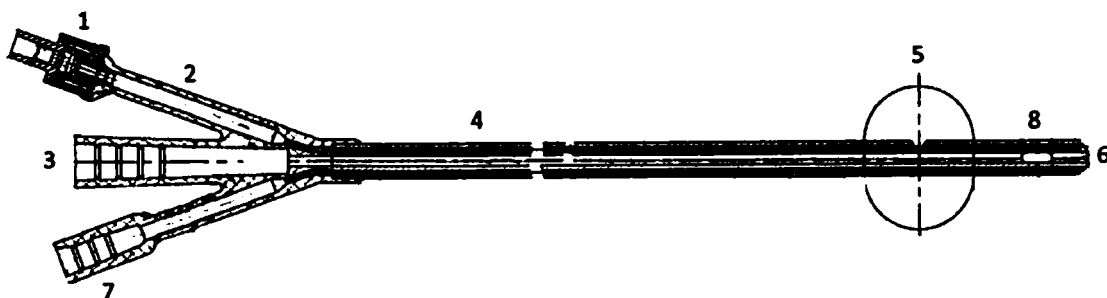

1. Клапан (жесткий) 2. Порт для наполнения баллона
3. Дренажная воронка 4. Трубка катетера 5. Баллон
6. Дистальный конец 7. Порт для введения медикаментов
8. Дренажные отверстия

Рисунок 19 – Типовое схематическое изображение

«Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский», исполнение силикон
Условные обозначения вариантов исполнения катетеров представлено ниже:

Вариант исполнения	Условное обозначение
Катетер Фолея двухходовой латексный	
1. Катетер Фолея двухходовой (размер 6 Ch/FR (2,0 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ1
2. Катетер Фолея двухходовой (размер 8 CH/FR (2,7 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ2
3. Катетер Фолея двухходовой (размер 10 CH/FR (3,3 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ3
4. Катетер Фолея двухходовой (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-10 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ4
5. Катетер Фолея двухходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ5
6. Катетер Фолея двухходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ6

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
7. Катетер Фолея двухходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ7
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
8. Катетер Фолея двухходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ8
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
9. Катетер Фолея двухходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ9
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
10. Катетер Фолея двухходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ10
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
11. Катетер Фолея двухходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ11
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
12. Катетер Фолея двухходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ12
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
13. Катетер Фолея двухходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ13
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
14. Катетер Фолея двухходовой (размер 6 Ch/FR (2,0 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ14
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- проводник - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
15. Катетер Фолея двухходовой (размер 8 CH/FR (2,7 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ15
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- проводник - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
16. Катетер Фолея двухходовой (размер 10 CH/FR (3,3 мм), длина 280 мм, объем баллона 3-5 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ16
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- проводник - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
17. Катетер Фолея двухходовой (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина	КФЛ17

400 мм, объем баллона 5-10 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
18. Катетер Фолея двухходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ18
19. Катетер Фолея двухходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ19
20. Катетер Фолея двухходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ20
21. Катетер Фолея двухходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ21
22. Катетер Фолея двухходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ22
23. Катетер Фолея двухходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ23
24. Катетер Фолея двухходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ24
25. Катетер Фолея двухходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ25
26. Катетер Фолея двухходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ26
27. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 5-10 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ27
28. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.;	КФЛ28

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
29. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ29
30. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ30
31. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ31
32. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ32
33. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ33
34. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ34
35. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 5-10 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ35
36. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ36
37. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ37
38. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ38
39. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ39
40. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм),	КФЛ40

длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
41. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ41
42. Катетер Фолея двухходовой женский (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 260 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ42
43. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ43
44. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ44
45. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ45
46. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ46
47. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ47
48. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ48
49. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ49

50. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ50
51. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ51
52. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ52
53. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ53
54. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ54
55. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ55
56. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ56
57. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ57
58. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ58
59. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 24	КФЛ59

CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
60. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ60
61. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ61
62. Катетер Фолея двухходовой с концом по Тиманну (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ62
Катетер Фолея трехходовой латексный	
63. Катетер Фолея трехходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ63
64. Катетер Фолея трехходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ64
65. Катетер Фолея трехходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ65
66. Катетер Фолея трехходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ66
67. Катетер Фолея трехходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ67
68. Катетер Фолея трехходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ68
69. Катетер Фолея трехходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ69

- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
70. Катетер Фоля трехходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ70
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
71. Катетер Фоля трехходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, мягкий клапан) в составе:	КФЛ71
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
72. Катетер Фоля трехходовой (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ72
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
73. Катетер Фоля трехходовой (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ73
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
74. Катетер Фоля трехходовой (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ74
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
75. Катетер Фоля трехходовой (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ75
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
76. Катетер Фоля трехходовой (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ76
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
77. Катетер Фоля трехходовой (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ77
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
78. Катетер Фоля трехходовой (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ78
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
79. Катетер Фоля трехходовой (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ79
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
80. Катетер Фоля трехходовой (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30 мл, жесткий клапан) в составе:	КФЛ80
- катетер урологический Фоля - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	

81. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 10 мл, объем баллона №2 - 30 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ81
82. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ82
83. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ83
84. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ84
85. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ85
86. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ86
87. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ87
88. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ88
89. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ89
90. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер	КФЛ90

30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, мягкий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
91. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 10 мл, объем баллона №2 - 30 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ91
92. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ92
93. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ93
94. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ94
95. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ95
96. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ96
97. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ97
98. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ98
99. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем	КФЛ99

баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
100. Катетер Фолея трехходовой с дополнительным баллоном (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл, жесткий клапан) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФЛ100
Катетер Фолея двухходовой силиконовый	
101. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 6 Ch/Fr (2,0 мм), длина 330 мм, объем баллона 1,5 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС101
102. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 8 CH/FR (2,7 мм), длина 330 мм, объем баллона 2 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС102
103. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 10 CH/FR (3,3 мм), длина 330 мм, объем баллона 3-5 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - проводник - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС103
104. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС104
105. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС105
106. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС106
107. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС107
108. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС108
109. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	КФС109

- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
110. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	КФС110
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
111. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	КФС111
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
112. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	КФС112
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
113. Катетер Фолея двухходовой силиконовый (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	КФС113
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
114. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 5 мл) в составе:	КФС114
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
115. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе:	КФС115
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
116. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	КФС116
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
117. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	КФС117
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
118. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	КФС118
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
119. Катетер Фолея двухходовой силиконовый женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе:	КФС119
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	
- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
120. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5 мл) в составе:	КФС120
- катетер урологический Фолея - 1 шт.;	

- инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
121. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС121
122. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС122
123. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС123
124. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС124
125. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС125
126. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС126
127. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС127
128. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС128
129. Катетер Фолея двухходовой силиконовый с концом по Тиманну (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС129

Катетер Фолея трехходовой силиконовый	
130. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 5 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС130
131. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС131
132. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС132
133. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС133
134. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС134
135. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС135
136. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС136
137. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС137
138. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС138
139. Катетер Фолея трехходовой силиконовый (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС139
140. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 12 CH/FR (4,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 10 мл, объем баллона №2 - 30 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС140

141. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС141
142. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС142
143. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС143
144. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС144
145. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС145
146. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 24 CH/FR (8,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС146
147. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 26 CH/FR (8,7 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС147
148. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 28 CH/FR (9,3 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС148
149. Катетер Фолея трехходовой силиконовый с дополнительным баллоном (размер 30 CH/FR (10,0 мм), длина 400 мм, объем баллона №1 - 30 мл, объем баллона №2 - 50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС149
150. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 12	КФС150

CH/FR (4,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 5 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	
151. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 14 CH/FR (4,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 5-15 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС151
152. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 16 CH/FR (5,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС152
153. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 18 CH/FR (6,0 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС153
154. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 20 CH/FR (6,7 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС154
155. Катетер Фолея трехходовой силиконовый женский (размер 22 CH/FR (7,3 мм), длина 250 мм, объем баллона 30-50 мл) в составе: - катетер урологический Фолея - 1 шт.; - инструкция по применению - 1 шт. на каждые 10 шт.	КФС155

По основным параметрам и техническим характеристикам катетер должен соответствовать нормам, приведенным в таблицах 2 – 17 и рисункам 20-35.

Катетер Фолея двухходовой латексный

(размеры CH/Fr: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (клапан: мягкий)):

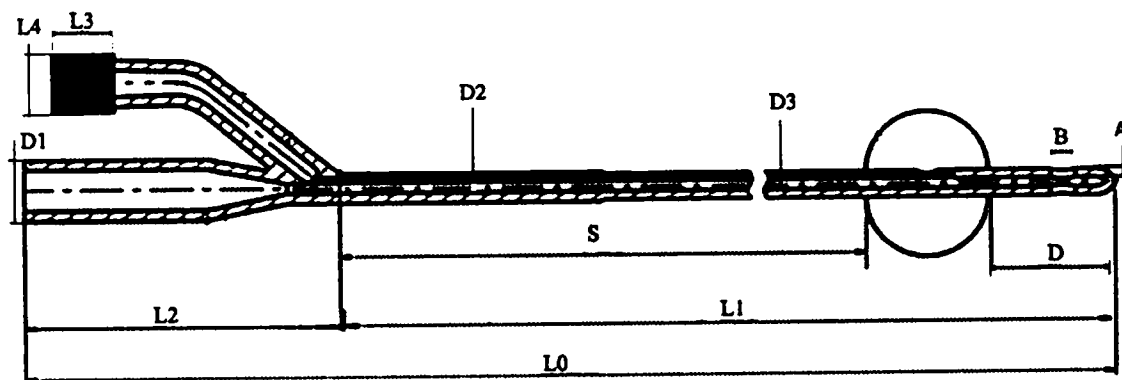


Рисунок 20 – Типовое обозначение размеров

Таблица 2 – Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ1	КФЛ2	КФЛ3	КФЛ4	КФЛ5	КФЛ6	КФЛ7
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	6	8	10	12	14	16	18
Общая длина катетера (L0), мм	280±15			400±15			
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	215±15			330±15			
Наружный диаметр клапана мягкого, мм	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2
Внутренний диаметр клапана мягкого, мм	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5
Длина мягкого клапана, мм	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона, мм	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр трубки катетера (D2), мм	2±0.3	2.7±0.3	3.3±0.3	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	1.1±0.3	1.7±0.3	2.3±0.3	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3
Наружный диаметр порта для	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2

наполнения баллона (L4), мм							
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	175±25	175±25	175±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	3-5	3-5	3-5	5-10	30	30	30
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	10	15	30	50	70	100	100
Цветовой код размера катетера	светло-красный	черный	серый	белый	зеленый	оранжевый	красный
Ширина дренажных отверстий (A), мм	0.7±0.5	0.9±0.5	1.0±0.5	2.0±1	2.0±1	3.0±1	3.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	1.8±1	2.4±1	3.0±1	4.0±1	5.0±1	6.0±1	7.4±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	15±5	15±5	15±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Продолжение таблицы 2 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ8	КФЛ9	КФЛ10	КФЛ11	КФЛ12	КФЛ13
Размер по шкале Шарьера (Сb/Fr)	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15					
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15					
Наружный диаметр клапана мягкого, мм	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2
Внутренний диаметр клапана мягкого, мм	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5
Длина мягкого клапана, мм	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона, мм	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр трубки катетера (D2), мм	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L4), мм	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	30	30	30	30	30	30
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	3.5±1	3.5±1	3.5±1	4.0±1	4.0±1	4.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	7.4±1	7.5±1	8.5±1	9.0±1	9.0±1	9.0±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70

Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея двухходовой латексный

(размеры CH/Fr: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (клапан: жесткий))

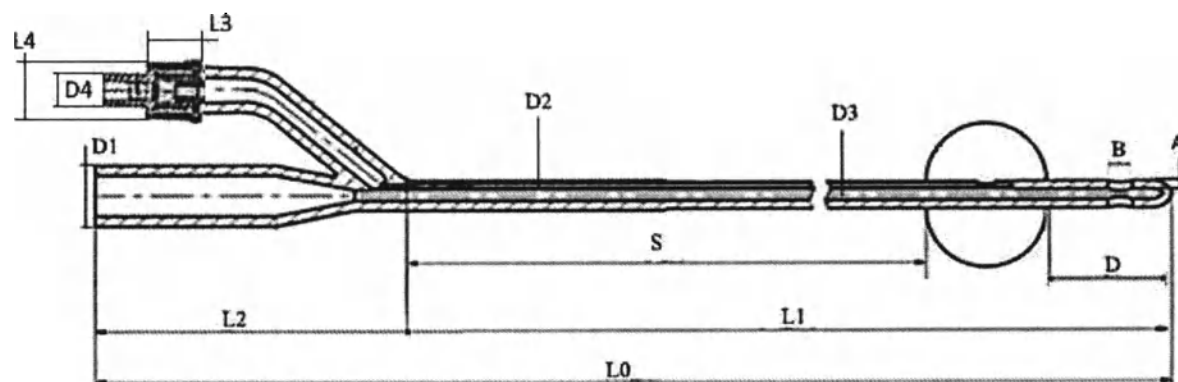


Рисунок 21 – Типовое обозначение размеров

Таблица 3 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ14	КФЛ15	КФЛ16	КФЛ17	КФЛ18	КФЛ19	КФЛ20
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	6	8	10	12	14	16	18
Общая длина катетера (L0), мм	280±15			400±15			
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	215±15			330±15			
Наружный диаметр клапана жесткого, мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого (D4), мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона (без учета длины клапана), мм	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр трубки катетера (D2), мм	2±0.3	2.7±0.3	3.3±0.3	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3
Внутренний диаметр трубки кате-	1.1±0.3	1.7±0.3	2.3±0.3	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3

тера (D3), мм							
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L4), мм	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	175±25	175±25	175±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	3-5	3-5	3-5	5-10	30	30	30
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	10	15	30	50	70	100	100
Цветовой код размера катетера	светло-красный	черный	серый	белый	зеленый	оранжевый	красный
Ширина дренажных отверстий (A), мм	0.7±0.5	0.9±0.5	1.0±0.5	2.0±1	2.0±1	3.0±1	3.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	1.8±1	2.4±1	3.0±1	4.0±1	5.0±1	6.0±1	7.4±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	15±5	15±5	15±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Продолжение таблицы 3 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ21	КФЛ22	КФЛ23	КФЛ24	КФЛ25	КФЛ26
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15					
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15					
Наружный диаметр клапана жесткого, мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого (D4), мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона (без учета длины клапана), мм	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр трубки катетера (D2), мм	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L4), мм	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	30	30	30	30	30	30
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	3.5±1	3.5±1	3.5±1	4.0±1	4.0±1	4.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	7.4±1	7.5±1	8.5±1	9.0±1	9.0±1	9.0±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100

Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея двухходовой латексный

(размеры CH/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (женский, клапан: мягкий)):

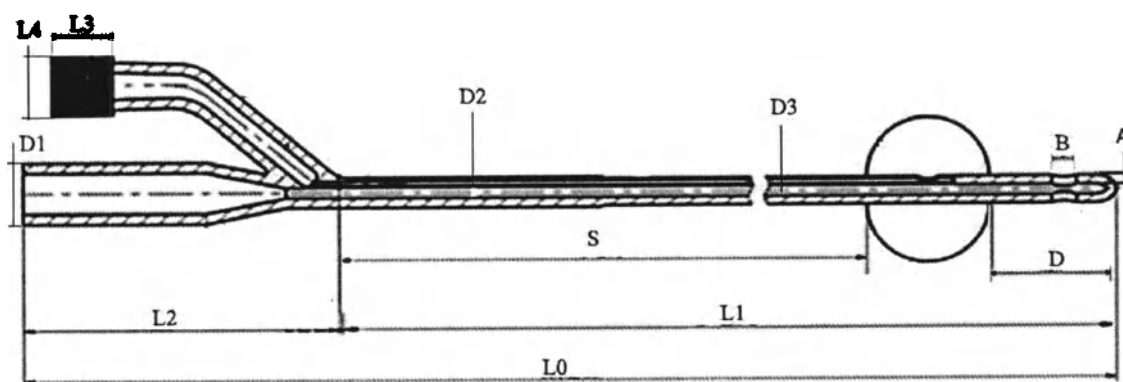


Рисунок 22 – Типовое обозначение размеров

Таблица 4 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ27	КФЛ28	КФЛ29	КФЛ30	КФЛ31	КФЛ32	КФЛ33	КФЛ34
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	12	14	16	18	20	22	24	26
Общая длина катетера (L0), мм	260±15							
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	200±15							
Наружный диаметр клапана мягкого, мм	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2
Внутренний диаметр клапана мягкого, мм	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5
Длина мягкого клапана, мм	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона, мм	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр трубки катетера (D2), мм	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3

Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L4), мм	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25
Объем баллона, мл	5-10	30	30	30	30	30	30	30
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	50	70	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	белый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	2.0±1	2.0±1	3.0±1	3.0±1	3.5±1	3.5±1	3.5±1	4.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	4.0±1	5.0±1	6.0±1	7.4±1	7.4±1	7.5±1	8.5±1	9.0±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея двухходовой латексный

(размеры CH/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (женский, клапан: жесткий)):

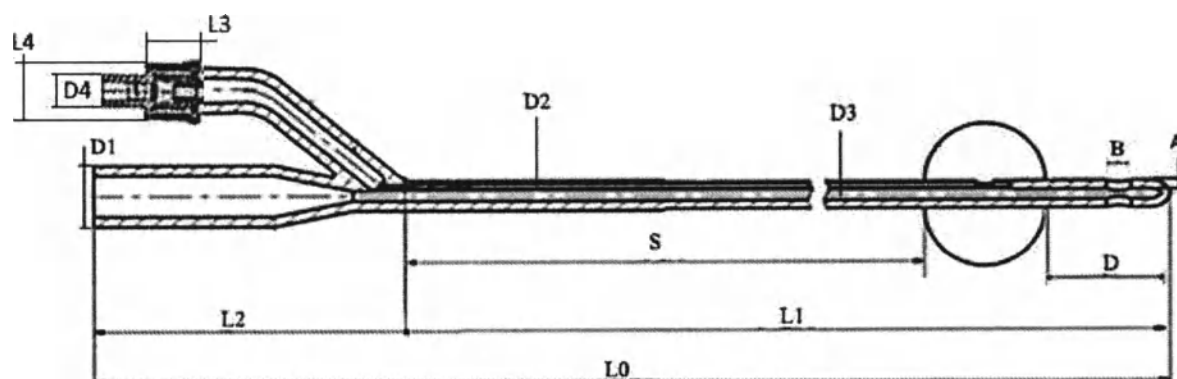


Рисунок 23 – Типовое обозначение размеров

Таблица 5 – Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ35	КФЛ36	КФЛ37	КФЛ38	КФЛ39	КФЛ40	КФЛ41	КФЛ42
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	12	14	16	18	20	22	24	26
Общая длина катетера (L0), мм	260±15							
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	200±15							
Наружный диаметр клапана жесткого, мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого (D4), мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона, мм	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр трубки катетера (D2), мм	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3

мм								
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L4), мм	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25
Объем баллона, мл	5-10	30	30	30	30	30	30	30
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	50	70	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	белый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	2.0±1	2.0±1	3.0±1	3.0±1	3.5±1	3.5±1	3.5±1	4.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	4.0±1	5.0±1	6.0±1	7.4±1	7.4±1	7.5±1	8.5±1	9.0±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея двухходовой латексный

(размеры СН/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (Тиманн, клапан: мягкий)):

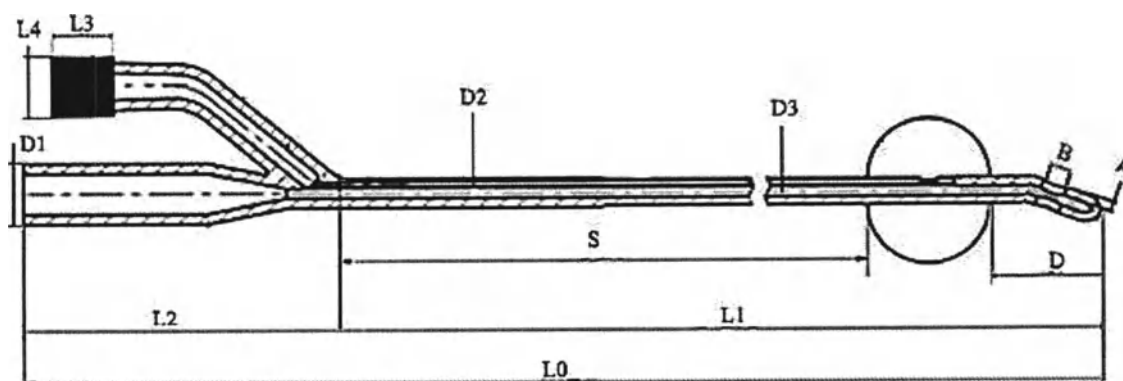


Рисунок 24 – Типовое обозначение размеров

Таблица 6 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ43	КФЛ44	КФЛ45	КФЛ46	КФЛ47	КФЛ48	КФЛ49	КФЛ50	КФЛ51	КФЛ52
Размер по шкале Шарье-ра (СН/Fr)	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15									
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15									
Наружный диаметр клапана мягкого, мм	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2
Внутренний диаметр клапана мягкого, мм	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5
Длина мягкого клапана, мм	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3
Длина цвето-вого кода раз-мера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренаж-ной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполне-ния баллона, мм	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10
Наружный диаметр дре-нажной ворон-ки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дре-нажной ворон-ки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр труб-ки катетера (D2), мм	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3
Внутренний диаметр труб-ки катетера	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3

(D3), мм										
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L4), мм	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	5-15	5-15	30	30	30	30	30	30	30	30
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	белый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	2.0±1	2.0±1	3.0±1	3.0±1	3.5±1	3.5±1	3.5±1	4.0±1	4.0±1	4.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	4.0±1	5.0±1	6.0±1	7.4±1	7.4±1	7.5±1	8.5±1	9.0±1	9.0±1	9.0±1
Расстояние от конца накопника катетера до начала баллона (D), мм	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	ТИМАНН 	ТИМАНН 	ТИМАНН 	ТИМАНН 	ТИМАНН 	ТИМАНН 	ТИМАНН 	ТИМАНН 	ТИМАНН 	ТИМАНН 
Угол изгиба дистального конца, °	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15

Катетер Фолея двухходовой латексный

(размеры CH/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (Тиманн, клапан: жесткий)):

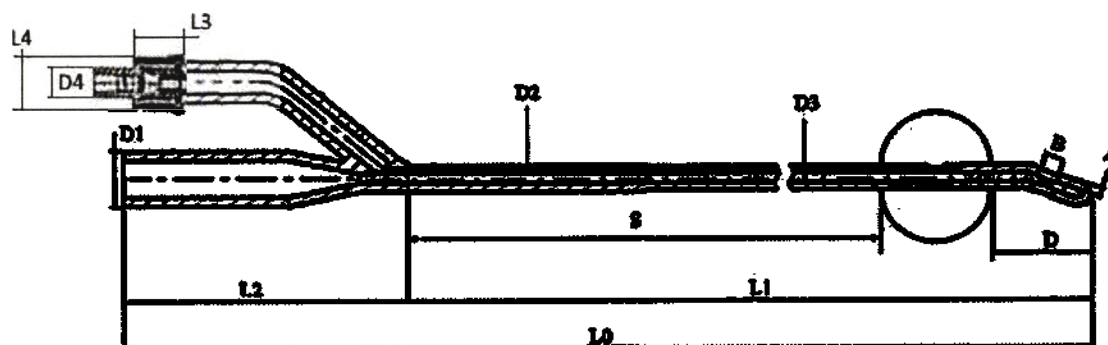


Рисунок 25 – Типовое обозначение размеров

Таблица 7 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КОЛ53	КОЛ54	КОЛ55	КОЛ56	КОЛ57	КОЛ58	КОЛ59	КОЛ60	КОЛ61	КОЛ62
Размер по шкале Шарье-ра (CH/Fr)	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15									
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15									
Наружный диаметр клапана жесткого, мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого (D4), мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина цветного кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона, мм	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр трубки катетера (D2), мм	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3

Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L4), мм	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	5-15	5-15	30	30	30	30	30	30	30	30
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	белый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	2.0±1	2.0±1	3.0±1	3.0±1	3.5±1	3.5±1	3.5±1	4.0±1	4.0±1	4.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	4.0±1	5.0±1	6.0±1	7.4±1	7.4±1	7.5±1	8.5±1	9.0±1	9.0±1	9.0±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5	40±5
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Тимани 	Тимани 	Тимани 	Тимани 	Тимани 	Тимани 	Тимани 	Тимани 	Тимани 	Тимани 
Угол изгиба дистального конца, °	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15	145±15

Катетер Фолея трехходовой латексный

(размеры CH/Fr: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (клапан: мягкий)):

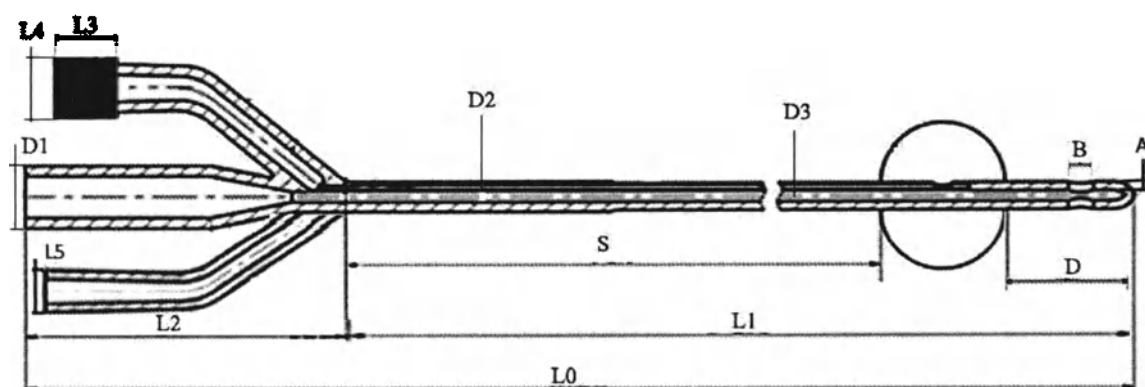


Рисунок 26 – Типовое обозначение размеров

Таблица 8 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ63	КФЛ64	КФЛ65	КФЛ66	КФЛ67	КФЛ68	КФЛ69	КФЛ70	КФЛ71
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15								
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15								
Наружный диаметр клапана мягкого, мм	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2
Внутренний диаметр клапана мягкого, мм	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5
Длина мягкого клапана, мм	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона, мм	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10
Длина порта для введения медикаментов, мм	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10
Наружный диаметр порта для введения медикаментов, (L5), мм	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1
Внутренний диаметр порта для введения медикаментов, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр трубки ка-	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3

катетера (D2), мм									
Диаметр ирригационного отверстия, мм	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L4), мм	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	70	100	100	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	2.0±1	3.0±1	3.0±1	3.5±1	3.5±1	3.5±1	4.0±1	4.0±1	4.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	5.0±1	6.0±1	7.4±1	7.4±1	7.5±1	8.5±1	9.0±1	9.0±1	9.0±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея трехходовой латексный

(размеры СН/Fr: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (клапан: жесткий)):

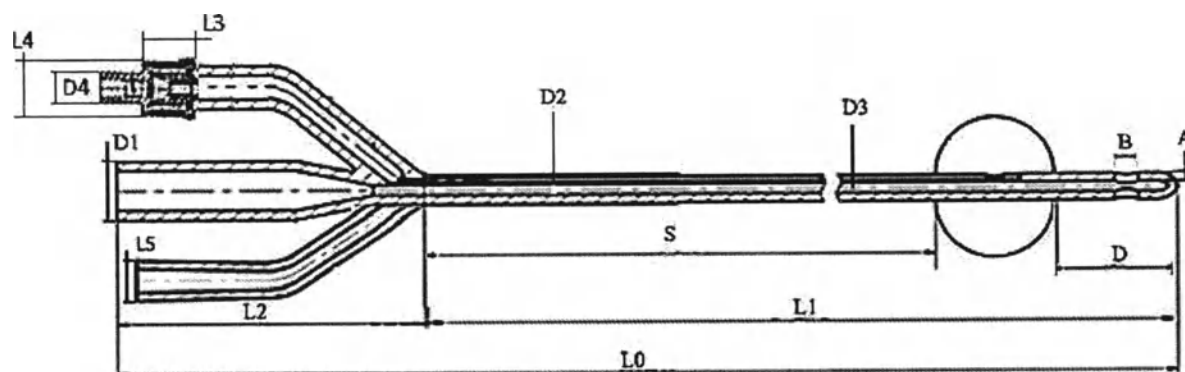


Рисунок 27 – Типовое обозначение размеров

Таблица 9 – Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ72	КФЛ73	КФЛ74	КФЛ75	КФЛ76	КФЛ77	КФЛ78	КФЛ79	КФЛ80
Размер по шкале Шарьера (СН/Fr)	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15								
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15								
Наружный диаметр клапана жесткого, мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого (D4), мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона, мм	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10
Длина порта для введения медикаментов, мм	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10
Наружный диаметр порта для введения медикаментов, (L5), мм	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1	10±1
Внутренний диаметр порта для введения медикаментов, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Диаметр пригнатионного отверстия, мм	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1

Воронка, мм									
Наружный диаметр трубки катетера (D2), мм	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3
Наружный диаметр порта для наведения баллона (L4), мм	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	70	100	100	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	2.0±1	3.0±1	3.0±1	3.5±1	3.5±1	3.5±1	4.0±1	4.0±1	4.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	5.0±1	6.0±1	7.4±1	7.4±1	7.5±1	8.5±1	9.0±1	9.0±1	9.0±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея трехходовой латексный

(размеры СН/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (с дополнительным баллоном, клапан: мягкий)):

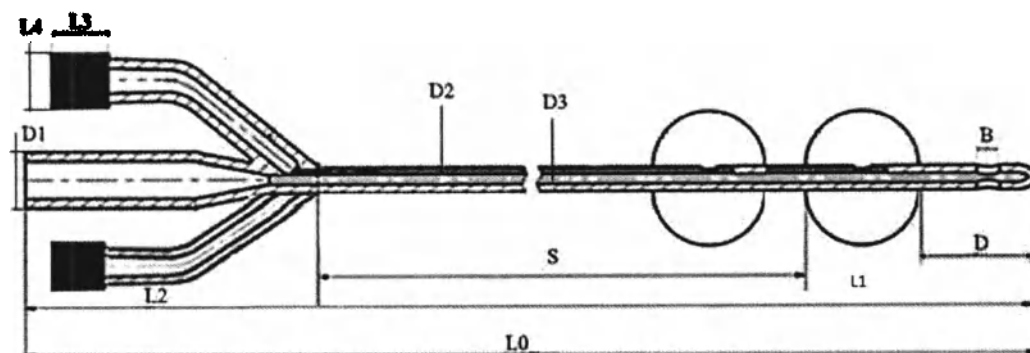


Рисунок 28 – Типовое обозначение размеров

Таблица 10 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ81	КФЛ82	КФЛ83	КФЛ84	КФЛ85	КФЛ86	КФЛ87	КФЛ88	КФЛ89	КФЛ90
Размер по шкале Шарьера (СН/Fr)	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15									
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15									
Наружный диаметр клапана мягкого, мм	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2
Внутренний диаметр клапана мягкого, мм	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5	3.0±0,5
Длина мягкого клапана, мм	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3	20.0±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона, мм	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр трубки катетера (D2), мм	4.7±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	3.3±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3
Наружный диа-	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2

метр порта для наполнения баллона (L4), мм										
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона №1, мл	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Объем баллона №2, мл	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	зеленый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	2.0±1	2.0±1	3.0±1	3.0±1	3.5±1	3.5±1	3.5±1	4.0±1	4.0±1	4.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	5.0±1	5.0±1	6.0±1	7.4±1	7.4±1	7.5±1	8.5±1	9.0±1	9.0±1	9.0±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Расстояние между баллонами, мм	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея трехходовой латексный

(размеры CH/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (с дополнительным баллоном, клапан: жесткий)):

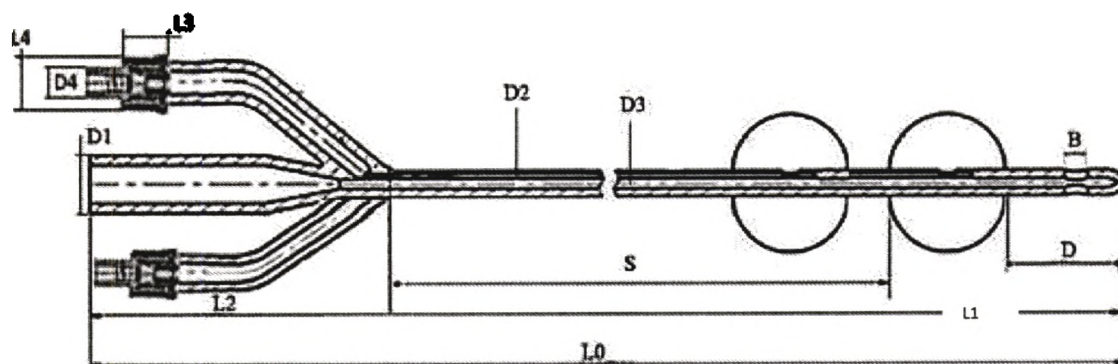


Рисунок 29 – Типовое обозначение размеров

Таблица 11 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФЛ91	КФЛ92	КФЛ93	КФЛ94	КФЛ95	КФЛ96	КФЛ97	КФЛ98	КФЛ99	КФЛ100
Размер по шкале Шарье-ра (Ch/Fr)	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15									
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15									
Наружный диаметр клапана жесткого, мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого (D4), мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2	14.0±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10	55±10
Длина порта для наполнения баллона, мм	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15	65±15
Наружный диаметр дренажной воронки (D1), мм	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1	11.0±1
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1	7.5±1
Наружный диаметр трубки катетера (D2), мм	4.7±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3

Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	3.3±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L4), мм	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2	11.0±2
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Диаметр иригационного отверстия, мм	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3
Объем баллона №1, мл	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Объем баллона №2, мл	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	зеленый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	2.0±1	2.0±1	3.0±1	3.0±1	3.5±1	3.5±1	3.5±1	4.0±1	4.0±1	4.0±1
Длина дренажных отверстий (B), мм	5.0±1	5.0±1	6.0±1	7.4±1	7.4±1	7.5±1	8.5±1	9.0±1	9.0±1	9.0±1
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Расстояние между баллонами, мм	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов катетера, ≥ Н	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Тип дисталь- ного конца	Прямой ΣD	Прямой ΣD	Прямой ΣD	Прямой ΣD	Прямой ΣD	Прямой ΣD	Прямой ΣD	Прямой ΣD	Прямой ΣD	Прямой ΣD
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Катетер Фолея двухходовой силиконовый

(размеры СН/Fr: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (клапан: жесткий)):

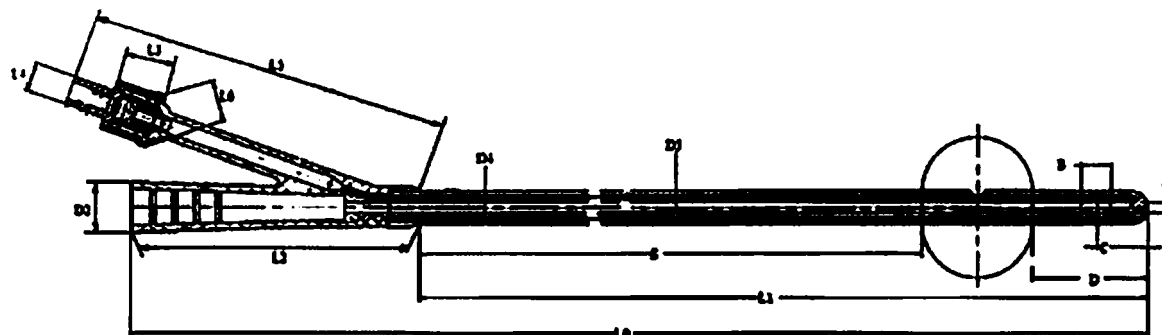


Рисунок 30 – Типовое обозначение размеров

Таблица 12 – Характеристики изделия

Условное обозначение	КФС101	КФС102	КФС103	КФС104	КФС105	КФС106	КФС107
Размер по шкале Шарьера (СН/Fr)	6	8	10	12	14	16	18
Общая длина катетера (L0), мм	330±15			400±15			
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	250±15			330±15			
Наружный диаметр клапана жесткого (L4), мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого, мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина порта для наполнения баллона (L5), мм	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L6), мм	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1
Наружный диаметр дренажной воронки (D2), мм	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2
Наружный диаметр трубки катетера (D4), мм	2±0.3	2.7±0.3	3.3±0.3	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	1.1±0.3	1.7±0.3	2.3±0.3	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	250±25	250±25	250±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	1.5	3-5	5	5	5-15	30-50	30-50
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	10	15	30	50	70	100	100

Цветовой код размера катетера	светло-красный	черный	серый	белый	зеленый	оранжевый	красный
Ширина дренажных отверстий (А), мм	0.7±0.5	0.9±0.5	1.0±0.5	1.2±0.5	1.5±0.5	1.5±0.5	2.0±0.5
Длина дренажных отверстий (В), мм	1.8±1	2.4±1	3.0±1	3.4±1	4.6±1	4.6±1	5.4±1
Расстояние от конца наконечника катетера до центра отверстия (С), мм	5±2	5±2	5±2	9±2	12±2	13±2	14±2
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	15±5	15±5	15±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Рентгеноконтрастная линия вдоль трубки катетера	+	+	+	+	+	+	+
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов силиконового катетера, ≥ Н	16	16	16	16	16	16	16
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	60	60	60	60	60	60	60
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Продолжение таблицы 12 – Характеристики изделия

Условное обозначение	КФС108	КФС109	КФС110	КФС111	КФС112	КФС113
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15					
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15					
Наружный диаметр клапана жесткого (L4), мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого, мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина порта для наполнения баллона (L5), мм	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L6), мм	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1
Наружный диаметр дренажной воронки (D2), мм	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2
Наружный диаметр трубки катетера (D4), мм	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	2.0±0.5	2.3±0.5	2.3±0.5	2.7±0.5	2.7±0.5	2.7±0.5
Длина дренажных отверстий (B), мм	5.4±1	6.5±1	6.5±1	7.1±1	7.1±1	7.1±1
Расстояние от конца наконечника катетера до центра отверстия (C), мм	15±2	15±2	15±2	15±2	15±2	15±2
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Рентгеноконтрастная линия вдоль трубки катетера	+	+	+	+	+	+
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов силиконового катетера, ≥ Н	16	16	16	16	16	16
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	60	60	60	60	60	60
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея двухходовой силиконовый

(размеры CH/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22 (женский, клапан: жесткий)):

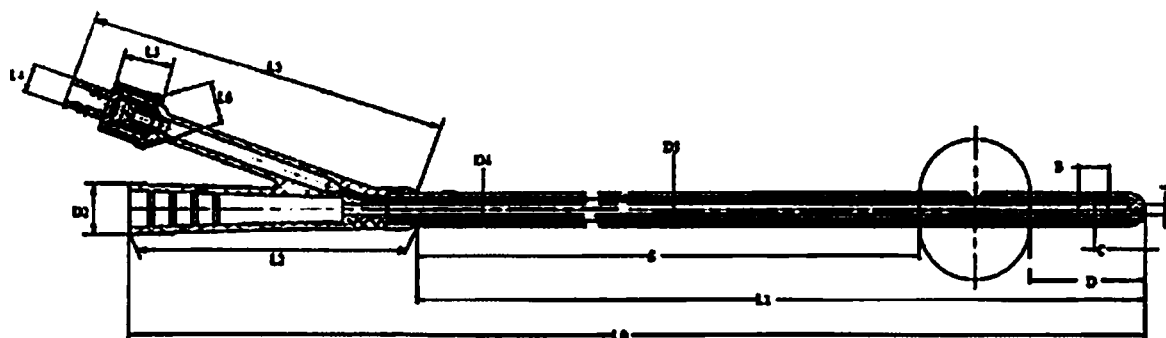


Рисунок 31 – Типовое обозначение размеров

Таблица 13 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФС114	КФС115	КФС116	КФС117	КФС118	КФС119
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	12	14	16	18	20	22
Общая длина катетера (L0), мм	250±15					
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	200±15					
Наружный диаметр клапана жесткого (L4), мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого, мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина порта для наполнения баллона (L5), мм	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L6), мм	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1
Наружный диаметр дренажной воронки (D2), мм	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2
Наружный диаметр трубки катетера (D4), мм	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25
Объем баллона, мл	5	5-15	30-50	30-50	30-50	30-50
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	50	70	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	белый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	1.2±0.5	1.5±0.5	1.5±0.5	2.0±0.5	2.0±0.5	2.3±0.5
Длина дренажных отверстий (B), мм	3.4±1	4.6±1	4.6±1	5.4±1	5.4±1	6.5±1
Расстояние от конца наконечника катетера до центра отверстия (C), мм	9±2	12±2	13±2	14±2	15±2	15±2

Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Рентгеноконтрастная линия вдоль трубки катетера	+	+	+	+	+	+
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов силиконового катетера, ≥ Н	16	16	16	16	16	16
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	60	60	60	60	60	60
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея двухходовой силиконовый

(размеры CH/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (Тиманн, клапан: жесткий)):

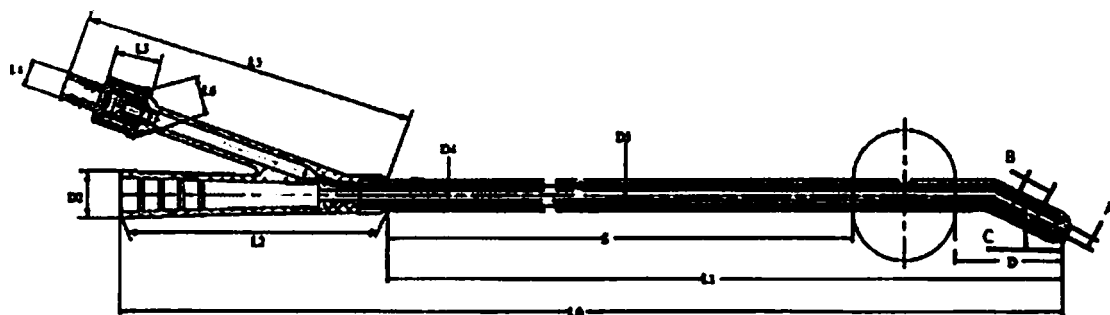


Рисунок 32 – Типовое обозначение размеров

Таблица 14 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФС 120	КФС 121	КФС 122	КФС 123	КФС 124	КФС 125	КФС 126	КФС 127	КФС 128	КФС 129
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15									
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	340±15									
Наружный диаметр клапана жесткого (L4), мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого, мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина порта для наполнения баллона (L5), мм	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L6), мм	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1
Наружный диаметр дренажной воронки (D2), мм	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2
Наружный диаметр трубки катетера (D4), мм	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25

Объем баллона, мл	5	5-15	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Скорость потока жидкости, $\geq$ мл/мин	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	белый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (А), мм	1.2 ± 0.5	1.5 ± 0.5	1.5 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.3 ± 0.5	2.3 ± 0.5	2.7 ± 0.5	2.7 ± 0.5	2.7 ± 0.5
Длина дренажных отверстий (В), мм	3.4 ± 1	4.6 ± 1	4.6 ± 1	5.4 ± 1	5.4 ± 1	6.5 ± 1	6.5 ± 1	7.1 ± 1	7.1 ± 1	7.1 ± 1
Расстояние от конца наконечника катетера до центра отверстия (С), мм	21 ± 4	22 ± 4	23 ± 4	24 ± 4	25 ± 4	25 ± 4	25 ± 4	26 ± 4	27 ± 4	27 ± 4
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	40 ± 5	40 ± 5	40 ± 5	40 ± 5	40 ± 5	40 ± 5	40 ± 5	40 ± 5	40 ± 5	40 ± 5
Рентгеноконтрастная линия вдоль трубки катетера	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов силиконового катетера, $\geq$ Н	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Тиманин 	Тиманин 	Тиманин 	Тиманин 	Тиманин 	Тиманин 	Тиманин 	Тиманин 	Тиманин 	Тиманин 
Угол изгиба дистального конца, °	145 ± 15	145 ± 15	145 ± 15	145 ± 15	145 ± 15	145 ± 15	145 ± 15	145 ± 15	145 ± 15	145 ± 15

Катетер Фолея трехходовой силиконовый, размеры CH/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (клапан: жесткий):

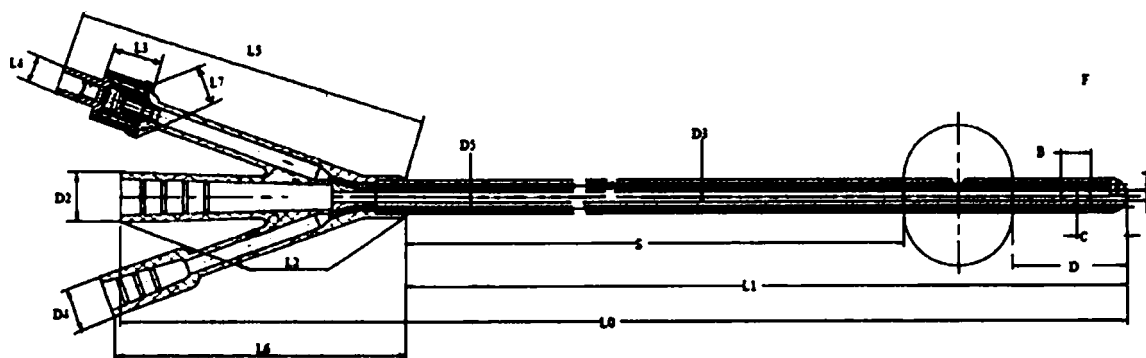


Рисунок 33 – Типовое обозначение размеров

Таблица 15 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФС 130	КФС 131	КФС 132	КФС 133	КФС 134	КФС 135	КФС 136	КФС 137	КФС 138	КФС 139
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L0), мм	400±15									
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15									
Наружный диаметр клапана жесткого (L4), мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого, мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина порта для наполнения баллона (L5), мм	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L7), мм	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1
Наружный диаметр дренажной воронки (D2), мм	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2
Наружный диаметр трубки катетера (D5), мм	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3
Длина порта для введения медикаментов, (L6), мм	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10
Наружный диаметр порта для введения медика-	10±0.5	10±0.5	10±0.5	10±0.5	10±0.5	10±0.5	10±0.5	10±0.5	10±0.5	10±0.5

ментов, (D 4), мм										
Внутренний диаметр порта для введения медикamentов, мм	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5
Диаметр ирригационного отверстия (F), мм	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона, мл	5	5-15	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	белый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	1.2±0.5	1.5±0.5	1.5±0.5	2.0±0.5	2.0±0.5	2.3±0.5	2.3±0.5	2.7±0.5	2.7±0.5	2.7±0.5
Длина дренажных отверстий (B), мм	3.4±1	4.6±1	4.6±1	5.4±1	5.4±1	6.5±1	6.5±1	7.1±1	7.1±1	7.1±1
Расстояние от конца наконечника катетера до центра отверстия (C), мм	9±2	12±2	13±2	14±2	15±2	15±2	15±2	15±2	15±2	15±2
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Рентгеноконтрастная линия вдоль трубки катетера	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов силиконового катетера, ≥ Н	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея трехходовой силиконовый

(размеры CH/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (дополнительный баллон, клапан: жесткий)):

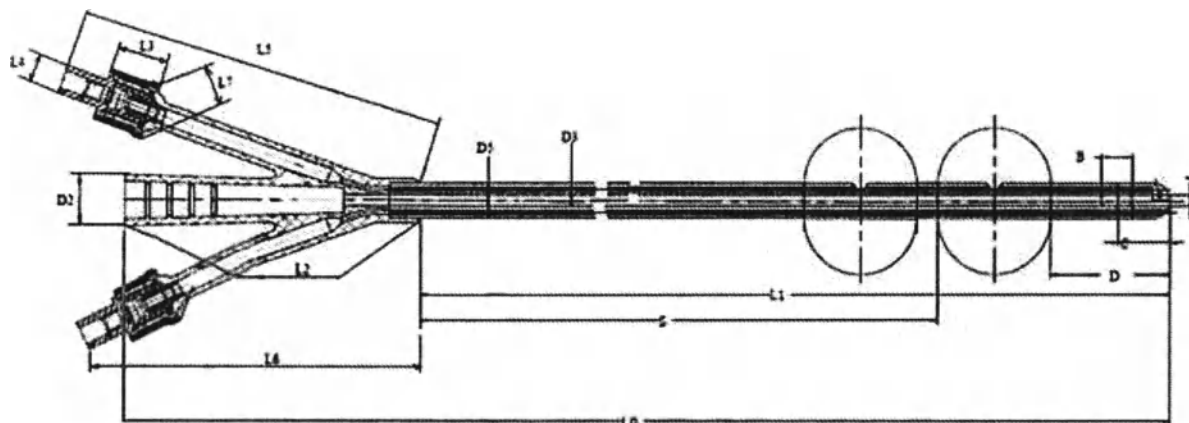


Рисунок 34 – Типовое обозначение размеров

Таблица 16 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФС 140	КФС 141	КФС 142	КФС 143	КФС 144	КФС 145	КФС 146	КФС 147	КФС 148	КФС 149
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Общая длина катетера (L6), мм	400±15									
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	330±15									
Наружный диаметр клапана жесткого (L4), мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого, мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина порта для наполнения баллона (L5), мм	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L7), мм	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1
Наружный диаметр дренажной воронки (D2), мм	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2
Наружный диаметр трубки катетера (D5), мм	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3	8.0±0.3	8.7±0.3	9.3±0.3	10.0±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3	6.2±0.3	6.8±0.3	7.2±0.3	7.6±0.3

Длина порта для наполнения баллона (L6), мм	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15	85±15
Длина от основания дренажной воронки до баллона (S), мм	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25	275±25
Объем баллона №1, мл	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Объем баллона №2, мл	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Скорость потока жидкости, ≥ мл/мин	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	белый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый	синий	розовый	коричневый	серый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	1.2±0.5	1.5±0.5	1.5±0.5	2.0±0.5	2.0±0.5	2.3±0.5	2.3±0.5	2.7±0.5	2.7±0.5	2.7±0.5
Длина дренажных отверстий (B), мм	3.4±1	4.6±1	4.6±1	5.4±1	5.4±1	6.5±1	6.5±1	7.1±1	7.1±1	7.1±1
Расстояние от конца наконечника катетера до центра отверстия (C), мм	9±2	12±2	13±2	14±2	15±2	15±2	15±2	15±2	15±2	15±2
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5	25±5
Расстояние между баллонами, мм	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10	30±10
Рентгеноконтрастная линия вдоль трубки катетера	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов силиконового катетера, ≥ Н	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Катетер Фолея трехходовой силиконовый

(размеры СН/Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22 (женский, клапан: жесткий)):

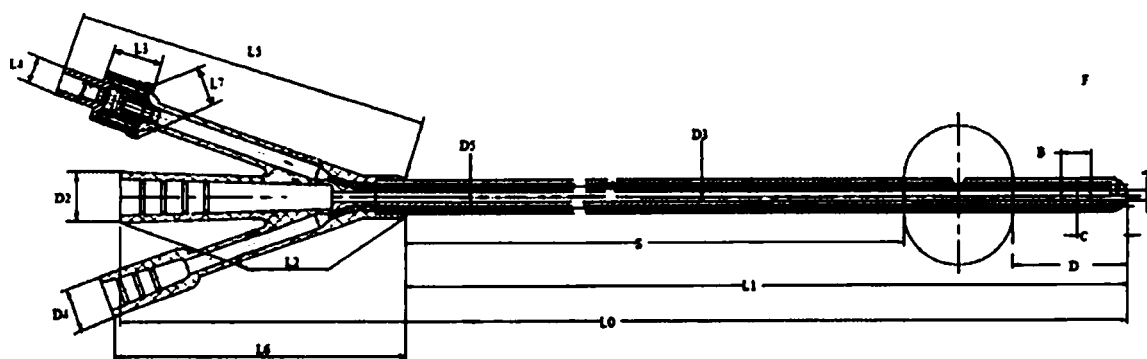


Рисунок 35 – Типовое обозначение размеров

Таблица 17 - Характеристики изделия

Условное обозначение	КФС150	КФС151	КФС152	КФС153	КФС154	КФС155
Размер по шкале Шарье-ра (СН/Fr)	12	14	16	18	20	22
Общая длина катетера (L0), мм	250±15					
Рабочая длина трубки катетера (L1), мм	200±15					
Наружный диаметр клапана жесткого (L4), мм	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1	6.6±0.1
Внутренний диаметр клапана жесткого, мм	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
Длина жесткого клапана, мм	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3	25.0±3
Длина порта для наполнения баллона (L5), мм	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3	85±3
Длина цветового кода размера катетера (L3), мм	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5	11.7±0.5
Наружный диаметр порта для наполнения баллона (L7), мм	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2	13±2
Длина дренажной воронки (L2), мм	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1	66±1
Наружный диаметр дренажной воронки (D2), мм	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2	11.8±0.2
Внутренний диаметр дренажной воронки, мм	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2
Наружный диаметр трубки катетера (D5), мм	4.0±0.3	4.7±0.3	5.3±0.3	6.0±0.3	6.7±0.3	7.3±0.3
Внутренний диаметр трубки катетера (D3), мм	2.8±0.3	3.3±0.3	3.8±0.3	4.5±0.3	5.1±0.3	5.6±0.3
Длина порта для введения медикаментов, (L6), мм	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10	65±10
Наружный диаметр порта для введения медикаментов, (D 4), мм	10±0.5	10±0.5	10±0.5	10±0.5	10±0.5	10±0.5
Внутренний диаметр порта для введения медикаментов, мм	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	7.5±0.5
Диаметр ирригационного отверстия (F), мм	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3	1.45±0.3
Длина от основания дре-	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25	150±25

нажной воронки до баллона (S), мм						
Объем баллона, мл	5	5-15	30-50	30-50	30-50	30-50
Скорость потока жидкости, $\geq$ мл/мин	50	70	100	100	100	100
Цветовой код размера катетера	белый	зеленый	оранжевый	красный	желтый	фиолетовый
Ширина дренажных отверстий (A), мм	1.2 ± 0.5	1.5 ± 0.5	1.5 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.3 ± 0.5
Длина дренажных отверстий (B), мм	3.4 ± 1	4.6 ± 1	4.6 ± 1	5.4 ± 1	5.4 ± 1	6.5 ± 1
Расстояние от конца наконечника катетера до центра отверстия (C), мм	9 ± 2	12 ± 2	13 ± 2	14 ± 2	15 ± 2	15 ± 2
Расстояние от конца наконечника катетера до начала баллона (D), мм	25 ± 5	25 ± 5	25 ± 5	25 ± 5	25 ± 5	25 ± 5
Рентгеноконтрастная линия вдоль трубки катетера	+	+	+	+	+	+
Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов силиконового катетера, $\geq$ Н	16	16	16	16	16	16
Прочность при растяжении, Н, не менее	6	6	6	6	6	6
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	100	100	100	100	100
Давление разрыва для катетера, кПа, не менее	60	60	60	60	60	60
Давление разрыва расширяющего баллона, кПа, не менее	30	30	30	30	30	30
Масса изделия без упаковки не более, г.	50	50	50	50	50	50
Масса изделия с упаковкой не более, г.	60	60	60	60	60	60
Тип дистального конца	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 	Прямой 

Внутренние и наружные разъемы, диаметры должны обеспечивать совместимость с предназначенными для них устройствами (изделиями).

Конструкция изделий должна отвечать эргономическим требованиям, позволять осуществлять быстрый и удобный доступ и проводить визуальный контроль при применении.

Катетеры в ненарушенных упаковках должны быть нетоксичными в течение гарантийного срока годности. Катетер и детали катетера должны изготавливаться из материалов, указанных ТУ.

Требования к рентгеноконтрастной линии (полосе): Рентгеноконтрастная полоса должна быть нанесена на всю длину узкой части (стержня) катетера. Ширина рентгеноконтрастной линии (полосы) должна составлять 0,2 мм, допустимое отклонение $\pm 5\%$, исполнение силикон.

Требования к встроенному проводнику

Проводник представляет собой гибкую направляющую из нейлона.

Предназначен для упрощения постановки катетеров малых размеров. Придает дополнительную жесткость катетеру в момент постановки. Располагается в дренажном ходу тела катетера, без крепления к самому катетеру. Сразу после постановки катетера, проводник следует аккуратно извлечь из тела катетера. Используется только в катетерах размеров (Ch/Fr): 6, 8, 10, как латексных, так и силиконовых катетерах.

Длина встроенного проводника катетеров Фолея силиконовых, размеров: 6, 8, 10 CH/Fr, 300±50 мм, диаметр 0,8 – 1,8 мм.

Длина встроенного проводника катетера Фолея латексного, размеров: 6, 8, 10 CH/Fr, 350±50 мм, диаметр 0,8 – 1,8 мм.

Требования к надежности

Катетеры в ненарушенных герметичных индивидуальных упаковках должны быть стерильными, не токсичными в течение срока годности/хранения.

Срок годности/хранения катетеров при их непрерывном хранении в условиях, указанных в настоящих технических условиях, пять лет.

Поверхность трубки, кончика, баллона и отверстий должна быть гладкой, без посторонних примесей. На поверхности катетера не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, сквозных отверстий, пузырей, прижогов и других загрязнений при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрения. Катетеры исполнения силикон должны быть прозрачными.

Требования к стерилизации

Катетеры должны быть стерильными изделиями однократного применения. Стерилизация производится газовым методом с применением этиленоксида в соответствии с ISO 11135.

Катетер должен быть устойчив к стерилизации оксидом этилена.

Метод стерилизации катетеров – оксидом этилена, повторной стерилизации не подлежат.

Стерилизация должна проводиться в соответствии со следующими условиями:

- Газ: Этиленоксид-99,99%
- Концентрация этиленоксида: 7±1 кг
- Температура: 47~53°C
- Влажность: 40.0~70.0 %
- Давление: (-20 ~ -10) КПа
- Время экспозиции: 360 минут

Уровень гарантированной стерильности SAL 10⁻⁶.

Остаточное содержание оксида этилена не должен превышать 10мкг/г.

Требования стойкости к внешним воздействиям

Катетер при транспортировании и хранении должен быть устойчив к воздействию климатических факторов при воздействии температур от плюс 5°C до

плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 96% при температуре плюс 25°C.

Катетер в транспортной упаковке должен быть устойчив к воздействию климатических факторов при воздействии температур от плюс 5°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 96% при температуре плюс 25°C.

Катетер в транспортной упаковке должен быть устойчив к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании, и обладать вибропрочностью и ударопрочностью при вибрационных нагрузках в диапазоне 10-55 Гц, амплитуде перемещения 0,15 мм.

Катетеры в условиях эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения У6 (от +32 до +42 С).


Индивидуальная (потребительская) упаковка катетеров должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO 11607-1. Индивидуальная упаковка с вложенным в нее катетером должна быть целостна. На ее поверхности не допускаются порывы, разрывы и другие повреждения, открывающие доступ к внутренней полости индивидуальной упаковки и катетера. Индивидуальная упаковка с вложенным в нее изделием должна быть герметична. Индивидуальная упаковка должна соответствовать техническим параметрам таблицы 18 настоящих технических условий.

Катетер должен быть устойчив к воздействию агрессивных биологических жидкостей. На поверхности катетера не допускаются поверхностные изменения: растрескивание, появление микротрещин, изменение цвета, коробление.

14. ОПИСАНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Катетер урологический Фолея был разработан специально для дренирования мочевого пузыря в среднесрочном и долгосрочном периоде до или после хирургических и урологических вмешательств и/или диагностических манипуляций.

Общая схема основных компонентов катетера Фолея приведена на рисунке 36.

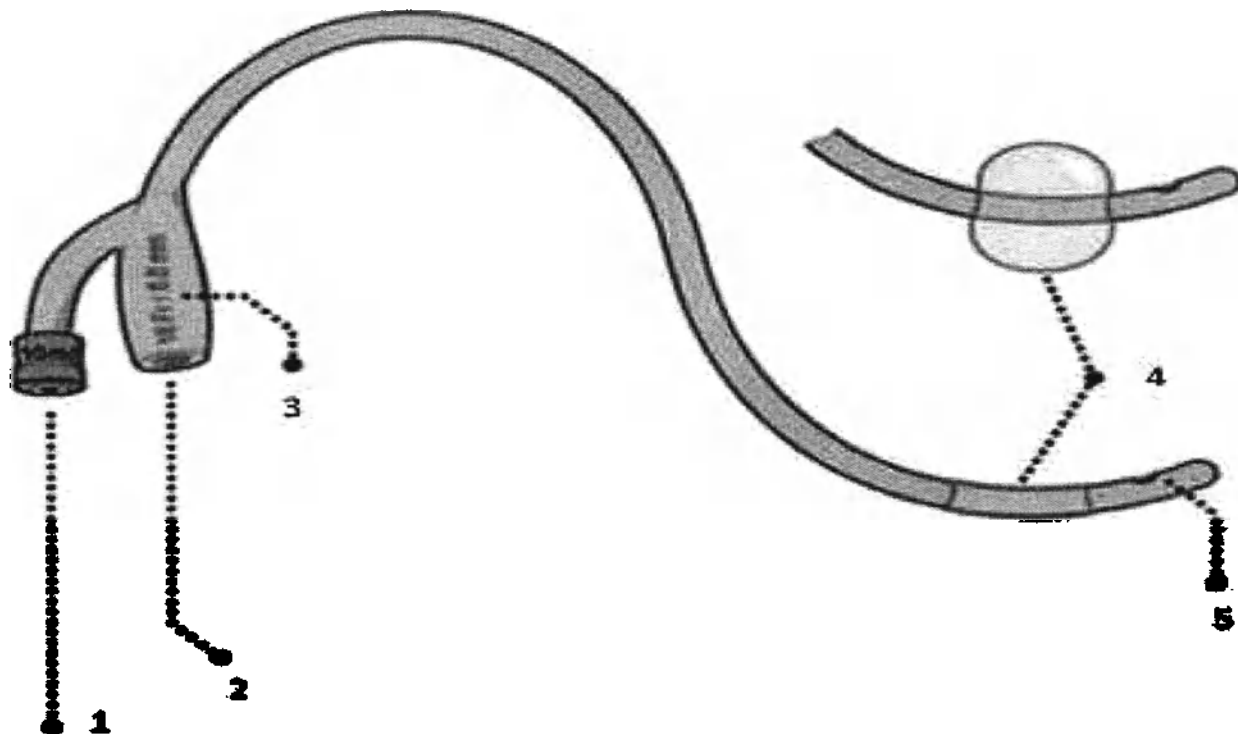

1. Клапан 2. Порт для отвода мочи 3. Трубка катетера

4. Баллон 5. Дистальный конец с дренажными отверстиями

Рисунок 36 – Типовое схематическое изображение основных компонентов катетера Фолея

Общая характеристика всех разновидностей катетера Фолея - наличие слепого дистального конца (типа наконечника) с расположенными на нем отверстиями. Один канал (ход) внутри катетера используется для отвода мочи. Второй, тонкий, канал (ход) необходим для подачи через него специальной жидкости для заполнения баллона, фиксирующего катетер внутри мочевого пузыря. Дополнительный третий канал (ход), имеющийся у части изделий, используется для введения в полость мочевого пузыря растворов, используемых для его промывания. Дополнительный баллон, имеющийся у части изделий, позволяет слегка приподнять промежность и таким образом сделать доступным для обзора перепончатый (мембранозный) мочеиспускательный канал для подготовки анастомоза.

Катетеры изготовлены из 100% силикона или из латекса, покрытого слоем силикона. Прозрачный материал катетеров из силикона позволяет визуально контролировать движение мочи по катетеру; физико-химические свойства силикона препятствуют образованию инкрустаций (камней). Биологическая совместимость силикона снижает риск раздражения тканей, обеспечивает комфорт и безопасность

пациента. Катетеры подходят для длительного использования. При гиперчувствительности к латексу следует выбирать модель катетера, изготовленного из силикона. Катетеры представлены различных размеров и длин, а также двух и трехходовые, латексные и силиконовые.

Катетер Фолея имеет баллон различного объема, который легко раздувается и сдувается.

Катетеры изготовлены из термопластичного материала, оптимально жесткие до введения, они размягчаются при температуре тела.

Размерный ряд на изделии отображен в единицах (CH/FR) согласно шкале Шарьера и в миллиметрах, с указанием длины катетера (мм) и объема жидкости (мл), необходимого для заполнения фиксирующего баллона.

Размерный ряд изделия, в части диаметра катетера, имеет цветовую маркировку порта для наполнения баллона, в соответствии с таблицей ниже.

Таблица 18. Цветовая маркировка в зависимости от размера

Размер катетера Фолея по шкале Шарьера, Ch/Fr (мм)	Цвет
6 (2,0 мм)	светло-красный
8 (2,7 мм)	черный
10 (3,3 мм)	серый
12 (4,0 мм)	белый
14 (4,7 мм)	зеленый
16 (5,3 мм)	оранжевый
18 (6,0 мм)	красный
20 (6,7 мм)	желтый
22 (7,3 мм)	фиолетовый
24 (8,0 мм)	синий
26 (8,7 мм)	розовый
28 (9,3 мм)	коричневый
30 (10,0 мм)	серый

Цветовая кодировка порта для наполнения баллона (контакт с пациентом отсутствует), а также маркировка объема заполнения баллона обеспечивает дополнительное удобство при использовании медицинским персоналом.

Трубки силиконовых катетеров снабжены рентгеноконтрастными полосами для удобства контроля за ходом установки катетера и его правильного местоположения.

Описание основных функциональных элементов медицинского изделия:

Изделие в зависимости от конструктивных особенностей представлено следующими вариантами исполнения:

Катетер Фолея двухходовой латексный:

- катетер урологический Фолея латексный 2-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), силиконовое покрытие, мягкий клапан, длина 280-400 мм, размеры 6-10 CH/FR оснащены проводником;

- катетер урологический Фолея латексный 2-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), силиконовое покрытие, жесткий клапан, длина 280-400 мм, размеры 6-10 CH/FR оснащены проводником;

- катетер урологический Фолея латексный женский 2-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), силиконовое покрытие, мягкий клапан, длина 260 мм;

- катетер урологический Фолея латексный женский 2-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), силиконовое покрытие, жесткий клапан, длина 260 мм;

- катетер урологический Фолея латексный с концом по Тиманну 2-х ходовой, дистальный конец (тип наконечника) типа Тиманна, силиконовое покрытие, мягкий клапан, длина 400 мм;

- катетер урологический Фолея латексный с концом по Тиманну 2-х ходовой, дистальный конец (тип наконечника) типа Тиманна, силиконовое покрытие, жесткий клапан, длина 400 мм;

Катетер Фолея трехходовой латексный:

- катетер урологический Фолея латексный 3-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), силиконовое покрытие, мягкий клапан, длина 400 мм;

- катетер урологический Фолея латексный 3-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), силиконовое покрытие, жесткий клапан, длина 400 мм;

- катетер урологический Фолея латексный с дополнительным баллоном 3-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), силиконовое покрытие, мягкий клапан, длина 400 мм;

- катетер урологический Фолея латексный с дополнительным баллоном 3-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), силиконовое покрытие, жесткий клапан, длина 400 мм;

Катетер Фолея двухходовой силиконовый:

- катетер урологический Фолея силиконовый 2-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), жесткий клапан, рентгеноконтрастная полоса, длина 280-400 мм, размеры 6-10 CH/FR оснащены проводником;

- катетер урологический Фолея силиконовый женский 2-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), жесткий клапан, рентгеноконтрастная полоса, длина 250 мм;

- катетер урологический Фолея силиконовый с концом по Тиманну 2-х ходовой, дистальный конец (тип наконечника) типа Тиманна, жесткий клапан, рентгеноконтрастная полоса, длина 400 мм;

Катетер Фолея трехходовой силиконовый:

- катетер урологический Фолея силиконовый 3-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), жесткий клапан, длина 400 мм;

- катетер урологический Фолея силиконовый с дополнительным баллоном 3-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), жесткий клапан, длина 400 мм;

мм;


- катетер урологический Фолея силиконовый женский 3-х ходовой, прямой дистальный конец (тип наконечника), жесткий клапан, длина 250 мм.

Клапан, предназначен для введения через него (внутрь катетера) раствора с целью раздувания фиксирующего баллона, а также удержания раствора внутри фиксирующего баллона и последующего опорожнения баллона по окончании использования катетера.

Каждый вариант исполнения представлен своим вариантом исполнения и представлен п. «Варианты исполнения» в разделе №1 «Вводная часть».

Клапаном комплектуются все варианты исполнения изделия. Силиконовые катетеры оснащены только жестким клапаном. Клапан латексных катетеров может быть выполнен в одном из двух вариантов:

Вариант 1. Мягкий клапан.

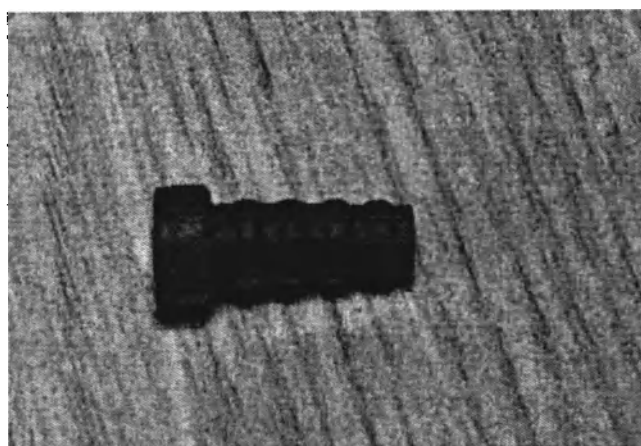

Вариант 2. Жесткий клапан.



В зависимости от типа клапана один и тот же экземпляр латексного катетера относится к разным вариантам исполнения изделия (см. п «Наименование медицинского изделия»). Сам тип клапана не влияет на эксплуатационные характеристики каждого выбранного по конструкции, размеру и материалу экземпляра изделия.

Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в

непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента (телом человека): В зависимости от материала изготовления катетеры Фолея подразделяются на следующие виды:

- латексные с силиконовым покрытием;
- силиконовые.

Силиконовый катетер применяется у пациентов с аллергией на латекс.

Вид контакта с организмом человека – длительный инвазивный контакт со слизистыми оболочками, продолжительность применения – не более 30 дней.

При использовании медицинский персонал должен работать в стерильных перчатках.

Описание принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием: Принадлежности, медицинские изделия или изделия, не являющиеся медицинскими, но предусмотренные для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием, отсутствуют.

Описание принципа работы МИ

Катетер Фолея - используется для длительной катетеризации мочевого пузыря. Катетеры Фолея предназначены для длительной катетеризации мочевого пузыря как через уретру, так и через эпицистостому.

Катетеры имеют баллон, порт для наполнения баллона и дренажную воронку для присоединения мочеприемника.

Катетеры могут быть изготовлены из 100% силикона или из латекса, покрытого слоем силикона. При гиперчувствительности к латексу следует выбирать модель катетера, изготовленного из силикона. Существуют катетеры различных размеров и длин, а также двух и трехходовые катетеры для эффективного дренирования мочевого пузыря. Катетер Фолея имеет баллон различного объема, который легко раздувается и сдувается. Катетеры находятся в стерильной упаковке. Перед применением необходимо вскрыть упаковку, достать катетер и ввести в уретру или эпицистостому, осторожно продвигая до мочевого пузыря. Когда катетер достигнет мочевого пузыря необходимо раздуть баллон. Этот баллон удерживает катетер и не дает ему выпасть из мочевого пузыря. Затем катетер присоединяется к мешку для приема мочи. В урологии используются двух- и трехходовые катетеры Фолея. Двухходовой катетер имеет два отверстия на выводящем конце, одно из которых предназначено для отвода мочи из пузыря, а через другое наполняется баллон катетера для его фиксации. Трехходовой катетер имеет дополнительное отверстие, которое используется для введения лекарственных препаратов в полость мочевого пузыря.

Размер катетера, необходимого пациенту, может определить только лечащий врач, методом подбора (калибровки) от меньшего диаметра катетера к большему.

Модель меньшего диаметра 6, 8, 10 имеет специальный проводник для более легкого введения.

15. СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ

Метод стерилизации - газовый. Используемое вещество для стерилизации - оксид этилена, газовая смесь 99,99%. Время стерилизации 6 часов.

Срок хранения (стерильности) изделия в индивидуальной упаковке: 5 лет.

16. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При выполнении всех манипуляций, связанных с установкой катетера Фолея, следует строго соблюдать правила асептики.

16.1 Подготовка

Для катетеризации необходимы следующие дополнительные принадлежности (не входят в комплект поставки):

- стерильное поле;
- стерильные перчатки;
- шприц;
- стерильный лубрикант на водной основе;
- принадлежности для обработки цистостомы пациента (стерильные, основанные на общепринятых методах);
- мочеприемник, совместимый с катетером Фолея.

Уложите мужчину-пациента на спину, женщину-пациентку — в положение для литотомии.

Тщательно вымойте и высушите руки.

С соблюдением правил асептики извлеките катетер из внешней упаковки и поместите его в стерильное поле.

Наденьте стерильные перчатки и освободите катетер от упаковки.

Проверьте баллон катетера на целостность и сдувание/раздувание, раздувая баллон требуемым (указанным на воронке катетера) объемом жидкости перед катетеризацией. Потяните поршень шприца на себя и дайте баллону сдуться. Делайте это аккуратно. Не прилагайте больших усилий.

Для наполнения баллона катетера Фолея, присоедините канюлю шприца к порту для наполнения баллона.

Наполните баллон катетера указанным объемом стерильной жидкости (стерильный 10% раствор глицерина и тд.), а именно если объем баллона 10 мл (см³) - введите не более 10 мл (см³) жидкости.

Наполните баллон катетера указанным объемом физиологического раствора, воды для инъекций или стерильным 10 % раствором глицерина, а именно:

- если объем баллона 1,5 мл (см³) - введите не более 1,5 мл (см³) жидкости;
- если объем баллона 3 мл (см³) - введите не более 3 мл (см³) жидкости;
- если объем баллона 5 мл (см³) - введите не более 5 мл (см³) жидкости;
- если объем баллона 10 мл (см³) - введите не более 10 мл (см³) жидкости;
- если объем баллона 30 мл (см³) - введите не более 30 мл (см³) жидкости;
- если объем баллона 50 мл (см³) - введите не более 50 мл (см³) жидкости.

Удерживая поршень шприца, убедитесь в отсутствии каких-либо признаков утечки из баллона или трудностей, связанных с наполнением баллона.

Отпустите поршень шприца, позвольте воде вытечь из баллона в шприц.

Убедитесь в отсутствии каких-либо трудностей, связанных со сдуванием

баллона. При необходимости, для эвакуации воды из баллона аккуратно потяните поршень шприца на себя, прикладывая минимум усилий.

Нанесите на кончик катетера лубрикант на водной основе.

Очистите наружное отверстие уретры и окружающую область, используя стандартные правила обработки.

16.2 Катетеризация мочевого пузыря через уретру

Чистыми руками возьмите катетер из стерильного поля.

Осторожно введите наконечник (дистальный кончик) катетера в уретру до уровня, когда кончик катетера и баллон окажутся в просвете мочевого пузыря, на что указывает появление тока мочи из катетера.

Продвиньте катетер дальше, чтобы баллон располагался за шейкой мочевого пузыря.

Медленно раздуйте баллон указанным объемом стерильной жидкости (стерильный 10% раствор глицерина и тд.) и слегка потяните трубку катетера назад, тем самым обеспечив правильную "посадку" баллона на шейке мочевого пузыря.

Для раздувания баллона используйте требуемый (указанный на воронке катетера) объем.

Медленно потяните за катетер до ощущения легкого сопротивления, чтобы убедиться, что баллон правильно расположен в мочевом пузыре перед шейкой мочевого пузыря.

Подсоедините катетер к устройству для сбора мочи.

Наблюдайте за током мочи.

16.3 Удаление катетера

Для удаления катетера сдуйте баллон, введя наконечник шприца в порт для раздувания. Потяните поршень шприца на себя и дайте баллону сдуться. Делайте это аккуратно. Не прилагайте больших усилий.

Утилизируйте использованный катетер по правилам, принятым в Вашем лечебном учреждении.

16.4 Уход за катетером

Обеспечьте соблюдение правил гигиены для поддержания в чистоте кожи в области надлобковой стомы.

При работе с катетером надевайте одноразовые перчатки. До и после любой манипуляции с катетером мойте руки в соответствии с правилами обработки рук.

Обеспечьте беспрепятственный отток мочи.

Предотвращайте перегибы катетера и отводящей трубки.

Всегда располагайте мочеприемник ниже уровня мочевого пузыря, чтобы моча стекала под действием силы тяжести. Не кладите мочеприемник на пол.

Опорожняйте мочеприемник в индивидуальный мочеприемник для каждого пациента, избегая пролива и предотвращая контакт дренажной воронки с нестерильными устройствами сбора мочи.

16.5 Извлечение установленного катетера

Общепринятыми методами очистите и продезинфицируйте область вокруг катетера.

Для извлечения катетера сдуйте баллон, введя наконечник шприца в клапан для раздувания. Потяните поршень шприца на себя и дайте баллону сдуться. Делайте это аккуратно. Не прилагайте больших усилий.

Извлеките катетер легким потягиванием его вверх.

После удаления катетера убедитесь в том, что катетер извлечен целиком.

Утилизируйте использованный катетер по правилам, принятым в вашем лечебном учреждении.

16.6 Катетеризация пациента через цистостому

Наденьте новые стерильные перчатки.

Еще раз выполните очистку места вокруг цистостомы.

Осторожно введите катетер и проведите его через цистостомический канал.

Убедитесь в том, что раздуваемый баллон катетера полностью введен в мочевого пузырь через надлобковый канал.

Раздуйте баллон катетера с помощью стерильной жидкости (стерильный 10% раствор глицерина и тд.), как предписано врачом. Необходимый объем определяется маркировкой на этикетке/дренажной воронке катетера.

Спросите пациента, нет ли у него неприятных ощущений. При возникновении сопротивления очень осторожно (баллон все еще находится в мочевом пузыре) продвиньте катетер немного вперед или немного оттяните назад (если кончик катетера вошел в шейку мочевого пузыря или уретру).

Осторожно оттяните катетер, чтобы он оставался внутри мочевого пузыря, и дополнительно раздуйте баллон жидкостью до нормального объема (указанного на воронке катетера).

Подсоедините катетер к устройству для сбора мочи.

Проверьте, что ток мочи не нарушен.

16.7 Опорожнение баллона

Вставьте канюлю шприца в порт для раздувания манжеты. Потяните поршень шприца на себя до тех пор, пока жидкость не будет удалена из баллона полностью. Если опорожнения баллона не происходит, используйте другие методы, перечисленные ниже:

1. Медленно потяните поршень шприца на себя. Если принудительного опорожнения баллона не происходит, перейдите к этапу 2.

2. Отсоедините шприц от клапана, заполните его 2-3 мл (см³) стерильной жидкости (стерильный 10% раствор глицерина и тд.), повторно присоедините шприц к клапану катетера, введите жидкость в баллон и снова проведите активную аспирацию жидкости из баллона. Если опорожнения баллона не происходит, перейдите к этапу 3.

3. Отрежьте ножницами боковую часть катетера ниже клапана или трубку катетера на некотором расстоянии от уретры, обеспечивающем безопасность манипуляции. Баллон должен опорожниться самостоятельно. Если этого не происходит, перейдите к этапу 4.

4. Введите в мочевой пузырь 100-200 мл/см³ жидкости, используемой для промывания мочевого пузыря, затем шприцем с иглой медленно введите в канал баллона 10-15 мл/см³ смеси нейтрального минерального масла с водой и подождите опорожнения баллона, после чего удалите жидкость, инсталлированную в мочевой пузырь с целью предотвращения угрозы развития химического цистита. Если опорожнения баллона не происходит, перейдите к этапу 5.

5. Оцените ситуацию в отношении катетера и выполните пункцию баллона с помощью соответствующих устройств.

16.8 Частота замены

Частота смены катетера, установленного на длительное время, должна определяться в большей степени его проходимостью, чем конкретным фиксированным интервалом времени. Средний период, в течение которого катетер Фолея остается на месте, может существенно различаться у разных пациентов. У всех пациентов оценка этого периода проводится на индивидуальной основе.

Другими словами, необходимо постоянное наблюдение пациента в соответствии с принятыми медицинскими процедурами, при этом удаление катетера должно быть произведено по истечении того интервала времени, который является в данном случае приемлемым с точки зрения врача или другого специалиста, имеющего квалификацию, достаточную для принятия подобного решения.

16.9 Меры предосторожности и предупреждения

- Перед использованием катетера Фолея его необходимо протестировать. С этой целью необходимо ввести в баллон через порт для наполнения баллона стерильным 10 % раствором глицерина и тд.

- Не допускается использование изделия, если его упаковка повреждена или была предварительно вскрыта.

- Перед использованием убедитесь в плотном соединении частей устройства. Проверьте правильность соединения во время использования.

- Не пережимайте и не перекручивайте трубку катетера, так как канал для наполнения баллона может деформироваться, что может нарушить опорожнение баллона. При необходимости, для остановки тока мочи закройте катетер стерильной пробкой.

- Не допускается заполнение баллона катетера через иглу шприца, введенную в клапан для раздувания баллона.

- Не прокалывайте стенку катетера в области воронкообразного коннектора для взятия проб мочи.

- Не подвергайте силиконовый катетер воздействию радиации, т.к. это

приводит к изменению свойств силикона, аналогичным тепловому старению материала.

- Используйте смазочные материалы, выполненные только на водорастворимой основе. Не используйте мази или смазки на вазелиновой основе или жировой основе. Они вызывают нарушение свойств материала, из которого выполнен катетер и являются причиной разрыва баллона.

- Не используйте изделие после даты истечения срока годности.

- Изделие предназначено для применения врачами или надлежащим образом обученными медицинскими работниками с соблюдением правил асептики.

- Неправильно установленные катетеры при неправильном положении баллона в мочевом пузыре могут привести к травмированию пациента.

- Не используйте иглы для раздувания баллона.

- Заранее заполненный шприц предназначен только для раздувания баллона.

Не для инъекции.

- Раздувайте баллон катетера стерильным 10 % раствором глицерина и тд.

- Не допускайте избыточного раздувания баллона. Емкость баллона указана на этикетке изделия или воронке катетера.

- Катетеризированных пациентов необходимо регулярно обследовать по назначению врача.

- Обеспечивайте мероприятия для поддержания катетера и мочевого канала/стомы в максимально чистом состоянии. При длительном применении катетера следует регулярно мониторировать объем баллона при наличии любых клинических признаков нарушения его целостности, например подтекания мочи или болезненности в мочеиспускательном канале. При необходимости можно откорректировать объем жидкости в баллоне.

- Перед удалением катетера баллон должен быть полностью опорожнен.

- Если сдуть баллон не удалось, врач или надлежащим образом обученный медицинский работник должен выполнить общепринятые процедуры.

- Это одноразовое изделие для однократного применения. Любая повторная стерилизация или повторное использование этого изделия сопряжены с риском для пациента.

- При удалении этого изделия в отходы следует соблюдать требования местных нормативных документов касательно биологически опасных отходов.

- Изделие предназначено для однократного применения и не должно использоваться повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции или перекрестной контаминации, а также к изменению физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению;

16.10 Длительность применения катетеров.

Катетер урологический предназначен для временного применения, и подлежит

регулярной замене.

Рекомендуемая длительность применения:

- для катетеров из латекса - от нескольких часов до 7 суток;
- для катетеров из силикона - от нескольких часов до 7 суток, но не реже 1 раза в 30 дней.

17. МАРКИРОВКА

Маркировка катетера должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1 и должна однозначно идентифицировать изделие.

На порте отведения мочи катетера, должна быть нанесена маркировка, содержащая сведения о объеме баллона(ов), размере и наружном диаметре катетера методом лазерной гравировки.

На внешней индивидуальной упаковке катетера, в зависимости от материала изделия (силикон/латекс), должна быть нанесена маркировка, приведенная ниже:

- Наименование изделия;
- Вариант исполнения изделия;
- Сведения о размере изделия;
- Сведения о наружном диаметре катетера;
- Сведения о длине катетера;
- Сведения о объеме баллона;
- Сведения о материале катетера (для латексных катетеров);
- Сведения о материале покрытия катетера (для латексных катетеров);
- Сведения о наличии проводника (для катетеров, размеров 6 Ch/FR (2,0 мм), 8 CH/FR (2,7 мм), 10 CH/FR (3,3 мм));
- Сведения о виде клапана - мягкий или жесткий (для латексных катетеров);
- Наименование, адрес и сайт производителя (обозначено соответствующим символом);
- Наименование и адрес производственной площадки (места производства);
- Логотип;
- Номер лота (партии) (обозначено соответствующим символом);
- Номер по каталогу (обозначено соответствующим символом);
- Дата изготовления (обозначено соответствующим символом);
- Дата истечения срока годности (обозначено соответствующим символом «Использовать до ...»);
- Количество изделий в упаковке (1 шт. в упаковке)
- Надпись «Изделие рентгеноконтрастно» (для всех исполнений силиконовых катетеров);
- Информация о стерильности и способе стерилизации (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о неиспользовании при повреждении упаковки (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о запрете на повторное применение (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о запрете на повторную стерилизацию (обозначено соответствующим символом);

- Предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (обозначено соответствующим символом);
- Сведения о содержании латекса (обозначено соответствующим символом, для всех исполнений латексных катетеров);
- Сведения об отсутствии латекса (обозначено соответствующим символом, для всех исполнений силиконовых катетеров);
- Информация об отсутствии токсичности (обозначено соответствующим символом);
- Информация о температурном диапазоне хранения (обозначено соответствующим символом);
- Сведения о воздействии солнечного света (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о необходимости беречь от влаги (обозначено соответствующим символом);
- Сведения об утилизации (обозначено соответствующим символом);
- Маркировка (указание) места вскрытия;
- Сведения о сертификации (при необходимости);
- Штриховой код (при необходимости);
- Номер и дата регистрационного удостоверения.

Маркировка групповой упаковки, в зависимости от материала изделия (силикон /латекс), должна быть нанесена маркировка, приведенная ниже:

- Наименование изделия;
- Вариант исполнения изделия;
- Сведения о размере изделия;
- Сведения о наружном диаметре катетера;
- Сведения о длине катетера;
- Сведения о объеме баллона;
- Сведения о материале катетера (для латексных катетеров);
- Сведения о материале покрытия катетера (для латексных катетеров);
- Сведения о наличии проводника (для катетеров, размеров 6 Ch/FR (2,0 мм), 8 CH/FR (2,7 мм), 10 CH/FR (3,3 мм));
- Сведения о виде клапана - мягкий или жесткий (для латексных катетеров);
- Наименование, адрес и сайт производителя (обозначено соответствующим символом);
- Наименование и адрес производственной площадки (места производства);
- Логотип;
- Номер лота (партии) (обозначено соответствующим символом);
- Номер по каталогу (обозначено соответствующим символом);
- Дата изготовления (обозначено соответствующим символом);

- Дата истечения срока годности (обозначено соответствующим символом «Использовать до ...»);
- Количество изделий в упаковке (10 шт. в упаковке);
- Сведения о количестве инструкций по применению в упаковке (10 шт. в упаковке);
- Надпись «Изделие рентгеноконтрастно» (для всех исполнений силиконовых катетеров);
- Информация о стерильности и способе стерилизации (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о неиспользовании при повреждении упаковки (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о запрете на повторное применение (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о запрете на повторную стерилизацию (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (обозначено соответствующим символом);
- Сведения о содержании латекса (обозначено соответствующим символом, для всех исполнений латексных катетеров);
- Сведения об отсутствии латекса (обозначено соответствующим символом, для всех исполнений силиконовых катетеров);
- Информация об отсутствии токсичности (обозначено соответствующим символом);
- Информация о температурном диапазоне хранения (обозначено соответствующим символом);
- Сведения о воздействии солнечного света (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о необходимости беречь от влаги (обозначено соответствующим символом);
- Сведения об утилизации (обозначено соответствующим символом);
- Сведения о сертификации (при необходимости);
- Штриховой код (при необходимости);
- Номер и дата регистрационного удостоверения.

Маркировка транспортной упаковки, в зависимости от материала изделия (силикон /латекс), должна быть нанесена маркировка, приведенная ниже:

- Наименование изделия;
- Вариант исполнения изделия;
- Сведения о размере изделия;

- Сведения о наружном диаметре катетера;
- Сведения о длине катетера;
- Сведения о объеме баллона;
- Сведения о материале катетера (для латексных катетеров);
- Сведения о материале покрытия катетера (для латексных катетеров);
- Сведения о виде клапана - мягкий или жесткий (для латексных катетеров);
- Наименование, адрес и сайт производителя (обозначено соответствующим символом);
- Наименование и адрес производственной площадки (места производства);
- Номер лота (партии) (обозначено соответствующим символом);
- Номер по каталогу (обозначено соответствующим символом);
- Дата изготовления (обозначено соответствующим символом);
- Дата истечения срока годности (обозначено соответствующим символом «Использовать до ...»);
- Количество изделий в упаковке (500 шт. в упаковке);
- Сведения о количестве инструкций по применению в упаковке (50 шт. в упаковке);
- Надпись «Изделие рентгеноконтрастно» (для всех исполнений силиконовых катетеров);
- Информация о стерильности и способе стерилизации (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о запрете на повторное применение (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о запрете на повторную стерилизацию (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о необходимости обратиться к инструкции по применению (обозначено соответствующим символом);
- Сведения о содержании латекса (обозначено соответствующим символом, для всех исполнений латексных катетеров);
- Сведения об отсутствии латекса (обозначено соответствующим символом, для всех исполнений силиконовых катетеров);
- Информация об отсутствии токсичности (обозначено соответствующим символом);
- Информация о температурном диапазоне хранения (обозначено соответствующим символом);
- Сведения о воздействии солнечного света (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о необходимости беречь от влаги (обозначено соответствующим символом);
- Предупреждение о бережном обращении (обозначено соответствующим символом);

символом «Хрупкое»);

- Сведения о правильном вертикальном положении груза (обозначено соответствующим символом);

- Штриховой код (при необходимости);

- Номер и дата регистрационного удостоверения;

- Сведения о размере транспортной тары;

- Сведения о массе: Вес нетто - N.W. (net weight);

- Сведения о массе: Вес брутто - G.W. (gross weight).

Условные обозначения (символы), применяемые при маркировке изделия:

СИМВОЛ	Наименование символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Номер лота (партии)
	Номер по каталогу
	Использовать до ... (дата истечения срока годности)
	Стерилизовано оксидом этилена
	Не использовать при повреждении упаковки

Символ	Наименование символа
	Только для одноразового использования, не использовать дважды.
	Не стерилизовать повторно
	Обратитесь к инструкции по применению
	Содержит натуральный латекс
	Не содержит натуральный латекс
NON-TOXIC	Не токсично
	Условия температурные
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги

Символ	Наименование символа
	После окончания использования запрещено выбрасывать вместе с бытовыми отходами, подлежит отдельному сбору и утилизации
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Верх

Маркировка должна быть хорошо видна, разборчива, не стираема.

18. УПАКОВКА

Упаковка катетера должна быть выполнена в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

Упаковка катетера должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов при заявленных условиях хранения и транспортирования в течение всего срока годности катетера.

Изделия должны быть герметично упакованы в индивидуальную упаковку.

Материал и конструкция упаковки должны обеспечивать:

сохранение физико-химических свойств изделия при нормальных условиях транспортирования и хранения;

сохранение стерильности при хранении в сухих, чистых и хорошо проветриваемых помещениях;

предохранение изделие от вредных компонентов из внешней среды;

минимальный риск загрязнения содержимого при вскрытии упаковки;

невозможность повторного запечатывания упаковки, если целостность ее была нарушена, факт вскрытия упаковки должен быть очевиден.

Материал упаковки не должен оказывать вредного воздействия на содержимое.

Индивидуальная упаковка

Каждый катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку – пакет из полимерных или комбинированных материалов, который должен быть упакован методом автоматической термосварки.

Сведения об основных характеристиках упаковочного материала представлены в таблице 19.

Таблица 19 Сведения основных характеристиках индивидуальной упаковки.

	Характеристика	Показатель
Общие:	- прочность соединения (шва), не менее	1,2 Н на 15 мм
	- ширина клеевого слоя	4,5-9,8 мм
	- размер	500 × 70 × 0,05 ± 10 мм
	- масса	не более, 10 гр
Для бумаги:	- толщина бумаги	0,08 ± 0,02 мм
	- плотность бумаги	60 ± 5 г/м ²
	- прочность на продавливание, более	70 кПа
	- прочность на растяжение, более	0,5 кН/м
	- относительное удлинение, не менее	0,7 %
	- воздухопроницаемость, более	3,4 мкм/(Па с)
Для РЕ/ПЕТ пленки:	- толщина	0,06 ± 0,02 мм
	- плотность	45 ± 5 г/м ²

- прочность при разрыве в продольном/ поперечном направлении, не менее	30 МПа
- относительное удлинение при разрыве в продольном/поперечном направлении, не менее	30%

Каждая упаковка должна содержать одну единицу продукции.


Материал и конструкция упаковки должны обеспечивать возможность визуального определения цветовой кодировки.

Сведения об основных характеристиках индивидуальной упаковки представлены в таблице 20.


Таблица 20 Упаковка индивидуальная, номинальный размер.

Упаковка	Материал*	Производитель*
Индивидуальная упаковка	Верх: Полиэтилен-PE/PET, марки See-through PE-film U-life или Полимерная пленка PE/PET - состав: полиэтилен №9002-88-4, полиэтилентерефталат №25038-59-9 Низ: Бумага медицинская, марки Allover TA 5511A packaging pouch или марки A-2	Jiaxing U-life Medical Device Technology Co., Ltd., China Quzhou Z-SHINE Medical Packing Co., Ltd., China Jiangshu Ruiqian Plastic Factory, China Nanchang Meiguang Packing Co., LTD., China

*В случае необходимости материалы внутренней упаковки могут быть заменены на материалы других производителей, при сохранении ими указанных в таблице 19 характеристик и верифицированных требований к упаковочным материалам для медицинских изделий.

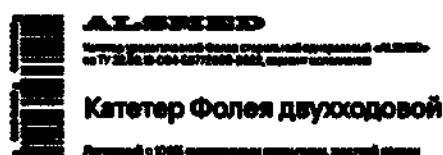

размер	30/40/40
размер	47 мм
размер	400 мм
размер	30 мм
размер	1 мм

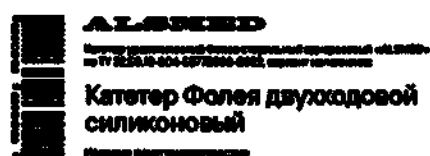


размер	30/40/40
размер	47 мм
размер	400 мм
размер	30 мм
размер	1 мм



Рисунок 37 – Схематическое изображение макета индивидуальной упаковки, пример

Групповая упаковка

Изделие в индивидуальной упаковке в количестве 10 упаковывают в картонные коробки (пеналы) размером $(509 \times 80 \times 45) \pm 5$ мм из гофрированного картона плотностью $(450-490)$ г/м², массой не более 50 г., марки NST, производства Ningbo Dacheng Package Factory, Китай.

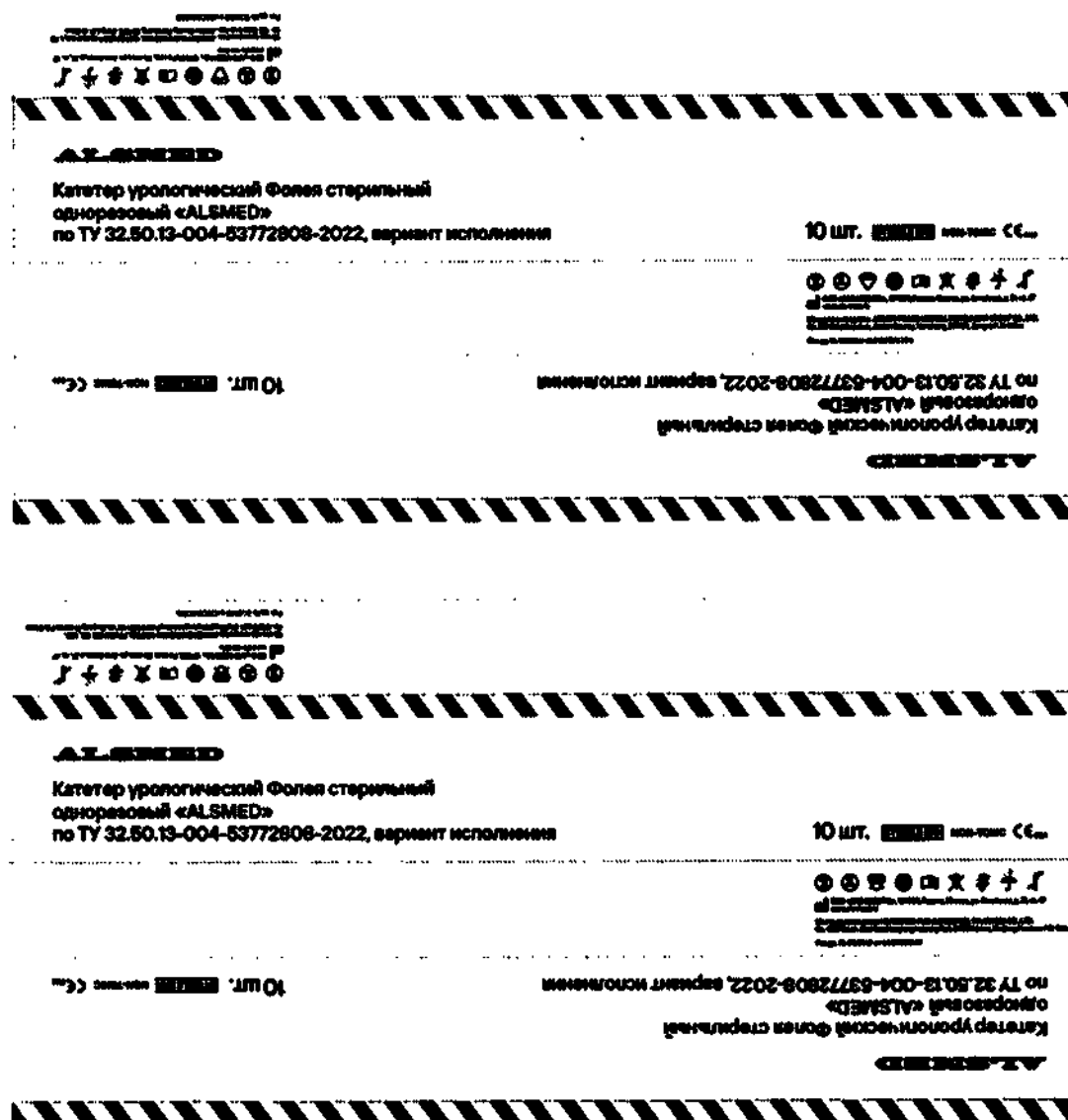

ALSMED

Катетер Фолея двухходовой

Латексный с 100% силиконовым покрытием, жесткий клапан
Инструкция по применению, 1 шт.

Ch/Fr 14

10 шт.

диаметр	4,7 мм
длина	400 мм
баллон	30 мл



08-2022



07-2027



2022-07-07



010101

ALSMED

Катетер Фолея двухходовой СИЛИКОНОВЫЙ

Изделие рентгеноконтрастно. Инструкция по применению, 1 шт.

Ch/Fr 14

10 шт.

диаметр	4,7 мм
длина	400 мм
баллон	5–15 мл



08-2022



07-2027



2022-07-07



010101

Рисунок 38 – Схематическое изображение макета групповой упаковки (пенал) и стикера на ней

Транспортная упаковка

Изделия в групповой упаковке в коробках (пеналах) помещают в транспортную упаковку в количестве 50 групповых упаковок (пеналов) в коробку из картона двухслойного гофрированного плотностью (650-700)г/м² толщиной 2,0 – 4,0 мм. размером (520х395-430х430-475)±5 мм, массой не более 1000 г., марки NST-2/3, производства Ningbo Dacheng Package Factory, Китай.

ALSMED

ALSMED

PLACE FOR THE STRIP



ALSMED

Катетер урологический Фолея стерильный одноразовый «ALSMED»
по ТУ 32.50.13-004-53772808-2022, вариант исполнения

Катетер Фолея двухходовой

Латексный с 100% силиконовым покрытием,
жесткий клапан

Инструкция по применению, 50 шт.

Ch/Fr 14

Диаметр	4,7 мм
Длина	400 мм
Баллон	30 мл



08-2022

MEAS 520×420×475 mm



ООО «АЛС МЕДИКА», 107589, Россия, Москва, ул. Алтайская, д. 21, кв. 47.
www.als-med.ru



07-2027

QTY 50×10=500 pcs

Место производства: JIANGXI YIKANG MEDICAL INSTRUMENT GROUP CO., LTD.
No. 188 Uduoshu Ave, Jindan County, Nanchang, 331728, Jiangxi, P. R. China
Reg. № 03000 07 00000000

REF

2022-07-07

NW KGS



LOT

010101

GW KGS

STERILE EO NON-TOXIC CE



**ALS MED**

Катетер урологический Фолея стерильный одноразовый «ALS MED»
по ТУ 32.50.13-004-53772808-2022, вариант исполнения

Катетер Фолея двухходовой СИЛИКОНОВЫЙ

Изделие рентгеноконтрастно
Инструкция по применению, 50 шт.

Ch/Fr 14

диаметр	4,7 мм
длина	400 мм
баллон	5-15 мл

 06-2022 MEAS 520×430×475 mm

 07-2027 QTY 50×10=500 pcs

 REF 2022-07-07 NW KGS

 LOT 00001 GW KGS

ООО «АМС МЕДИКА», 107000, Пекинг, Мянма, ул. Амбулаторная, д. 21, кв. 47,
700000-000000
Имя производителя: HANGZHOU FULIYUAN MEDICAL APPLIANCE CO., LTD.
No. 1888 South 3rd Road Lingang Industry Park 201301 Lian, Zhejiang Province P.R. China
Reg. No. 16 (00000) 07 00000000



Рисунок 39 – Схематическое изображение макета транспортной упаковки

Масса транспортной упаковки с изделиями – не более 25 кг.

Для исключения нарушения целостности транспортной упаковки при транспортировании и хранении она должна быть заклеена лентой с липким слоем.

Все материалы упаковки должны быть адаптированы к стерилизации оксидом этилена.

Допускается, по согласованию с заказчиком, применять для упаковки другие виды материалов, обеспечивающих сохранность катетера и сохранение стерильности при транспортировании и хранении.

Сведения основных характеристиках групповой и транспортной упаковки, представлены в таблице 21.

Таблица 21 Сведения основных характеристиках групповой и транспортной упаковки.

Характеристики	Значения
Прочность упаковки - транспортная	≥ 5,0 Н/15 мм
Прочность упаковки - пенал	≥ 1,5 Н/15 мм
Прочность на продавливание упаковки	≥ 650 кПа

Все материалы упаковки адаптированы к стерилизации оксидом этилена.

Чернила для маркировки: Чернила марки GC02, «Zhuhai Letong chemical products Co., Ltd.», Китай.

19. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

Изделия медицинские изготавливаются в рамках сертифицированной Системы Менеджмента Качества в соответствии с ISO 13485.

Производство имеет сертифицированную систему менеджмента качества, в том числе в части производства медицинского изделия «Катетеры».

Требования к персоналу

Весь персонал, занятый в производстве, и персонал отдела качества, обязаны проходить медицинское освидетельствование раз в году, или чаще по мере необходимости.


Мониторинг и запись температуры и влажности

В помещениях постоянно проводится мониторинг температуры и относительной влажности. Во время смены производится замер максимальных и минимальных значений по температуре и влажности.

Мониторинг и запись перепадов давления воздуха

Процесс производства представлен на Схеме 1.

Схема 1. Схема основного производственного процесса изготовления

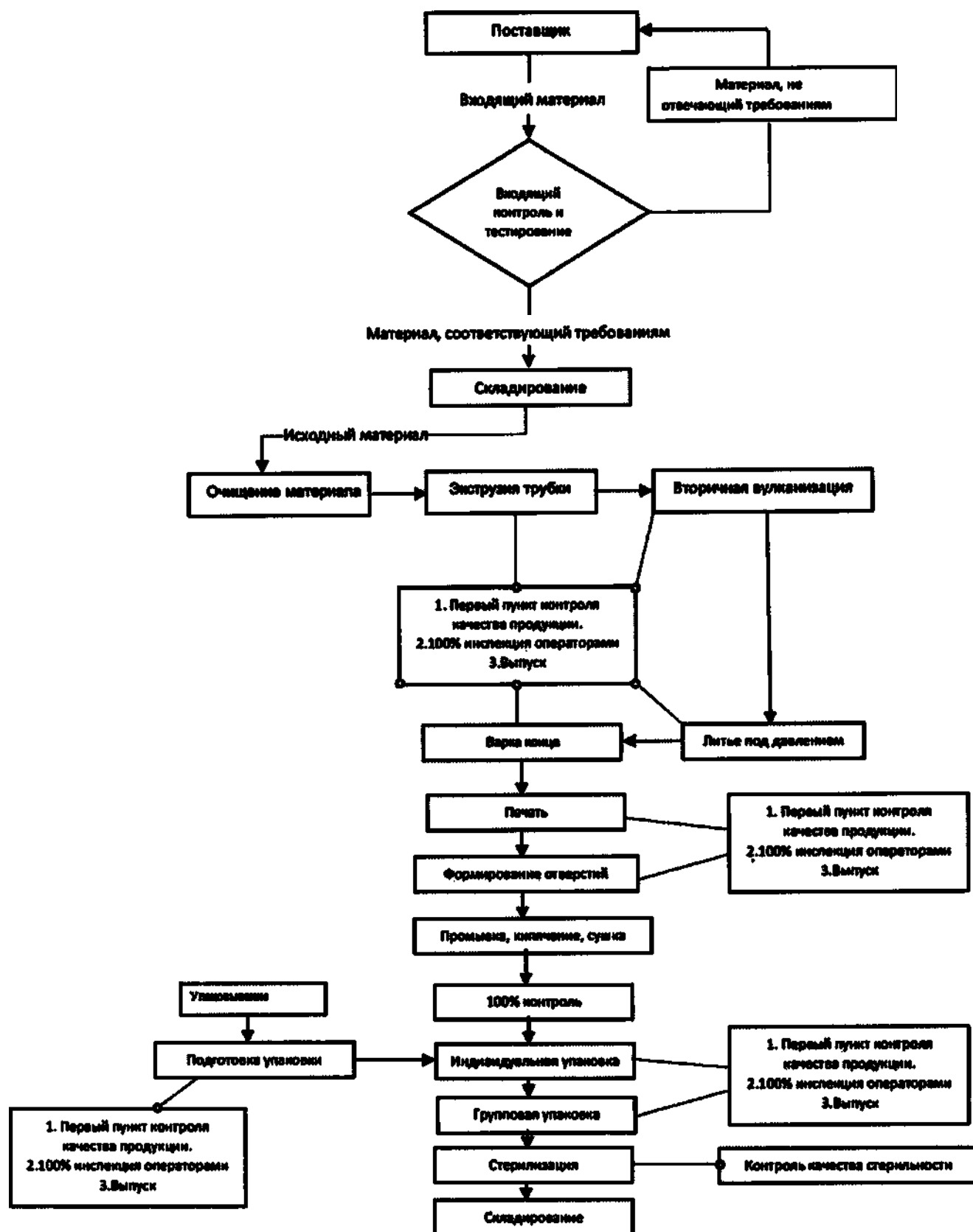

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Катетер не подлежит техническому обслуживанию.

21. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия, отслужившего свой срок на завершающей стадии, не может быть возложена на предприятие-изготовителя.

Изделие подлежит утилизации после одноразового использования.

Медицинское изделие должно быть утилизировано в соответствии с законодательством стран, в которых оно обращается.

Упаковка, неиспользованные изделия и изделия, бывшие в употреблении и не загрязненные биологическими жидкостями, утилизируются, как класс А «эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО», изделия, загрязненные в процессе эксплуатации кровью и другими биологическими жидкостями и инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности утилизируются, как класс Б «эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

Использованные медицинские изделия утилизируют после дезинфекции с соблюдением официального порядка, предписаний и норм. Класс отходов Б.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения, а также упаковка изделий подлежит утилизации как медицинские отходы класса А.

22. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие катетера требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией изготовителя.

Гарантийный срок годности/хранения катетера – 5 лет со дня изготовления при условии целостности герметичной индивидуальной упаковки.

Изделие сохраняет стерильность в течение всего срока годности при условии целостности герметичной индивидуальной упаковки.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, связанные с использованием катетера не по назначению, повреждением упаковки и функциональных элементов катетера.

В случае применения изделий за пределами параметров настоящих технических условий не может быть гарантирована правильность работы изделий.

23. РЕКЛАМАЦИИ

Производитель (изготовитель):

ООО «АЛС МЕДИКА», 107589, Россия, г. Москва, ул. Алтайская, д. 21, кв. 47.

Место производства медицинского изделия

1. LIANGXI YIKANG MEDICAL INSTRUMENT GROUP CO., LTD.

No.188 Liduaihua Ave, Jinxian County, Nanchang, 331725, Jiangxi, P.R. China

2. HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD.

No. 1288 South Jinxi Road Linglong Industrial Park Lin'an District 311301

Hangzhou City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Рекламации в отношении товара ненадлежащего качества отправлять в
ООО «АЛС МЕДИКА», 107589, Россия, г. Москва, ул. Алтайская, д. 21, кв. 47.

24. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ ISO 10993-5-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ ISO 10993-12-2015	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
ГОСТ ISO 11607-1-2018	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Сшито и заверено печатью
(156) листа(ов)

Генеральный директор
ООО "АЛС МЕДИКА"
Свистунов Артём Александрович

