

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
Федерального медико-биологического агентства

ОКП 94 5150

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ФГУП ЭПМ
ФМБА России


К. И. Полежаев
2010г.



НОСИЛКИ САНИТАРНЫЕ

НС-2 ЭПМ

ПАСПОРТ

9451.50-202.00.00.000 ПС

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взвеш. и инд. №	Подп. и дата
Взвеш. и инд. №	Подп. и дата

20 10г

Носилки санитарные НС-2 ЭПМ, входящие в средства перемещения и перевозки пациентов медицинские СППМ-ЭПМ (в дальнейшем - СППМ-ЭПМ), предназначены для эвакуации и транспортировки больных и пострадавших непосредственно на месте происшествия; в автомобилях скорой медицинской помощи в процессе транспортировки в стационар; в передвижных комплексах медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах; в стационарных медицинских учреждениях; реабилитационных центрах.

Область применения - специализированные медицинские подразделения, станции скорой помощи.

Носилки санитарные НС-2 ЭПМ могут поставляться как самостоятельно, так и в комплекте с другими СППМ-ЭПМ, который формируется согласно заказу. Номенклатура, условные обозначения изделий, входящих в комплект СППМ-ЭПМ, соответствуют таблице 1.

	Наименование	Модель	Обозначение конструкторской документации
1.	Средства перемещения и перевозки пациентов медицинские СППМ-ЭПМ, в составе:		
1.1	Носилки санитарные	НС-1 ЭПМ	9451.50-201.00.00.000
		НС-2 ЭПМ	9451.50-202.00.00.000
1.2.	Приемное устройство	ПУ-1 ЭПМ	9451.50-301.00.00.000
		ПУ-2 ЭПМ	9451.50-302.00.00.000
		ПУ-3 ЭПМ	9451.50.303.00.00.000
1.3	Тележка-каталка	ТК-1 ЭПМ	9451.50-101.00.00.000
		ТК-2 ЭПМ	9451.50-102.00.00.000
		ТК-3 ЭПМ	9451.50-103.00.00.000
		ТК-4 ЭПМ	9451.50-104.00.00.000

Носилки санитарные НС-2 ЭПМ изготавливаются в климатическом исполнении и категории размещения У1.1 по ГОСТ 15150.

Класс носилок санитарных НС-1 ЭПМ в зависимости от потенциала риска применения 1 по ГОСТ Р 51609.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации носилки санитарные НС-2 ЭПМ относятся к классу Б по ГОСТ Р 50444.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий носилки санитарные НС-2 ЭПМ относятся к группе изделий 5 ГОСТ Р 50444.

Носилки санитарные НС-2 ЭПМ при транспортировании устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 5 ГОСТ 15150.

				9451.50-202.00.00.000 ПС		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разработ	Макаров				Лист	Листов
Проб.	Гомес					2 9
Н.контр.					ЭПМ	
Утв.	Полехов					

Носилки санитарные
НС-2 ЭПМ

Копирован

Формат А4

Носилки санитарные НС-2 ЭПМ в транспортной упаковке устойчивы к механическим воздействиям и сохраняют свою работоспособность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Носилки санитарные НС-2 ЭПМ соответствуют техническим условиям ТУ 9451-003-25866562-2010.

Средний срок службы СППМ-ЭПМ должен быть не менее 5 лет. За критерий предельного состояния СППМ-ЭПМ принимается состояние, при котором восстановление СППМ-ЭПМ невозможно или экономически нецелесообразно.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ НОСИЛОК САНИТАРНЫХ НС-2 ЭПМ.

1.1. Габаритные размеры в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2.

Обозначение	Длина, мм, не более	Высота, мм, не более	Ширина, мм, не более
НС-2 ЭПМ	2000/500	130/90	550/270

1.2. Внешний вид носилок санитарных НС-2 ЭПМ приведен на рис.1

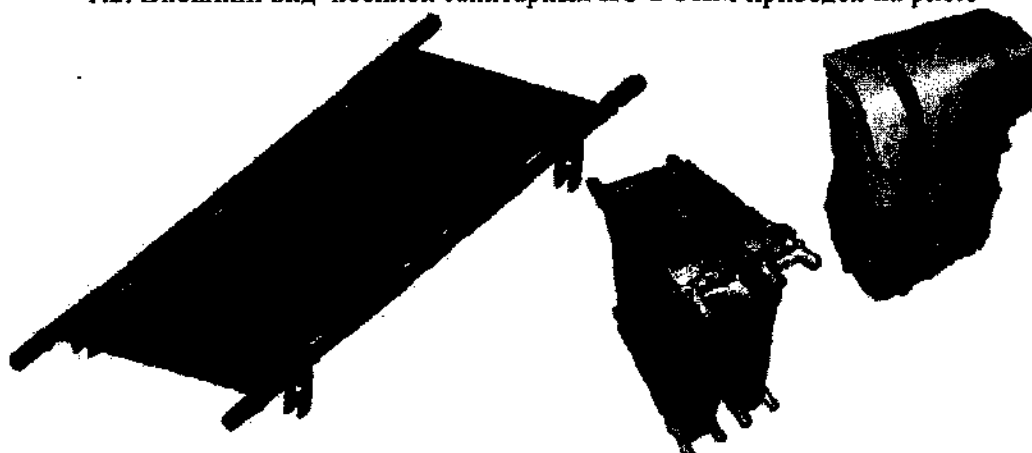


Рис.1. Носилки санитарные НС-2 ЭПМ.

1.3. Масса и грузоподъемность НС-2 ЭПМ в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3.

Обозначение	Масса, кг, не более	Грузоподъемность, кг, не менее
НС-2 ЭПМ	8	150

Изд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № докл.
Подп. и дата	

Изд. № подл.	Изд. № докл.	Подп.	Дата
--------------	--------------	-------	------

9451.50-202.00.00.000 ПС

Лист
3

Копирован

Формат А4

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Носилки санитарные НС-2 ЭПМ поставляются как самостоятельно, так и в комплекте с другими СППМ-ЭПМ, который формируется согласно заказу.

Перечень изделий входящих в состав СППМ-ЭПМ приведён в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование	Модель	Обозначение конструкторского документа	Кол-во, шт.
1.	Средства перемещения и перевозки пациентов медицинские СППМ-ЭПМ в составе:			
1.1	Носилки санитарные	НС-1 ЭПМ	9451.50-201.00.00.000	*
		НС-2 ЭПМ	9451.50-202.00.00.000	*
1.2	Приемное устройство	ПУ-1 ЭПМ	9451.50-301.00.00.000	*
		ПУ-2 ЭПМ	9451.50-302.00.00.000	*
		ПУ-3 ЭПМ	9451.50-303.00.00.000	*
1.3	Тележка-каталка	ТК-1 ЭПМ	9451.50-101.00.00.000	*
		ТК-2 ЭПМ	9451.50-102.00.00.000	*
		ТК-3 ЭПМ	9451.50-103.00.00.000	*
		ТК-4 ЭПМ	9451.50-104.00.00.000	*
2.	Эксплуатационные документы			
2.1	Паспорт	НС-1 ЭПМ	9451.50-201.00.00.000 ПС	*
		НС-2 ЭПМ	9451.50-202.00.00.000 ПС	*
		ПУ-1 ЭПМ	9451.50-301.00.00.000 ПС	*
		ПУ-2 ЭПМ	9451.50-302.00.00.000 ПС	*
		ПУ-3 ЭПМ	9451.50-303.00.00.000 ПС	*
		ТК-1 ЭПМ	9451.50-101.00.00.000 ПС	*
		ТК-2 ЭПМ	9451.50-102.00.00.000 ПС	*
		ТК-3 ЭПМ	9451.50-103.00.00.000 ПС	*
		ТК-4 ЭПМ	9451.50-104.00.00.000 ПС	*

Примечание: * - Комплект поставки СППМ-ЭПМ по требованию заказчика.

9451.50-202.00.00.000 ПС

Лист

5

Копировать

Формат А4

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НОСИЛКАМИ САНИТАРНЫМИ НС-2 ЭПМ.

4.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.1.1. Эксплуатировать комплект без технического осмотра с видимыми дефектами;

4.1.2. Оставлять без присмотра носилки санитарные НС-2 ЭПМ с пациентом

4.2. КОНТРОЛИРОВАТЬ ЧЕТКОСТЬ:

4.2.1. Продольной и поперечной установки носилок санитарных НС-2 ЭПМ на поверхности.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Изучите устройство и порядок работы с носилками санитарными НС-2 ЭПМ отдельно или в составе комплекта СПППМ-ЭПМ в соответствии с настоящим паспортом и паспортами на входящие в комплект иными СПППМ-ЭПМ.

5.2. Распакуйте носилки санитарные НС-2 ЭПМ, очистите от консервационной смазки с помощью растворителя.

5.3. Проверьте внешний вид носилок санитарных НС-2 ЭПМ.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Необходимо предохранять носилки санитарные НС-2 ЭПМ от загрязнения.

6.2. После применения производить санитарную обработку металлических и полимерных поверхностей носилок санитарных НС-2 ЭПМ.

6.4. Хранить носилки санитарные НС-2 ЭПМ в сухом помещении, закрытом от атмосферных осадков при температуре от - 20 0С до + 20 0С.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	945150-202.00.00 000 ПС		Лист
							6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Копирован

Формат А4

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Носилки санитарные НС-2 ЭПМ соответствуют техническим условиям ТУ 9451-003-25866562-2010, комплекту технической документации 9451.50-202.00.00.000.

7.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право введения в изделия конструктивно-технологических изменений, не ухудшающих его эксплуатационные качества.

7.3. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу носилок санитарных НС-2 ЭПМ в течение одного года со дня поставки при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.

7.4. Предприятие-изготовитель не принимает претензии без предъявления настоящего паспорта и отметки ОТК предприятия-изготовителя о дате приемки.

7.5. Рекламации направлять по адресу:

ФГУП ЭПМ ФМБА России

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.5, стр.2

e-mail: epm.fmba@mail.ru

т./ф. +7 (499) 190-64-24

т./ф. +7 (499) 190-64-60

т./ф. +7 (495) 981-65-81

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____ лица, _____ ответственного _____ за _____ приемку

9451.50-202.00.00.000 ПС

Лист

7

Копировал

Формат А4

ФГУП ЭПМ ФМБА России
123182, г.Москва, ул. Щукинская, д.5, стр.2

ТАЛОН № 1

на техническое обслуживание носилок санитарных НС-2 ЭПМ
заводской номер изделия № _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Выполнены

работы: _____

Исполнитель: _____

Владелец: _____

**КОРЕШОК
ТАЛОНА № 1**

Техническое
обслуживание

Изъят:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Исполнитель: _____

ФГУП ЭПМ ФМБА России
123182, г.Москва, ул. Щукинская, д.5, стр.2

ТАЛОН № 2

на техническое обслуживание носилок санитарных НС-2 ЭПМ
заводской номер изделия № _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Выполнены

работы: _____

Исполнитель: _____

Владелец: _____

**КОРЕШОК
ТАЛОНА № 2**

Техническое
обслуживание

Изъят:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Исполнитель: _____

ФГУП ЭПМ ФМБА России
123182, г.Москва, ул. Щукинская, д.5, стр.2

ТАЛОН № 3

на техническое обслуживание носилок санитарных НС-2 ЭПМ
заводской номер изделия № _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Выполнены

работы: _____

Исполнитель: _____

Владелец: _____

**КОРЕШОК
ТАЛОНА № 3**

Техническое
обслуживание

Изъят:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Исполнитель: _____

945150-202.00.00.000. ПС

Лист

8

Копировал

Формат А4

Лист регистрации изменений

[illegible]