

58
ООО "МИМ"

Оливы для промывания носа и продувания слуховых труб полимерные,
однократного применения стерильные

Инструкция по эксплуатации
гТ.0123.000.М ИЭ



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН. ДИРЕКТОР

ООО «МИМ»

ЧИКРИЗОВ В.А.

- месяц и год срока годности;
- сведения об однократности применения, указания о недопустимости применения в случае нарушения целостности потребительской упаковки.

2 Оливы стерилизованы этилен оксидом.

3 Меры безопасности

1 Запрещается использовать оливу из поврежденной потребительской упаковкой, неоднородным сварным швом или с просроченным сроком годности, в противном случае олива подлежит утилизации. Повторная стерилизация оливы недопустима.

2 Не допускается использовать оливу для нескольких пациентов, а также повторное её использование.

3 Использовать оливу только по назначению.

4 Строго соблюдать инструкцию Минздравсоцразвития по утилизации данного медицинского изделия.

4 Порядок применения

1 Убедиться в правильности выбора номера оливы.

2 Визуальным осмотром определить целостность потребительской упаковки оливы и однородность сварного шва.

3 Убедиться в действии срока годности оливы.

4 Вскрыть потребительскую упаковку.

5 Извлечь оливу из потребительской упаковки и подсоединить (в соответствии с предполагаемой процедурой) к нагнетательному аппарату, шлангу кружки Эсмарха или баллону типа Политцера.

6 Провести процедуру.

7 После проведения процедуры оливу утилизировать.

5 Хранение

1 Хранить оливы в отапливаемых, вентилируемых помещениях с температурой воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%.

2 Срок хранения не выше срока годности, указанного на упаковке.

6 Гарантийные обязательства

Стерильность олив гарантируется предприятием-изготовителем в течение 3 лет от даты стерилизации, при сохранении целостности потребительской упаковки и соблюдении условий хранения по разделу 5.

[illegible]



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (лист)

Подпись

В.А.