



Общество с ограниченной  
ответственностью «Фламинго»

ИНН: 5003124557  
КПП: 470601001  
ОГРН:  
1175027020300

+7 (812) 667-83-78  
[flamingo@flamingoproduct.ru](mailto:flamingo@flamingoproduct.ru)

187342 Российская Федерация, Ленинградская область,  
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, оф. №  
7

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Фламинго»



Волокитин Н. М.

«15» декабря 2023 г.

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(инструкция пользователя)  
ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ОДНОРАЗОВЫЕ**

по ТУ 32.50.50-001-19127789-2018  
Изменение №2

г. Кировск  
2023

## **1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Подгузники для взрослых одноразовые в вариантах исполнения: 1. «Light», размеры S, M, L, XL. 2. «Standard», размеры XS, S, M, L, XL. 3. «Premium», размеры XS, S, M, L, XL.

## **2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

### **2.1. Назначение**

Для впитывания и удерживания мочи при уходе за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежащими больными и в других случаях.

### **2.2. Противопоказания**

общая непереносимость материала, из которого изготовлен подгузник.

### **2.3. Показания к применению**

- недержание мочи;
- частичная, или полная обездвиженность.

**2.4. Возможные побочные явления:** возможно возникновение контактного дерматита на участках тела, закрытых подгузником. При длительном применении возможно развитие инфекции мочевых путей.

### **2.5. Условия применения**

Подгузники используются в качестве изделий санитарно-гигиенического назначения для мужчин и женщин в домашних условиях, а также в условиях лечебно-профилактических учреждений. Применение подгузников является профилактикой развития пролежней у лежачих больных и защитой от загрязнений постельного белья.

### **2.6. Характеристики (свойства)**

**2.6.1.** В зависимости от обхвата талии/бедер человека подгузники распределены по группам и изготовлены в соответствии с размерами указанными в таблице 1

Таблица 1.

| <b>Группа подгузников</b> | <b>Размерный ряд по обхвату талии/бедер, см</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| XS                        | До 60                                           |
| S                         | До 90                                           |
| M                         | До 120                                          |
| L                         | До 150                                          |
| XL                        | До 175                                          |

2.6.2. В зависимости от количества впитываемой жидкости изготавливают подгузники следующих вариантов исполнения:

- подгузники в варианте исполнения «Light» для людей с легкой степенью недержания (далее – подгузник для легкой степени недержания);
- подгузники в варианте исполнения «Standard» для людей со средней степенью недержания (далее - подгузник для средней степени недержания);
- подгузники в варианте исполнения «Premium» для людей с тяжелой степенью недержания (далее - подгузник для тяжелой степени недержания).

2.6.3. Общий вид подгузника должен соответствовать изделию, изображённому на рисунке 1.



Рисунок 1

## 2.7. Состав изделия

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- Верхний покровный слой
- Распределительный слой
- Верхний слой
- Верхний впитывающий слой
- Нижний впитывающий слой
- Нижний слой
- Фиксирующие элементы (эластичные манжеты и пояс, застёжка липучка, фронтальная лента)
- Защитный слой

Допускается изготавливать подгузники без распределительного слоя, эластичного пояса и фронтальной ленты.

В конструкции подгузников возможно использовать вместо верхнего слоя,


верхнего впитывающего слоя, нижнего впитывающего слоя, нижнего слоя один впитывающий слой.

**2.8. Изделие одноразового использования, не подлежит ремонту и техническому обслуживанию. После применения, подлежит утилизации.**


### **3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

#### **3.1. Подготовка подгузника**


Для удобства транспортировки подгузник плотно складывают, и в таком спрессованном виде он попадает к потребителю. Освободив изделие от упаковки, полностью разверните подгузник, отвернув все сложенные элементы. Не прилагая чрезмерно больших усилий, потяните его за края, до полного исчезновения складок.

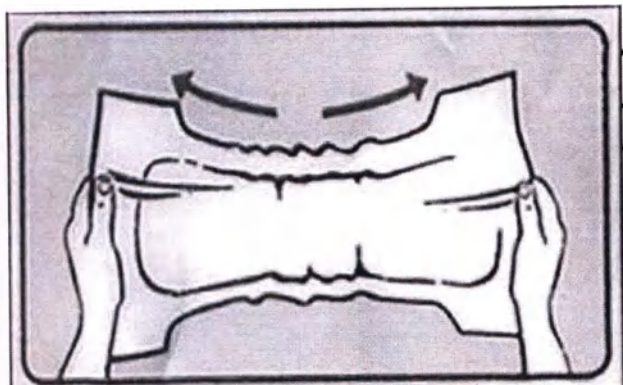

Растяните среднюю часть.

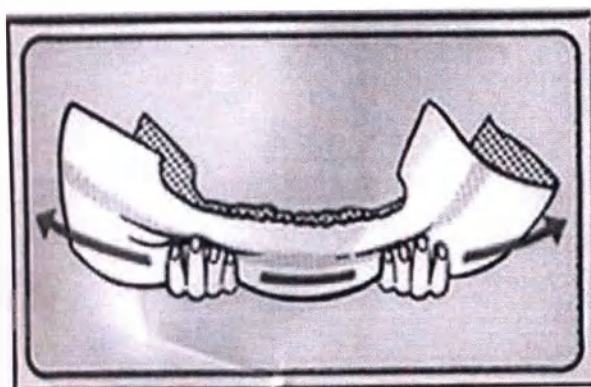


Настройте у подгузника бортик от протекания (если он есть, находится на внутренней стороне), а то он иногда, при производстве, слипается с основанием и моча может вытекать при обильном орошении. Особенно при положении больного лежа на боку.

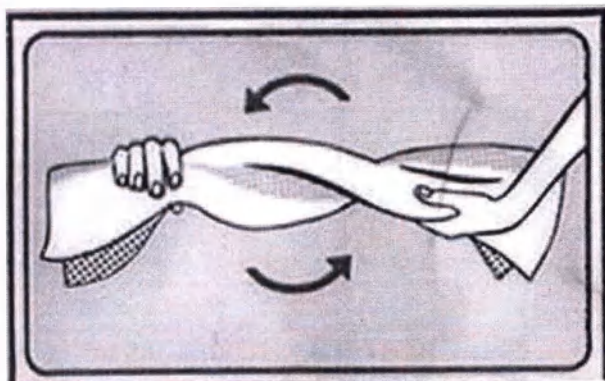


В некоторых случаях приходится немного покрутить, чтобы искусственный материал приобрел эластичность и лучше прилегал к телу.


### 3.2. Одеваем подгузник на ходячего больного

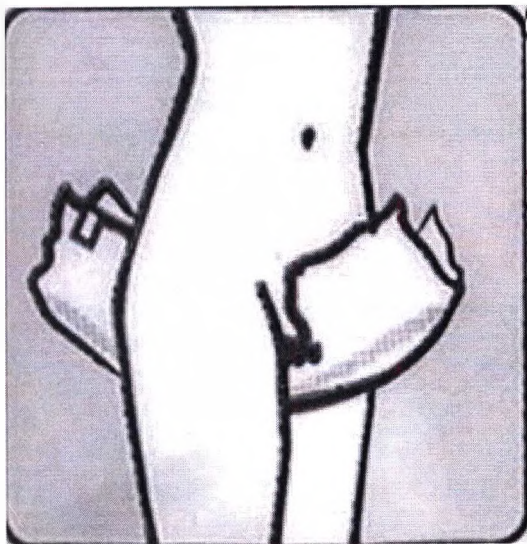


В расправленном виде подкладываем его между ног, следя за тем, чтобы спереди и сзади было одинаковое количество впитывающего материала.

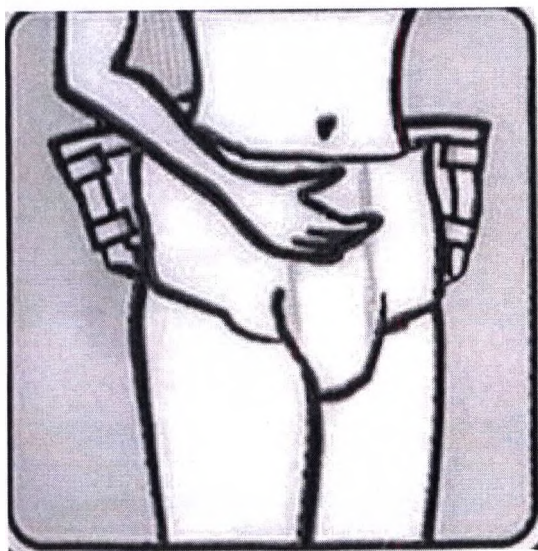


Расправляем подгузник на теле пациента.

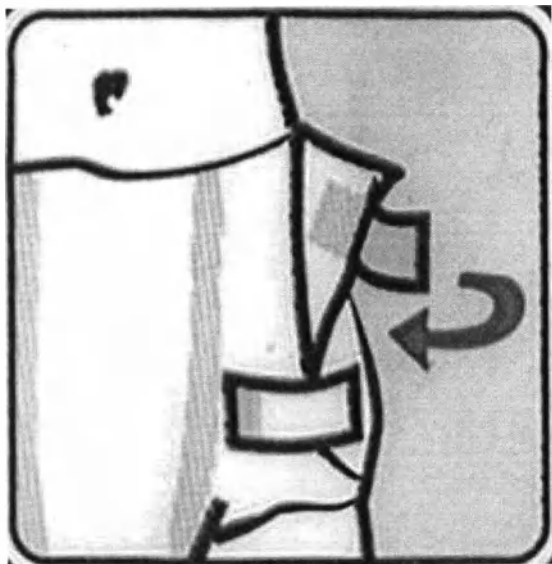

Следя за тем, чтобы материал не стягивал тело больного, и в тоже время подгузник плотно сидел, приклеиваем застёжки.

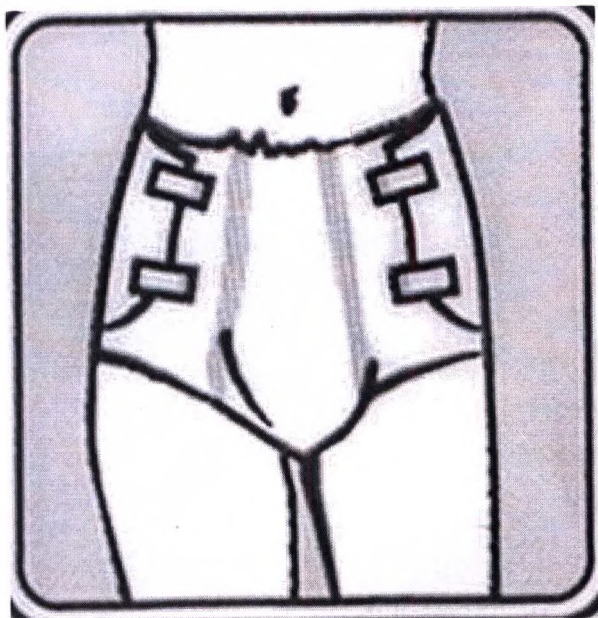

Подгузник полностью застегнут. Рабочее положение подгузника.

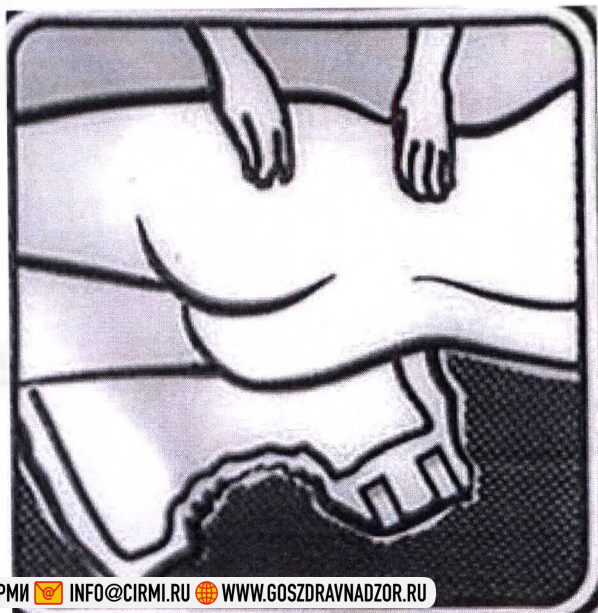


### 3.3. Одеваем подгузника на лежачего больного


Больной лежит на боку. Сворачиваем в трубочку треть подгузника со стороны попы. Подкладываем ее под больного. Переворачиваем его сначала на спину, а потом на другой бок. При этом подгузник остается под человеком. Расправляем свернутую часть. Переднюю часть подгузника просовываем между ног и вытягиваем на верх.



Расправляем подгузник на теле, чтобы не осталось как можно меньше складок. У лежачих больных складки белья часто приводят к застойным явлениям.

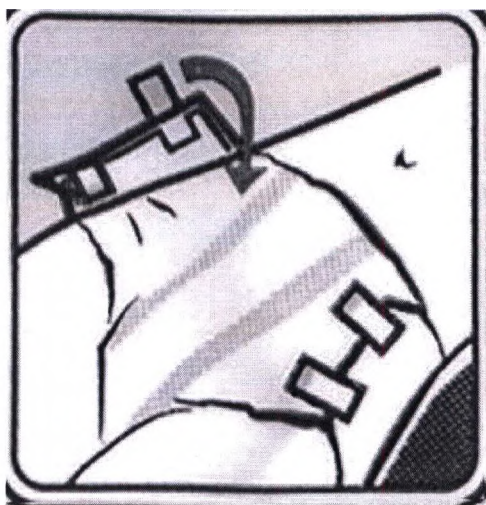

Застегиваем липучки. Здесь можно натягивать материал не так сильно, как в случае с ходячим пациентом. Важно, чтобы тело проветривалось и могло дышать.

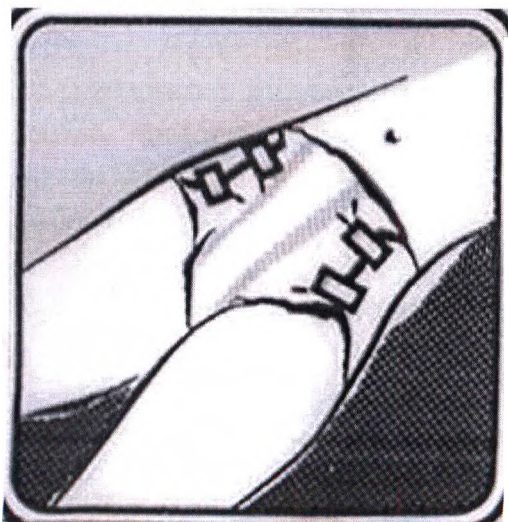

Подгузник полностью застегнут. Рабочее положение подгузника.



Использованный подгузник сверните и выбросьте в мусорное ведро. Не выбрасывайте использованное изделие в унитаз.

### **3.4. Смена подгузника**

#### **Правильное снятие подгузника:**

- у лежащего на спине человека расстегните застёжки подгузника, подверните их липкой стороной внутрь, чтобы избежать травмирования кожи и продвиньте ладонью нижний край под бедра;
- аккуратно сверните переднюю часть подгузника, уложите больного набок и удалите использованный подгузник сзади.
- при снятии подгузника у обычного больного попросите его встать ровно и проделайте те же манипуляции.

**! Помните, что надевать и снимать подгузник необходимо только сзади, так как это предотвращает случайный перенос бактерий со стороны кишечника.**

**! Чтобы избежать протекания подгузника, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача.**

**! Каждый раз после снятия использованного подгузника не забывайте проводить гигиеническую обработку.**

**При недержании кала, а также при наличии в местах контакта с подгузником нарушения целостности кожных покровов (язвы, пролежни, раны, ожоги и прочее) и/или раздражения, перед использованием подгузника, необходимо проконсультироваться с медицинским работником.**

#### **Самыми частыми причинами протекания являются:**

- ошибки при надевании (несоблюдение инструкции);
- неверно подобранный размер;
- неправильный выбор степени впитываемости.

Менять подгузники нужно каждые 3–4 часа либо после очередной дефекации. В тех случаях, когда такая частая замена не возможна, следует отдать предпочтение подгузникам повышенной степени впитываемости.

Подгузники для взрослых – прекрасное средство личной гигиены для тех, кто потерял способность контролировать определенные функции своего организма. Они помогают облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями, делая ее максимально комфортной.

## **1. ХРАНЕНИЕ**

5.1 Подгузники хранят в упаковке предприятия – изготовителя в условиях хранения по группе 1 ГОСТ 15150. Подгузники должны храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 75 %.

5.2. Подгузники должны храниться на складах поставщика и потребителя (кроме складов железнодорожных станций), в упаковке предприятия – изготовителя.

5.3. Не допускается совместное хранение подгузников с химическими веществами.

5.4. Срок годности 5 лет, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения

5.5. После окончания срока годности подгузники подлежат утилизации, как бытовые отходы.

## **2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Транспортирование - по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по группе 5 ГОСТ 15150.

## **3. УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ**

7.1. Утилизация подгузников должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.2790.

6.3. В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, подгузники относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

6.4. Утилизация отходов материалов – согласно СанПиН 2.1.7.1322.

7.2. После использования или по истечении установленного срока годности подгузники должны быть утилизированы как твердые бытовые отходы.

7.3. Уничтожение производится посредством захоронения.

## **8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ**

Претензии в установленном порядке предъявляются ООО «Фламинго» по адресу: Россия, 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, офис 7.

## **9 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие подгузников требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2. Срок хранения (годности) – 5 лет с даты изготовления.

Производитель: ООО «Фламинго», Россия, 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, офис 7.

Телефон: +7(812)667-83-78. электронная почта: [info@flamingoproduct.ru](mailto:info@flamingoproduct.ru)

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2018/7639

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 11 (одинадцать) листов  
Должность ген. директор.  
Подпись [подпись] / Воловский Н.А.  
«15» 12 2023 года М.П.

