

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ТОНУС»

С.В.Наталуха

«05» декабря 2022 г.

М.П.



Бинты медицинские эластичные УНГА®, ЭЛАСМА® по ТУ 21.20.24-018-10434277-2021

ПУ № ФСР 2010/09514 от «__» _____ 20__ г.

Инструкция по применению

Производитель (изготовитель) медицинского изделия/приём претензий

Акционерное общество «ТОНУС» (АО «ТОНУС»).

Адрес места нахождения производителя (изготовителя):

243300, Брянская обл., Унечский р-н, г. Унеча, ул. Совхозная, д. 30.

ИНН 3231004618

Номер телефона: (4832) 505-155

Адрес электронной почты: tonus@unga.ru

Область применения медицинского изделия. Бинты могут быть использованы в клинических, поликлинических, полевых условиях, при оказании первой медицинской помощи, спортивной медицине и в быту.

Назначение медицинского изделия и показания к применению. Бинты медицинские эластичные «УНГА» предназначены для проведения компрессионной терапии в различных областях хирургии (сердечно-сосудистой, абдоминальной, торакальной, пластической и др.), травматологии, ортопедии, спортивной медицине и других областях практического здравоохранения.

Варианты исполнения. Бинты выпускаются 41 типоразмера: длиной 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 м и шириной 5,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0 и 20 см в 6-и вариантах исполнения:

I. Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости «УНГА-ВР»:

- текстильной застежкой: 0,6 м x 5,0 см; 0,6 м x 8,0 см; 0,6 м x 10,0 см; 1,0 м x 5,0 см; 1,0 м x 8,0 см; 1,0 м x 10,0 см; 1,0 м x 12,0 см; 1,0 м x 15,0 см; 1,5 м x 5,0 см; 1,5 м x 8,0 см; 1,5 м x 10,0 см; 1,5 м x 12,0 см; 1,5 м x 15,0 см; 2,0 м x 5,0 см; 2,0 м x 8,0 см; 2,0 м x 10,0 см; 2,0 м x 12,0 см; 2,0 м x 15,0 см; 2,5 м x 5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 5,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 5,0 см; 7,0 м x 8,0 см; 7,0 м x 10,0 см; 7,0 м x 12,0 см; 7,0 м x 15,0 см

- застежками-клипсами: 0,6 м x 5,0 см; 0,6 м x 8,0 см; 0,6 м x 10,0 см; 1,0 м x 5,0 см; 1,0 м x 8,0 см; 1,0 м x 10,0 см; 1,0 м x 12,0 см; 1,0 м x 15,0 см; 1,5 м x 5,0 см; 1,5 м x 8,0 см; 1,5 м x 10,0 см; 1,5 м x 12,0 см; 1,5 м x 15,0 см; 2,0 м x 5,0 см; 2,0 м x 8,0 см; 2,0 м x 10,0 см; 2,0 м x 12,0 см; 2,0 м x 15,0 см; 2,5 м x 5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 5,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 5,0 см; 7,0 м x 8,0 см; 7,0 м x 10,0 см; 7,0 м x 12,0 см; 7,0 м x 15,0 см

II. Бинт медицинский эластичный средней растяжимости «УНГА-СР»:

- текстильной застежкой: 0,6 м x 5,0 см; 0,6 м x 8,0 см; 0,6 м x 10,0 см; 1,0 м x 5,0 см; 1,0 м x 8,0 см; 1,0 м x 10,0 см; 1,0 м x 12,0 см; 1,0 м x 15,0 см; 1,5 м x 5,0 см; 1,5 м x 8,0 см; 1,5 м x 10,0 см; 1,5 м x 12,0 см; 1,5 м x 15,0 см; 2,0 м x 5,0 см; 2,0 м x 8,0 см; 2,0 м x 10,0 см; 2,0 м x 12,0 см; 2,0 м x 15,0 см; 2,5 м x 5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 5,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 15,0 см

- застежками-клипсами: 0,6 м x 5,0 см; 0,6 м x 8,0 см; 0,6 м x 10,0 см; 1,0 м x 5,0 см; 1,0 м x 8,0 см; 1,0 м x 10,0 см; 1,0 м x 12,0 см; 1,0 м x 15,0 см; 1,5 м x 5,0 см; 1,5 м x 8,0 см; 1,5 м x 10,0 см; 1,5 м x 12,0 см; 1,5 м x 15,0 см; 2,0 м x 5,0 см; 2,0 м x 8,0 см; 2,0 м x 10,0 см; 2,0 м x 12,0 см; 2,0 м x 15,0 см; 2,5 м x 5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 5,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 15,0 см

III. Бинт медицинский эластичный малой растяжимости «УНГА-МР»:

- текстильной застежкой: 0,6 м x 5,0 см; 0,6 м x 8,0 см; 0,6 м x 10,0 см; 1,0 м x 5,0 см; 1,0 м x 8,0 см; 1,0 м x 10,0 см; 1,0 м x 12,0 см; 1,0 м x 15,0 см; 1,5 м x 5,0 см; 1,5 м x 8,0 см; 1,5 м x 10,0 см; 1,5 м x 12,0 см; 1,5 м x 15,0 см; 2,0 м x 5,0 см; 2,0 м x 8,0 см; 2,0 м x 10,0 см; 2,0 м x 12,0 см; 2,0 м x 15,0 см; 2,5 м x 5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 5,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 7,0 м x 8,0 см; 7,0 м x 10,0 см; 7,0 м x 12,0 см; 7,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 20,0 см

- застежками-клипсами: 0,6 м x 5,0 см; 0,6 м x 8,0 см; 0,6 м x 10,0 см; 1,0 м x 5,0 см; 1,0 м x 8,0 см; 1,0 м x 10,0 см; 1,0 м x 12,0 см; 1,0 м x 15,0 см; 1,5 м x 5,0 см; 1,5 м x 8,0 см; 1,5 м x 10,0 см; 1,5 м x 12,0 см; 1,5 м x 15,0 см; 2,0 м x 5,0 см; 2,0 м x 8,0 см; 2,0 м x 10,0 см; 2,0 м x 12,0 см; 2,0 м x 15,0 см; 2,5 м x 5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 5,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 7,0 м x 8,0 см; 7,0 м x 10,0 см; 7,0 м x 12,0 см; 7,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 20,0 см

IV. Бинт медицинский эластичный спортивный «УНГА-РСУ»:

- текстильной застежкой: 0,6 м x 5,0 см; 0,6 м x 8,0 см; 0,6 м x 10,0 см; 1,0 м x 5,0 см; 1,0 м x 8,0 см; 1,0 м x 10,0 см; 1,0 м x 12,0 см; 1,0 м x 15,0 см; 1,5 м x 5,0 см; 1,5 м x 8,0 см; 1,5 м x 10,0 см; 1,5 м x 12,0 см; 1,5 м x 15,0 см; 2,0 м x 5,0 см; 2,0 м x 8,0 см; 2,0 м x 10,0 см; 2,0 м x 12,0 см; 2,0 м x 15,0 см; 2,5 м x 5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 5,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 8,0 см; 7,0 м x 10,0 см; 7,0 м x 12,0 см; 7,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 20,0 см

- застежками-клипсами: 0,6 м x 5,0 см; 0,6 м x 8,0 см; 0,6 м x 10,0 см; 1,0 м x 5,0 см; 1,0 м x 8,0 см; 1,0 м x 10,0 см; 1,0 м x 12,0 см; 1,0 м x 15,0 см; 1,5 м x 5,0 см; 1,5 м x 8,0 см; 1,5 м x 10,0 см; 1,5 м x 12,0 см; 1,5 м x 15,0 см; 2,0 м x 5,0 см; 2,0 м x 8,0 см; 2,0 м x 10,0 см; 2,0 м x 12,0 см; 2,0 м x 15,0 см; 2,5 м x 5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 5,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 8,0 см; 7,0 м x 10,0 см; 7,0 м x 12,0 см; 7,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 20,0 см

5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 8,0 см; 7,0 м x 10,0 см; 7,0 м x 12,0 см; 7,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 20,0 см.

V. Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости «ЭЛАСМА-ВР»:

- с застежками-клипсами: 0,6 м x 5,0 см; 0,6 м x 8,0 см; 0,6 м x 10,0 см; 1,0 м x 5,0 см; 1,0 м x 8,0 см; 1,0 м x 10,0 см; 1,0 м x 12,0 см; 1,0 м x 15,0 см; 1,5 м x 5,0 см; 1,5 м x 8,0 см; 1,5 м x 10,0 см; 1,5 м x 12,0 см; 1,5 м x 15,0 см; 2,0 м x 5,0 см; 2,0 м x 8,0 см; 2,0 м x 10,0 см; 2,0 м x 12,0 см; 2,0 м x 15,0 см; 2,5 м x 5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 8,0 см; 7,0 м x 10,0 см; 7,0 м x 12,0 см; 7,0 м x 15,0 см; 7,0 м x 20,0 см

VI. Бинт медицинский эластичный средней растяжимости «ЭЛАСМА-СР»:

- с застежками-клипсами: 0,6 м x 5,0 см; 0,6 м x 8,0 см; 0,6 м x 10,0 см; 1,0 м x 5,0 см; 1,0 м x 8,0 см; 1,0 м x 10,0 см; 1,0 м x 12,0 см; 1,0 м x 15,0 см; 1,5 м x 5,0 см; 1,5 м x 8,0 см; 1,5 м x 10,0 см; 1,5 м x 12,0 см; 1,5 м x 15,0 см; 2,0 м x 5,0 см; 2,0 м x 8,0 см; 2,0 м x 10,0 см; 2,0 м x 12,0 см; 2,0 м x 15,0 см; 2,5 м x 5,0 см; 2,5 м x 8,0 см; 2,5 м x 10,0 см; 2,5 м x 12,0 см; 2,5 м x 15,0 см; 3,0 м x 5,0 см; 3,0 м x 8,0 см; 3,0 м x 10,0 см; 3,0 м x 12,0 см; 3,0 м x 15,0 см; 3,5 м x 5,0 см; 3,5 м x 8,0 см; 3,5 м x 10,0 см; 3,5 м x 12,0 см; 3,5 м x 15,0 см; 4,0 м x 5,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 4,0 м x 15,0 см; 4,5 м x 5,0 см; 4,5 м x 8,0 см; 4,5 м x 10,0 см; 4,5 м x 12,0 см; 4,5 м x 15,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 15,0 см.

Форма выпуска: нестерильные.

Степень компрессии: класс компрессии не классифицируется.

Кратность применения: изделия многократного применения.

Потенциальные потребители: Бинты предназначены для использования как медицинскими работниками, так и населением всех возрастных категорий.

Показания к применению. Показания к применению медицинского изделия в зависимости от варианта исполнения:

• **Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости «УНГА-ВР»** предназначен для наложения компрессионных повязок:

- для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей;
- для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов;
- для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса;
- для снятия посттравматических отеков различной этиологии;
- для профилактики венозных тромбозомболических осложнений в до- и послеоперационном периоде при проведении оперативного воздействия на внутренние органы человека;
- для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии;
- для лечения хронических заболеваний вен клинического класса по CEAP C1-C6.

• **Бинт медицинский эластичный средней растяжимости «УНГА-СР»** предназначен для наложения компрессионных повязок:

- для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей;
- для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов;
- для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса;
- для снятия посттравматических отеков различной этиологии;
- для профилактики венозных тромбозомболических осложнений в до- и послеоперационном периоде при проведении оперативного воздействия на внутренние органы человека;
- для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии;
- для лечения хронических заболеваний вен клинического класса по CEAP C1-C6.

• **Бинт медицинский эластичный малой растяжимости «УНГА-МР»** предназначен для наложения компрессионных повязок:

- для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей;
- для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов;
- для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса;
- для снятия отеков различной этиологии;
- для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии;
- для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии;
- для лечения хронических заболеваний вен клинического класса по CEAP C1-C6.

• **Бинт медицинский эластичный спортивный «УНГА-РУС»** предназначен для наложения компрессионных повязок:

- для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей;
- для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов во время тренировок и спортивных соревнований;
- для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса;
- для снятия отеков различной этиологии.

• **Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости «ЭЛАСМА-ВР»** предназначен для наложения компрессионных повязок:

- для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей;
- для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов;
- для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса;
- для снятия посттравматических отеков различной этиологии;
- для профилактики венозных тромбозомболических осложнений в до- и послеоперационном периоде при проведении оперативного воздействия на внутренние органы человека;
- для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии;
- для лечения хронических заболеваний вен клинического класса по CEAP C1-C6.

• **Бинт медицинский эластичный средней растяжимости «ЭЛАСМА-СР»** предназначен для наложения компрессионных повязок:

- для профилактики послеоперационных осложнений после хирургического восстановления капсульно-связочного аппарата, костной и мышечной тканей;
- для профилактики растяжений, вывихов и деформации мягких тканей, сухожилий и суставов;
- для поддержания состояния покоя и профилактики атрофии мышечных тканей после снятия гипса;

- для снятия посттравматических отеков различной этиологии;
- для профилактики и лечения посттромботической болезни, лимфедемы и для профилактики послеоперационных осложнений после склеротерапии и флебэктомии;
- для лечения хронических заболеваний вен клинического класса по СЕАР С1–С6.

Противопоказания. Воспалительные, инфекционные поражения кожных покровов в месте наложения бинта: флегмоны, гнойные затеки, анаэробная инфекция, гангрена, ишемические расстройства конечности, выраженные нарушения артериального кровотока в конечностях. Индивидуальная непереносимость компонентов сырья. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бинт после истечения срока годности.

Побочные действия. Появление онемения, болей, ощущения пульсации говорят о выборе растяжимости бинта или необходимости перебинтования.

Меры предосторожности. Появление онемения, болей, ощущения пульсации говорят о выборе несоответствующей компрессии бинта или необходимости повторного наложения компрессионной повязки. Хранить в местах, недоступных для детей.

Основные технические характеристики.


Наименование	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка до и после стирки, Н не менее	Растяжимость до и после стирки, %	Усадка после стирки, % не более	Остаточная деформация до и после стирки, % не более
Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости «УНГА-ВР»	400±20	200	Не менее 150	20,0	10,0
Бинт медицинский эластичный средней растяжимости «УНГА-СР»	300±10	220	Не менее 100, но не более 150	20,0	10,0
Бинт медицинский эластичный малой растяжимости «УНГА-МР»	400±20	220	Не менее 35, но не более 100	20,0	10,0
Бинт медицинский эластичный спортивный «УНГА-РУС»	430±20	200	Не менее 150	20,0	10,0
Бинт медицинский эластичный высокой растяжимости «ЭЛАСМА-ВР»	480±40	170	Не менее 150	20,0	10,0
Бинт медицинский эластичный средней растяжимости «ЭЛАСМА-СР»	360±20	170	Не менее 100, но не более 150	20,0	10,0

Основные материалы изготовления: хлопок, полиэфир, латекс, лайкра.

Бинты укомплектованы застежкой «велкро» / клипсами для фиксации бинта на теле пациента.

Рекомендованная длина бинтов для наложения повязок.

На суставы рук и ног	Ширина - 5 - 8 см, длина 0,6-2,5 м	Рис.2
На всю руку	Ширина - 8 - 10 см, длина 3-4 м	Рис.3
На ногу, от основания пальцев до колена	Ширина - 8 - 12 см, длина 3-4 м	Рис.4
На ногу, от основания пальцев до паха	Ширина - 8 - 15 см, длина 4-5 м	Рис.5
На туловище, торс, грудную клетку	Ширина - 8 - 20 см, длина 5 - 7 м	Рис.6

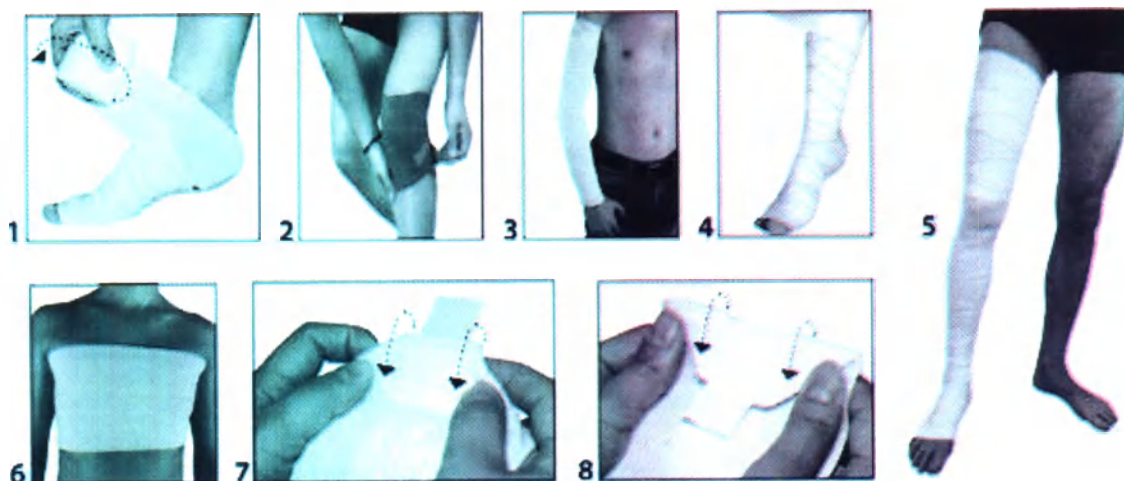

Порядок применения бинтов.

1. Перед использованием проконсультироваться с врачом
2. Подобрать бинт необходимого исполнения и размера. Проверить срок годности бинта
3. Размеры бинта выбирать в соответствии с таблицей. Рекомендованная длина бинтов для наложения компрессионных повязок.
4. Накладывать бинт на конечность согласно общепринятому методу или в соответствии с рекомендациями врача, или в соответствии с рекомендациями, указанными на этикетке изделия.

Рекомендации по уходу за изделием.

Бинты необходимо стирать вручную в мыльном растворе, из хозяйственного мыла, при температуре (40±2)°C. После стирки выполоскать в теплой воде, аккуратно отжать, в полотенце, без выкручивания. Сушить в расправленном виде на вертикальной или горизонтальной поверхности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать синтетические моющие средства, отбеливать, подвергать химической чистке, гладить или подвергать другой высокотемпературной обработке.

Бинты выдерживают не менее 5 стирок.

Упаковка. Каждое готовое изделие должно иметь индивидуальную упаковку из пленочных материалов. Бинты в индивидуальной упаковке комплектуются в групповую упаковку - картонные коробки, в количестве от 10 до 100 штук. Групповая упаковка выполняет роль транспортной упаковки, и предназначена для хранения и транспортирования готовой продукции.

Условия применения. Бинты изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре до 42°C и относительной влажности до 80%.

Хранение. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в условиях хранения по группе 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Транспортировка.

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-800 и правилами перевозки грузов, действующими для соответствующего вида транспорта.

Условия транспортирования изделий по группе 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Утилизация. Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684-21. Изделия соответствуют классу медицинских отходов А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО).

Гарантия изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие бинтов техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящей инструкции.

Гарантийный срок годности бинтов – 5 лет с даты изготовления.

Стандарты соответствия. ГОСТ Р 58236-2020, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020.

Редакция документа 4.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено 4 листов

Генеральный директор
Генеральный директор
Наталуха С.В.
« » 2023 г.

