

«УТВЕРЖДАЮ»



2011

Инструкция по эксплуатации

МОЛОКОСБОРНИК

Описание

Молокосборник представляет собой сосуд, состоящих из двух, соединяющихся полусфер, снабженный отверстием для соска и желобком для слива собранного молока.

Назначение

Молокосборник применяется для защиты воспаленных или чувствительных сосков женской груди, сосков с трещинами; для исправления изменившейся формы сосков, в частности, перед родами.

Молокосборник предназначается для кормящих матерей:

- во время кормления (на свободную грудь);
- между кормлением (на обе груди) для сбора капающего молока (до 20 мл), а также для защиты одежды от пятен.

Область применения: акушерство, в быту.

Меры безопасности

Перед применением детали молокосорборника необходимо продезинфицировать.

Свободно раскройте молокосорборник для мойки. Мойте горячей мыльной водой, тщательно ополосните. Стерилизуйте кипячением в воде или погружением в раствор для стерилизации детских бутылок, следуя указаниям изготовителя.

Указания к применению

При надетом белье скользящими движениями расположить молокосорборник вогнутой стороной отверстием на сосок и ореол, выпускным желобом вверх.

Для переливания молока осторожно убрать молокосорборник от груди и вылить молоко через желоб в стерильный сосуд.

Собранное молоко можно хранить в холодильнике для более позднего кормления ребенка. Примечание: если имеют место проблемы при кормлении грудью, обратитесь к местной акушерке, участковому врачу или к врачу в поликлинике.

Условия хранения

Молокосборник следует хранить при температуре окружающей среды от 5 до 40 °C и относительной влажности не более 80%.

Маркировка

Название изделия, обозначение НТД и дата изготовления указаны на этикетке, входящей в комплект поставки.

Срок годности

Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

Производитель: ООО "Альберт-Киевгума Лтд", 03039, Украина, г.Киев, пр.40-летия Октября,6