

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Назначение

Спринцовка применяется для спринцевания, ирригации (орошения) и отсоса жидкости из полостей организма.

2. Комплект поставки:

- баллон - 1 шт.,
- наконечник кроме номера 0 (для спринцовки Бр, Б исполнений 1,2,3, ИБ, АСП) – 1 шт.

3. Применение

Перед применением баллон спринцовки нужно продезинфицировать путем кипячения в дистиллированной воде в течение (30 ± 5) минут, при этом баллон спринцовки должен быть наполнен водой до уровня, при котором он, находясь в воде, не соприкасается с дном и стенками сосуда, в котором происходит кипячение, или баллон спринцовки и наконечник выдержать в 3% растворе перекиси водорода в течение (80 ± 5) минут с последующим ополаскиванием в проточной воде.

Перед применением спринцовки наконечник смазывают нейтральным жиром (вазелином, ланолином).

Спринцовка должна контактировать с лекарственными растворами не более 30 минут.

После применения спринцовку промывают горячей водой для удаления лекарственного раствора и просушивают.

4. Условия хранения

Хранение спринцовки должно осуществляться в помещении при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Спринцовки после транспортировки при минусовых температурах необходимо выдержать в упаковке на протяжении суток в нормальных климатических условиях. Не допускать воздействия на спринцовку кислот, щелочи, растворителей и других веществ, разрушающих изделия.

Изготовитель гарантирует качество спринцовок при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения спринцовки 4 года со дня изготовления, гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня получения потребителем.

Рег. уд. МЗ РФ № 2003/1262

Серт. соотв. № РОСС.УА.ИМ15.В01185

Спринцовка соответствует требованиям ТУ У 25.2 - 25274980.002-2002



Дата изготовления:

Адрес предприятия-изготовителя: Украина, 03039 г. Киев, пр-т 40-летия Октября, 6
ООО "Альберт-Киевгума Лтд" тел./факс +38 (044) 525-76-61; 455-98-53



James