

Інструкція по експлуатації

МОЛОКООТСОС

Описание

Молокоотсос представляют собой изделие, состоящее из двух частей - баллона, создающего вакуум и резервуара для сбора молока.

Назначение

Молокоотсос служит для удаления избытка молока из груди кормящей женщины - это способствует правильной лактации.

Область применения: акушерство, в быту.

Меры безопасности

Молокоотсос может применяться только *индивидуально*.

Перед первым применением разберите молокоотсос - отсоедините баллон от пластмассового резервуара и продезинфицируйте обе части.

Баллон и резервуар молокоотсоса дезинфицируют погружением в 3% раствор перекиси водорода в течении 360+/-5мин при температуре не менее 18°C или погружением в раствор для стерилизации детских бутылок, следуя указаниям изготовителя. После дезинфекции изделие необходимо тщательно промыть в проточной воде до полного удаления запаха дезинфицирующего средства. Ершование баллона не допускается.

После каждого последующего применения разбирайте молокоотсос, промывайте его тщательно теплой водой и просушивайте внутреннюю сторону молокоотсоса. Храните в сухом виде в предварительно прокипяченном и закрытом контейнере.

Указание по применению: сожмите баллон, поместите коническую воронкообразную часть резервуара (со сферической емкостью для сбора молока) на ореол соска, отпустите баллон для создания всасывающей силы. При отсасывании молоко будет собираться в емкости.

Примечание! Грудного ребенка нельзя кормить молоком, которое контактировало непосредственно с баллоном.

Условия хранения

Молокоотсосы хранят в помещении при температуре от 5 °C до плюс 25 °C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Молокоотсосы после транспортирования при отрицательных температурах следует выдержать в упаковке в течение суток в нормальных климатических условиях. Не допускать воздействия на молокоотсосы кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих изделия.

Срок годности

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Производитель: ООО "Альберт-Киевгума Лтд", 03039, Украина, г.Киев, пр.40-летия Октября,6

