

8.2. Предельный срок хранения без переконсервации – 3 года.

8.3. Дата проведения консервации изделия указана в свидетельстве о приемке.

8.4. Изделие обернуто влагонепроницаемым материалом.

8.5. Изделие в упаковке должно транспортироваться в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах).

9. Гарантийные обязательства

9.1. При соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации, изложенных в паспорте, предприятие гарантирует безотказную работу изделия на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи товара покупателю. В случае невозможности определения момента передачи, гарантийный срок устанавливается в пределах 18 месяцев с момента выпуска изделия.

10. Утилизация

10.1. Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

10.2. Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» и в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

10.3. Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

11. Свидетельство о приемке

Кушетка смотровая «Волгоградская» КСВ-01С серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.

Соответствует техническим условиям ТУ 9452 – 004 – 13726632 – 2014 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

12. Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска _____ № _____

Приобретено _____

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Мебель медицинская ТУ 9452 – 004 – 13726632 – 2014

Кушетка смотровая «Волгоградская»
КСВ-01С

Паспорт
КСВ-01С.00.000 ПС



г. Волгоград

Назначение изделия

Кушетка медицинская смотровая КСВ-01С (с головной секцией) предназначена для осмотра больных в смотровых, процедурных и других кабинетах.

Нормальные условия эксплуатации: температура от +10°C до +35°C и относительная влажность до 80% при температуре +25°C.

1. Технические характеристики

1.1. Габаритные размер:	Размер подголовника:	Размер ложа:
Длина – 1945 мм;	Длина – 440 мм;	Длина – 1500 мм;
Высота – 565 мм;	Ширина – 600 мм.	Ширина – 600 мм.
Ширина – 600 мм.		

1.1.1. Масса не более 23 кг.

1.2. Характеристики:

1.2.1. Каркас изготовлен из стальных труб квадратного сечения 25×25 мм.

1.2.2. Равномерно распределенная нагрузка не более 200 кг.

1.2.3. Лежак кушетки состоит из двух секций – подголовника и ложа. Подголовник и ложе изготовлены из ДСП 16 мм, обтянуты поролоном (толщина поролона 10 мм) и винилискожей. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0° до 45°.

1.2.4. Каркас изделия имеет защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам. Наружная поверхность изделия устойчива к средствам дезинфекционной обработки химическим методом, согласно МУ-287-113.

1.2.5. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

1.2.6. Изделие при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

1.2.7. Средний срок службы изделия до списания не менее 5 лет. За критерий предельного состояния кушеток принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

2. Комплектация

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перемычка	2
2	Опора	2
3	Стяжка	1
4	Ложе	1
5	Подголовник	1
6	Подъемный механизм «Растомат»	1
7	Крепёжные элементы	1 комплект
		1

3. Устройство и принципы работы

3.1. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию (рис. 1).

3.2. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости ступенчато изменяется от 0° до 45°, с помощью механизма «Растомат».

4. Меры безопасности

4.1. К сборке и эксплуатации изделия допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

5. Подготовка к сборке

5.1. Распакуйте изделие, проверьте его комплектность, а также сохранность после транспортировки. Поверхности, смазанные консервационной смазкой, протрите хлопчатобумажными салфетками, смоченными бензином или растворителем по ГОСТ 3134 или ГОСТ 443, затем протрите сухими салфетками до полного удаления консервационной смазки.

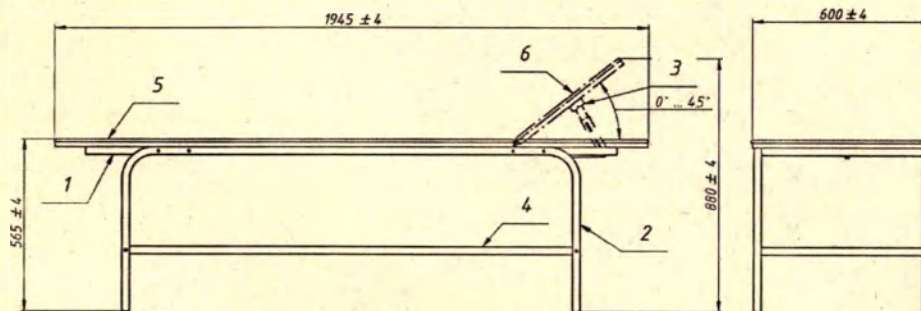


Рисунок 1

1. Стяжка. 2. Опора. 3. Подъемный механизм «Растомат». 4. Перемычка. 5. Ложе 6. Подголовник.

6. Порядок сборки

6.1. Прикрутить опоры поз. 2 к перемычкам поз. 1. при помощи болтов М8 и гаек.

6.2. Установить стяжку между опорами и закрепить винтами М10.

6.3. Закрепить ложе с подголовником к каркасу изделия саморезами 3,5*40.

6.4. Закрепить подъемный механизм «Растомат» и установить нужное положение подголовника.

7. Техническое обслуживание

7.1. Изделие имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

7.2. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений.

7.3. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

8. Правила хранения, консервации, упаковки и транспортирования

8.1. Изделие, упакованное в транспортную тару, может храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от +40°C до минус 50°C и относительной влажности не более 98% при температуре +25°C. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

АО «СКБ СО и Э»



Мебель медицинская ТУ 9452 – 004 – 13726632 – 2014:
Кушетка смотровая «Волгоградская»
КСВ-01С

Руководство по эксплуатации
КСВ-01С.00.000 РЭ

Версия 1.0
2023

Оглавление

1. Введение.....	3
2. Наименование медицинского изделия.....	3
3. Назначение	3
4. Комплектность поставки.....	3
5. Основные технические характеристики	4
6. Маркировка	4
7. Упаковка.....	6
8. Устройство и сборка.....	7
9. Меры предосторожности (противопоказания) при применении медицинского изделия.....	8
10. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).....	8
11. Условия хранения.....	8
12. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия.....	8
13. Техническое обслуживание	8
14. Порядок осуществления утилизации.....	9
15. Гарантии изготовителя.....	9
16. Свидетельство о приемке.....	9
17. Свидетельство об упаковывании	10
18. Свидетельство о консервации	10
19. Сведения о рекламациях	10
20. Сведения о производителе (изготовителе).....	11
Приложение 1.....	12

1. Введение

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации является совмещенным документом с техническим описанием и паспортом.

1.2. Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с медицинским изделием «Мебель медицинская ТУ 9452-004-13726632-2014: Кушетка смотровая «Волгоградская» КСВ-01С» и устанавливает правила его эксплуатации (использования, технического обслуживания, транспортирования и хранения).

2. Наименование медицинского изделия

Мебель медицинская ТУ 9452-004-13726632-2014: Кушетка смотровая «Волгоградская» КСВ-01С (далее по тексту – медицинское изделие, изделие, мебель, кушетка).

3. Назначение

Кушетка смотровая «Волгоградская» КСВ-01С (с головной секцией) предназначена для осмотра больных в смотровых, процедурных и других кабинетах.

Показания к применению: использование с целью создания мест для осмотра больных.

4. Комплектность поставки

п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Перемычка	2
2	Опора	2
3	Стяжка	1
4	Ложе	1
5	Подголовник	1
6	Подъемный механизм «Растомат»	1
7	Крепёжные элементы	1 комплект
Эксплуатационная документация		
6	Руководство по эксплуатации	1
7	Паспорт	1

5. Основные технические характеристики

5.1. Каркас изготовлен из стальных труб квадратного сечения 25×25 мм.

5.2. Равномерно распределенная нагрузка не более 200 кг.

5.3. Лежак кушетки состоит из двух секций – подголовника и ложа. Подголовник и ложе изготовлены из ДСП 16 мм, обтянуты поролоном (толщина поролона 10 мм) и винилискожей. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 ° до 45°.

5.4. Каркас изделия имеет защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам. Наружная поверхность изделия устойчива к средствам дезинфекционной обработки химическим методом, согласно МУ-287-113.

5.5. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

5.6. Основные параметры и размеры

5.6.1. Габаритные размеры:	Размер подголовника:	Размер ложа:
Длина – 1945 мм	Длина – 440 мм	Длина – 1500 мм
Высота – 565 мм	Ширина – 600 мм	Ширина – 600 мм

5.6.2. Масса изделия: 23 ±2,3 кг

6. Маркировка

Маркировка по ГОСТ 16371. Маркировка должна быть выполнена типографским, литографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно прикрепленном к изделию мебели.

Не допускается нанесения маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и т.п. деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены.

6.1. На каждом предмете мебели должна быть прикреплена табличка, по ГОСТ 50444, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение настоящих технических условий;
- обозначение типа мебели;
- порядковый номер типа изделия;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем;
- год выпуска изделия (или две последние цифры);

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

- знак соответствия ГОСТ Р 50460 (при наличии сертификата соответствия).

6.2. На каждом предмете мебели, поставляемом для экспорта, должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 50444, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение экспортера и товарный знак экспортера;
- обозначение типа мебели;
- порядковый номер типа изделия;
- надпись «Сделано в России»;
- обозначение настоящих технических условий;
- год выпуска стола (или две последние цифры);
- знак соответствия по ГОСТ Р 50460 (при наличии сертификата соответствия).

Примечание – обозначение экспортера и его товарный знак не указывают, если поставку производят через другие внешнеторговые организации.

6.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 16371.

На транспортную тару должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: "Хрупкое - осторожно!", "Верх", "Беречь от влаги", а на ящик для изделий, поставляемых для экспорта в страны с тропическим климатом, также знак "Тропическая упаковка".

Транспортная маркировка должна наноситься по трафарету, или штемпелеванием черной водостойкой краской; знак "Тропическая упаковка" выполняют красной краской.

В случае изготовления упаковки из гофрированного картона, на нем должна быть наклеена этикетка, выполненная печатным способом. На этикетке должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- условия хранения; - гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем;
- год выпуска изделия (или две последние цифры);
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- обозначение настоящих технических условий.

Примечание – допускается указанную маркировку наносить печатным способом непосредственно на ящике.

7. Упаковка

7.1. Упаковка - по ГОСТ 16371, ГОСТ Р 50444.

7.2. Перед упаковыванием металлические поверхности мебели были обезжирены и законсервированы по ГОСТ 9.014 для условий хранения Ж:

- ВЗ-1; ВУ-1 - для внутреннего рынка;
- ВЗ-1; ВУ-5 - для экспорта в страны с умеренным климатом.

7.3. Эксплуатационная документация завернута в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Документация для мебели (кроме эксплуатационной), поставляемой на экспорт, упакована в герметично запаянный пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, и помещена внутри упаковки.

7.4. Мебель упакована в разовую или многооборотную тару обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений с применением внутренней упаковки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и (или) бумаги упаковочной по ГОСТ 515.

В случае применения древесины при изготовлении упаковки, её влажность не превышает 22%.


По согласованию с потребителем, допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании.

Для транспортирования в контейнерах допускается упаковывать один или два комплекта мебели в обрешетку по ГОСТ 12082 или в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

7.5. В каждый ящик вложен упаковочный лист по ГОСТ Р 50444.

8. Устройство и сборка

8.1. Устройство изделия представлено на рисунке 1

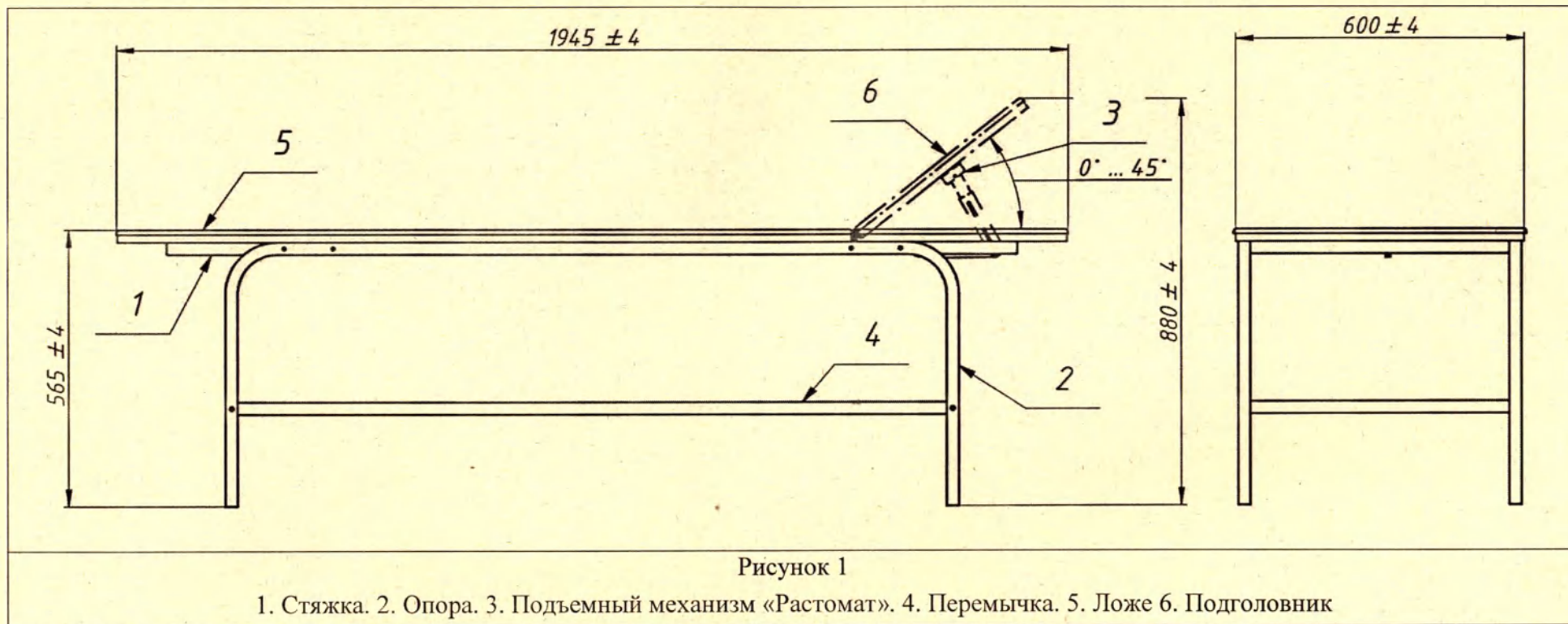

8.2. Сборка

8.2.1. Прикрутить опоры поз. 2 к перемычке поз 1. при помощи болтов М8, и гаек.

8.2.2. Установить стяжку между опорами и закрепить винтами М10.

8.2.3. Закрепить ложе с подголовником к каркасу изделия саморезами 3,5*40.

8.2.4. Закрепить подъемный механизм «Растомат» и установить нужное положение подголовника.

9. Меры предосторожности (противопоказания) при применении медицинского изделия

9.1. Недопустимо использовать изделие при наличии аллергической реакции на материал корпуса мебели.

9.2. К сборке и эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящее руководство по эксплуатации, описание и конструкцию медицинского изделия.

9.3. Не использовать не по назначению.

10. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности)

10.1. Средний срок службы до списания мебели не менее 5 лет. Предельное состояние - состояние, при котором восстановление работоспособности невозможно или экономически нецелесообразно.

11. Условия хранения

11.1. Изделие, упакованное в транспортную тару, может храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от +40°C до минус 50°C и относительной влажности не более 98% при температуре +25°C.

11.2. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

12. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия

12.1. Медицинское изделие соответствует условиям эксплуатации группы УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

13. Техническое обслуживание

13.1. Изделие имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

13.2. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений.

13.3. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их.

14. Порядок осуществления утилизации

14.1. Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

14.2. Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

14.3. Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

15. Гарантии изготовителя

15.1. При соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации, изложенных в паспорте, предприятие гарантирует безотказную работу изделия на протяжении гарантийного срока.

15.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи товара покупателю. В случае невозможности определения момента передачи, гарантийный срок устанавливается в пределах 18 месяцев с момента выпуска изделия.

16. Свидетельство о приемке

Мебель медицинская ТУ 9452-004-13726632-2014: Кушетка смотровая
«Волгоградская» КСВ-01С

Серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-004-13726632-2014 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

17. Свидетельство об упаковке

Мебель медицинская ТУ 9452-004-13726632-2014: Кушетка смотровая
«Волгоградская» КСВ-01С,

Серийный номер _____,

Упакована АО «СКБ СО и Э» согласно требованиям ТУ 9452-004-13726632-2014.

Дата упаковки _____

Подпись лиц, ответственных за упаковку.

18. Свидетельство о консервации

Мебель медицинская ТУ 9452-004-13726632-2014: Кушетка смотровая
«Волгоградская» КСВ-01С,

Серийный номер _____, подвергнута

_____ (наименование предприятия, производившего консервацию)

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию произвел:

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Изделие после консервации принял:

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

19. Сведения о рекламациях

19.1 Рекламации в установленном порядке направлять предприятию-изготовителю АО
«СКБ СО и Э» по адресу: г. Волгоград, революционная 57 а оф. 12

Контакты: Тел./Факс: +7(8442)41-99-06, E-mail: info@vzmo.su

Сайт: <https://vzmo.su/>

20. Сведения о производителе (изготовителе)

Производитель:

АО «СКБ СО и Э», адрес регистрации г. Волгоград, революционная 57 а оф. 12

Адреса мест производства:

1. г. Волгоград электролесовская 70 а

2. г. Волгоград электролесовская 70 б

3. г. Волгоград электролесовская 70 л

Контакты: Тел./Факс: +7(8442)41-99-06, E-mail: info@vzmo.su

Сайт: <https://vzmo.su/>

Гарантийный талон
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска _____ № _____

Приобретено _____

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

12 листов

Генеральный директор _____ /Н.В. Шабанов/

