

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Канюли с портом и без порта предназначены для установки в периферические вены пациента и длительного (до 3 суток) внутривенного введения растворов лекарственных препаратов.

Канюли с портом и без порта предназначены для применения в хирургии, интенсивной терапии, реанимации.

Канюли предназначены для:

- переливания внутривенных растворов;
- прерывистого внутривенного введения лекарственных растворов;
- поддержания гидратации и/или использования дегидратации, если пациент не способен принимать достаточный объем жидкости через рот

Область применения:

- Предназначены для длительного введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента
- Могут находиться в вене до 3-х суток

наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене

Отличительные характеристики

- имеют рентгеноконтрастную полосу с прозрачной канюлей для обеспечения эффективного контроля его расположения в вене;
- минимальное расстояние от конца канюли до скоса иглы и уменьшение толщины стенки канюли к дистальному концу облегчает пункцию вены;

- канюля плотно облегает иглу и минимально травмирует ткани при введении в вену;
 - прозрачная камера возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене;
 - дополнительный порт для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии;
 - тефлоновое покрытие канюли снижает вероятность возникновения тромбофлебита
 - клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента.
- Канюли с портом и без порта имеют индивидуальную блистерную упаковку, которая дополнительно упакована либо в промежуточную коробку, либо пакет, а затем транспортную коробку.

Канюли с портом и без порта хранить в прохладном и сухом месте. Беречь от воздействия высокой температуры и прямого света. Изделие должно быть использовано немедленно после вскрытия упаковки. Срок стерильности 5 лет.

Технические характеристики

Канюли с портом и без порта обладают хорошими функциональными характеристиками.

- Стерильно, для однократного применения;
- мягкий атравматический наконечник, стойкий к образованию крючков, трещин и заусенцев;
- игла изготовлена из прочной хирургической стали;
- канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN/ISO;
- внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой имеет двойную заточку, что сводит к минимуму боль при введении;

- срок стерильности 5 лет;
- апиrogenны;
- нетоксичны;
- стерилизованы окисью этилена.

Методы работы

- тщательно выбрать и асептически подготовить участок для протокола;
- выбрать подходящий размер внутривенной канюли с портом и без порта и визуально убедиться, что пакет не поврежден;
- извлечь канюлю с портом и без порта из стерильной индивидуальной блистерной упаковки и снять колпачок с иглы;
- держать канюлю с портом и без порта за крышку порта для инъекций и его проекции на втулку;
- сделать укол в вену и проверить на обратный поток в камеру обратного потока;

Никогда не пробуйте повторно вставить частично или полностью убрannую иглу!

- убрать иглу полностью, нажимая вену около участка прокола и выбросить иглу в подходящий контейнер;
- соединить с линией устройства для внутривенного переливания;
- закрыть участок прокола стерильной повязкой;
- выполнять наблюдение и уход за участком прокола согласно медицинским нормам.

Никогда не пробуйте повторно вставить частично или полностью убрannую иглу!

Убрать иглу полностью, нажимая вену около участка прокола и выбросить иглу в подходящий контейнер;

Соединить с линией устройства для внутривенного переливания;

Закрыть участок прокола стерильной повязкой;

Выполнять наблюдение и уход за участком прокола согласно медицинским нормам.

