

Cross Diamond Tools Co., Ltd.


109/87 Moo 2, Taparak Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10540, Thailand.
Tel : 66-2-6352126, Fax : 66-2-2377541 Email : info.crosstech@gmail.com www.crosstechbur.com

Date / Дата: 26.08.2016

Sales and Marketing Director of Crosstech Diamond Tools Co., Ltd /

Директор по продажам и маркетингу компании «Кросстех Даймонд Тулз Ко., Лтд.»

Mr. Alan Lam / г-н Алан Лам

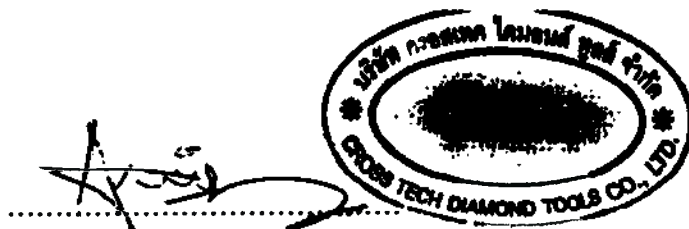A handwritten signature in black ink is written over a dotted line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp has a double border. The outer border contains the text 'CROSSTECH DIAMOND TOOLS CO., LTD.' in English and Thai. The inner circle contains a dark, textured area.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

MEDICAL PRODUCT INSTRUCTION

**Боры стоматологические твердосплавные нестерильные многоразового
использования в исполнениях, с принадлежностями**

Dental carbide non-sterile reusable burs with accessories

2016

Боры стоматологические твердосплавные нестерильные многоразового использования в исполнениях, с принадлежностями:

I. Боры стоматологические твердосплавные нестерильные многоразового использования в исполнениях:

1. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования, с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 0,5 мм, код 500-314-001-215-005 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.
2. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования, с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 0,5 мм, код 500-316-001-215-005 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.
3. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования, с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 0,7 мм, код 500-314-001-215-007. — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.
4. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 0,7 мм, код 500-316-001-215-007 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.
5. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 0,8 мм, код 500-314-001-215-008 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.
6. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 0,8 мм, код 500-316-001-215-008 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 0,8 мм, код 500-204-001-215-008 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

8. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RAOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 0,8 мм, код 500-205-001-215-008 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

9. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1 мм, код 500-314-001-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

10. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1 мм, код 500-316-001-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

11. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1 мм, код 500-204-001-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

12. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RAOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1 мм, код 500-205-001-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

13. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа HP, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1 мм, код 500-104-001-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

14. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,4 мм, код 500-314-001-215-014 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

15. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма

001-215-014 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

16. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,4 мм, код 500-204-001-215-014 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

17. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RAOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,4 мм, код 500-205-001-215-014 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

18. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа HP, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,4 мм, код 500-104-001-215-014 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

19. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,8 мм, код 500-314-001-215-018 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

20. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,8 мм, код 500-316-001-215-018 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

21. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,8 мм, код 500-204-001-215-018 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

22. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RAOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,8 мм, код 500-205-001-215-018 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

23. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа HP, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,8 мм, код 500-104-001-215-018 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 2,3 мм, код 500-314-001-215-023 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

25. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 2,3 мм, код 500-316-001-215-023 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

26. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 2,3 мм, код 500-204-001-215-023 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

27. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RAOS, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 2,3 мм, код 500-205-001-215-023 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

28. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа HP, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 2,3 мм, код 500-104-001-215-023 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

29. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части обратноконусная, диаметр рабочей части 0,8 мм, длина головки 0,9 мм, код 500-314-010-215-008 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

30. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части обратноконусная, диаметр рабочей части 0,8 мм, длина головки 0,9 мм, код 500-204-010-215-008 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

31. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части обратноконусная, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 1,1 мм, код 500-314-010-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части обратноконусная, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 1,1 мм, код 500-204-010-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

33. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части обратноконусная, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 1,2 мм, код 500-314-010-215-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

34. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части обратноконусная, диаметр рабочей части 1,4 мм, длина головки 1,4 мм, код 500-314-010-215-014 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

35. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание боковое и концевое, диаметр рабочей части 0,9 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-107-215-009 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

36. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части цилиндрическая, резание боковое и концевое, диаметр рабочей части 0,9 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-204-107-215-009 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

37. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание боковое и концевое, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-107-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

38. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части цилиндрическая, резание боковое и концевое, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-204-107-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, диаметр рабочей части 0,9 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-107-214-009 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

40. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, диаметр рабочей части 0,9 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-316-107-214-009 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

41. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-107-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

42. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-316-107-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

43. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа HP, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-104-107-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

44. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-107-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

45. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-316-107-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа НР, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-104-107-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

47. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, полусферический конец, диаметр рабочей части 0,9 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-314-137-215-009 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

48. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, полусферический конец, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-314-137-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

49. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, полусферический конец, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-314-137-215-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

50. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части цилиндрическая, полусферический конец, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-316-137-215-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

51. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, полусферический конец, диаметр рабочей части 0,9 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-314-137-214-009 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

52. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, полусферический конец, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-314-137-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, полусферический конец, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-316-137-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

54. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, полусферический конец, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-314-137-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

55. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части цилиндрическая, резание поперечное, полусферический конец, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-316-137-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

56. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 0,9 мм, длина головки 3,2 мм, код 500-314-168-215-009 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

57. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-314-168-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

58. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-314-168-215-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

59. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 3,7 мм, код 500-316-168-215-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 6 мм, код 500-314-169-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

61. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 6 мм, код 500-314-169-215-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

62. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 0,9 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-168-214-009 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

63. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-168-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

64. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-316-168-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

65. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-204-168-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

66. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-168-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-316-168-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

68. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-204-168-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

69. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа HP, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-104-168-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

70. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,6 мм, длина головки 4,4 мм, код 500-314-168-214-016 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

71. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,6 мм, длина головки 4,4 мм, код 500-316-168-214-016 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

72. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа RA, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,6 мм, длина головки 4,4 мм, код 500-204-168-214-016 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

73. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа HP, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,6 мм, длина головки 4,4 мм, код 500-104-168-214-016 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 6 мм, код 500-314-169-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

75. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 6 мм, код 500-314-169-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

76. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа HP, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 6 мм, код 500-104-169-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

77. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,6 мм, длина головки 6 мм, код 500-314-169-214-016 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

78. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FGOS, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,6 мм, длина головки 6 мм, код 500-316-169-214-016 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

79. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа HP, форма рабочей части конусная (усеченная конусная), диаметр рабочей части 1,6 мм, длина головки 6 мм, код 500-104-169-214-016 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

80. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, длинная, стрелчатый конец, диаметр рабочей части 0,8 мм, длина головки 2,7 мм, код 500-314-234-215-008 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

81. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, длинная, диаметр рабочей части 0,8 мм, длина головки 1,6 мм, код 500-314-234-215-008 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

82. Бор стоматологический универсальный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, длинная, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 1,7 мм, код 500-314-234-215-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

83. Бор стоматологический финишный твердосплавный нестерильный двенадцатигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,4 мм, код 500-314-001-042-014 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

84. Бор стоматологический финишный твердосплавный нестерильный двенадцатигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,8 мм, код 500-314-001-042-018 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

85. Бор стоматологический финишный твердосплавный нестерильный двенадцатигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 2,3 мм, код 500-314-001-042-023 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

86. Бор стоматологический финишный твердосплавный нестерильный двенадцатигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная, куполообразный (полусферический) конец, диаметр рабочей части 2,3 мм, длина головки 8 мм, код 500-314-198-042-014 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

87. Бор стоматологический финишный твердосплавный нестерильный двенадцатигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части «яйцо», диаметр рабочей части 1,4 мм, длина головки 2,8 мм, код 500-314-277-042-014 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

88. Бор стоматологический финишный твердосплавный нестерильный двенадцатигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части «яйцо», диаметр рабочей части 1,8 мм, длина головки 3,4 мм, код 500-314-277-042-018 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

двенадцатигранный многоцветного использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части «яйцо», диаметр рабочей части 2,3 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-277-042-023 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

90. Бор стоматологический финишный твердосплавный нестерильный двенадцатигранный многоцветного использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная, диаметр рабочей части 0,9 мм, длина головки 3,6 мм, код 500-314-247-071-009 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

91. Бор стоматологический финишный твердосплавный нестерильный двенадцатигранный многоцветного использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная, диаметр рабочей части 1,1 мм, длина головки 3,6 мм, код 500-314-247-071-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

92. Бор стоматологический финишный твердосплавный нестерильный двенадцатигранный многоцветного использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 3,6 мм, код 500-314-247-071-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

93. Бор стоматологический полировочный твердосплавный нестерильный тридцатигранный многоцветного использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,4 мм, код 500-314-001-032-014 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

94. Бор стоматологический полировочный твердосплавный нестерильный тридцатигранный многоцветного использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 1,8 мм, код 500-314-001-032-018 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

95. Бор стоматологический полировочный твердосплавный нестерильный тридцатигранный многоцветного использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части сферическая (круглая), диаметр рабочей части 2,3 мм, код 500-314-001-032-023 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

96. Бор стоматологический полировочный твердосплавный нестерильный тридцатигранный многоцветного использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части «яйцо», диаметр рабочей части 1,8 мм, длина головки 3,4 мм, код 500-314-277-032-018 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части конусная, куполообразный конец, только боковое резание, диаметр рабочей части 1,6 мм, длина головки 9 мм, код 500-314-220-215-016 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

98. Бор стоматологический для удаления металла и коронок твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, длинная, диаметр рабочей части 0,8 мм, длина головки 1,6 мм, код 500-314-234-214-008 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

99. Бор стоматологический для удаления металла и коронок укороченный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, длинная, диаметр рабочей части 0,8 мм, длина головки 1,6 мм, код 500-313-234-214-008 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

100. Бор стоматологический для удаления металла и коронок твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание боковое и концевое, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-107-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

101. Бор стоматологический для удаления металла и коронок укороченный твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание боковое и концевое, диаметр рабочей части 1 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-313-107-214-010 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

102. Бор стоматологический для удаления металла и коронок твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, резание боковое и концевое, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-107-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

103. Бор стоматологический для удаления металла и коронок твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, полусферический конец, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-314-137-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

твердосплавный нестерильный шестигранный многоразового использования с хвостовиком типа FG, форма рабочей части цилиндрическая, полусферический конец, диаметр рабочей части 1,2 мм, длина головки 4,2 мм, код 500-313-137-214-012 — в отдельных упаковках по 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 шт.

II. Принадлежности:

1. Подставка под стоматологические боры Bur Block.

2. Область применения медицинского изделия

Твердосплавные боры применяются в стоматологии для препарирования полостей и коронок, при процедурах терапевтической стоматологии, а также при работе с пломбировочным материалом.

3. Показания к применению

- Препарирование полостей и коронок
- Процедуры терапевтической стоматологии
- Финишная обработка пломбировочного материала

4. Противопоказания

Боры противопоказано использовать при нарушениях подвижности челюсти, вызванных болезнями височно-нижнечелюстного сустава.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

бора, соответствующий планируемой стоматологической процедуре.

- Перед применением убедитесь, что все наконечники находятся в хорошем рабочем состоянии
- Убедитесь, что хвостовик бора полностью вставлен и адекватно соединен с наконечником
- Убедитесь, что вы используете достаточный запас воды для того, чтобы предотвратить повреждение структуры зуба или ткани. Для достижения этой цели, Crosstech рекомендует использовать высокоскоростные наконечники, которые распыляют охлаждающую жидкость по всей длине режущей поверхности инструмента. Минимальная подача охлаждающей жидкости 50 мл / мин. Следует отметить, что боры длиной свыше 21 мм и головкой, превышающей 2 мм в диаметре, требуют дополнительного охлаждения.
- Не используйте затупленные, поврежденные, изогнутые или неконцентрические инструменты из карбида.
- Во избежание неправильной идентификации храните боры в оригинальной упаковке.
- Медицинские работники и пациенты должны соблюдать необходимые требования гигиены во время процедур. Медицинским работникам следует применять перчатки.

6. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

При использовании медицинского изделия по назначению побочных действий не выявлено.

7. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Стоматологический бор является важнейшей частью бормашины и представляет собой специально сконструированный инструмент,

образом, не предусмотрено использование бора отдельно от бормашины, и в любом случае бор взаимодействует с бормашиной.

**имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями,
беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей,
взрослых, имеющих хронические заболевания**

Возможность применения медицинского изделия для данных категорий пациентов определяется врачом-стоматологом.

9. Срок хранения и срок службы

Срок хранения медицинского изделия не ограничен.

Ограничение по сроку службы: боры не предназначены для использования более 10 раз.

10. Условия транспортирования и хранения

10.1. Хранение

Срок хранения не ограничен.

Хранить при условиях, установленных для климатического исполнения У2 в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 в месте, защищенном от влаги, во избежание коррозии.

Температура хранения: от -25 °С до +40 °С

Боры необходимо хранить в местах, недоступных для детей.

10.2. Транспортирование

Изделие следует транспортировать всеми видами крытого транспорта без специальных ограничений, отличных от правил транспортирования на каждом виде транспорта.

Изделие транспортируется в транспортной упаковке.

Температура транспортирования: от -25 °С до +40 °С

11. Сведения о производителе медицинского изделия

Кросстех Даймонд Тулз Ко., Лтд., Таиланд

(Crosstech Diamond Tools Co., Ltd., Thailand)

109/87 Moo 2, Тапарак Роуд, Бангсаотонг, Самутпракран 10540, Таиланд

109/87 Moo 2, Taparak Road, Bangsaothong, Samutprakran 10540, Thailand

Место производства медицинского изделия идентично юридическому адресу производителя.

12. Варианты комплектации медицинского изделия

Варианты исполнений боров приведены в таблице 1.

Таблица 1. Варианты исполнений медицинского изделия.

<i>№</i>	<i>Код по ISO 6360-1:2004</i>	<i>Тип бора</i>	<i>Кол-во граней</i>	<i>Тип хвостовика</i>	<i>Форма рабочей части</i>	<i>Диаметр рабочей части, мм</i>	<i>Длина головки мм</i>
1	500-314-001-215-005	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Сферическая (круглая)	0,5	--
2	500-316-001-215-005	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Сферическая (круглая)	0,5	--
3	500-314-001-215-007	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Сферическая (круглая)	0,7	--
4	500-316-001-215-007	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Сферическая (круглая)	0,7	--
5	500-314-001-215-008	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Сферическая (круглая)	0,8	--

6	500-316-001-215-008	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Сферическая (круглая)	0,8	--
7	500-204-001-215-008	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Сферическая (круглая)	0,8	--
8	500-205-001-215-008	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	RAOS	Сферическая (круглая)	0,8	--
9	500-314-001-215-010	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Сферическая (круглая)	1	--
10	500-316-001-215-010	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Сферическая (круглая)	1	--
11	500-204-001-215-010	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Сферическая (круглая)	1	--

12	500-205-001-215-010	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	RAOS	Сферическая (круглая)	1	--
13	500-104-001-215-010	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	HP	Сферическая (круглая)	1	--
14	500-314-001-215-014	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Сферическая (круглая)	1,4	--
15	500-316-001-215-014	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Сферическая (круглая)	1,4	--
16	500-204-001-215-014	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Сферическая (круглая)	1,4	--
17	500-205-001-215-014	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	RAOS	Сферическая (круглая)	1,4	--

18	500-104-001-215-014	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	HP	Сферическая (круглая)	1,4	--
19	500-314-001-215-018	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Сферическая (круглая)	1,8	--
20	500-316-001-215-018	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Сферическая (круглая)	1,8	--
21	500-204-001-215-018	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Сферическая (круглая)	1,8	--
22	500-205-001-215-018	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	RAOS	Сферическая (круглая)	1,8	--
23	500-104-001-215-018	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	HP	Сферическая (круглая)	1,8	--
24	500-314-001-215-	Для препарирования	6	FG	Сферическая (круглая)	2,3	--

	023	полости и коронок					
25	500-316-001-215-023	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Сферическая (круглая)	2,3	--
26	500-204-001-215-023	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Сферическая (круглая)	2,3	--
27	500-205-001-215-023	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	RAOS	Сферическая (круглая)	2,3	--
28	500-104-001-215-023	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	HP	Сферическая (круглая)	2,3	--
29	500-314-010-215-008	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Обратноконусная	0,8	0,9
30	500-204-010-215-008	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Обратноконусная	0,8	0,9

31	500-314-010-215-010	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Обратноконусная	1	1,1
32	500-204-010-215-010	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Обратноконусная	1	1,1
33	500-314-010-215-012	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Обратноконусная	1,2	1,2
34	500-314-010-215-014	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Обратноконусная	1,4	1,4
35	500-314-107-215-009	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Цилиндрическая, резание боковое и концевое	0,9	4,2
36	500-204-107-215-009	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Цилиндрическая, резание боковое и концевое	0,9	4,2
37	500-314-107-215-010	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Цилиндрическая, резание боковое и концевое	1	4,2
38	500-204-107-215-010	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Цилиндрическая, резание боковое и концевое	1	4,2

39	500-314-107-214-009	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Цилиндрическая, резание поперечное	0,9	4,2
40	500-316-107-214-009	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Цилиндрическая, резание поперечное	0,9	4,2
41	500-314-107-214-010	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Цилиндрическая, резание поперечное	1	4,2
42	500-316-107-214-010	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Цилиндрическая, резание поперечное	1	4,2
43	500-104-107-214-010	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	HP	Цилиндрическая, резание поперечное	1	4,2
44	500-314-107-214-012	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Цилиндрическая, резание поперечное	1,2	4,2
45	500-316-107-214-012	Удлиненный для хирургического и эндодонтического	6	FGOS	Цилиндрическая, резание поперечное	1,2	4,2

		доступа					
46	500-104-107-214-012	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	HP	Цилиндрическая, резание поперечное	1,2	4,2
47	500-314-137-215-009	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Цилиндрическая, полусферический конец	0,9	3,7
48	500-314-137-215-010	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Цилиндрическая, полусферический конец	1	3,7
49	500-314-137-215-012	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Цилиндрическая, полусферический конец	1,2	3,7
50	500-316-137-215-012	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Цилиндрическая, полусферический конец	1,2	3,7
51	500-314-137-214-009	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Цилиндрическая, резание поперечное, полусферический конец	0,9	3,7
52	500-314-137-214-010	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Цилиндрическая, резание поперечное,	1	3,7

					полусферический конец		
53	500-316-137-214-010	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Цилиндрическая, резание поперечное, полусферический конец	1	3,7
54	500-314-137-214-012	Для препарирования полости и коронок	6	FG	Цилиндрическая, резание поперечное, полусферический конец	1,2	3,7
55	500-316-137-214-012	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Цилиндрическая, резание поперечное, полусферический конец	1,2	3,7
56	500-314-168-215-009	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	0,9	3,2
57	500-314-168-215-010	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	1	3,7
58	500-314-168-215-012	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	1,2	3,7
59	500-316-168-215-	Удлиненный для хирургического и	6	FGOS	Конусная (усеченная	1,2	3,7

	012	эндодонтического доступа			конусная)		
60	500-314-169-215-010	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	1	6
61	500-314-169-215-012	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	1,2	6
62	500-314-168-214-009	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	0,9	4,2
63	500-314-168-214-010	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	1	4,2
64	500-316-168-214-010	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Конусная (усеченная конусная)	1	4,2
65	500-204-168-214-010	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Конусная (усеченная конусная)	1	4,2
66	500-314-168-214-012	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	1,2	4,2

67	500-316-168-214-012	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Конусная (усеченная конусная)	1,2	4,2
68	500-204-168-214-012	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Конусная (усеченная конусная)	1,2	4,2
69	500-104-168-214-012	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	HP	Конусная (усеченная конусная)	1,2	4,2
70	500-314-168-214-016	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	1,6	4,4
71	500-316-168-214-016	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Конусная (усеченная конусная)	1,6	4,4
72	500-204-168-214-016	Для высокоточного препарирования эмали и дентина	6	RA	Конусная (усеченная конусная)	1,6	4,4
73	500-104-168-214-	Для использования в	6	HP	Конусная (усеченная конусная)	1,6	4,4

	016	зуботехнических лабораториях			конусная)		
74	500-314-169-214-010	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	1,2	6
75	500-314-169-214-012	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	1,2	6
76	500-104-169-214-012	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	HP	Конусная (усеченная конусная)	1,2	6
77	500-314-169-214-016	Для препарирования коронок и мостов	6	FG	Конусная (усеченная конусная)	1,6	6
78	500-316-169-214-016	Удлиненный для хирургического и эндодонтического доступа	6	FGOS	Конусная (усеченная конусная)	1,6	6
79	500-104-169-214-016	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	HP	Конусная (усеченная конусная)	1,6	6
80	500-314-234-215-	Для использования в зуботехнических	6	FG	Обратноконусная, вогнутый конец,	2,7	2,7

	008	лабораториях			закругленная кромка		
81	500-314-234-215-008	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	FG	Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка	0,8	1,6
82	500-314-234-215-010	Для использования в зуботехнических лабораториях	6	FG	Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка	1	1,7
83	500-314-001-042-014	Финишный	12	FG	Сферическая (круглая)	1,4	--
84	500-314-001-042-018	Финишный	12	FG	Сферическая (круглая)	1,8	--
85	500-314-001-042-023	Финишный	12	FG	Сферическая (круглая)	2,3	--
86	500-314-198-042-014	Финишный	12	FG	Конусная, куполообразный (полусферический) конец	2,3	8
87	500-314-277-042-014	Финишный	12	FG	«Яйцо»	1,4	2,8
88	500-314-277-042-018	Финишный	12	FG	«Яйцо»	1,8	3,4

89	500-314-277-042-023	Финишный	12	FG	«Яйцо»	2,3	4,2
90	500-314-247-071-009	Финишный	12	FG	Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная	0,9	3,6
91	500-314-247-071-010	Финишный	12	FG	Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная	1,1	3,6
92	500-314-247-071-012	Финишный	12	FG	Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная	1,2	3,6
93	500-314-001-032-014	Для полирования	30	FG	Сферическая (круглая)	1,4	--
94	500-314-001-032-018	Для полирования	30	FG	Сферическая (круглая)	1,8	--
95	500-314-001-032-023	Для полирования	30	FG	Сферическая (круглая)	2,3	--
96	500-314-277-032-018	Для полирования	30	FG	«Яйцо»	1,8	3,4

97	500-314-220-215-016	Для эндодонтических работ	6	FG	Конусная, куполообразный конец, только боковое резание	1,6	9
98	500-314-234-214-008	Для удаления коронок и мостов	6	FG	Обратноконусная, вогнутый конец	0,8	1,6
99	500-313-234-214-008	Для удаления коронок и мостов	6	FG	Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, длинная	0,8	1,6
100	500-314-107-214-010	Для удаления коронок и мостов	6	FG	Цилиндрическая, резание боковое и концевое	1	4,2
101	500-313-107-214-010	Для удаления коронок и мостов	6	FG	Цилиндрическая, резание боковое и концевое	1	4,2
102	500-314-107-214-012	Для удаления коронок и мостов	6	FG	Цилиндрическая, резание боковое и концевое	1,2	4,2
103	500-314-137-214-012	Для удаления коронок и мостов	6	FG	Цилиндрическая, полусферический конец	1,2	4,2
104	500-313-137-214-012	Для удаления коронок и мостов	6	FG	Цилиндрическая, полусферический конец	1,2	4,2

Боры упакованы в прозрачные пакеты из полиэтилена с застежкой-гриппером по 1, 3, 5, 10, 20 или 100 штук. Фотография упаковки приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Вторичная упаковка боров (на примере 1 бора в упаковке)



Транспортная упаковка

Транспортная упаковка представляет собой параллелепипедообразную коробку из картона с крышкой, соединенной с корпусом шарнирно. Ее фотография приведена на рисунке 2.



Подставка под боры Bur Block

Подставка под боры Bur Block поставляется в параллелепипедообразной коробке из картона с крышкой, соединенной с корпусом шарнирно. Специальной транспортной тары подставка не имеет. Фотография упаковки подставки Bur Block приведена на рисунке 3.



14. Маркировка

Маркировка индивидуальной и вторичной упаковки представляет собой этикетку, наклеиваемую на упаковку, и включает в себя:

- товарный знак производителя
- наименование изделия
- каталожный номер изделия
- предостережение «не использовать более 10 раз»
- дату изготовления изделия
- наименование производителя
- надпись «Сделано в Таиланде»
- наименование уполномоченного представителя производителя

Эскиз маркировки приведен на рисунке 4.



Боры стоматологические твердосплавные
нестерильные многоразового использования.

Артикул: FG1101

Наименование производителя: Crosstech Diamond Tools Co., Ltd.

Сделано в Таиланде.

Не использовать более 10 раз.

Срок хранения не ограничен.

Дата изготовления: **05.02.2015**

Организация, уполномоченная принимать претензии
на территории Российской Федерации:

ООО СП "ХИРАТРЕЙД",
600000, г. Владимир, ул. Гоголя, 20-а
тел. +7 (4922) 42-05-32

Маркировка подставки Bur Block включает в себя надпись "CROSS TECH DENTAL BURS" (стоматологические боры «Кросстех»), нанесенную трафаретным способом непосредственно на подставку Bur Block.

Маркировка упаковки подставки Bur Block представляет собой этикетку, наклеиваемую на упаковку, и включает в себя:

- товарный знак производителя
- наименование изделия
- каталожный номер изделия
- дату изготовления изделия
- наименование производителя
- надпись «Сделано в Таиланде»
- наименование уполномоченного представителя производителя

15. Технические характеристики

Стоматологический бор – это тип сверла, используемый в наконечнике бормашины. Твердосплавные стоматологические боры состоят из хвостовика из нержавеющей стали (часть, охватываемая наконечником) и твердосплавной головки (часть, которая вводится в зуб).

Имеют различные формы, размеры и количество граней.

Компоненты твердосплавного стоматологического бора проиллюстрированы на рисунке 4а.

Рис. 4а. Твердосплавный стоматологический бор

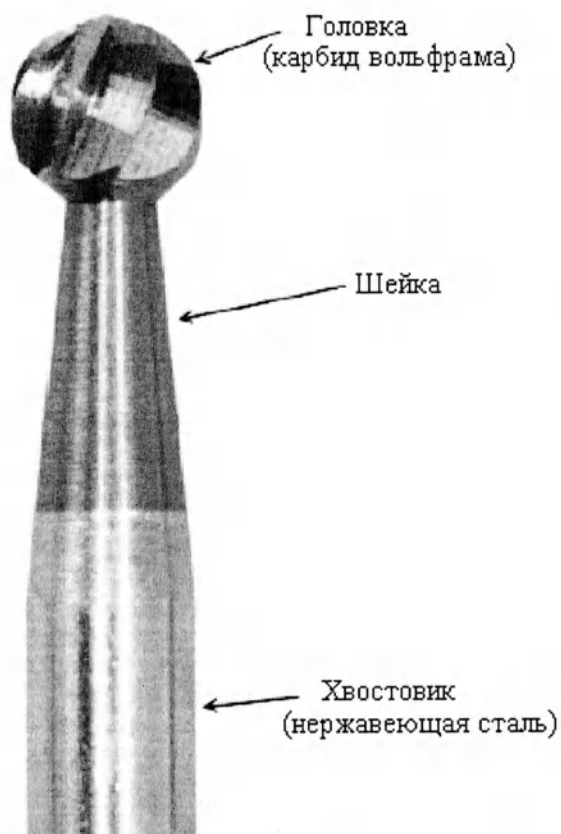


Рис. 4б. Наконечник для бормашины



Наконечник для бормашины, представленный на рисунке 1б, не входит в комплект поставки. Его изображение приведено в иллюстративных целях.

15.1. Типы хвостовиков

1. Хвостовик типа FG (под турбинный наконечник)

Для высокоскоростных наконечников и низкоскоростных наконечников с поворотной головкой.

Наименьший диаметр хвостовика из всех типов твердосплавных боров.

фрикционной цанге.

Наиболее часто используемый оперативный бор.

2. Хвостовик типа FGOS (под турбинный наконечник для хирургической стоматологии)

Для высокоскоростных наконечников и низкоскоростных наконечников с поворотной головкой.

Диаметр хвостовика такой же, как у стандартного хвостовика типа FG, но длина больше на 50%; закрепление бора также осуществляется зажатием во фрикционной цанге.

Боры с удлиненным хвостовиком наиболее часто используются во время эндодонтического лечения.

3. Хвостовик типа RA (под угловой наконечник)

Для головок типа защелки, устанавливаемых под разным углом, в низкоскоростных наконечниках.

На конце хвостовика имеется паз, в который входит защелка и запирает бор в головке наконечника.

Обеспечивает лучшее управление при препарировании дентина или эмали.

4. Хвостовик типа RAOS (под угловой наконечник для хирургической стоматологии)

Для головок типа защелки, устанавливаемых под разным углом, в низкоскоростных наконечниках.

На конце хвостовика имеется паз, в который входит защелка и запирает бор в головке наконечника.

Диаметр хвостовика такой же, как у стандартного хвостовика типа RA, но длина больше на 20%.

5. Хвостовик типа HP (под прямой наконечник)

передними частями и соединением типа «Дорио» (соединение с жестким рукавом).

6. Удлиненный хвостовик.

Применяется, в основном, в зуботехнических лабораториях и для корректировки материала вне ротовой полости.

15.2. Количество граней

По количеству граней все варианты исполнения боров можно разделить на три основных группы:

- 6-гранные универсальные твердосплавные боры
- 12-гранные финишные боры
- 30-гранные полировочные боры

15.3. Основные формы рабочей части боров

Основные формы рабочей части боров представлены на рисунке 2. В соответствии с ISO 6360-2:2004 «Стоматология. Система цифрового кодирования вращающихся инструментов. Часть 2. Формы» представлены следующие формы:

- сферическая (круглая)
- обратноконусная
- цилиндрическая, резание боковое и концевое
- цилиндрическая, резание поперечное
- цилиндрическая, полусферический конец
- цилиндрическая, резание поперечное, полусферический конец
- конусная (усеченная конусная)
- цилиндрическая, длинная, стрельчатый конец
- обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, длинная

- конусная, куполообразный конец, только боковое резание

Рис. 5. Основные формы рабочей части боров

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ БОРОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БОРЫ								
Сферическая (круглая)	Обратно- конусная	Цилиндрическая (резание боковое и концевое)	Цилиндрическая (резание поперечное)	Цилиндрическая (полусферичес- кий конец)	Цилиндрическая (резание поперечное, полусферичес- кий конец)	Конусная	Конусная	Цилиндрическая Длинная (стрельчатый конец)
								

ФИНИШНЫЕ БОРЫ				
Сферическая (круглая)	Конусная (полусферичес- кий конец)	"Яйцо"	Цилиндрическая (стрельчатый ко- нец, длинная)	
				

ПОЛИРОВОЧНЫЕ БОРЫ	
Сферическая (круглая)	"Яйцо"
	



Таблица 2. Рекомендуемые ограничения частоты вращения

<i>Диаметр рабочей части, мм</i>	<i>Рекомендуемый диапазон скорости вращения, об./мин</i>	<i>Максимальная частота вращения, об./мин</i>
0,5 – 0,6	53000 – 105000	300000
0,7 – 0,8	40000 – 80000	300000
0,9 – 1	30000 – 60000	300000
1,2 – 1,4	24000 – 48000	300000
1,6 – 1,8	19000 – 37000	300000

15.4. Подставка под стоматологические боры Bur Block

К борам также поставляется принадлежность, не входящая в комплектацию какого-либо из вариантов исполнений – подставка под стоматологические боры Bur Block, изготовленная из анодированного алюминиевого сплава. Она служит для удобства пользователя при эксплуатации боров. Кроме того, подставка может использоваться в автоклаве.

Боры помещаются в подставку хвостовиками, что обеспечивает удобство доступа пользователя к ним, в особенности, когда в рамках стоматологической процедуры требуется применение нескольких различных боров подряд. Изображение подставки приведено на рис. 6 и 7.

Рис. 6. Подставка под стоматологические боры Bur Block (лицевая сторона)


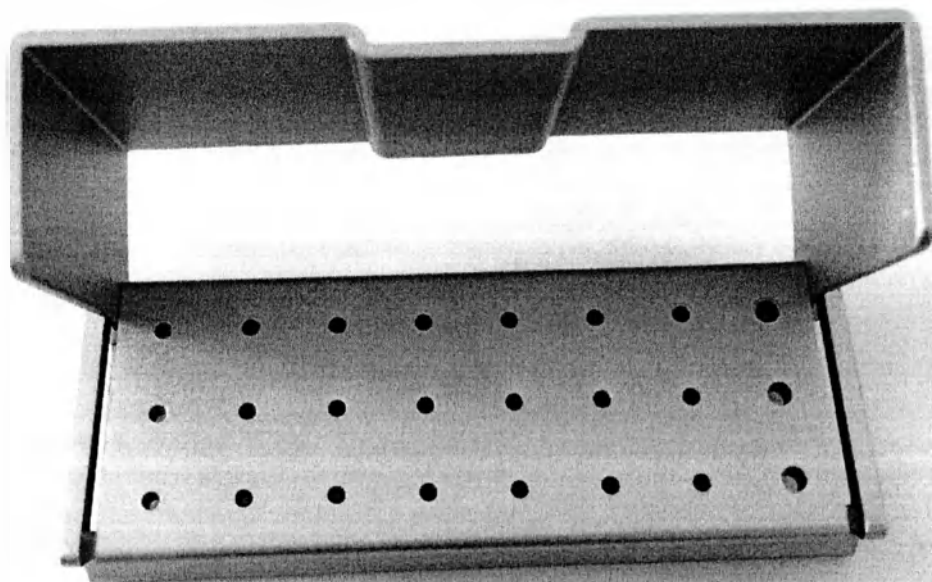


Рис. 7. Подставка под стоматологические боры Bur Block (оборотная сторона)

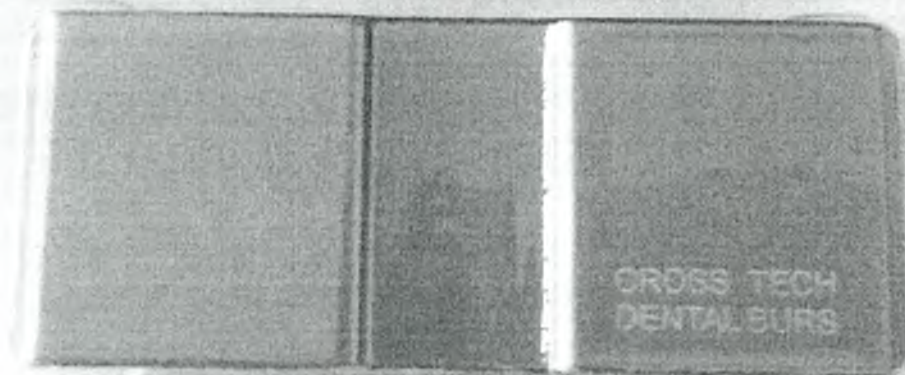

16. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия

Медицинское изделие применяется в условиях лечебно-профилактических учреждений специалистами, имеющими необходимую для этого квалификацию и обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Используется многократно (до физического изнашивания бора, но не более 10 применений)

17. Методы и средства дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации

Боры поставляются нестерильными, однако перед использованием обязательно должны быть подвергнуты дезинфекции и стерилизации конечным потребителем. Эти же процедуры необходимо проводить после каждого использования бора.

17.1. Дезинфекция и предстерилизационная очистка

1. Для соблюдения гигиены наденьте перчатки. Погрузите боры в емкость с этиловым спиртом для очистки от загрязнений. Также для этого могут применяться ультразвуковые системы очистки. Во время очистки боры должны быть физически отделены друг от друга с целью предотвращения повреждения их поверхности.
2. Удалите оставшиеся обломки с помощью металлической щетки, после чего промойте боры проточной водой.
3. После промывания просушите боры, поместив их в абсорбирующие полотенца.

17.2. Стерилизация

Правильная стерилизация боров чрезвычайно важна, поскольку этот процесс устраняет угрозу заражения пациентов и персонала инфекционными заболеваниями.

Предусматривается два возможных способа стерилизации:

1. Стерилизация в сухожаровом шкафу (температура 170°C) в течение 1 часа. Этот метод при его правильном применении не приведет к коррозии боров.
2. Автоклавирование (температура 121°C) в течение 20 минут. При использовании этого метода стерилизация будет более эффективной, однако, возможен риск коррозии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не применяйте методы холодной стерилизации, поскольку они могут негативно повлиять на физические свойства боров.

18. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

Утилизация использованного, пришедшего в негодность или неиспользованного изделия осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б.

19. По вопросам качества медицинского изделия на территории РФ обращаться к уполномоченному представителю производителя по адресу:

Совместное российско-словацкое общество с ограниченной ответственностью «Хиратрейд» (ООО СП "ХИРАТРЕЙД")

Юридический и фактический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Гоголя, д. 20-а

Телефон: +7 (4922)420532

Кросстех Даймонд Тулз Ко., Лтд. (Crosstech Diamond Tools Co., Ltd.)

109/87 Moo 2, Тапарак Роуд, Бангсаотонг, Самутпракан 10540, Таиланд.

Тел.: 66-2-6352126, Факс: 66-2-2377541 Email: info.crosstech@gmail.com

www.crosstechbur.com

[ТЕКСТ ДУБЛИРУЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

[ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ]

[Подпись]

Алан Лам

Овальный штамп:

КРОСС ТЭК ДАЙМОНД ТУЛЗ КО., ЛТД. (CROSS TECH DIAMOND TOOLS CO., LTD.)

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Мамедовым Тимуром Джаванишировичем. Требования к тексту перевода (максимальная точность, грамотное изложение) мне разъяснены.

Город Москва

Седьмого сентября две тысячи шестнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Мамедовым Тимуром Джаванишировичем в моём присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 10-11482

Взыскано по тарифу 100 руб.



Нотариус

*Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 49 листов(а)*

Нотариус

