


ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЛУЧАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО БАКТЕРИЦИДНОГО «СВЕТОЛИТ» С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 9451-001- 37247008-2015 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ: СВЕТОЛИТ-50, СВЕТОЛИТ-100

1. Надеть медицинские перчатки. Установить облучатель в центре помещения, **защитный чехол должен быть снят**.
2. Убедиться, что сетевой выключатель находится в положении «выключено».
3. Подключить кабель питания в штыревой разъём на корпусе облучателя, вставить вилку кабеля в розетку ~220 В, 50 Гц.

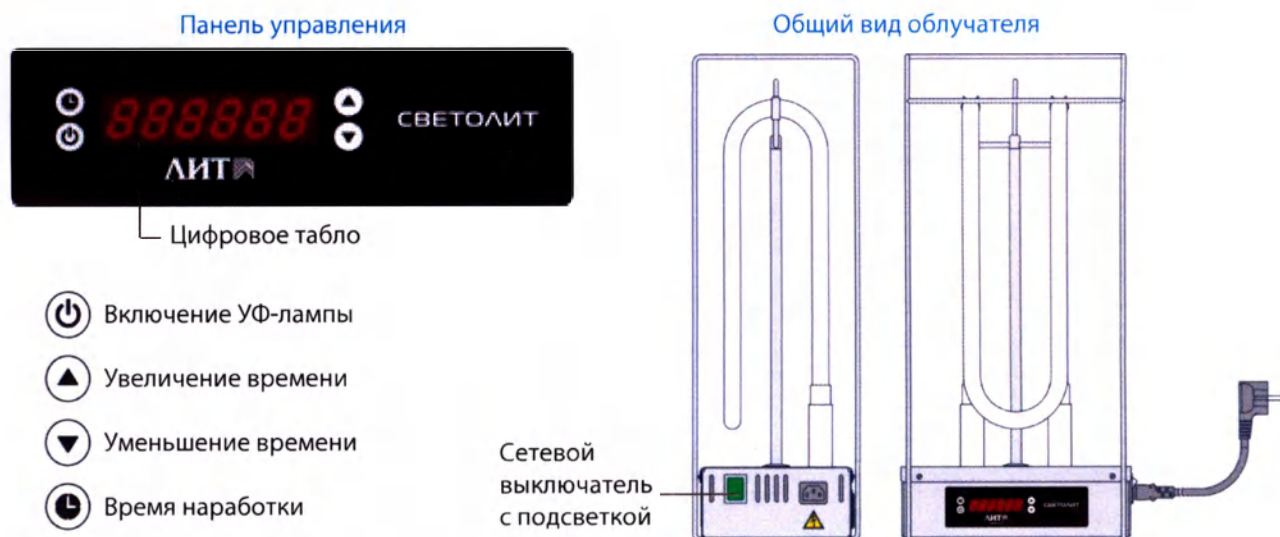

4. Включить сетевой выключатель. При этом должна засветиться его подсветка. На табло облучателя отобразится последнее установленное время работы.
5. Перед включением УФ-лампы необходимо выбрать время облучения и установить его на табло облучателя кнопками.

Объем помещения, м ³	Расстояние от облучателя до облучаемой поверхности (радиус обработки), м	Время обработки помещений, мин			
		СВЕТОЛИТ-50		СВЕТОЛИТ-100	
		Для эффективности 99,9% по показателю «общее микробное число»	Для эффективности 99,9% по показателю «Staphylococcus Aureus»	Для эффективности 99,9% по показателю «общее микробное число»	Для эффективности 99,9% по показателю «Staphylococcus Aureus»
25	1,4	20	6	11	5
50	2	-	10	20	6
75	2,5	-	14	29	8
100	2,8	-	18	-	10
150	3,5	-	26	-	14
200	4	-	-	-	18
250	4,5	-	-	-	22
300	5	-	-	-	26

6. Включение УФ-лампы производится нажатием кнопки «». После включения начинается обратный отсчет интервала времени 24 секунды, сопровождаемый звуковым сигналом – в течение этого времени необходимо покинуть помещение. После окончания звукового сигнала произойдет включение УФ-лампы облучателя. К моменту окончания звукового сигнала в помещении не должно быть людей и животных, входная дверь закрыта и приняты меры к недопущению людей в помещение в течение сеанса облучения. Вывесить табличку «Не входите! Опасно! Идет обеззараживание УФ-излучением».
7. По окончании установленного времени работы УФ-лампы она выключится и прозвучат 5 коротких звуковых сигналов; на цифровом табло отобразятся символы окончания облучения «- - - - -».
8. По окончании сеанса облучения выключить сетевой выключатель. При этом должна погаснуть его подсветка, затем вынуть вилку из розетки.
9. Переместить облучатель в следующее помещение либо на место хранения.

Рекомендации по выбору места расположения

Для достижения наиболее эффективного обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении облучатель должен размещаться в помещении так, чтобы на пути распространения УФ-излучения было как можно меньше препятствий.

Допускается использование облучателя при температуре воздуха от +10 до +35 °С.

Меры безопасности

1. Эксплуатация облучателя должна осуществляться с соблюдением мер безопасности, указанных в паспорте, а также с учетом требований для облучателей открытого типа согласно Р 3.5.1904-04 Минздрава РФ «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».
2. По способу защиты от поражения электрическим током облучатель относится к оборудованию класса I. Дополнительную безопасность обеспечивает УЗО (устройство защитного отключения), конструктивно объединённое с сетевой вилкой.
3. Все работы с облучателем необходимо проводить в медицинских перчатках.
4. Облучатели открытого типа предназначены для обеззараживания помещений **только в отсутствие людей**. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии людей, животных, живых растений в помещении, в котором необходимо провести обеззараживание.
5. К эксплуатации облучателей допускается персонал, изучивший руководство по эксплуатации и прошедший инструктаж по охране труда в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок.
6. Запрещается вносить любые изменения в электрические и механические компоненты облучателя.
7. **ОСТОРОЖНО!** Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сети питания, имеющей защитное заземление.
8. На облучатель распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого осуществляется напряжением 220 В частотой 50 Гц.
9. При необходимости оперативного контроля работы облучателя в помещении необходимо применять средства индивидуальной защиты от УФ-излучения: защитные очки от УФ-излучения и маска, х/б перчатки, х/б халат с капюшоном, полностью закрывающий открытые участки кожи.
10. Во время проведения сеанса облучения над входом в помещение включить световое табло: «Не входить. Идет облучение ультрафиолетом» или вывесить табличку (входит в комплект поставки) с надписью, предупреждающей о протекании процесса УФ-облучения в данном помещении.
11. В случае возникновения внештатной ситуации необходимо немедленно обесточить облучатель.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!


- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЛУЧАТЕЛЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
- ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ РАБОТАЮЩИХ УФ-ЛАМПАХ
- ПРОИЗВОДИТЬ ОЧИСТКУ УФ-ЛАМПЫ ИЛИ ЗАМЕНУ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ

Более подробная информация в руководстве по эксплуатации на облучатель.

**ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЛУЧАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
БАКТЕРИЦИДНОГО «СВЕТОЛИТ» С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 9451-001-
37247008-2015 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-100Н**

1. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии людей, животных, живых растений в помещении.
2. Тщательно закрыть двери помещения и принять меры к недопущению людей в помещение в течение сеанса облучения. Вывесить табличку «Не входить! Опасно! Идёт обеззараживание УФ-излучением».

Общий вид облучателя

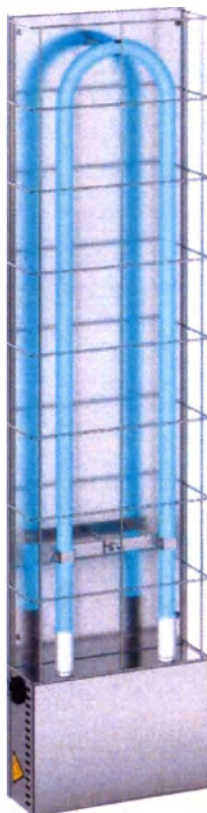

3. Включить облучатель. В процессе работы облучателя входить в помещение категорически запрещается.
4. Для визуального контроля работы облучателя рекомендуется, чтобы в двери либо стене облучаемого помещения имелось окно с силикатным (обычным оконным) стеклом. ОРГСТЕКЛО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (пропускает УФ-излучение)!
5. По истечении времени работы выключить облучатель.

Объем помещения, м ³	Расстояние от облучателя до облучаемой поверхности (радиус обработки), м	Время обработки помещений, мин	
		Для эффективности 99,9% по показателю «общее микробное число»	Для эффективности 99,9% по показателю «Staphylococcus Aureus»
25	1,4	23	7
50	2	-	11
75	2,5	-	16
100	2,8	-	20
150	3,5	-	29

Рекомендации по выбору места расположения

Монтаж осуществляется на стене на высоте не менее 2м от пола либо на потолке. Место установки облучателя следует выбирать таким образом, чтобы на пути распространения УФ-излучения было как можно меньше препятствий, а также обеспечить свободный доступ к защитной решетке облучателя для проведения регламентных и ремонтных работ по замене лампы, проверке ее состояния.

Допускается использование облучателя при температуре воздуха от +10 до +35 °С.

Меры безопасности

1. Эксплуатация облучателя должна осуществляться с соблюдением мер безопасности, указанных в паспорте, а также с учетом требований для облучателей открытого типа согласно Р 3.5.1904-04 Минздрава РФ «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».
2. Все работы с облучателем необходимо проводить в медицинских перчатках.
3. Облучатели открытого типа предназначены для обеззараживания помещений **только в отсутствие людей**. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии людей, животных, живых растений в помещении.
4. К эксплуатации облучателей допускается персонал, изучивший руководство по эксплуатации и прошедший инструктаж по охране труда в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок.
5. **ОСТОРОЖНО!** Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сети питания, имеющей защитное заземление.
6. На облучатель распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого осуществляется напряжением 220 В частотой 50-60 Гц.
7. При необходимости оперативного контроля работы облучателя в помещении необходимо применять средства индивидуальной защиты от УФ-излучения: защитные очки от УФ-излучения и маска, х/б перчатки, х/б халат с капюшоном, полностью закрывающий открытые участки кожи.
8. Во время проведения сеанса облучения над входом в помещение включить световое табло: «Не входить. Идет облучение ультрафиолетом» или вывесить табличку (входит в комплект поставки) с надписью, предупреждающей о протекании процесса УФ-облучения в данном помещении.
9. В случае возникновения внештатной ситуации необходимо немедленно обесточить облучатель.

	ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! • ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЛУЧАТЕЛЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ • ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ РАБОТАЮЩИХ УФ-ЛАМПАХ • ПРОИЗВОДИТЬ ОЧИСТКУ УФ-ЛАМПЫ ИЛИ ЗАМЕНУ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ
---	---

Более подробная информация в руководстве по эксплуатации на облучатель.

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЛУЧАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО БАКТЕРИЦИДНОГО «СВЕТОЛИТ» С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 9451-001-37247008-2015 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ: СВЕТОЛИТ-300, СВЕТОЛИТ-400, СВЕТОЛИТ-600

1. Надеть медицинские перчатки. Установить облучатель в центре помещения, **защитный чехол должен быть снят.**
2. Убедиться, что сетевой выключатель находится в положении «выключено».
3. Вставить вилку УЗО в розетку ~220 В, 50 Гц и нажать кнопку «RESET» на корпусе УЗО.


Панель управления



Цифровое табло

- Включение УФ-ламп
- Увеличение времени
- Уменьшение времени
- Время наработки

Общий вид облучателя

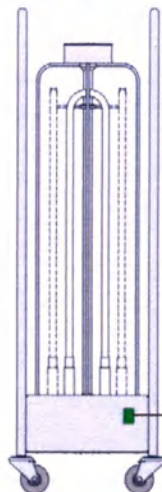

Сетевой выключатель с подсветкой

Вилка УЗО



TEST
RESET

4. Включить сетевой выключатель. При этом должна засветиться его подсветка. На табло облучателя отобразится последнее установленное время работы.
5. Перед включением УФ-ламп необходимо выбрать время облучения и установить его на табло облучателя кнопками.

Объем помещения, м³	Расстояние от облучателя до облучаемой поверхности (радиус обработки), м	Время обработки помещений, мин					
		СВЕТОЛИТ-300		СВЕТОЛИТ-400		СВЕТОЛИТ-600	
		Для эффективности 99,9% по показателю «общее микробное число»	Для эффективности 99,9% по показателю «Staphylococcus Aureus»	Для эффективности 99,9% по показателю «общее микробное число»	Для эффективности 99,9% по показателю «Staphylococcus Aureus»	Для эффективности 99,9% по показателю «общее микробное число»	Для эффективности 99,9% по показателю «Staphylococcus Aureus»
25	1,4	5	5	5	5	5	5
50	2	8	5	7	5	5	5
75	2,5	11	5	9	5	7	5
100	2,8	14	5	11	5	8	5
150	3,5	20	6	16	5	11	5
200	4	26	8	20	6	14	5
250	4,5	-	10	25	7	17	6
300	5	-	11	29	8	20	6
400	5,8	-	13	-	10	26	8
500	6,5	-	15	-	12	-	9
600	7	-	18	-	14	-	10
700	7,6	-	21	-	16	-	12
800	8	-	23	-	18	-	13

6. Включение УФ-лампы производится нажатием кнопки «». После включения начинается обратный отсчет интервала времени 24 секунды, сопровождаемый звуковым сигналом – в течение этого времени необходимо покинуть помещение. После окончания звукового сигнала произойдет включение УФ-ламп облучателя. К моменту окончания звукового сигнала в помещении не должно быть людей и животных, входная дверь закрыта и приняты меры к недопущению людей в помещение в течение сеанса облучения. Вывесить табличку «Не входить! Опасно! Идет обеззараживание УФ-излучением».
7. По окончании установленного времени работы УФ-лампы она выключится и прозвучат 5 коротких звуковых сигналов; на цифровом табло отобразятся символы окончания облучения «- - - - -».
8. По окончании сеанса облучения выключить сетевой выключатель. При этом должна погаснуть его подсветка, затем вынуть вилку из розетки.
9. Переместить облучатель в следующее помещение либо на место хранения.

Рекомендации по выбору места расположения

Для достижения наиболее эффективного обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении облучатель должен размещаться в помещении так, чтобы на пути распространения УФ-излучения было как можно меньше препятствий.

Допускается использование облучателя при температуре воздуха от +10 до +35 °С.

Меры безопасности

1. Эксплуатация облучателя должна осуществляться с соблюдением мер безопасности, указанных в паспорте, а также с учетом требований для облучателей открытого типа согласно Р 3.5.1904-04 Минздрава РФ «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».
2. По способу защиты от поражения электрическим током облучатель относится к оборудованию класса I. Дополнительную безопасность обеспечивает УЗО (устройство защитного отключения), конструктивно объединённое с сетевой вилкой.
3. Все работы с облучателем необходимо проводить в медицинских перчатках.
4. Облучатели открытого типа предназначены для обеззараживания помещений **только в отсутствие людей**. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии людей, животных, живых растений в помещении, в котором необходимо провести обеззараживание.
5. К эксплуатации облучателей допускается персонал, изучивший руководство по эксплуатации и прошедший инструктаж по охране труда в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок.
6. Запрещается вносить любые изменения в электрические и механические компоненты облучателя.
7. **ОСТОРОЖНО!** Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сети питания, имеющей защитное заземление.
8. На облучатель распространяются все требования по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого осуществляется напряжением 220 В частотой 50 Гц.
9. При необходимости оперативного контроля работы облучателя в помещении необходимо применять средства индивидуальной защиты от УФ-излучения: защитные очки от УФ-излучения и маска, х/б перчатки, х/б халат с капюшоном, полностью закрывающий открытые участки кожи.
10. Во время проведения сеанса облучения над входом в помещение включить световое табло: «Не входить. Идет облучение ультрафиолетом» или вывесить табличку (входит в комплект поставки) с надписью, предупреждающей о протекании процесса УФ-облучения в данном помещении.
11. В случае возникновения внештатной ситуации необходимо немедленно обесточить облучатель.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЛУЧАТЕЛЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
- ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ РАБОТАЮЩИХ УФ-ЛАМПАХ
- ПРОИЗВОДИТЬ ОЧИСТКУ УФ-ЛАМПЫ ИЛИ ЗАМЕНУ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ

Более подробная информация в руководстве по эксплуатации на облучатель.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АкваФлайт»



Е. О. Лысый
«11» декабря 2023 г.

Перечень нормативных документов

Облучатели медицинские бактерицидные СВЕТОЛИТ с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015

1. **ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС** Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (с Изменениями №1 и 2).
2. **ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС** Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.
3. **ГОСТ 177-88** Водорода перекись. Технические условия.
4. **ГОСТ 5959-80** Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия.
5. **ГОСТ 7502-98** Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
6. **ГОСТ 10354-82** Пленка полиэтиленовая. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5).
7. **ГОСТ 33781-2016** Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.
8. **ГОСТ 12969-67** Таблички для машин и приборов. Технические требования.
9. **ГОСТ 14192-96** Маркировка грузов.
10. **ГОСТ 15150-69** Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5).
11. **ГОСТ 20477-86** Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
12. **ГОСТ Р 50444-2020** Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования.
13. **ГОСТ 25644-96** Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования.
14. **ГОСТ 26828-86** Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка.
15. **ГОСТ Р 12.4.026-2015** Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением № 1).
16. **ГОСТ Р 15.013-2016** Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия.
17. **ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022** Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик.
18. **ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014** Изделия медицинские. Общие требования безопасности с учётом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания.
19. **ГОСТ Р 53228-2008** Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания (с Изменением № 1).
20. **Р 3.5.1904-04** Руководство Минздрава РФ «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
21. **МУ 287-113-98** Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

22. **ТУ 25.1894.003-90** Секундомеры механические. Технические условия.
23. **ТУ 27.40.15-001-03402223-2021** Лампы амальгамные бактерицидные низкого давления.
24. **ТУ 4215-003-16796024-04** Приборы комбинированные ТКА ПКМ.
25. **ТУ 9392-031-00203306-2003** Средство дезинфицирующее «Хлорамин Б».
26. **ГОСТ 31508-2012** Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
27. **ГОСТ ISO 14971-2021** Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.
28. **ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023** Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности.
29. **ГОСТ CISPR 11-2017** Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний.
30. **ГОСТ 13837-79** Динамометры общего назначения. Технические условия.
31. **СанПиН 2.1.3684-21** Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
32. **Постановление Правительства РФ № 2314 от 28.12.2020 г.** Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.
33. **ГОСТ 21214-75 Средства пакетирования.** Обязка для пакетов пиломатериалов из стальной упаковочной ленты.
34. **ТУ 2245-001-72384673-2005** Пленка полиэтиленовая упаковочная "Стрейч".
35. **ТУ 2245-001-96117480-08** Пленка воздушно-пузырчатая полиэтиленовая.
36. **ГОСТ Р 27.403-2009** Надежность в технике (ССНТ). Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 3 (три) листа(-ов)

Генеральный директор _____ /Лысый Е.О. /

М.п.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АкваФлайт»



Е. О. Лысый
«25» декабря 2023 г.

Фотографии

медицинского изделия

Облучатели медицинские бактерицидные «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50. Общий вид изделия




ТЕЛ. 8-800-100-61-75

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ "СВЕТОЛИТ"
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 9451-001-37247008-2015
В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-50


РУ № РЗН 2016/4366

НАПРЯЖЕНИЕ, В	<u>220±22</u>	IP	<u>20</u>
ЧАСТОТА ТОКА, Гц	<u>50±1</u>	МАССА, КГ	<u>3,3</u>
ПОТР. МОЩНОСТЬ, Вт	<u>170</u>	ЗАВ. НОМЕР	<u>K269-017</u>
СДЕЛАНО В РОССИИ		ДАТА ВЫПУСКА	<u>08/2023</u>

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50. Маркировка (макет)

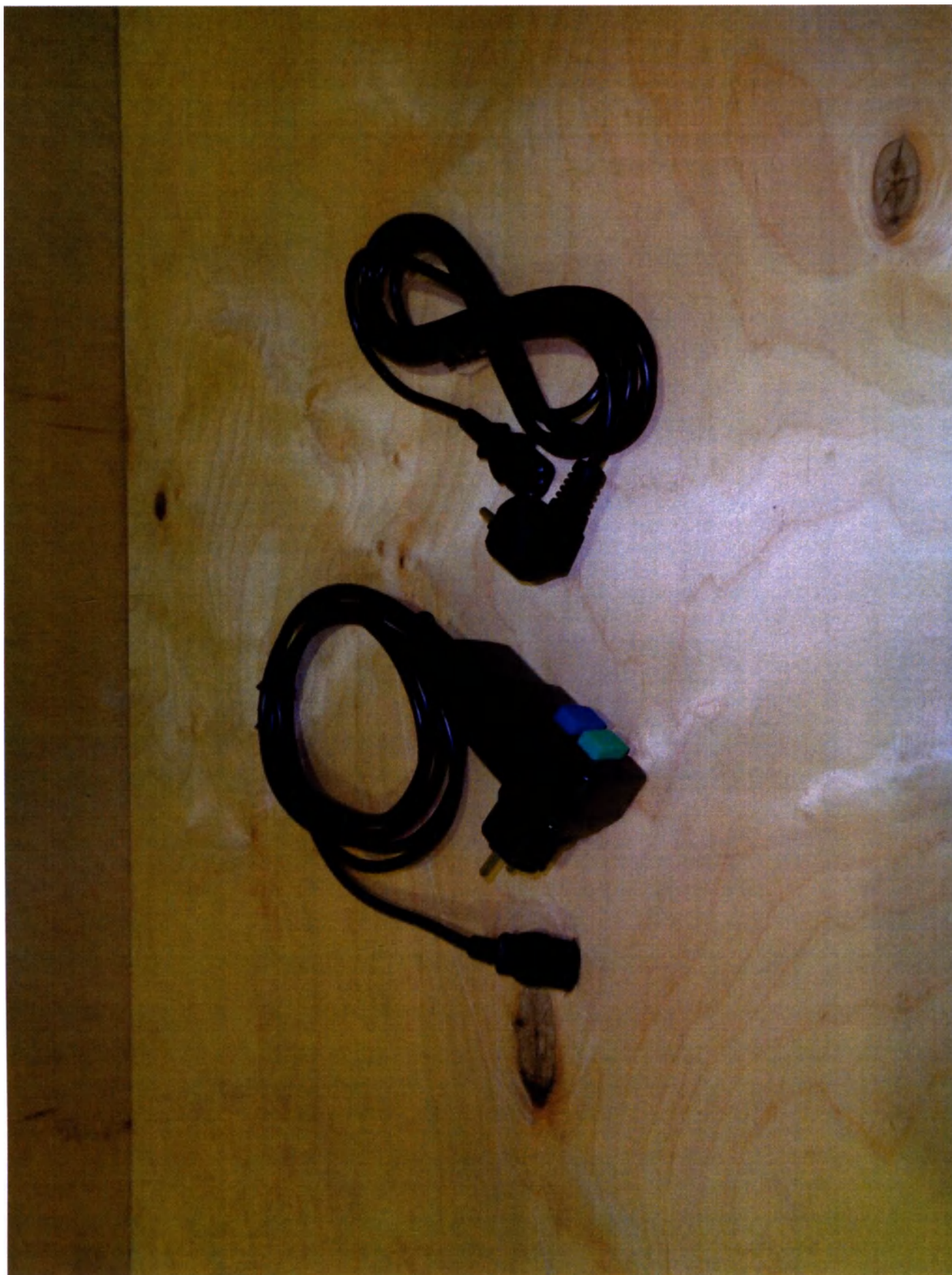

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50.
Кабель питания, кабель питания с УЗО

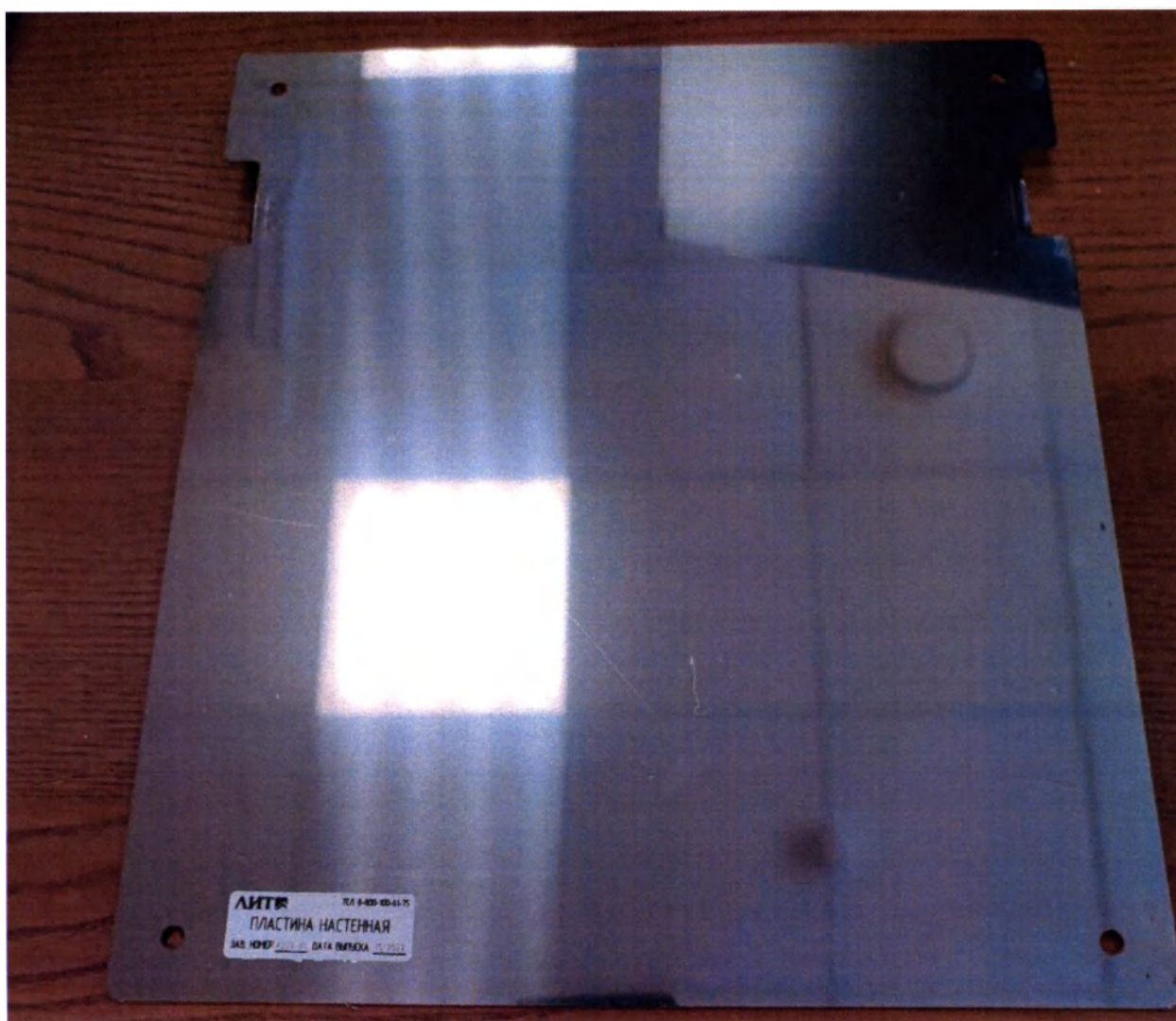

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50.
Пластина для настенного размещения облучателя

ЛИТИ

ТЕЛ 8-800-100-61-75


ПЛАСТИНА НАСТЕННАЯ

ЗАВ. НОМЕР K239-3П ДАТА ВЫПУСКА 11/2023


Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50.
Маркировка пластины для настенного размещения облучателя (макет)



**Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50.
Чехол защитный для УФ-лампы**

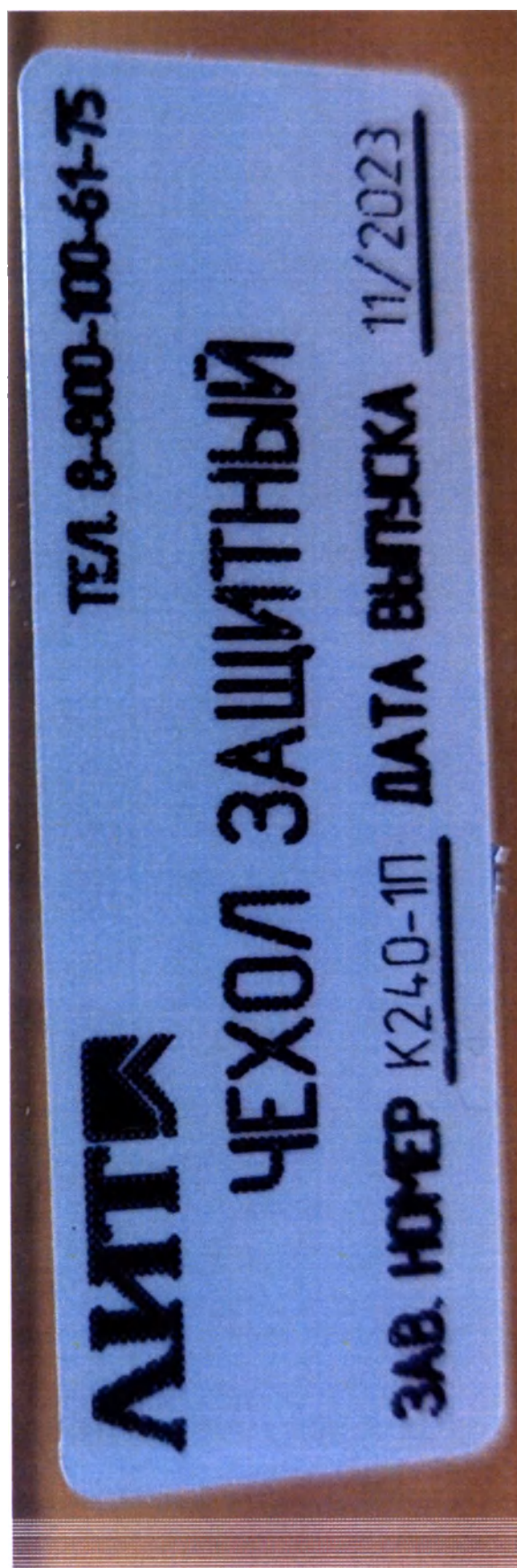

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50.
Маркировка чехла защитного для УФ-лампы (макет)

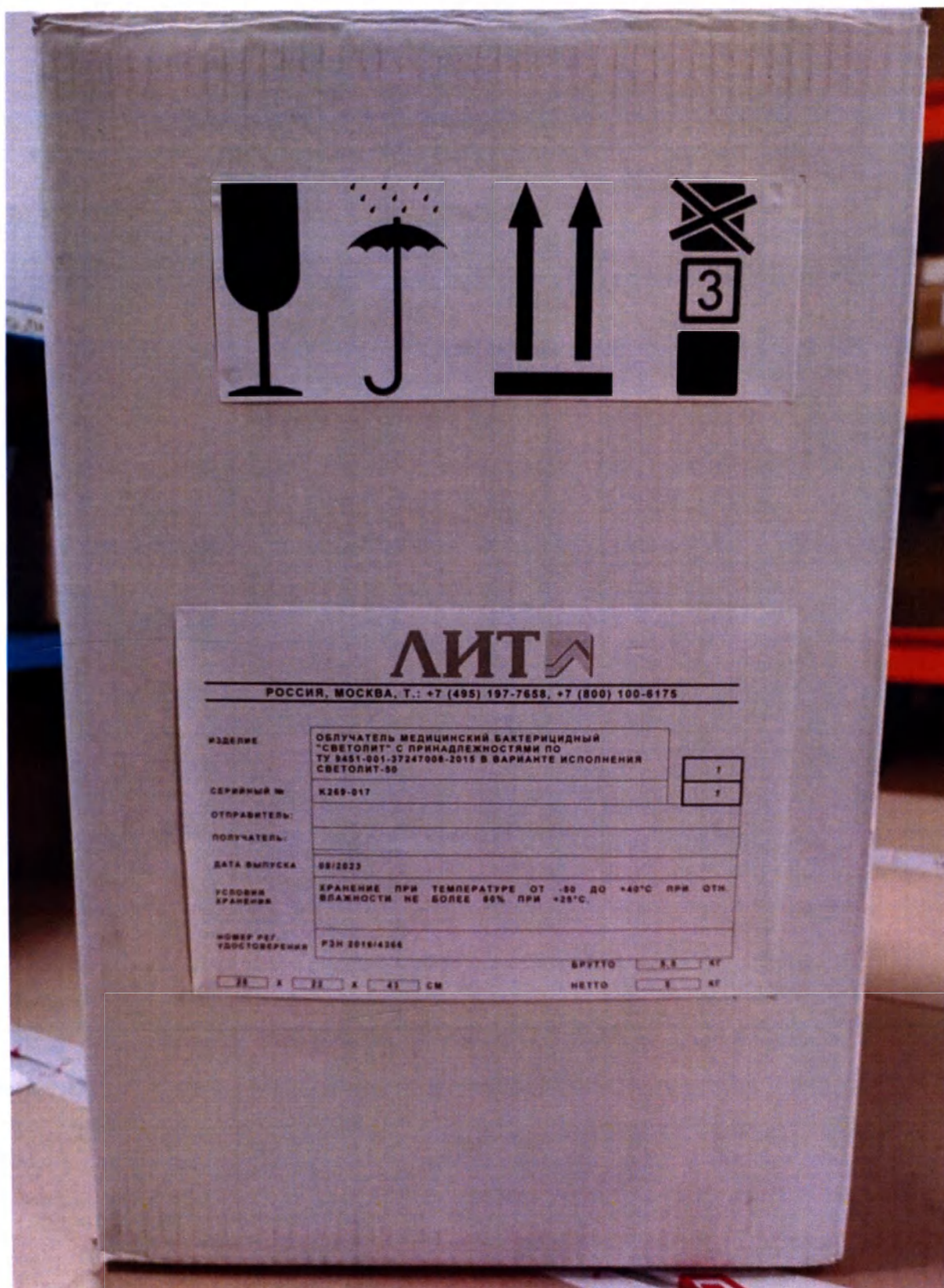

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50. Упаковка



РОССИЯ, МОСКВА, Т.: +7 (495) 197-7658, +7 (800) 100-6175

ИЗДЕЛИЕ

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
"СВЕТОЛИТ" С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО
ТУ 9451-001-37247008-2015 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-50

1

ЗАВОДСКОЙ №

K269-017

1

ОТПРАВИТЕЛЬ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ДАТА ВЫПУСКА

08/2023

УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50 ДО +40°C ПРИ ОТН.
ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 80% ПРИ +25°C.

НОМЕР РЕГ.
УДОСТОВЕРЕНИЯ

РЗН 2016/4366

БРУТТО

5,5

КГ

28

X

22

X

43

CM

НЕТТО


5

КГ

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50.
Маркировка упаковки (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50. Табличка «НЕ входите! Опасно! Идет обеззараживание УФ-излучением»

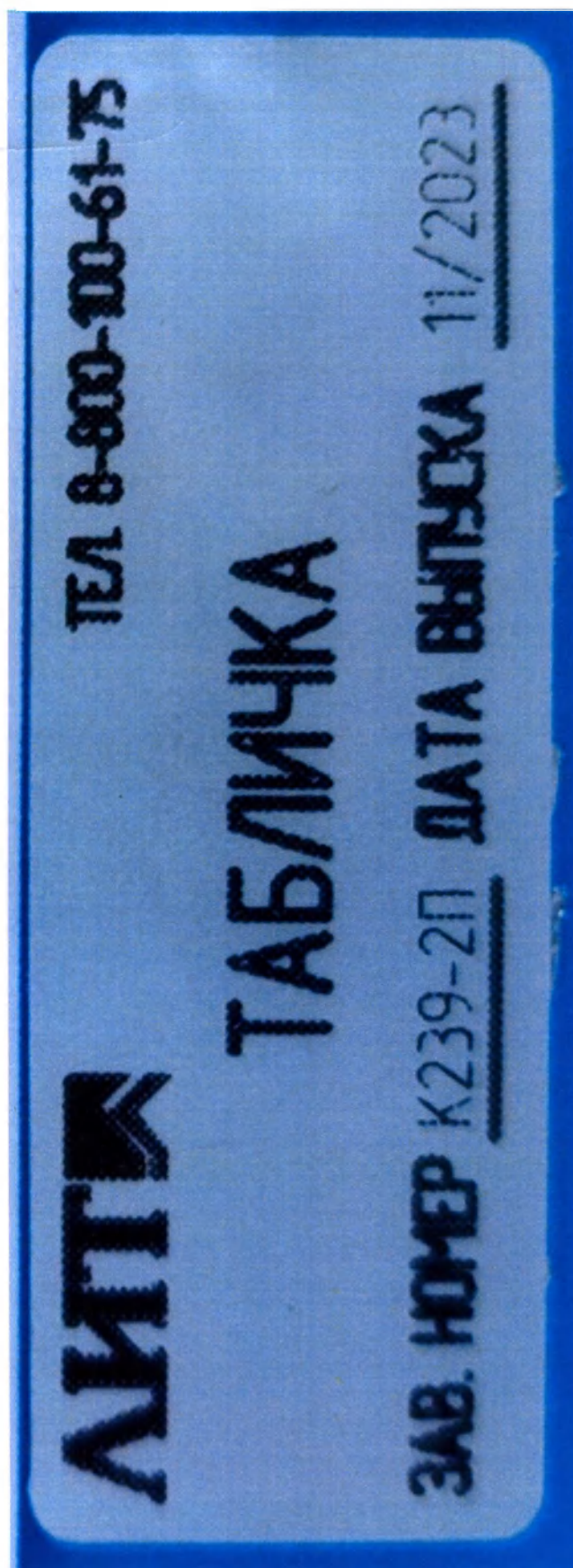

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-50.
Маркировка таблички «НЕ входить! Опасно! Идет обеззараживание УФ-излучением»
(макет)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 12 (двенадцать) листа(-ов)

Генеральный директор _____ /Лысый Е.О. /
М.П.





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АкваФлайт»

Е. О. Лысый
«25» декабря 2023 г.

Фотографии медицинского изделия

**Облучатели медицинские бактерицидные «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100**



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100.
Общий вид изделия




ТЕЛ. 8-800-100-61-75

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ "СВЕТОЛИТ"
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 9451-001-37247008-2015
В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-100


РУ № РЗН 2016/4366

НАПРЯЖЕНИЕ, В	<u>220±22</u>	IP	<u>20</u>
ЧАСТОТА ТОКА, Гц	<u>50±1</u>	МАССА, КГ	<u>4,5</u>
ПОТР. МОЩНОСТЬ, Вт	<u>300</u>	ЗАВ. НОМЕР	<u>K269-016</u>
СДЕЛАНО В РОССИИ		ДАТА ВЫПУСКА	<u>08/2023</u>

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100.
Маркировка (макет)

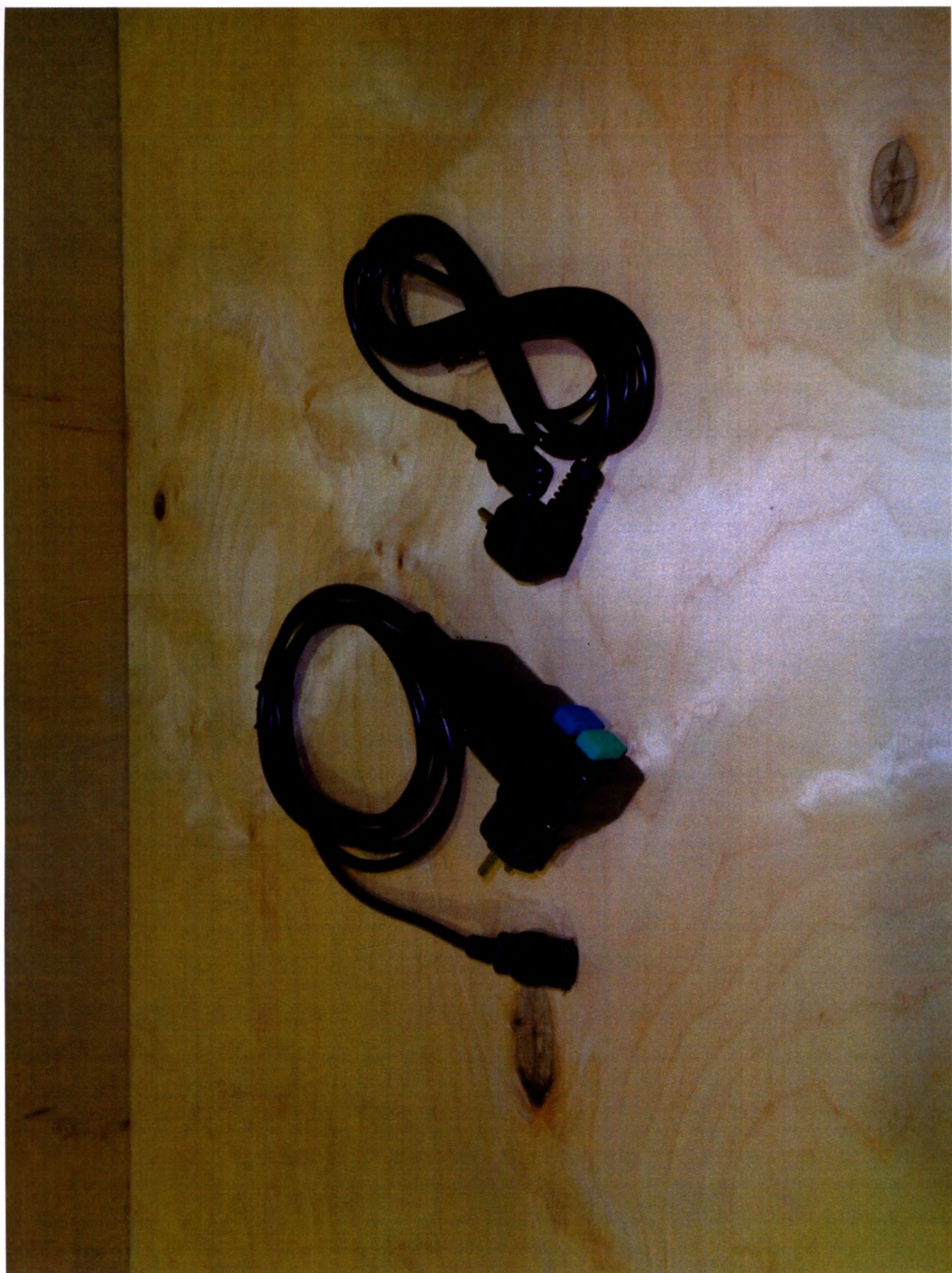

**Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100.
Кабель питания, кабель питания с УЗО**

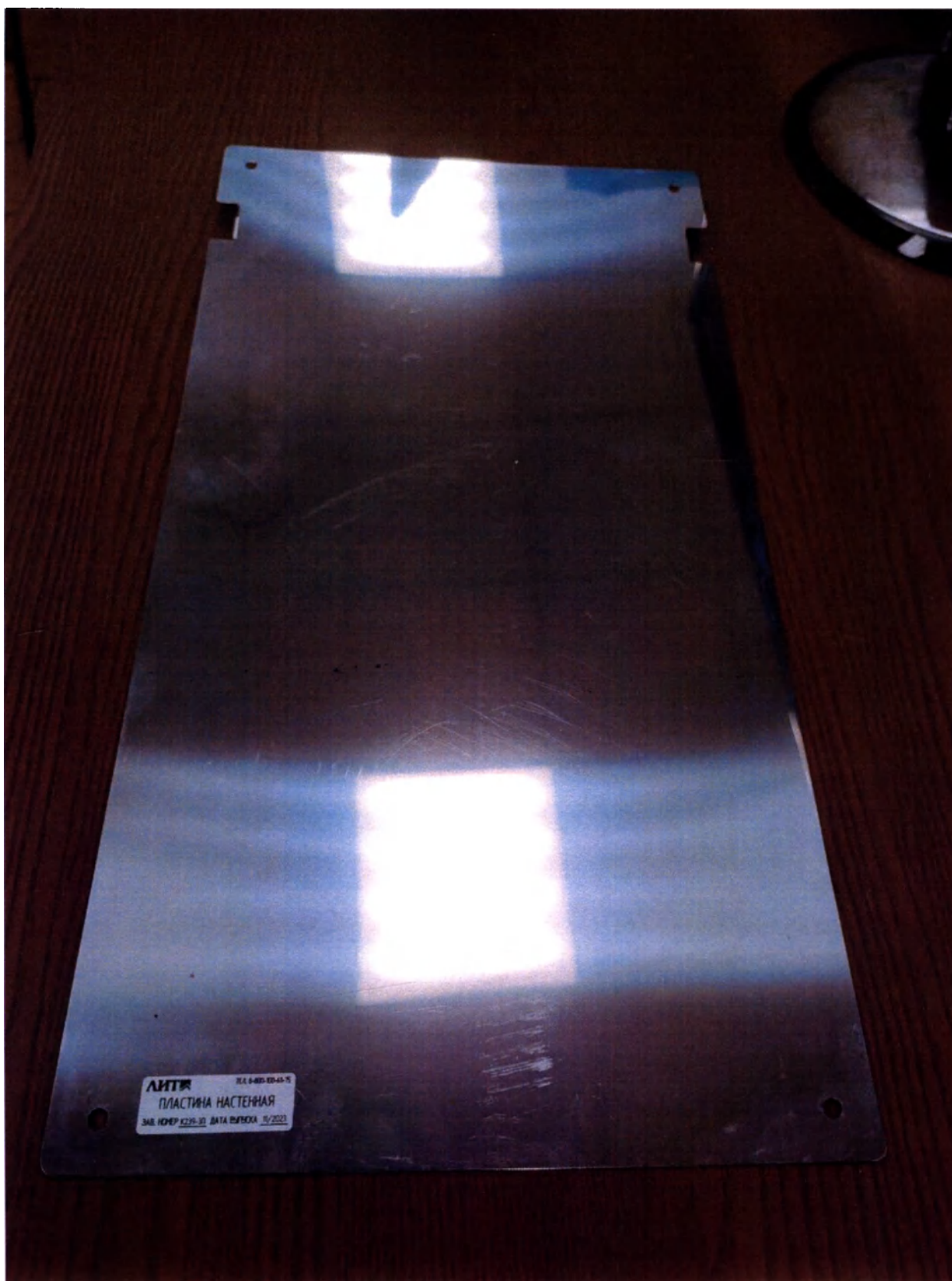

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100.
Пластина для настенного размещения облучателя




Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100.
Маркировка пластины для настенного размещения облучателя (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100.
Чехол защитный для УФ-лампы



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100.
Маркировка чехла защитного для УФ-лампы (макет)

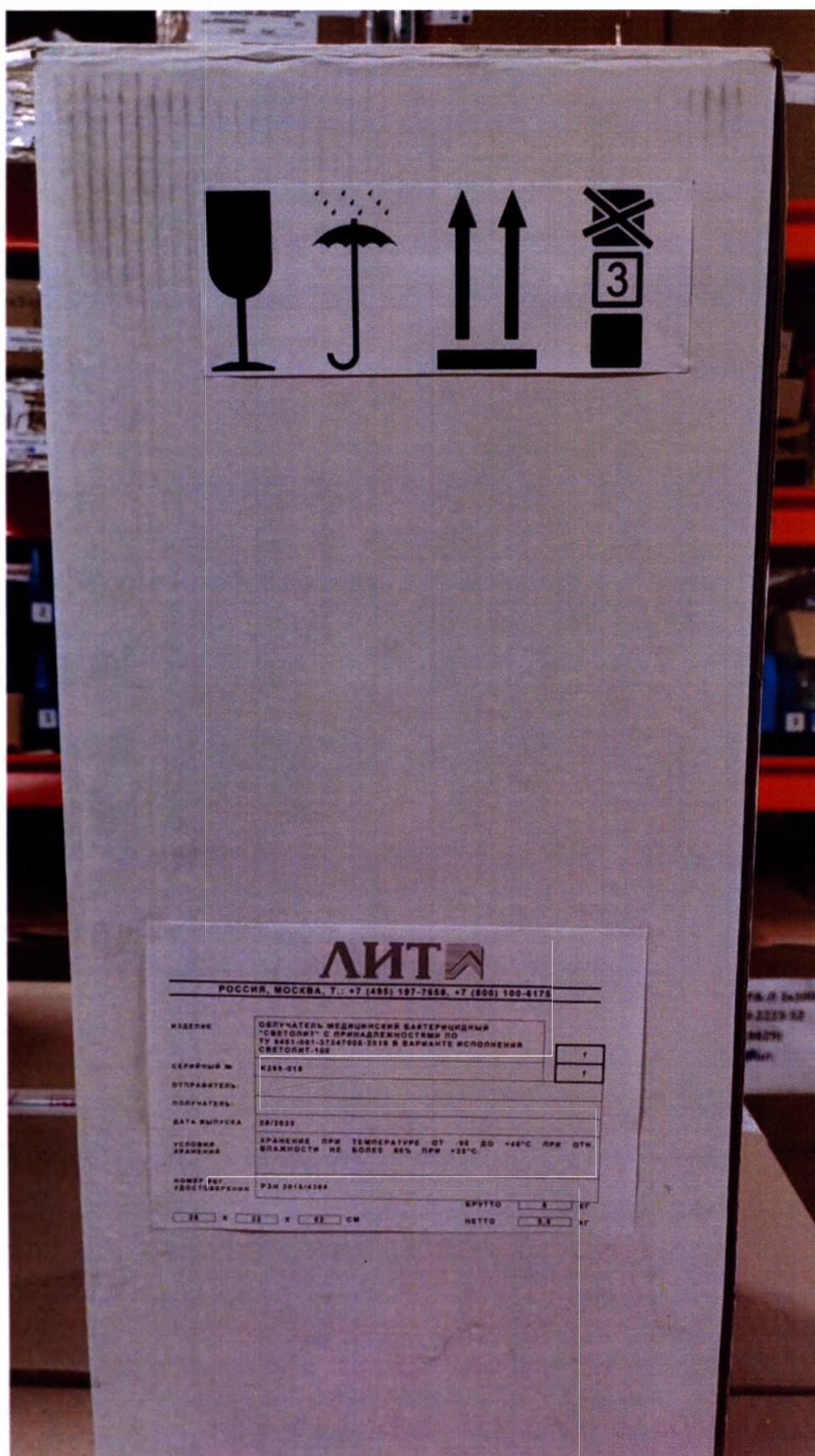

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100. Упаковка



РОССИЯ, МОСКВА, Т.: +7 (495) 197-7658, +7 (800) 100-6175

ИЗДЕЛИЕ

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
"СВЕТОЛИТ" С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО
ТУ 9451-001-37247008-2015 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-100

1

ЗАВОДСКОЙ №

K269-018

1

ОТПРАВИТЕЛЬ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ДАТА ВЫПУСКА

08/2023

УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50 ДО +40°C ПРИ ОТН.
ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 80%. ПРИ +25°C.

НОМЕР РЕГ.
УДОСТОВЕРЕНИЯ

РЗН 2016/4366

БРУТТО

6

КГ

28

X

22

X

62

CM

НЕТТО

5,5

КГ

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100.
Маркировка упаковки (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100. Табличка «НЕ входите! Опасно! Идет обеззараживание УФ-излучением»



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100.
Маркировка таблички «НЕ входить! Опасно! Идет обеззараживание УФ-излучением»
(макет)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 12 (двенадцать) листа(-ов)

Генеральный директор _____ /Лысый Е.О. /
М.П.






УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АкваФлайт»

Е. О. Лысый
«25» декабря 2023 г.

Фотографии медицинского изделия

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100Н

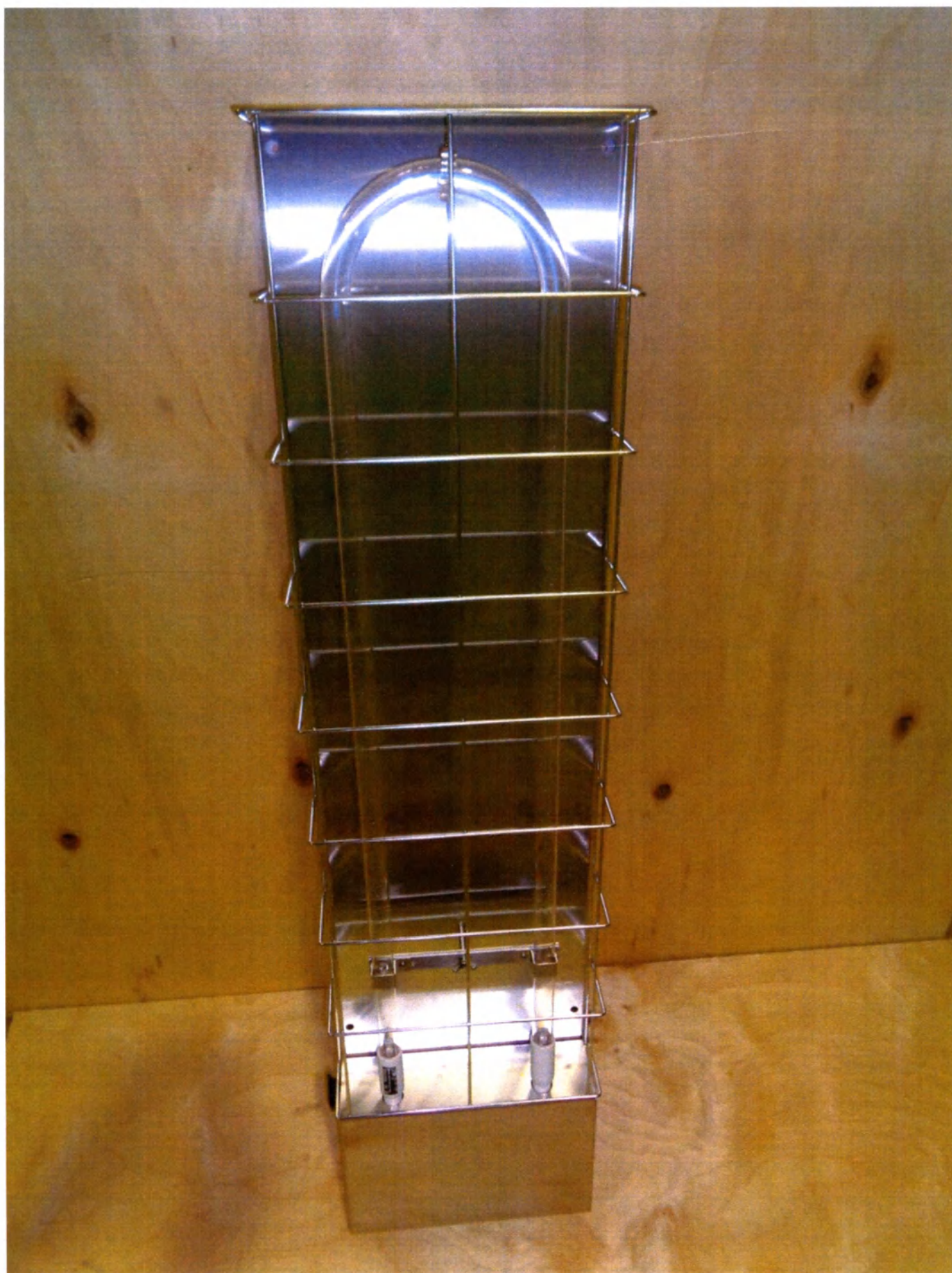

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100Н. Общий вид изделия



ТЕЛ. 8-800-100-61-75

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ "СВЕТОЛИТ"
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 9451-001-37247008-2015
В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-100Н

РУ № РЗН 2016/4366

НАПРЯЖЕНИЕ, В

220±22

IP

20

ЧАСТОТА ТОКА, Гц

50±1

МАССА, КГ

4,7

ПОТР. МОЩНОСТЬ, Вт

300

ЗАВ. НОМЕР

K269-016

СДЕЛАНО В РОССИИ

ДАТА ВЫПУСКА

08/2023

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100Н. Маркировка (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100Н. Упаковка



РОССИЯ, МОСКВА, Т.: +7 (495) 197-7658, +7 (800) 100-6175

ИЗДЕЛИЕ

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
"СВЕТОЛИТ" С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО
ТУ 9451-001-37247008-2015 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-100Н

1

ЗАВОДСКОЙ №

J532-008

1

ОТПРАВИТЕЛЬ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ДАТА ВЫПУСКА

08/2023

УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50 ДО +40°C ПРИ ОТН.
ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 80% ПРИ +25°C.

НОМЕР РЕГ.
УДОСТОВЕРЕНИЯ

РЗН 2016/4366

БРУТТО

6,5

КГ

100

X

28

X

10

CM

НЕТТО


4,7

КГ

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100Н.
Маркировка упаковки (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100Н. Табличка «НЕ входите! Опасно! Идет обеззараживание УФ-излучением»

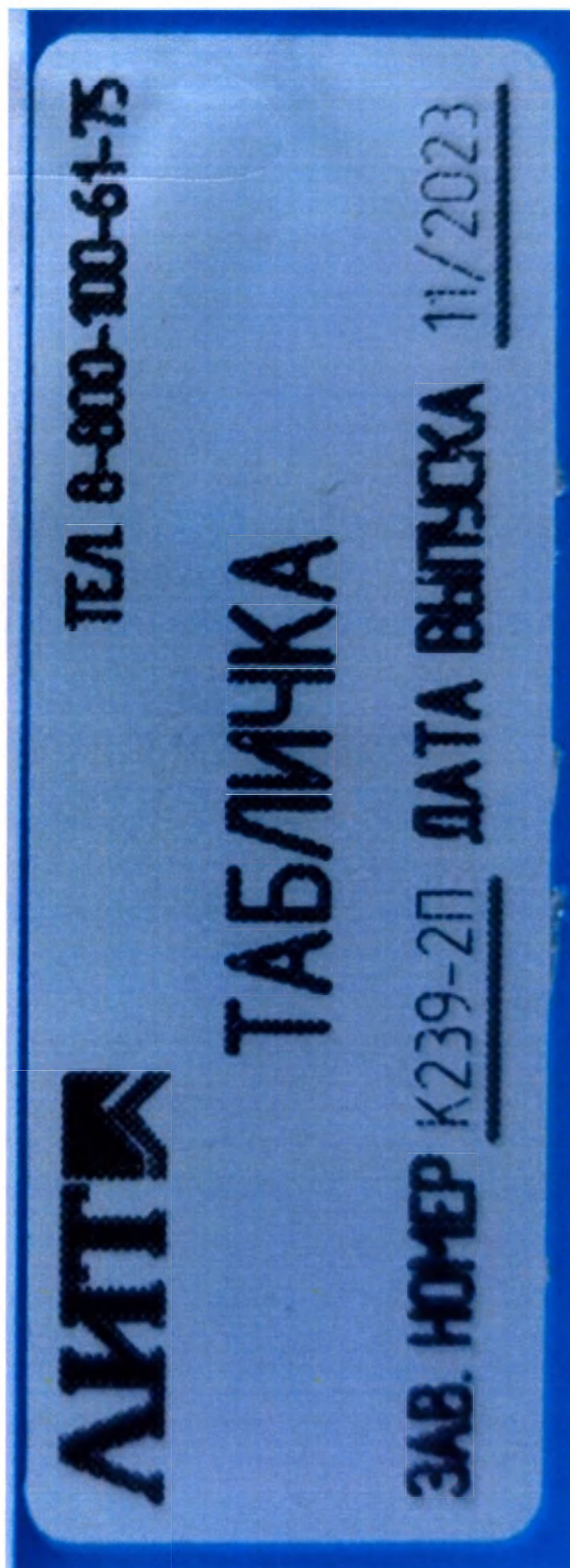

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-100Н. Маркировка таблички «НЕ входить! Опасно! Идет обеззараживание УФ-излучением» (макет)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 7 (семь) листа(-ов)

Генеральный директор _____ /Лысый Е.О. /
М.П. _____



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АкваФлайт»

_____ Е. О. Лысый
«25» декабря 2023 г.



Фотографии

медицинского изделия

Облучатели медицинские бактерицидные «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения:
СВЕТОЛИТ-300, СВЕТОЛИТ-400, СВЕТОЛИТ-600



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-300. Общий вид изделия



ТЕЛ. 8-800-100-61-75

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ "СВЕТОЛИТ"
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 9451-001-37247008-2015
В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-300

РУ № РЗН 2016/4366

НАПРЯЖЕНИЕ, В

220±22

IP

20

ЧАСТОТА ТОКА, Гц

50±1

МАССА, КГ

24,5

ПОТР. МОЩНОСТЬ, Вт

1000

ЗАВ. НОМЕР

K269-016

СДЕЛАНО В РОССИИ

ДАТА ВЫПУСКА

08/2023

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-300.
Маркировка (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-300. Упаковка



РОССИЯ, МОСКВА, Т.: +7 (495) 197-7658, +7 (800) 100-6175

ИЗДЕЛИЕ

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
"СВЕТОЛИТ" С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО
ТУ 9451-001-37247008-2015 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-300

1

ЗАВОДСКОЙ №

K269-016

1

ОТПРАВИТЕЛЬ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ДАТА ВЫПУСКА

08/2023

УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50 ДО +40°C ПРИ ОТН.
ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 80% ПРИ +25°C.

НОМЕР РЕГ.
УДОСТОВЕРЕНИЯ

РЗН 2016/4366

БРУТТО

38

КГ

60

X

60

X

142

CM

НЕТТО

24,5

КГ

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-300.
Маркировка упаковки (макет)



**Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-400.
Общий вид изделия**



ТЕЛ. 8-800-100-61-75

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ "СВЕТОЛИТ"
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 9451-001-37247008-2015
В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-400

РУ № РЗН 2016/4366

НАПРЯЖЕНИЕ, В

220±22

IP

20

ЧАСТОТА ТОКА, Гц

50±1

МАССА, КГ

26

ПОТР. МОЩНОСТЬ, Вт

1200

ЗАВ. НОМЕР

K269-015

СДЕЛАНО В РОССИИ

ДАТА ВЫПУСКА

08/2023

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-400.
Маркировка (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-400. Упаковка



РОССИЯ, МОСКВА, Т.: +7 (495) 197-7658, +7 (800) 100-6175

ИЗДЕЛИЕ

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
"СВЕТОЛИТ" С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО
ТУ 9451-001-37247008-2015 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-400

1

ЗАВОДСКОЙ №

K269-015

1

ОТПРАВИТЕЛЬ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ДАТА ВЫПУСКА

08/2023

УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50 ДО +40°C ПРИ ОТН.
ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 80% ПРИ +25°C.

НОМЕР РЕГ.
УДОСТОВЕРЕНИЯ

РЗН 2016/4366

БРУТТО

40

КГ

60

X

60

X

142

CM

НЕТТО

26

КГ

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-400.

Маркировка упаковки (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-600.
Общий вид изделия



ТЕЛ. 8-800-100-61-75

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ "СВЕТОЛИТ"
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 9451-001-37247008-2015
В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-600

РУ № РЗН 2016/4366

НАПРЯЖЕНИЕ, В

220±22

IP

20

ЧАСТОТА ТОКА, Гц

50±1

МАССА, КГ

28

ПОТР. МОЩНОСТЬ, Вт

2000

ЗАВ. НОМЕР

K269-016

СДЕЛАНО В РОССИИ

ДАТА ВЫПУСКА

08/2023

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-600.
Маркировка (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-600. Упаковка



РОССИЯ, МОСКВА, Т.: +7 (495) 197-7658, +7 (800) 100-6175

ИЗДЕЛИЕ

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
"СВЕТОЛИТ" С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО
ТУ 9451-001-37247008-2015 В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СВЕТОЛИТ-600

1

ЗАВОДСКОЙ №

K269-014

1

ОТПРАВИТЕЛЬ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ДАТА ВЫПУСКА

08/2023

УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -50 ДО +40°C ПРИ ОТН.
ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 80% ПРИ +25°C.

НОМЕР РЕГ.
УДОСТОВЕРЕНИЯ

РЗН 2016/4366

БРУТТО

42

КГ

60

X

60

X

142

CM

НЕТТО

28

КГ


Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения СВЕТОЛИТ-600.
Маркировка упаковки (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения: СВЕТОЛИТ-300, СВЕТОЛИТ-400, СВЕТОЛИТ-600. Чехол защитный




Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения: СВЕТОЛИТ-300, СВЕТОЛИТ-400, СВЕТОЛИТ-600. Упаковка чехла защитного

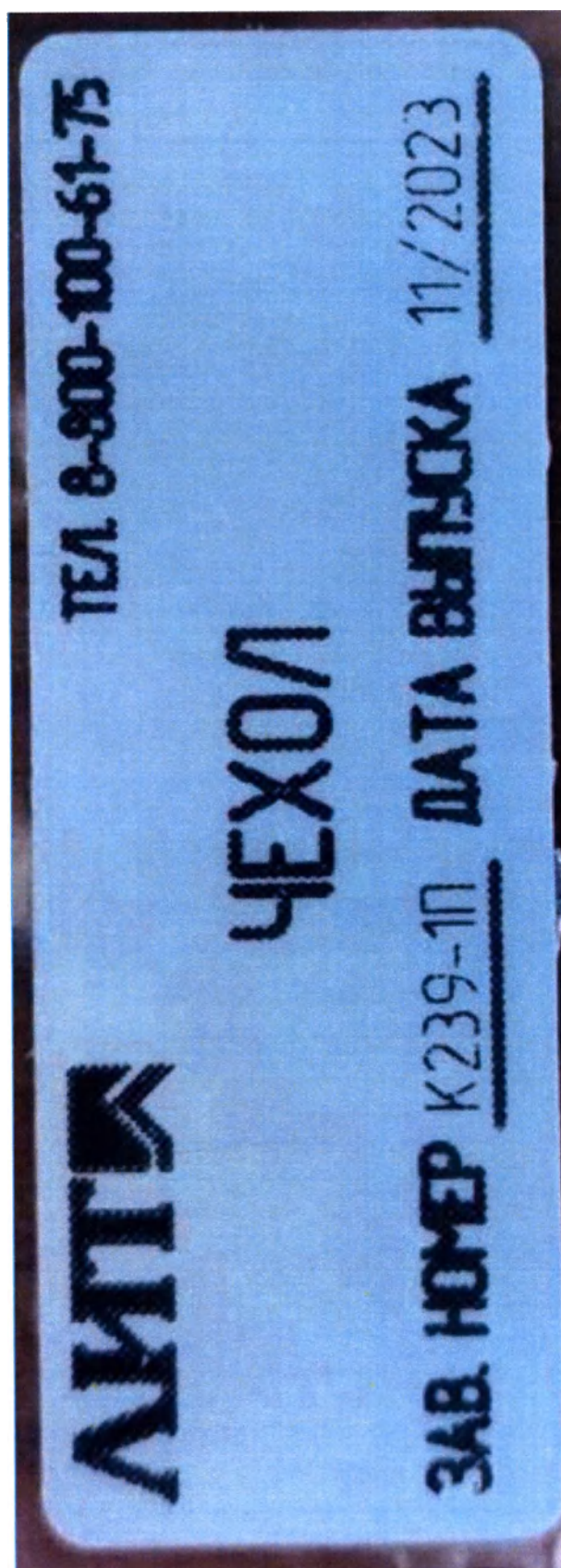

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями
по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения: СВЕТОЛИТ-300, СВЕТОЛИТ-400,
СВЕТОЛИТ-600. Маркировка упаковки чехла защитного (макет)



Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения: СВЕТОЛИТ-300, СВЕТОЛИТ-400, СВЕТОЛИТ-600. Табличка «НЕ входите! Опасно! Идет обеззараживание УФ-излучением».

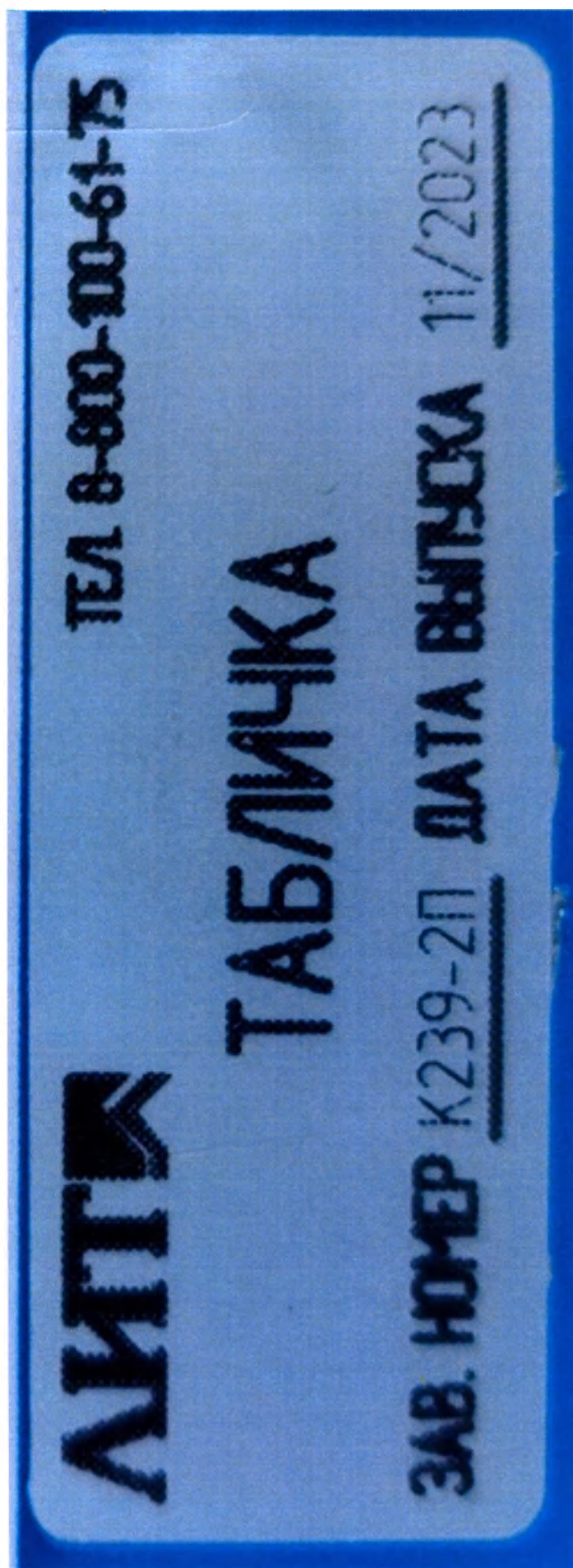

Облучатель медицинский бактерицидный «СВЕТОЛИТ» с принадлежностями по ТУ 9451-001-37247008-2015 в варианте исполнения: СВЕТОЛИТ-300, СВЕТОЛИТ-400, СВЕТОЛИТ-600. Маркировка таблички «НЕ входить! Опасно! Идет обеззараживание УФ-излучением» (макет).

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 18 (восемнадцать) листа(-ов)

Генеральный директор _____ /Лысый Е.О. /
и.п.

