

Внимание !

Не допускать попадания влаги  металлическую платформу и внутрь вибростолика.

Запрещается работа без резиновой накладки.

Для уменьшения загрязнений **ВБ**, в т.ч. накладки (1) и переключателя (3), рекомендуется защита в виде надетой сверху медицинской бахилы, с заменой ее по мере необходимости.

7 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Что делать
Отсутствует вибрация рабочей поверхности	Неисправный переключатель режимов вибрации	
	Сгорела вставка плавкая	

Примечание:  - обратитесь к продавцу или в ближайшее сервисное представительство изготовителя.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ВБ** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ВБ** не требуется.

9 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы – 5 лет.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя: 620102, Екатеринбург, Чкалова 3,

ООО «ВЕГА-ПРО», www.averon.ru, тел. (343) 234-65-86

feedback@averon.ru, сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются


ВБ 1.1	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п.
Дата выпуска _____	Упаковщик _____ м.п.
Дата продажи _____	Продавец _____ м.п.



А АВЕРОН



ВИБРОСТОЛИК ПОРТАТИВНЫЙ ВБ 1.1 «АВЕРОН»

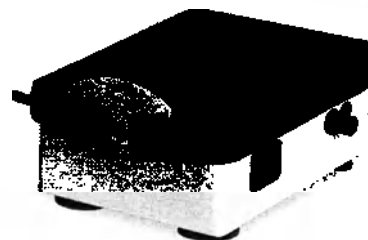

Руководство по эксплуатации
АВЕ 229.000.000 РЭ



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для вибростолика портативного ВБ 1.1 «АВЕРОН» (далее - ВБ), ТУ 9452-022-52331864-2013, ОКП 94 5220.

1.2 ВБ используется в зуботехнических лабораториях для удаления пузырьков воздуха из формовочной массы в процессах отливки моделей, заливки жевых и паковых литейных опок. В ВБ предусмотрена регулировка амплитуды вибрации.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более 80 %

1.4 Основные технические характеристики

- режимы вибрации:
 - режим I 50 Гц
 - режим II 100 Гц
- максимальная амплитуда вибрации:
 - режим I 0,25 мм
 - режим II 0,15 мм
- размеры рабочей поверхности 185×135 мм
- электропитание* ~220В 50Гц 0,5А
- габариты (ШхВхГ), не более 210×135×170 мм
- масса, не более 5,5 кг

* - вставка плавкая ВП4-3-1А-250В - 1 шт

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вибростолик 1 шт
Руководство по эксплуатации АВЕ 229.000.000 РЭ 1 шт

3 УСТРОЙСТВО

3.1 Основные элементы

- 1 - рабочая поверхность (резиновая накладка)
- 2 - опорная дуга
- 3 - переключатель режимов вибрации:
I - 50 Гц; 0 - 0; II - 100 Гц
- 4 - ручка регулировки амплитуды вибрации



Рис.1

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для работы:

- установить ВБ на рабочее место таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к органам управления и сетевой вилке шнура питания;
- вставить вилку сетевого шнура в розетку;
- включить переключатель (3).

Опорная дуга (2) вибрирует вместе с рабочей поверхностью (1) столика. Для лучшей передачи вибрации на ней размещается слепочная ложка зубного ряда.

Вращение ручки (4) по часовой стрелке (к черной метке) - увеличение амплитуды, против часовой (к белой метке) - уменьшение.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

Внимание!



Рекомендуемый режим работы ВБ: 5 минут работы, 5 минут перерыв.

При длительной непрерывной работе возможно отключение ВБ из-за срабатывания тепловой защиты.

Для возобновления работы ВБ необходимо выключить на 10...15 минут, для чего перевести переключатель режимов вибрации в положение «0».

Во избежание повреждения сетевого шнура не устанавливать ВБ задней стенкой вплотную к каким-либо объектам.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование ВБ проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50 °С, относительная влажность до 100 % при температуре 25 °С.

5.2 ВБ должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.

Не допускается хранение ВБ совместно с кислотами и щелочами.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей ВБ от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

В случае сильного загрязнения рабочей поверхности снять резиновую накладку, промыть и после полного высыхания надеть обратно на металлическую платформу.