

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИМБИАН»



Иванов С.А.


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
Экспресс-тест для качественного и полуколичественного колориметрического
определения аскорбиновой кислоты в моче «Витамин С-ИМБИАН-КМ» по ТУ
21.20.23-080-39271034-2023

2023 г.

В состав наборов входят следующие компоненты:
Тест-полоска




Туба с осушителем для тест-полосок

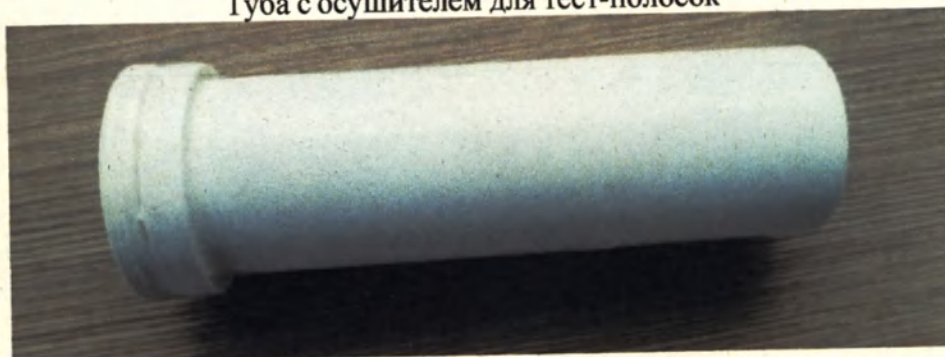

Потребительская упаковка. Комплект №1



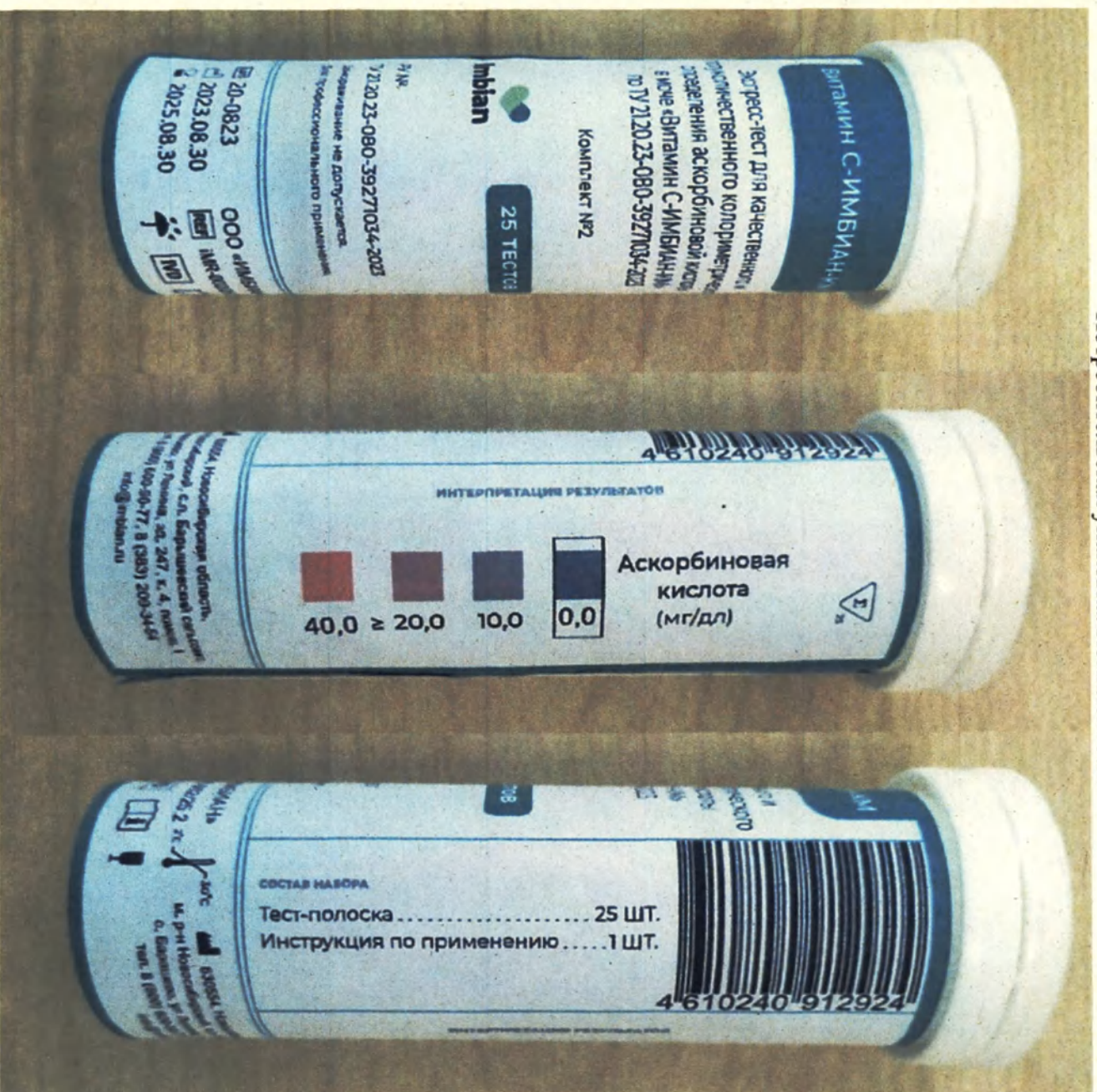

Общий вид медицинского изделия. Комплект №1

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
определения аскорбиновой кислоты в моче
«Витамин С-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-080-
39271034-2023

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению
распространяется на медицинское изделие:
«Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
определения аскорбиновой кислоты в моче
«Витамин С-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-080-
39271034-2023» (далее - экспресс-тест, набор,
«Витамин С-ИМБИАН-КМ»).

Медицинское изделие выпускается в двух
базовых вариантах комплектаций и рассчитан на 1
определение (Комплект №1), 25 определений
(Комплект №2).

Комплект №1

1. Тест-полоска - 1 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.

Комплект №2

1. Тест-полоска - 25 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.

Назначение изделия

Предназначен для качественного и
полуколичественного колориметрического
определения Витамина С (аскорбиновой кислоты) в
моче человека с помощью колориметрического
анализа (КМ).

Предназначен для диагностики *in vitro* при
профессиональном применении как вспомогательное
средство контроля уровня витамина С (аскорбиновой
кислоты): диагностики дефицита (цинга) или
избытка (гипервитаминоза С) для всех групп
населения.

Сокращенное наименование

«Витамин С-ИМБИАН-КМ»

Функциональное назначение

Набор является вспомогательным средством



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
определения аскорбиновой кислоты в моче
«Витамин С-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-080-
39271034-2023

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению
распространяется на медицинское изделие:
«Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
определения аскорбиновой кислоты в моче
«Витамин С-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-080-
39271034-2023» (далее экспресс-тест, набор,
«Витамин С-ИМБИАН-КМ»).

Медицинское изделие выпускается в двух
базовых вариантах комплектации и рассчитан на 1
определение (Комплект №1), 25 определений
(Комплект №2).

Комплект №1

1. Тест-полоска - 1 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.

Комплект №2

1. Тест-полоска - 25 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.

Назначение изделия

Предназначен для качественного и
полуколичественного колориметрического
определения Витамина С (аскорбиновой кислоты) в
моче человека с помощью колориметрического
анализа (КМ).

Предназначен для диагностики *in vitro* при
профессиональном применении как вспомогательное
средство контроля уровня витамина С (аскорбиновой
кислоты); диагностики дефицита (цинга) или
избытка (гипервитаминоза С) для всех групп
населения.

Сокращенное наименование

«Витамин С-ИМБИАН-КМ»

Функциональное назначение


Набор является вспомогательным средством



6



Групповая упаковка (транспортная тара) медицинского изделия. Комплект №2

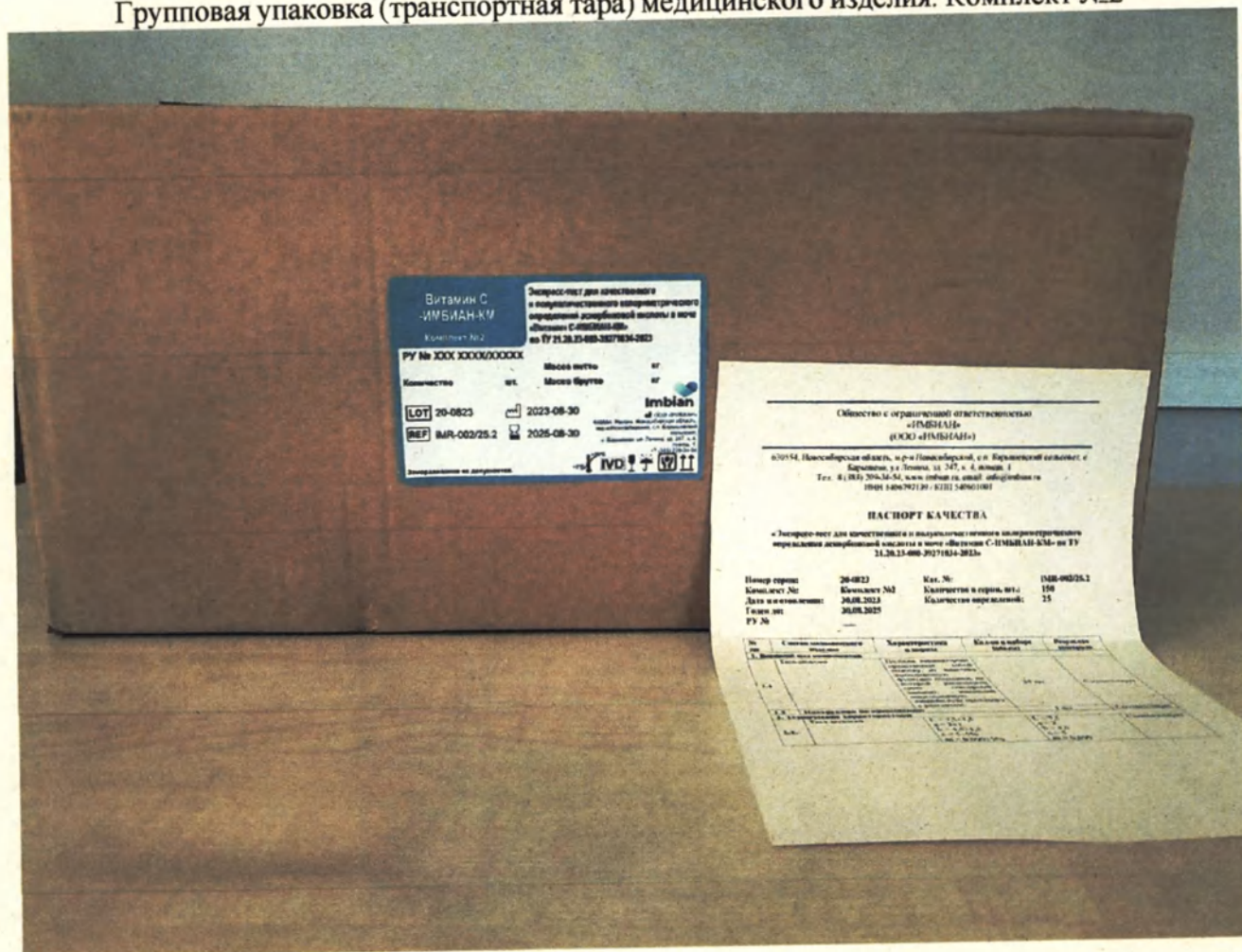

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист 06

Директор ООО «ИМБИАН»



С.А. Иванов "31" 05 2023 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «ИМБИАН»



Иванов С.А. \

**Экспресс-тест для качественного и полуколичественного
колориметрического определения аскорбиновой кислоты в моче
«Витамин С-ИМБИАН-КМ» по ТУ 21.20.23-080-39271034-2023**

Проект маркировки

2023

Витамин С-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
определения аскорбиновой кислоты
в моче «Витамин С-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-080-39271034-2023

Комплект №1



1 TEST

РУ №

ТУ 21.20.23-080-39271034-2023

Замораживание не допускается.

Для профессионального применения.



4 610240 912917

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 1 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Аскорбиновая
кислота
(мг/дл)

0,0



10,0



20,0



40,0

LOT 20-0823

2023.08.30

2025.08.30

ООО «ИМБИАН»

REF iMR-002/1.1



IVD



630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Витамин С-ИМБИАН-КМ

Экспресс-тест для качественного и
полуколичественного колориметрического
определения аскорбиновой кислоты
в моче «Витамин С-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-080-39271034-2023

Комплект №2



25 ТЕСТОВ

РУ №

ТУ 21.20.23-080-39271034-2023

Замораживание не допускается.

Для профессионального применения.




4 610240 912924

СОСТАВ НАБОРА

Тест-полоска 25 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

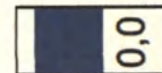Аскорбиновая
кислота
(мг/дл)

0,0



10,0



20,0



40,0

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

LOT 20-0823

2023.08.30

2025.08.30

ООО «ИМБИАН»

REF iMR-002/25.2



IVD



30°C

630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барашево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Транспортная упаковка
Комплект №1

Витамин С
-ИМБИАН-КМ

Комплект №1


Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного колориметрического
определения аскорбиновой кислоты в моче
«Витамин С-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-080-39271034-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Количество		шт.	Масса нетто	кг	Масса брутто	кг
LOT	20-0823		2023-08-30			
REF	iMR-002/1.1		2025-08-30			

Замораживание не допускается.

 +30°C
+2°C

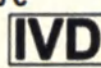Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский
сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4,
помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54

Комплект №2

Витамин С
-ИМБИАН-КМ

Комплект №2

Экспресс-тест для качественного
и полуколичественного колориметрического
определения аскорбиновой кислоты в моче
«Витамин С-ИМБИАН-КМ»
по ТУ 21.20.23-080-39271034-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Количество		шт.	Масса нетто	кг	Масса брутто	кг
LOT	20-0823		2023-08-30			
REF	iMR-002/25.2		2025-08-30			

Замораживание не допускается.

 +30°C
+2°C

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский
сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4,
помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54

Директор ООО «ИМБИАН»



С.А. Иванов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист а
Директор ООО «ИМБИАН»

С.А. Иванов "26 05 2023 г

