

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

Аппарат электрохирургический высокочастотный Surtron


Приложение 1

Фотографические изображения

(инструменты электрохирургические, входящие в стандартную комплектацию и в состав медицинского изделия опционально (с пометкой «при необходимости»))

Производства LED S.p.A., Италия

2024 г.

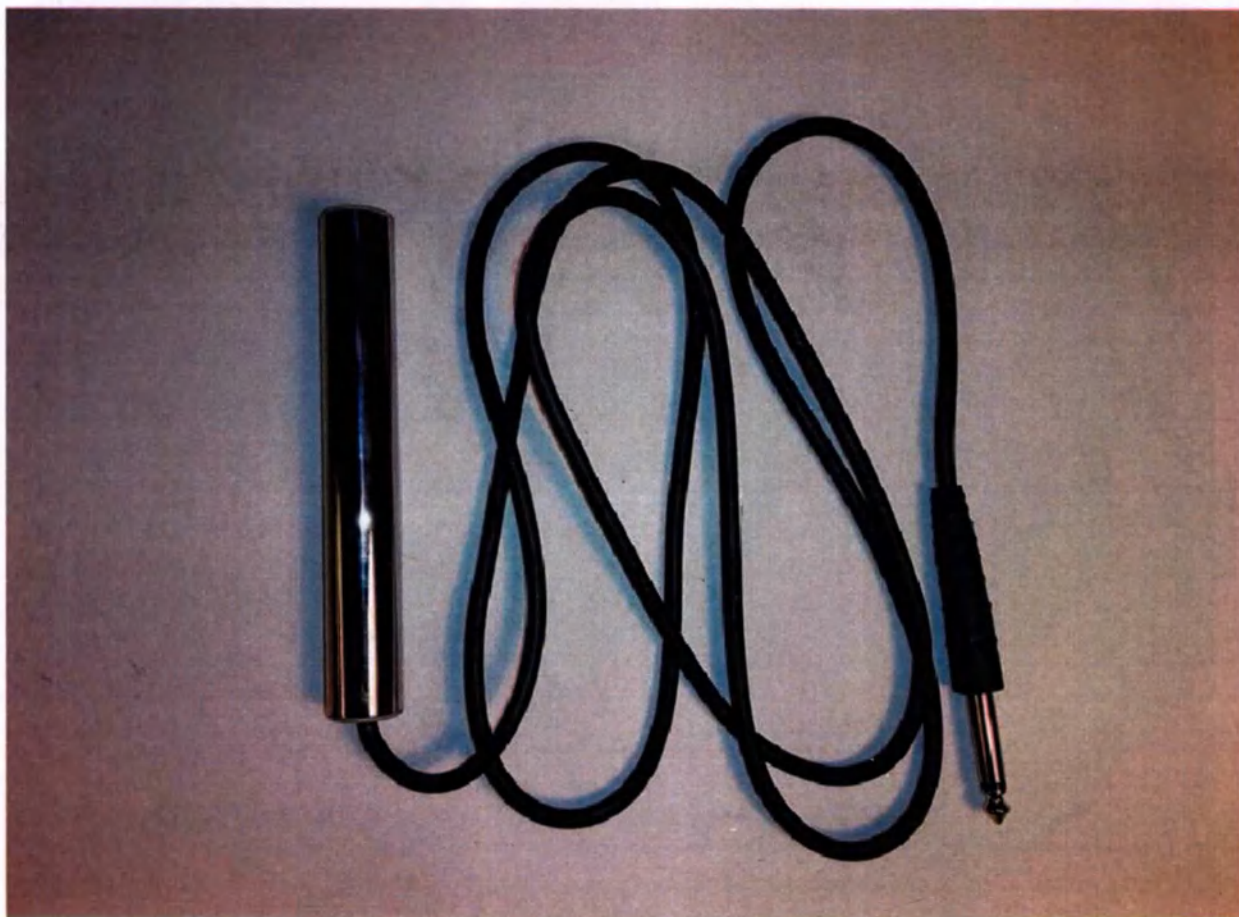

Электрод нейтральный

MAX 120W

REF 00400.00
LOT 77547
2021-06

CE 0051

Электрод пациента возвратный нейтральный стержневой (длина 120мм, диаметр 17мм), с кабелем длиной 1,8м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм

Предупреждение

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов:

- Электрод пациента возвратный нейтральный должен прочно удерживаться в руке пациента
- Если активирует электростимулятор не происходит желаемый эффект, следует прекратить электрод пациента возвратный нейтральный стержневой. Причиной низкого уровня электрической активности или некорректной работы аппарата электростимулятора, при нахождении на поверхности пациента электрод нейтральный, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального с поверхностью или его неправильное расположение

ОЧИСТКА

Сразу после использования необходимо промыть проточной водой, затем погрузить на 45 минут в 2-процентный раствор обычного дезинфицирующего средства

LED SVA Via Seicamilla 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

1400400-00-00 ed. 03-2019

1. Электрод пациента возвратный нейтральный стержневой (длина 120мм, диаметр 17мм), с кабелем длиной 1,8м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, 00400.00. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод нейтральный

Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый

REF 00401.02
LOT 65832
2019-05

121 °C
250 °F
20 min
AUTOCLAVE

134 °C
275 °F
10 min
AUTOCLAVE

100 cycles

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента изолирована нейтральным диэлектриком. Если размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протоками, рубцами и частями тела, которые подверглись изолонии заживости или имеют подкожную жировую ткань. Частички тела должны быть без волос, сухой и чистой. Не использовать спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.

1A03431-02_12 ed. 10-2017


(1) - зона термалки

8 0 3 3 6 3 8 3 2 1 4 3 0

• Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрофизиологического, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Salsicella 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

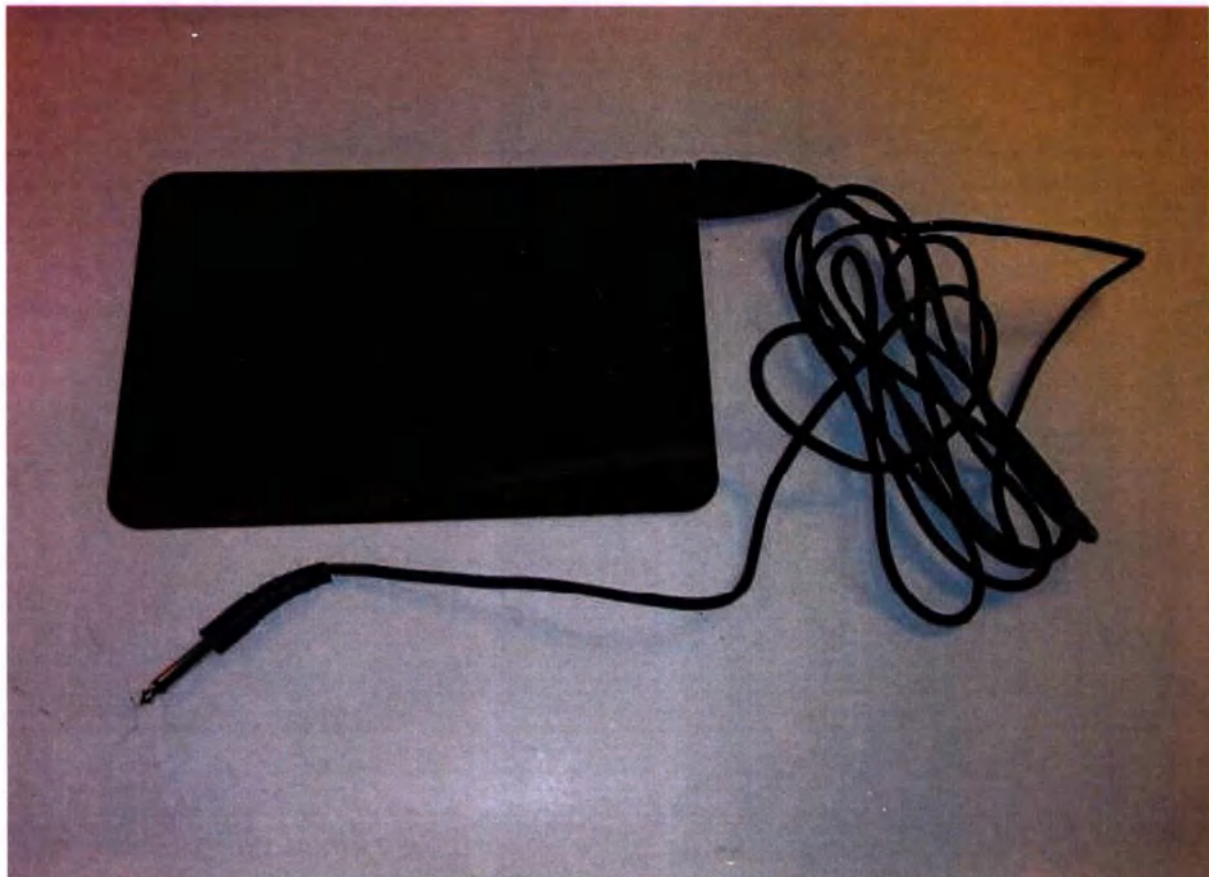

2. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый, 00401.02. Фото изделия и пример маркировки.



Электрод нейтральный

Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый

REF 00401.03

LOT 68787

2019-09

121 °C 210 °F 20 min AUTOCLAVE

134 °C 275 °F 10 min AUTOCLAVE

100 cycles

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подвергнуты накоплению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.

IA00401-03_12 ed. 10-2017

(1) - зона тералии

CE 0051

LED SpA Via Sciacella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 10 33638 3 21447

i

* Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрофизиологического, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

3. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый, 00401.03. Фото изделия и пример маркировки.

**Электрод
нейтральный**

REF 6420A
LOT C2417
2017-04
Совместим с 0004.08

Электрод пациента возвратный
нейтральный стальной 240x160мм
с язычковым соединением

2017-04
250 °C
275 °C
121 °C
100 min
100 min
100 min

2017-04
250 °C
275 °C
121 °C
100 min
100 min
100 min

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым использованием снимите защитные пленки

Следующие меры предосторожности снижают риск лучевых ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо вентилируемой поверхности, как можно ближе к операционному участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, простегами, рубцами и частями тела, которые подвержены воздействию жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос; сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуются использование желатиновых веществ для электродов.

(1) - зона терапии

M3365.12 ed. 10-2017

Если возникнет электрический нежелательный эффект, следует прекратить использование электрода пациента возвратного нейтрального. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электрохирургического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть опутывание контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Selcastella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

5. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм с язычковым соединением, 6429A. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод нейтральный

REF 00401.10

LOT 68417

2019-10

2024-10

Электрод пациента возвратный
нейтральный стальной с TPE покрытием
210x120мм с язычковым соединением



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

• Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризированной мышце, как можно ближе к оперируемой области и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, пролезнами, рубцами и частями тела, которые подверглись накоплению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электрода.

00401-10_10 ed. 03-2019



(1)

(1) - зона терапии



• Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электрофизиологического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Seicatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



Электрод нейтральный

REF 00401.20 Электрод пациента возвратный нейтральный

LOT 68418 нейтральный стальной с ТРЕ покрытием

2019-10 разделенный 210x120мм с язычковым соединением

2024-10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов:

- Если электрод электроды пациента возвращаются нейтральный Электрод размещен на хорошо васкуляризованной коже, как можно ближе к операционному участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, пролежнями, рубцами и частями тела, которые подвержены некрозу или ожогам. Не используйте электрод на жирную кожу. Не используйте электрод на влажную кожу. Не используйте электрод на коже, которая была обработана антисептиком. Не используйте электрод на коже, которая была обработана антисептиком.

8 033 638 322 63

(1) - зона термалли

• Если аппарат электрофизиологии не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Проверить уровень электрической активности или пассивной работы электрофизиологического аппарата. При нормальном значении высокой мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильного размещения.

CE 0051

LCD SpA Via Eclissiella 40
D-40111 Aprila (LT) - ITALY

7. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с ТРЕ покрытием разделенный 210x120 мм с язычковым соединением, 00401.20. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-110 *Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323373

LOT 68346 2019-09 2024-09

NON STERILE 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8. Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-110. Фото изделия и пример маркировки.



Электрод

REF 152-112 *Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323380

LOT 61825 2018-08 2023-08

NON STERILE 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

9. Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-112. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-115 *Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323403

LOT 65348 2019-03 2024-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

10. Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-115. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-120 *Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323410

LOT 68930 2019-10 2024-10

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

11. Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-120. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-122	Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323427	
LOT 60945	2018-03 2023-03
NON STERILE	
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

12. Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-122. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-125	Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323434	
LOT 60946	2018-03 2023-03
NON STERILE	
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

13. Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-125. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-130 *Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
EAN13 8033638323441

LOT 61022 2018-08 2023-08

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

14. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-130. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-132 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм,
диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
EAN13 8033638323458

LOT 65402 2019-03 2024-03

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

15. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-132. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-140

EAN13 8033638323465

LOT 60949

Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03

2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

16. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-140. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-142

EAN13 8033638323472

LOT 60950

Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03

2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

17. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-142. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-145

EAN13 8033638323489

LOT 60951

*Электрод-шар, длина стержня 140мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*

2018-03
 2023-03

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

18. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-145. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-150

EAN13 8033638323496

LOT 68516

*Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм*

2019-10
 2024-10

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

19. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-150. Фото изделия и пример маркировки

14

ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ЭЛЕКТРОД

REF 152-152

EAN13 8033638323502

LOT 60953

Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03

2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

20. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-152. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-160

EAN13 8033638323519

LOT 60954

Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03

2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

21. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-160. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-162

EAN13 8033638323528

LOT 60955

Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм,
диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03

2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

22. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-162. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-165

EAN13 8033638323533

LOT 60956

Электрод-шар, длина стержня 140мм,
диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03

2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES


121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

23. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-165. Фото изделия и пример маркировки

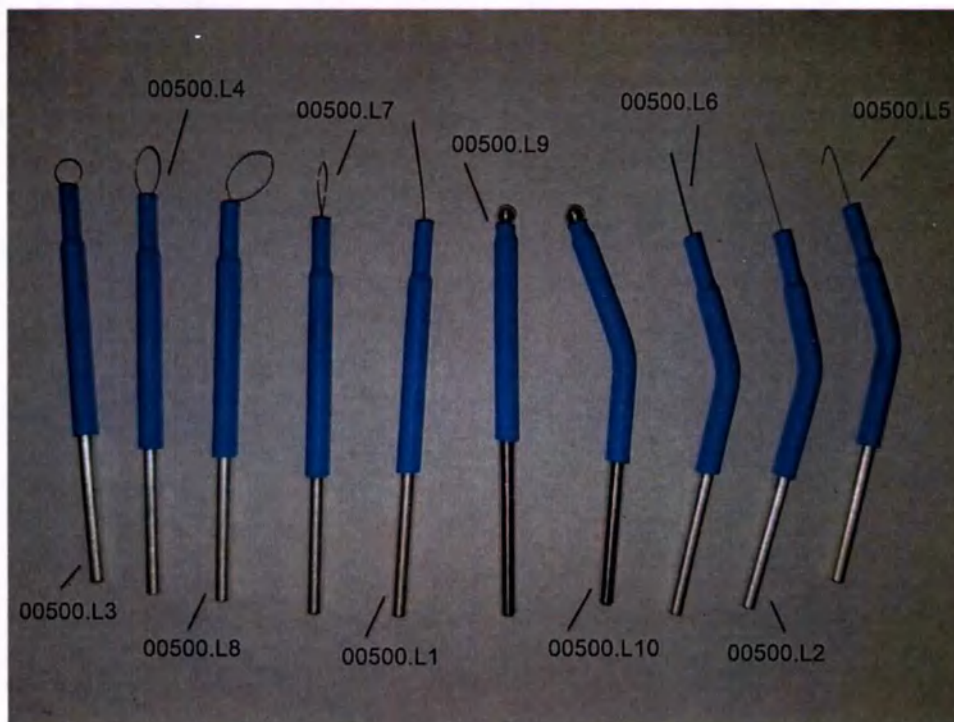

ЭЛЕКТРОД

REF 00500.00 Набор электродов (10 шт., длина стержня 50мм, посадочный диаметр 2,4мм)
 EAN13 8033638322277

LOT 65411 2019-03 2024-03

NON STERILE 30 CYCLES 121 °C 15 min AUTOCLAVE 134 °C 10 min AUTOCLAVE

CE 0051 **LED SpA** Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY


ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 50мм, посадочный диаметр 2,4мм) в составе:

- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1 – 1 шт.;
- Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2 – 1 шт.;
- Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3 – 1 шт.;
- Электрод -петля, диаметр 8мм, 00500.L4 – 1 шт.;
- Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5 – 1 шт.;
- Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6 – 1 шт.;
- Электрод-петля каплевидный, 00500.L7 – 1 шт.;
- Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8 – 1 шт.;
- Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9 – 1 шт.;
- Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10 – 1 шт.;

24. Набор электродов (10 шт., длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм), 00500.00, в составе:
- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1 – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2 – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3 – 1 шт.;
 - Электрод -петля, диаметр 8мм, 00500.L4 – 1 шт.;
 - Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5 – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6 – 1 шт.;
 - Электрод-петля каплевидный, 00500.L7 – 1 шт.;
 - Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8 – 1 шт.;
 - Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9 – 1 шт.;
 - Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10 – 1 шт.

Фото изделия и пример маркировки.

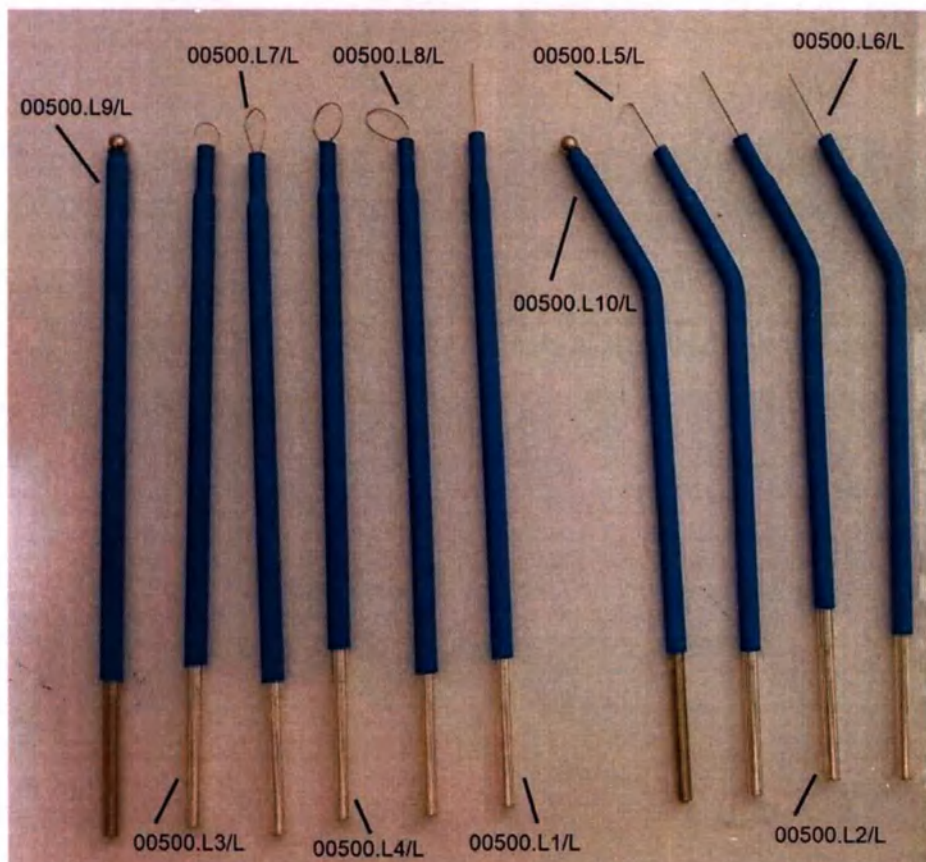

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 100мм, посадочный диаметр 2,4мм)

REF 00500.00/L

EAN13 8033638322215

LOT 65063

2019-01

2024-01

NON STERILE

30 CYCLES

136 °C AUTOCLAVE 20 min

136 °C AUTOCLAVE 10 min

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

QR code

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 100мм, посадочный диаметр 2,4мм) в составе:

Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1/L – 1 шт.;

Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2/L – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3/L – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4/L – 1 шт.;

Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5/L – 1 шт.;

Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6/L – 1 шт.;

Электрод-петля каплевидный, 00500.L7/L – 1 шт.;

Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8/L – 1 шт.;

Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9/L – 1 шт.;

Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10/L – 1 шт.

25. Набор электродов (10 шт., длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм), 00500.00/L, в составе:
- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1/L – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4/L – 1 шт.;
 - Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5/L – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля каплевидный, 00500.L7/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8/L – 1 шт.;
 - Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9/L – 1 шт.;
 - Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10/L – 1 шт.

Фото изделия и пример маркировки



26. Электрод проволоочный тонкий прямой, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L1;



27. Электрод проволоочный тонкий прямой, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L1/L;



28. Электрод проволоочный тонкий изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L2;



29. Электрод проволоочный тонкий изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L2/L;



30. Электрод-петля, диаметр 4мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L3;



31. Электрод-петля, диаметр 4мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L3/L;



32. Электрод-петля, диаметр 8мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L4;



33. Электрод-петля, диаметр 8мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L4/L;



34. Электрод-крючок изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L5;



35. Электрод-крючок изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L5/L;



36. Электрод проволоочный толстый изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L6;



37. Электрод проволоочный толстый изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L6/L;



38. Электрод-петля каплевидный, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L7;



39. Электрод-петля каплевидный, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L7/L;



40. Электрод-петля типа "лассо", длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L8;



41. Электрод-петля типа "лассо", длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L8/L;



42. Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L9;



43. Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L9/L;



44. Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L10;



45. Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L10/L;

46. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 180мм, 410-200-18.
Фото изделия и пример маркировки

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 180мм

REF 410-200-18

LOT 72304

2020-01

2025-01

NON
STERILE

30
CYCLES

133 °C
AUTOClave
20 min


133 °C
AUTOClave
10 min


CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 033638 323717

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в заглушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

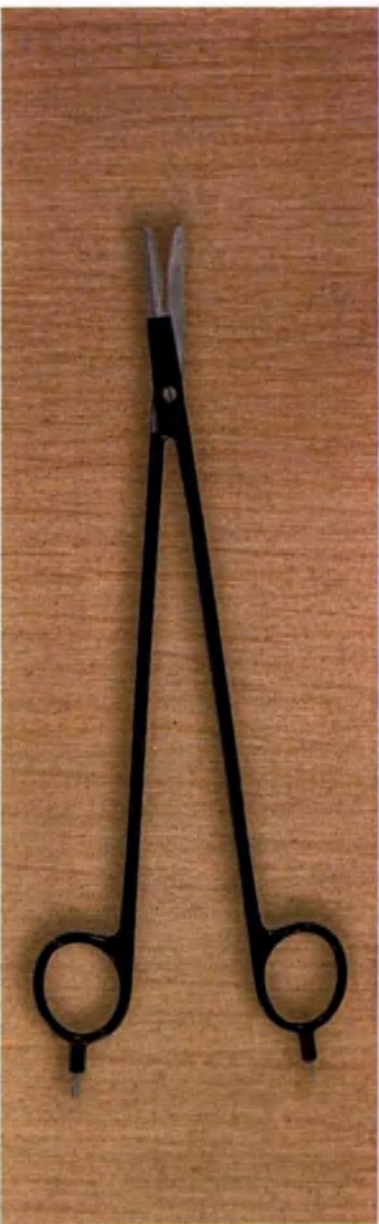

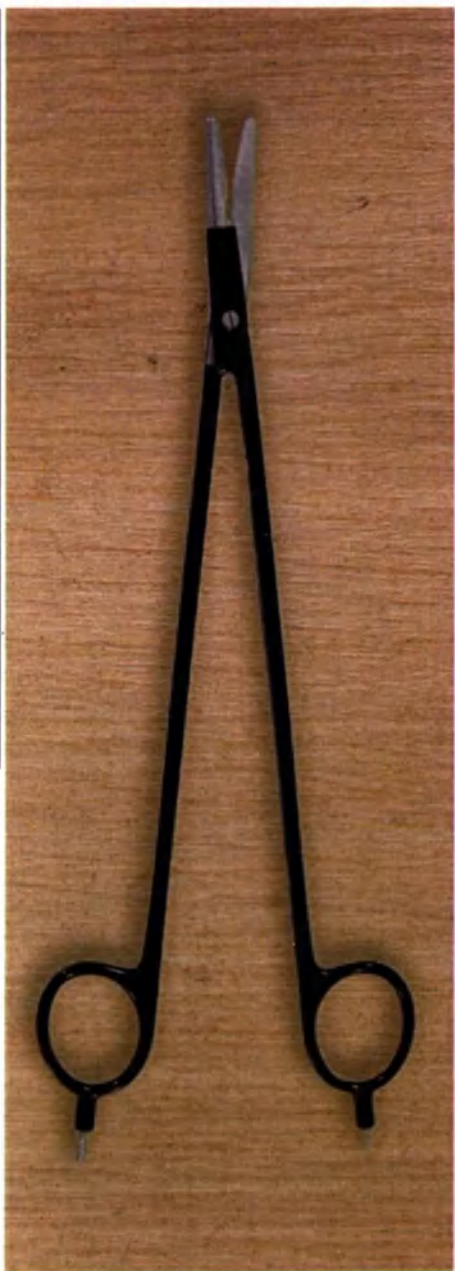

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм

REF 410-200-21

LOT 72305

2020-01

2025-01

NON
STERILE

30
CYCLES

131.9
AUTOClave
20 min

131.9
AUTOClave
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 033638 323717

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в заглушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

48. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм, 410-200-21.
Фото изделия и пример маркировки

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

Анаэробные биопольные лакокрасочные с ингибиторами для
предварительного разбавления 2:0-2:1, вязкость 230мПа

REF 410-200-23

LOT 72306

2020-01

2025-01

LED SpA Via Solciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0051

**NON
STIRARE**

**30
MIN**

350 g
20 mm

350 g
10 mm



8 433 638 237 11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от
интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени
подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный
осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует
использовать в случае наличия дефектов (трещин, коррозий или повреждений
поверхности). Для получения информации о технике безопасности в области
электроник необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой
ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо
очистить сплассирующие дезинфицирующие средства. Не рекомендуется
погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за
возникающих при этом окислений контактов и кристаллизации в запусках срок
службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть
диспергированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо
всегда заменять их новыми.

50. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 230мм, 410-200-23. Фото изделия и пример маркировки

51.



52. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм, 310-110-05. Фото изделия и пример маркировки



53. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши

шириной 0,5мм, 310-112-05. Фото изделия и пример маркировки



54. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-140-10. Фото изделия и пример маркировки



55. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-140-20. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

REF 310-142-10

LOT 61821

2018-06

2023-06

LED SpA Via Salsomaggi 40
04011 Argenta (LT) - ITALY

CE 0061

8 333 638 352 32

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или поврежденной изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с паровым воздействием. После использования необходимо очистить стерилизационным дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, порошок, из-за взаимодействия при этом возникает контакт и кристаллизация в загрузочный срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

56. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-142-10. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм

REF 310-142-20

LOT 61277

2018-05

2023-05

LED SpA Via Salsomaggi 40
04011 Argenta (LT) - ITALY

CE 0061

8 333 638 352 32

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или поврежденной изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с паровым воздействием. После использования необходимо очистить стерилизационным дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, порошок, из-за взаимодействия при этом возникает контакт и кристаллизация в загрузочный срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

57. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-142-20. Фото изделия и пример маркировки



**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

REF 310-180-10 Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 63924 2018-03 2023-03

NON STERILE 30 CYCLES AUTOCLAVE 20 min AUTOCLAVE 10 min

CE 0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 433638 323649

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в заглушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

58. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-180-10. Фото изделия и пример маркировки



**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

REF 310-180-20 Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм

LOT 64295 2019-02 2024-02

NON STERILE 30 CYCLES AUTOCLAVE 20 min AUTOCLAVE 10 min

CE 0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 433638 323656

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в заглушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

59. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-180-20. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-182-10 Пинцет биполярный байонетный изогнутый наружу с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 00634 2018-03 2023-03

LED SPA Via Salsavilla 40 04011 Asola (LT) - ITALY

CE 0081

8 633 638 32366 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большой или меньшей степени подвержены износу. Пользователю необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: изгибы или повреждения изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электротехники необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторе с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спорообразующим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку восстановление при этом окисления контактов и кристаллизация в заступах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

60. Пинцет биполярный байонетные изогнутые наружу с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-182-10. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-185-10 Пинцет биполярный байонетный изогнутый внутрь с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 00634 2018-03 2023-03

LED SPA Via Salsavilla 40 04011 Asola (LT) - ITALY

CE 0081

8 633 638 32367 0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большой или меньшей степени подвержены износу. Пользователю необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: изгибы или повреждения изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электротехники необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторе с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спорообразующим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку восстановление при этом окисления контактов и кристаллизация в заступах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

61. Пинцет биполярный байонетные изогнутые внутрь с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-185-10. Фото изделия и пример маркировки

БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

REF 310-510

LOT 74464

2020-12

2025-12

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

EAN13 8033638323687

314 °C
30 сек
10 мм

314 °C
30 сек
10 мм

NON STERILE

CE 0051

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электроинструментов необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить электроинструмент дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящее и дезинфицирующее средство, поскольку из-за возможной коррозии при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

62. Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-510. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

REF 310-550

LOT 76538

2021-04

2026-04

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

EAN13 8033638323694

314 °C
30 сек
10 мм

314 °C
30 сек
10 мм

NON STERILE

CE 0051

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электроинструментов необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить электроинструмент дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящее и дезинфицирующее средство, поскольку из-за возможной коррозии при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

63. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-550. Фото изделия и пример маркировки

БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый на 45° с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

REF 310-590

LOT 75102

2021-03

2026-03

134°C 10 min

134°C 20 min

30 cycles

NON STERILE

CE 0051


LED SpA Via Seicitalia 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

EUR13 803638323700

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Покупку необходимо проводить у лицензированных поставщиков и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (например, трещина или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электроинструментов необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизационным дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чашку и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

64. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый на 45°С с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-590. Фото изделия и пример маркировки



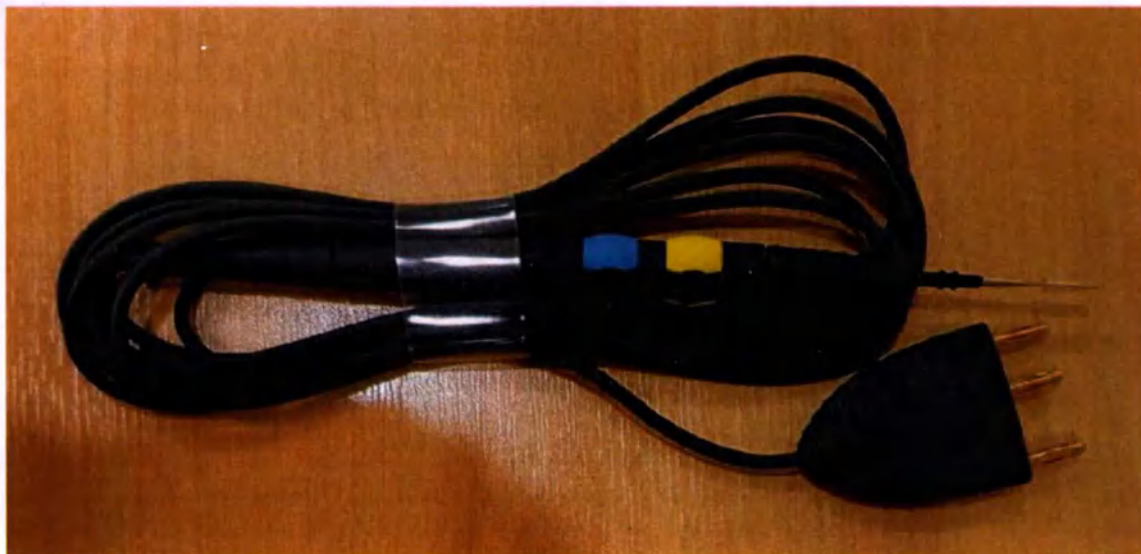

Ручка

REF	00205.00	Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)
LOT	76955	
	2021-06	
	2026-06	
CE	0051	

NON
STERILE

100
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

0 °C — +50 °C — 80% — 20%

8 0 3 3 6 3 8 3 2 1 2 2 5

65. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка

REF	00205.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)
LOT	67890	
	2019-07	
	2024-07	

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

66. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.40. Фото изделия и пример маркировки



Ручка

REF 00206.00 LOT 64900 2019-01 2024-01	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)
---	---

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

MADE IN ITALY

67. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00206.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)				
LOT 67891					
2019-07					
2024-07					
0051	NON STERILE	100 CYCLES	121 °C 250 °F 20 min AUTOCLAVE	134 °C 275 °F 10 min AUTOCLAVE	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					
0 °C +50 °C 20% 80%		8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 5 4			

68. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.40. Фото изделия и пример маркировки



Кабель					
REF 00402.04	Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм				
LOT 72504					
2020-01					
2025-01					
0051	NON STERILE	100 CYCLES	121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min	134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					
0 °C +50 °C 20% - 80%		 8 033638 323786			

69. Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм, 00402.04. Фото изделия и пример маркировки

Кабель

REF 00404.08

LOT 71642

2020-04

Совместим с электродами 5365A / 6429A, 00401.1000401.20

Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайного ожога:

- Кабель должен использоваться с электрофизиологическим аппаратом или принадлежностью в соответствии с действующими нормами.
- Для получения информации об использовании аппарата электрофизиологического и других необходимых принадлежностей следует обратиться к инструкциям.
- Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, емкостный эффект может вызвать ожог.
- При отсоединении кабеля от аппарата электрофизиологического не следует тянуть за провод, необходимо брать его непосредственно за предназначенный для подключения разъем.


CE 0051

ОЧИСТКА

Сразу после использования необходимо промыть проточной водой, затем погрузить на 45 минут в 2-процентный раствор обычного дезинфицирующего средства

LED SpA Via Seicitalia 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

70. Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.08. Фото изделия и пример маркировки

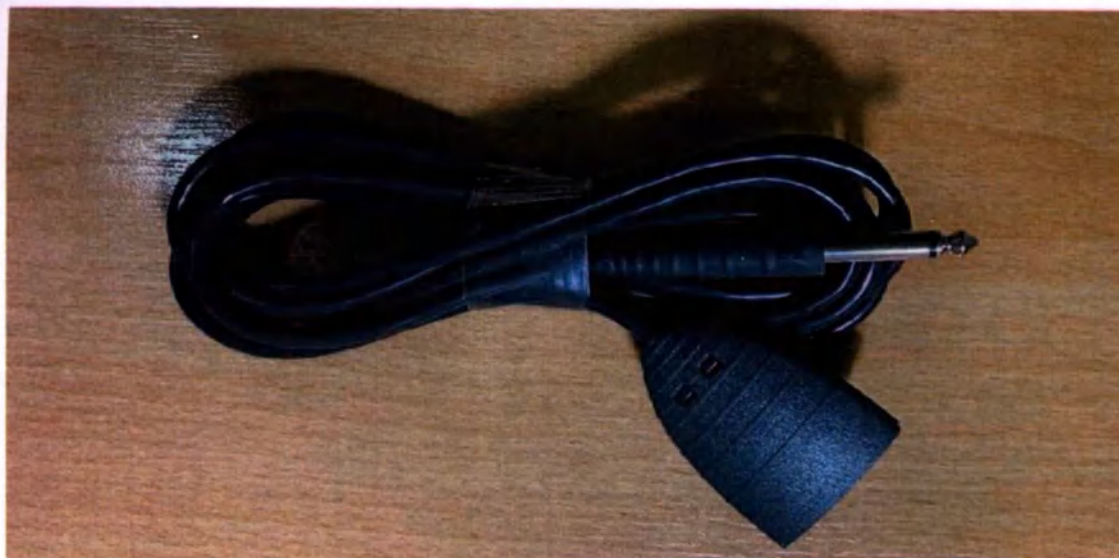

Кабель

REF 00404 09

LOT 71011

2020-02

Совместим с аппаратами S365A / 4429A, 00401, 1000401, 20


Кабель, электроизолируемый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с ТРЕ покрытием, длиной 3м со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм

100% TPE

100% TPE

100% TPE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

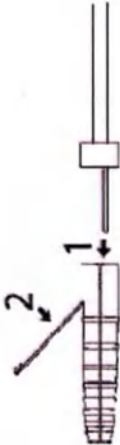


Самостоятельно не применять для подключения к аппарату электрода пациента

• Кабель должен использоваться с электроизолирующим аппаратом и/или приспособлением в соответствии с инструкциями к ним

• Для получения информации об использовании аппарата электроизолирующего в соответствии с инструкциями к нему обратитесь к инструкции и к аппарату

• Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, это может вызвать ожог

• При отсоединении кабеля от аппарата электроизолирующего не следует тянуть за провод, необходимо брать за рукоятку или за приспособление для подключения разъем

CE 0051

LED SpA Via Salsavilla 40
04011 Arbia (IT) - ITALY

00404-09-10

02-03-2019

71. Кабель автоклавируемый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с ТРЕ покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.09. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00411.00 LOT 66009 2019-03 2024-03	Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента – плоский разъем (European Flat plug)
---	---

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8
0 3 3 6 3 8 3 2 1 2 4 9

72. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента – плоский разъем (European Flat plug), 00411.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00412.00

LOT 63478



2018-09




2023-09

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа «банан» 4 мм (4mm 2-Banana plug), со стороны инструмента - плоский разъем (European Flat plug)



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

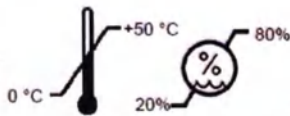

73. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа «банан» 4 мм (4mm 2-Banana plug), со стороны инструмента - плоский разъем (European Flat plug), 00412.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00414.00

LOT 72505

 2020-01

 2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug)


0051


NON
STERILE



100
CYCLES


121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min


134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min



 **LED SpA** Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

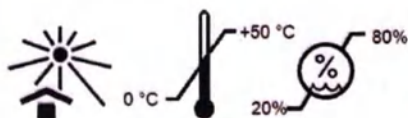

74. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug), 00414.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00418.00

LOT 72514

2020-01


2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм

0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

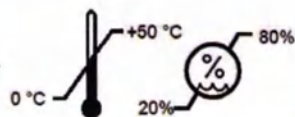

75. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм, 00418.00. Фото изделия и пример маркировки

Генеральный директор

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

П. В. Гижинский

Прошито и пронумеровано

44 / корп. гетте
листа (ов).

