

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

Аппарат электрохирургический высокочастотный Surtron HP

Приложение 1

Фотографические изображения

(инструменты электрохирургические, входящие в стандартную комплектацию и в состав медицинского изделия опционально (с пометкой «при необходимости»))

Производства LED S.p.A., Италия

2024 г.

Электрод _____
нейтральный _____

REF 00401.03
LOT 68787
2019-09

Электрод пациента возвратный нейтральный
стальной 240x160мм, с кабелем длиной 3м,
разъем со стороны генератора - типа Jack
Ø6,3мм, автоклавируемый

151 °C
250 °F
AUTOClave
20 min

154 °C
275 °F
AUTOClave
10 min

100 cycles

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подверглись накоплению жира или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.

8 0 3 3 6 3 8 3 2 1 4 4 7

MA04-01-03_L2 ed. 10-2017

(1) - зона терапии

Если аппарат электрохирургический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрохирургического, при исправном на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Sciacca 40
04011 Aversa (LT) - ITALY





1. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый, 00401.03. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод нейтральный

REF 6420A

Электрод пациента возвратный нейтральный

LOT C2417

Нейтральный стальной 240x160мм с язычковым соединением

2017-04

Срок годности с 00004.09

121 °C
250 °F
ПРОТЯЖИ
20 лет

134 °C
275 °F
ПРОТЯЖИ
10 лет

Перед первым использованием тщательно очистите защитные пленки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск получения ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо вентилируемой поверхности, как можно ближе к операционному участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с любыми выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подверглись каутизации жидкостью или имеют подкожную жировую ткань. Части тела должны быть без волос, ногтей и чистых. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электрода.




MA3365_12 ed. 10-2017

1) - зона термостата

CE 0051

LED SpA/Via Selcastella 40
04011 Agrate (L.T) - ITALIA



* Если активный электродимпульсный не приводит желаемой аффиции, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Проверкой является проверка мощности или непрерывной работы электродимпульсного аппарата, при нахождении на нормальном значении выходной мощности, может быть установлен контакт электрода пациента возвратного нейтрального или с его непрерывное использование.

2. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм с язычковым соединением, 6429A. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод нейтральный

REF 00401.10
LOT 68417
2019-10
2024-10

Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с TPE покрытием 210x120мм с язычковым соединением

121 °C
35.0 °F
АВТОСТАВ
20 min

134 °C
273.5 °F
АВТОСТАВ
10 min

100 cycles

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризированной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, пролезнами, рубцами и частями тела, которые подвержены накоплению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.

(1) - зона терапии

M00401-10_10 04.03.2019

• Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электрофизиологического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

**LED SpA Via Seicatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY**

CE 0051

3. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с TPE покрытием 210x120мм с язычковым соединением, 00401.10. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

REF 00401.20
LOT 68418
2019-10
2024-10

Электрод пациента возвратный нейтральный
нейтральный стальной с ТРЕ покрытием
разделенный 210x120мм с язычковым соединением

350°C
20 min
334°C
10 min
100 cycles

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ошибок

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо вентилируемой поверхности, как можно ближе к операционному участку в плотном прилегании к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подвержены нападению жидкостей или имеют повышенную жирность тканей. Нельзя трогать датчик без перчаток, сушить и чистить. Не использовать электрод для оказания первой помощи. Не использовать электрода для оказания первой помощи.

MA0401-20_01 n. 03-2019




(1) - зона терапии

CE 0051

LCD SpA Via Scatolaccia 40
04011 April (LT) - ITALY

Если аппарат электрокардиографический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня сигнала могут быть некорректная работа электрокардиографического аппарата, при настройке на журнальное значение высокой амплитуды, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное размещение




4. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с ТРЕ покрытием разделенный 210x120 мм с язычковым соединением, 00401.20. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-110 *Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323373

LOT 68346 2019-09 2024-09

CE 0051 **LED SpA Via Selciatella 40**
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

5. Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-110. Фото изделия и пример маркировки.



Электрод

REF 152-112 *Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323380

LOT 61825 2018-08 2023-08

CE 0051 **LED SpA Via Selciatella 40**
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

6. Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-112. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-115 *Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323403

LOT 65348 2019-03 2024-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

7. Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-115. Фото изделия и пример маркировки




ЭЛЕКТРОД

REF 152-120 *Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323410

LOT 68930 2019-10 2024-10

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8. Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-120. Фото изделия и пример маркировки.

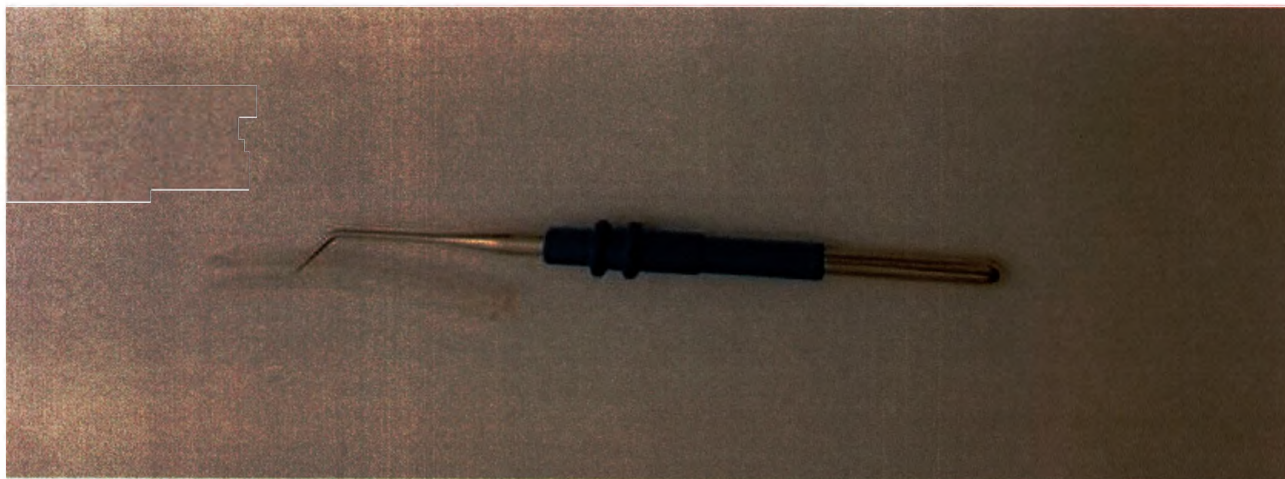


ЭЛЕКТРОД	
REF 152-122	Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323427	
LOT 60945	2018-03 2023-03
NON STERILE	121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min
CE 0051	134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY	
QR CODE	

9. Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-122. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-125	Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323434	
LOT 60946	2018-03 2023-03
NON STERILE	121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min
CICLI 30 CYCLES	134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY
QR CODE	

10. Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-125. Фото изделия и пример маркировки.

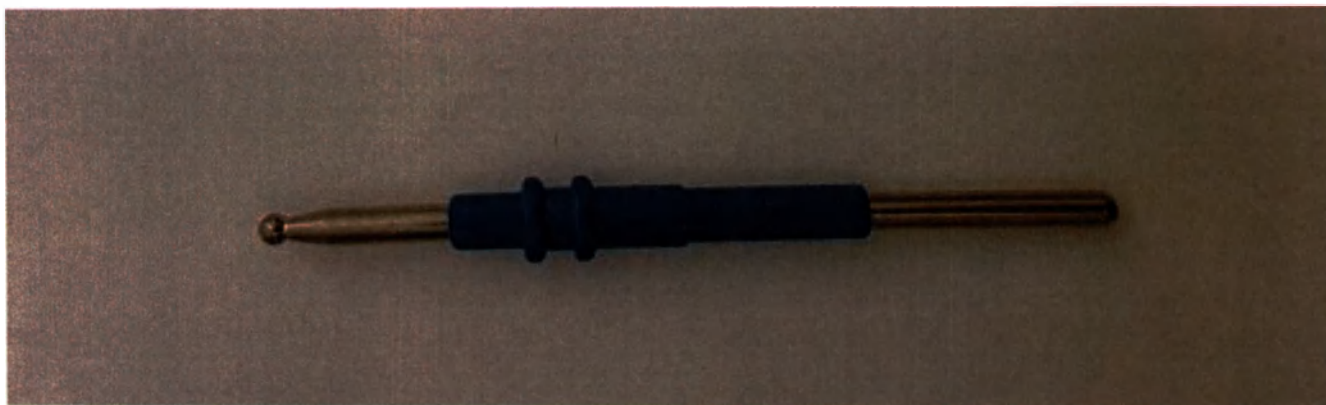

ЭЛЕКТРОД

REF 152-130 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323441

LOT 61022 2018-08 2023-08

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

11. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-130. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-132 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323458

LOT 65402 2019-03 2024-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

12. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-132. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-140 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323465

LOT 60949  2018-03  2023-03

  **LED SpA** Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY 

13. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-140. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-142 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323472

LOT 60950  2018-03  2023-03

  **LED SpA** Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY 

14. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-142. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-145

EAN13 8033638323489

LOT 60951

*Электрод-шар, длина стержня 140мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*

2018-03

2023-03

NON
STERILE

30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

15. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-145. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-150

EAN13 8033638323496

LOT 68516

*Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм*

2019-10

2024-10

NON
STERILE

30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

16. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-150. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-152 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323502

LOT 60953 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

17. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-152. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-160 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323519

LOT 60954 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

18. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-160. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-162 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323526

LOT 60955 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

19. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-162. Фото изделия и пример маркировки




ЭЛЕКТРОД

REF 152-165 *Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323533

LOT 60956 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

20. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-165. Фото изделия и пример маркировки

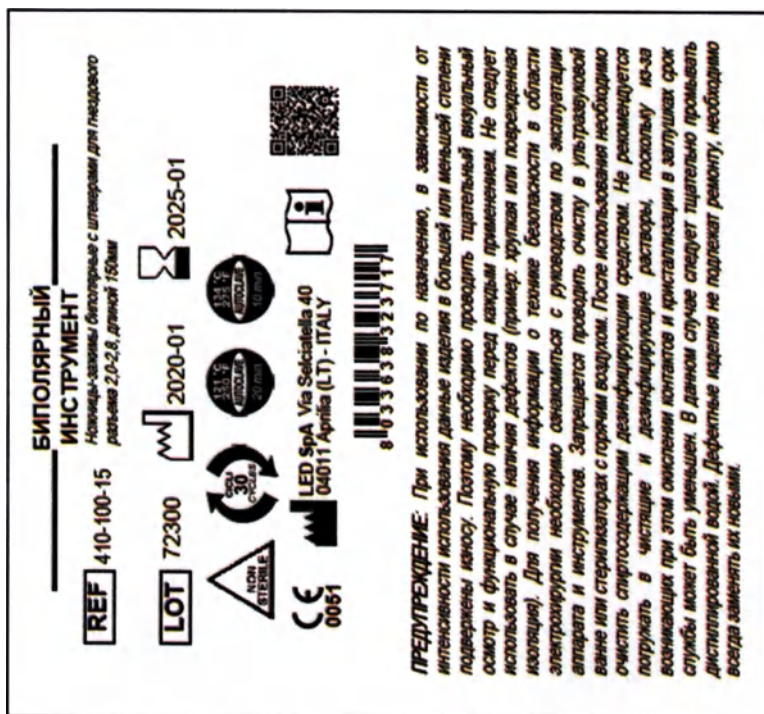

21. Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длиной 190мм, 410-100-15.
 Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длиной 190мм

REF 410-100-19

LOT 72302

2020-01

2025-01

LED SpA Via Salsatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0061

NON STERILE

30

133.3

134.3

QR CODE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить регулярный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещины, деформации, повреждения изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить операции в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спайросодержащими дезинфицирующими средствами. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, пасты или ультразвуковые ванны при этом омытии контактов и присоединения в аппарате отслужившей может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

22. Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длиной 190мм, 410-100-19.
Фото изделия и пример маркировки

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**
Ножницы биполярные изогнутые с щетками для
гнездового разъема 2,0-2,8, длина 180мм

REF 410-200-18

LOT 72304

2020-01

2025-01

30
CYCLES

**NON
STERILE**

CE
0051


**LED SpA Via Selcitalia 40
04011 Aprila (LT) - ITALY**

8 0 3 3 6 3 8 3 2 3 1 1


PRECAUTIONE: При использовании по назначению, в зависимости от
интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени
подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный
осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует
использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная
изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области
электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой
ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо
очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется
погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за
возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в заступах срок
службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать
дисциplinированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо
всегда заменять их новыми.

23. Ножницы биполярные изогнутые с щетками для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 180мм, 410-200-18.
Фото изделия и пример маркировки



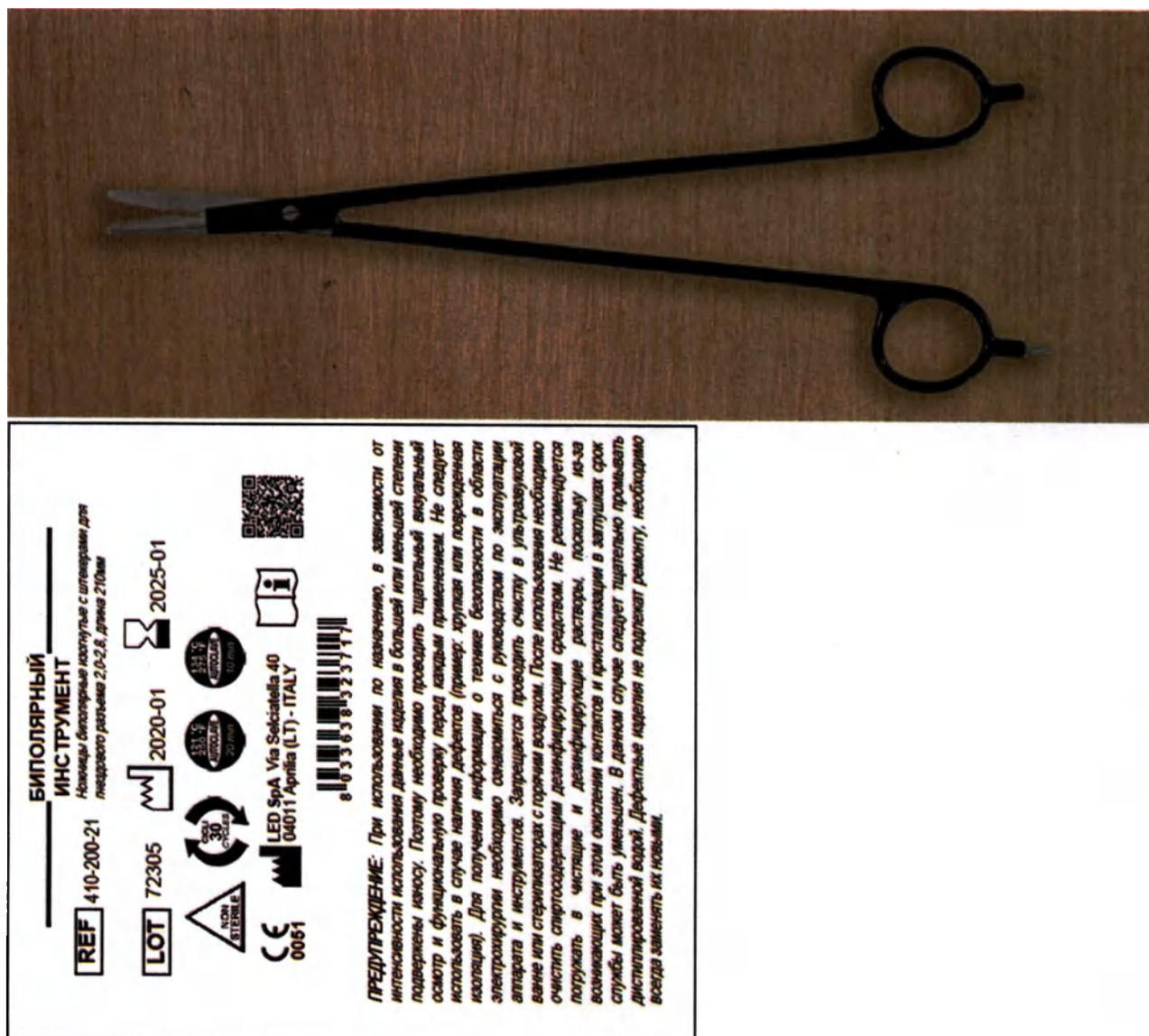

24. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм, 410-200-21.
 Фото изделия и пример маркировки

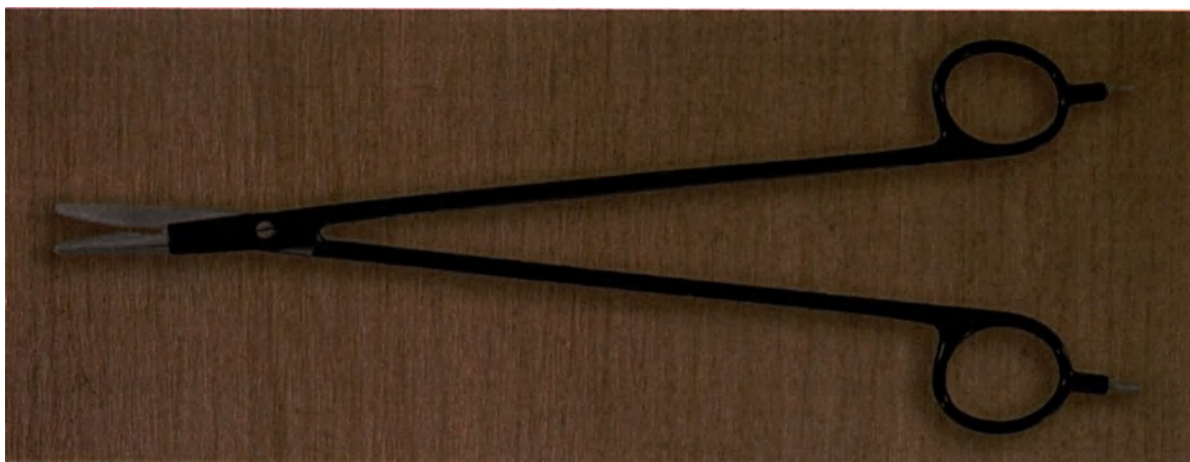

БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

Инструмент биполярный изогнутый с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 230мм

REF 410-200-23

LOT 72306

2020-01

2025-01

CS


LED SpA Via Salsomaggi 40

40011 Gattatico (R. T.) - ITALY

00001

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в соответствии с инструкцией, изделие должно работать в безопасной или меньшей степени напряженности. Любая модификация, изменение конструкции, нарушение целостности и функционирования инструмента, а также любые повреждения. Не следует использовать в случае наличия дефектов функционирования или повреждения конструкции. Для получения информации о наличии безопасности в области использования изделия необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и инструкциями. Запрещается проводить работу в напряженном режиме или с перегрузками с целью снижения риска. После использования необходимо очистить инструмент от загрязнений. Не рекомендуется использовать инструмент в условиях повышенной влажности, температуры, давления, вибрации или других факторов, которые могут повлиять на его функциональность. В случае возникновения неисправности или повреждения инструмента, необходимо немедленно прекратить его использование и обратиться к производителю за консультацией.

25. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 230мм, 410-200-23. Фото изделия и пример маркировки

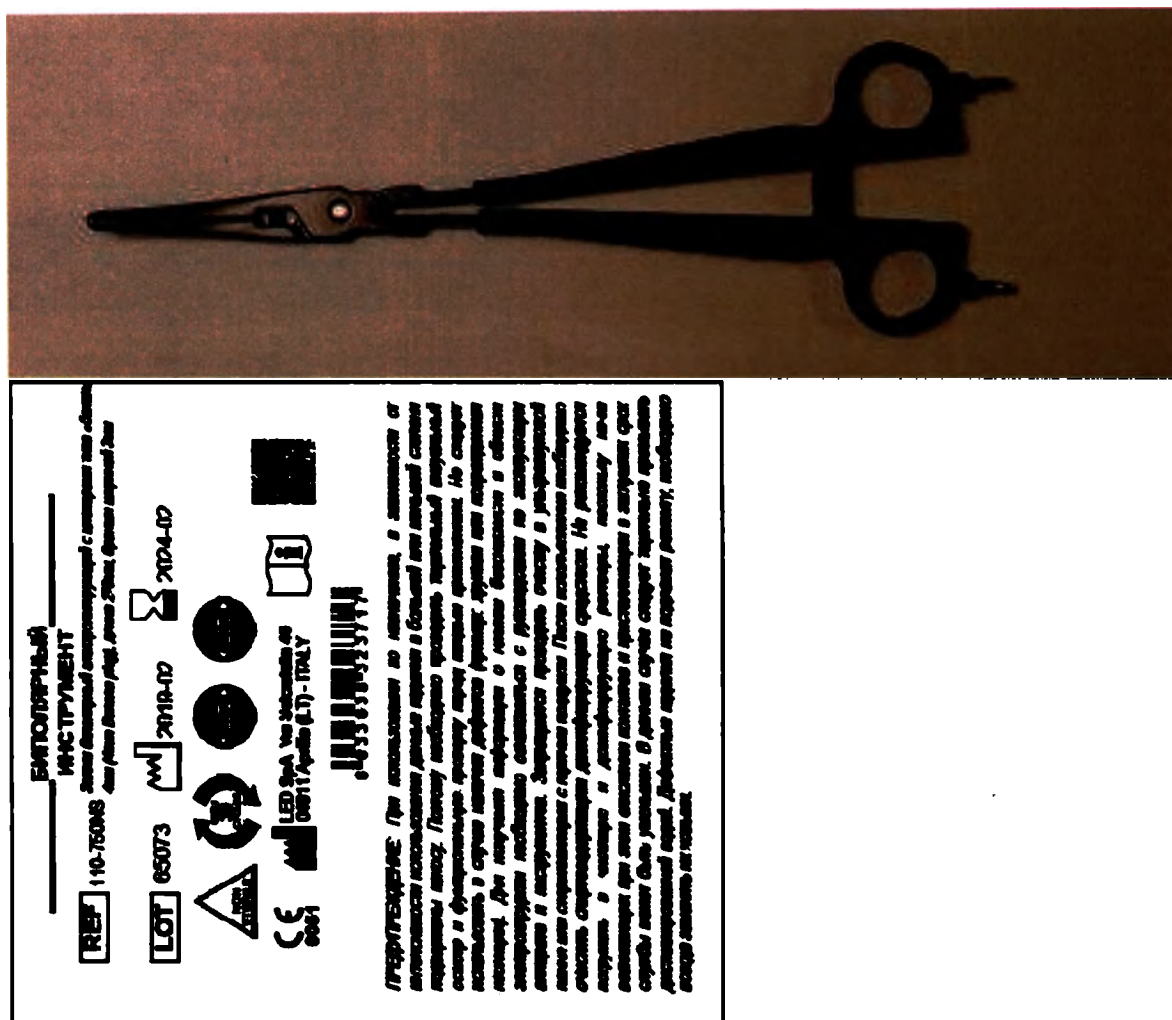

26. Зажим биполярный электролигирующий с штекерами типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), длина 270мм, бранши шириной 3мм, 110-750NS. Фото изделия и пример маркировки


БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

REF 110-760NS Зажим биполярный электролигирующий с штекерами типа «банан»
Длина 170мм, бранши шириной 2мм


LOT 63151 2018-10 2023-10

CE LED 904 V₀ Schindler 0
04011 April (S.T.) - ITALY


PERFORMANCE При использовании по назначению, в зависимости от
интенсивности использования данные маркировки в течение 10 лет активной службы
сохраняются неизменными. Любая маркировка, нанесенная на изделие, является
основанием для идентификации изделия. Не следует
использовать в случаях, когда маркировка не соответствует требованиям
маркировки. Для получения информации о товаре необходимо в области
информации, нанесенной на изделие, с помощью сканера по штрих-коду
получить информацию. Запрещается применять сканер в условиях
высокой температуры, влажности, пыли, грязи. После использования изделия
следует очистить от загрязнений. Не рекомендуется использовать изделие
в условиях повышенной влажности, пыли, грязи. Не рекомендуется
использовать изделие для измерения температуры, влажности, пыли, грязи.
В данном случае следует применять изделие для измерения температуры,
влажности, пыли, грязи. Дефектная маркировка не подлежит ремонту, изделие
следует заменить на новое.

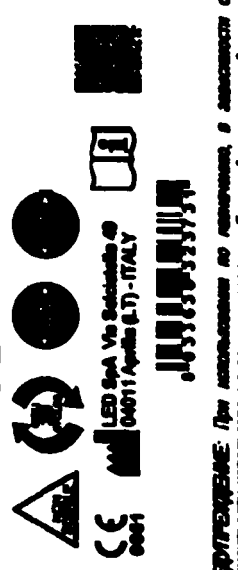


28. Зажим биполярный электролигирующий с штекерами типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), длина 170мм, бранши шириной 2мм, 110-760NS. Фото изделия и пример маркировки

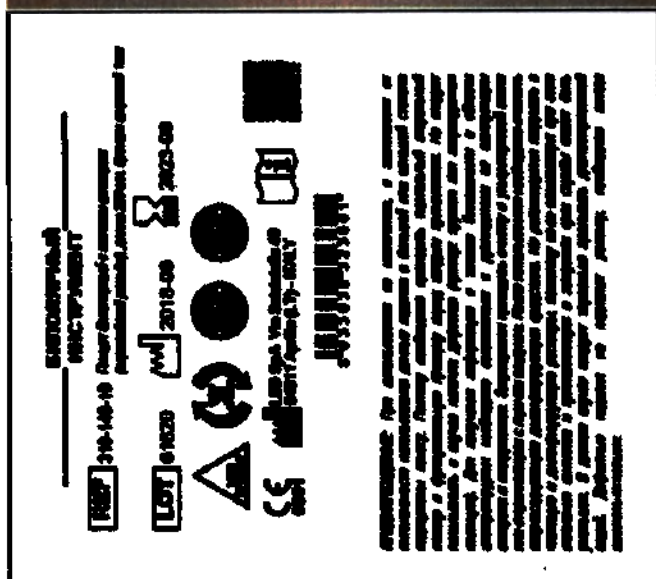


31. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1 мм, 310-140-10. Фото изделия и пример маркировки

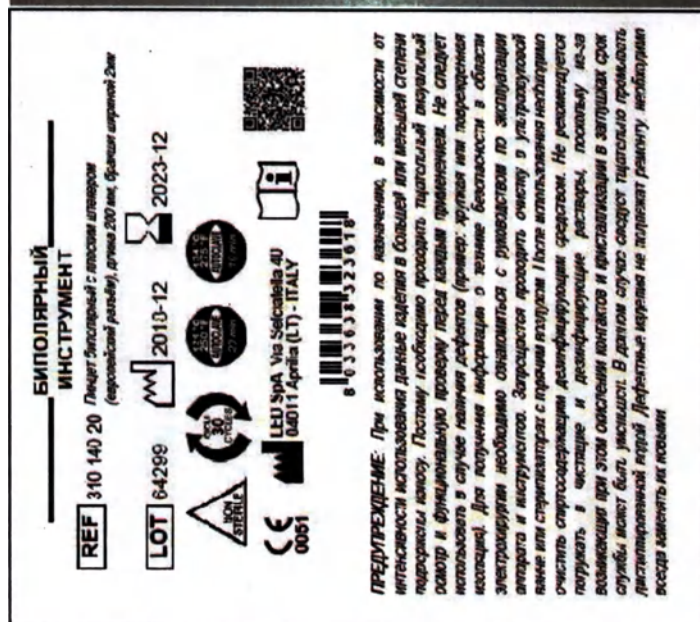


32. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2 мм, 310-140-20. Фото изделия и пример маркировки

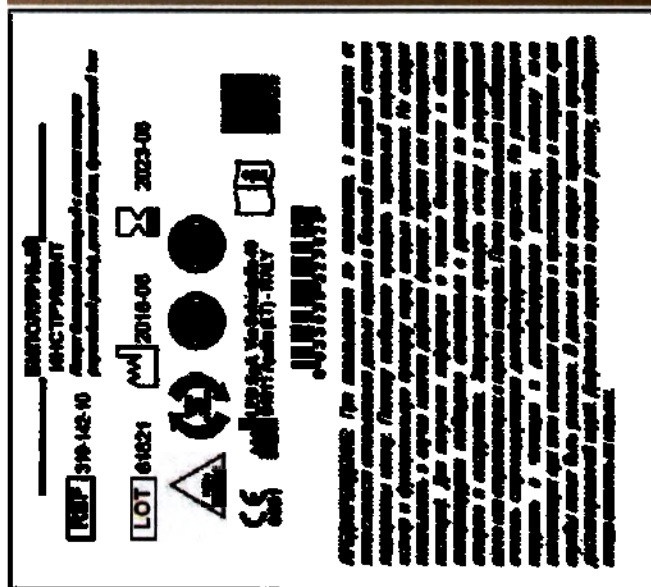

33. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-142-10. Фото изделия и пример маркировки

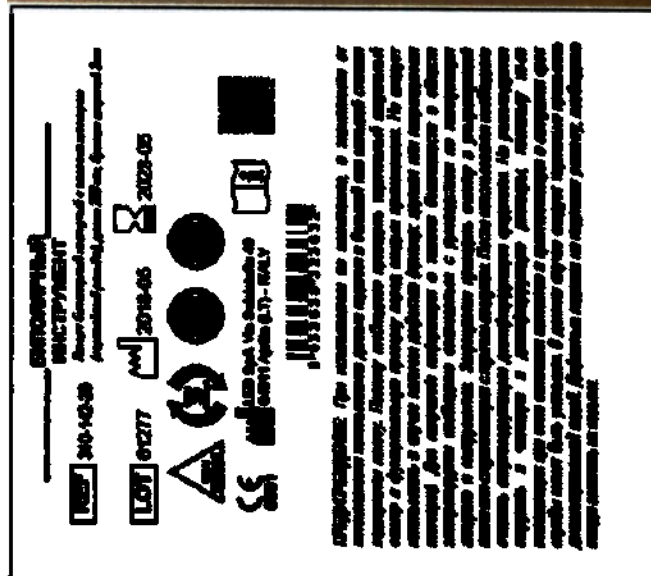

34. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-142-20. Фото изделия и пример маркировки

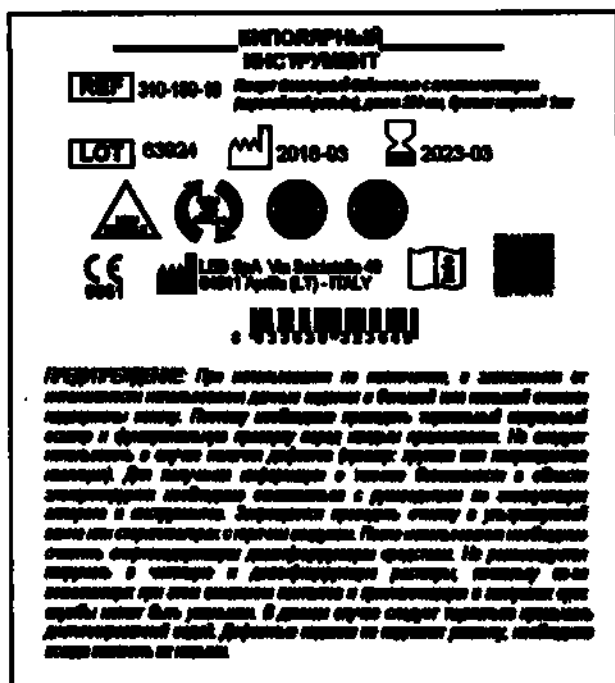

35. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-180-10. Фото изделия и пример маркировки



36. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-180-20. Фото изделия и пример маркировки



37. Пинцет биполярный байонетные изогнутые наружу с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-182-10. Фото изделия и пример маркировки



38. Пинцет биполярный байонетные изогнутые внутрь с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-185-10. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

REF 310-510

LOT 74484

2020-12 2025-12

134°C 30min

134°C 30min


NON STERILE

CE 0061

LED SpA Via Seicatalia 40 04011 Aprila (LT) - ITALY EAN13 803363323587

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо периодически проверять функциональный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещины, изгибы или повреждение изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизовать с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спайродержатель дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за коррозии при этом окислении контактов и кристаллизации в запущенных сроках службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

39. Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-510. Фото изделия и пример маркировки

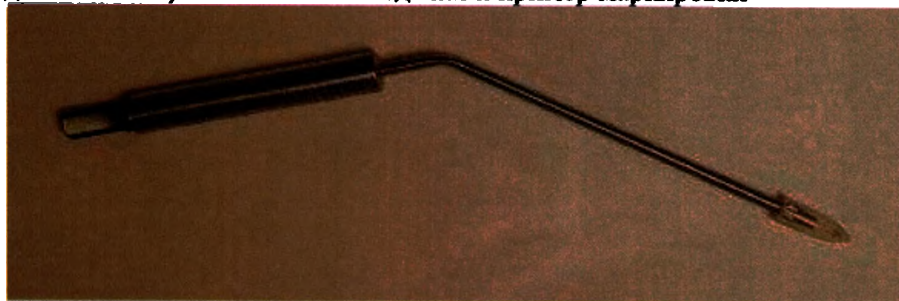

БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

REF 310-550

LOT 76538

2021-04 2026-04

134°C 30min

134°C 30min

NON STERILE

CE 0061

LED SpA Via Seicatalia 40 04011 Aprila (LT) - ITALY EAN13 803363323594

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо периодически проверять функциональный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещины, изгибы или повреждение изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизовать с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спайродержатель дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за коррозии при этом окислении контактов и кристаллизации в запущенных сроках службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

40. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-550. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый на 45°С с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

REF 310-590

LOT 75102

2021-03

2026-03

LED SpA Via Seiciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0051

314 °C
AUTOClave
20 min

314 °C
AUTOClave
10 min

NON STERILE

30 cycles

QR code

Предупреждение: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Покупку необходимо проводить у официального дистрибутора и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещины, изгибы или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электроинструментов необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спайтеростерилизацию дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислений контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

41. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый на 45°С с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-590. Фото изделия и пример маркировки



Электрод аргонный

Электрод аргонный коагуляционный, длина 75мм, посадочный диаметр 4мм

REF 00420.10

LOT 68933

2019-10

2024-10

LED SpA Via Seiciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE

NON STERILE

314 °C
AUTOClave
20 min

314 °C
AUTOClave
10 min

QR code


0 °C

20%



80%

Barcode: 8 033638 324561


42. Электрод аргонный коагуляционный, длина 75мм, посадочный диаметр 4мм, 00420.10. Фото изделия и пример маркировки

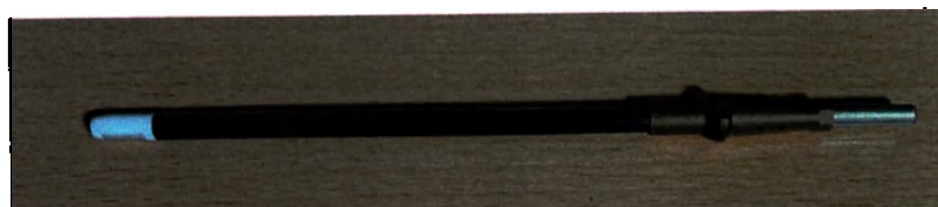

43. Электрод аргоновый коагуляционный, длина 150мм, посадочный диаметр 4мм, 00420.12. Фото изделия и пример маркировки

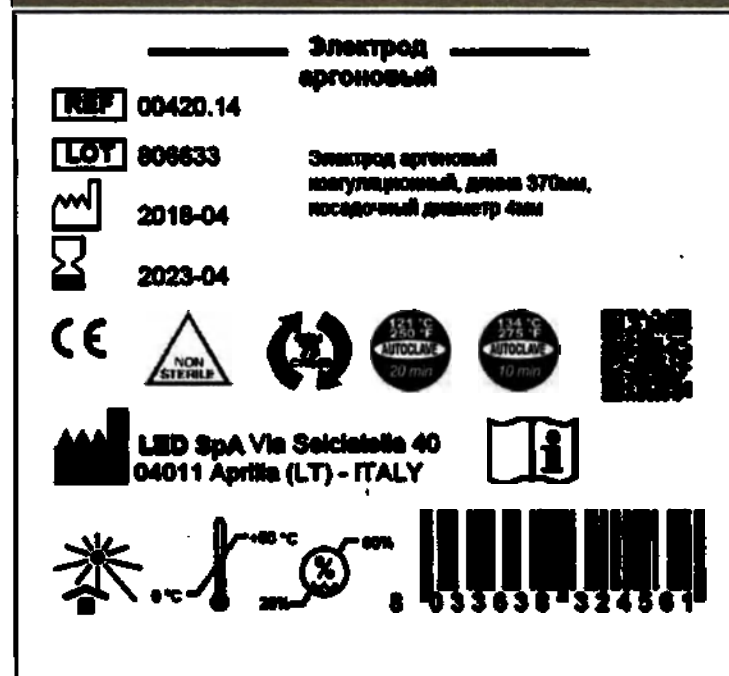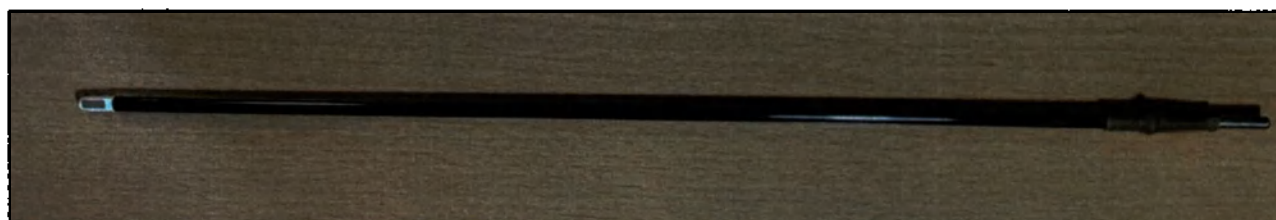

44. Электрод аргоновый коагуляционный, длина 370мм, посадочный диаметр 4мм, 00420.14. Фото изделия и пример маркировки

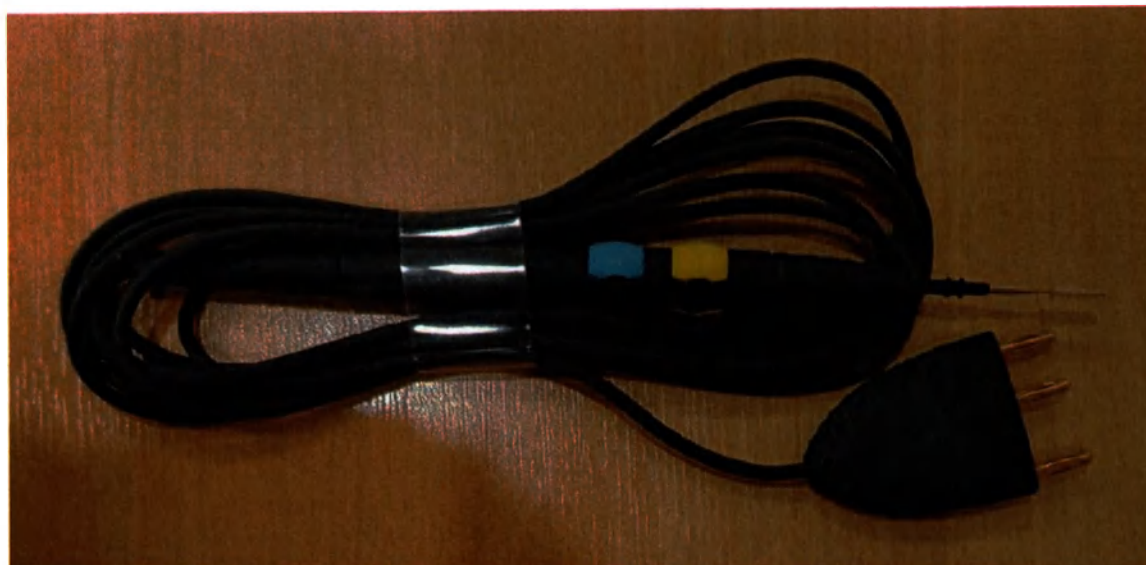

Ручка				
REF 00205.00	Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)			
LOT 76955				
2021-06				
2026-06				
0051				
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY				
0 °C +50 °C 20% 80%		 8 033638 321225		

45. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00205.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)				
LOT 67890					
2019-07					
2024-07					
0061					
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					
0 °C — +50 °C 20% — 80%		8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 6 1			

46. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.40. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00206.00	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)				
LOT 64900					
2019-01					
2024-01					
0051	NON STERILE	100 CYCLES	121 °C 250 °F 20 min	134 °C 275 °F 10 min	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY		MADE IN ITALY			
0 °C +50 °C 20% 80%		8 033638 321232			

47. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00206.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)				
LOT 67891					
2019-07					
2024-07					
0051					
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					
0 °C	+50 °C	20%	80%		
				8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 5 4	

48. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.40. Фото изделия и пример маркировки



**Ручка
аргоновая**

REF 00420.00 LOT 68941 2019-10 2024-10 	Ручка электрохирургическая многофункциональная монополярная с переключателем для применения аргона для подключения электродов аргоновых, с кабелем длиной 3,5м, штекер типа Luer Lock для подключения к разъему выхода аргона, разъем со стороны генератора - 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)	
---	--	--------------

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 6 1

49. Ручка электрохирургическая многофункциональная монополярная с переключателем для применения аргона для подключения электродов аргоновых, с кабелем длиной 3,5м, штекер типа Luer Lock для подключения к разъему выхода аргона, разъем со стороны генератора - 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00420.00. Фото изделия и пример маркировки



Кабель					
REF 00402.04	Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм				
LOT 72504					
2020-01					
2025-01					
0051	NON STERILE				
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					
0 °C +50 °C 20% 80%		 8 0 3 3 6 3 8 3 2 3 7 8 6			

50. Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм, 00402.04. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

REF 00404.08 Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack 06,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения

LOT 71642

2020-04

Совместим с аппаратами 53654 / 6429A, 60401, 6000401.20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

8 93363 03253

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных случаев:

- Кабель должен использоваться с электрофизиологическим аппаратом и/или принадлежностями в соответствии с действующими нормами.
- Для получения информации об использовании аппарата электрофизиологического и других необходимых принадлежностей следует обратиться к инструкции.
- Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, электромагнитный эффект может вызвать ожоги.
- При использовании кабеля от аппарата электрофизиологического не следует тянуть за провод, необходимо брать за него непосредственно за предначиненный для подключения разъем.

ОЧИСТКА

Сразу после использования необходимо промыть проводной вход, затем погрузить на 45 минут в 2-процентный раствор общего дезинфицирующего средства

CE 0051

LED 6mA Via Seisitalia 40

040111 Aprilia (LT) - ITALY

00404.08_10 ed. 03-2019

51. Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack 06,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.08. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

REF 00404.09

LOT 71011

2020-02

Совместим с аппаратами S365A / 6429A, 60481, 10000401, 20

Кабель, электроламинируемый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - штекер Jack Ø6,3мм





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Следующие меры предосторожности являются частью процедуры использования:

- Кабель должен использоваться с электроламинируемым электродом.
- Для получения информации об использовании аппарата электроламинируемого типа, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя и инструкции.
- Не следует использовать проводные компоненты кабелей с открытой проводкой, электродами, электродами.
- При использовании кабеля от аппарата электроламинируемого не следует использовать лишний кабель, поскольку это может привести к повреждению кабеля.

Модель: 00404.09.10

04.03.2019

52. Кабель автоклавируемый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.09. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00411.00

LOT 66009




2019-03



2024-03



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

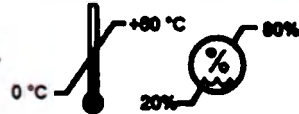

53. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента – плоский разъем (European Flat plug), 00411.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00412.00

LOT 63478



2018-09




2023-09

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа «банан» 4 мм (4mm 2-Banana plug), со стороны инструмента - плоский разъем (European Flat plug)

CE
0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

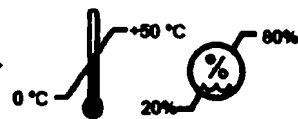

54. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа «банан» 4 мм (4mm 2-Banana plug), со стороны инструмента - плоский разъем (European Flat plug), 00412.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00413.00

LOT 62264

 2018-06

 2023-06

Кабель автоклавируемый для подключения зажима биполярного электролигирующего, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовой разъем 4 мм для зажима биполярного электролигирующего

CE
0051

 NON
STERILE

 100
CYCLES

 121 °C
250 °F
20 min

 134 °C
275 °F
10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C — +50 °C
20% — 80%



55. Кабель автоклавируемый для подключения зажима биполярного электролигирующего, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовой разъем 4 мм для зажима биполярного электролигирующего, 00413.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00414.00 Кабель автоклавируемый для
подключения биполярных инструментов,
длиной 3м: со стороны аппарата - 2х
LOT 72505 контактный штекер типа Pin Distance
29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со
2020-01 стороны инструмента - 2х штырьковый
2025-01 разъем (USA 2-Pin plug)



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



56. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug), 00414.00. Фото изделия и пример маркировки




КАБЕЛЬ

REF	00415.00	Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов END01 (F4-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовые разъемы 4 мм и 2-2,8 мм
LOT	72508	
	2020-01	
	2025-01	



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

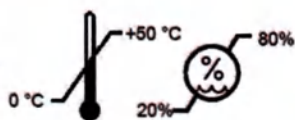

57. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов END01 (F4-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовые разъемы 4 мм и 2-2,8 мм, 00415.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00418.00 Кабель автоклавируемый для
подключения биполярных инструментов
LOT 72514 SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со
стороны аппарата - штекер 2-х
штырьковый 4 мм (на расстоянии 29
мм), со стороны инструмента - два
гнездовых разъема 2-2,8 мм




2020-01



2025-01



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

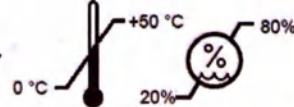

58. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм, 00418.00. Фото изделия и пример маркировки

Генеральный директор

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

Л.В.Гижинс

Прошито и пронумеровано

43/соедин

листа (ов).

