

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

Аппарат электрохирургический высокочастотный

Surtron Touch HP

Приложение 1

Фотографические изображения

(инструменты электрохирургические, входящие в стандартную комплектацию и в состав медицинского изделия опционально (с пометкой «при необходимости»))

Производства LED S.p.A., Италия

2024 г.

1. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый, 00401.03. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод нейтральный

REF 00401.03

LOT 68787

 **2019-09**

*Электрод пациента возвратный нейтральный
стальной 240x160мм, с кабелем длиной 3м,
разъем со стороны генератора - типа Jack
Ø6,3мм, автоклавируемый*

121 °C
250 °F
AUTOClave
20 min

134 °C
275 °F
AUTOClave
10 min

100
cycles

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризированной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подвергнуты накоплению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.



8 033638 321447



(1) - зона терапии

IA00401-03_r2 ed. 10-2017

- Если аппарат электрохирургический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрохирургического, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

 **LED SpA** Via Seiciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY







Электрод
нейтральный

REF 6420A
LOT C2417
2017-04

Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм с язычковым соединением

Срок годности с 00404.08

Параметры:
121 °C
250 °C
134 °C
275 °C
20 min
10 min

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым использованием тщательно очистить защитные пленки

Специальные меры предосторожности снижают риск лучевой овердозы

• Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо вентилируемой поверхности, как можно ближе к операционному участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, пролезнами, рубцами и частями тела, которые подвержены венозному застою или имеют подкожную жировую ткань. Частички тела должны быть без волос, грязи и чистой. Не используйте электрод для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электрода.

8 03 638 32223

LA3365_12 ed. 10-2017

(1) - зона терапии

Если внешний маркировочный код не указывает на наличие дефекта, следует проверить электрод пациента возвратного нейтрального. Проверка должна включать проверку на наличие дефектов или повреждений. Проверка должна включать проверку на наличие дефектов или повреждений. Проверка должна включать проверку на наличие дефектов или повреждений.

CE 0051

LED SpA Via Settebello 40
04011 Agrate (LT) - ITALY

2. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм с язычковым соединением, 6429A. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с TRE покрытием 210x120мм с язычковым соединением

REF 00401.10
LOT 68417
2019-10
2024-10

124 °C
250 °F
AUTOCLEAR
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLEAR
10 min

100 cycles

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подвержены накоплению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Чисть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электрода.



8 033638 32253



(1) - зона терапии

6102-10 0' 01-10100M


• Если аппарат электрохирургический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электрохирургического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Salsatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



3. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с TRE покрытием 210x120мм с язычковым соединением, 00401.10. Фото изделия и пример маркировки.

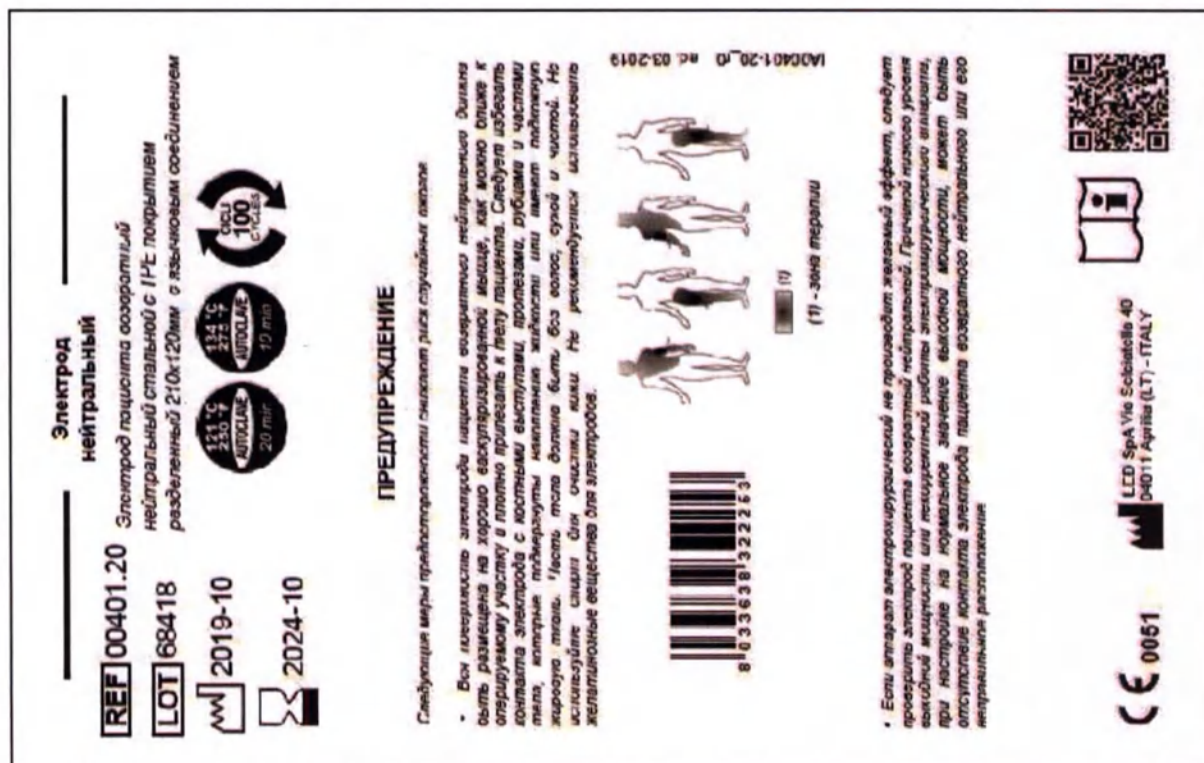

4. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с ТРЕ покрытием разделенный 210x120 мм с язычковым соединением, 00401.20. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-110 *Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*


EAN13 8033638323373

LOT 68346 2019-09 2024-09

NON STERILE 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

5. Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-110. Фото изделия и пример маркировки.

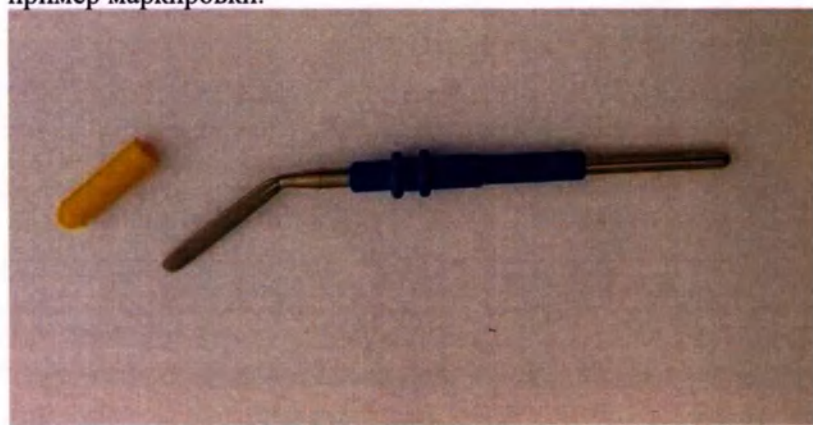

Электрод

REF 152-112 *Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*

EAN13 8033638323380

LOT 61825 2018-08 2023-08

NON STERILE 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

6. Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-112. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-115 *Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323403

LOT 65348 2019-03 2024-03

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

7. Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-115. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД


REF 152-120 *Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323410

LOT 68930 2019-10 2024-10

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8. Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-120. Фото изделия и пример маркировки.

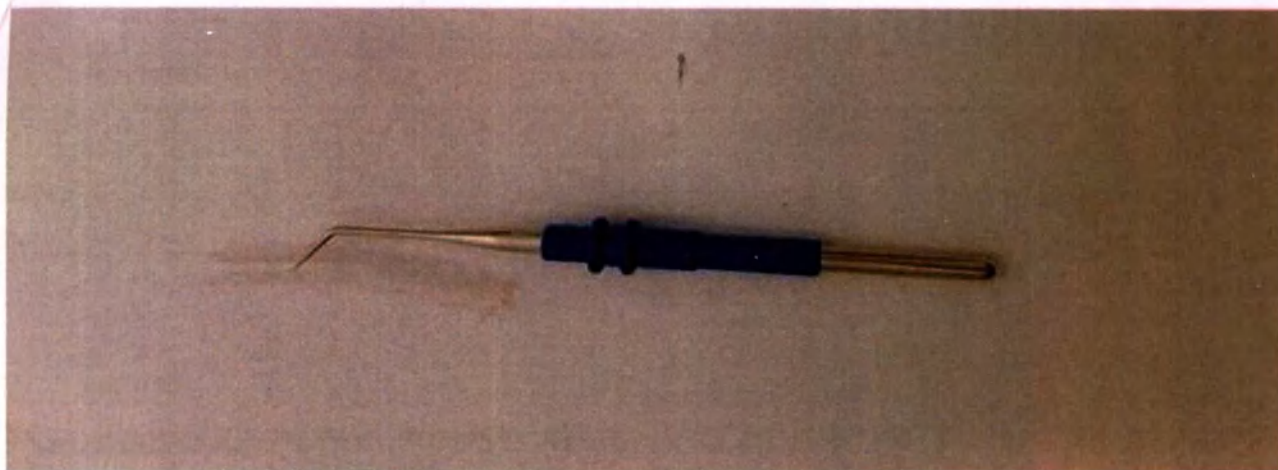

ЭЛЕКТРОД	
REF 152-122	Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323427	
LOT 60945	2018-03 2023-03
NON STERILE	
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

9. Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-122. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-125	Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323434	
LOT 60946	2018-03 2023-03
NON STERILE	
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

10. Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-125. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-130 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
EAN13 8033638323441

LOT 61022 2018-08 2023-08

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

11. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-130. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-132 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
EAN13 8033638323458

LOT 65402 2019-03 2024-03

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

12. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-132. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-140 *Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*
EAN13 8033638323465

LOT 60949  2018-03  2023-03

 NON STERILE  CICLI 30 CYCLES  121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min  134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min 

 0051  LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY 

13. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-140. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД


REF 152-142 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*
EAN13 8033638323472

LOT 60950  2018-03  2023-03

 NON STERILE  CICLI 30 CYCLES  121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min  134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min 

 0051  LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY 

14. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-142. Фото изделия и пример маркировки.

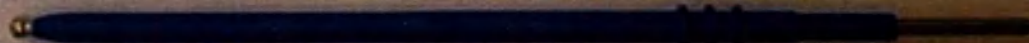

ЭЛЕКТРОД

REF 152-145

EAN13 8033638323489

LOT 60951

*Электрод-шар, длина стержня 140мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*

2018-03
 2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

15. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-145. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-150

EAN13 8033638323496

LOT 68516

*Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм*

2019-10
 2024-10

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

16. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-150. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-152 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323502

LOT 60953 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

17. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-152. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-160 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323519

LOT 60954 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

18. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-160. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-162 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323526

LOT 60955 2018-03 2023-03

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

19. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-162. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-165 *Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323533

LOT 60956 2018-03 2023-03

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

20. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-165. Фото изделия и пример маркировки



Зонд аргоновый

REF 00430.10

LOT 76236

Зонд монополярный гибкий
аргоновый, диаметр 1,5 мм,
длина 1,5 м




2021-04




2026-04



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

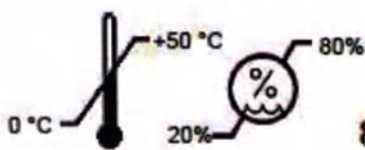

21. Зонд монополярный гибкий аргоновый, диаметр 1,5 мм, длина 1,5 м, 00430.10. Фото изделия и пример маркировки.

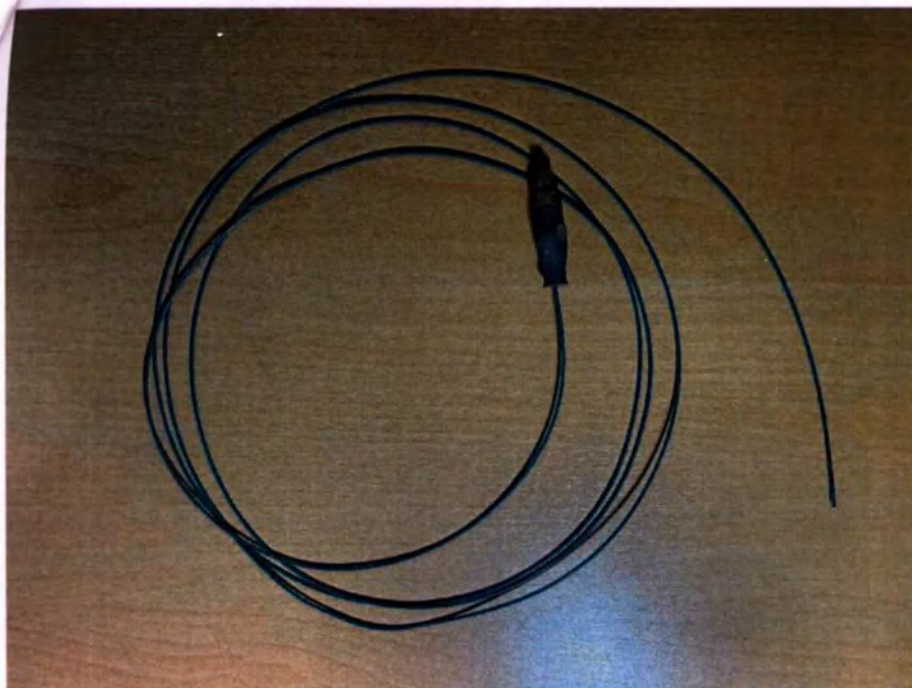

Зонд аргоновый

REF 00430.12

LOT 76237

Зонд монополярный гибкий
аргоновый, диаметр 1,5 мм,
длина 3 м




2021-04



2026-04



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

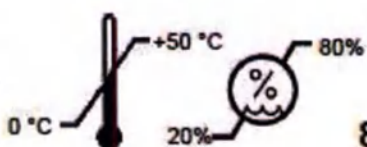

22. Зонд монополярный гибкий аргоновый, диаметр 1,5 мм, длина 3 м, 00430.12. Фото изделия и пример маркировки.



Зонд аргоновый

REF 00430.20

LOT 76238

Зонд монополярный гибкий
аргоновый, диаметр 2,3 мм,
длина 1 м




2021-04




2026-04



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

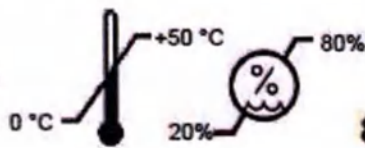

23. Зонд монополярный гибкий аргоновый, диаметр 2,3 мм, длина 1 м, 00430.20. Фото изделия и пример маркировки

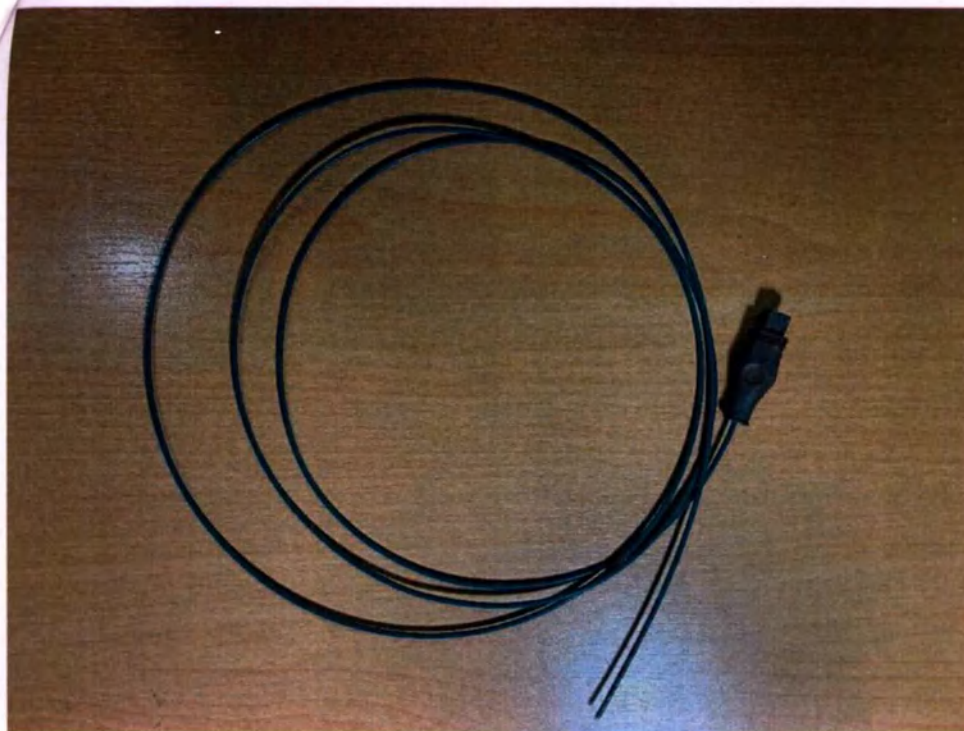

Зонд аргоновый

REF 00430.22

LOT 76239


 2021-04

 2026-04

Зонд монополярный гибкий
аргоновый, диаметр 2,3 мм,
длина 2,2 м



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

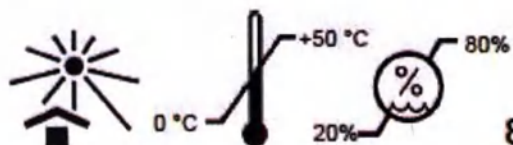

24. Зонд монополярный гибкий аргонный, диаметр 2,3 мм, длина 2,2 м, 00430.22. Фото изделия и пример маркировки



Зонд аргоновый

REF 00430.24

LOT 76240



2021-04



2026-04

Зонд монополярный гибкий
аргоновый, диаметр 2,3 мм,
длина 3 м




LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C



+50 °C

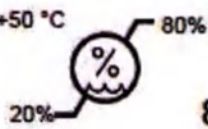

20%

80%

8



25. Зонд монополярный гибкий аргонный, диаметр 2,3 мм, длина 3 м, 00430.24. Фото изделия и пример маркировки



**Зонд
аргоновый**

REF 00430.30

LOT 76241

2021-04

2026-04

Зонд монополярный гибкий
аргоновый, диаметр 3,2 мм,
длина 2,2 м

CE

NON
STERILE

20
CYCLES

134 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °F
AUTOCLAVE
10 min

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

0 °C

+50 °C

20%

80%

8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 6 1

26. Зонд монополярный гибкий аргоновый, диаметр 3,2 мм, длина 2,2 м, 00430.30. Фото изделия и пример маркировки

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**
Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового
разъема 2,0-2,8, длиной 190мм

REF 410-100-15

LOT 72300

2020-01

2025-01

30
NON
STERILE

181.5
STERILE
20 mm

190 mm

LED SpA Via Salsatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0051

8 0 3 3 6 3 8 3 2 3 7 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от
интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени
подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный
осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует
использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная
изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области
электроэнергии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой
ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо
очистить спиртодержателем дезинфицирующим средством. Не рекомендуется
погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за
возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в заступах срок
службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать
дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо
всегда заменять их новыми.

27. Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длиной 190мм, 410-100-15.
Фото изделия и пример маркировки



28. Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длиной 190мм, 410-100-19.
Фото изделия и пример маркировки

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового
разъема 2,0-2,8, длиной 190мм

REF 410-100-19

LOT 72302

2020-01

2025-01










LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY






8 033638 323717

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в заглушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

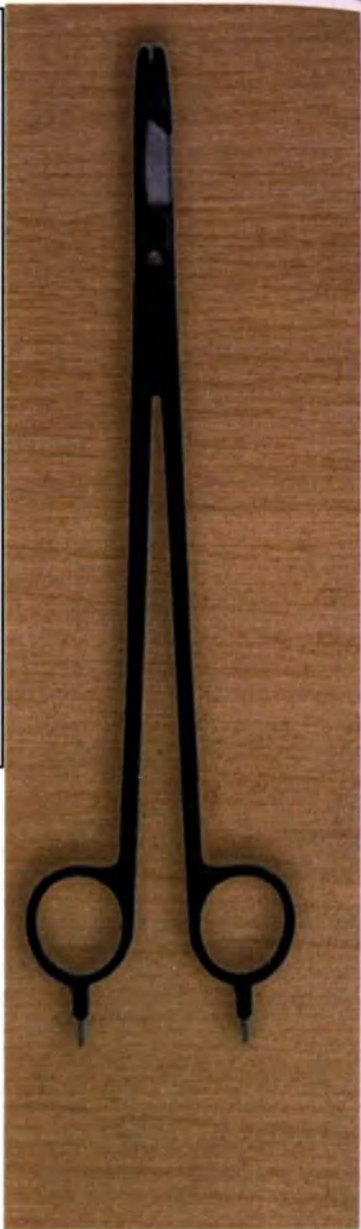

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**
Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 180мм

REF 410-200-18

LOT 72304

2020-01

2025-01

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0051

**NON
STERILE**

**30
min**

**131.5
min**


**134.5
min**

10 min

8 40 3 3 6 3 8 4 3 2 3 7 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: крупная или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

29. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 180мм, 410-200-18.
Фото изделия и пример маркировки

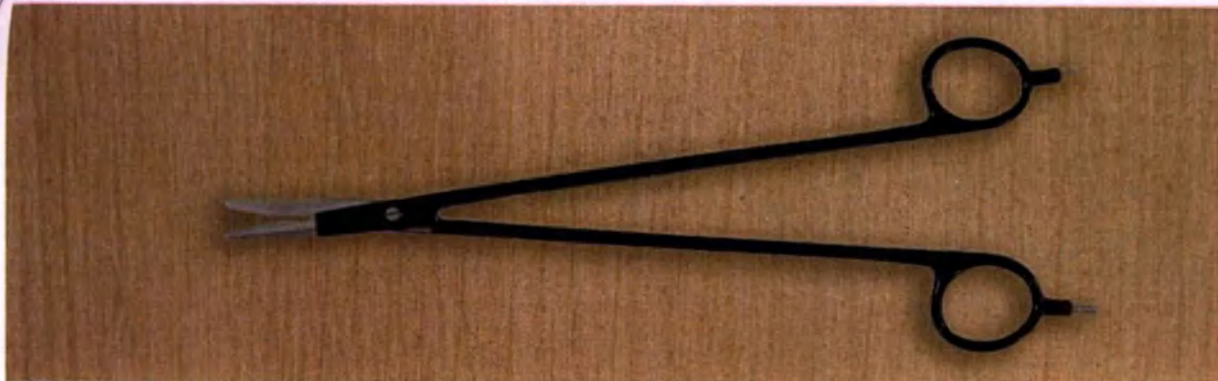

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

REF 410-200-21
Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм

LOT 72305

2020-01 2025-01

**LED SpA Via Selcattella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY**

CE 0061

**NON
STERILE**

ISO 13485

ISO 9001


ISO 14001

8 033 638 32371

QR CODE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизацию с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спайтосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

30. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм, 410-200-21.
Фото изделия и пример маркировки

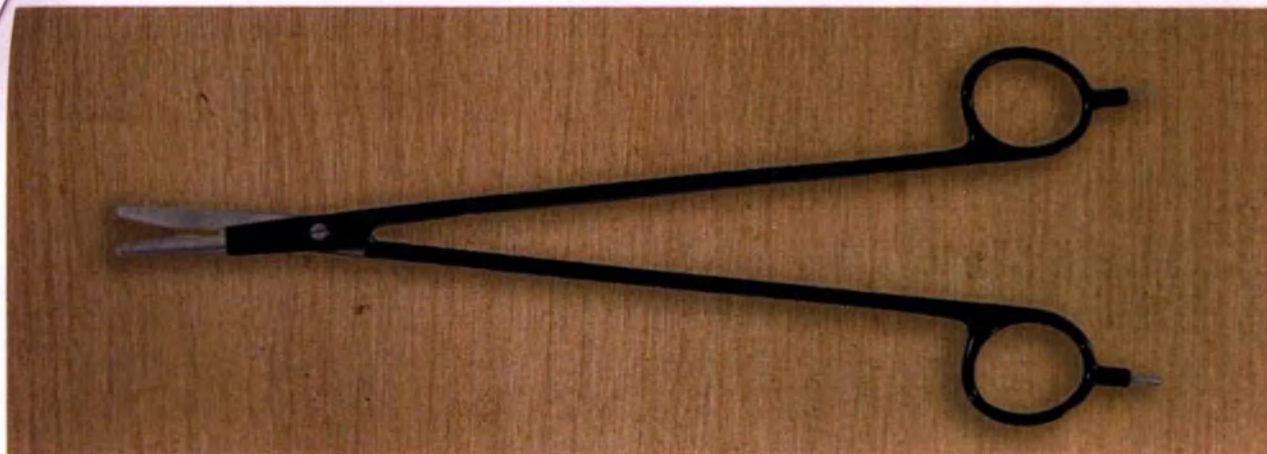

32. Зажим биполярный электрокоагулирующий с штекерами типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), длина 270мм, бранши шириной 3мм, 110-750NS. Фото изделия и пример маркировки

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

REF 110-750NS Зажим биполярный электрокоагулирующий с штекерами типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), длина 270мм, бранши шириной 3мм

LOT 65073  2019-02  2024-02

  **LED SpA** Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY  

 633636523717

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.





33. Зажим биполярный электролигирующий с штекерами типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), длина 255мм, бранши шириной 3мм, 110-755NS. Фото изделия и пример маркировки

БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 110-760NS - Зажим биполярный электролигирующий с штекерами типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), длина 170мм, бранши шириной 2мм

LOT 63151

2018-10

2023-10

LED SdA Via Seicitalia 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0061

NON STERILE

30 30 sec


35 35 sec

10 10 mm


QR CODE

0 33 63 3237 31

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электроинструмента необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спайтосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

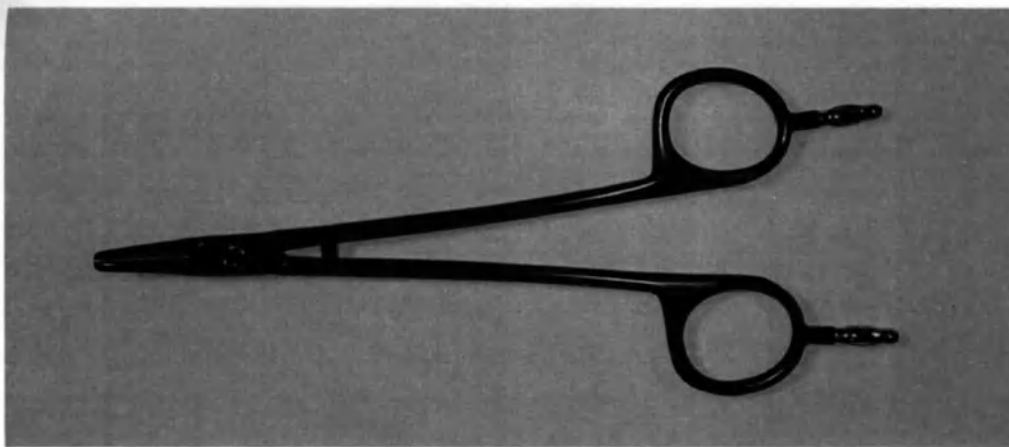


34. Зажим биполярный электролигирующий с штекерами типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), длина 170мм, бранши шириной 2мм, 110-760NS. Фото изделия и пример маркировки

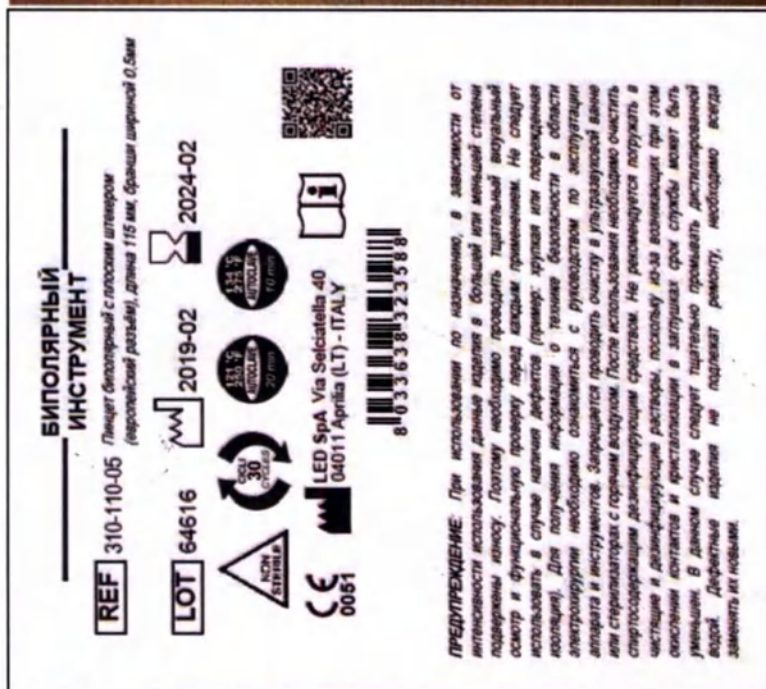

35. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм, 310-110-05. Фото изделия и пример маркировки




36. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм, 310-112-05. Фото изделия и пример маркировки

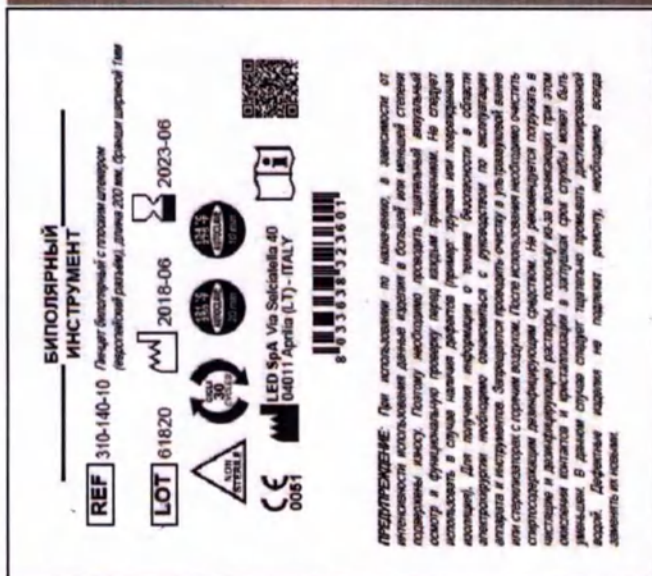

37. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-140-10. Фото изделия и пример маркировки



38. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-140-20. Фото изделия и пример маркировки

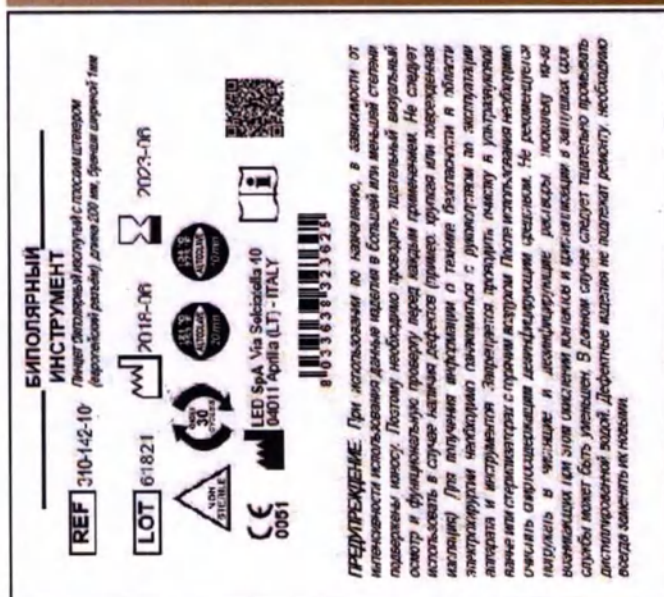

39. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-142-10. Фото изделия и пример маркировки



40. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-142-20. Фото изделия и пример маркировки



**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

REF 310-180-10 Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 63924 2018-03 2023-03

NON STERILE 30 min 180°C 30 min 180°C

CE 0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprila (LT) - ITALY

8 033638 323649

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в загибах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

41. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-180-10. Фото изделия и пример маркировки



**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

REF 310-180-20 Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм

LOT 64285 2019-02 2024-02

NON STERILE 30 min 180°C 30 min 180°C

CE 0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprila (LT) - ITALY

8 033638 323650

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в загибах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

42. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-180-20. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-182-10 Пинцет биполярный байонетный изогнутые наружу с плоским штекером (европейский разъем) длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 60034 2018-03 2023-03

LED 50A V/A Saccisella 40 04011 Agrilis (LT) - ITALY

CE 0081

8 433 638 523 83

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации изделия и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с паровым воздействием. После использования необходимо очистить стерилизационные дезинфицирующие средства. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за воздействия при этом оголенных контактов и кристаллизации в заступах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

43. Пинцет биполярный байонетные изогнутые наружу с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-182-10. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-185-10 Пинцет биполярный байонетный изогнутый внутрь с плоским штекером (европейский разъем) длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 60034 2018-03 2023-03

LED 50A V/A Saccisella 40 04011 Agrilis (LT) - ITALY

CE 0081

8 433 638 523 670

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации изделия и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с паровым воздействием. После использования необходимо очистить стерилизационные дезинфицирующие средства. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за воздействия при этом оголенных контактов и кристаллизации в заступах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

44. Пинцет биполярный байонетные изогнутые внутрь с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-185-10. Фото изделия и пример маркировки

БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-510
Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

LOT 74494
2020-12 2025-12

LED SpA Via Salsatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY
EAN13 8033638323587

NON STERILE
30 cycles
131 °C
137 °C
154 °C
10 min
20 min
40 min

CE 0051

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо периодически проводить визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (например: изгиб или повреждение изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается погружать электрод в ультразвуковой ванне или стерилизовать с парным воздухом. После использования необходимо очистить электроды дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку久之 взаимодействие при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

45. Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-510. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-550
Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

LOT 76538
2021-04 2026-04

LED SpA Via Salsatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY
EAN13 8033638323594

NON STERILE
30 cycles
131 °C
137 °C
154 °C
10 min
20 min
40 min

CE 0051

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо периодически проводить визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (например: изгиб или повреждение изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается погружать электрод в ультразвуковой ванне или стерилизовать с парным воздухом. После использования необходимо очистить электроды дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку久之 взаимодействие при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

46. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-550. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-590

LOT 75102

2021-03

2026-03

134°C AUTOCLAVE 10 min

121°C AUTOCLAVE 20 min

DELTA 30 CYCLES

NON STERILE

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

EUROPEAN REGISTERED

QR CODE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещины, изгибы или поврежденная изоляция). Для получения информации техники безопасности в области электроинструмента необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить споттер/дезинфицирующее средство. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислений контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

47. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый на 45°C с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-590. Фото изделия и пример маркировки



Электрод аргоновый

REF 00420.10

LOT 68933

2019-10

2024-10

CE

NON STERILE

DELTA 75 CYCLES

121°C AUTOCLAVE 20 min

134°C AUTOCLAVE 10 min

QR CODE

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

100% 80% 20% 0°C ~50°C

8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 6 1

48. Электрод аргоновый коагуляционный, длина 75мм, посадочный диаметр 4мм, 00420.10. Фото изделия и пример маркировки



**Электрод
аргоновый**

REF 00420.12

LOT 63292

Электрод аргоновый
коагуляционный, длина 150мм,
посадочный диаметр 4мм

2018-09

2023-09

CE

NON
STERILE

75
CYCLES

121 °C
20 min
AUTOCLAVE

134 °C
10 min
AUTOCLAVE

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

0 °C


+50 °C

20%

80%

8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 6 1

49. Электрод аргоновый коагуляционный, длина 150мм, посадочный диаметр 4мм, 00420.12. Фото изделия и пример маркировки

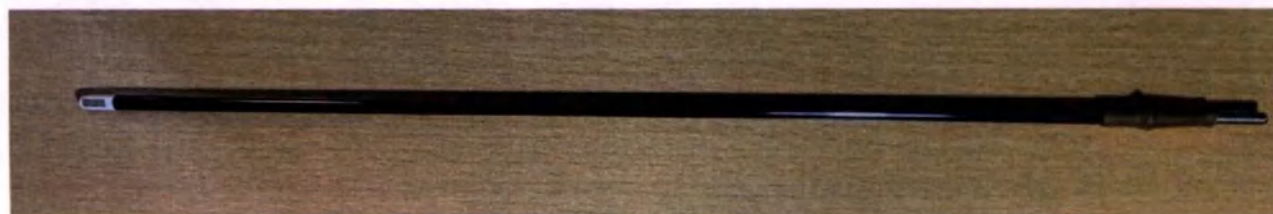

**Электрод
аргоновый**

REF 00420.14

LOT 806633

Электрод аргоновый
коагуляционный, длина 370мм,
посадочный диаметр 4мм

2018-04

2023-04

CE

NON
STERILE

75
CYCLES

121 °C
20 min
AUTOCLAVE

134 °C
10 min
AUTOCLAVE

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

0 °C


+50 °C

20%

80%

8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 6 1

50. Электрод аргоновый коагуляционный, длина 370мм, посадочный диаметр 4мм, 00420.14. Фото изделия и пример маркировки

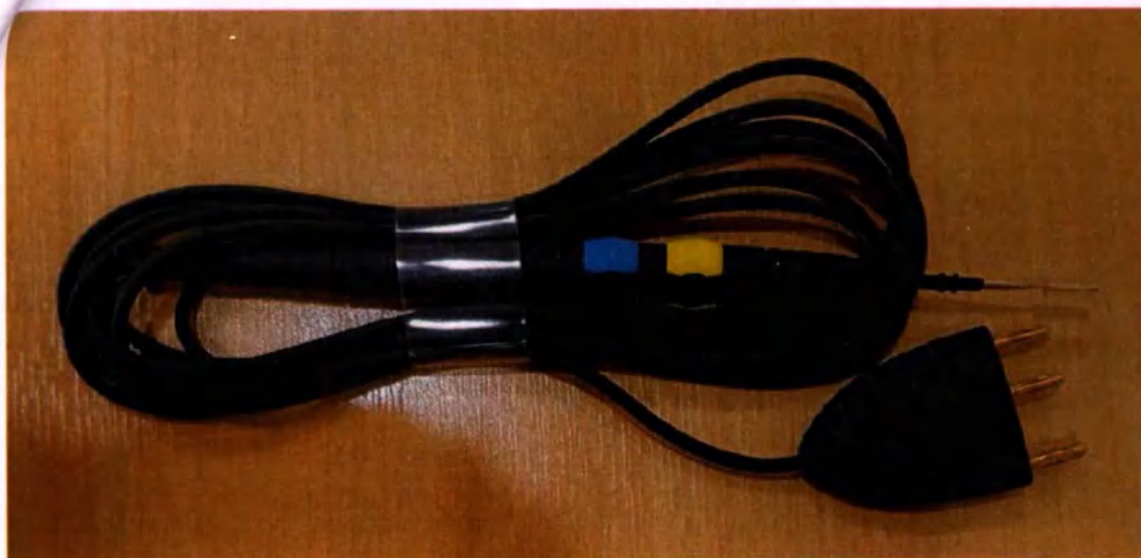

Ручка

REF 00205.00

LOT 76955

2021-06

2026-06

Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)

0051

NON
STERILE

100
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C +50 °C 20% 80%



51. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка

REF	00205.40	Ручка электрохирургическая
LOT	67890	монополярная с ручным
	2019-07	переключателем для электрода
	2024-07	с посадочным диаметром 4мм,
		с кабелем длиной 3м, разъем со
		стороны генератора – 3х
		контактный штекер типа «банан»
		4мм (4mm 3-Banana plug)

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

52. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.40. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00206.00	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)				
LOT 64900					
2019-01					
2024-01					
0051	NON STERILE	100 CYCLES	121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min	134 °C 273 °F AUTOCLAVE 10 min	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY		MADE IN ITALY			
0 °C +50 °C 20% 80%		 8 033638 321232			

53. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00206.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)				
LOT 67891					
2019-07					
2024-07					
0051	NON STERILE	100 CYCLES	121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min	134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					
0 °C +50 °C 20% 80%					

54. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.40. Фото изделия и пример маркировки



**Ручка
аргоновая**

REF	00420.00	Ручка электрохирургическая
LOT	68941	многофункциональная монополярная с
	2019-10	переключателем для применения аргона для
	2024-10	подключения электродов аргоновых, с
		кабелем длиной 3,5м, штекер типа Luer Lock
		для подключения к разъему выхода аргона,
		разъем со стороны генератора - 3х
		контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-
		Banana plug)

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 6 1

55. Ручка электрохирургическая многофункциональная монополярная с переключателем для применения аргона для подключения электродов аргоновых, с кабелем длиной 3,5м, штекер типа Luer Lock для подключения к разъему выхода аргона, разъем со стороны генератора - 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00420.00. Фото изделия и пример маркировки



Кабель					
REF 00402.04	Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм				
LOT 72504					
2020-01					
2025-01					
0051	NON STERILE	100 CYCLES	121 °C 250 °F 20 min	134 °C 275 °F 10 min	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					
0 °C — +50 °C — 20% — 80%		8 033638 323786			

56. Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм, 00402.04. Фото изделия и пример маркировки

Кабель

REF 00404.08


LOT 71642

2020-04

Совместим с аппаратами 5365A / 6429A, 00401.1000001.20

Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

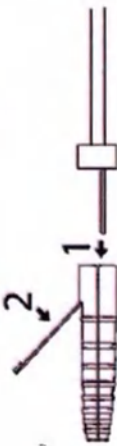


Следующие меры предосторожности снижают риск случайного самог

- Кабель должен использоваться с электрофизиологическим аппаратом и/или принадлежностями в соответствии с действующими нормами.
- Для получения информации об использовании аппарата электрофизиологического и других необходимо обратиться к инструкциям.
- Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, электролитный эффект может вызвать ожог.
- При отсоединении кабеля от аппарата электрофизиологического не следует тянуть за провод, необходимо брать за предусмотренное за предзнаменование для подключения разъем

ОЧИСТКА

Сразу после использования необходимо промыть проводной кабель, затем погрузить на 40 минут в 2-процентный раствор обычного дезинфицирующего средства

CE 0051

LED SpA Via Salsomaggi 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

57. Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.08. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00411.00

LOT 66009

 2019-03


 2024-03

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента – плоский разъем (European Flat plug)


CE
0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

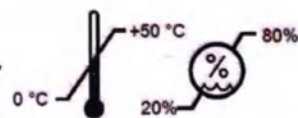

59. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента – плоский разъем (European Flat plug), 00411.00. Фото изделия и пример маркировки

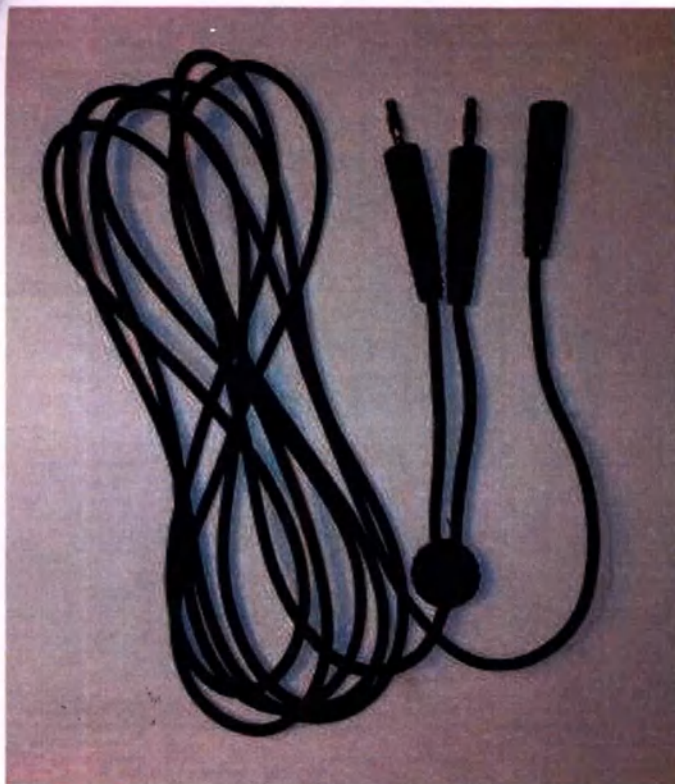

КАБЕЛЬ

REF 00412.00

LOT 63478

 2018-09

 2023-09

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа «банан» 4 мм (4mm 2-Banana plug), со стороны инструмента - плоский разъем (European Flat plug)

CE
0051

 NON
STERILE


 100
CYCLES

 121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

 134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min



 **LED SpA** Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

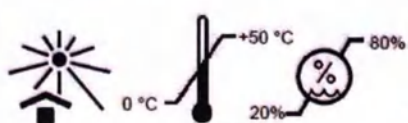

60. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа «банан» 4 мм (4mm 2-Banana plug), со стороны инструмента - плоский разъем (European Flat plug), 00412.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00413.00

LOT 62264



2018-06




2023-06

Кабель автоклавируемый для подключения зажима биполярного электролигирующего, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовой разъем 4 мм для зажима биполярного электролигирующего



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

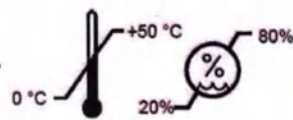

61. Кабель автоклавируемый для подключения зажима биполярного электролигирующего, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовой разъем 4 мм для зажима биполярного электролигирующего, 00413.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00414.00

LOT 72505



2020-01




2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug)



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

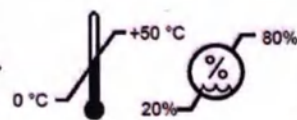

62. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug), 00414.00. Фото изделия и пример маркировки




КАБЕЛЬ

REF	00415.00	Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов END01 (F4-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовые разъемы 4 мм и 2-2,8 мм
LOT	72508	
	2020-01	
	2025-01	



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

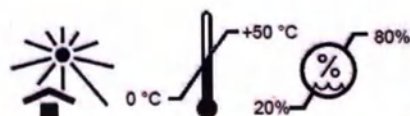

63. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов END01 (F4-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовые разъемы 4 мм и 2-2,8 мм, 00415.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00418.00

LOT 72514

 2020-01

 2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм


0051

 NON
STERILE


 100
CYCLES

 121 °C
250 °F
20 min

 134 °C
275 °F
10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

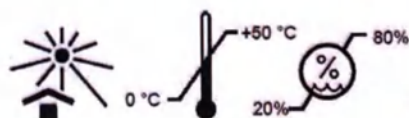

64. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм, 00418.00. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

REF 00430.00 Кабель автоклавируемый соединительный для зондов гибких аргоновых, длиной 2,5м: со стороны аппарата – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), со стороны инструмента - штекер типа Luer Lock для подключения к разъему выхода аргона, гнездовой разъем для подключения зондов монополярных гибких аргоновых

LOT 68942

2019-10

2024-10



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



+50 °C
0 °C
20%
80%



65. Кабель автоклавируемый соединительный для зондов гибких аргоновых, длиной 2,5м: со стороны аппарата – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), со стороны инструмента - штекер типа Luer Lock для подключения к разъему выхода аргона, гнездовой разъем для подключения зондов монополярных гибких аргоновых, 00430.00. Фото изделия и пример маркировки

Генеральный директор

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

П. В. Гижинская

Прошито и пронумеровано

50

(подпись)

листа (ов).