

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

Аппарат электрохирургический высокочастотный

Surtron Touch 200

Приложение 1

Фотографические изображения

(инструменты электрохирургические, входящие в стандартную комплектацию и в состав медицинского изделия опционально (с пометкой «при необходимости»))

Производства LED S.p.A., Италия

2024 г.

Электрод нейтральный

Электрод палшета еозратный нейтральный
стальной 160x120мм, с кабелем длиной 3м,
разъем со стороны генератора - типа Jack
Ø6,3мм, автоклавируемый

REF 00401.02
LOT 65832
2019-05

121 °C
30 min
AUTOCULATE
20 min

134 °C
30 min
AUTOCULATE
10 min

100 CYCLES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента изогнутого нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протоками, рубцами и частями тела, которые подверглись наложению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Ноги должны быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать жидкие вещества для электродов.




1A03431-02_12 Ed. 10-2017

• Если аппарат электрохирургический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента еозратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрохирургического, при несправке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента еозратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Salsatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY




1. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый, 00401.02. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод нейтральный

REF 5365A
Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм с язычковым соединением

LOT C4015/18

2018-09

Совместим с 90404.08

121 °C
250 °F
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
30 мин

134 °C
275 °F
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
12 мин

Перед первым использованием снимите защитные пленки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к операционному участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, суставами, рубцами и частями тела, которые подвержены накоплению жира или имеют повышенную хрупкость тканей. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать жепатинжные вещества для электродов.



(1) зона терапии

8 0 3 3 6 3 8 1 3 2 2 2 6 3

MA5365_12 Ed. 10-2017

Если пациент электрохирургический не исключает тепловой эффект, следует проверить электрод пациента возвратного нейтрального. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электрохирургического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Zecchiella 40
04011 Arona (LT) - ITALY

MADE IN ITALY



3. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм с язычковым соединением, 5365A. Фото изделия и пример маркировки.



Электрод нейтральный

REF 00401.20
Электрод пациента возвратный нейтральный с ТРЕ покрытием разделенный 210x120мм с язычковым соединением

LOT 68418

2019-10
2024-10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов:

- Для избежания ожогов пациента электродом нейтральное должно быть размещено на хорошо вентилируемой коже, как можно ближе к операционному участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, проставками, рубцами и частями тела, которые подвержены неглубоким ожогам или имеют повышенную жирность тканей. Если тело должно быть без волос, сухой и чистой. Не использовать крем или другие вещества. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.

AC0401-20_01 ed. 03-2019

(1) - зона терапии

* Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Проверка уровня выходной мощности или текучей силы работы электрофизиологического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть осуществлена контактом электрода пациента возвратного нейтрального или его нейтральное расстояние.

CE 0051

LED SpA Via Sciacca 40
04011 Aprate (LT) - ITALY

6. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с ТРЕ покрытием разделенный 210x120 мм с язычковым соединением, 00401.20. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-110 *Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323373

LOT 68346 2019-09 2024-09

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

7. Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-110. Фото изделия и пример маркировки.



Электрод

REF 152-112 *Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323380

LOT 61825 2018-08 2023-08

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8. Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-112. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-115

EAN13 8033638323403

LOT 65348

Электрод-лезвие, длина стержня 160мм,
посадочный диаметр 2,4 мм

2019-03

2024-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

9. Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-115. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-120

EAN13 8033638323410

LOT 68930

Электрод-игла, длина стержня 70мм,
посадочный диаметр 2,4 мм

2019-10

2024-10

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

10. Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-120. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-122	Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323427	
LOT 60945	2018-03 2023-03
	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

11. Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-122. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-125	Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323434	
LOT 60946	2018-03 2023-03
	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

12. Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-125. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-130 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323441

LOT 61022 2018-08 2023-08

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

13. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-130. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-132 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323458

LOT 65402 2019-03 2024-03

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

14. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-132. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-140

EAN13 8033638323465

LOT 60949

CE 0051

Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03 2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

15. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-140. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-142

EAN13 8033638323472

LOT 60950

CE 0051

Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03 2023-03

NON
STERILE


CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

16. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-142. Фото изделия и пример маркировки.

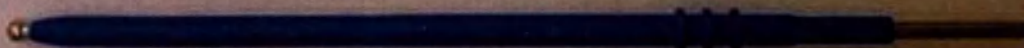

ЭЛЕКТРОД

REF 152-145

EAN13 8033638323489

Электрод-шар, длина стержня 140мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм

LOT 60951



2018-03



2023-03



CE
0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



17. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-145. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-150

EAN13 8033638323496

Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм

LOT 68516



2019-10



2024-10



CE
0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



18. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-150. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-152 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм*

EAN13 8033638323502

LOT 60953  2018-03  2023-03

  **LED SpA** Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY  

19. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-152. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-160 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*

EAN13 8033638323519

LOT 60954  2018-03  2023-03

  **LED SpA** Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY  

20. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-160. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-162 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*


EAN13 8033638323526

LOT 60955 2018-03 2023-03

NON STERILE 30 CYCLES AUTOCLAVE 20 min AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

21. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-162. Фото изделия и пример маркировки

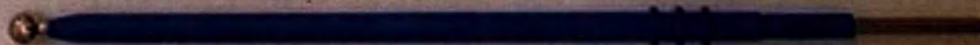

ЭЛЕКТРОД

REF 152-165 *Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*


EAN13 8033638323533

LOT 60956 2018-03 2023-03

NON STERILE 30 CYCLES AUTOCLAVE 20 min AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

22. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-165. Фото изделия и пример маркировки

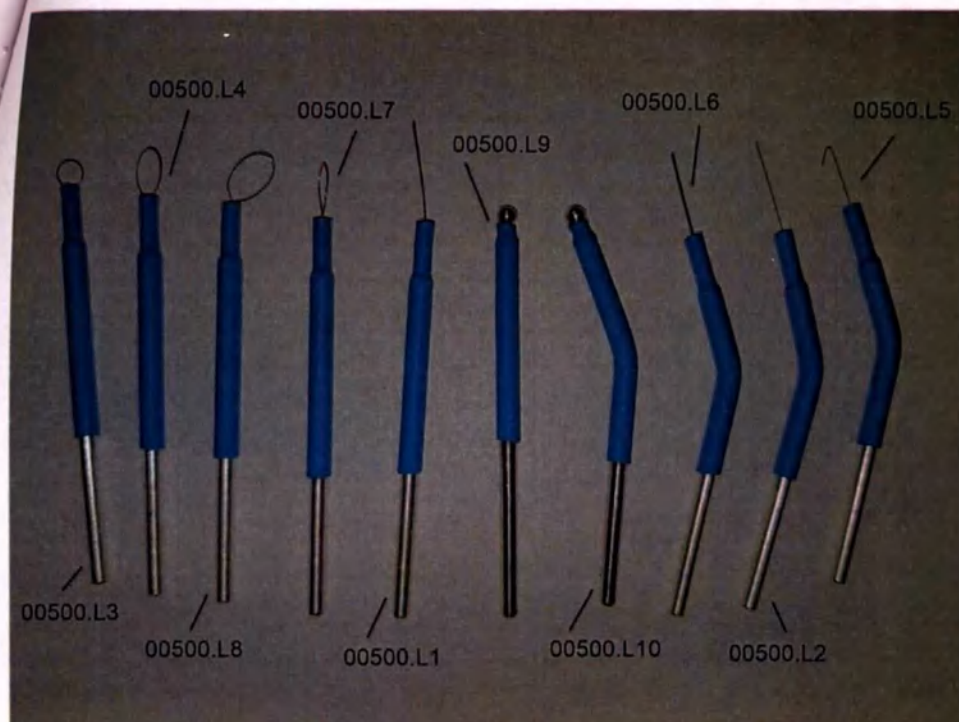

ЭЛЕКТРОД

REF 00500.00 Набор электродов (10 шт., длина стержня 50мм, посадочный диаметр 2,4мм)

EAN13 8033638322277

LOT 65411  2019-03  2024-03

  LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY  

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 50мм, посадочный диаметр 2,4мм) в составе:

Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1 – 1 шт.;

Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2 – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3 – 1 шт.;

Электрод -петля, диаметр 8мм, 00500.L4 – 1 шт.;

Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5 – 1 шт.;

Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6 – 1 шт.;

Электрод-петля каплевидный, 00500.L7 – 1 шт.;

Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8 – 1 шт.;


Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9 – 1 шт.;

Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10 – 1 шт.;

23. Набор электродов (10 шт., длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм), 00500.00, в составе:

- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1 – 1 шт.;
- Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2 – 1 шт.;
- Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3 – 1 шт.;
- Электрод -петля, диаметр 8мм, 00500.L4 – 1 шт.;
- Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5 – 1 шт.;
- Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6 – 1 шт.;
- Электрод-петля каплевидный, 00500.L7 – 1 шт.;
- Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8 – 1 шт.;
- Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9 – 1 шт.;
- Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10 – 1 шт.

Фото изделия и пример маркировки.

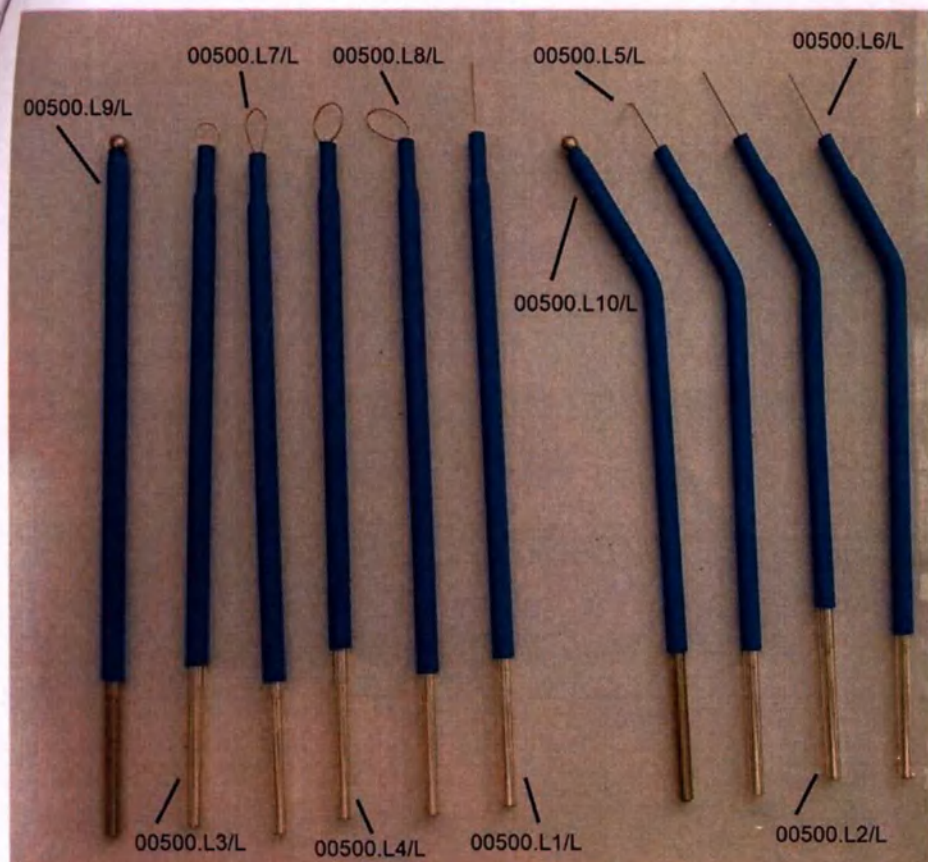

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 100мм, посадочный диаметр 2,4мм)

REF 00500.00/L

LOT 65063

2019-01

2024-01

NON STERILE

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °C 273 °F AUTOCLAVE 10 min

QR code

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 100мм, посадочный диаметр 2,4мм) в составе:

Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1/L – 1 шт.;

Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2/L – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3/L – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4/L – 1 шт.;

Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5/L – 1 шт.;

Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6/L – 1 шт.;

Электрод-петля каплевидный, 00500.L7/L – 1 шт.;

Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8/L – 1 шт.;

Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9/L – 1 шт.;

Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10/L – 1 шт.;

24. Набор электродов (10 шт., длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм), 00500.00/L, в составе:
- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1/L – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4/L – 1 шт.;
 - Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5/L – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля каплевидный, 00500.L7/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8/L – 1 шт.;
 - Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9/L – 1 шт.;
 - Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10/L – 1 шт.

Фото изделия и пример маркировки



25. Электрод проволочный тонкий прямой, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L1;



26. Электрод проволочный тонкий прямой, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L1/L;



27. Электрод проволочный тонкий изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L2;



28. Электрод проволочный тонкий изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L2/L;



29. Электрод-петля, диаметр 4мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L3;



30. Электрод-петля, диаметр 4мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L3/L;



31. Электрод-петля, диаметр 8мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L4;



32. Электрод-петля, диаметр 8мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L4/L;



33. Электрод-крючок изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L5;



34. Электрод-крючок изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L5/L;



35. Электрод проволоочный толстый изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L6;



36. Электрод проволоочный толстый изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L6/L;



37. Электрод-петля каплевидный, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L7;



38. Электрод-петля каплевидный, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L7/L;



39. Электрод-петля типа "лассо", длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L8;



40. Электрод-петля типа "лассо", длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L8/L;



41. Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L9;



42. Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L9/L;



43. Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L10;



44. Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L10/L;

46. Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длиной 190мм, 410-100-19.
Фото изделия и пример маркировки

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

REF 410-100-19 Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового
разъема 2,0-2,8, длиной 190мм

LOT 72302 2020-01 2025-01

NON STERILE 30 CYCLES 20 min 10 min

CE 0051 LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

8 033638 523717

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в заглушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.



**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

Ножицы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 180мм

REF 410-200-18

LOT 72304

2020-01

2025-01


**NON
STERILE**

CE 0051


LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 033 63 832 37 17

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в заглушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

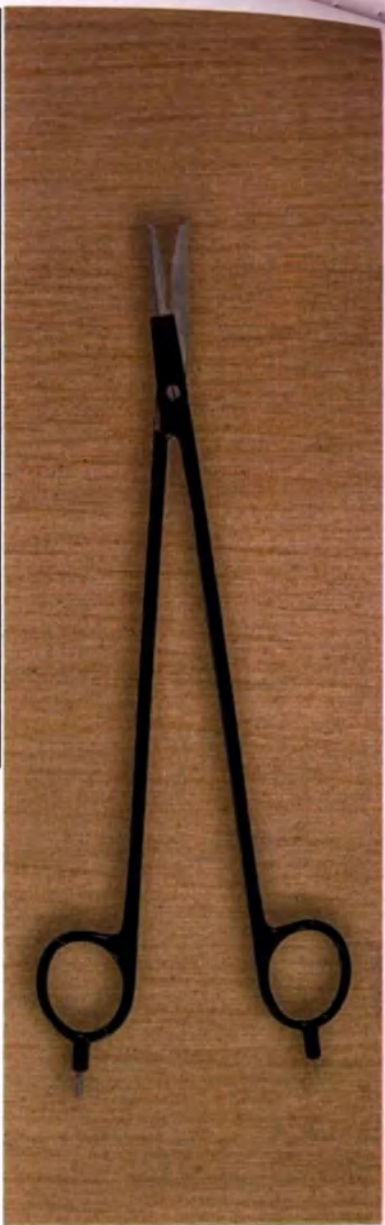

47. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 180мм, 410-200-18.
Фото изделия и пример маркировки

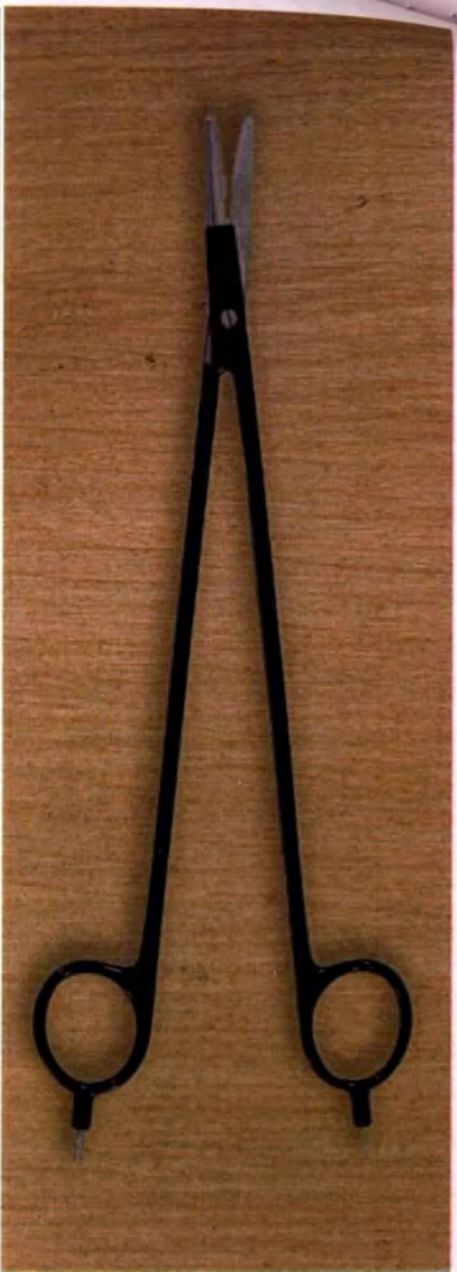

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм

REF 410-200-21

LOT 72305

2020-01

2025-01

NDN
STERILE

30
CYCLES

131 °C
20 min

131 °C
10 min

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY


8 033638 323717

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в заглушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

48. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм, 410-200-21.
Фото изделия и пример маркировки



51. Зажим биполярный электролигирующий с штекерами типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), длина 255мм, бранши шириной 3мм, 110-755NS. Фото изделия и пример маркировки

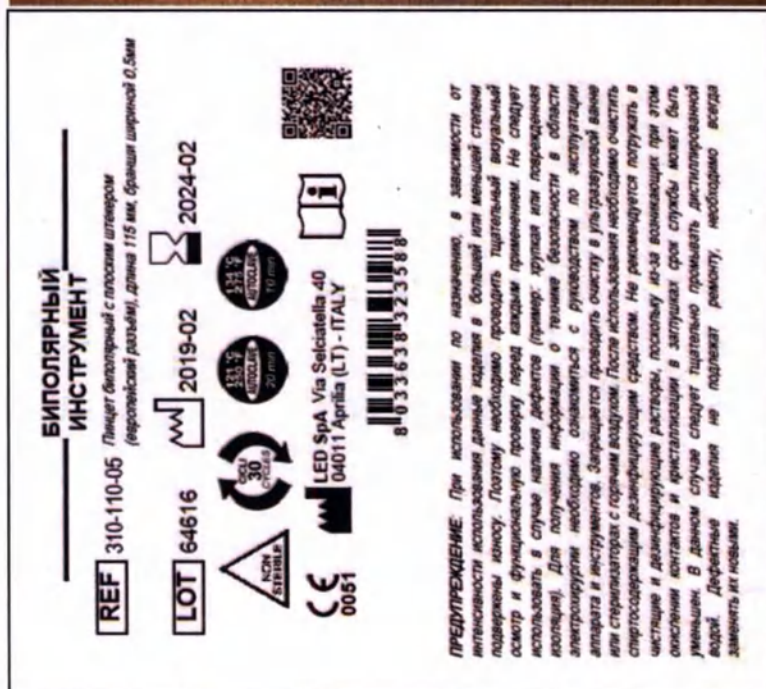

53. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм, 310-110-05. Фото изделия и пример маркировки



54. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм, 310-112-05. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-140-10 Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, ширина щипцов 1мм

LOT 61820

LED SpA Via Salicetta 40 04011 Aprila (LT) - ITALY

CE 0081

8 033 638 523 611

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или повреждений изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизовать с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизационным дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку жидкая дезинфекция при этом окислит контакты и кристаллы, в результате срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей жидкостью. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

55. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-140-10. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310 140 20 Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, ширина щипцов 2мм

LOT 64299

LED SpA Via Salicetta 40 04011 Aprila (LT) - ITALY

CE 0081

8 033 638 523 611

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или повреждений изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизовать с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизационным дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку жидкая дезинфекция при этом окислит контакты и кристаллы, в результате срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей жидкостью. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

56. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-140-20. Фото изделия и пример маркировки



57. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-142-10. Фото изделия и пример маркировки



58. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-142-20. Фото изделия и пример маркировки



**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

REF 310-180-10 Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 63924 2018-03 2023-03

NON STERILE 30 cycles 155 °C AUTOCLAVE 20 min 155 °C AUTOCLAVE 10 min

CE 0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 033638 323649

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в заступах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

59. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-180-10. Фото изделия и пример маркировки



**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

REF 310-180-20 Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм

LOT 64295 2019-02 2024-02

NON STERILE 30 cycles 155 °C AUTOCLAVE 20 min 155 °C AUTOCLAVE 10 min

CE 0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 033638 323658

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в заступах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

60. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-180-20. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-182-10 Пинцет биполярный байонетные изогнутые наружу с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 60934

2018-03

2023-03

LED SpA Via Sacisvalda 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0051

8 033638 323663

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большой или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или повреждения изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с паровым воздействием. После использования необходимо очистить стерилизатора дезинфицирующим раствором. Не рекомендуется погружать в чашки и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за коррозии при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах от солей может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

61. Пинцет биполярный байонетные изогнутые наружу с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-182-10. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-185-10 Пинцет биполярный байонетные изогнутые внутрь с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 60934

2018-03

2023-03

LED SpA Via Sacisvalda 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0051

8 033638 323670

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большой или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или повреждения изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с паровым воздействием. После использования необходимо очистить стерилизатора дезинфицирующим раствором. Не рекомендуется погружать в чашки и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за коррозии при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах от солей может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

62. Пинцет биполярный байонетные изогнутые внутрь с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-185-10. Фото изделия и пример маркировки

БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

REF 310-510

LOT 74454

2020-12 2025-12

LED SpA Via Selcattella 40
04011 Agrila (LT) - ITALY
EAN13 8033638323587

314 °C
STERILIZATION
20 min

314 °C
STERILIZATION
10 min

NON STERILE

CE 0051

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в больший или меньший степени подвержены износу. Поэтому необходимо периодически проводить визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов, деформации и т.д.). Для получения информации о технике безопасности по эксплуатации аппарата и инструмента Запрещается проводить очистку ультразвуковой ванне или стерилизатора с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизатора дезинфицирующим раствором. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникновения при этом окисления контактов и кристаллизации в катушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дезинфицирующей жидкостью. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

63. Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-510. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

REF 310-550

LOT 76536

2021-04 2026-04

LED SpA Via Selcattella 40
04011 Agrila (LT) - ITALY
EAN13 8033638323594

314 °C
STERILIZATION
20 min


314 °C
STERILIZATION
10 min

NON STERILE

CE 0051

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в больший или меньший степени подвержены износу. Поэтому необходимо периодически проводить визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов, деформации и т.д.). Для получения информации о технике безопасности по эксплуатации аппарата и инструмента Запрещается проводить очистку ультразвуковой ванне или стерилизатора с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизатора дезинфицирующим раствором. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникновения при этом окисления контактов и кристаллизации в катушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дезинфицирующей жидкостью. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

64. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-550. Фото изделия и пример маркировки

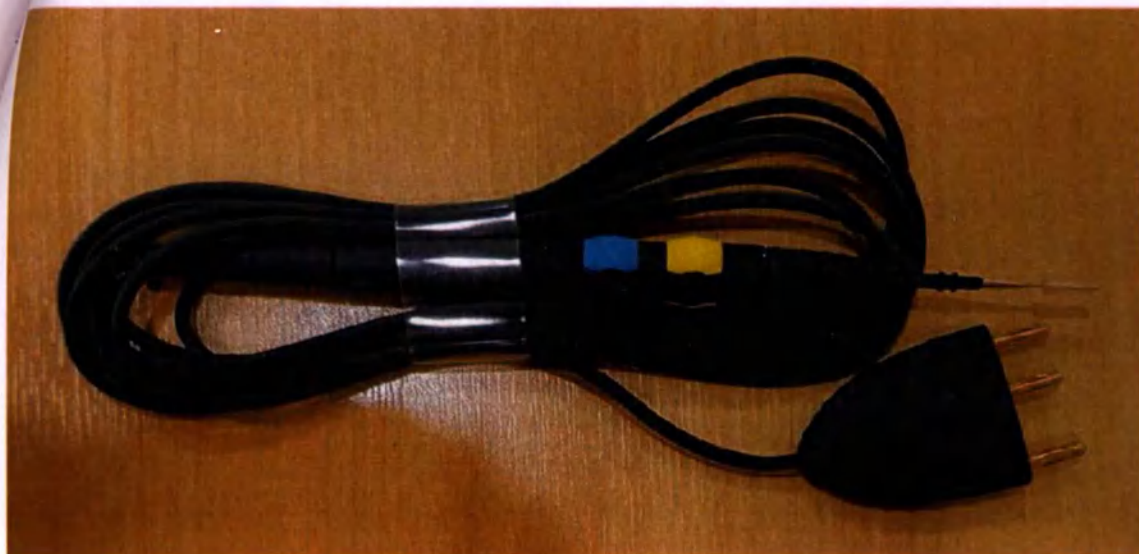

Ручка

REF 00205.00

LOT 76955

2021-06

2026-06

Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)

0051

NON STERILE

CICLI 100 CYCLES

121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C +50 °C 20% 80%



66. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка

REF	00205.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)
LOT	67890	
	2019-07	
	2024-07	

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

67. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.40. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00206.00	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)				
LOT 64900					
2019-01					
2024-01					
0051	NON STERILE	100 CYCLES	121 °C 250 °F 20 min AUTOCLAVE	134 °C 275 °F 10 min AUTOCLAVE	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY		MADE IN ITALY			
0 °C +50 °C 20% 80%		8 033638 321232			

68. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00206.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)				
LOT 67891					
2019-07					
2024-07					
0051	NON STERILE	100 CYCLES	121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min	134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					
0 °C +50 °C 20% 80%		8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 5 4			

69. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.40. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

REF 00402.04

LOT 72504

2020-01


2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов М4-F2.М, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм

0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

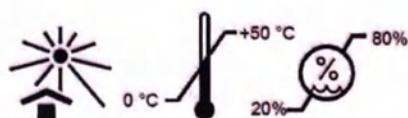

70. Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов М4-F2.М, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм, 00402.04. Фото изделия и пример маркировки

Кабель


REF 00404.08

LOT 71642

2020-04

Совместим с электродами S365A / 6429A, 00401, 1000401.20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

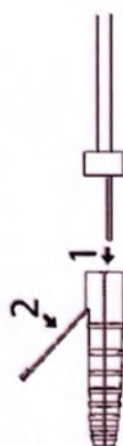


00404-08_01 01.03.2019

ОЧИСТКА

Сразу после использования необходимо промыть проточной водой, затем погрузить на 45 минут в 2-процентный раствор обычного дезинфицирующего средства


CE 0051

LED SpA Via Solimanita 40
06011 Aprica (LT) - ITALY

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных скачков:

- Кабель должен использоваться с электрофизиологическим аппаратом или прибором, одобренным в соответствии с действующими нормами.
- Для получения информации об использовании аппарата электрофизиологического и других необходимых принадлежностей следует обратиться к инструкциям.
- Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, в противном случае может возникнуть ожог.
- При отсоединении кабеля от аппарата электрофизиологического не следует тянуть за провод, необходимо брать его непосредственно за предназначенный для подключения разъем.

71. Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.08. Фото изделия и пример маркировки

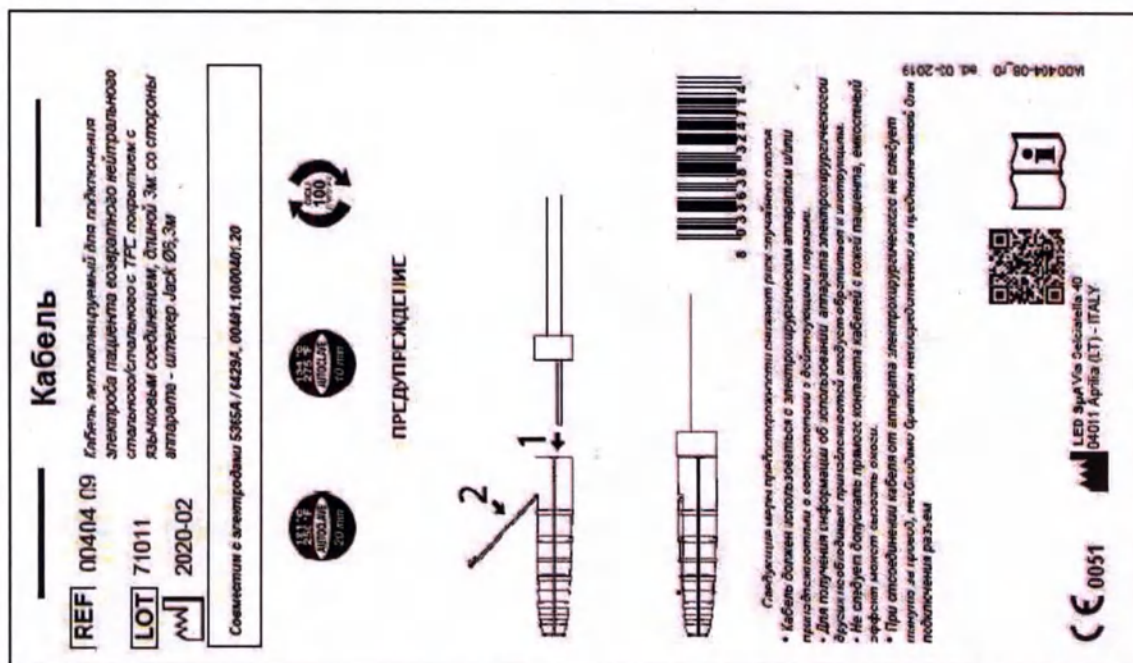

72. Кабель автоклавируемый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с ТРЕ покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.09. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00411.00

LOT 66009



2019-03






2024-03

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента – плоский разъем (European Flat plug)



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

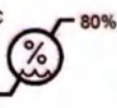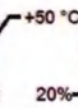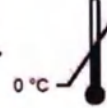

73. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента – плоский разъем (European Flat plug), 00411.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00412.00

LOT 63478

2018-09

2023-09

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа «банан» 4 мм (4mm 2-Banana plug), со стороны инструмента - плоский разъем (European Flat plug)

0051

NON STERILE


100 CYCLES

121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

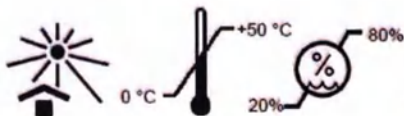

74. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа «банан» 4 мм (4mm 2-Banana plug), со стороны инструмента - плоский разъем (European Flat plug), 00412.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00413.00

LOT 62264



2018-06



2023-06

Кабель автоклавируемый для подключения зажима биполярного электролигирующего, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовой разъем 4 мм для зажима биполярного электролигирующего



0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C +50 °C 20% 80%



75. Кабель автоклавируемый для подключения зажима биполярного электролигирующего, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовой разъем 4 мм для зажима биполярного электролигирующего, 00413.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00414.00

LOT 72505

 2020-01

 2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug)

 0051

 NON STERILE

 CICLI 100 CYCLES

 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min

 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C +50 °C 20% 80%



76. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug), 00414.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF	00415.00	Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов END01 (F4-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4mm на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовые разъемы 4 мм и 2-2,8 мм
LOT	72508	
	2020-01	
	2025-01	



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



+50 °C
0 °C
20%
80%



77. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов END01 (F4-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4mm на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовые разъемы 4 мм и 2-2,8 мм, 00415.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00418.00

LOT 72514

2020-01

2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм

0051

NON STERILE

100 CYCLES

121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C +50 °C 20% 80%



78. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм, 00418.00. Фото изделия и пример маркировки

Генеральный директор

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

Л.В.Гижинск

Прошито и пронумеровано

50

листа (ов).

